



Медицинское изделие.

«Бинты "CombiMedica Lino" эластичные медицинские антибактериальные, с хлоргексидином (4м x 5см).

Перевязочное средство. Не стерильно.

Состав: 30% полиамид, 70% хлопок, ковалентно связанный с диглюконатом хлоргексидина.

Назначение изделия: «Бинты "CombiMedica Lino" эластичные медицинские антибактериальные, с хлоргексидином предназначены для перевязки и самостоятельной обработки хирургических и травматических ран, а также кожных порезов, натертостей, эритем.

Способ применения: После очистки и дезинфекции поврежденного участка кожи или раны, накладывается повязка или салфетка, которая фиксируется бинтом. Бинт может применяться как самостоятельное изделие непосредственно на раны и закрепляется с помощью пластыря или специальных скоб. Одноразового применения.

Предупреждения: Не затягивать очень сильно бинт во избежание затруднения кровообращения. Не использовать изделие, если упаковка открыта или повреждена. Не использовать изделие после даты срока годности, указанной на упаковке. Не использовать изделие, если заметны какие-то загрязнения. Целостность упаковки гарантирует качество продукта. Хранить в прохладном и сухом месте, при температуре +5 °C до +30° C +/-2°C вдали от источников тепла. После открытия упаковки продукт должен быть использован и после использования утилизирован. Не применять повторно. Хранить в недоступном для детей месте. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость хлоргексидина.

Производитель: «Franzoni Medical Device s.r.l», piazza Vittoria, 9 - 25122 Brescia (BS), Italia\ «Франзонни Медикал Девайс С.р.л», piazza Виттория 9 - 25122 Брешиа, Италия.

Место производства: «Previx S.r.l.» (Превикс С.р.л.), Италия, via Dell'Industria, 10A - 36070 Trissino (VI), Italia.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Дата изготовления: 11/2010

Lotto: 83042



11/2010



83042



11/2015