

УТВЕРЖДЕН

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 2007 г. № _____

Генеральный директор

ООО «Эссилор Оптика»



Лагард В.

«__» _____ 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению "Линз очковых из органического материала: бесцветных, фотохромных, однофокальных, окрашенных, бифокальных, мультифокальных (прогрессивных)", Тайланд, Филиппины, КНР

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор

ООО «Эссилор Оптика»

Лагард В.

Данная инструкция по применению описывает применение и использование очковых линз.

Очковая линза представляет собой прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями. В некоторых случаях одна поверхность линзы может быть плоской. Линзы изготавливаются из органических или минеральных материалов, прозрачных для определенных диапазонов длин волн. Очковые линзы служат для исправления оптических дефектов глаз пользователя.

Линзы, вставленные в оправу (очки) следует носить на носу.

Для сохранения оптических свойств линз следует по мере необходимости очищать линзы следующими способами:

- 1) Сухое очищение с помощью специальной салфетки из микрофибры;
- 2) Влажное очищение – с применением мыльной воды, после чего линзы необходимо ополоснуть чистой водой и осушить специальной салфеткой из микрофибры;
- 3) Допускается очищение ультразвуком в рамках салона оптики.

Не рекомендуется очищать линзы не предназначенными для этого материалами.

После снятия очков для их хранения и транспортировки необходимо поместить их в специально предназначенный для этого футляр, соответствующий размерам оправы. Не рекомендуются иные способы транспортировки и хранения линз.

В процессе эксплуатации следует аккуратно обращаться с линзами, а именно: не класть очки линзами вниз, так как это может привести к появлению царапин на их поверхности. Снимать очки следует двумя руками, взявшись

за оба заушника. Не рекомендуется снимать очки одной рукой, так как это может привести к образованию трещин на линзах. Не рекомендуется допускать перегрева или переохлаждения линз. Следует оберегать линзы от ударов и падений на твердые поверхности.

Утилизировать линзы следует вместе с бытовыми отходами.

В случае использования линз по прямому назначению, то есть для коррекции зрения, и при условии аккуратного обращения с линзами, гарантийный срок эксплуатации линз составляет 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть или получения их потребителем.

влияющие на качество зрения




БЛИКИ



ПЫЛЬ И
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



ЦАРАПИНЫ

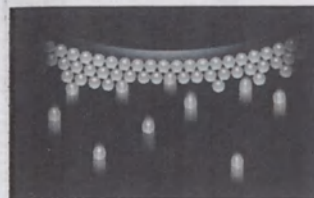

Передовая технология


При производстве покрытия Crizal A2 применяется технология i-technology™, используемая в космической и оптоволоконной оптике.

Новые методы тестирования

Впервые в офтальмологической отрасли был применен **Сенсорный Анализ** для сопоставления лабораторных результатов с ощущениями пользователей очками. Пользователи очками признали, что линзы с новым покрытием Crizal A2 меньше загрязняются, их легче очищать, и они более прозрачны, чем другие линзы на рынке.



Применение этой передовой высокоточной технологии обеспечивает пользователям очками непревзойденное качество зрения.

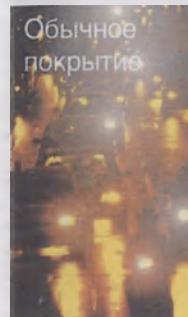


Улучшенный зрительный комфорт

Новое покрытие Crizal A2 обеспечивает комфортное зрение в любое время – днем или ночью. Оно **наполовину** уменьшает интенсивность раздражающих отражений

Более эстетичный вид:

Вы видите и выглядите лучше.

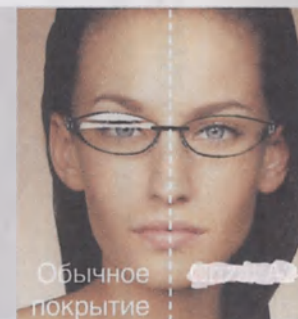

Простой уход за линзами:

- Пользователи очками выбрали именно эти линзы среди всех представленных на рынке, так как их легче всего очистить*
- Загрязняются и пылятся **в 2 раза** меньше других линз*
- Кроме того, менее чувствительны к загрязнениям

*См. ссылку на последней странице.

Гораздо меньше царапин:

- Линзы с покрытием Crizal A2 – это гарантия высокой устойчивости к образованию царапин
- Так как линзы приходится протирать гораздо реже, риск возникновения царапин минимален