



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»



О.Е. Макарова


2011__г.

Инструкция по применению

«Фильтр ультрачистый для газовых потоков в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями»

производства «ORIGIO MidAtlantic Devices», США

Импрегнированная мембрана увеличивает площадь поверхности для улучшения фильтрации.

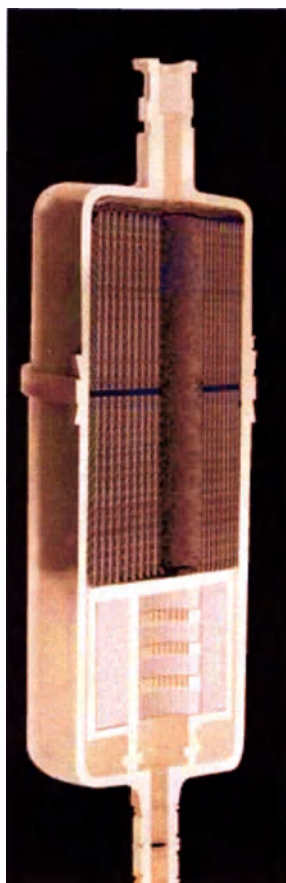

Этап 1

Обеспечивает фильтрование быстро испаряющихся органических соединений. Фильтрование осуществляется с помощью перманганата калия и активированной углеродной мембраны.


Этап 2

Фильтрация с помощью НЕРА фильтра. Высокоэффективные НЕРА фильтры содержат волокна диаметром 0,65 – 6,5 мкм, расстояние между которыми составляет от 10 до 40 мкм. Фильтрация основана на изменении линий воздушного потока. Что обеспечивает снижение микробной концентрации в фильтруемом воздухе.

Фильтр ультрачистый для газовых потоков в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями,

производства

ORIGIO MidAtlantic Devices, США

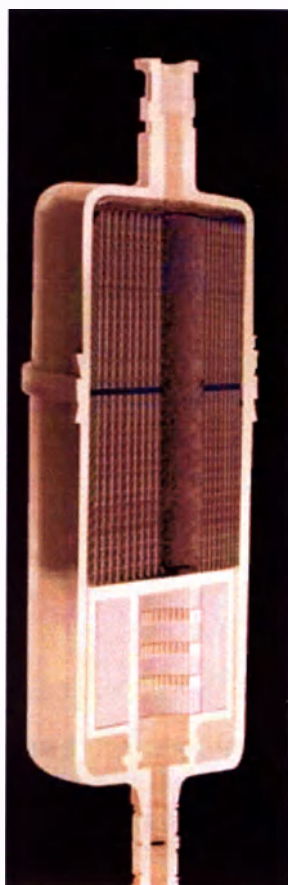

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»



О.Е. Макарова


2011 г.

Инструкция по применению

**«Фильтр ультрачистый газовый для инкубаторов
лабораторий ЭКО, в наборе или отдельной упаковке,
с принадлежностями»**

производства «ORIGIO MidAtlantic Devices», США

Импрегнированная мембрана увеличивает площадь поверхности для улучшения фильтрации.

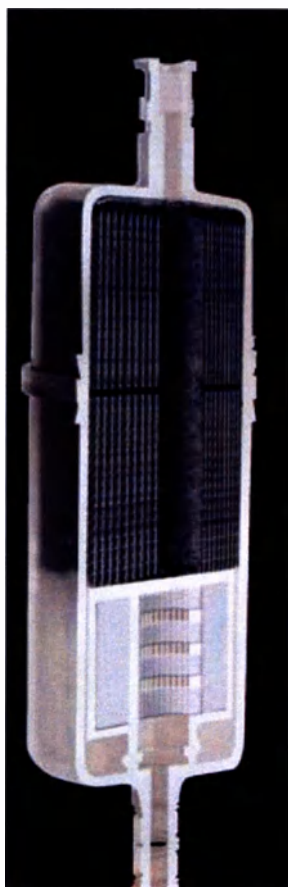

Этап 1

Обеспечивает фильтрование быстро испаряющихся органических соединений. Фильтрование осуществляется с помощью перманганата калия и активированной углеродной мембраны.

Этап 2

Фильтрация с помощью НЕРА фильтра. Высокоэффективные НЕРА фильтры содержат волокна диаметром 0,65 – 6,5 мкм, расстояние между которыми составляет от 10 до 40 мкм. Фильтрация основана на изменении линий воздушного потока. Что обеспечивает снижение микробной концентрации в фильтруемом воздухе.

Угольный фильтр подсоединяется к газовым магистралям при помощи сменных соединителей (фиттингов). К нижнему входному отверстию подсоединяется магистраль с газовым потоком из баллонов со смесителем, к верхнему выходному отверстию подключается магистраль, соединенная с инкубатором. Фильтр крепится в вертикальном положении на магнитном держателе, например, на стене. После проверки на утечку газов, фильтр готов к работе.

После активного использования в течение 6 месяцев рекомендуется его замена на новый фильтр.

Проект
проект
3 (1/10) н/д



Пр
(по
VII

Ко
ОО
(д
(И.