

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ХЕЛС ЛАЙН РУС»

Пак И.Т.



Дата: 27.12.2023 года

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шприц инъекционный трехдетальный с иглой,
стерильный, однократного применения

2023

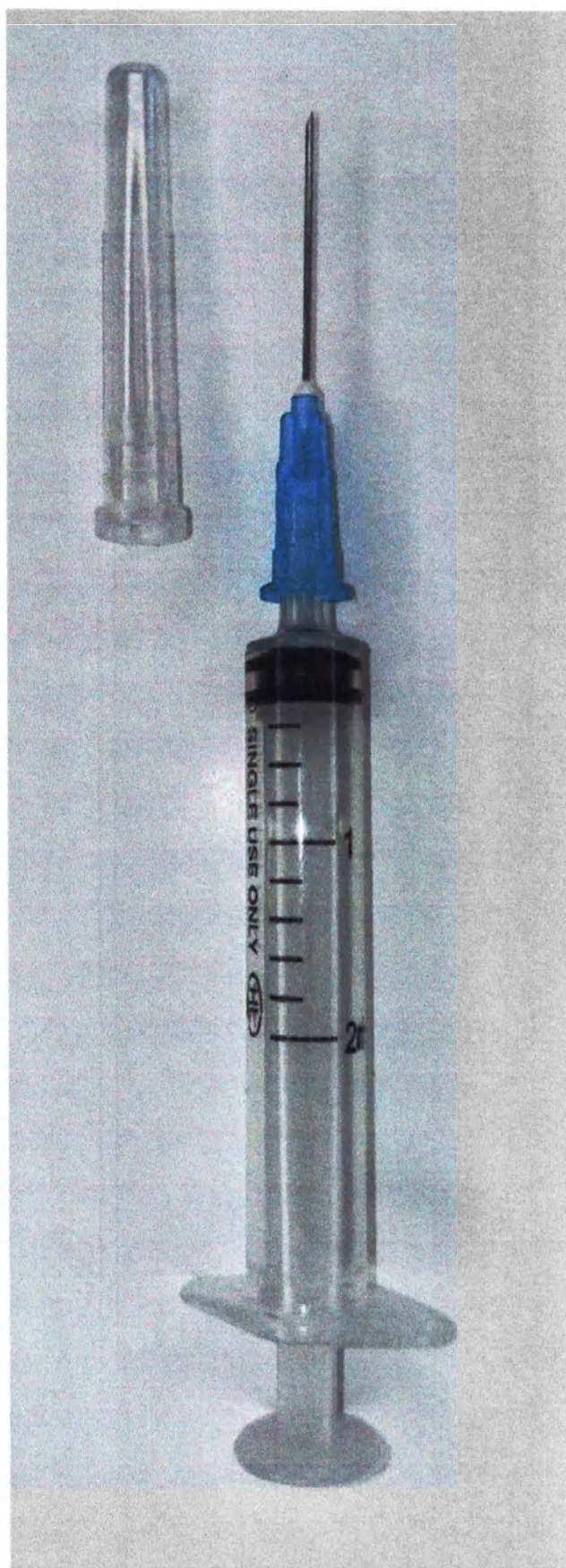


Рисунок 1. Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Общий вид.



Рисунок 1.1. Шприц инъекционный стерильный одноразового применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.

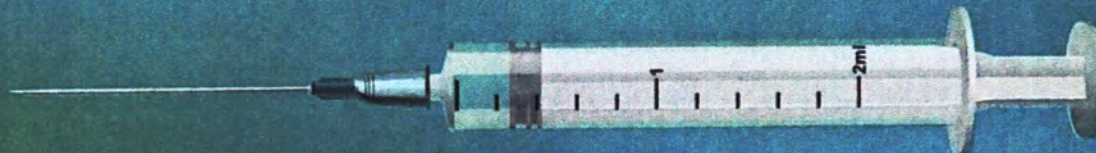


Рисунок 1.2. Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1"(0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена.



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей



ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6 x 25 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

2 МЛ

× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6 x 25 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытия) и срока годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и слить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для одноразового применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНА.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Рисунок 1.3 Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 1

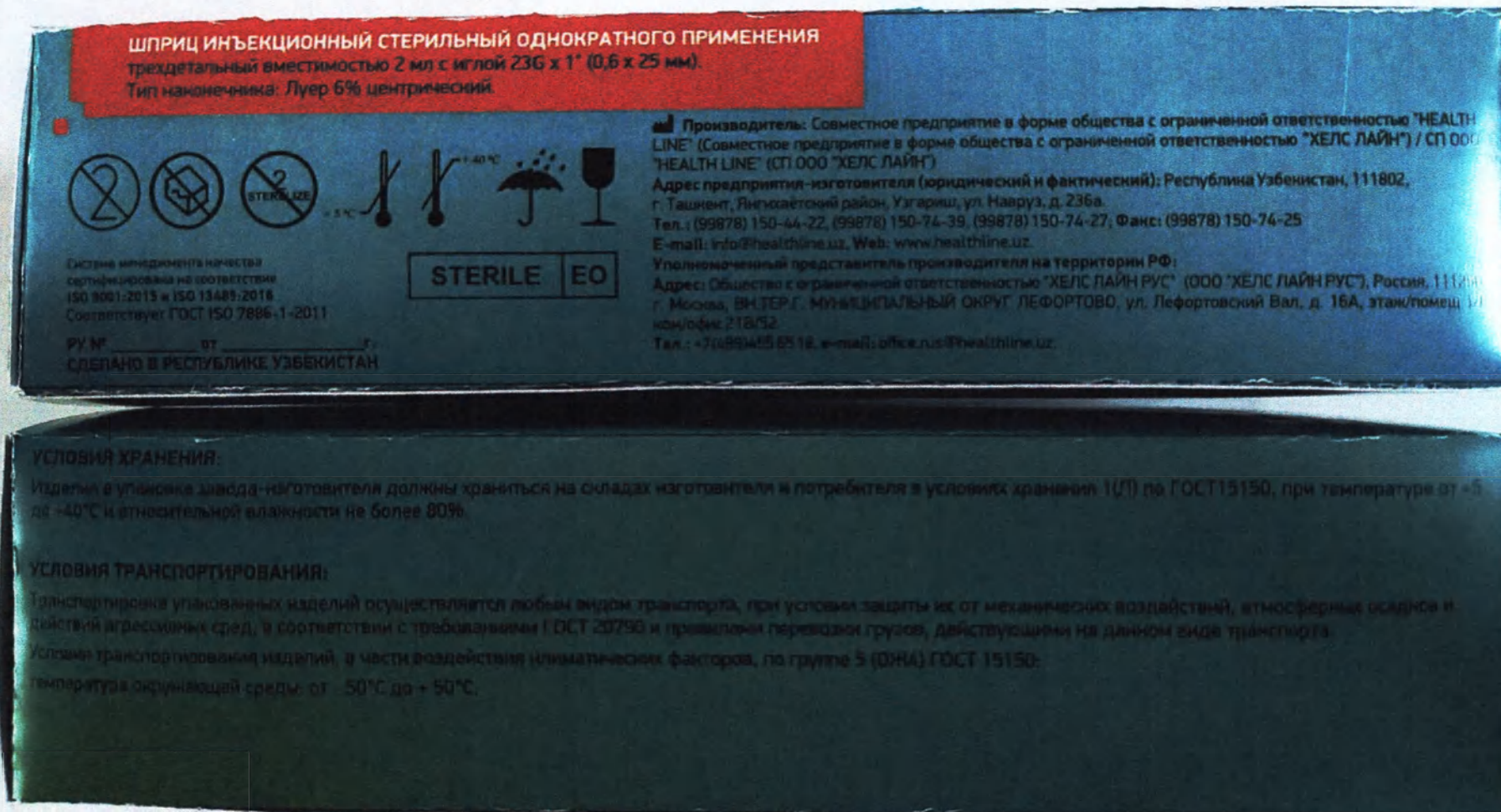


Рисунок 1.4 Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 2.



Рисунок 1.5 Шприц инъекционный стерильный одноразового применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1" (0,6x25 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 3.

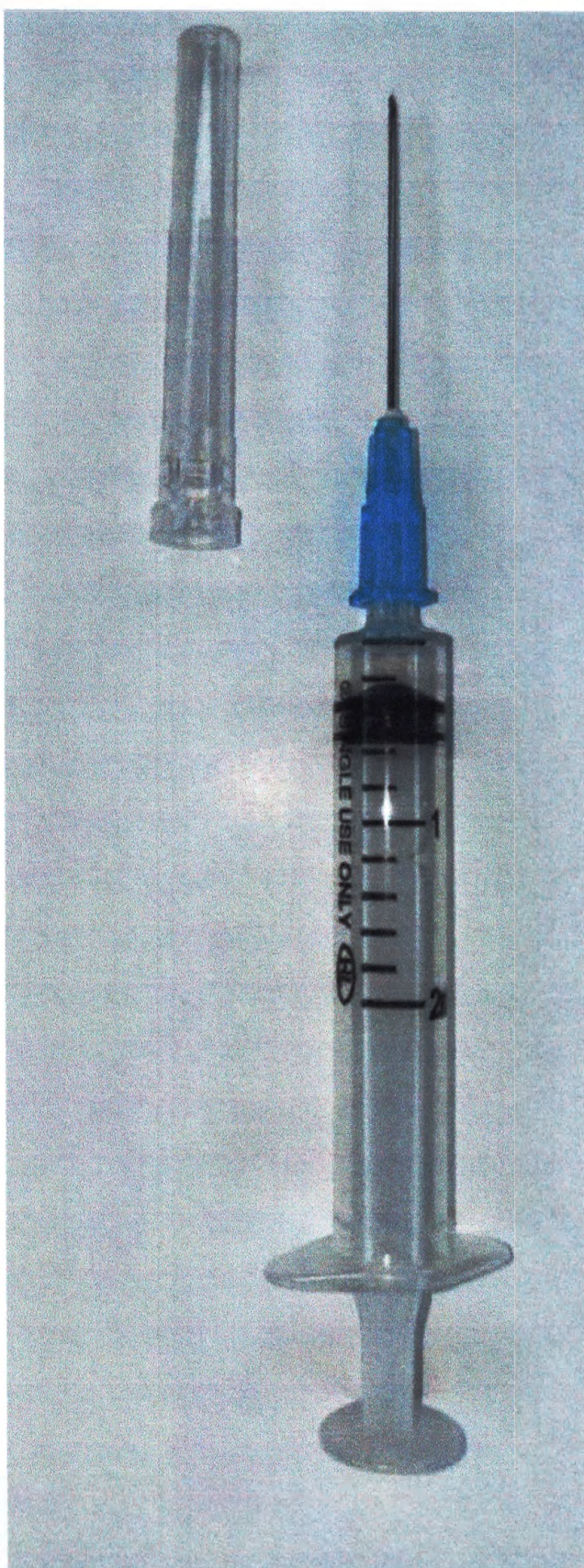
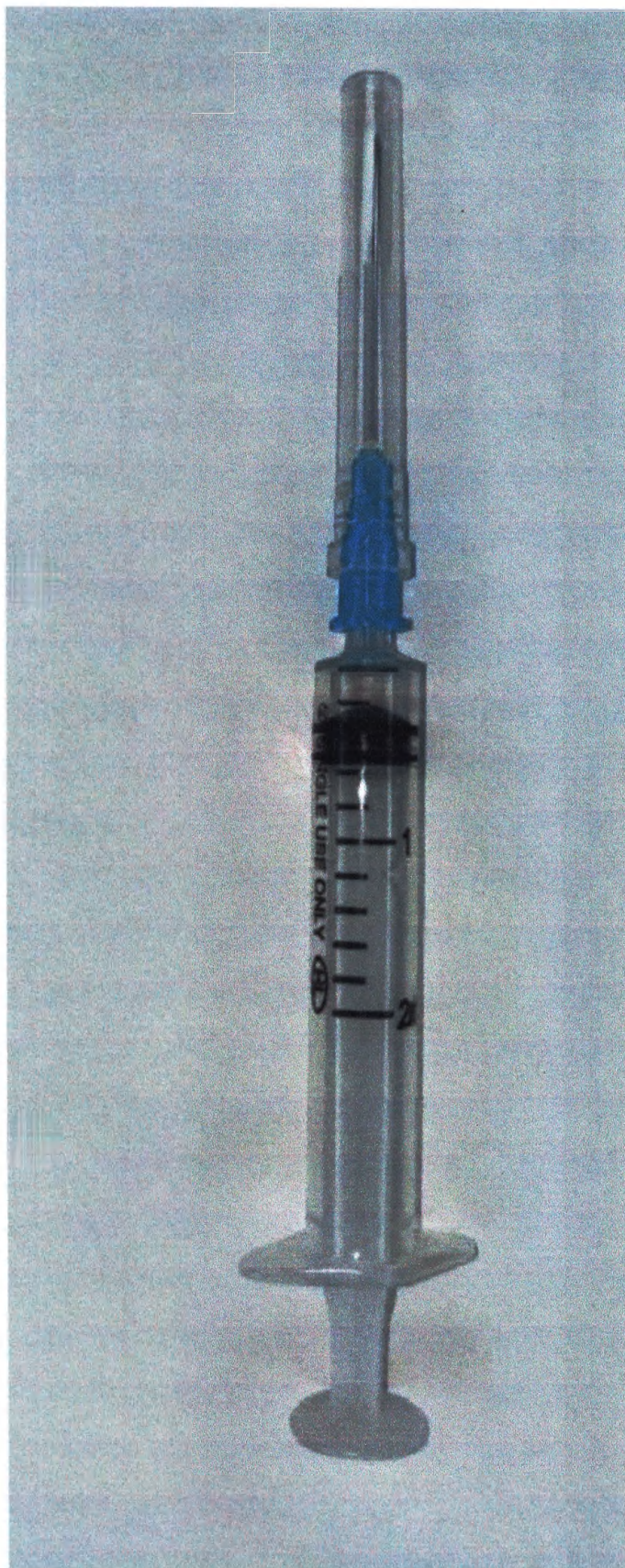


Рисунок 2. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Общий вид.



Рисунок 2.1. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.

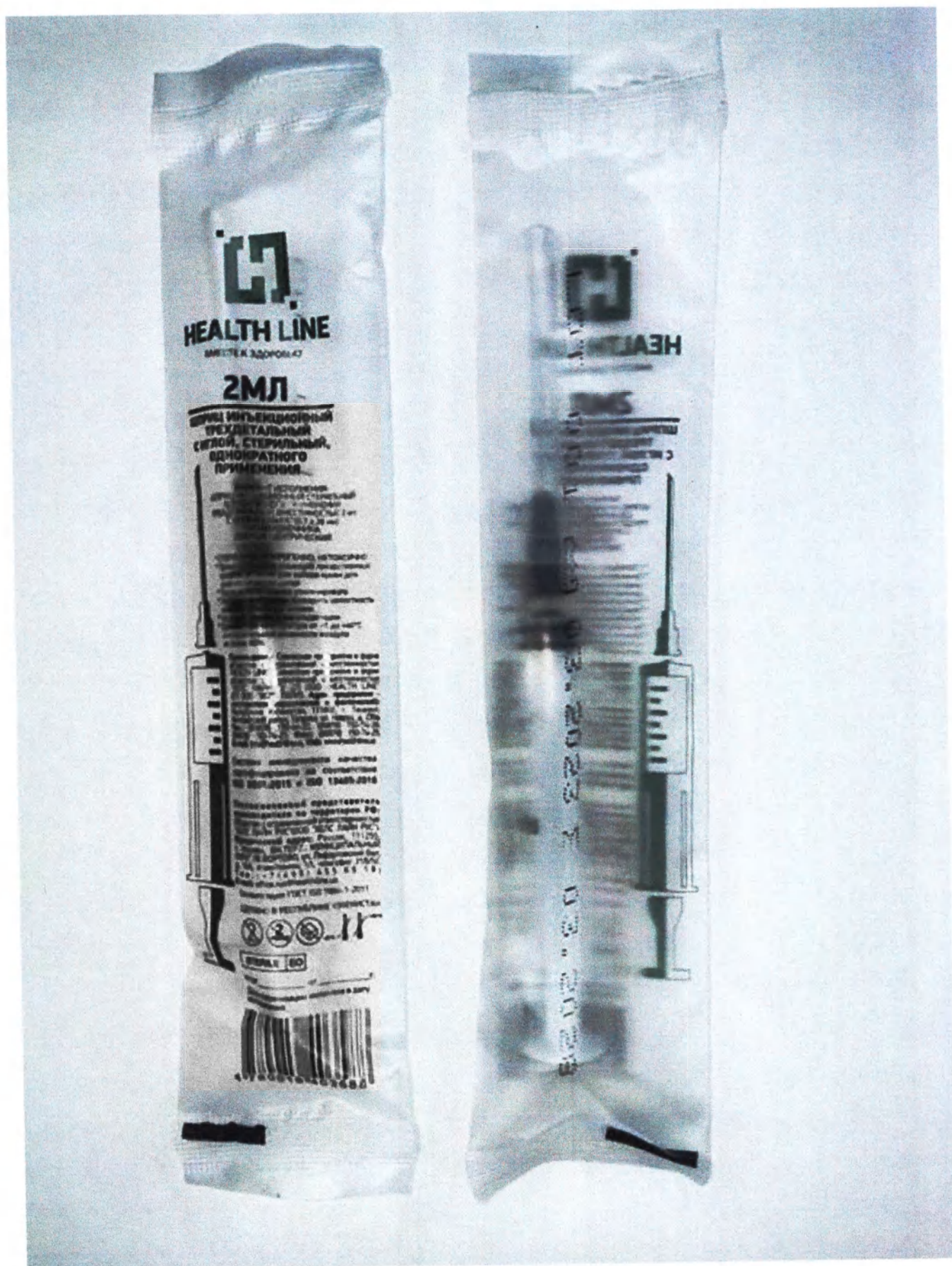


Рисунок 2.2. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1¼" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей



ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6 x 32 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

2 МЛ
× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6 x 32 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутривенно, внутримышечно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вздутий) и срока годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается шприц и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и отпустить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола закрыть тампоном с дезинфицирующим

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для однократного применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 85,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия **ЗАПРЕЩЕНА**.

Повторное применение **ЗАПРЕЩЕНО**.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Рисунок 2.3 . Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 1

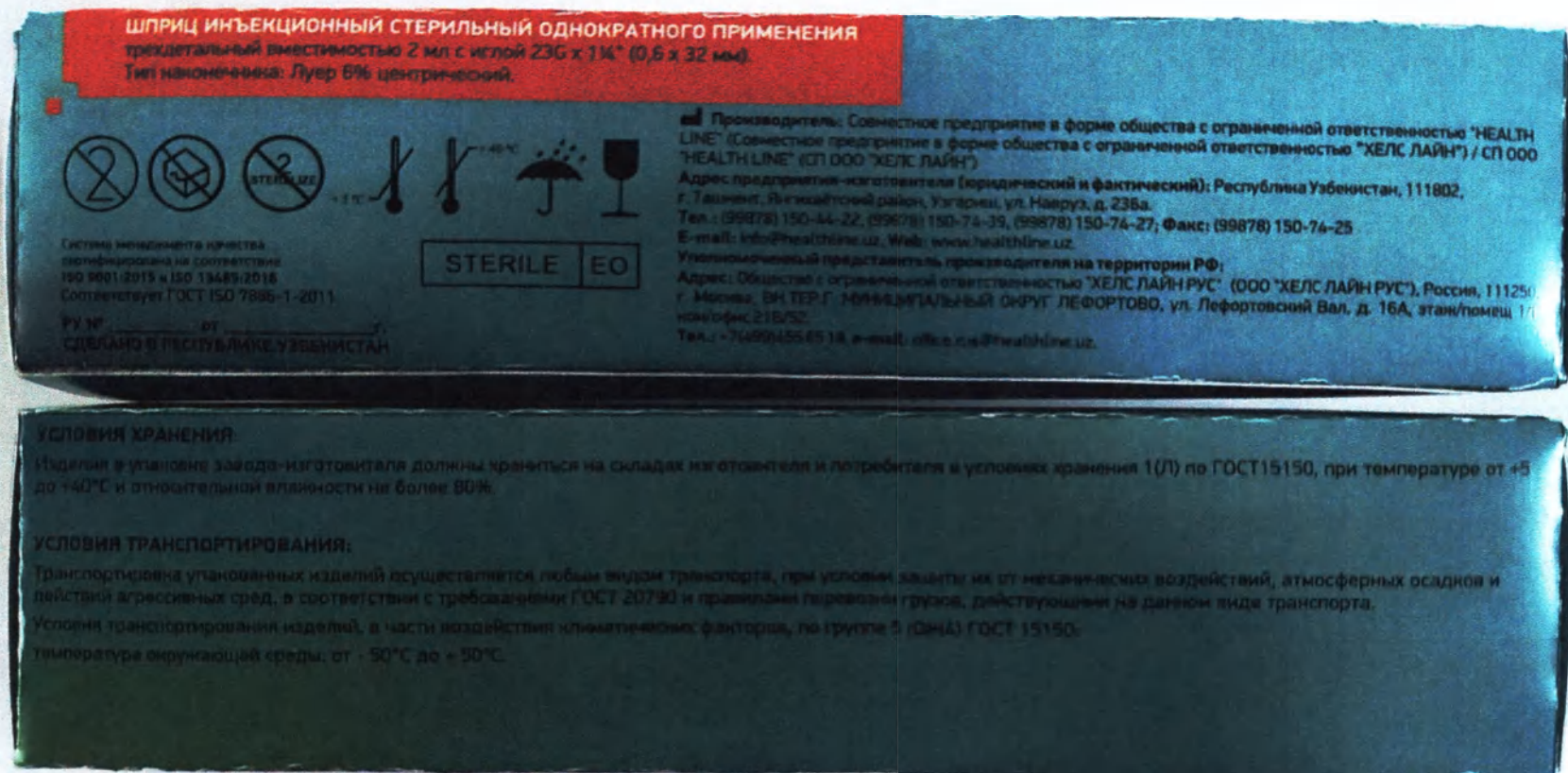


Рисунок 2.4 . Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1¼"(0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 2.5. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Групповая упаковка (коробка). Вид 3

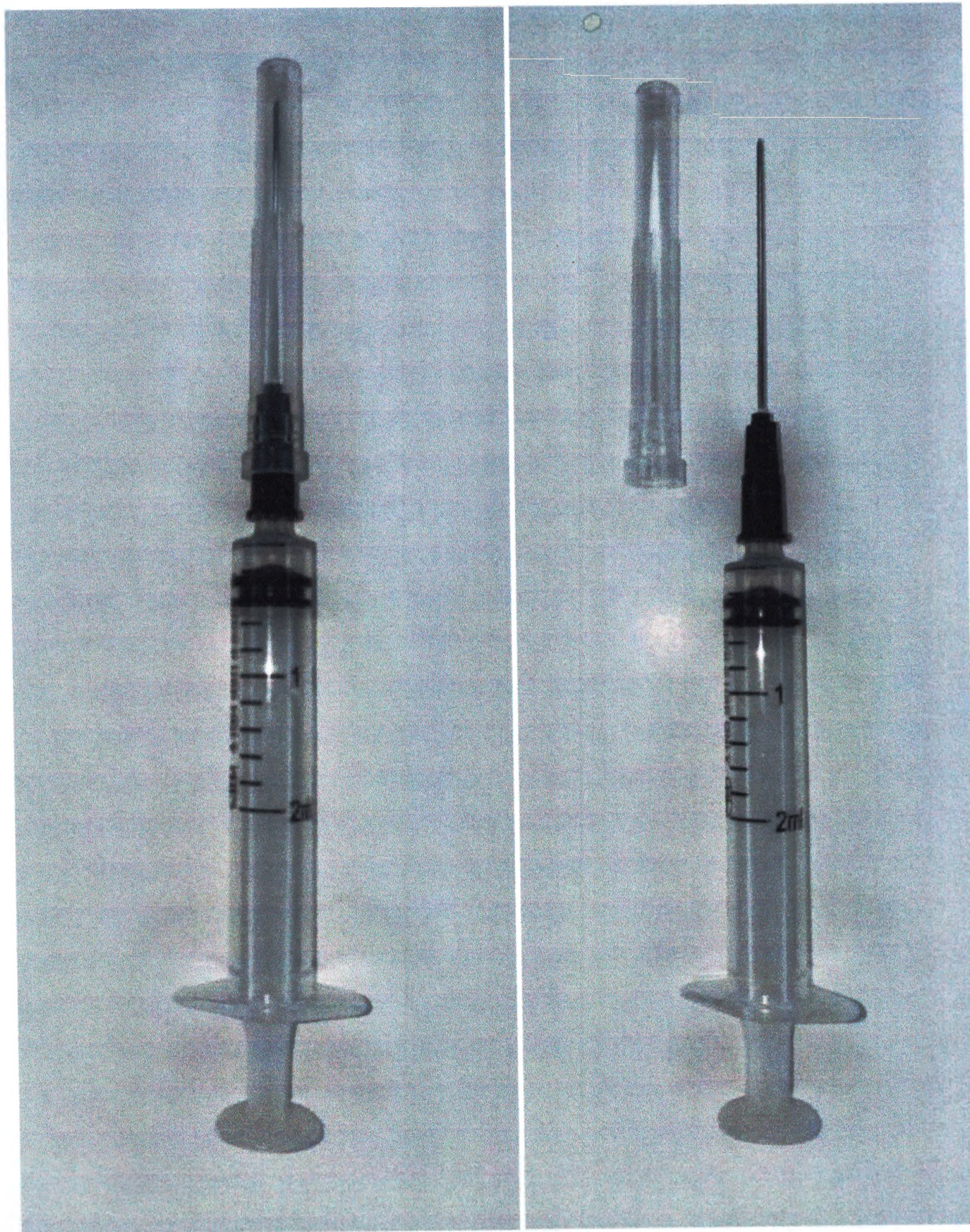


Рисунок 3. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид.



Рисунок 3.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.



Рисунок 3.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический; Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей



ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7 x 38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

2 МЛ

× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7 x 38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытия) и срока годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и слупить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола закрыть тампоном с дезинфицирующим

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном

СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для одноразового применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия **ЗАПРЕЩЕНО**.

Повторное применение **ЗАПРЕЩЕНО**.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Рисунок 3.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1


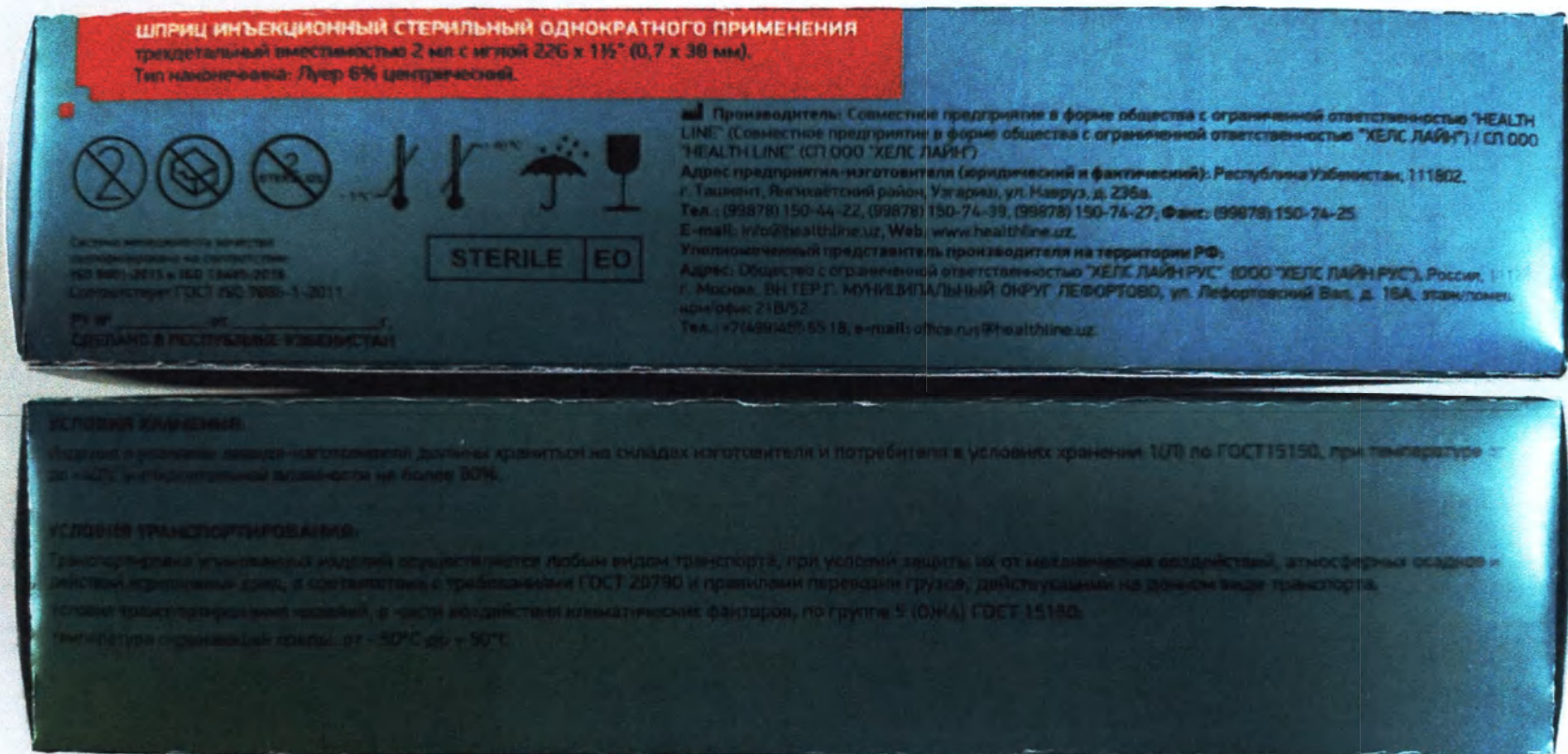


Рисунок 3.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2

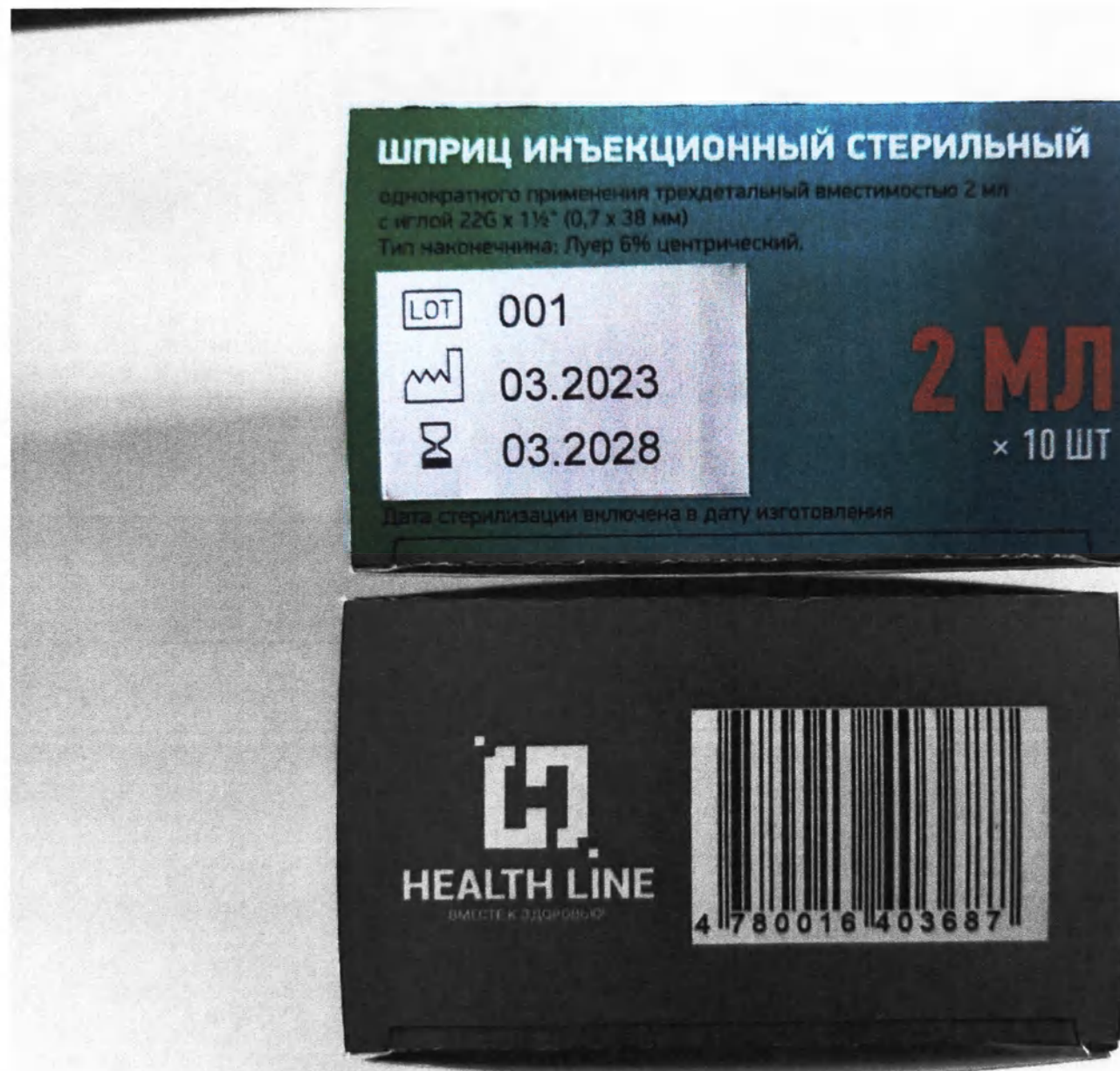

Р
Рисунок 3.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 2 мл с иглой 22G x 1½"(0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

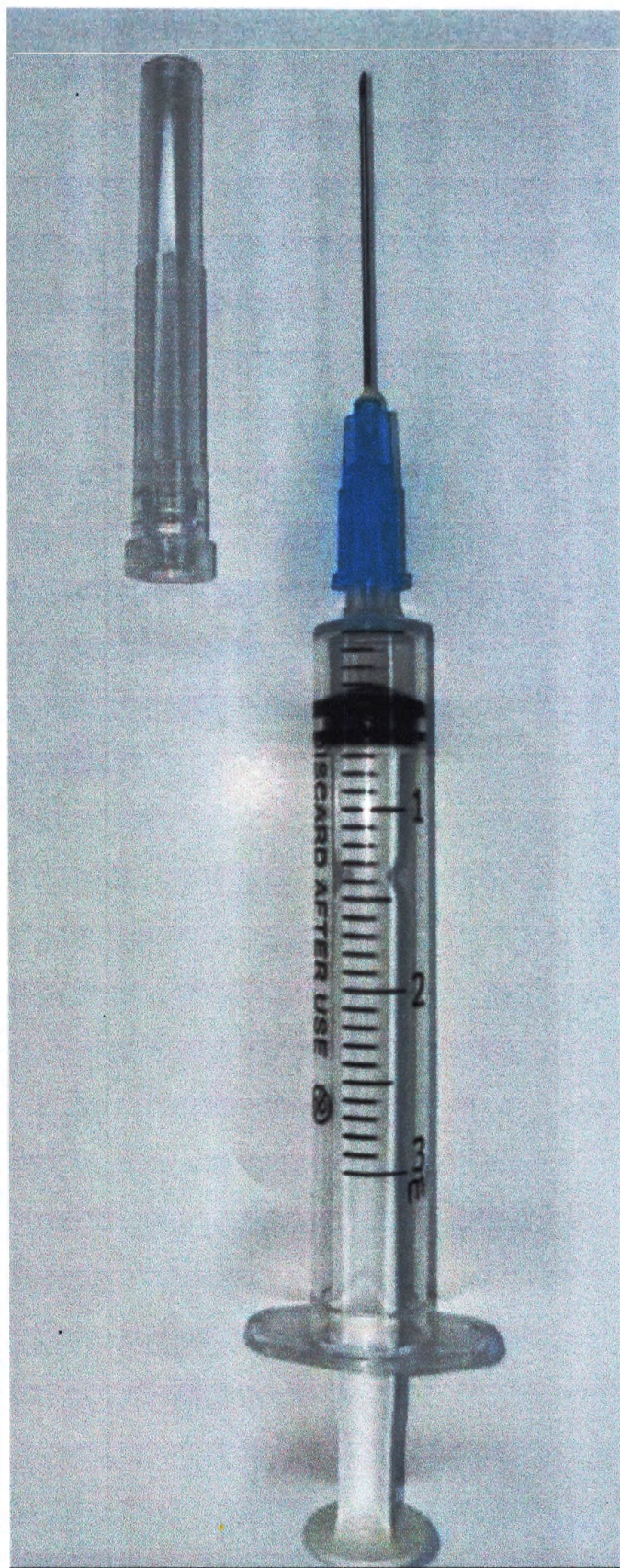
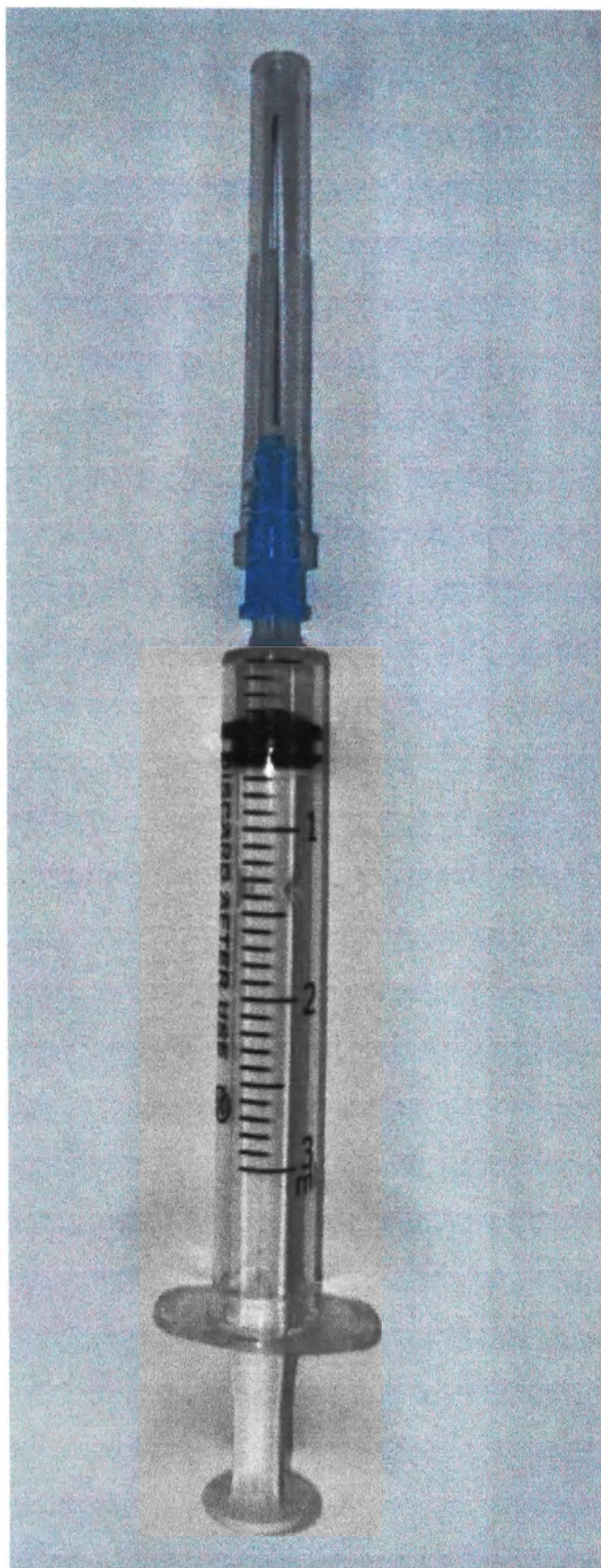


Рисунок 4. Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1¼" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид;



Рисунок 4.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1¼" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.



Рисунок 4.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена.

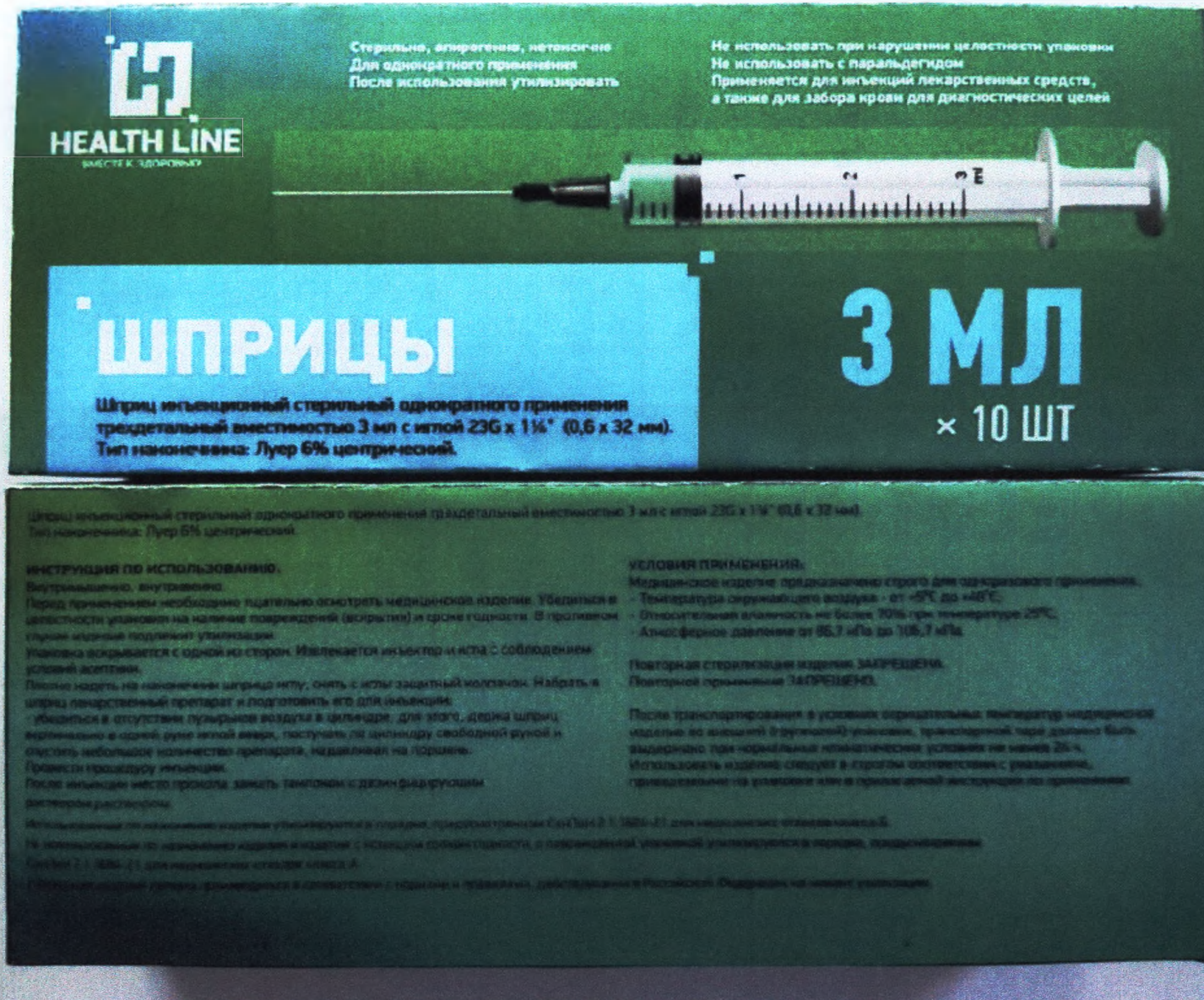


Рисунок 4.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

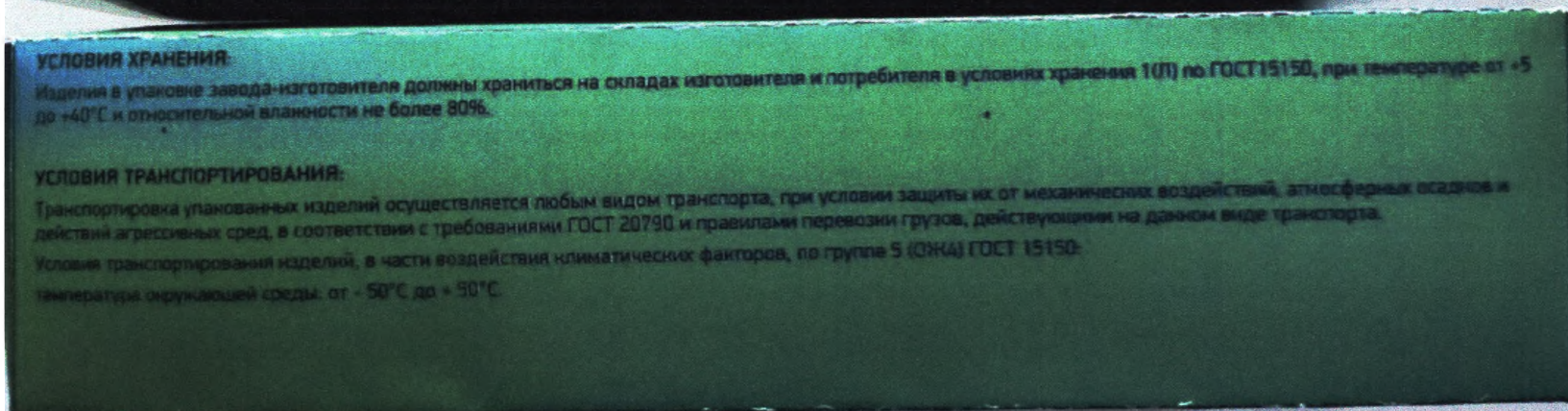
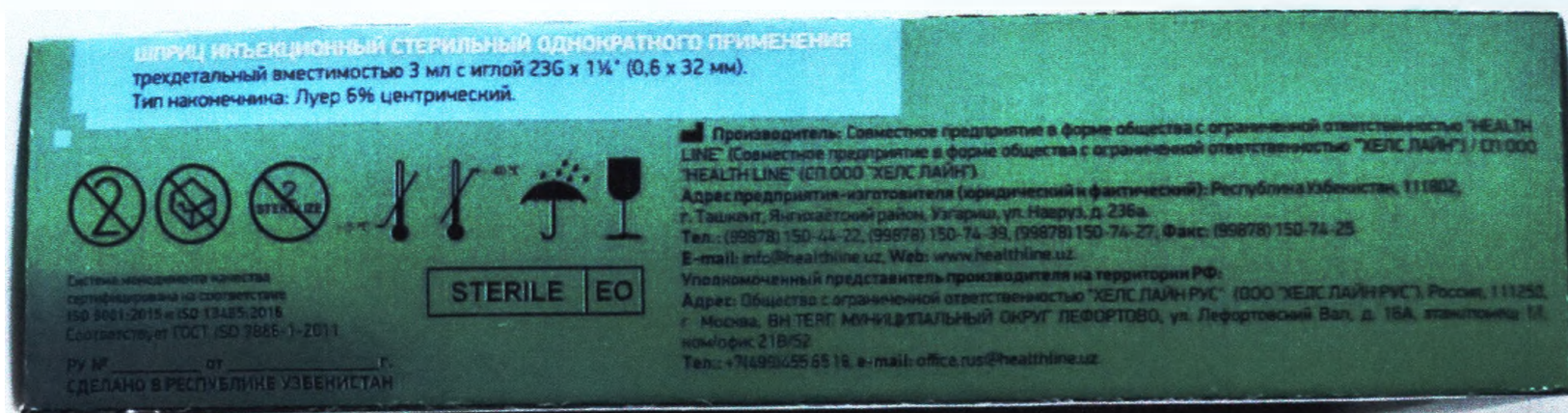


Рисунок 4.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2

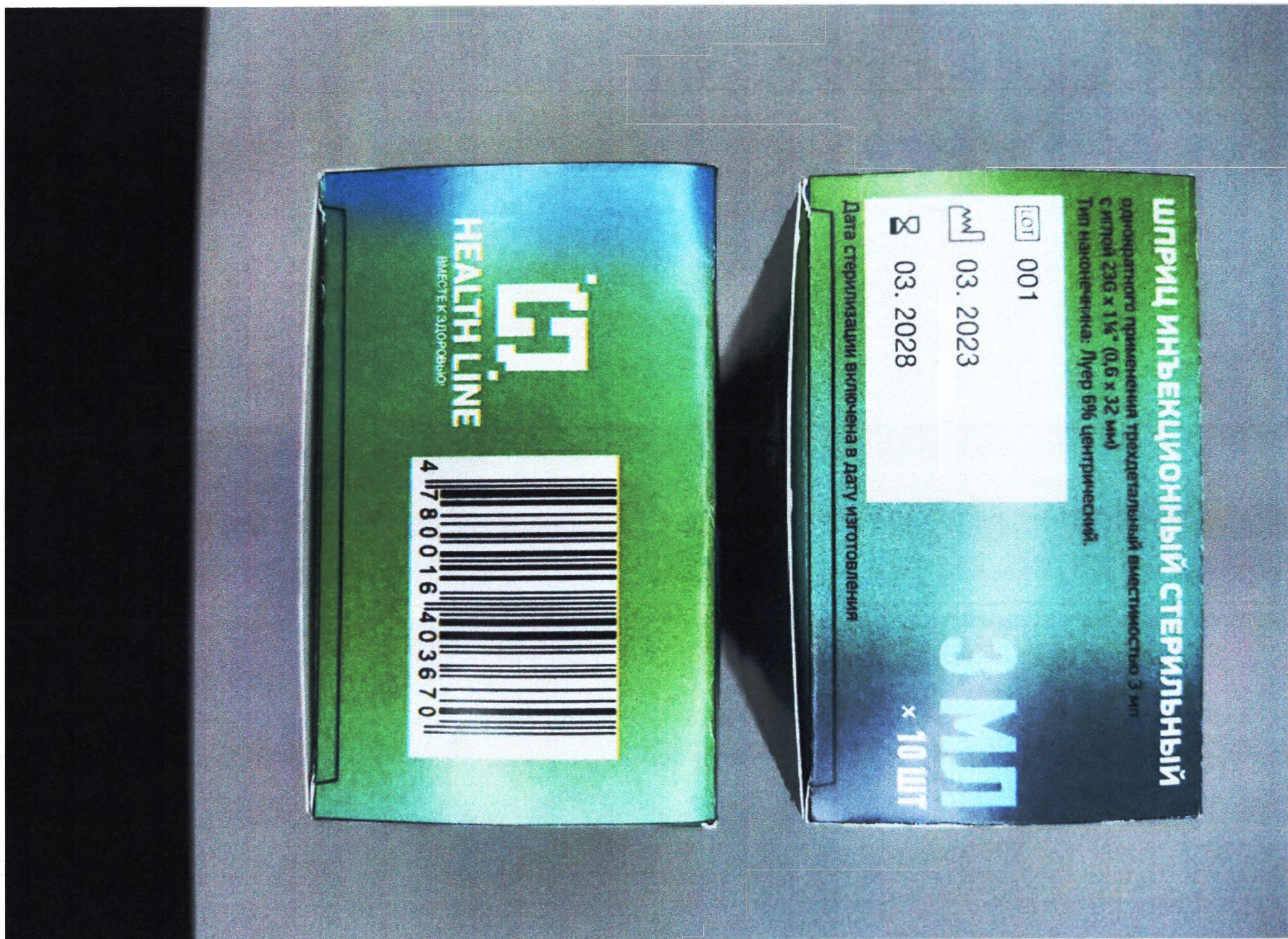


Рисунок 4.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

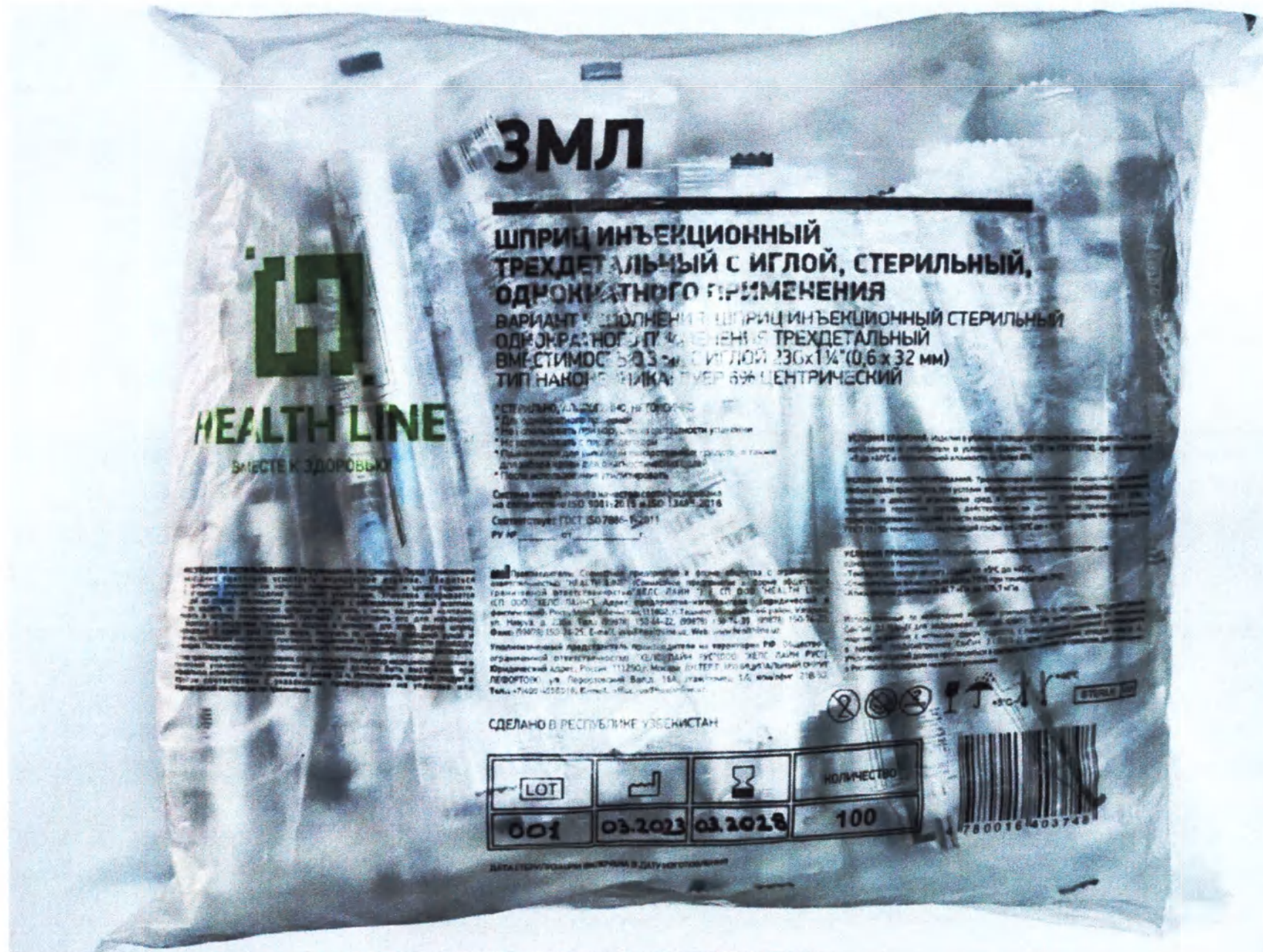


Рисунок 4.6 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 23G x 1 1/4" (0,6x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (пакет).

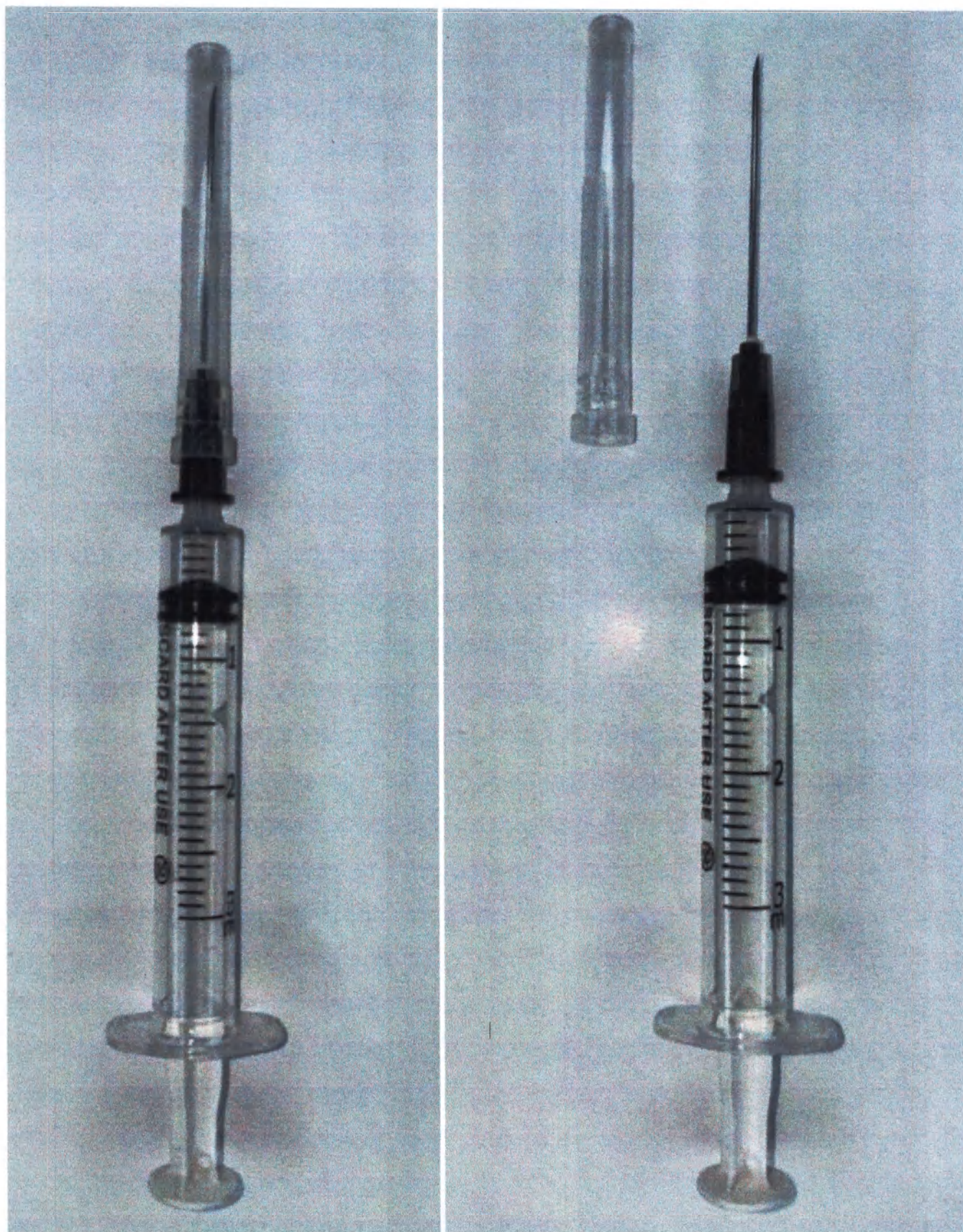


Рисунок 5. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид.

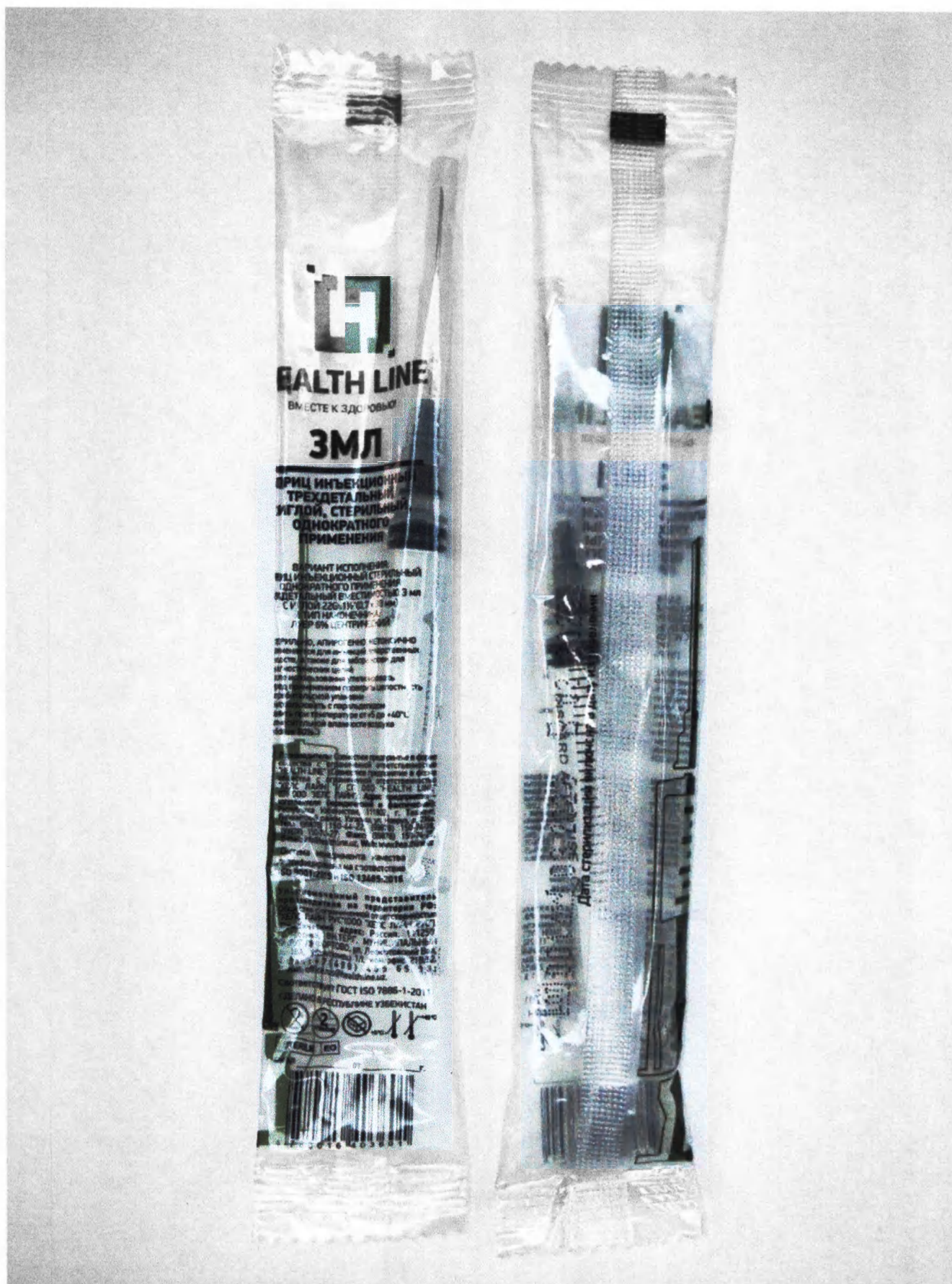


Рисунок 5.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.


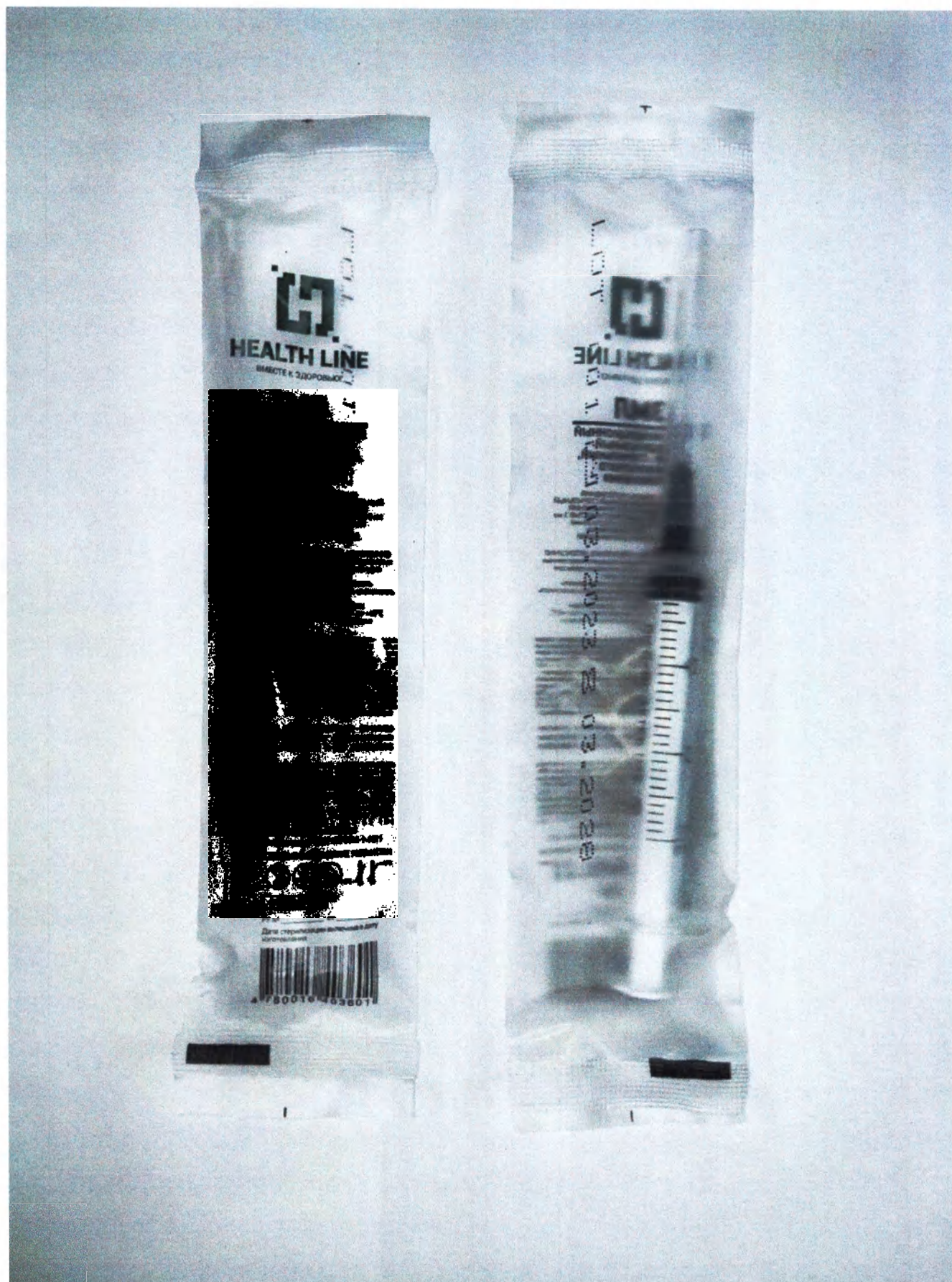


Рисунок 5.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена.



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей

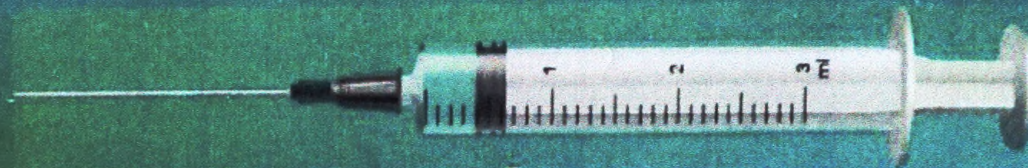

ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7 x 38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

3 МЛ
× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7 x 38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (искривлений) и сроке годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и слить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для однократного применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНО.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Рисунок 5.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

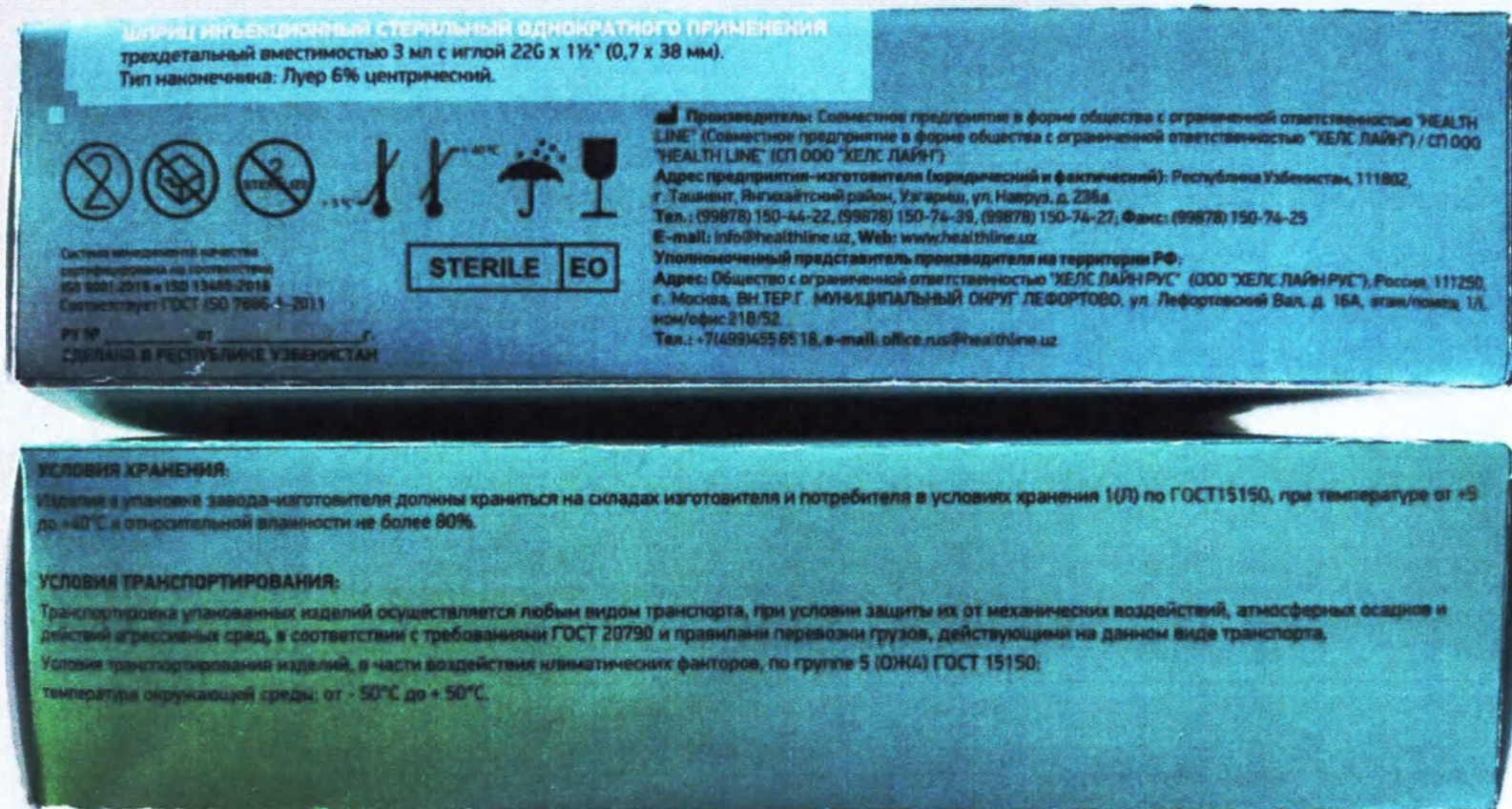


Рисунок 5.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½"(0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрмической. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 5.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 3 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

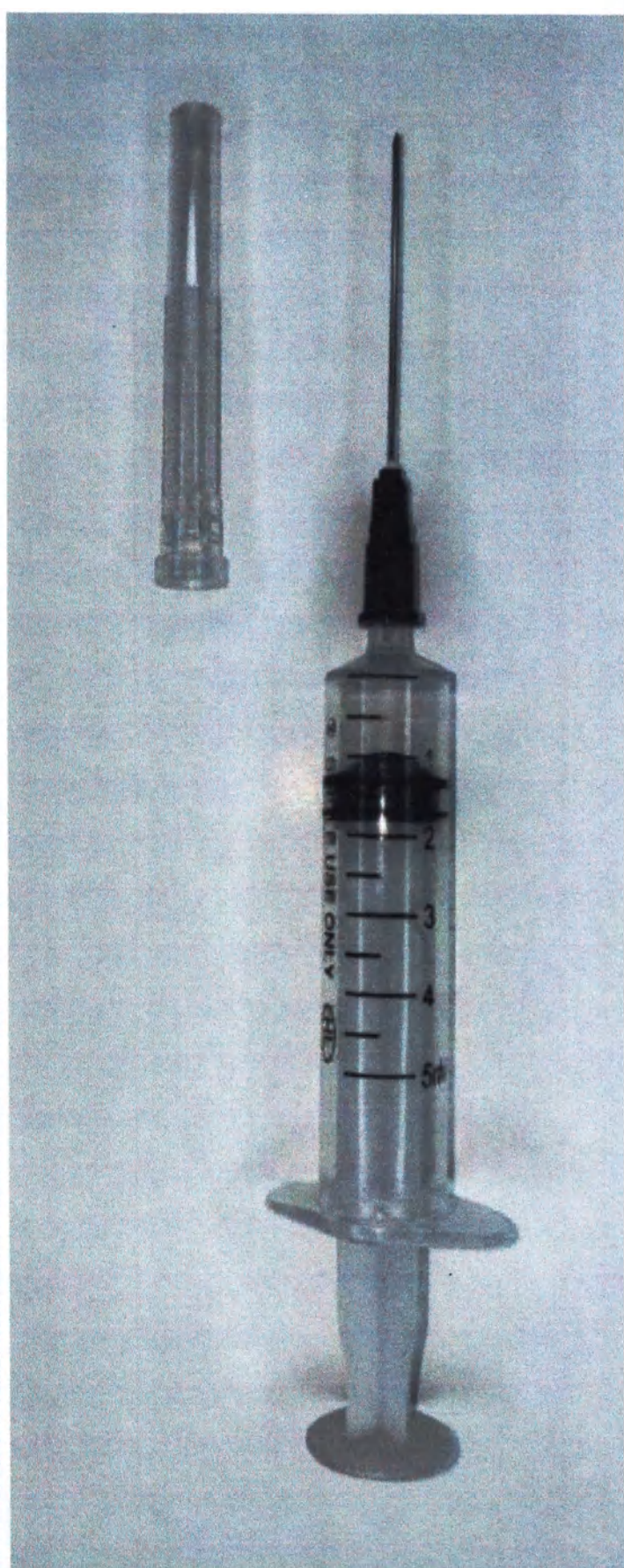


Рисунок 6. Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид.



Рисунок 6.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1½"(0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.



Рисунок 6.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1½" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для диагностических целей для забора крови



ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1 1/2" (0,7x38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

5 МЛ
× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1 1/2" (0,7x38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытий) и сроке годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и спустить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола закрыть тампоном с дезинфицирующим

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для одноразового применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C,
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C,
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНО.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Использованные по назначению изделия утилизуются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизуются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Рисунок 6.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1 1/2" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

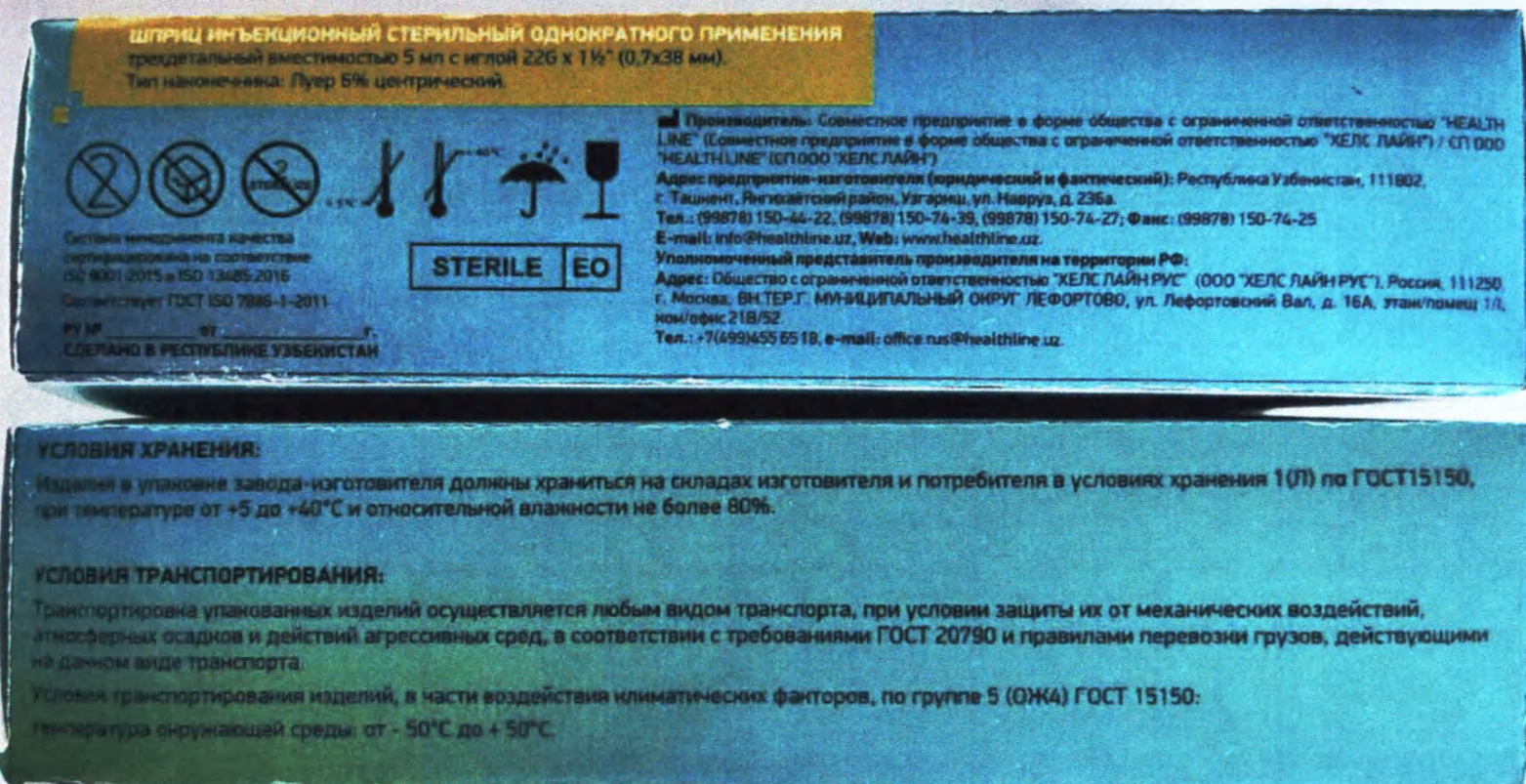


Рисунок 6.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1 1/2" (0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 6.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 22G x 1½"(0,7x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

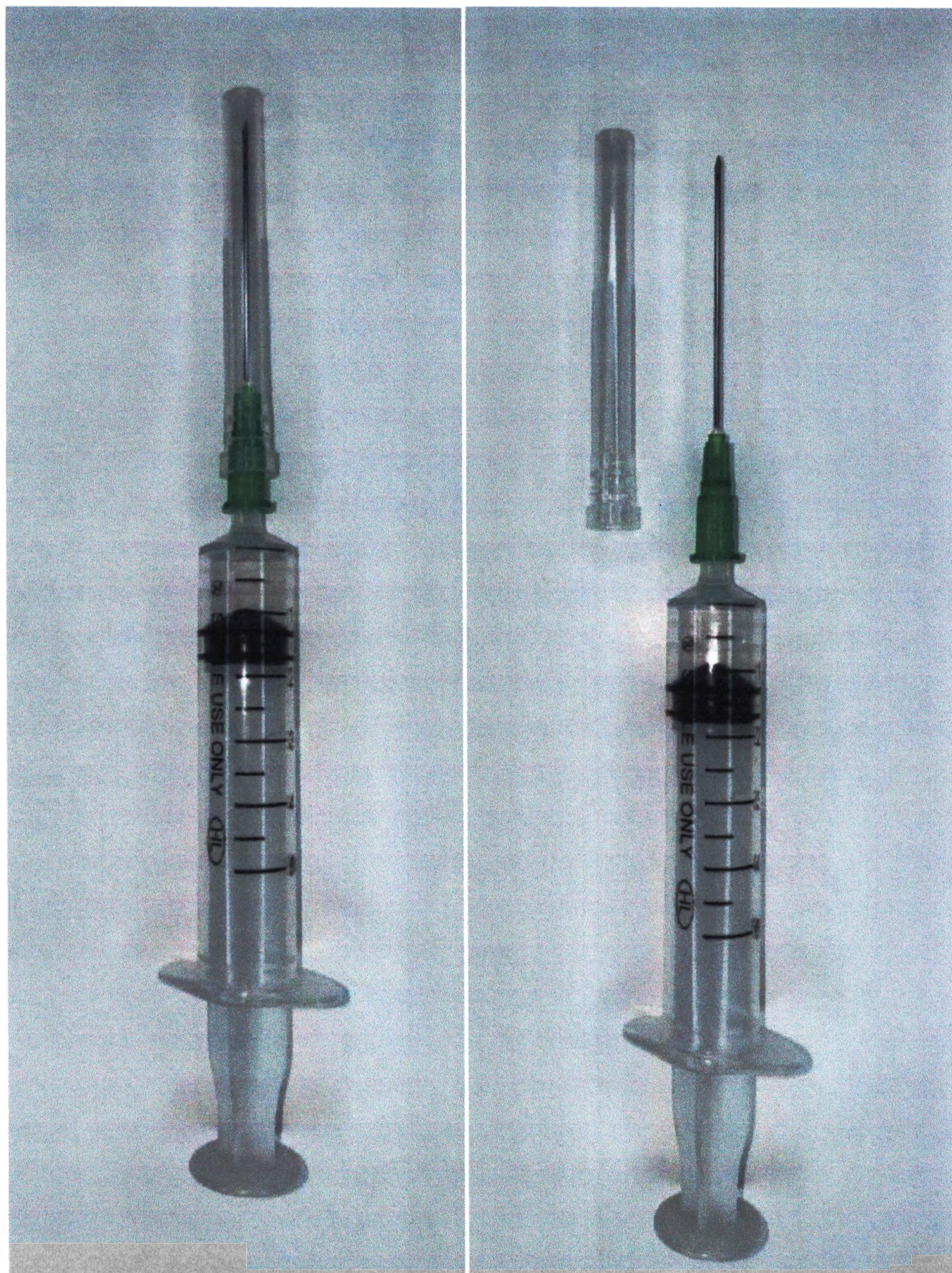


Рисунок 7. Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид.



Рисунок 7.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.


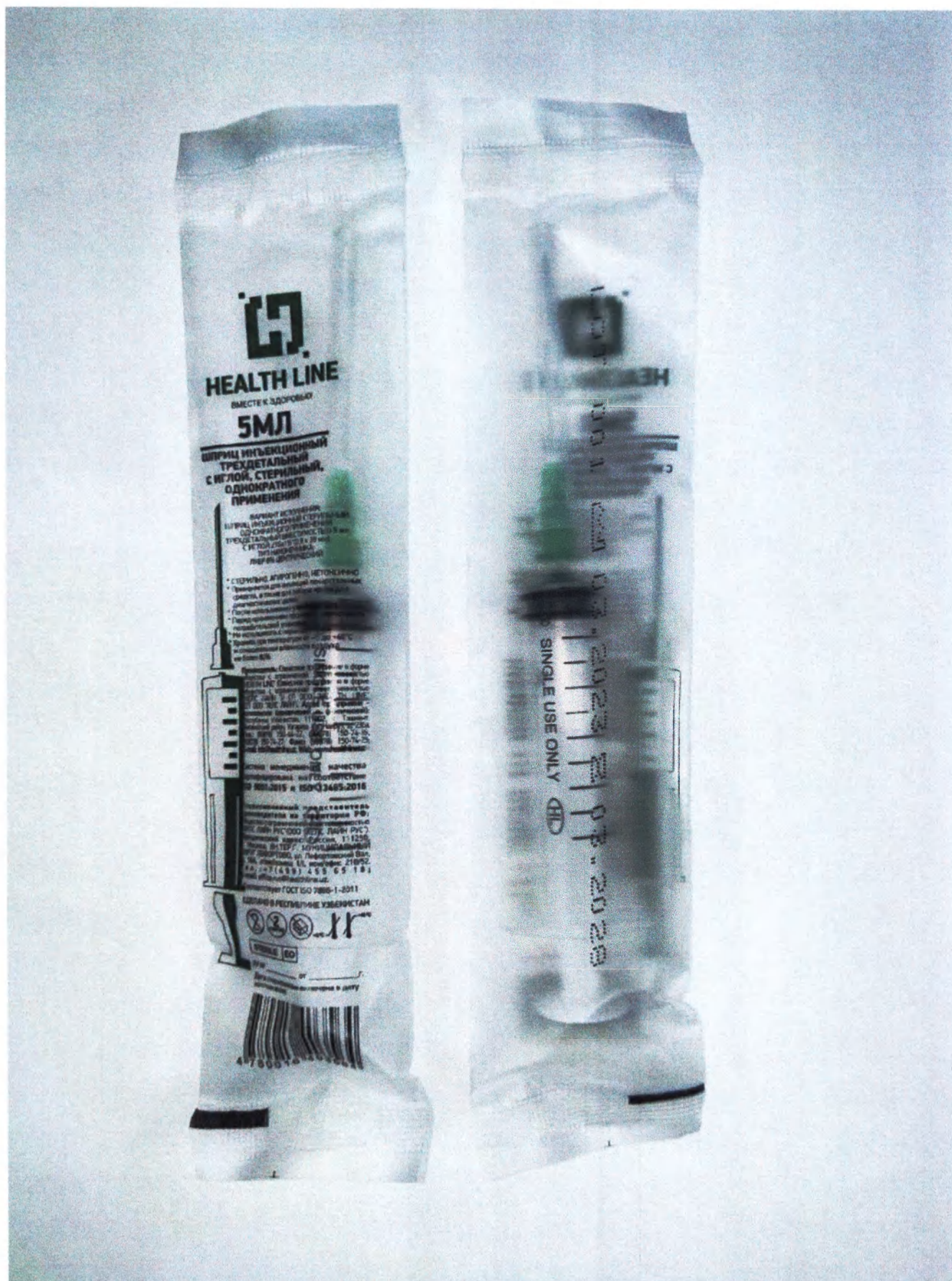


Рисунок 7.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1½"(0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, алирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для диагностических целей для забора крови

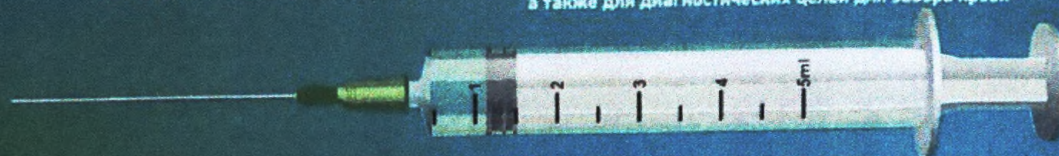

ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

5 МЛ
× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм)
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытия) и сроке годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок. Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру свободной рукой и спустить небольшое количество препарата, надавливая на поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола закрыть тампоном с дезинфицирующим

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном

СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Утилизацию изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для однократного применения.

- Температура окружающего воздуха: от +5°C до +40°C;

- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;

- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНА.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не менее 24 ч. Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями.

Рисунок 7.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

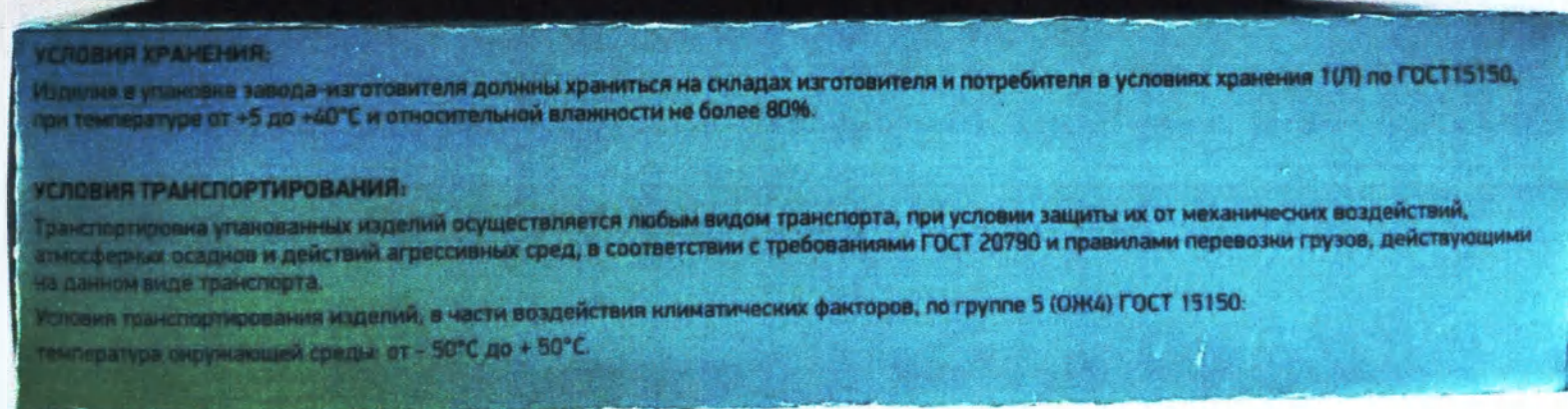
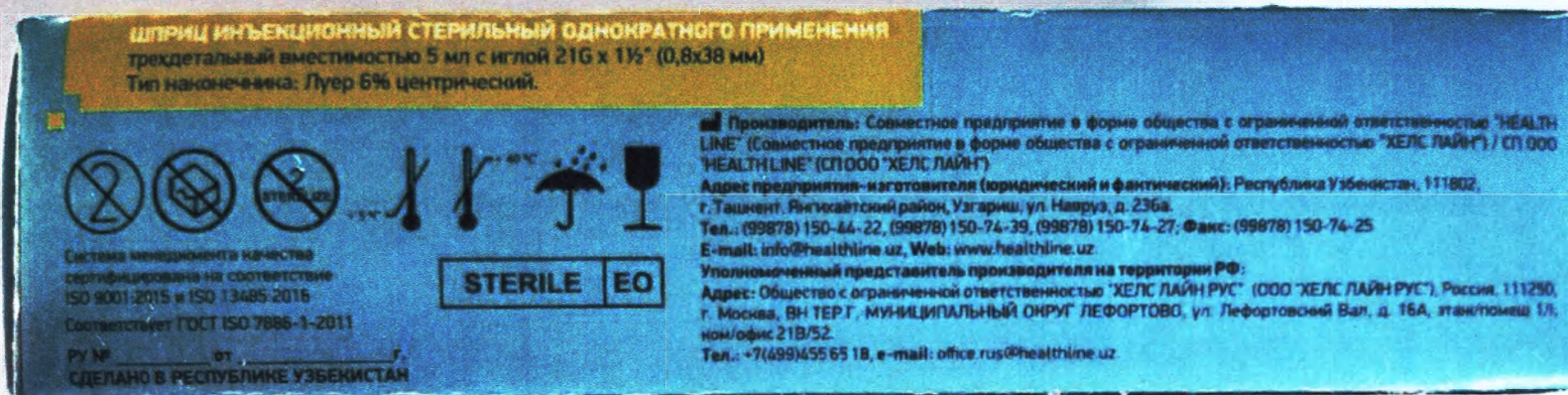


Рисунок 7.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1 1/2"(0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 7.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 5 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

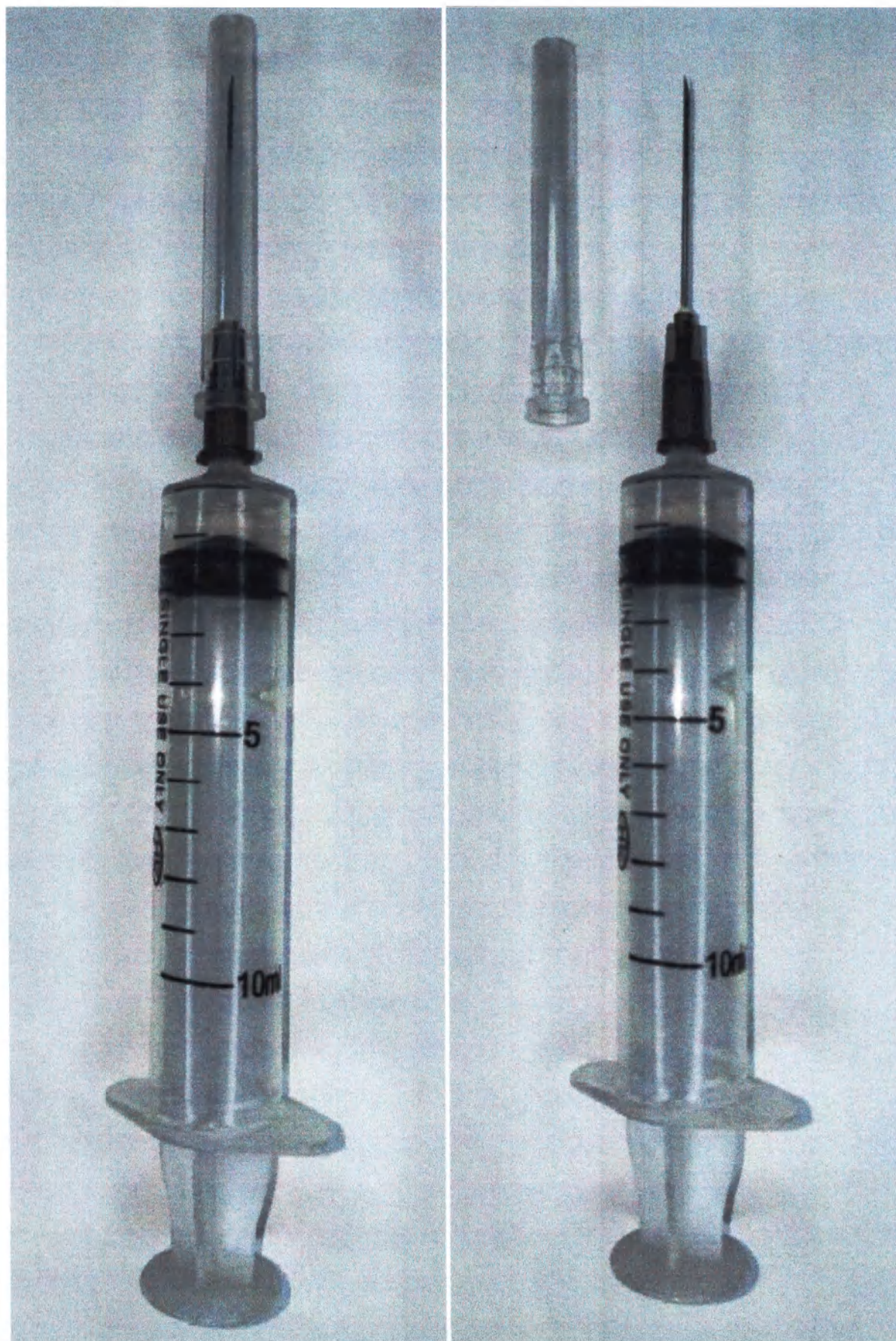


Рисунок 8. Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид



Рисунок 8.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1¼" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.

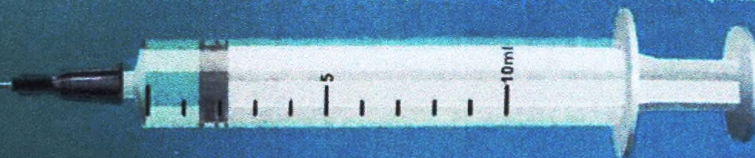


Рисунок 8.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1¼" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей



ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

10 МЛ
× 10 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм).
Тип наконечника: Луер 6% центрический.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие.

Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрывтия) и
сроке годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с
соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок.

Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:

- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа
шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру
свободной рукой и спустить небольшое количество препарата, надавливая на
поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола занять тампоном с дезинфицирующим
раствором.

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном

СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для одноразового
применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНА.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной
таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не
менее 24 ч.

Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями,

Рисунок 8.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

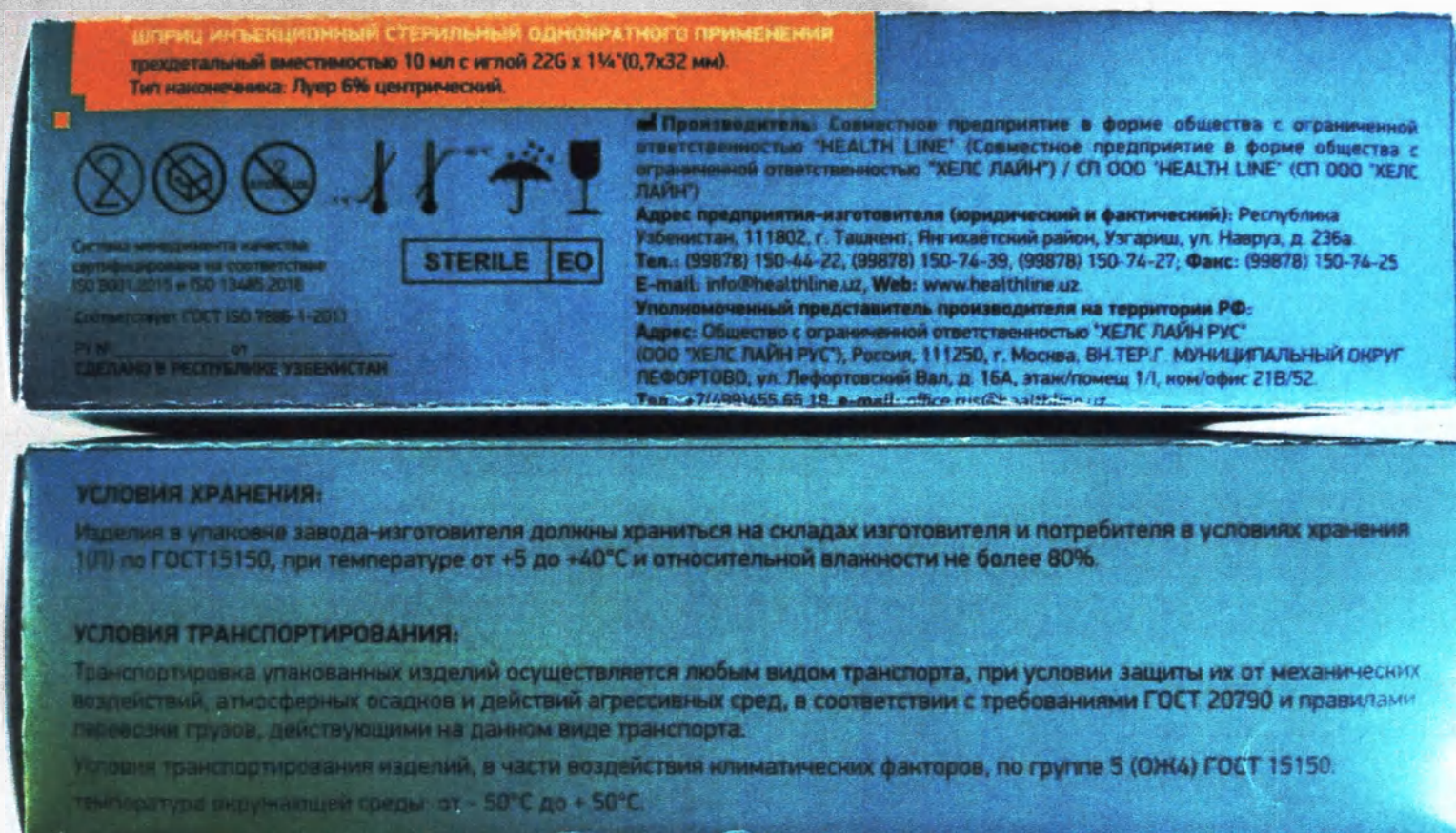


Рисунок 8.4 Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 8.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1¼"(0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

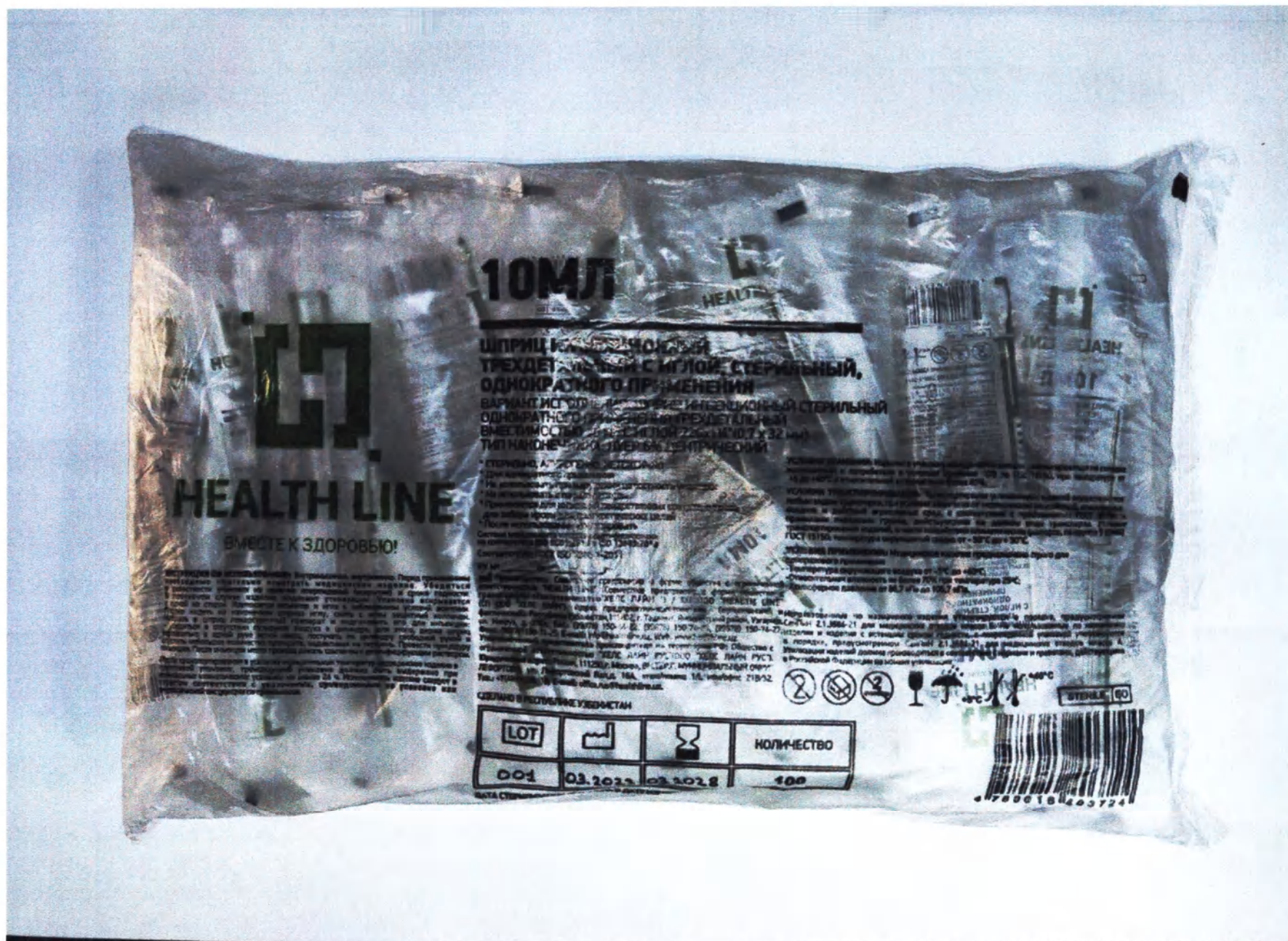


Рисунок 8.6 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 22G x 1 1/4" (0,7x32 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (пакет)

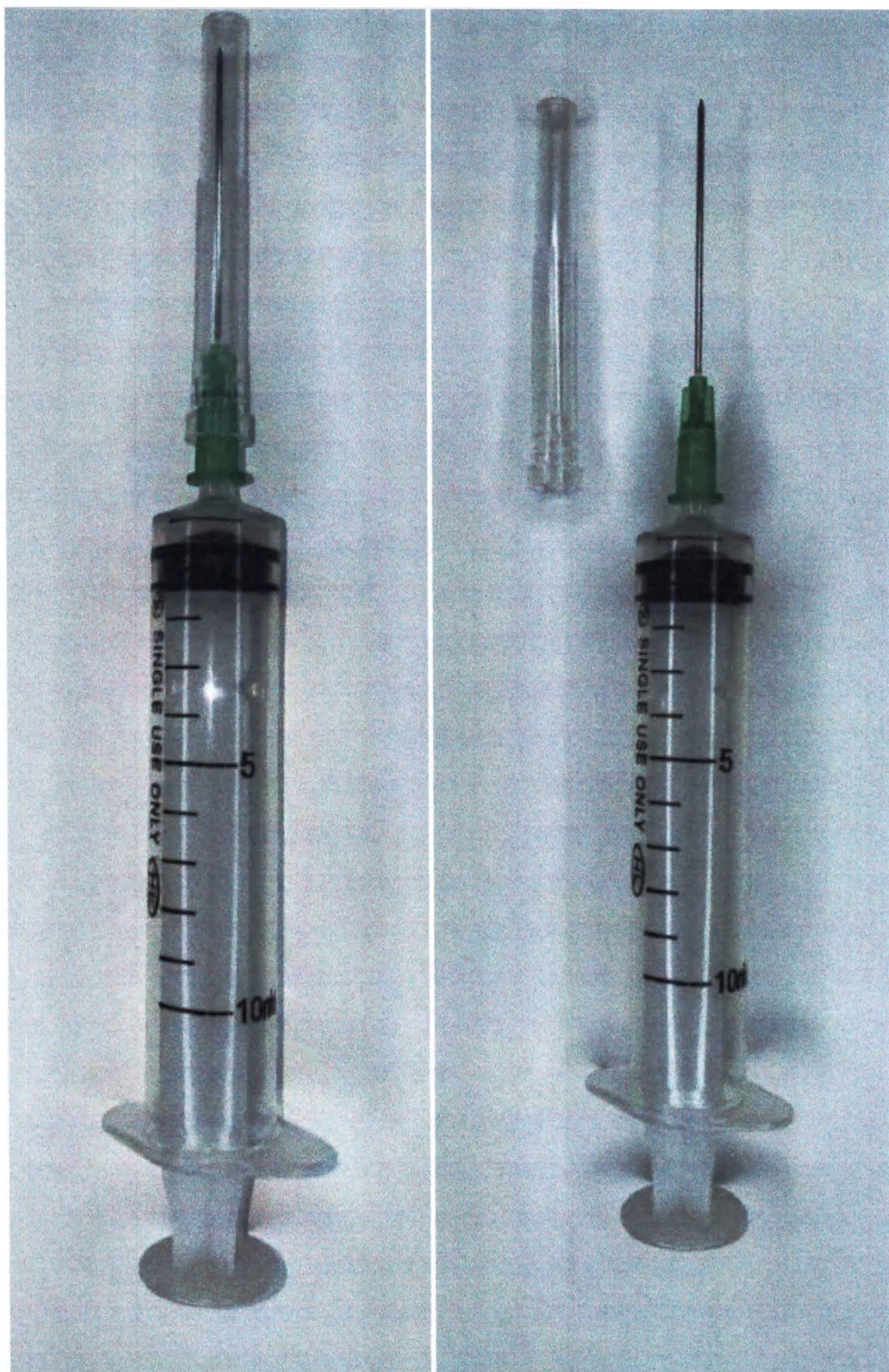


Рисунок 9. Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Общий вид.



Рисунок 9.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.



Рисунок 9.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Рисунок 9.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

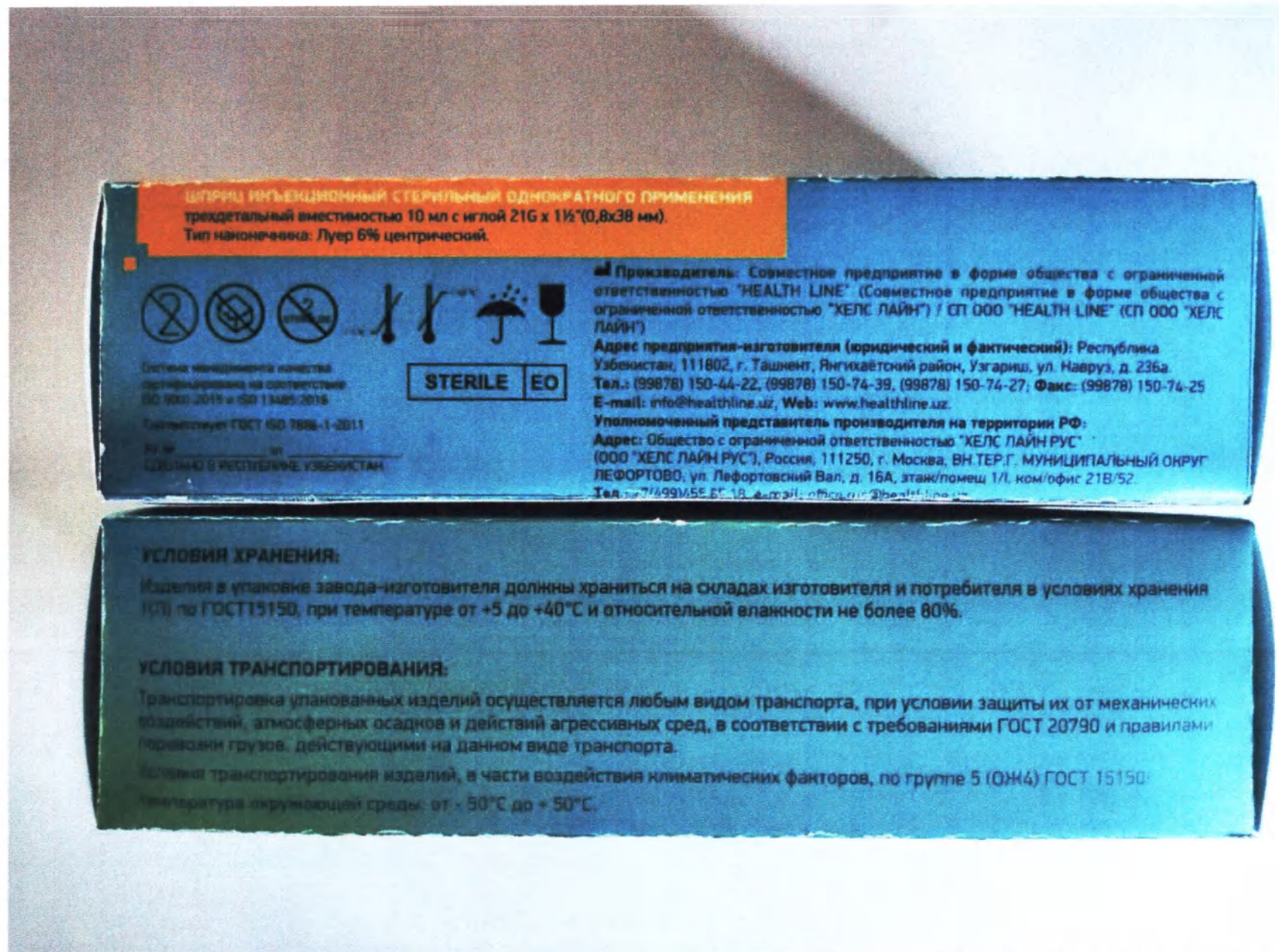


Рисунок 9.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 9.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (коробка). Вид 3.

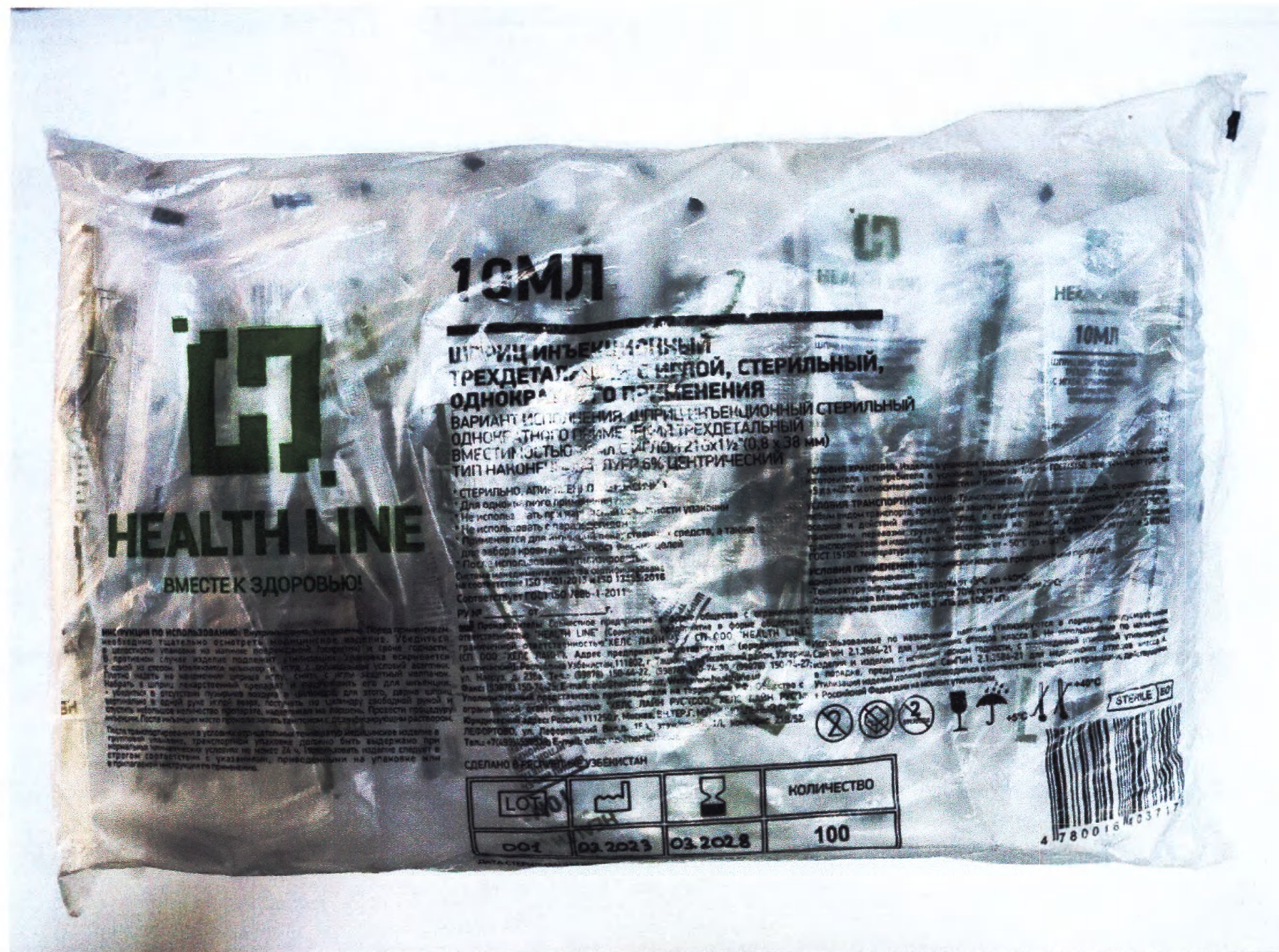


Рисунок 9.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 10 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6% центрический. Групповая упаковка (пакет).

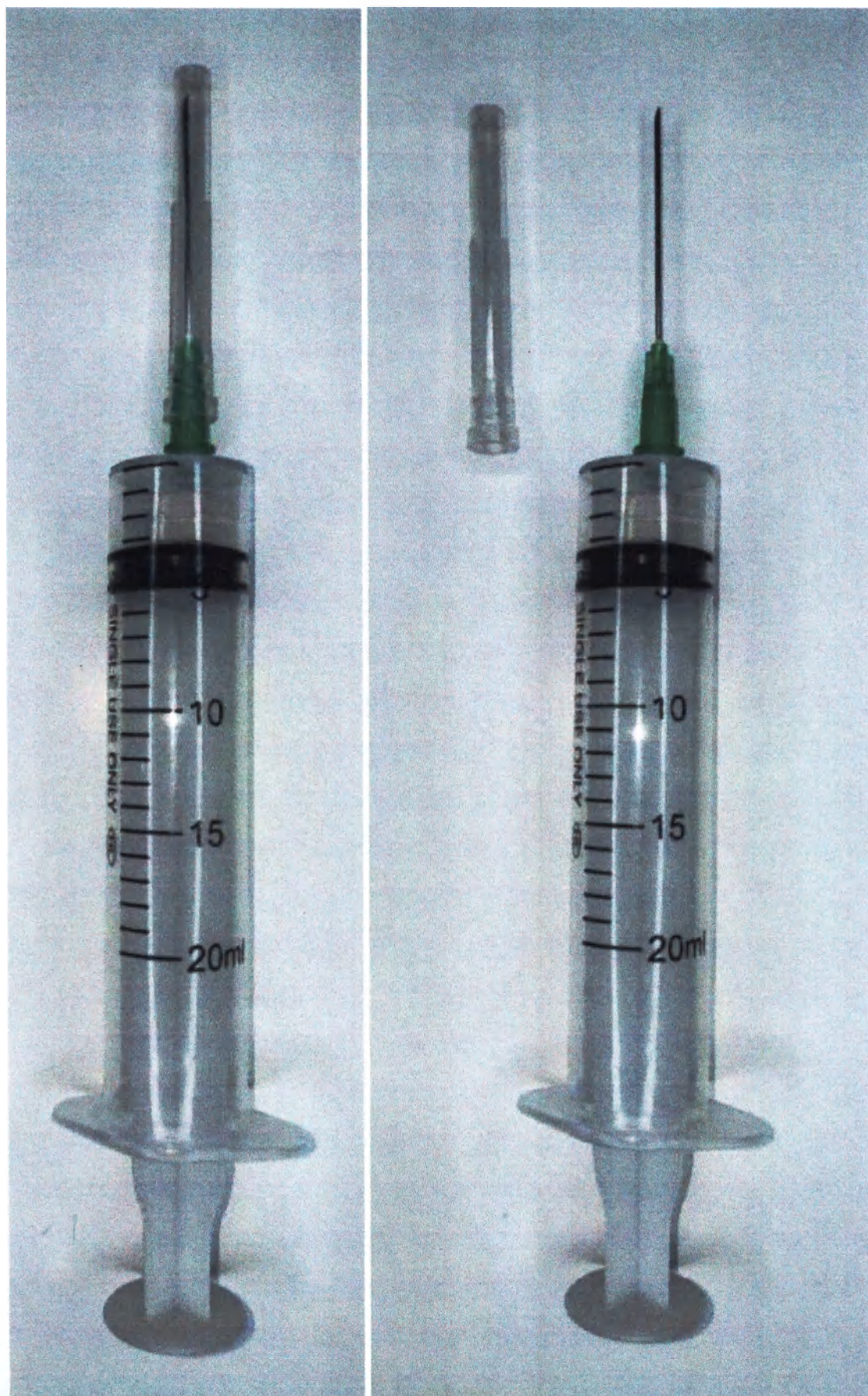


Рисунок 10. Шприц инъекционный стерильный, одноразового применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Общий вид.



Рисунок 10.1 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Индивидуальная стерильная упаковка из многослойной полимерной пленки.


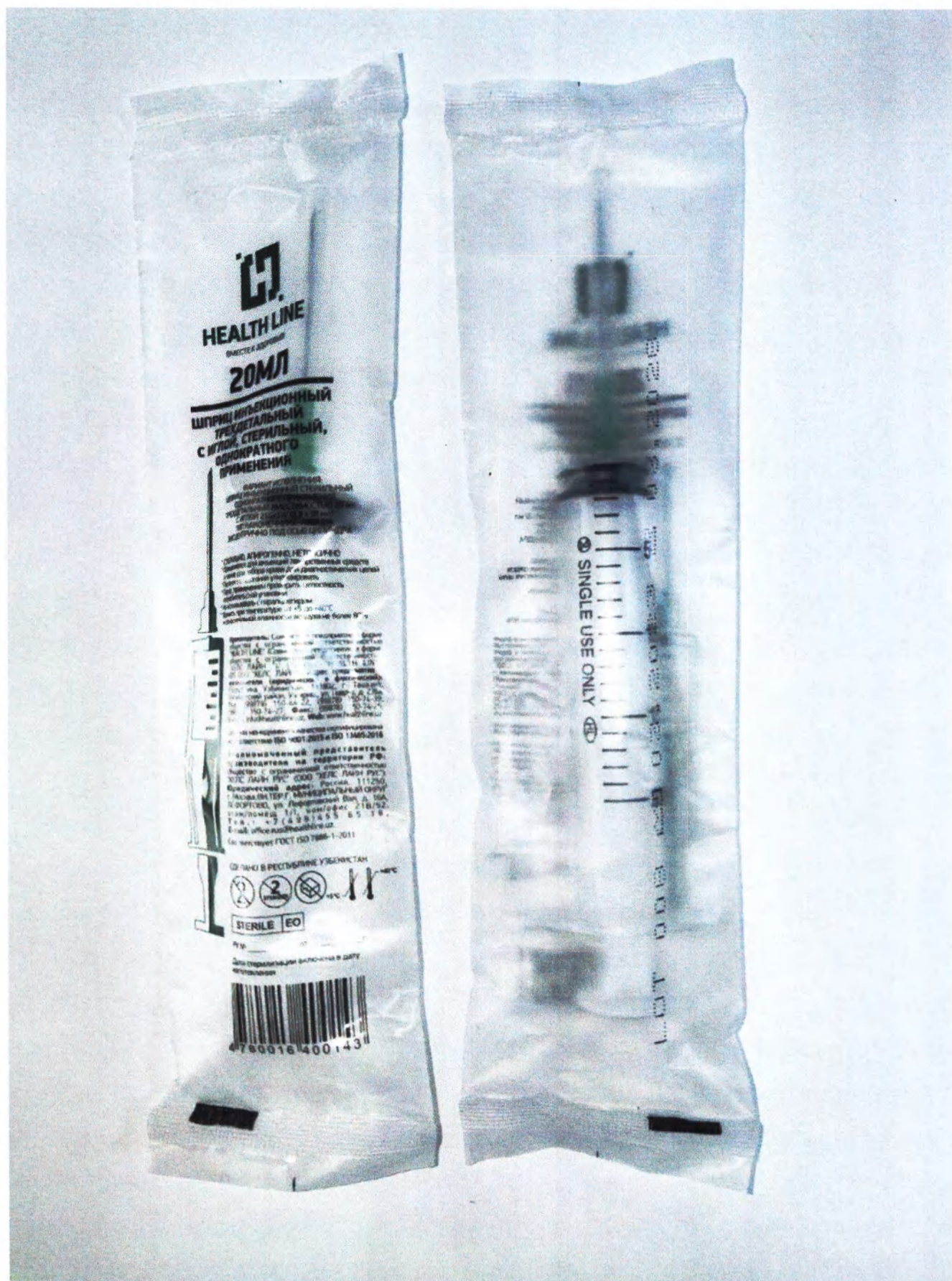


Рисунок 10.2 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Индивидуальная стерильная упаковка из полиэтилена



Стерильно, апирогенно, нетоксично
Для однократного применения
После использования утилизировать

Не использовать при нарушении целостности упаковки
Не использовать с паральдегидом
Применяется для инъекций лекарственных средств,
а также для забора крови для диагностических целей

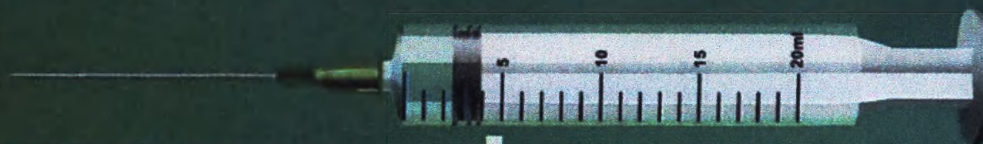

ШПРИЦЫ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения
трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм).
Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра.

20 МЛ
× 5 ШТ

Шприц инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм).
Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внутримышечно, внутривенно.

Перед применением необходимо тщательно осмотреть медицинское изделие.
Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытия) и
срока годности. В противном случае изделие подлежит утилизации.
Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла с
соблюдением условий асептики.

Плотно надеть на наконечник шприца иглу, снять с иглы защитный колпачок.
Набрать в шприц лекарственный препарат и подготовить его для инъекции:
- убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в цилиндре, для этого, держа
шприц вертикально в одной руке иглой вверх, постучать по цилиндру
свободной рукой и спустить небольшое количество препарата, надавливая на
поршень.

Провести процедуру инъекции.

После инъекции место прокола занять тампоном с дезинфицирующим
раствором раствора.

Использованные по назначению изделия утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой утилизируются в порядке, предусмотренном
СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов классов А.

Утилизация изделий должна производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицинское изделие предназначено строго для одноразового
применения.

- Температура окружающего воздуха - от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность не более 70% при температуре 25°C;
- Атмосферное давление от 86,7 кПа до 106,7 кПа.

Повторная стерилизация изделия ЗАПРЕЩЕНО.

Повторное применение ЗАПРЕЩЕНО.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
медицинское изделие во внешней (групповой) упаковке, транспортной
таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях не
менее 24 ч.

Использовать изделие следует в строгом соответствии с указаниями,
приведенными на упаковке или в прилагаемой инструкции по применению.

Рисунок 10.3 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Групповая упаковка (коробка). Вид 1

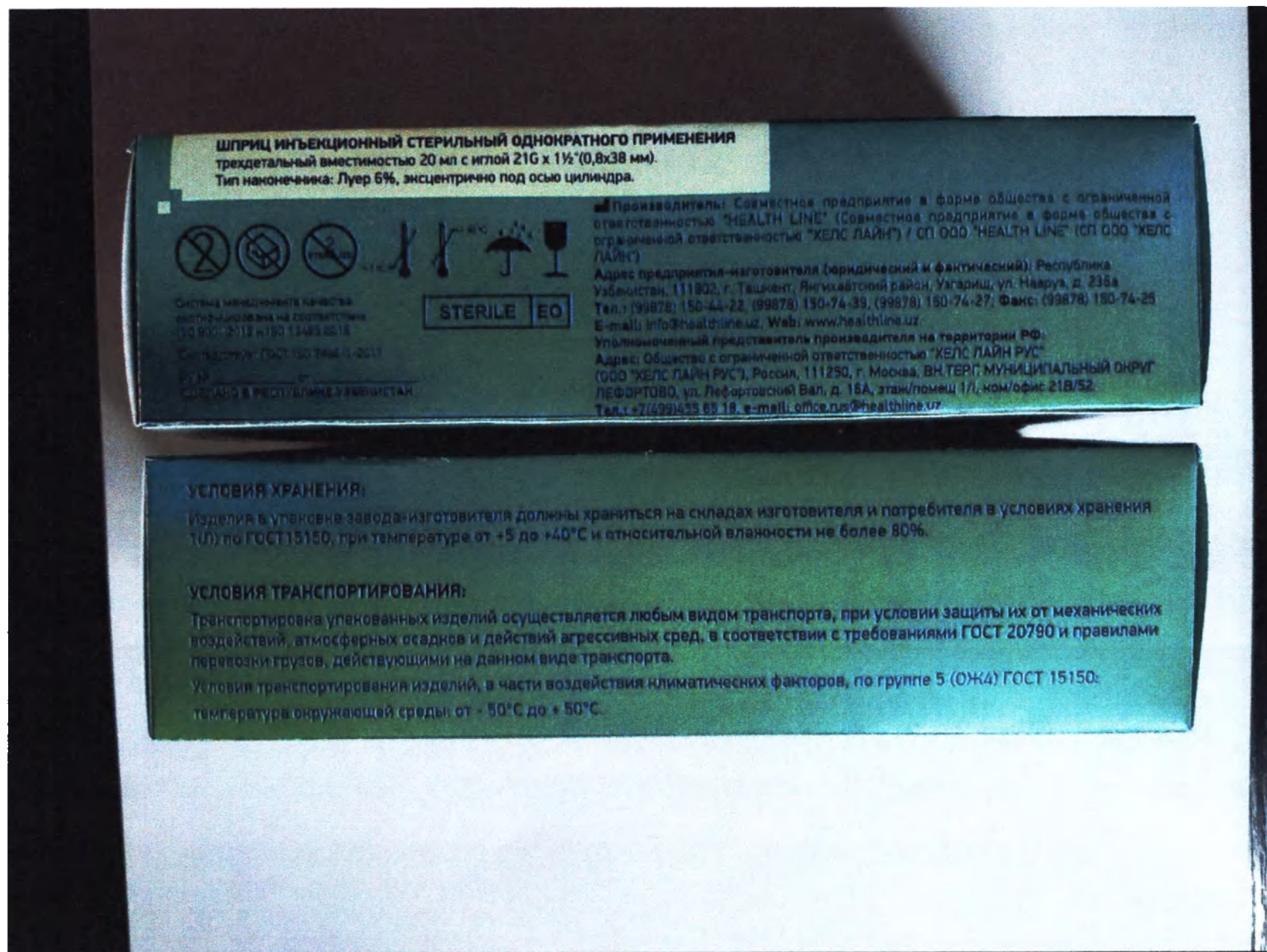


Рисунок 10.4 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Групповая упаковка (коробка). Вид 2



Рисунок 10.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½ (0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под ось цилиндра. Групповая упаковка (коробка). Вид 3

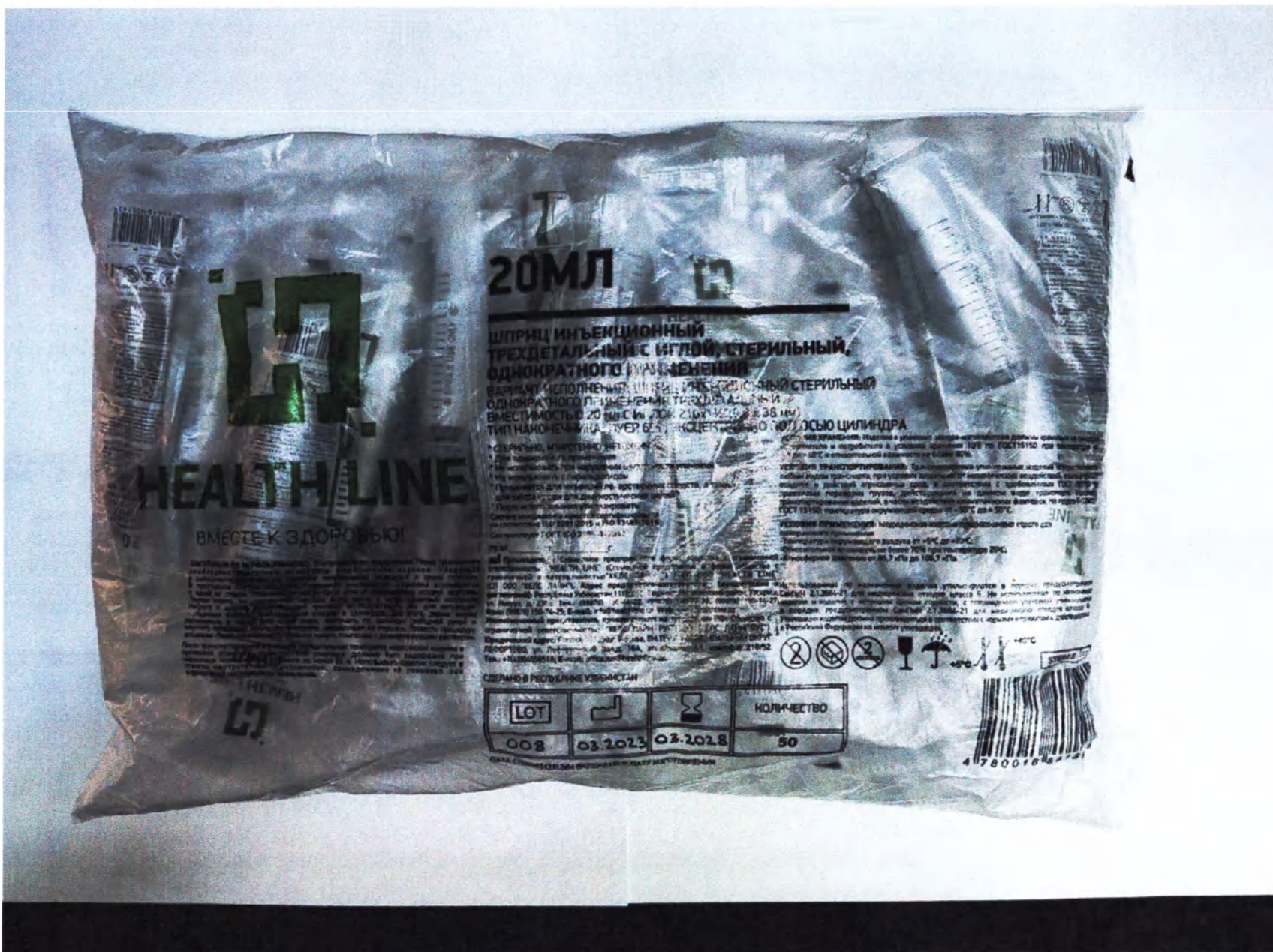


Рисунок 10.5 Шприц инъекционный стерильный, однократного применения трехдетальный вместимостью 20 мл с иглой 21G x 1½"(0,8x38 мм). Тип наконечника: Луер 6%, эксцентрично под осью цилиндра. Групповая упаковка (пакет).

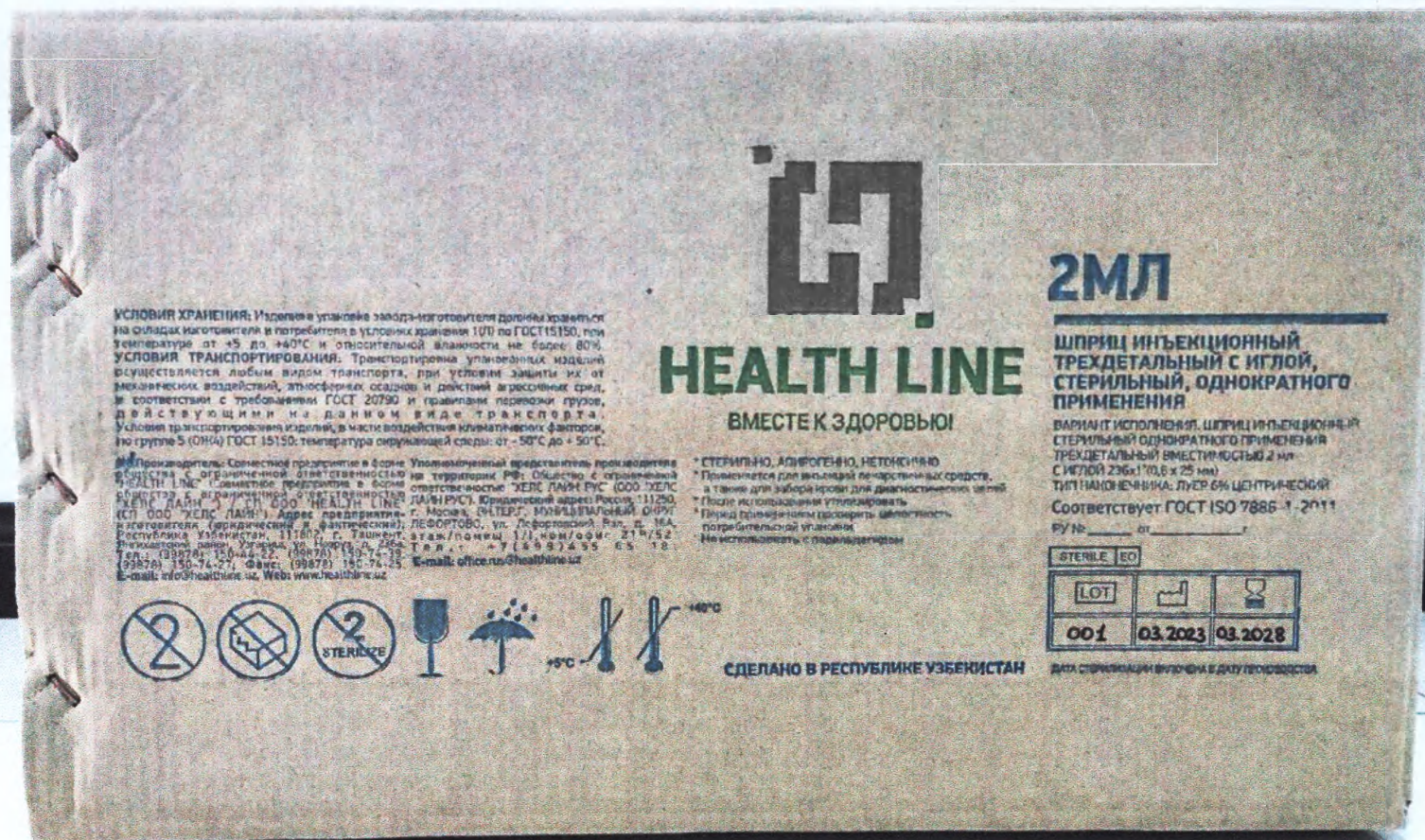


Рисунок 11. Транспортная тара. Вид спереди

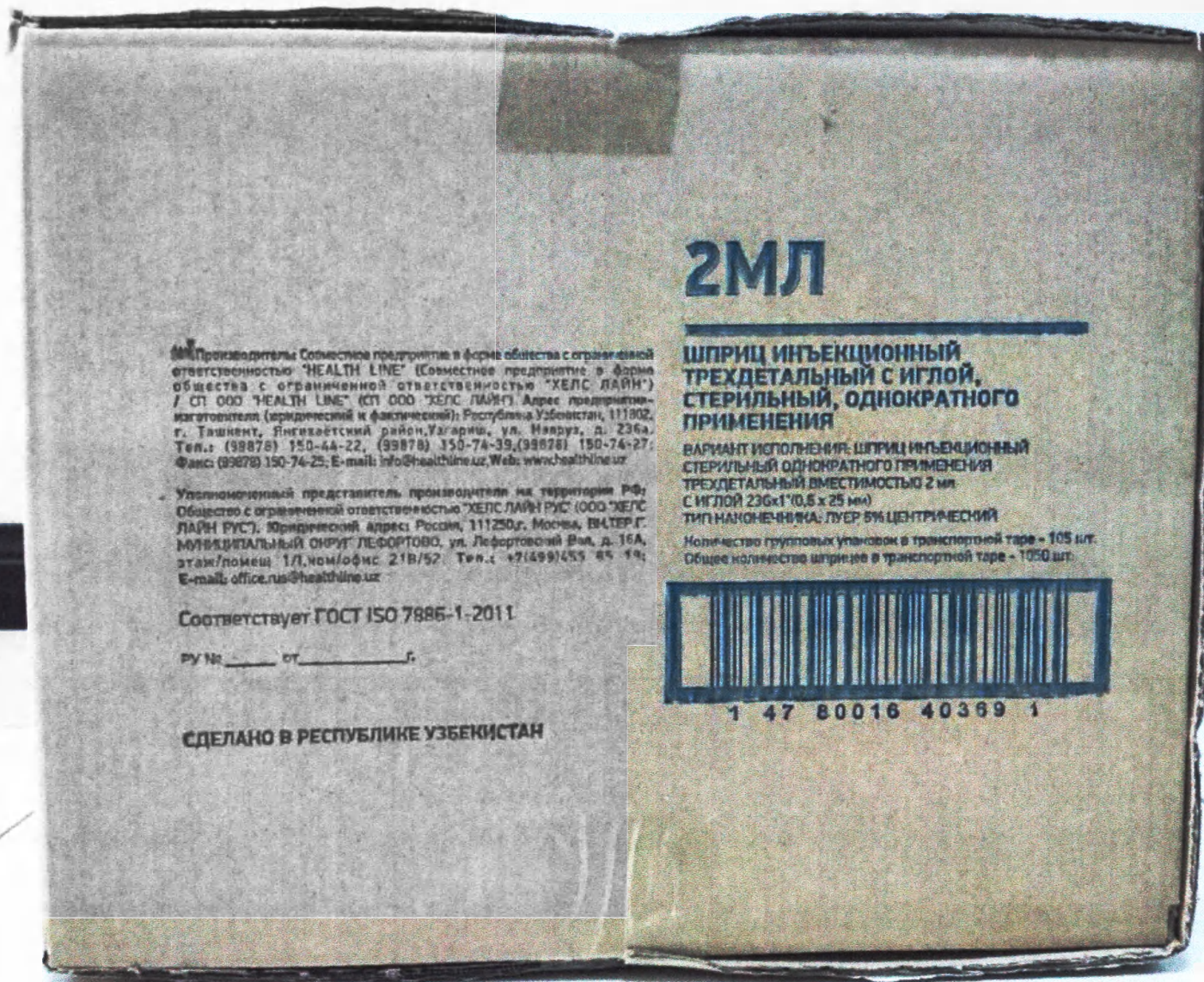


Рисунок 12. Транспортная тара. Вид сбоку



Рисунок 14. Макет маркировки групповой упаковки (коробка). Вид 1

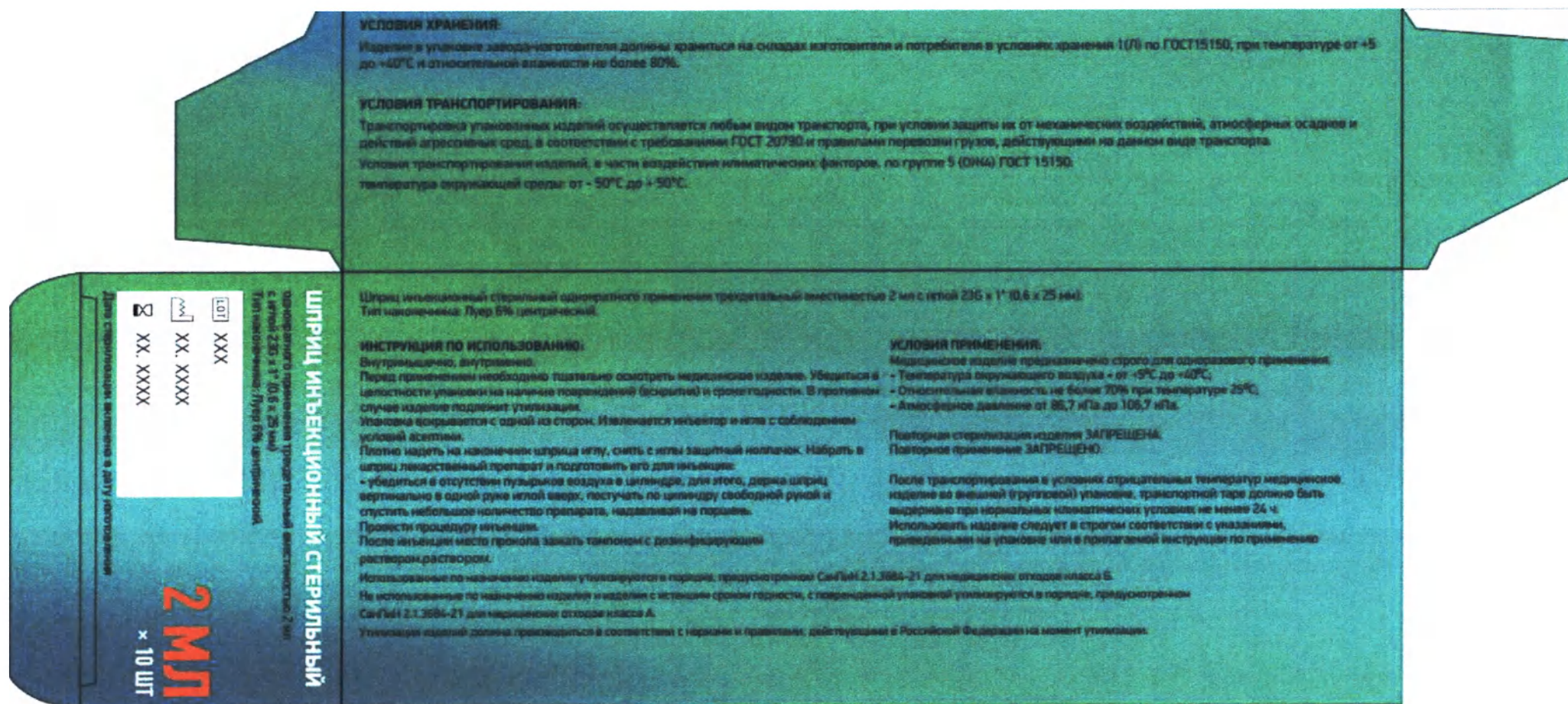


Рисунок 15. Макет маркировки групповой упаковки (коробка). Вид 2



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Изделия в упаковке завода-изготовителя должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1(П) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: Транспортировка упакованных изделий осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от механических воздействий, атмосферных осадков и действий агрессивных сред, в соответствии с требованиями ГОСТ 20790 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования изделий, в части воздействия климатических факторов, по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150: температура окружающей среды: от -50°C до +50°C.

Производитель: Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "HEALTH LINE" (Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН") / СП ООО "HEALTH LINE" (СП ООО "ХЕЛС ЛАЙН"). Адрес предприятия-изготовителя (юридический и фактический): Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент, Янгиаевский район, Угариш, ул. Махмуз, д. 236а. Тел.: (99878) 150-44-22; (99878) 150-74-39; (99878) 150-74-27. Факс: (99878) 150-74-25; E-mail: info@healthline.uz; Web: www.healthline.uz

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН РУС" (ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"). Юридический адрес: Россия, 111250, г. Москва, Вн-Терг. муниципальный округ ЛЕФОРТОВО, ул. Лефортовский Вал, д. 16А, этаж/помещ 1/1, ком/офис 218/52. Тел.: +7 (499) 455 65 18; E-mail: office.rus@healthline.uz



ВМЕСТЕ К ЗДОРОВЬЮ!

- * СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО
- * Применяется для инъекций лекарственных средств, а также для забора крови для диагностических целей
- * После использования утилизировать
- * Перед применением проверить целостность потребительской упаковки
- * Не использовать с паральдегидом

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

20МЛ

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ С ИГЛОЙ, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 20 мл
С ИГЛОЙ 21Gx1 1/2" (0,8x38mm)
ТИП НАКОНЕЧНИКА: ЛУЕР 6%,
ЭКСЦЕНТРИЧНО ПОД ОСЬЮ ЦИЛИНДРА

Соответствует ГОСТ ISO 7886-1-2011

РУ № _____ от _____ г.

STERILE BOX		
LOT	Factory	Hourglass

ДАТА СТЕРИЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕНА В ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Рисунок 17. Макет маркировки транспортной тары. Вид спереди.

Производитель: Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "HEALTH LINE" (Совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН") / СП ООО "HEALTH LINE" (СП ООО "ХЕЛС ЛАЙН") Адрес предприятия-изготовителя (юридический и фактический): Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент, Янгиҳаётский район, Узгариш, ул. Навруз, д. 236а. Тел.: (99878) 150-44-22, (99878) 150-74-39, (99878) 150-74-27; Факс: (99878) 150-74-25; E-mail: info@healthline.uz, Web: www.healthline.uz

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛС ЛАЙН РУС" (ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"). Юридический адрес: Россия, 111250, г. Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ул. Лефортовский Вал, д. 16А, этаж/помещ 1/1, ком/офис 21В/52. Тел.: +7(499)455 65 18; E-mail: office.rus@healthline.uz

Соответствует ГОСТ ISO 7886-1-2011

РУ № _____ от _____ г.

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

20МЛ

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ С ИГЛОЙ, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 20 мл
С ИГЛОЙ 21Gx1½" (0,8x38mm)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ЛУЕР 6%,
ЭКСЦЕНТРИЧНО ПОД ОСЬЮ ЦИЛИНДРА

Количество групповых упаковок в транспортной таре - 12 шт.
Общее количество шприцев в транспортной таре - 600 шт.



1 47 80016 40159 8

Рисунок 18. Макет маркировки транспортной тары. Вид сбоку

Всего прошнуровано и скреплено печатью

46 (Серьгей и др) лист 06

Генеральный директор
ООО "ХЕЛС ЛАЙН РУС"

Пак Ирина Тимофеевна

