



“Утверждаю”

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью

«Нипро Медикал»

Гузовский Е.В.

Гузовский

“14” мая 2007 года



ИНСТРУКЦИЯ

По применению игл дентальных типо - размерного ряда (см. Приложение)

Соответствует требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 2504687



Матвеевский

Матвеев

Матвеев Е.А.

Иглы дентальные

Инструкция по применению

Прочитайте все рекомендации, предупреждения и предостережения перед использованием

I. Назначение

Иглы дентальные предназначены для проведения инъекций медикаментов в стоматологической практике и используются совместно с устройствами для проведения инъекций.

II. Основные технические характеристики

1. Супертонкая стенка позволяет создавать эффективный поток медикаментов.
2. Специальная система заточки иглы минимизирует болезненные ощущения и упрощает процедуру инъекции.
3. Силиконизированное покрытие снижает сопротивление потоку раствора, вводимого для инъекций.

III. Противопоказания

Данное изделие само по себе не является лечебным устройством, и для него нет абсолютных противопоказаний.

IV. Подготовка изделия к работе

1. Достаньте дентальную иглу из упаковки, удалите защитный колпачок.
2. Соедините иглу с устройством для инъекции и убедитесь в надежности соединения.

V. Порядок работы изделия

1. Выпустите весь остаточный воздух и произведите пункцию иглой.
2. Произведите инъекцию медикамента, пользуясь устройством для инъекции и в соответствии с инструкциями на устройства для инъекции.
3. После проведения инъекции удалите иглу и утилизируйте ее в соответствии с нормами принятыми в данном медицинском учреждении.

VI. Правила хранения и использования

1. Дентальные иглы предназначены для однократного использования. Не использовать повторно.
2. Не использовать, если упаковка повреждена.
3. Используйте асептические условия при установке и использовании.
4. Не хранить при высокой температуре и влажности.
5. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Приложение

I. Длина иглы в миллиметрах

25G x 13мм (A, E)

25G x 25мм (A, E)

25G x 30мм (A, E)

27G x 21мм (A, E)

27G x 30мм (A, E)

27G x 35мм (A, E)

27G x 41мм (A, E)

30G x 12мм (A, E)

30G x 16мм (A, E)

30G x 21мм (A, E)

30G x 25мм (A, E)

30G x 30мм (A, E)

30G x 41мм (A, E)

II. Длина иглы в дюймах

25G x 1/2" (A, E)

25G x 1" (A, E)

25G x 1-3/16" (A, E)

27G x 13/16" (A, E)

27G x 1-3/16" (A, E)

27G x 1-3/8" (A, E)

27G x 1-5/8" (A, E)

30G x 1/2" (A, E)

30G x 5/8" (A, E)

30G x 13/16" (A, E)

30G x 1" (A, E)

30G x 1-3/16" (A, E)

30G x 1-5/8" (A, E)

Генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
«Нипро Медикал»

Гузовский В.В.



14 мая 2007 года