

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «НПЦ «Сериал-Мед»



О.А. Субботко

«14» декабря 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

**Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные
стерильные
16см x 14см и 45см x 29см.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Салфетки марлевые медицинские стерильные (далее - салфетки) предназначены для наложения, а также для изготовления операционно-перевязочных средств

2. Основные технические характеристики.

Салфетки изготовлены стерильными.

Салфетки изготовлены различных типоразмеров:

- 16см x 14см, 45см x 29см;

Салфетки двухслойные и однослойные, слоем считается один слой марки. Раскрой салфеток произведен по основе или утку. Салфетки без швов и с не обрезной кромкой. При складывании салфеток их продольные и поперечные края загнуты внутрь.

Салфетки изготовлены из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412.

Салфетки в количестве:

- 16см x 14см, 10шт или 20шт - двухслойные
- 16см x 14см, 20шт или 40шт - однослойные;
- 45см x 29см; 5 шт - двухслойные,
- 45см x 29см; 10 шт - однослойные,

Стерилизация салфеток осуществлена радиационным или паровым методом.

Салфетки, стерилизованные паровым методом, уложены в групповую упаковку, выполненную из пергамента по ГОСТ 1341-97 или из подпергамента по ГОСТ 1760-80 или из бумаги оберточной по ГОСТ 8273-75 или из пленки полипропиленовой двухосноориентированной по ТУ 2245-003-70378591-2007.

Салфетки, стерилизованные радиационным методом, уложены в групповую упаковку, выполненную из пленки полипропиленовой двухосноориентированной по ТУ 2245-003-70378591-2007 или из бумаги комбинированной по ТУ 2245-010-21683836-2009 или из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или из материалов упаковочных комбинированных на бумажной основе по ТУ 5453-001-81659324-2010 или в пакеты комбинированные по ГОСТ Р ИСО 11607-2003.

3. Противопоказания к применению.

Салфетки не применять при нарушении целостности упаковки.

Салфетки однократного применения.

4. Подготовка к работе изделия.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

5. Порядок работы изделия.

Вскрыть упаковку и взять необходимые для работы изделие.

6. Правила хранения и использования.

Салфетки транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 7000.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с момента стерилизации.