

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ «АРМЕД»

ОКП 94 5250

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»
О.С. Данилова
«__» _____ 2016 г.




Руководство по эксплуатации

						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
Введение	3
1 Основные сведения	4
2 Технические характеристики	6
3 Комплектность	8
4 Указания мер безопасности	9
5 Описание кресел	10
6 Маркировка	13
7 Подготовка кресел к использованию и порядок использования.	14
8 Возможные неисправности и способы их устранения	17
9 Техническое обслуживание	18
10 Правила хранения и транспортирования, утилизация	19
11 Гарантии изготовителя	20
12 Свидетельство о приемке	21
13 Свидетельство об упаковке	22
14 Сведения о рекламациях	23
Приложение А Гарантийные талоны	24

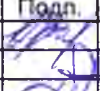Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кресла инвалидные с санитарным оснащением «АРМЕД» Руководство по эксплуатации	Литера	Лист	Листов	
Разраб.		Крашениников				А	2	25	
Проверил									
Зав. НИЛ		Анисимов							
Н.контр.		Дорошкевиц							
Утвердил									
						ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»			

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции и правил эксплуатации, транспортирования и хранения кресел инвалидов с санитарным оснащением «АРМЕД» (далее по тексту – кресло).

Прежде чем приступить к использованию кресла, необходимо изучить и понять содержание настоящего руководства по эксплуатации.

Ниже приведены символы, используемые в настоящем руководстве.

	ОПАСНО <i>Указывает на то, что предполагается высокая вероятность возникновения ситуации, вызывающей риск гибели или нанесения серьезной травмы при несоблюдении данных требований</i>
	ОСТОРОЖНО <i>Указывает на то, что предполагается возможность возникновения ситуации, которая может привести к гибели или нанесению серьезной травмы при несоблюдении данных требований</i>
	ВНИМАНИЕ <i>Указывает на то, что предполагается возможность нанесения травмы или повреждения оборудования при несоблюдении данных требований</i>

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кресла предназначены для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в качестве передвижного санитарно-гигиенического приспособления в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.



ВНИМАНИЕ

Кресла не предназначены для транспортировки больных и инвалидов

1.2 Кресла изготавливаются в различных исполнениях, отличающихся шириной сиденья, наличием или отсутствием опорных колес, максимальной нагрузкой, массой, габаритными размерами, дизайном.

1.3 Показания к применению:

- болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования;
- паралич или ампутация нижних конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

1.4 Противопоказания к применению кресел:

- невозможность сохранения сидячего положения;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие;
- психические расстройства.

1.5 Предприятие-изготовитель – ООО «НПЦ МТ «АРМЕД» [143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А; тел. (495) 989-12-88; E-mail: 209@armed.ru].

1.6 В зависимости от потенциального риска применения кресла относятся к классу 1 (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу МЗ РФ от 6.06.2012 г. № 4н).

1.7 По рабочим условиям применения кресла относятся к изделиям, изготовленным в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4

1.8 Нормальными условиями применения кресел являются следующие значения влияющих величин:

- температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Размеры кресел соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Исполнение				
	H005B	H009B	H020B	H021B	H023B
Ширина, мм, не более	650	540	630	540	550
Ширина сиденья, мм, не менее	380	440	355	380	380
Ширина между поручнями, мм, не менее	555	420	450	450	450
Длина, мм, не более	500	820	520	540	520
Глубина сиденья, мм, не менее	400	400	385	380	400
Высота, мм, не более	790 – 890	950	600 – 750	790 – 890	780 – 880
Высота сиденья, мм, не более	490 – 590	550	420 – 570	490 – 590	490 – 590
Диаметр колес, мм, не более	50	125	–	50	50
Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм, не более	–	560 x 340 x 520	–	–	–

Окончание таблицы 1

Параметр	Исполнение				
	ФС692	ФС695С	ФС810	ФС813	ФС899
Ширина, мм, не более	540	550	600	570	540
Ширина сиденья, мм, не менее	430	380	380	380	385
Ширина между поручнями, мм, не менее	435	460	450	460	435
Длина, мм, не более	910	510	510	500	480
Глубина сиденья, мм, не менее	430	400	400	400	400
Высота, мм, не более	960	765 – 865	650 – 750	620 – 720	775
Высота сиденья, мм, не более	520	460 – 560	430 – 550	370 – 470	440
Диаметр колес, мм, не более	125	75	–	–	–
Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм, не более	540 x 540 x 570	–	–	–	110 x 520 x 770

Примечание – Высота кресел и высота сидений кресел, кроме исполнений H009B, ФС692, ФС899 – регулируемая в указанных диапазонах.

						Лист
						6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.2 Масса кресел не более указанной в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Исполнение				
	H005B	H009B	H020B	H021B	H023B
Масса, кг, не более	9	13	6	8	8

Окончание таблицы 2

Параметр	Исполнение				
	ФС692	ФС695С	ФС810	ФС813	ФС899
Масса, кг, не более	11	5	6	6	4

2.3 Допускаемая нагрузка не превышает указанной в таблице 3.

Таблица 3

Параметр	Исполнение				
	H005B	H009B	H020B	H021B	H023B
Допускаемая нагрузка, кг, не более	120	120	110	120	120

Окончание таблицы 3

Параметр	Исполнение				
	ФС692	ФС695С	ФС810	ФС813	ФС899
Допускаемая нагрузка, кг, не более	120	110	110	110	110

2.4 Усилие перемещения, приложенное к спинке или подлокотнику, необходимое для трогания с места кресла с опорными колесами, нагруженного манекеном по ГОСТ Р ИСО 7176-11 массой (100 ± 1) кг, – не более 100 Н.

2.5 Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресла и его элементов:

- для складывания (раскладывания) кресла – не более 60 Н;
- для закрепления спинки – не более 80 Н (при этом спинка не должна откидываться при приложении усилия 200 Н);
- для регулирования длины и угла наклона подножки – не более 100 Н.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кресел соответствует указанному в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и обозначение	Количество на исполнение									
	Н005В	Н009В	Н020В	Н021В	Н023В	ФС692	ФС695С	ФС810	ФС813	ФС899
Кресло	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Стульчак	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Емкость санитарная	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Спинка	–	1 шт.	–	–	–	1 шт.	–	–	–	–
Сиденье	–	1 шт.	–	–	–	1 шт.	–	–	–	–
Подножка	–	2 шт.	–	–	–	1 шт.	–	–	–	–
Наконечник резиновый	4 шт.	–	4 шт.	–	4 шт.	–	–	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Ключ шестигранный	–	–	–	–	–	–	–	1 шт.	–	–
Комплект крепежный	–	–	–	–	–	–	–	1 шт.	–	–
Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД». Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

Примечание – Конструктивное исполнение, размеры, а также специфические требования к конкретному креслу должны быть указаны при заказе.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла.

4.2 Необходимо иметь в виду, что изменение положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменения нагрузки на кресло, а также наклоне на угол более 10° повышается опасность опрокидывания кресла.

4.3 При посадке в кресло и высадке из кресла исполнений Н005В, Н009В, Н021В, Н023В, ФС692 и ФС695С колеса необходимо зафиксировать с помощью тормозов.

4.4 При посадке в кресло и высадке из кресло исполнений Н009В и ФС692 не наступайте на подножку.

4.5 После перемещения кресел исполнений Н005В, Н009В, Н021В, Н023В, ФС692 и ФС695С рекомендуется фиксировать колеса с целью предотвращения несчастных случаев.

4.6 Не оставляйте пациента в кресле без присмотра.

						Лист
						9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

5 ОПИСАНИЕ КРЕСЕЛ

5.1 Кресла исполнений Н020В, ФС810 и ФС813 (см. рисунок 1)



Кресло Н020В



Кресло ФС810



Кресло ФС813

Рисунок 1

5.1.1 Металлическая рама кресел имеет полимерное покрытие.

5.1.2 Подлокотники кресел:

– прямые, несъемные, оснащенные накладками из полипропилена марки 01030 – у кресел исполнений Н020В и ФС810.

– прямые, откидные, оснащенные пластиковыми накладками из пенополиэтилена марки ППЭ – у кресла исполнения ФС813.

5.1.3 Спинка кресла исполнения ФС813 оснащена мягкой накладкой из пенополиэтилена марки ППЭ.

5.1.4 Сиденье и санитарная емкость, изготовленные из легко-моющегося полистирола типа РСМ 525, – съемные.

5.1.5 Высота сиденья кресла регулируется кнопочным фиксатором через каждые 25 мм (семь уровней в кресле исполнении Н020В и пять – в исполнениях ФС810 и ФС813).

5.1.6 Ножки кресел оснащены резиновыми наконечниками для предотвращения скольжения.

5.1.7 Конструкция кресла позволяет устанавливать его над унитазом. Для этого санитарную емкость необходимо снять.

5.2 Кресло исполнения ФС899 (см. рисунок 2)



Рисунок 2 – Кресло ФС899

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

10

- 5.2.1 Металлическая рама кресла имеет эмалевое лакокрасочное покрытие.
- 5.2.2 Подлокотники кресел – прямые, несъемные, оснащенные мягкими накладками из полипропилена марки 01030.
- 5.2.3 Спинка кресла оснащена пластиковой рельефной перекладиной из пластика ПВХ Ш-62-0, обеспечивающей оптимальное положение пациента.
- 5.2.4 Сиденье и санитарная емкость, изготовленные из легко-моющегося полистирола типа ПСМ 525, – съемные.
- 5.2.5 Ножки кресла оснащены резиновыми наконечниками для предотвращения скольжения.
- 5.2.6 Конструкция кресла позволяет устанавливать его над унитазом. Для этого санитарную емкость необходимо снять.

5.3 Кресла исполнений Н005В, Н021В, Н023В и ФС695С (см. рисунок 3)

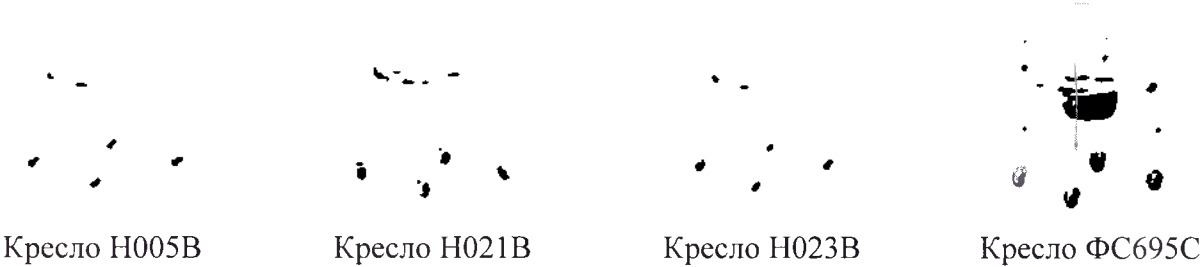


Рисунок 3

- 5.3.1 Металлическая рама кресел (кроме кресла исполнения ФС695С) имеет полимерное покрытие. Рама кресла исполнения ФС695С имеет хромированное покрытие.
 - 5.3.2 Подлокотники кресел – прямые, несъемные, оснащенные пластиковыми накладками из полипропилена марки 01030.
 - 5.3.3 Сиденье и санитарная емкость, изготовленные из легко-моющегося полистирола типа ПСМ 525, – съемные.
 - 5.3.4 Высота сиденья кресла регулируется на пяти уровнях кнопочным фиксатором через каждые 25 мм.
 - 5.3.5 Ножки кресел оснащены колесами, два из которых имеют тормоза, позволяющие надежно зафиксировать кресло в стационарном положении.
- Примечание – При необходимости колеса кресел исполнений Н005В и Н023В могут быть заменены на резиновые наконечники.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

5.3.6 Конструкция кресла позволяет устанавливать его над унитазом. Для этого санитарную емкость необходимо снять.

5.4 Кресла исполнений Н009В и ФС692 (см. рисунок 4)



Кресло Н009В



Кресло ФС692

Рисунок 4

5.4.1 Металлическая рама кресла имеет эмалевое лакокрасочное покрытие.

5.4.2 Подлокотники кресел:

– прямые, несъемные, оснащенные мягкими накладками из ПВХ мягкого Е6250Ж – у кресла исполнение Н009В;

– прямые, съемные, откидывающиеся, оснащенные мягкими накладками из ПВХ мягкого Е6250Ж – у кресла исполнение ФС692;

5.4.3 Сиденье и спинка кресла, изготовленные из искусственной кожи, – съемные.

5.4.4 Подножка – съемная, откидная, регулируемая по высоте.

5.4.5 Ножки кресел оснащены колесами (имеющими цельнолитые шины), два из которых имеют тормоза, позволяющие надежно зафиксировать кресло в стационарном положении.

5.4.6 Конструкция кресла позволяет устанавливать его над унитазом. Для этого санитарную емкость необходимо снять.

						Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6 МАРКИРОВКА

6.1 На каждом кресле прикреплена табличка, на которой указаны:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение кресла;
- номер кресла по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий ТУ 9452-009-13391002-2015;
- знак подтверждения соответствия;
- год изготовления.

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим устойчивость надписей к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации.

6.2 На каждом ящике для транспортирования наклеен ярлык, выполненный печатным способом. На ярлыке указаны:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение кресла;
- год и месяц упаковывания;
- обозначение технических условий ТУ 9452-009-13391002-2015.

6.3 Транспортная маркировка груза – по ГОСТ 14192. На ящик для транспортирования нанесены основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги».

Транспортная маркировка нанесена по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской.

						Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

7 ПОДГОТОВКА КРЕСЛА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1 Кресла исполнений Н020В, ФС810 и ФС813

7.1.1 Установите сиденье.

7.1.2 Установите крышку с задней стороны рамы до щелчка фиксатора.

7.1.3 У кресел исполнений Н020В и ФС810 установите и зафиксируйте спинку в гнезда рамы.


7.1.4 Установите санитарную емкость на опоры рамы под сиденьем.

7.1.5 Установите необходимую высоту сиденья с помощью кнопочных фиксаторов. Для устойчивости выбирайте на всех ножках один и тот же уровень высоты.

7.2 Кресло исполнения ФС899

7.2.1 Кресло поставляется в сложенном виде.

7.2.2 Для раскладывания кресла возьмитесь одной рукой за заднюю направляющую рамы, другой рукой – за переднюю, и разведите их друг от друга до упора. Зафиксируйте данное положение с помощью рычагов фиксаторов, повернув их до упора по часовой стрелке (см. рисунок 5).

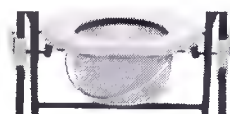

Рычаг фиксатора

Рисунок 5

7.2.3 Установите санитарную емкость на опоры сзади рамы, под сиденьем.

7.2.4 Складывание кресла осуществляется в обратном порядке.

7.3 Кресла исполнений Н005В, Н021В, Н023В и ФС695С

7.3.1 У кресел исполнений Н023В и ФС695С установите переднюю поперечную штангу на левую и правую стороны рамы кресла при помощи пластиковых фиксаторов.

7.3.2 Установите на задней части рамы стульчак, а затем крышку.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

7.3.3 Установите санитарную емкость на дугообразные опоры рамы под сиденье с крышкой.

7.3.4 Установите необходимую высоту сиденья кресла с помощью кнопочных фиксаторов. Для устойчивости выбирайте одинаковую высоту для всех ножек.

7.4 Кресла исполнений Н009В и ФС692

7.4.1 Кресло поставляется в сложенном виде.

7.4.2 Разложите раму кресла исполнения Н009В по ширине, раздвинув по периметру колесные стойки. Зафиксируйте это положение, установив в гнезда рамы спинку до упора; при этом фиксаторы должны защелкнуться.

7.4.3 Наденьте подножку на направляющие, находящиеся на раме и поверните в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия подножки необходимо нажать на рычажок по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

7.4.4 Для установки спинки вставьте ее в соответствующие отверстия на раме до упора до срабатывания фиксаторов.

7.4.5 Установите на раму кресла стульчак, при этом необходимо совместить фиксаторы, расположенные по периметру на стульчаке, с основанием рамы, затем с легким нажимом по периметру стульчака зафиксировать его на раме; поверх положить мягкое сиденье.

7.4.6 Повесьте санитарную емкость на нижние пазы стульчака.

7.4.7 Складывание кресла осуществляется в обратном порядке.

7.4.8 При посадке пациента спереди:

- зафиксируйте тормоза колес кресла;
- сложите вверх подножки;
- переместите пациента в кресло;
- опустите подножки и поставьте на них ноги пациента.

Высадку пациента осуществляйте в обратном порядке.

7.4.9 При посадке пациента сбоку:

- зафиксируйте тормоза колес кресла;
- снимите подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пациент;
- сложите подножки вверх;

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

- переместите пациента в кресло;
- установите подлокотник на место, опустите подножки и поставьте на них ноги пациента.

Высадку пациента осуществляйте в обратном порядке.

	ОПАСНО <i>При посадке больного в кресло и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза.</i> <i>Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение</i>
	ОСТОРОЖНО <i>Запрещается эксплуатация кресла с неисправными тормозами</i>
	ВНИМАНИЕ <i>Сопровождающее лицо может приводить кресло в движение и управлять им с помощью предусмотренной для этого ручки управления.</i> <i>Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло собственными силами.</i> <i>Для парковки используйте тормоза на колесах кресла</i>

							Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			16

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла, необходимо обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя.

	ВНИМАНИЕ <i>Ремонт кресла собственными силами не разрешается</i>
---	---

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 При эксплуатации кресло требует определенного технического ухода.

9.2 Дезинфекцию проводить в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» МУ-287-113, утвержденными 30.12.1998 г. Допускается протирание поверхностей 1 % раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78.

9.3 Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.



ВНИМАНИЕ

Поверхность металлических деталей кресла имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		18

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Кресло, освобожденное от транспортной упаковки, должно храниться при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С, относительной влажности до 80 % при температуре +25 °С.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию и разрушающих покрытия.

10.2 Срок хранения кресла без переконсервации – не более 6 месяцев.

10.3 Кресло в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.4 При транспортировании ящик с креслами должен быть закреплен и защищен от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

10.5 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать следующим:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до +50 °С;
- относительная влажность воздуха 96 % при температуре +35 °С.

10.6 Запрещается опрокидывать на бок, переворачивать и резко бросать упакованное кресло во избежание его повреждения.

10.7 При получении кресла потребитель обязан проверить целостность транспортной упаковки. В случае обнаружения ее повреждения необходимо уведомить об этом транспортную компанию и поставщика.

10.8 По истечении срока службы, а также в случае списания в результате выхода из строя, кресло подлежит утилизации в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

Допускается утилизация кресла вместе с бытовыми отходами.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям, установленным настоящим руководством по эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

11.3 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия-изготовителя или ремонтной организации.

11.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло вплоть до замены его в целом, если за этот срок кресло выйдет из строя или ухудшатся его характеристики, установленные настоящим руководством по эксплуатации.

11.5 Срок службы кресла – 5 лет.

						Лист
						20
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» _____, заводской номер _____, соответствует техническим условиям ТУ 9452-009-13391002-2015 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» _____, заводской номер _____, упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 В случае отказа кресла в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке кресла, потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип кресла, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта (или некомплектности);
- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, номер телефона.

14.2 Рекламации направлять по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А.

14.3 Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующими условиями поставки продукции.

14.4 Лист регистрации рекламаций

Содержание	Меры, принятые по рекламации	Подпись лица, ответственного за ремонт

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

1. Наименование изделия: Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» _____.

2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи _____

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец: _____ (_____)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

1. Наименование изделия: Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» _____.

2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи _____

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец: _____ (_____)

М.П.

						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		24

Лист регистрации изменений

[illegible]

						Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

