



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»




О.С. Данилова
2016г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Матрац противопрележневый
«АРМЕД»,
в вариантах исполнения:*



СП-1

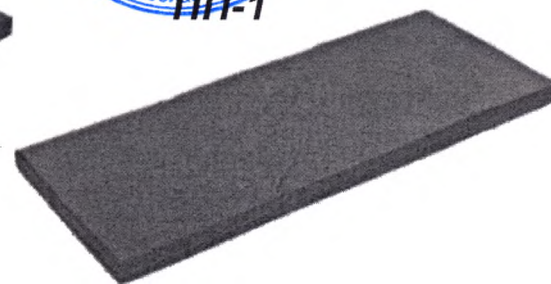

ПП-1



ДП-1



ПС-1

по ТУ 9396-013-13391002-2015

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

Настоящее Руководство по эксплуатации разработано фирмой производителем - Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственным центром медицинской техники «АРМЕД».

Настоящее Руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием, паспортом медицинского изделия и инструкцией по эксплуатации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матрац противопролежневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015 (далее по Руководству - матрац) предназначен для предотвращения образования пролежней при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата.

Матрац используется в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), в домашних условиях.

Дополнительно матрац может использоваться для равномерного распределения веса, а также для снятия нагрузки с позвоночника, суставов и мышечной системы организма во время сна за счет поддержки различных частей тела.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Профилактика возникновения пролежней;
- Пролежни;
- Реабилитация лежащих больных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Травмы позвоночника и спинного мозга и скелетные вытяжения;
- Аллергические реакции на материалы матраца;
- Различные заболевания поясничного и грудного отделов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	СП-1	ПП-1	ДП-1	ПС-1
Габариты (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	1950x800x80	1950x800x110	1300x800x80	1910x800x80
Масса (нетто/брутто) ($\pm 5\%$), кг	13/14,7	14,5/16,3	7,5/9	12,1/13,7
Допустимая нагрузка, кг	125	130	75	125

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Избегайте контакта матраца с острыми и колющими предметами;
- Не размещайте посторонние предметы между матрацем и пользователем;
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на матрац;
- Для предотвращения деформации матраца не следует скручивать или складывать;
- При температуре воздуха ниже 1 °С возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не

рекомендуется использовать матрац при температуре ниже 1 °С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются при комнатной температуре в течение 2 часов;

- Во избежание потери противопротезного эффекта не рекомендуется использовать другие чехлы для матраца;
- Запрещается прыгать и ходить по матрацу, в том числе и детям;
- Берегите матрац от попадания агрессивных жидкостей и химикатов, горячих предметов и огня;
- Используйте матрац на ровной горизонтальной поверхности или на качественном ортопедическом основании;
- Не превышайте допустимую нагрузку на матрац;
- Меняйте положение голова-ноги у матраца раз в 1-3 месяца. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.

Классификация:

- По потенциальному риску применения матрац относится к классу 1;
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 167990;
- Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия - 93 9679.

ОПИСАНИЕ

Все варианты исполнения матраца состоят из трех формообразующих секций. Формообразующие секции изготовлены из 100% пенополиуретана.

Верхняя поверхность секций матраца состоит из отдельных квадратных ячеек. Ячейки обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха и равномерное распределение массы тела не только из-за уникальных свойств пенополиуретана, но и благодаря воздушным потокам между ячейками.

Наличие отдельных ячеек у секций обеспечивает противопрележневый эффект (рис. 1, 2).

Профиль матраца способствует равномерному распределению давления и снижению нагрузки на поверхность тела.

Чехол, варианты исполнения:

из дублированной ПВХ ткани на основе лавсана, из медицинской барьерной ткани с полиуретановым покрытием.*

Матрац изготавливается в четырех основных исполнениях:

- СП-1 и ПС-1 - противопрележневые матрацы длина матрацев рассчитана на стандартную длину - для модели СП-1 - 1950 мм, для модели ПС-1 - 1910 мм. Ширина матрацев моделей СП-1 и ПС-1 - 800 мм, высота - 80 мм.

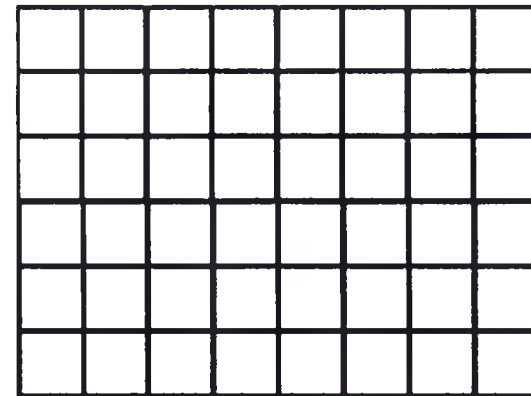


Рис. 1

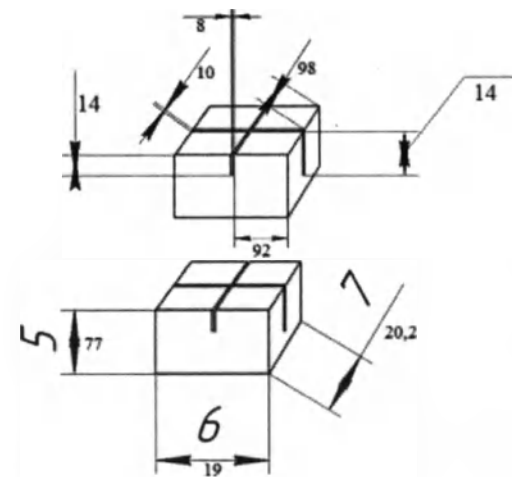


Рис. 2

- ПП-1 - матрац противопролежневый с увеличенной высотой. Данный матрац отличается повышенной допустимой нагрузкой и большей высотой в сравнении с другими моделями. Длина матраца - 1950 мм, ширина - 800 мм, высота - 110 мм .

- ДП-1 - матрац противопролежневый детский. Данный матрац отличается меньшими габаритами и допустимой нагрузкой, он рассчитан на детей. Длина матраца - 1300 мм, ширина - 800 мм, высота - 80 мм.

* - вариант чехла согласовывается покупателем с продавцом при заказе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для подготовки матраца к эксплуатации необходимо упаковать формообразующие секции в чехол и аккуратно застегнуть молнию.

Матрац должен располагаться на кроватном основании или на ровной жесткой горизонтальной поверхности, выдерживающей допустимую нагрузку матраца.

Эксплуатируйте матрац, учитывая указанные меры безопасности, в следующих условиях:

Влажность: до 85%

Температура: от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия

Давление: не более 785 мм.рт.ст.

УХОД

ОЧИСТКА МАТРАЦА (ФОРМООБРАЗУЮЩИХ СЕКЦИЙ):

Снимите чехол.

С помощью губки и мягкой кисточки вымойте формообразующие секции со всех сторон.

Протрите сухой мягкой тканью и дайте полностью высохнуть на воздухе, вдали от отопительных приборов и источников открытого огня или на открытом воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Производите очистку матраца периодически, по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 2 недели.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- НЕ стирайте формообразующие секции в стиральной машине;
- НЕ используйте для очистки абразивные материалы и чистящие средства;
- НЕ используйте чистящие средства содержащие органические растворители, бензин, нефть, ацетон, толуол, растворители и прочие агрессивные жидкости
- НЕ автоклавируйте и не подвергайте формообразующие секции при воздействии температуры выше + 65 °C и давлению выше атмосферного;
- НЕ подвергайте формообразующие секции ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

ОЧИСТКА ЧЕХЛА ИЗ ДУБЛИРОВАННОЙ ПВХ ТКАНИ НА ОСНОВЕ ЛАВСАНА:

- Стирать его можно как ручным способом, так и в стиральной машине;
- Используйте машинную стирку при температуре не выше 40 °С с мягким моющим средством, на деликатном режиме;
- Не используйте отбеливатели и органические растворители;
- Просушите чехол на воздухе.

ОЧИСТКА ЧЕХЛА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ БАРЬЕРНОЙ ТКАНИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ:

- Стирать его можно как ручным способом, так и в стиральной машине;
- Используйте машинную стирку при температуре не выше 90 °С с мягким моющим средством, на деликатном режиме;
- При необходимости могут быть использованы отбеливатели;
- Просушите чехол на воздухе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Матрац не требует специального технического обслуживания.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Чехол из дублированной ПВХ ткани на основе лавсана устойчив к санитарной обработке с помощью дезинфицирующих средств по ГОСТ 14193 и моющих средств по ГОСТ 25644 при температуре не более 40°C. Чехол из медицинской барьерной ткани с полиуретановым покрытием должен быть стойким к санитарной обработке и моющих средств при тем. до +90°C, возможно обработка хлорсодержащими средствами.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Матрац не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация матраца осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Матрац в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +1 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

Матрац транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от +1 °С до +40 °С.

Транспортировка и хранение матраца без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность матраца. Повреждения матраца, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В состав изделия входят:

Секция формообразующая в чехле _____ 3 шт.

Чехол, в одном из вариантов исполнения: _____ 1 шт.

из дублированной ПВХ ткани на основе лавсана

из медицинской барьерной ткани с полиуретановым покрытием

Сумка упаковочная _____ 1 шт.

Руководство по эксплуатации _____ 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Матрац противопролежневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на матрац противопролежневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015 – 6 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантия распространяется только на производственный брак!

На расходные материалы и быстроизнашивающиеся части (чехол) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А, тел.: (495) 989-12-88

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Матрац противопролежневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015 серийный номер _____, соответствует техническим условиям _____ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Матрац противопрележневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015 заводской номер _____, упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Наименование изделия: матрац противопролежневый «АРМЕД», в вариантах исполнения: СП-1, ПП-1, ДП-1, ПС-1 по ТУ 9396-013-13391002-2015
2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на производственный брак!

Срок гарантии 6 месяцев

Дата продажи _____

Мы гарантируем, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных повреждений на момент осуществления продажи.

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец: тел: (495) 989-12-89 (_____)

М.П.



Принят 15 июля
2008 г. № 17 "АРЕЛ"