



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПЦ МТ «АРМЕД»



О.С. Данилова

«8» Октября 2015г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Трость опорная «АРМЕД» в различных
вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015*

ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S;
ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S;
ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S;
ФС821-М-УПС-В-2;
ФС821-М-УПС-В-3;
ФС821-М-УПС-В-4;
ФС821-М-УПС-В-5;
ФС821-М-УПС-В-6;
ФС821-М-УПС-В-7;
ФС821-М-УПС-В-8;
ФС821-М-УПС-В-9;
ФС821-М-УПС-В-10;
ФС821-М-УПС-В-11;
ФС821-М-УПС-В-14;
ФС821-М-УПС-Н-2;

ФС821-М-УПС-Н-3;
ФС821-М-УПС-Н-4;
ФС821-М-УПС-Н-5;
ФС821-М-УПС-Н-6;
ФС821-М-УПС-Н-7;
ФС821-М-УПС-Н-8;
ФС821-М-УПС-Н-9;
ФС821-М-УПС-Н-10;
ФС821-М-УПС-Н-11;
ФС821-М-УПС-Н-14;
ФС821-М-2;
ФС821-М-3;
ФС821-М-4;
ФС821-М-5;
ФС821-М-6;

ФС821-М-7;
ФС821-М-8;
ФС821-М-9;
ФС821-М-10;
ФС821-М-11;
ФС821-М-14;
ФС821-М3-12;
ФС821-М3-13;
ФС910-М-УПС-Н-14;
ФС910-М-14;
ФС920-М-УПС-В-15;
ФС920-М-УПС-Н-15;
ФС920-М-15;
ФС929-М-УПС-В-16;
ФС929-М-УПС-Н-16;

ФС929-М-16;
ФС927-М-УПС-Н-17;
ФС927-М-17;
ФС9206-М-УПС-Н-18;
ФС9206-М-18

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трость опорная «АРМЕД» в различных вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015 (далее по Руководству - трость) предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями, для сохранения равновесия и поддержки собственного веса при ходьбе.

Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.

Трость изготавливается в различных вариантах исполнения: ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-М-УПС-В-2, ФС821-М-УПС-В-3, ФС821-М-УПС-В-4, ФС821-М-УПС-В-5, ФС821-М-УПС-В-6, ФС821-М-УПС-В-7, ФС821-М-УПС-В-8, ФС821-М-УПС-В-9, ФС821-М-УПС-В-10, ФС821-М-УПС-В-11, ФС821-М-УПС-В-14, ФС821-М-УПС-Н-2, ФС821-М-УПС-Н-3, ФС821-М-УПС-Н-4, ФС821-М-УПС-Н-5, ФС821-М-УПС-Н-6, ФС821-М-УПС-Н-7, ФС821-М-УПС-Н-8, ФС821-М-УПС-Н-9, ФС821-М-УПС-Н-10, ФС821-М-УПС-Н-11, ФС821-М-УПС-Н-14, ФС821-М-2, ФС821-М-3, ФС821-М-4, ФС821-М-5, ФС821-М-6, ФС821-М-7, ФС821-М-8, ФС821-М-9, ФС821-М-10, ФС821-М-11, ФС821-М-14, ФС821-М3-12, ФС821-М3-13, ФС910-М-УПС-Н-14, ФС910-М-14, ФС920-М-УПС-В-15, ФС920-М-УПС-Н-15, ФС920-М-15, ФС929-М-УПС-В-16, ФС929-М-УПС-Н-16, ФС929-М-16, ФС927-М-УПС-Н-17, ФС927-М-17, ФС9206-М-УПС-Н-18, ФС9206-М-18

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Заболевания, последствия травм, деформация костей нижней конечности, таза, позвоночника при наличии болевого синдрома;
- Врожденная деформация стопы;
- Эндопротезирование сустава нижней конечности;
- Выраженные нарушения функции ходьбы и стояния;
- Умеренный гемипарез.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей;
- Выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/ Параметр	УПС	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Высота, мм	Матери ал	Покрыт ие*	Масса, кг
ФС821-Д-УПС-В-1							
размер L	встроенное	110	бук	960	дерево	1	0,44
размер M	встроенное	110	бук	905	дерево	1	0,4
размер S	встроенное	110	бук	850	дерево	1	0,36
ФС821-Д-УПС-Н-1							
размер L	накладное	110	бук	950	дерево	1	0,54
размер M	накладное	110	бук	895	дерево	1	0,5
размер S	накладное	110	бук	840	дерево	1	0,46
ФС821-Д-1							
размер L	-	110	бук	940	дерево	1	0,38
размер M	-	110	бук	885	дерево	1	0,36
размер S	-	110	бук	830	дерево	1	0,34
ФС821-М-УПС-В-2	встроенное	110	светлое дерево	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-3	встроенное	110	розовая с цветами	725-970	металл	3	0,39

Модель/ Параметр	УПС	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Высота, мм	Матери ал	Покрыт ие*	Масса, кг
ФС821-М-УПС-В-4	встроенное	110	темное дерево	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-5	встроенное	110	черная крокодиловая	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-6	встроенное	110	красная с цветами	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-7	встроенное	110	серебристая с цветами	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-8	встроенное	110	синяя с цветами	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-9	встроенное	110	фиолетово-синяя	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-10	встроенное	110	светло-синяя с цветами	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-11	встроенное	110	белая с цветами	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-В-14	встроенное	110	бронза	725-970	металл	3	0,39
ФС821-М-УПС-Н-2	накладное	110	светлое дерево	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-3	накладное	110	розовая с цветами	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-4	накладное	110	темное дерево	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-5	накладное	110	черная крокодиловая	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-6	накладное	110	красная с цветами	725-970	металл	3	0,49

Модель/ Параметр	УПС	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Высота, мм	Матери ал	Покрыт ие*	Масса, кг
ФС821-М-УПС-Н-7	накладное	110	серебристая с цветами	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-8	накладное	110	синяя с цветами	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-9	накладное	110	фиолетово-синяя	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-10	накладное	110	светло-синяя с цветами	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-11	накладное	110	белая с цветами	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-УПС-Н-14	накладное	110	бронза	725-970	металл	3	0,49
ФС821-М-2	-	110	светлое дерево	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-3	-	110	розовая с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-4	-	110	темное дерево	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-5	-	110	черная крокодиловая	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-6	-	110	красная с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-7	-	110	серебристая с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-8	-	110	синяя с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-9	-	110	фиолетово-синяя	725-970	металл	3	0,35

Модель/ Параметр	УПС	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Высота, мм	Матери ал	Покрыт ие*	Масса, кг
ФС821-М-10	-	110	светло-синяя с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-11	-	110	белая с цветами	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М-14	-	110	бронза	725-970	металл	3	0,35
ФС821-М3-12	-	110	темно-розовая	790-1000	металл	3	0,4
ФС821-М3-13	-	110	серебро	790-1000	металл	3	0,4
ФС910-М-УПС-Н-14	накладное	110	бронза	900	металл	2	0,45
ФС910-М-14	-	110	бронза	900	металл	2	0,35
ФС920-М-УПС-В-15	встроенное	110	серебристый металлик	700-925	металл	2	0,45
ФС920-М-УПС-Н-15	накладное	110	серебристый металлик	700-925	металл	2	0,5
ФС920-М-15	-	110	серебристый металлик	700-925	металл	2	0,4
ФС929-М-УПС-В-16	встроенное	110	черный	720-945	металл	3	0,4
ФС929-М-УПС-Н-16	накладное	110	черный	720-945	металл	3	0,45
ФС929-М-16	-	110	черный	720-945	металл	3	0,35

Модель/ Параметр	УПС	Макс. нагрузка, кг	Цвет	Высота, мм	Матери ал	Покрыт ие*	Масса, кг
ФС927-М-УПС-Н-17	накладное	110	светло-коричневый	800-900	металл	3	0,45
ФС927-М-17	-	110	светло-коричневый	800-900	металл	3	0,35
ФС9206-М-УПС-Н-18	накладное	110	темно-оранжевый	710-935	металл	3	0,41
ФС9206-М-18	-	110	темно-оранжевый	710-935	металл	3	0,31

*Покрытия опорной стойки тростей в следующих исполнениях:

1 - лакокрасочное покрытие;


2 - гальваническое покрытие;

3 - полимерное порошковое покрытие.

Допустимые отклонения по массе - в пределах 5 %.

Модель	Фото	Модель	Фото	Модель	Фото
ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S		ФС821-М-УПС-В-3		ФС821-М-УПС-В-7	
ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S		ФС821-М-УПС-В-4		ФС821-М-УПС-В-8	
ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S		ФС821-М-УПС-В-5		ФС821-М-УПС-В-9	
ФС821-М-УПС-В-2		ФС821-М-УПС-В-6		ФС821-М-УПС-В-10	

Модель	Фото	Модель	Фото	Модель	Фото
ФС821-М-УПС-В-11		ФС821-М-УПС-Н-4		ФС821-М-УПС-Н-8	
ФС821-М-УПС-В-14		ФС821-М-УПС-Н-5		ФС821-М-УПС-Н-9	
ФС821-М-УПС-Н-2		ФС821-М-УПС-Н-6		ФС821-М-УПС-Н-10	
ФС821-М-УПС-Н-3		ФС821-М-УПС-Н-7		ФС821-М-УПС-Н-11	

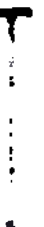Модель	Фото	Модель	Фото	Модель	Фото
ФС821-М-УПС-Н-14		ФС821-М-5		ФС821-М-9	
ФС821-М-2		ФС821-М-6		ФС821-М-10	
ФС821-М-3		ФС821-М-7		ФС821-М-11	
ФС821-М-4		ФС821-М-8		ФС821-М-14	

Модель	Фото	Модель	Фото	Модель	Фото
ФС821-М3-12		ФС821-М3-13		ФС910-М-УПС-Н-14	
ФС910-М-14		ФС929-М-УПС-В-16		ФС927-М-17	
ФС920-М-УПС-В-15		ФС929-М-УПС-Н-16		ФС9206-М-УПС-Н-18	
ФС920-М-УПС-Н-15		ФС929-М-16		ФС9206-М-18	

Модель	Фото	Модель	Фото	Модель	Фото
ФС920-М-15		ФС927-М-УПС-Н-17			

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием необходимо проверить наконечник на предмет повреждений. Не используйте неисправную трость.
2. Проверяйте, плотно ли защелкнут фиксирующий элемент.
3. Во время ходьбы держите трость максимально вертикально.
4. Не ставьте трость слишком далеко от себя.
5. Используйте трость только по прямому назначению. Не вешайте на трость сумки, пакеты и т.д.
6. При спуске или подъеме по лестнице всегда держитесь свободной рукой за поручень.
7. Зимой выходите на улицу с тростью, оснащенной устройством против скольжения.
8. Передвигайтесь очень осторожно по кафелю и незакрепленным коврам и половичкам.
9. В случае падения постарайтесь откинуть трость в сторону, чтобы не упасть на нее.
10. Не превышайте максимальную нагрузку на трости.
11. Не использовать трость с открытым устройством против скольжения на каменных и твердых поверхностях.
12. Не использовать трость с открытым устройством против скольжения в помещениях.

ОПИСАНИЕ

Трость представляет собой приспособление в виде стержня из металла или дерева для опоры при ходьбе с ручкой и упором на кисть. Трость обеспечивает увеличение площади опоры при ходьбе и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону. Способствует симметричности тела при ходьбе.

Все модели тростей исполнения ФС821, кроме моделей ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S - двухсекционные, оснащены возможностью регулировки высоты. Трости имеют 9 ступенчатых регулировок по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора с шагом регулировки каждые 25 мм.

Высота моделей ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S - фиксированная.

Трости защищены от внешних воздействия, благодаря покрытию, указанному в разделе технических характеристик.

Т-образная рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

Опорная насадка-наконечник - резиновая, прочная, нескользящая, сменная. Регулярно проверяйте и своевременно заменяйте насадку-наконечник трости.

Трости ФС920-М-УПС-В-15, ФС920-М-УПС-Н-15, ФС920-М-15, ФС929-М-УПС-В-16, ФС929-М-УПС-Н-16, ФС929-М-16, ФС9206-М-УПС-Н-18, ФС9206-М-18 - двухсекционные, оснащены возможностью регулировки по высоте. Имеют 10 ступенчатых регулировок по высоте с помощью

надежного кнопочного фиксатора. Шаг регулировки каждые 25 мм.

Трости ФС910-М-УПС-Н-14, ФС910-М-14 - односекционные.

Трости ФС927-М-УПС-Н-17, ФС927-М-17 имеют 5 уровней ступенчатых регулировок по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора с шагом регулировки каждые 25 мм.

Конструкция тростей обеспечивает комфорт и устойчивость.

ПОДБОР РАЗМЕРА

чтобы определить правильную длину трости, нужно встать прямо, не снимая обуви. Опустить руки по бокам. Длина трости должна равняться расстоянию от линии изгиба запястья до пола. Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките трость из упаковки.

Все модели, за исключением моделей ФС927-М-УПС-Н-17, ФС927-М-17 поставляются в собранном виде.

Раскладывание моделей ФС927-М-УПС-Н-17, ФС927-М-17

Извлеките части стойки трости из упаковки и разложите их на ровной поверхности. Соберите сначала нижнюю часть трости. Для этого необходимо установить каждое очередное колено стойки до упора в муфту предыдущего (рис. 1). Далее возьмите верхнюю часть трости, с ручкой, на немного отпустите контргайку с накаткой, соедините обе части стойки, нажмите кнопку фиксатора и установите требуемую высоту трости, при этом кнопка фиксатора должна выскочить из одного отверстий (рис. 1). Дополнительно зафиксируйте выбранную высоту трости контргайкой.

Разборка производится в обратном порядке.

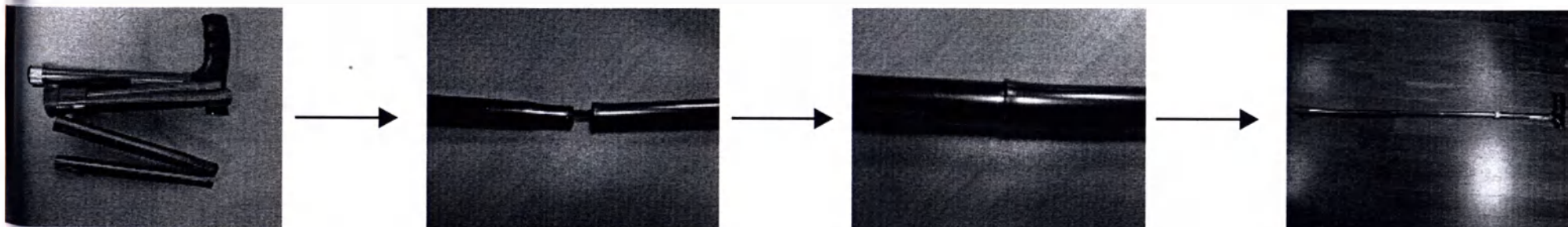


Рисунок 1

Регулировка высоты тростей (кроме моделей ФС821-Д-УПС-В-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-УПС-Н-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС821-Д-1, 3-х типоразмеров: L, M, S, ФС910-М-УПС-Н-14, ФС910-М-14).

Отрегулируйте с помощью кнопочного фиксатора высоту тростей. Фиксатор должен полностью выскочить из отверстия (рис. 2).

Установка УПС (для моделей с накладным УПС)

Установите УПС на стойку так, чтобы зубчатый фланец сел в нишу резинового наконечника, далее, используя скобу и два винта М5, надежно зафиксируйте его на стойке (рис. 3).

Для выдвигания встроенного УПС сместите головку стопора в сторону наконечника до упора, затем поверните ее против часовой стрелки до щелчка фиксатора, чтобы задвинуть УПС, сместите головку стопора в ту же сторону, поверните по часовой стрелке и под действием пружины механизм вернется в первоначальное положение.



Рисунок 2

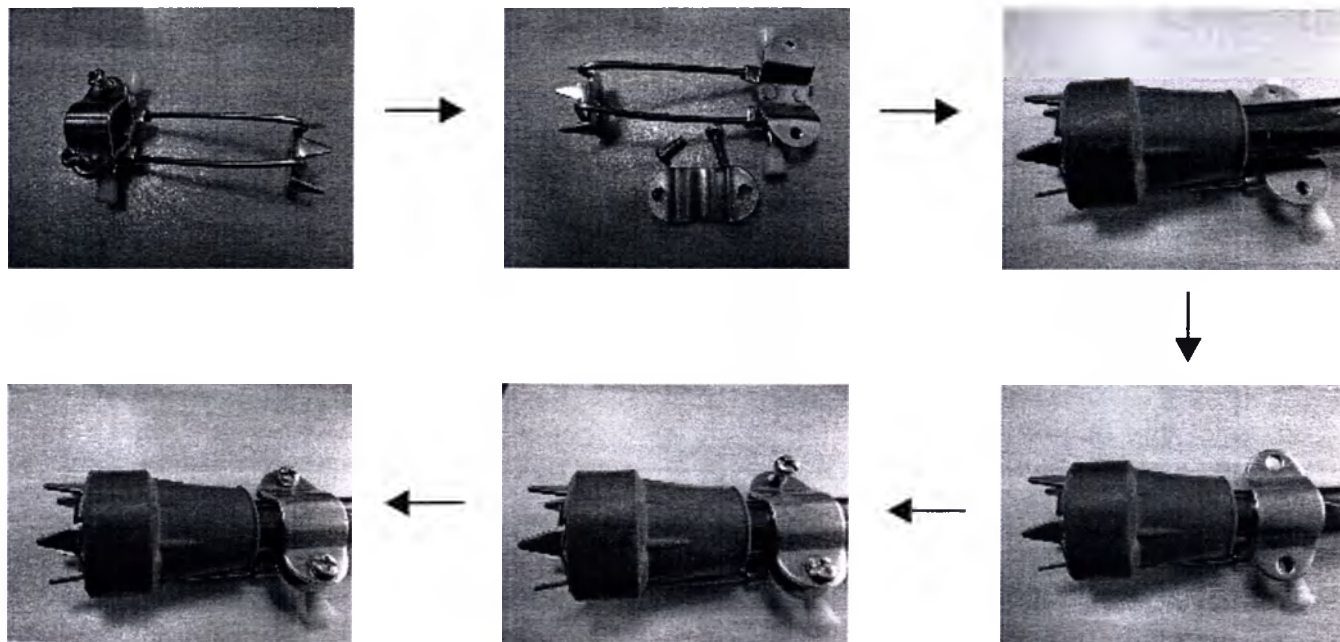


Рисунок 3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Условия эксплуатации тростей:

- температура окружающего воздуха от минус 40°С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25°С;
- атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм тр. ст.)

Передвижение с помощью трости:

Для ортопедно-травматологических больных, с нарушенной функцией одной из нижних конечностей: трость удерживается кистью, противоположенной по стороне травмированной (больной) нижней конечности.

Если у вас болит левая нога, то трость следует держать в правой руке. Если у вас болит правая нога, тогда вам нужно держать трость в левой руке.

Когда вы делаете шаг больной ногой, перемещайте трость вперед и опирайте свой вес одновременно и на нее, и на больную ногу, позволяя трости поглощать большую нагрузку, чем нога (рис. 4). Не используйте трость, когда вы наступаете на здоровую ногу.

Чтобы подниматься с тростью по ступенькам:

Держитесь рукой за перила (при наличии), переложив трость в другую руку. Сделайте первый шаг здоровой ногой, а затем поднимите больную ногу на ту же ступеньку.

Повторяйте снова.



Рисунок 4

Чтобы спуститься по ступенькам вниз с тростью:

Держитесь рукой за перила (при наличии), переложив трость в другую руку.

Сделайте первый шаг здоровой ногой и тростью одновременно, а затем опустите на ступеньку больную ногу.

Повторяйте снова.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Влажная обработка растворами нейтральных моющих средств или раствором детского мыла, без применения абразивных чистящих средств.

Периодически (раз в три месяца) необходимо проводить дезинфекцию трости в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей (например, 3% медицинской перекисью водорода) по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется специального технического обслуживания.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Трость не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация трости и накладного УПС осуществляется как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790, в домашних условиях - вместе с бытовыми отходами.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Трость в упаковке завода-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до + 40 °С, относительной влажности не более 95%.
2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
3. Трость транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки: температура окружающего воздуха от минус 40°С до + 40 °С, относительная влажность воздуха до 95% при температуре + 25°С, атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа (от 630 до 800 мм тр. ст.)

4. Транспортировка и хранение трости без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность трости. Повреждения трости, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.
5. Трости не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Утилизация тростей осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель	Трость	УПС	Руководство
ФС821-Д-УПС-В-1			
размер L	1	-	1
размер M	1	-	1
размер S	1	-	1
ФС821-Д-УПС-Н-1			
размер L	1	1	1
размер M	1	1	1
размер S	1	1	1
ФС821-Д-1			
размер L	1	-	1
размер M	1	-	1
размер S	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-2	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-3	1	-	1

Модель	Трость	УПС	Руководство
ФС821-М-УПС-В-4	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-5	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-6	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-7	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-8	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-9	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-10	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-11	1	-	1
ФС821-М-УПС-В-14	1	-	1
ФС821-М-УПС-Н-2	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-3	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-4	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-5	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-6	1	1	1

Модель	Трость	УПС	Руководство
ФС821-М-УПС-Н-7	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-8	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-9	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-10	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-11	1	1	1
ФС821-М-УПС-Н-14	1	1	1
ФС821-М-2	1	-	1
ФС821-М-3	1	-	1
ФС821-М-4	1	-	1
ФС821-М-5	1	-	1
ФС821-М-6	1	-	1
ФС821-М-7	1	-	1
ФС821-М-8	1	-	1
ФС821-М-9	1	-	1

Модель	Трость	УПС	Руководство
ФС821-М-10	1	-	1
ФС821-М-11	1	-	1
ФС821-М-14	1	-	1
ФС821-М3-12	1	-	1
ФС821-М3-13	1	-	1
ФС910-М-УПС-Н-14	1	1	1
ФС910-М-14	1	-	1
ФС920-М-УПС-В-15	1	-	1
ФС920-М-УПС-Н-15	1	1	1
ФС920-М-15	1	-	1
ФС929-М-УПС-В-16	1	-	1
ФС929-М-УПС-Н-16	1	1	1
ФС929-М-16	1	-	1

Модель	Трость	УПС	Руководство
ФС927-М-УПС-Н-17	1	1	1
ФС927-М-17	1	-	1
ФС9206-М-УПС-Н-18	1	1	1
ФС9206-М-18	11	-	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Трость опорная «АРМЕД» в различных вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015 _____ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

На расходные материалы и быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А, тел.: (495) 989-12-88

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трость опорная «АРМЕД» в различных вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015
_____ серийный номер _____, соответствует техническим условиям
_____ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Трость опорная «АРМЕД» в различных вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015
_____ серийный номер _____, упакована на предприятии-
изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Наименование изделия: Трость опорная «АРМЕД» в различных вариантах исполнения по ТУ 9396-011-13391002-2015 _____
2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
4. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на производственный брак!

Срок гарантии 6 месяцев

Дата продажи _____

Мы гарантируем, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических повреждений на момент осуществления продажи.

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец: тел: (495) 989-12-89 (_____)

М.П.



О.С. Данилов