

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Общество
с ограниченной ответственностью
«Приоритет»



Прикладовская Т.П.

«15» апреля 2024 г.

Инструкция по применению

Изделия медицинские одноразовые впитывающие для взрослых
страдающих недержанием OVIE CARE® по ТУ 32.50.50-014-31917593-2023

1. Наименование медицинского изделия.

Изделия медицинские одноразовые впитывающие для взрослых страдающих недержанием OVIE CARE® по ТУ 32.50.50-014-31917593-2023, в вариантах исполнения:

I. Варианты исполнения:

- 1.Подгузники- трусы для взрослых размер M (Medium) (вид 233900) - 10/30 шт. в уп.;
- 2.Подгузники- трусы для взрослых размер L (Large) (вид 233900) - 10/30 шт. в уп.;
- 3.Подгузники- трусы для взрослых размер XL (ExtraLarge) (вид 233900) - 10/30 шт. в уп.;
- 4.Подгузники для взрослых размер M (Medium) (вид 280360) - 10/30 шт. в уп.;
- 5.Подгузники для взрослых размер L (Large) (вид 280360) - 10/30 шт. в уп.;
- 6.Подгузники для взрослых размер XL (ExtraLarge) (вид 280360) - 10/30 шт. в уп.;

II. Инструкция по применению – 1 шт. в уп.

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица с транслитерацией, или фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет»
Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	ООО «Приоритет»
Фирменное наименование юридического лица (при наличии)	-
Идентификационный номер налогоплательщика	7811249320
Адрес места нахождения юридического лица	192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.33 литер А, помещение 409.
Номера телефонов	+7(800)-222-10-05
Адрес электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)	info@prioritet-spb.ru
Место производства медицинского изделия	Quanzhou Tianjiao Lady&Baby's Hygiene Supply Co. Ltd., 161 Wanhong Road, Shuangyang, Overseas Chinese Economic-Develop Area, Luojiang, Quanzhou, Fujian, P.R.China

3. Область применения медицинского изделия.

Гипургия. Применение подгузников является профилактикой развития пролежней у лежачих больных и защитой от загрязнений постельного белья для мужчин и женщин в домашних условиях, а также в условиях лечебно-профилактических учреждений.

4. Назначение медицинского изделия.

Изделия медицинские одноразовые впитывающие для взрослых страдающих недержанием OVIE CARE® по ТУ 32.50.50-014-31917593-2023 (далее по тексту - «подгузник» или «изделия»), предназначены для впитывания и удержания мочи у людей с легкой, средней и тяжелой степенью недержания, в том числе лежачих больных.

5. Показания к применению медицинского изделия.

- недержание мочи;
- частичная или полная обездвиженность;
- нарушениях в работе и/или дисфункции мочевыделительной системы и почек.

6. Противопоказания при применении медицинского изделия.

Заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции.

7. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Чрезвычайно важно правильно подобрать соответствующий размер подгузника.
- Время использования до 6 ч или по мере наполнения.
- Хранить в сухом, недоступном для детей месте.

8. Возможные побочные действия при использовании изделия.

возможно возникновение контактного дерматита на участках тела, закрытых подгузником. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

9. Технические данные

9.1. В зависимости от обхвата талии/бедер человека изготавливают подгузники указанных в таблице 1 групп.

Таблица 1

Группа подгузников/подгузников-трусов	Размер	Размерный ряд по обхвату талии/бедер, см
Средние	M	до 120
Большие	L	до 150
Сверхбольшие	XL	до 175

9.2 В зависимости от количества впитываемой жидкости изготавливают подгузники следующих видов:

- для людей с легкой степенью недержания (далее - подгузник для легкой степени недержания) варианты исполнения подгузники-трусы для взрослых размер M (Medium), размер L (Large), размер XL (ExtraLarge);
- для людей со средней степенью недержания (далее - подгузник для средней степени недержания) варианты исполнения подгузники-трусы для взрослых размер M (Medium),

размер L (Large), размер XL (ExtraLarge) и подгузники для взрослых размер M (Medium), размер L (Large), размер XL(ExtraLarge);

- для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания) варианты исполнения подгузники для взрослых размер M (Medium), размер L (Large), размер XL (ExtraLarge).

9.3 Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой, состоящий из не менее двух впитывающих слоев;
- защитный слой;
- нижний покровный слой;
- барьерные элементы (два вертикальных влагонепроницаемых барьера по бокам подгузника и три анатомические резинки вокруг ног);
- фиксирующие элементы (застежки-«липучки» - не менее 2, эластичный пояс);
- индикатор наполнения подгузника.

Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

9.4 Подгузники изготавливают в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).

9.5 Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников изготавливают с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

9.6 В подгузниках нет внешних дефектов - механических повреждений (разрыв краев, разрезов, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.

9.7 Печатное изображение на подгузниках четкое, без искажений и пробелов. Нет следов выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

9.8 Конструкция, линейные размеры подгузников соответствуют ГОСТ 31396 и 31399. Размеры подгузников-трусиков указаны в таблице 2.1, подгузников в таблице 2.2.

Таблица 2.1*

Компонент	Подгузники-трусы для взрослых размер M (Medium)		
	Размер (шхд), мм	Плотность (г/м ²)	Масса, г
целлюлозная вата	400x505	-	17,640
абсорбирующий слой	150x490	-	12,500
верхняя оболочка впитывающего слоя	600x130	10	0,823
нижняя оболочка впитывающего слоя	600x220	10	1,294

внешний распределительный слой	160x550	15	1,320
слой сбора и распределения	80 x350	35	0,980
защитный слой	600x320	13	2,288
верхний покровный слой	600x 620		5,580
нижний покровный слой	600x870	15	7,830
боковой слой из нетканого материала для впитывающего слоя	600x170	9	0,936
клей для структурных элементов	-	-	1,125
клей для эластичных элементов	-	-	1,209
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,037
Всего изделия	600x760	-	53,0
Подгузники-трусы для взрослых размер L (Large)			
целлюлозная вата	400x505	-	19,966
абсорбирующий слой	150x490	-	13,500
верхняя оболочка впитывающего слоя	710x140	10	0,823
нижняя оболочка впитывающего слоя	710x220	10	1,294
внешний распределительный слой	160x550	15	1,320
слой сбора и распределения	90 x350	35	0,980
защитный слой	710x320	13	2,288
верхний покровный слой	710x 650	15	6,923
нижний покровный слой	710x910	15	9,692
боковой слой из нетканого материала для впитывающего слоя	710x190	9	1,108
клей для структурных элементов	-	-	1,183

клей для эластичных элементов	-	-	1,399
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,037
Всего изделия	710x800	-	59,5
Подгузники- трусы для взрослых размер XL (ExtraLarge)			
целлюлозная вата	400x505	-	20,026
абсорбирующий слой	150x560	-	14,500
верхняя оболочка впитывающего слоя	830x155	7	0,941
нижняя оболочка впитывающего слоя	830x220	8	1,478
внешний распределительный слой	160x620	15	1,488
слой сбора и распределения	105 x350	25	0,980
защитный слой	830x320	10	2,579
верхний покровный слой	830x700	15	8,715
нижний покровный слой	830x970	15	12,077
боковой слой из нетканого материала для впитывающего слоя	830x180	9	1,295
клей для структурных элементов	-	-	1,433
клей для эластичных элементов	-	-	1,405
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,042
Всего изделия	830x860	-	64,0

Таблица 2.2

Компонент	Подгузники для взрослых размер M (Medium)		
	Размер (шхд), мм	Плотность (г/м ²)	Масса, г
целлюлозная вата в верхней части впитывающего слоя	-	-	14,0

целлюлозная вата в нижней части впитывающего слоя	-	-	27,99
абсорбирующий слой	230x580	-	7,0
верхняя оболочка впитывающего слоя	155x390	24	1,479
нижняя оболочка впитывающего слоя	175x580	15	1,479
внешний распределительный слой	300x800	15	3,72
защитный слой	570x800	13	5,928
верхний покровный слой	230x800	15	2,76
нижний покровный слой	650x800	13	6,76
фронтальная лента	120x480	23	1,32
клей для структурных элементов	-	-	1,932
клей для эластичных элементов	-	-	0,570
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,032
Всего изделия	650x800	-	84,3
Подгузники для взрослых размер L (Large)			
целлюлозная вата в верхней части впитывающего слоя	-	-	15,0
целлюлозная вата в нижней части впитывающего слоя	-	-	30,3
абсорбирующий слой	280x650	-	8,0
верхняя оболочка впитывающего слоя	155x490	25	1,6575
нижняя оболочка впитывающего слоя	175x650	15	1,6575
внешний распределительный слой	300x900	15	4,185
защитный слой	670x800	13	7,839
верхний покровный слой	230x900	15	3,105

нижний покровный слой	750x900	13	8,775
фронтальная лента	120x550	23	1,518
клей для структурных элементов	-	-	2,280
клей для эластичных элементов	-	-	0,618
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,036
Всего изделия	750x900	-	93,4
Подгузники для взрослых размер XL (ExtraLarge)			
целлюлозная вата в верхней части впитывающего слоя	-	-	22,0
целлюлозная вата в нижней части впитывающего слоя	-	-	32,01
абсорбирующий слой	280x760	-	10,0
верхняя оболочка впитывающего слоя	155x490	25	1,938
нижняя оболочка впитывающего слоя	175x760	15	1,938
внешний распределительный слой	300x1000	15	4,65
защитный слой	720x1000	13	9,36
верхний покровный слой	230x1000	15	3,45
нижний покровный слой	800x1000	12	10,4
фронтальная лента	120x600	23	1,656
клей для структурных элементов	-	-	2,637
клей для эластичных элементов	-	-	0,631
индикатор наполнения подгузника	-	-	0,041
Всего изделия	800x1000	-	114,4

* Погрешность параметров таблиц 2.1-2.2 - $\pm 10\%$

9.9 Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы непрерывные.

9.10 Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, соответствуют нормативам, установленным в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 18, утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299

9.11 Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, соответствуют требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя для подгузников видов и групп									
	для легкой и средней степени недержания					для тяжелой степени недержания				
	М	L	XL	М	L	XL	М	L	XL	XL
Полное влагопоглощение, г, не менее	1300	1450	1450	1800	2000	2800				
Сорбционная способность после центрифугирования, г, не менее	220	330	330	440	500	560				
Обратная сорбция, г, не более	4,4									
Скорость впитывания, см ³ /с, не менее	2,3									
Воздухопроницаемость, мм/с, не менее	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

9.12 Требования к фиксирующим элементам.

9.12.1 Линейные размеры соответствуют указанным ниже:

Липучки – 25±2 мм (ширина)

Пояс – размер М – 170±5 мм, размер L – 190±5 мм, XL – 180±5 мм.

9.12.2 Застежка-«липучка» закреплена на стороне, не контактирующей с кожей, термическим способом.

9.13 Индикатор влагонасыщения, который под влиянием жидкости, поступающей внутрь впитывающего слоя, по мере наполнения подгузника изменяет окраску или исчезает.

9.14 Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействиям температуры от +10 до +35 °C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

9.15 Изделия в транспортной упаковке устойчивы к климатическим воздействиям при транспортировании для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.16 Изделия в транспортной упаковке устойчивы к воздействию климатических факторов при хранении по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

9.17 Средний срок годности должен быть три года с даты изготовления. Критерием предельного состояния является несоответствие требованиям пп. 9.1, 9.8, 9.11.

9.18 Подгузники одноразового использования, нестерильны. Время использования до 6 ч или по мере наполнения.

10. Комплект поставки

В комплект поставки изделия входит: в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Наименование	Количество, шт. в упаковке
Изделия медицинские одноразовые впитывающие для взрослых страдающих недержанием OVIE CARE® по ТУ 32.50.50-014-31917593-2023 одного варианта исполнения	10/30
Инструкция по применению	1

11. Требования безопасности и охраны окружающей среды

11.1 Производство осуществляется с соблюдением правил пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.

11.2 Изделия не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей в процесс эксплуатации и после окончания срока эксплуатации.

11.3 Изделия относятся к группе горючих материалов, при контакте с открытым огнем горят коптящим пламенем с образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных углеводородов и газообразных продуктов.

В целях предотвращения возгорания изделия при хранении и эксплуатации следует соблюдать правила пожарной безопасности, не хранить изделия вблизи отопительных приборов, вблизи взрывоопасных и горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей.

11.4 Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

11.5 Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

11.6 Изделия при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном

контакте, работа с ними не требует дополнительных мер предосторожности и должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1.

11.7 Отходы производства изделия не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и не требуют особых условий при утилизации и захоронении.

11.8 Отходы производства изделия не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды, не требуют обезвреживания, подлежат дальнейшей переработке или утилизации.

11.9 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов материалов при производстве и хранении, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этой целей местах.

11.10 Отходы изделия, образующиеся в процессе медицинской деятельности учреждений здравоохранения, оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, так как в их состав входят химические, токсические и иные вещества и микроорганизмы.

11.11 Использованные по назначению изделия относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы) и подлежат утилизации.

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

12. Материалы, используемые при производстве

Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

Таблица 5

Наименование части изделия	Материал, марка	Завод-изготовитель, страна происхождения
верхний покровный слой	нетканый материал-спанбонд, целлюлозная бумага	Xingtai, Китай Domtar, Китай
нижний покровный слой	полиэтилен, полипропилен	Xingtai, Китай
распределительный слой	нетканый материал, полиэтилен + полипропилен	Jiaweisi, Китай Xingtai, Китай
абсорбирующий слой	волокнистые преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент (SAP) на основе полимеров акриловой кислоты	Chumei, Китай Sumitomo, Япония
защитный слой	полиэтилен, полипропилен	Xingtai, Китай

барьерные элементы	нетканый материал спандекс	Heyue, Китай
фронтальная лента	полипропилен	Heyue, Китай
фиксирующие элементы: застежка-«липучка»	полипропилен	Heyue, Китай
эластичный пояс	волокно из спандекса	Hyosung, Китай
Индикатор наполнения подгузника	желтый индикатор влажности – фильтровальная бумага	Fuller, Китай
Клей	клей для структурных элементов - акрил клей для эластичных элементов - акрил	Fuller, Китай
Потребительская упаковка	Полимерная пленка марка SCR1	Dongguan Zhongyueda Paper Co., Ltd., Китай
Транспортная упаковка	Картон Т-24, полиэтиленовый пакет марка HD03580	Quanzhou Tianjiao Lady&Baby's Hygiene Supply Co. Ltd., Китай

13. Упаковка

Подгузники в количестве согласно таблице 4, упаковывают в потребительскую упаковку: пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781. Для транспортировки подгузники в потребительской упаковке упаковывают в полиэтиленовый пакет затем в картонную коробку по ГОСТ 33781, обеспечивающие сохранность подгузников при транспортировании и хранении. В картонную коробку (транспортную упаковку) упаковывают: 4 потребительские упаковки (для 30 шт. изделий в упаковке), 8 потребительских упаковок (для 10 шт. изделия в упаковке).

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Габаритные размеры потребительской упаковки (дхшхв), мм:

- для 10 шт. в упаковке: 250х195х145 ± 10%
- для 30 шт. в упаковке: 360х280х160 ± 10%

Масса потребительской упаковки, г:

- для 10 шт. в упаковке: 40 ± 10%
- для 30 шт. в упаковке: 60 ± 10%

Габаритные размеры транспортной упаковки (дхшхв), см:

- для 4 потребительских упаковок в упаковке: 40х40х30 ± 10%,
- для 8 потребительских упаковок в упаковке: 40х58х35 ± 10%

Масса транспортной упаковки, г:

- для 4 потребительских упаковок в упаковке: $550 \pm 10\%$
- для 8 потребительских упаковок в упаковке: $850 \pm 10\%$

Масса брутто картонной коробки при ручной погрузке и разгрузке - в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05.2.2. В одну транспортную упаковку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

14. Подготовка к работе и порядок работы

Процедура одевания/ смены/ снятия подгузника осуществляется самим пользователем МИ или медицинским, социальным работником, осуществляющим уход за больным.

Перед процедурой одевания/ смены/ снятия подгузника заблаговременно необходимо подготовить: стерильные перчатки; защитную простынь или пеленку, зарегистрированные в установленном порядке в РФ; ёмкость с теплой водой и моющими средствами; полотенце; тару для использованного изделия, увлажняющий/питательный крем, тальк; новый подгузник

Общие требования при использовании подгузника:

При использовании подгузника необходимо придерживаться следующих требований:

- чётко придерживаться инструкции по применению, рекомендаций производителя и лечащего врача для предупреждения протекания подгузника;
- каждый раз после снятия, смены использованного подгузника у лежачего больного необходимо проводить гигиеническую обработку больного в месте соприкосновения кожных покровов с подгузником и поверхности, на которой он лежит (кровати);
- надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника;
- обращать особое внимание на то, чтобы индикатор наполнения располагался вертикально, по линии позвоночника, как бы продолжая ее;
- если подгузник уже одет на больного, необходимо следить за показателями полоски индикатора, которая меняет цвет по мере наполнения изделия;
- время использования до 6 ч или по мере наполнения.

Способ применения подгузников:

1. Наденьте подгузники как обычное белье, закрепите боковыми застежками.
2. Чтобы снять подгузники после использования, открепите боковые застежки.

Способ применения подгузников-трусиков:

1. Наденьте подгузники-трусики как обычное белье.
2. Чтобы снять подгузники-трусики после использования, разорвите изделие по боковым швам.

15. Срок годности.

Средний срок годности - три года с даты изготовления

16. Условия хранения и транспортировки.

16.1. Транспортирование.

16.1.1. Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150.

16.2. Хранение.

16.2.1. Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя - по группе 1 ГОСТ 15150.

17. Техническое обслуживание.

Не применимо.

Чистка и дезинфекция.

Не применимо. Изделия одноразового использования

18. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий (утилизация).

18.1. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

18.2. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

19. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

20. Маркировка

20.1 На каждую потребительскую упаковку должна быть нанесена маркировка с указанием:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
- назначение;
- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
- условия хранения;
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
- номер артикула (при наличии);
- серия;
- количество подгузников в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- обозначение стандарта ГОСТ Р 55082;
- qr-код («Честный знак»).

Допускается:

дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)

Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию - по ГОСТ 6658 с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Маркировка должна быть выполнена типографским, литографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к упаковке, с указанием:

- ☐ наименование изделия;
- ☐ наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- ☐ количество изделий;
- ☐ дата изготовления;
- ☐ срок годности;
- ☐ номер партии или серийный номер;
- ☐ обозначение настоящих технических условий;
- ☐ номер регистрационного удостоверения и дата выдачи (при получении);
- ☐ масса брутто.

Описание символов, нанесенных на маркировку:

Символ	Описание
	Изготовитель
	Товарный знак
	Не содержит латекса
	Беречь от влаги (Не допускать воздействия влаги)
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия солнечного света

	qr-код «Честный знак»
--	-----------------------

В случае возникновения претензий по качеству, необходимо обращаться в ООО «Приоритет» по телефону +7(812)-963-12-68 или почте info@prioritet-spb.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись / Прикладовская Т.П. /

«15»



М.П.