

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



235100B0/003186

号码 No.

兹证明：在所附文件上的迈克生物股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

商事证明专用章

CCPIT

(34)

授权签字:

Authorized
Signature: Sun Wenhui

日期: 2023年12月21日

(Date: Dec. 21, 2023)

证明书地址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

麦哲有限公司
成都市高新区西川路16号
28 87826777 / 传真: 028 87825783
611731
E-mail: maccura@maccura.com

Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 87826777 Fax: +86 28 87825783
www.maccura.com

maccura



To whom it may concern

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm that the content of document «Instruction for use» on medical device «A set of control materials for quality control of determination of total 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) in blood serum by immunochemiluminescent method on Maccura i analyzers (25-OH Vitamin D Control/25-OH VD Control), in versions» is valid and true.

Maccura Biotechnology Co., Ltd., 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China is the legal manufacturer of the device mentioned in the document «Instruction for use».

Name and Position: Clarence Xiao, Regional Sales Supervisor

Signature

Stamp



Контроль витамина D 25-ОН (25-ОН VD)

№ по каталогу

IM4291203	Уровень 1 0,5 мл × 1
IM4294203	Уровень 1 1,0 мл × 1
IM4292203	Уровень 2 0,5 мл × 1
IM4295203	Уровень 2 1,0 мл × 1
IM4293203	Уровень 1~2 0,5 мл × 2
IM4296203	Уровень 1~2 1,0 мл × 2

Приборы, с которыми может использоваться данное изделие

i 3000, i 1000, i 1000L, i 1000S

Назначение

Предназначен для использования в качестве объективного материала для контроля прецизионности тестов иммунохемилюминесцентного анализа витамина D 25-ОН (25-ОН VD) на анализаторах Massura i.

Принцип действия

Данное изделие осуществляет контроль качества результатов иммунохемилюминесцентного анализа 25-ОН VD, отслеживает стабильное состояние лабораторной тест-системы (включая факторы окружающей среды, такие как приборы, калибраторы, реагенты, персонал и т.д.), своевременно выявляет неполадки тест-системы и позволяет своевременно принять соответствующие меры по их исправлению для обеспечения точного тестирования.

Компоненты реагентов

Level 1:

Антиген витамина D (25-ОН)

Альбумин бычьей сыворотки 10 %.

Level 2:

Антиген витамина D (25-ОН)

Альбумин бычьей сыворотки 10 %.

Точные значения концентрации контроля для конкретной партии: см. «Листок-вкладыш».

Компоненты из разных партий контроля смешивать не допускается.

Меры предосторожности и предупреждения

- Исключительно для диагностики in vitro.
- Необходимо в точности следовать инструкции по применению. При отклонении от инструкции по применению, надежность результатов анализа не может быть гарантирована.
- Данный продукт не содержит веществ человеческого происхождения и не представляет опасности с точки зрения биологической безопасности, однако его все же следует считать потенциально инфекционным. Обработка, использование, хранение каждого из компонентов, а также утилизация твердых и жидких отходов, образующихся в процессе анализа, должны осуществляться в соответствии с применимыми требованиями местных руководящих документов или правил по биобезопасности.
- Это изделие содержит химические ингредиенты. Следует избегать контакта с кожей или слизистыми оболочками. При случайном попадании изделия в глаза, рот или на кожу промойте это место проточной водой и при необходимости обратитесь к врачу.
- Значения, указанные на листке-вкладыше, могут варьироваться в зависимости от партии. Запрещается смешивание.
- Все используемые стеклянные и пластиковые изделия должны быть чистыми и без дефектов.
- Упаковочные материалы, которые не являются биоразлагаемыми, следует сдавать в региональные пункты приема отходов.
- Запрещается применение изделий с истекшим сроком годности.

Применимые реагенты

Кат. № IM4401351 25-ОН Витамин D, 25 тестов

Кат. № IM4402351 25-ОН Витамин D, 50 тестов
Кат. № IM4403351 25-ОН Витамин D, 100 тестов
Кат. № IM4404351 25-ОН Витамин D, 200 тестов
Кат. № IM4405351 25-ОН Витамин D, 2 × 25 тестов
Кат. № IM4406351 25-ОН Витамин D, 2 × 50 тестов
Кат. № IM4407351 25-ОН Витамин D, 2 × 100 тестов
Кат. № IM4408351 25-ОН Витамин D, 2 × 200 тестов
Кат. № NEIM4205203 25-ОН Витамин D, 50 тестов
Кат. № NEIM4201203 25-ОН Витамин D, 100 тестов
Кат. № NEIM4203203 25-ОН Витамин D, 200 тестов

Хранение и стабильность

До вскрытия упаковки, при хранении в вертикальном положении при температуре 2–8 °С и вдали от солнечного света контроль остается стабильным до истечения срока годности, указанного на этикетках.

После вскрытия упаковки контроль сохраняет стабильность в течение 28 дней при 2–8 °С и соблюдении правил хранения и обращения.

Процедура анализа

- Перед началом использования в анализаторе довести контроль до температуры окружающей среды (15–25 °С).
- Перед началом работы перемешать контроль путем осторожного переворачивания и выдержать в течение 5–10 минут, избегая образования пены.
- Установить контроль и ввести нужную информацию в соответствии с правилами эксплуатации прибора.
- После каждого использования плотно закрыть крышки и быстро довести материал до температуры хранения (2–8 °С). Чтобы избежать испарения, не следует оставлять контроль открытым в течение длительного времени.

Основные изделия для контроля качества должны проверяться после каждой калибровки и ежедневно перед тестированием образцов. Тестирование образцов допускается только при условии, что результаты контроля находятся в рамках допустимого диапазона.

Функциональные характеристики

1. Внешний вид: бледно-желтая жидкость.
2. Межфлаконная вариация: коэффициент вариации (КВ) для различных сосудов не превышает 10,00 %.

Список литературы

Делберт А. Фишер ред. «Эндокринология» (Delbert A Fisher ed. Endocrinology). «Квест Диагностика Николс Институт» (Quest Diagnostics Nichols institute), 2007.



«Маккура Биотехнологии Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.)
№16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731 (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731)
Чэнду, Китайская Народная Республика (Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
Тел.: +86 28 8782 6777
Факс: +86 28 8782 5783
Эл. почта: maccura@maccura.com



«Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ» (Европа) (Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe))
Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany)

www.maccura.com

Активный мониторинг

Если с этим изделием произошел какой-либо серьезный инцидент, пожалуйста, свяжитесь с производителем и сообщите об этом в местный компетентный орган.

Символы для использования в маркировке

Символы	Определение
	НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
	ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
	МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO
	ХРАНИТЬ ВЕРТИКАЛЬНО
	ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫБРОСИТЬ ВМЕСТЕ С МУСОРОМ
	УПАКОВКА ПРИГОДНА ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	КОД ПАРТИИ
	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО
	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
	УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ИЗДЕЛИЯ
	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ
	ОСТОРОЖНО!

Листок-вкладыш

Партия: *****

Прибор	Единица измерения	Материал контрольный*	
		Значение	Диапазон
Анализатор: XXX	нг/мл	**	****
Анализатор: XXX	нг/мл	**	****

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование медицинского изделия

Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-ОН Vitamin D Control/25-ОН VD Control), в вариантах исполнения

Вариант 1:

1. Материал контрольный 1 (Level 1), пробирка объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант 2:

1. Материал контрольный 2 (Level 2), пробирка объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Далее по тексту могут использоваться следующие сокращения: набор, контроль, изделие, медицинское изделие.

Функциональное назначение

Применяется как вспомогательное средство для диагностики in vitro при профессиональном применении для определения витамина D 25-ОН (25-ОН VD).

Тип анализируемого образца

Не применимо, необходим для контроля качества набора реагентов для определения витамина D 25-ОН (25-ОН VD).

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Не применимо для данного медицинского изделия.

Кратность применения медицинского изделия

Медицинское изделие однократного применения

Показания

Медицинское изделие предназначено в качестве вспомогательного при количественном определении витамина D 25-ОН (25-ОН VD) у пациентов с целью определения уровня витамина D в организме.

Противопоказания

Отсутствуют. Изделие предназначено для лабораторной диагностики.

Побочные действия

Отсутствуют. Изделие предназначено для лабораторной диагностики.

Область применения медицинского изделия

Клиническая лабораторная диагностика.

Стерилизация

Изделие поставляется нестерильным. Не подлежит повторному использованию и/или стерилизации пользователем.

Популяционные, демографические аспекты применения медицинского изделия

Изделие не имеет популяционных и демографических аспектов применения.

Предназначенный пользователь

Исследования с использованием данного набора могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим или иным образованием: врач КДЛ, биолог, медицинский лабораторный техник, медицинский технолог. Персонал, проводящий исследования с использованием данного набора, должен владеть навыками проведения молекулярно-биологических исследований и работы на соответствующем оборудовании. Только при профессиональном применении.

Перечень материалов медицинского изделия, вступающих в контакт с организмом пациента (телом человека)

Не применимо.

Материалы данного медицинского изделия не вступают в контакт с организмом пациента ни напрямую, ни опосредованно. Медицинский персонал работает в перчатках.

Информация о лекарственных средствах в составе медицинского изделия

Не применимо. Медицинское изделие не содержит лекарственных средств.

Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Материалы человеческого происхождения:

Не применимо. Медицинское изделие не содержит материалов человеческого происхождения.

Материалы животного происхождения:

Компоненты животного происхождения являются безопасными с биологической точки зрения, что подтверждено сертификатами анализа и паспортом безопасности на медицинское изделие.

Необходимые дополнительные медицинские изделия для проведения тестирования:

Применимые реагенты:

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-ОН VD (CLIA)), набор на 200 тестов.

Необходимые материалы (не входят в набор)

- Раствор промывающий для хемилюминесцентных анализаторов Maccura i (CLIA Wash Buffer), в вариантах исполнения;
- Раствор очищающий для хемилюминесцентных анализаторов Maccura i (WS Wash Buffer), в составе;
- Набор хемилюминесцентных субстратов для анализаторов Maccura i (CLIA Substrate Buffer), в составе;

- Кювета реакционная для анализаторов Maccura i для диагностики in vitro (Chemiluminescence Analyzer Reaction Cuvettes), 3500 шт.

Оборудование*

Анализатор хемилюминесцентный автоматический Maccura i в составе, варианты исполнения:

I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000 в составе:

II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000 в составе:

* *Примечание: можно использовать любой анализатор из приведенных.*

Контроль качества

Рекомендуемая частота контроля качества:

- Для каждого нового реагента.
- После каждой калибровки.
- Раз в 24 часа во время использования теста.
- Если процедуры контроля качества в лаборатории пользователя требуют более частого применения контрольных образцов для проверки результатов тестов, следуйте процедурам, учитывающим специфику лаборатории.

Физико-химические характеристики

Физико-химические характеристики	
Материал контрольный 1 (Level 1)/ Материал контрольный 2 (Level 2)	
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Бледно-жёлтая
Запах	нет
рН (при 20°C)	7.3-7.4
Плотность	0,85-1,15 кг/м3 (0,85-1,15 мг/мл)

Упаковка

Первичная упаковка	
Материал контрольный 1 (Level 1)	
Объем жидкости в пробирке, мл	1,0 мл ($\pm 5\%$)
Объем пустой пробирки (максимальная вместимость)	2 мл ($\pm 5\%$)
Цвет пробирки	прозрачный
Цвет крышки	желтый
Материал контрольный 2 (Level 2)	
Объем жидкости в пробирке, мл	1,0 мл ($\pm 5\%$)
Объем пустой пробирки (максимальная вместимость)	2 мл ($\pm 5\%$)
Цвет пробирки	прозрачный
Цвет крышки	синий

Транспортная упаковка

Изделие следует перевозить в оригинальной упаковке производителя, защищающей

продукцию от внешних воздействий, в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов, на всех видах транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Температурный режим: от 2 до 8 °С.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании следует строго выполнять требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке и транспортной таре.

При несоблюдении условий транспортирования медицинское изделие не подлежит использованию.

Упаковка изделий обеспечивает достаточную защиту от механических, климатических воздействий при условии соблюдения правил транспортировки и хранения

Меры индивидуальной защиты

Защита кожи

Во избежание попадания на кожу используйте непроницаемые перчатки и защитную одежду, материал которых устойчив к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускает их.

Защита глаз

Во избежание попадания в глаза используйте защитные или лабораторные очки.

Защита органов дыхания

В обычных условиях при использовании изделия защита органов дыхания не требуется.

Комплект поставки

Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-OH витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (25-OH Vitamin D Control/25-OH VD Control), в вариантах исполнения:

Вариант 1:

1. Материал контрольный 1 (Level 1), пробирка объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант 2:

1. Материал контрольный 2 (Level 2), пробирка объем 1,0 мл - 1 шт.;
2. Листок-вкладыш – 1 шт.;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Хранение и стабильность (дополнение к инструкции по применению)

Срок годности медицинского изделия – 12 месяцев.

При транспортировании

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура при транспортировке 2-8°C.

Утилизация

Утилизация производится согласно законодательству, действующему на территории РФ.

Утилизация медицинских отходов осуществляется с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека:

Согласно классификации медицинских отходов, все части медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения», образцы и материалы, использующиеся и образующиеся при выполнении исследований, в том числе реагенты с истекшим сроком годности, пришедшие в негодность, относятся к классу Б. (Отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы, - класс Б (СанПиН 2.1.3684-21)).

Согласно классификации медицинских отходов, компоненты упаковки медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (25-ОН Vitamin D Control), в вариантах исполнения» относятся к классу А. (Отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО - класс А (СанПиН 2.1.3684-21)).

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие заявленным характеристикам изделия при условии применения изделия в соответствии с инструкцией по применению и по назначению, предусмотренному производителем.

Производитель гарантирует стабильность медицинского изделия при использовании в соответствии с инструкцией по применению по назначению до окончания срока годности при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, указанных в инструкции. Изделия должны использоваться только до истечения срока годности, который указан на упаковке.

По вопросам, связанным с качеством изделий, а также с их работой, нужно обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОПРОМ» (ООО «ЭВОПРОМ»), 125047, город Москва, 4-Я Тверская-Ямская ул., д.16 к.3, пом. 1, тел.: +7 495 785 07 25

Претензии по качеству (рекламации)

Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Порядок предъявления рекламаций и ответов на них регулируется гражданским правом. Рекламация может предъявляться только по таким вопросам,

которые не являлись предметом приемки товара, произведенной в соответствии с условиями договора.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием изделия, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя.

В случае рекламации обращаться к производителю и / или уполномоченному представителю производителя.

Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия, месте (местах) производства медицинского изделия

Maccura Biotechnology Co.,Ltd./ Маккура Биотехнология Ко.,Лтд.16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China

Уполномоченный представитель в РФ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОПРОМ» (ООО «ЭВОПРОМ»)

125047, город Москва, 4-Я Тверская-Ямская ул., д.16 к.3, пом. 1

Тел.: +7 495 785 07 25

E-mail: info@evoprom-med.ru

СЕРТИФИКАТ

**Китайский комитет содействия развитию международной
торговли**

**Китайский комитет содействия развитию международной
торговли –**

Торгово-промышленная палата Китая

01407945

[На бланке Китайского комитета содействия развитию международной торговли]

**Китайский комитет содействия развитию международной
торговли (ССРПТ)**

Торгово-промышленная палата Китая

[QR-код]

СЕРТИФИКАТ № 235100B0/003186

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что печать компании «МАККУРА
БИОТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» (MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) на
прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

[Вклейка с тисненой печатью:

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Сертификация ССРПТ (34)]

{Печать:

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Сертификация ССРПТ (34)]

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

/Подпись/

Подпись уполномоченного лица: Сун Вэньхуэй (Sun Wenhui)

Дата: 21 декабря 2023 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

«Маккура Биотехнологии Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.)
Адрес: №16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731 Чэнду,
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone,
611731 Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
Тел.: +86 28 87826777 Факс: +86 28 87825783
Электронная почта: maccura@maccura.com www.maccura.com

[Логотип компании «Маккура» (Maccura)]

Для предъявления по месту требования

Для предоставления в компетентные органы здравоохранения Российской Федерации

Настоящим я подтверждаю, что содержимое документа «Инструкция по применению» для медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения общего 25-гидроксивитамина D (25-ОН витамин D) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура I (25-ОН Vitamin D Control/25-ОН VD Control), в вариантах исполнения» является действительным и точным.

Компания «Маккура Биотехнологии Ко., Лтд.» (Maccura Biotechnology Co., Ltd.), №16, ул. Байчуань, Зона высоких технологий, 611731 Чэнду, Китайская Народная Республика (16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic Of China) является законным производителем изделия, упомянутого в документе «Инструкция по применению».

Имя и должность: Кларенс Сю (Clarence Xiao), руководитель по вопросам региональных продаж

Подпись: /Подпись/ 19.12.2023

Печать: [Печать компании «Маккура Биотехнологии Ко., Лтд.», 5101095288915]

Перевод с китайского и английского на русский язык выполнен переводчиком Гайдовой Ольгой Игоревной

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмое декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Гайдовой Ольги Игоревны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/883-н/77-2023-20-756.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Р.Ю.Обухов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 15/11/2023
ЛИСТОВ.

Арно Нотариус

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать седьмое декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/883-н/77-2023-20-758.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1600 руб. 00 коп.



Р.Ю.Обухов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10/11/2023
ЛИСТОВ.

в.н.с. Нотариус