



ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
Пилинг салициловый 15% и 25% SALICYLIC PEELING 15% and 25%,
по ТУ 21.20.23-007-17567509-2024

Описание

Представляет собой прозрачную от светло-желтого до бесцветного цвета жидкость с характерным запахом. В случае хранения при пониженной температуре окружающей среды (ниже +10°C) возможно обратимое выпадение кристаллов салициловой кислоты. В случае выпадения кристаллов салициловой кислоты следует выдержать при комнатной температуре в течение 3 часов.

Состав:

Салициловый пилинг 15%: Кислота салициловая, DL-Миндальная кислота, Азелаиновая кислота, Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (транскутол), Диметилизосорбид, Пропиленгликоль, Мультиэкс розаник (MultiEx Rozanic), Лизат лактобактерий, Изопропиловый спирт

Салициловый пилинг 25%: салициловая кислота, изопропиловый спирт.

Показатели качества салицилового пилинга 15% и 25%

Наименование показателя	Значение показателя
1 Внешний вид	Прозрачная жидкость с характерным кислым запахом
2 Цвет	От светло-желтого до бесцветного
3 Водородный показатель, pH	1,2-6,0
4 Термостабильность	Стабилен
5 Микробиологическая чистота	- Общее число аэробных микроорганизмов не более 10 ² КОЕ в 1 г (мл) - Общее число дрожжевых и плесневые грибы не более 10 ¹ КОЕ в 1 г (мл) - Отсутствие энтеробактерий, устойчивых к желчи, в 1 г (мл) - Отсутствие <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г (мл) - Отсутствие <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г (мл)

Назначение:

Предназначен для эстетической коррекции небольших дефектов лица и тела: морщин, гиперкератоза, посттравматических и послеоперационных рубцов, рубцов постакне и других нарушений рельефа кожи, лентиго, а также угревой болезни.

Применяется в соответствии с настоящей инструкцией.

Показание к применению:

- Акне (воспалительные и невоспалительные элементы);
- Солнечное и сенильное лентиго, мелазма, эфелиды;
- Рубцы различного происхождения (постакне);
- Возрастные изменения и поверхностные морщины (увядающая кожа);
- Нарушение микрорельефа кожи;
- Себорейный дерматит;
- Актинический гиперкератоз.

Противопоказания к применению

- Повышенная чувствительность к компонентам пилинга;
- Дерматозы в стадии обострения и дерматиты различной этиологии, в том числе инфекционные воспалительные заболевания (герпес, пиодермия);
- Инфекционные заболевания кожи (трихофития, микроспория);
- Нарушение целостности кожных покровов;
- Хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации;
- Избыточная инсоляция кожи;
- Беременность и лактация;
- Посещение солярия или принятие интенсивных солнечных ванн во время проведения курса пилинга, сразу после проведения процедуры пилинга, а также в период реабилитации.

Способ применения:

Только для профессионального применения!

Разрешен к применению специалистами, прошедшими обучение и аттестацию в соответствии с действующим законодательством!

Предпилинговая подготовка:

До процедуры пилинга салицилового в течение не менее 7 дней рекомендуется через день наносить Активную эмульсию для проблемной кожи, либо ежедневно

Рекомендуется до процедуры пилинга салицилового провести 1-2 процедуры поверхностного пилинга.

Ежедневно в светлое время суток необходимо наносить Солнцезащитный крем СПФ50 IV или Солнцезащитный флюид СПФ30.

Протокол проведения химического пилинга:

1 шаг. Провести демакияж кожи лица, в том числе в области вокруг глаз, при помощи Мицеллярной воды с маслом арганы или Легким гидрофильным маслом или Очищающим гидрофильным маслом.

2 шаг. Очистить кожу Очищающим молочком или Гелем для умывания с аминокислотами шелка.

После очищения средство смыть теплой водой, кожу высушить бумажными салфетками. Для очищения кожи не допускать применения любых других активных препаратов, например, спирта.

3 шаг. Обезжирить кожу Предпилинговым лосьоном.

4 шаг. Нанести пилинг на обрабатываемую зону, активно втирая в кожу, исключая периорбитальную зону. Во время нанесения пилинга пациент ощущает жжение, возможно покраснение и пощипывания кожи. Не смывать. Через 2-3 минуты (после высыхания) наносится следующий слой. Наиболее распространенной методикой является нанесения 3-4 слоев. Количество слоев определяется специалистом, исходя из индивидуальных особенностей кожи пациента, а также показаниями, и может быть увеличено до 6-7*. Через 2-4 минуты после нанесения последнего слоя нанести Нейтрализующий гель, а после смыть состав большим количеством воды.

4 шаг. Нанести Регенерирующую гель-маску на 10-15 минут, затем смыть салфетками, смоченными теплой водой, затем нанести Восстанавливающую сыворотку с ПДРН.

5 шаг. Нанести Солнцезащитный крем СПФ50 IV или Солнцезащитный флюид СПФ30

Использовать до полной реабилитации после процедуры.

Постпилинговый уход:

В течение 5-7 дней после процедуры на кожу необходимо наносить крем, который определяет специалист, исходя из индивидуальных особенностей кожи пациента и защищать кожу от ультрафиолетового излучения нанесением Солнцезащитного

Эффективность пилинга, длительность послепилингового периода, а также интенсивность клинической картины симптомокомплекса послепилингового периода, зависит от методики проведения процедуры: чем больше наносится слоев пилинга в рамках одной процедуры, тем более выражен результат, но при этом увеличивается длительность и интенсивность послепилингового периода.

Рекомендуемый курс: 2-4 процедур с интервалом 3-4 недели.

Побочные эффекты

После применения пилинга по наиболее распространенной методике (3-4 слоя) эритема сохраняется от нескольких часов до 2 суток. Через 2 дня после процедуры начинается шелушение, которое продолжается до 10 дней. Необходимо предупредить пациента о недопустимости принудительного удаления появившихся корочек, чешуек или пленок.

*В случае увеличения количества слоев нанесения пилинга длительность побочных эффектов увеличивается до 30 суток.

В зависимости от индивидуальных особенностей пациента в послепилинговом периоде субъективно отмечается чувство стягивания и дискомфорта, могут наблюдаться симптомы простого дерматита, пастозность, лихенификация, экзематизация, папулопустулезная сыпь.

Меры предосторожности

Соблюдать протокол проведения процедуры!

Не допускать попадания в глаза! При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, затем 2% раствором гидрокарбоната натрия.

Форма выпуска

Пилинг салициловый 15% и 25% поставляется по 30мл, 100мл в стеклянном флаконе. Флакон помещается вместе с инструкцией по применению в картонную коробку. Изделие поставляется не стерильным. Не нуждается в стерилизации перед использованием.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5°C до плюс 25 °C. После вскрытия флакона следует плотно закрыть во избежание испарения спирта изопропилового.

Срок годности

Условия отпуска

Реализуется в специализированные учреждения. Не предназначен для свободной реализации.

Владелец РУ/ предприятие-производитель/организация, принимающая претензии

Производитель: ООО "Лаборатория Ангиофарм", Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, пр-кт Академика Сандахчиева, зд. 13, офис 7

Контакты для обращений:

e-mail: www.angiopharm.pro

Телефон горячей линии: 8(962) 838-44-55

Символы на упаковке

	- Номер партии
	- Изготовитель
	- Использовать до (год, месяц)
	- Не допускать попадания солнечного света
	- Беречь от влаги
	- Внимание! Читать инструкцию по применению
	-Хранить в температурном диапазоне от 5°C до 25°C

Версия №4 от 26.08.2024 г.

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

5 (Пят.) листов
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись [подпись] /Пуртов А.А./

« 26 » 08 20 24 г. М.П.

