


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Белая линия»
 **А.В. Голоднов**

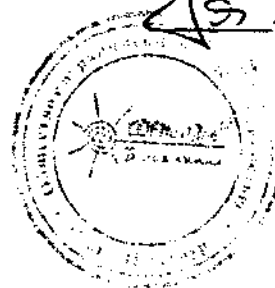

Инструкция по эксплуатации

**«Комплект одежды и белья акушерского из нетканого материала,
одноразовый, нестерильный «Антис»».**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

«Комплект одежды и белья хирургического из нетканого материала, одноразовый, нестерильный «Антис»» (далее комплект), предназначен для защиты медперсонала и пациента во время проведения хирургических операций, медперсонала и рожениц от инфицирования во время приёма родов. Комплект применяется в органах и учреждениях системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование, размеры и применяемые материалы при производстве комплекта приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Длина/Ширина/Толщина (см)	Название материала и его содержание в %	Размеры
1	Простыня	200/70/0,002	Полипропилен 100%	
2	Простыня (подстилка) впитывающая	140/70/0,004	Вискоза 70% Полиэфир 30%	
3	Простыня влагонепроницаемая	140/80/0,005	Целлюлоза 70% Полиэтилен 30%	
4	Салфетка	35/45/0,004	Вискоза 70% Полиэфир 30%	
5	Пеленка	60/70/0,006	Вискоза 60% Полиэфир 20% Полиэтилен 20%	
6	Прокладка	20/8/0,004	Вискоза 70% Полиэфир 30%	
7	Рубашка для роженицы	70/110/0,002	Полипропилен 100%	52
8	Салфетка впитывающая многослойная	60/60/0,01	Полипропилен 10 % Целлюлоза 80% Полиэтилен 10%	
9	Трусы одноразовые	50/60/0,002	Полипропилен 100%	50/52

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Комплект противопоказаний не имеет.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ.

Комплект применяется для нужд рожениц во время приема родов или проведения гинекологических операций.

Перед переводом роженицы в родильный зал, её переодевают в рубашку для роженицы и готовят акушерское кресло - на него укладывают последовательно: простыню влагонепроницаемую, простыню (подстилку) впитывающую, простыню. Пеленкой покрывают обеззараженный и согретый лоток для приема новорожденного. Трусы и прокладка надеваются роженицей после родов для обеспечения гигиены. Салфетки используются акушерами для обеспечения гигиены во время приема родов.

После приема родов или окончания операции использованный комплект собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

5. ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ.

Комплекты используются в родильных отделениях и операционных в течение времени выполнения оперативного вмешательства.

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.

Комплекты должны храниться в специально выделенных помещениях (бельевых). В отделениях должен храниться суточный запас чистого белья в отдельных помещениях или в отдельных местах на постах медсестер и других помещениях с чистым режимом при наличии специально выделенных для этой цели встроенных или обычных шкафов.

Комплекты и тара должны быть промаркированы, хранение в отделениях немаркированных комплектов не допускается.

Использованные комплекты собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную грязную бельевую. Все процессы, связанные с транспортировкой,

погрузкой, разгрузкой комплектов, должны быть максимально механизированы.

Временное хранение (не более 12 часов) использованных комплектов в отделениях следует осуществлять в санитарных комнатах или других специально отведенных для этой цели помещениях в закрытой таре (металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других емкостях, подвергающихся дезинфекции).

Для работы с использованными комплектами персонал должен быть обеспечен сменной санитарной одеждой (халат, косынка, перчатки, маска).

Использованные комплекты, не загрязненные биологическими жидкостями, могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.

Использованные комплекты, которые были загрязнены биологическими жидкостями, или в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), подвергается обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводится в соответствии с действующими нормативными документами непосредственно на местах первичного сбора отходов. Дезинфекция может проводиться химическим методом путем полного погружения изделий в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях. Для дезинфекции используются зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здравоохранения в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в инструкциях по их применению. Кроме того, дезинфекция может проводиться в паровых стерилизаторах (автоклавирование) и в дезинфекционных камерах. При дезинфекции использованных комплектов в паровых стерилизаторах или в дезинфекционных камерах, она собирается в биксы или в камерные мешки.

Продезинфицированные комплекты упаковываются в соответствующие классу отходов одноразовые пакеты для сбора и хранения медицинских

отходов, в дальнейшем уничтожается на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. При централизованном способе обезвреживание производится в печах мусоросжигательных заводов.