

ИНСТРУКЦИЯ

по применению комплекта одежды и белья хирургического из нетканого материала одноразовый стерильный "АНТИС"

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект одежды и белья хирургического из нетканого материала одноразовый стерильный «АНТИС» предназначен для защиты медперсонала и пациента во время проведения хирургических операций.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одноразовая хирургическая одежда имеет удельную разрывную нагрузку

Для вертикальных тканых нитей – 30 N/cm (ТС 253)

Для горизонтальных тканых нитей – 120 N/cm (ТС 253)

Плотность материала составляет - 23 г/м³

Одноразовые простыни, полотенца, салфетки имеют удельную разрывную нагрузку

Для вертикальных тканых нитей – 74 N/cm (ТС 253)

Для горизонтальных тканых нитей – 100 N/cm (ТС 253)

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению не существует.

Побочные эффекты не существуют.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием очистить кожу от микробных веществ.

Перед использованием комплекта необходимо убедиться в том, что срок стерильности комплекта не закончился.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Соблюдайте порядок работы, указанной на упаковке.

Вскрыть пакет, распределить содержимое комплекта по местам применения.

По окончании периода использования утилизировать.


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Изделие можно использовать только один раз. Не повреждайте упаковку изделия и не используйте изделие с повреждённой упаковкой, так как бельё стерильно. Для гарантированного использования следуйте указаниям, имеющимся на упаковке.

Перед использованием комплекта необходимо убедиться в том, что срок стерильности комплекта не закончился. Утилизация использованных комплектов производится путем сжигания.

Генеральный директор
ООО «Белая линия»

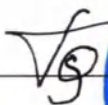

А.В. Голоднов