

ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»

Юридический адрес: 108811, г. Москва,
вн. тер. г. поселение Московский
км Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
двлд. 4 стр. 2, помещ. 68Н/2
Фактический адрес: 108811, г. Москва,
Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский),
домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7 (Седьмой)
ИНН/КПП: 7751265846/775101001
ОГРН/ ОКПО: 1237700585540/50383176
тел: +7 925 441 30 80
e-mail: office@bionoltra.com

**Макет маркировки
индивидуальной первичной (шприц), индивидуальной вторичной
(контейнер), потребительской и транспортной упаковки
медицинского изделия**

**«Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN),
стерильный, в шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023»**

Генеральный Директор
ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»



Еременко Оксана Николаевна

Макет маркировки первичной упаковки – шприца

Наклейка на шприц должна содержать следующую информацию:

- торговое наименование изделия на английском языке - NOLTREXSIN;
- объем изделия;
- номер партии (LOT);
- дата истечения срока годности (USE BY);

*Макет наклейки на шприц для вариантов исполнения
с наполнением шприца в объеме 2,0 мл*

NOLTREXSIN 2,0 ml
USE BY: 0000.00.00
LOT: NN00000S0BN

*Макет наклейки на шприц для вариантов исполнения
с наполнением шприца в объеме 3,0 мл*

NOLTREXSIN 3,0 ml
USE BY: 0000.00.00
LOT: NN00000S0BN

Макет идентификационных этикеток

Идентификационная этикетка должна содержать следующую информацию:

- торговое наименование изделия на английском языке - NOLTREXSIN;
- объем изделия;
- номер партии (LOT);
- дата истечения срока годности (USE BY);

*Макет идентификационной этикетки для вариантов исполнения
с наполнением шприца в объеме 2,0 мл*

NOLTREXSIN 2,0 ml
USE BY: 0000.00.00
LOT: NN00000S0BN
Для карты пациента

*Макет идентификационной этикетки для вариантов исполнения
с наполнением шприца в объеме 3,0 мл*

NOLTREXSIN 3,0 ml
USE BY: 0000.00.00
LOT: NN00000S0BN
Для карты пациента

Макет маркировки контейнера

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Для Вариантов исполнения:

- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 2,0 мл

 0000-00  NN00000S0BN  0000-00-00 Нетоксично     

 ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия

Место производства: г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

Для Варианта исполнения:

- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 3,0 мл

 0000-00  NN00000S0BN  0000-00-00 Нетоксично     

 ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия

Место производства: г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

пакет потребительской упаковки (коробка картонная) медицинского изделия
 эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный,
 шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023.

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце
 однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные
 этикетки (2 шт.).

Инструкция: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце
 однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237), инструкция по применению, идентификационные
 этикетки (2 шт.).



область
 без глаза
 и гравировки
 16,8 x 30,7 мм

01-21-10-23

Contents: three-dimensional polyacrylamide, %: 4.0 ± 1.0; water for injections, %: 96.0 ± 1.0; silver ions, %: 0.0001 – 0.0005.
 Состав: трехмерный полиакриламид, %: 4.0 ± 1.0; вода для инъекций, %: 96.0 ± 1.0; ионы серебра, %: 0.0001 – 0.0005.



PNN 2.0 UG REV.01/06.05.2024_PV



НЕТОКСИЧНО

REF 001NN-2.0UG

BIONOLTRA SA
 SWISS TECHNOLOGY

НОЛТРЕКСИН

4% Эндопротез синовиальной жидкости



1 x 2.0 ml

EN Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, in disposable syringe, TU 32.50.50-001-50383176-2023

MD version: Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, 2.0 ml in disposable syringe (Reg № РЗН 2013/764 or № ФСЗ 2011/11237), instruction for use leaflet, patient labels (2 pcs.)
 To be administered by authorized personnel only in accordance with local legislation
 Swiss technology

RU Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН
 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
 Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.
 Произведено по швейцарской технологии.

BIONOLTRA SA
 SWISS TECHNOLOGY

NOLTREXSIN

4% Endoprosthesis of synovial fluid



1 x 2.0 ml

Manufacturer: BIONOLTRA SA LLC, room 68H/2, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe
 highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia
 Place of manufacture: 7 floor, Block G, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway
 (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia.

Производитель: ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия, г. Москва, вн.тер.г. поселение
 Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), д.д.ч. 4, стр. 2, помещ. 68H/2
 Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домостр. 4,
 строение 2, Блок Г, этаж 7.

Tel: +7 925 441-30-80; e-mail: office@bionoltra.com



NOLTREXSIN 2.0 ml

Комплектация: э Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению, идентификационные этикетки (2 шт.).



Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)**, стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023.

Комплектация: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).



Макет потребительской упаковки (коробка картонная) медицинского изделия

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023..

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Комплектация: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).



Макет маркировки упаковочного листа (примеры)

Пример для варианта исполнения без иглы:

Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный,
объёмом 2,0 мл в шприце однократного
применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ
№ ФСЗ 2011/11237); инструкция по
применению; идентификационные этикетки
(2 шт.).

Пример для варианта исполнения без иглы:

Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный,
объёмом 3,0 мл в шприце однократного
применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ
№ ФСЗ 2011/11237); инструкция по
применению; идентификационные
этикетки (2 шт.).

Упаковочный лист ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ» Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023. Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.). Объем 2,0 мл Количество изделий – хх шт. № партии _____ Дата упаковки: хх. хх. ххххг. Годен до: хх. хх. хххх г. Упаковщик ФИО	Упаковочный лист ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ» Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023. Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.). Объем 3,0 мл Количество изделий – хх шт. № партии _____ Дата упаковки: хх. хх. ххххг. Годен до: хх. хх. хххх г. Упаковщик ФИО
---	---

Пример для варианта исполнения с иглой:
 Эндопротез синовиальной жидкости
 НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный,
 объемом 2,0 мл в шприце однократного
 применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ
 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G
 x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ
 № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом
 этилена; инструкция по применению;
 идентификационные этикетки (2 шт.)

Пример для варианта исполнения с иглой:
 Эндопротез синовиальной жидкости
 НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный,
 объемом 3,0 мл в шприце однократного
 применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ
 № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная
 стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ №
 ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ
 2007/00293), стерилизованная оксидом
 этилена; инструкция по применению;
 идентификационные этикетки (2 шт.).

Упаковочный лист ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ» Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения ТУ 32.50.50-001-50383176-2023. Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.). Объем 2,0 мл Количество изделий – хх шт. № партии _____ Дата упаковки: хх. хх. ххххг. Годен до: хх. хх. хххх г. Упаковщик ФИО _____	Упаковочный лист ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ» Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023. Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.). Объем 3,0 мл Количество изделий – хх шт. № партии _____ Дата упаковки: хх. хх. ххххг. Годен до: хх. хх. хххх г. Упаковщик ФИО _____
--	---

Макет маркировки транспортной упаковки (гофротара)

1. Макет наклейки на гофротару для вариантов исполнения, не комплектуемых иглой

ПРИМЕР для варианта исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

 ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия	
Юридический адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2	
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7	
Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023	
Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).	
№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000 20 штук по 2,0 мл Вес брутто: 1,00 кг	LOT 
     	30 °C  1 °C  STERILE 

2. Макет наклейки на гофротару для вариантов исполнения, не комплектуемых иглой

ПРИМЕР для варианта исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

 **ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия**
Юридический адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

**Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)
стерильный, в шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023**

Вариант исполнения:
Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000
20 штук по 3,0 мл
Вес брутто: 1,00 кг

 **LOT**


      **STERILE**

3. Макет наклейки на гофротару для вариантов исполнения, комплектуемых иглой

ПРИМЕР для варианта исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСЗ 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

	
ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия	
Юридический адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), двлд. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2	
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7	
Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)	
стерильный, в шприце однократного применения	
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023	
Вариант исполнения:	
Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСЗ 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).	
Поставляемая в комплекте игла – стерильная.	
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.	
№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000	
20 штук по 2,0 мл	
Вес брутто: 1,00 кг	
                         	


4. Макет наклейки на гофротару для вариантов исполнения, комплектуемых иглой

ПРИМЕР для варианта исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

 ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия	
Юридический адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), д/дл. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2	
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строения 2, Блок Г, этаж 7	
Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023	
Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).	
Поставляемая в комплекте игла – стерильная. Метод стерилизации иглы: оксид этилена.	
№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000 20 штук по 3,0 мл Вес брутто: 1,00 кг	
                            	

На каждой транспортной упаковке должно быть также указано (надпись и/или символ):
«Хрупкое. Обращаться с осторожностью» «Беречь от влаги» «Верх»

Макет наклейки на гофротару (пример)

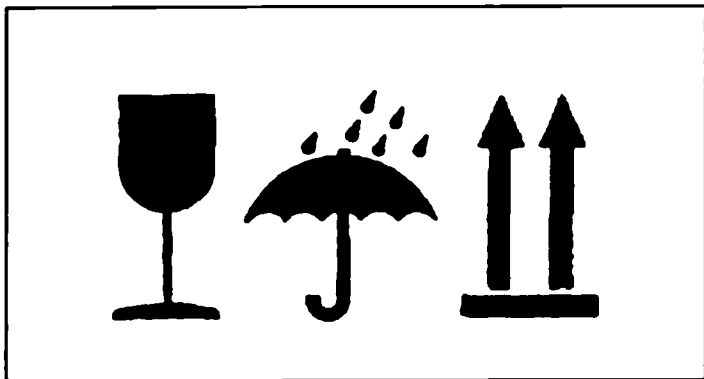

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью 14/Сетевые лист 01

Генеральный директор ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»



Еременко О.Н. Еременко О.Н.

ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»

Юридический адрес: 108811, г. Москва,
вн. тер. г. поселение Московский
км Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
двлд. 4 стр. 2, помещ. 68Н/2
Фактический адрес: 108811, г. Москва,
Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский),
домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7 (Седьмой)
ИНН/КПП: 7751265846/775101001
ОГРН/ ОКПО: 1237700585540/50383176
тел: +7 925 441 30 80
e-mail: office@bionoltra.com

Фотографические изображения

общего вида медицинского изделия

**Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023»**

Фотографические изображения медицинского изделия в первичной упаковке – стеклянном шприце;
Фотографические изображения медицинского изделия в шприце и в индивидуальной упаковке (контейнере);
Фотографические изображения общего вида медицинского изделия;
Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки) медицинского изделия;
Фотографические изображения транспортной упаковки (гофротара) медицинского изделия.

Генеральный Директор
ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»



Еременко Оксана Николаевна

Фотографическое изображение медицинского изделия в первичной упаковке – стеклянном шприце


Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях.

Для Вариантов исполнения объемом 2,0 мл:

- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

А) Пример - в шприце производства Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.", Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4,38801 Le Pont-de-Glaix, France. ПУ № ФСЗ 2011/11237

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 2,0 мл

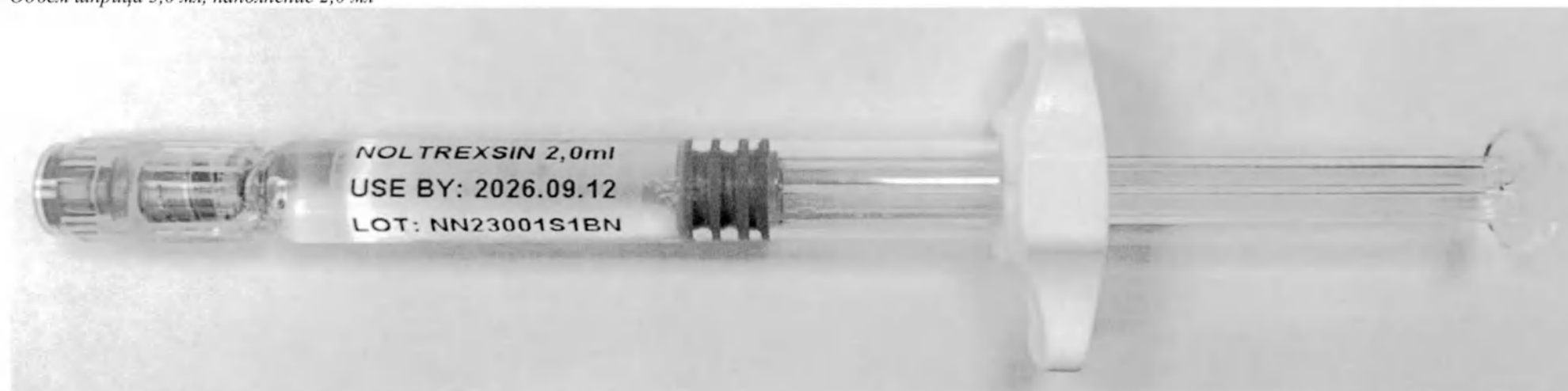


Объем шприца 2,25 мл, наполнение 2,0 мл





Б) Пример - в шприце производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 2,0 мл

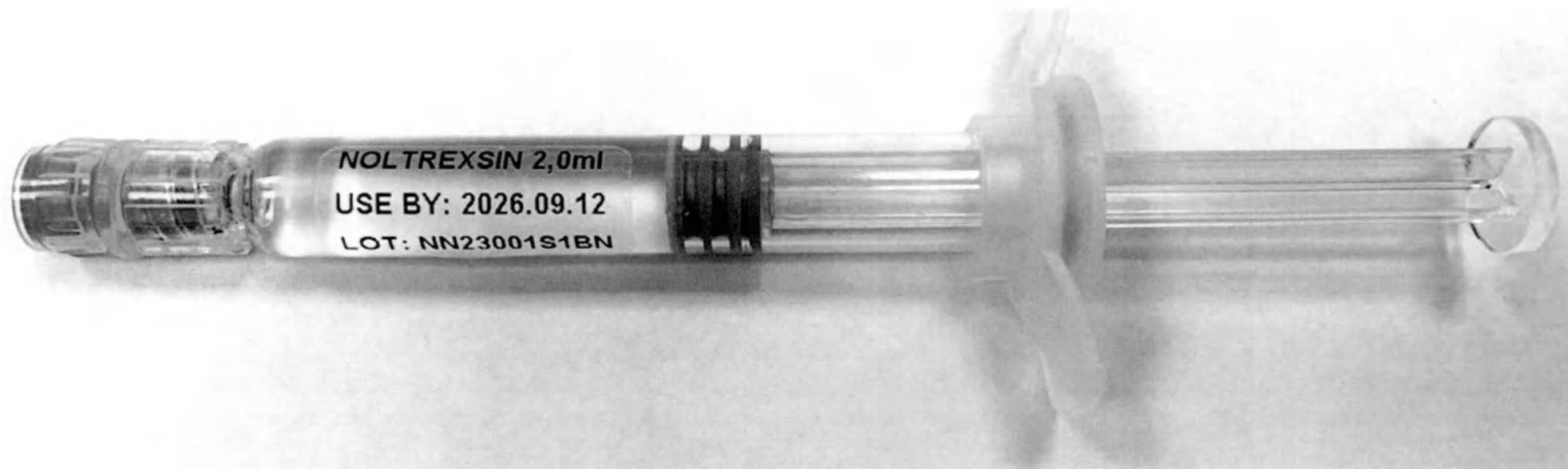

В) Пример комплектации шприца 3,0 мл (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237) наполнением 2,0 мл с комплектацией штоком 3 мл усиленными для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый или прозрачный), производства ООО «Альфа» (Россия)

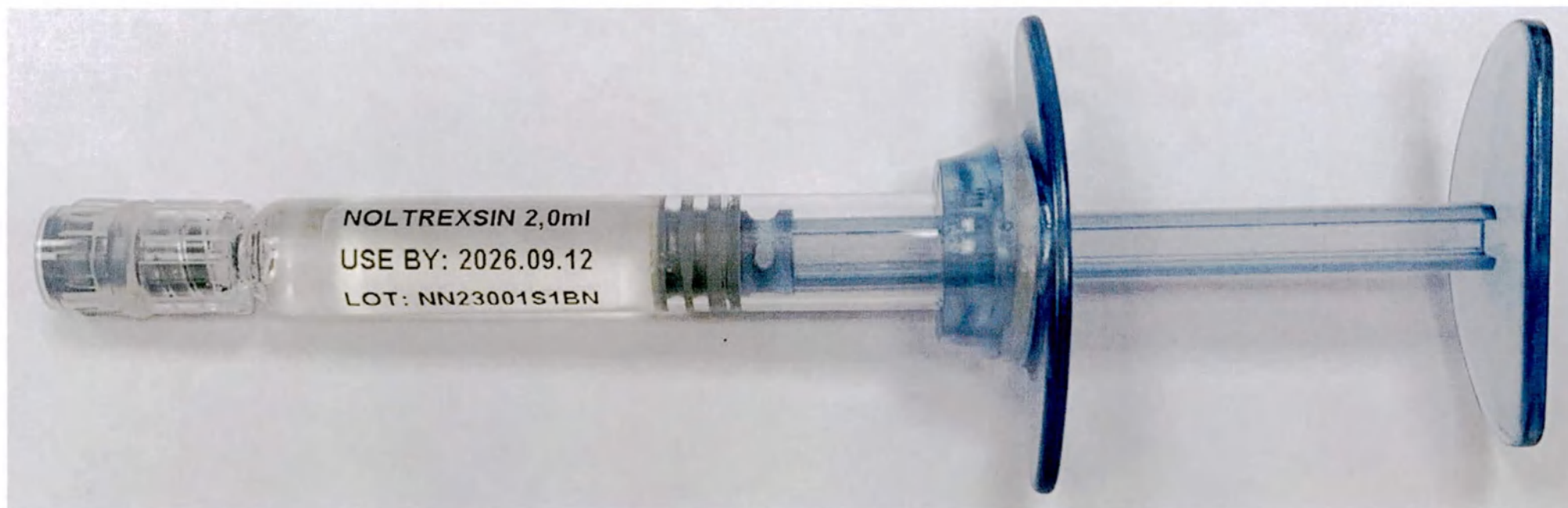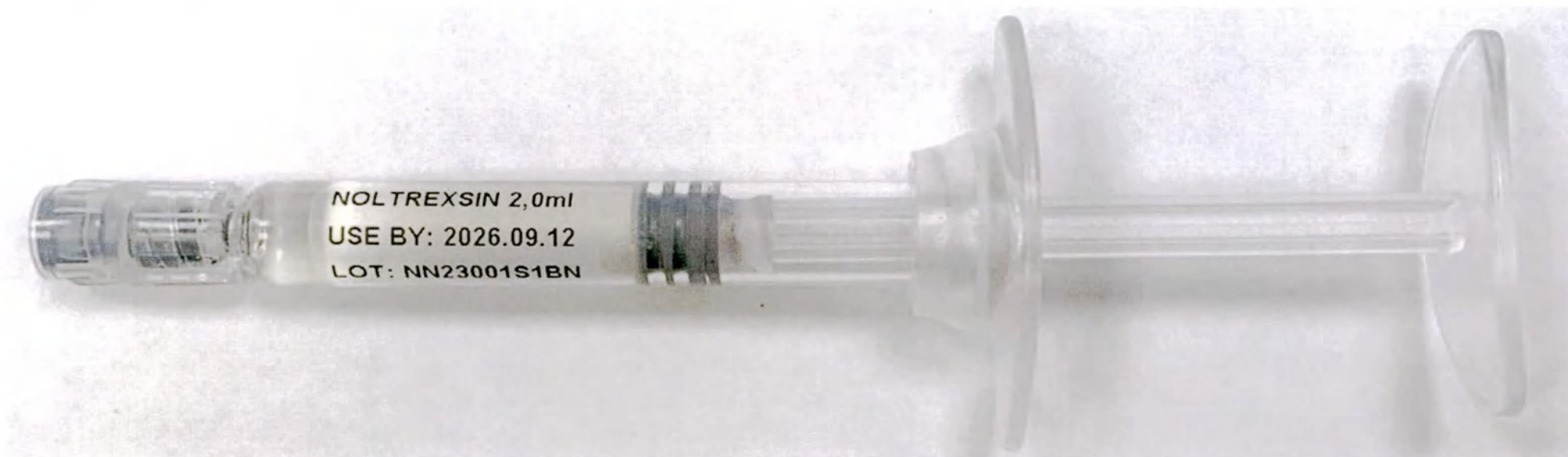


Для Вариантов исполнения:

- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).


А) Пример в шприце производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4,38801 Le Pont-de-Glaix, France. ПУ № ФСЗ 2011/11237

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 3,0 мл


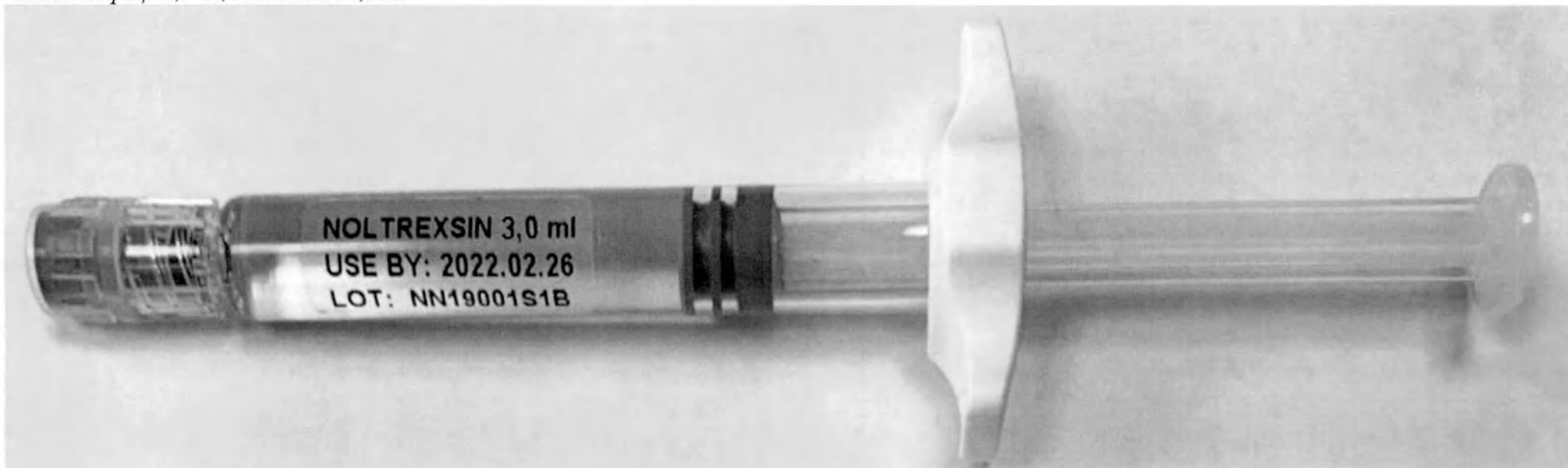


Б) Пример в шприце производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР
№ РЗН 2013/764 от 27.11.2023

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 3,0 мл

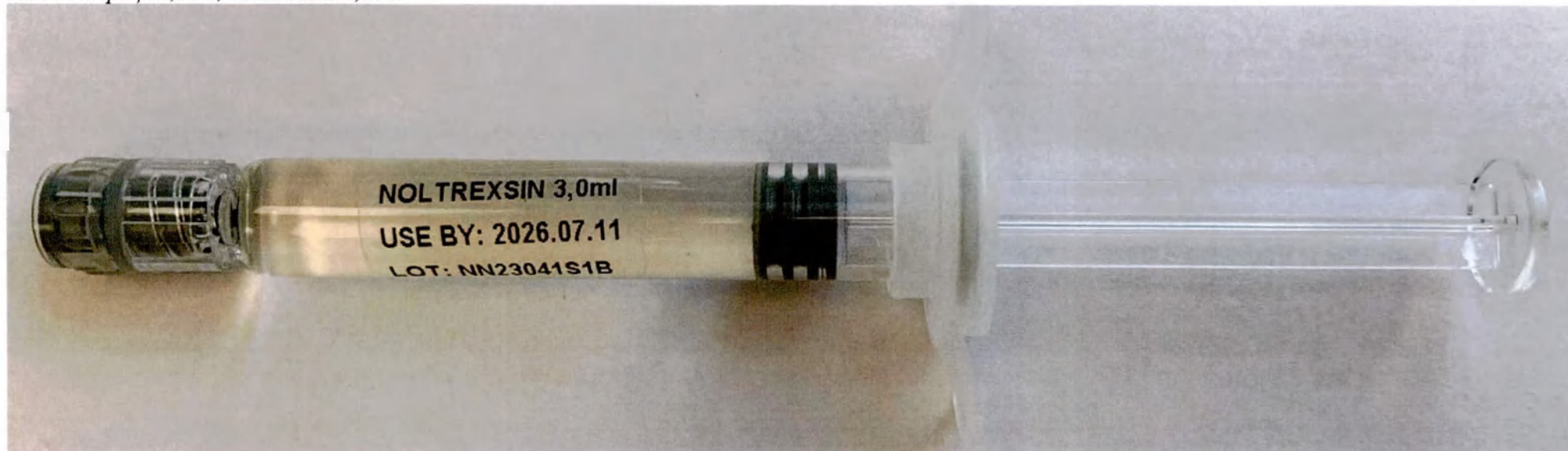

В) Пример шприца 3,0 мл (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237), наполнением 3,0, с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый), производства ООО «Альфа» (Россия)

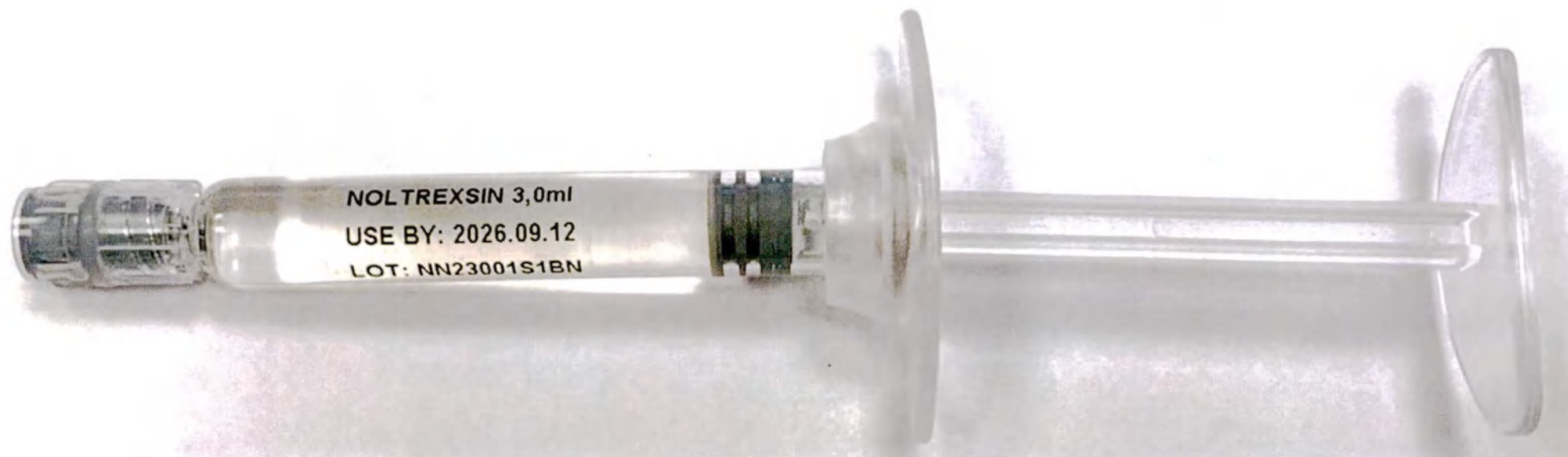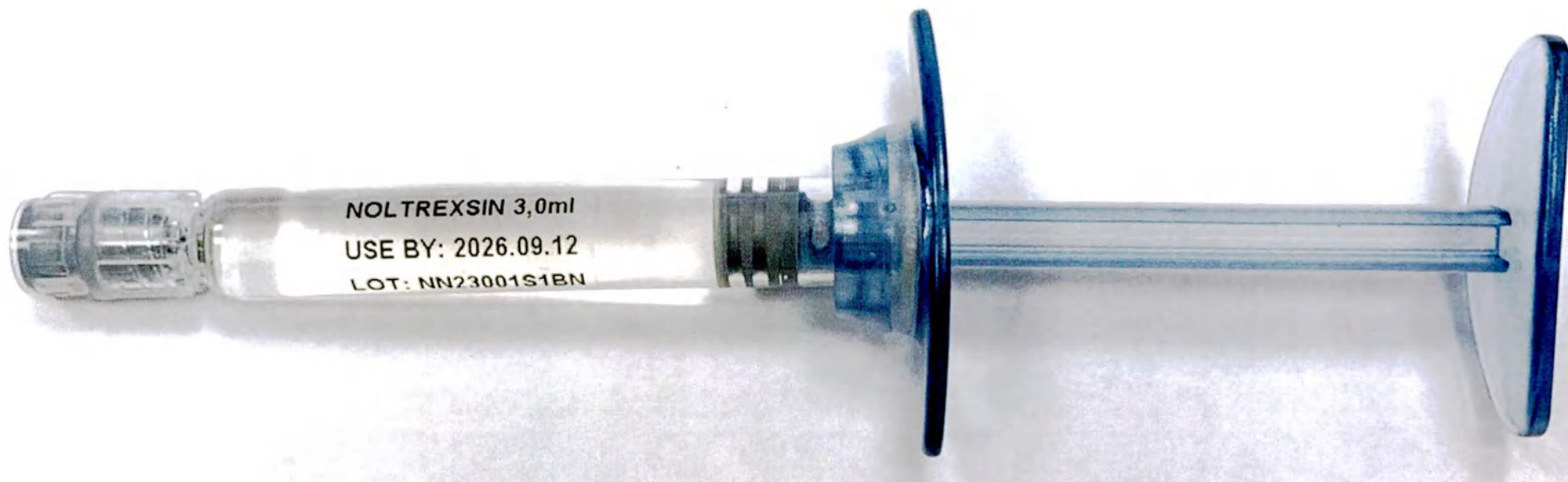



Фотографическое изображение эндопротеза в шприце и в индивидуальной упаковке (контейнере)

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях.

Для Вариантов исполнения объемом 2,0 мл:


- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

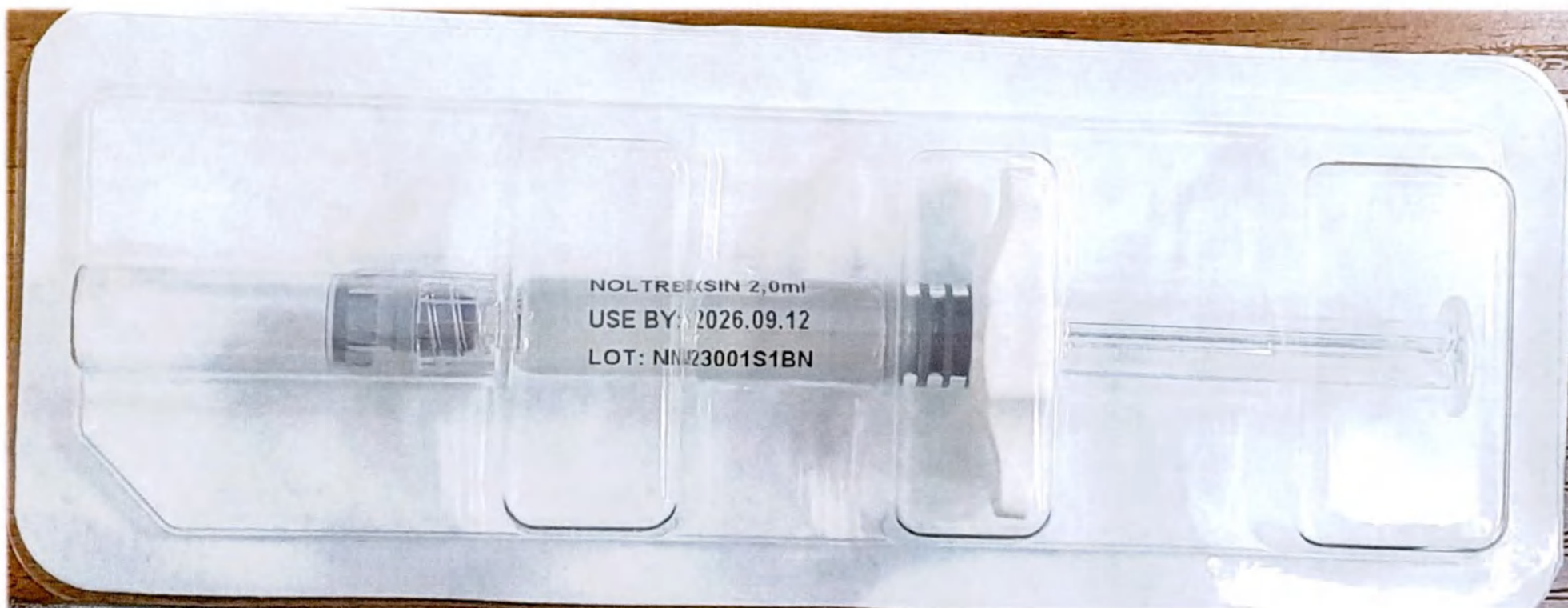

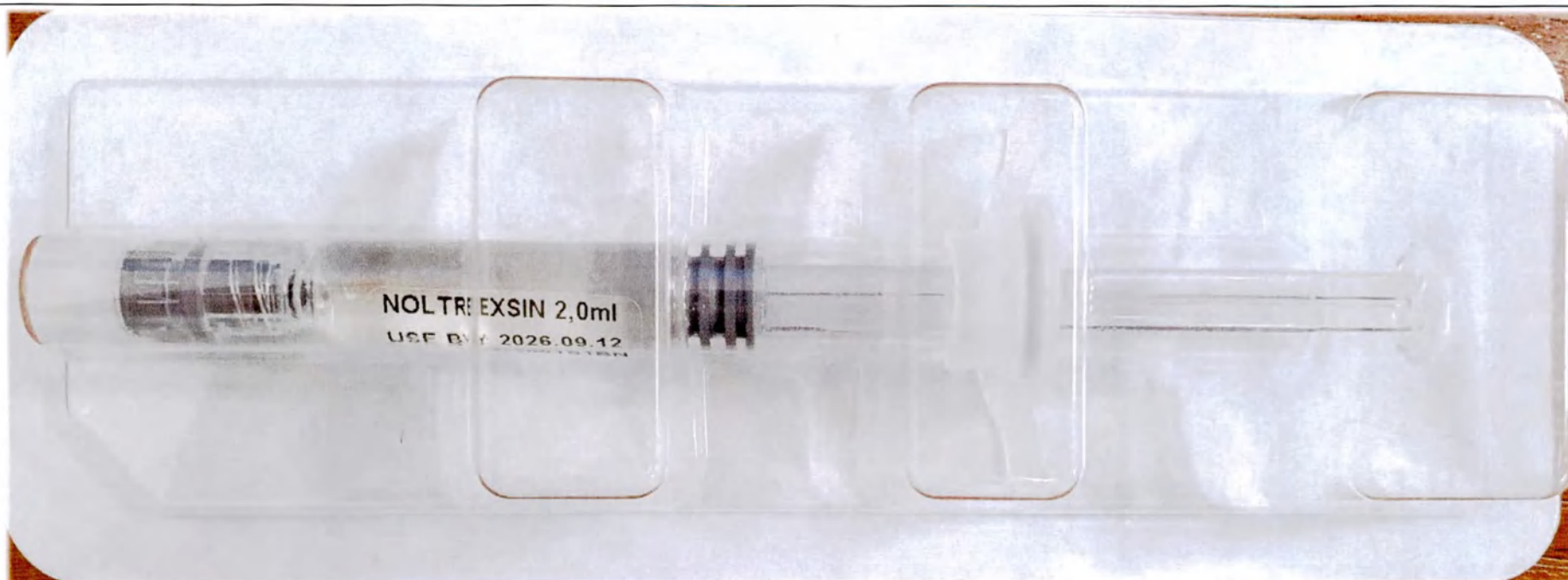

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 2.0 мл



2023-09 **LOT** NN23001S1BN 2026-09-12 Нетоксично

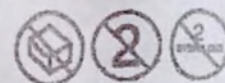


 ООО "БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ", Россия

Место производства: г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

Пример блистера для шприца 3,0 мл, наполнением 2,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый или бесцветный) производства ООО «Альфа» (Россия)

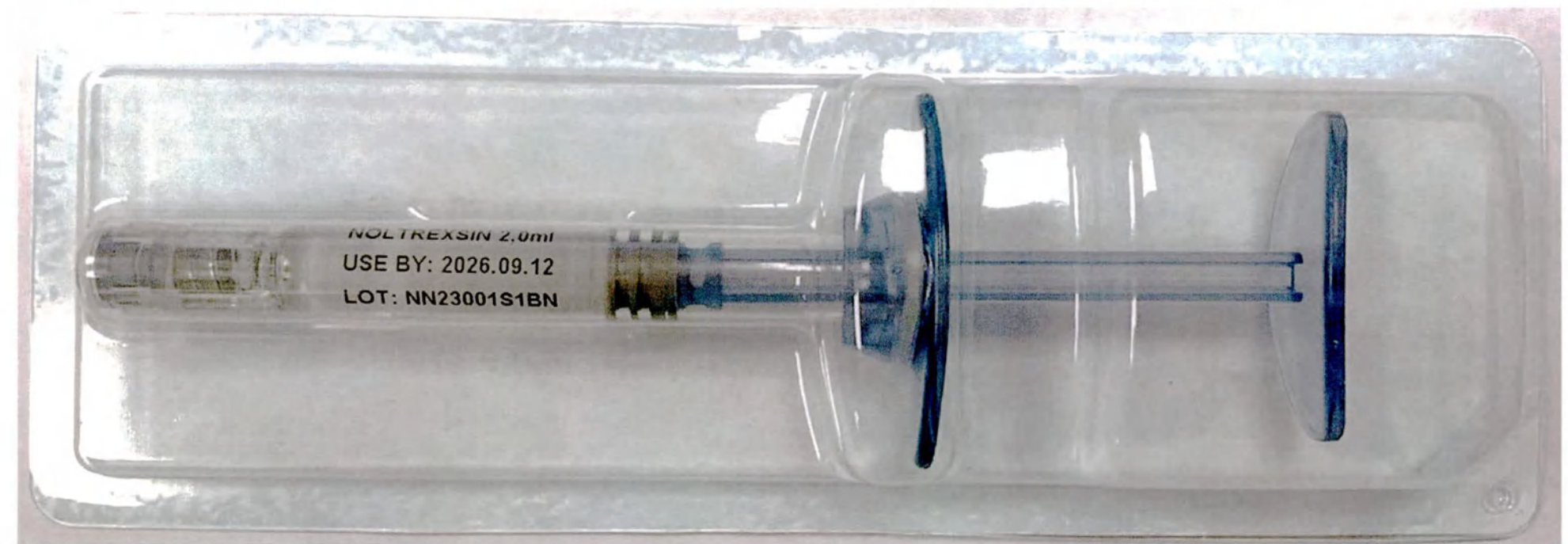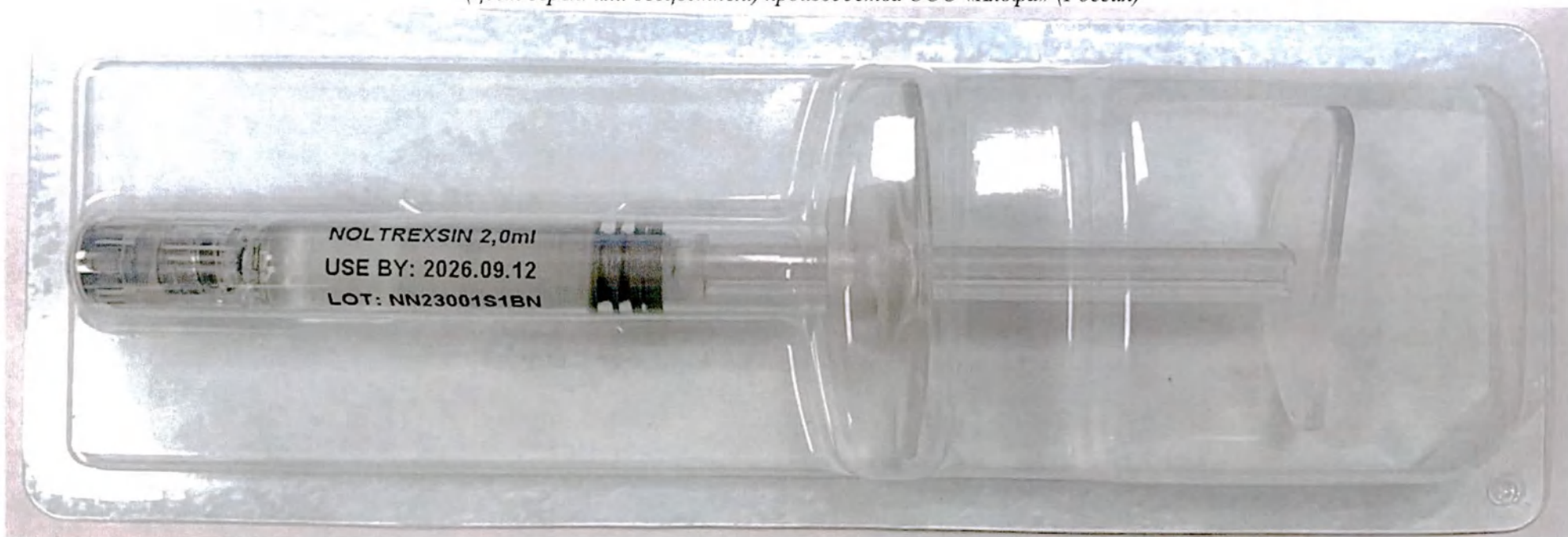

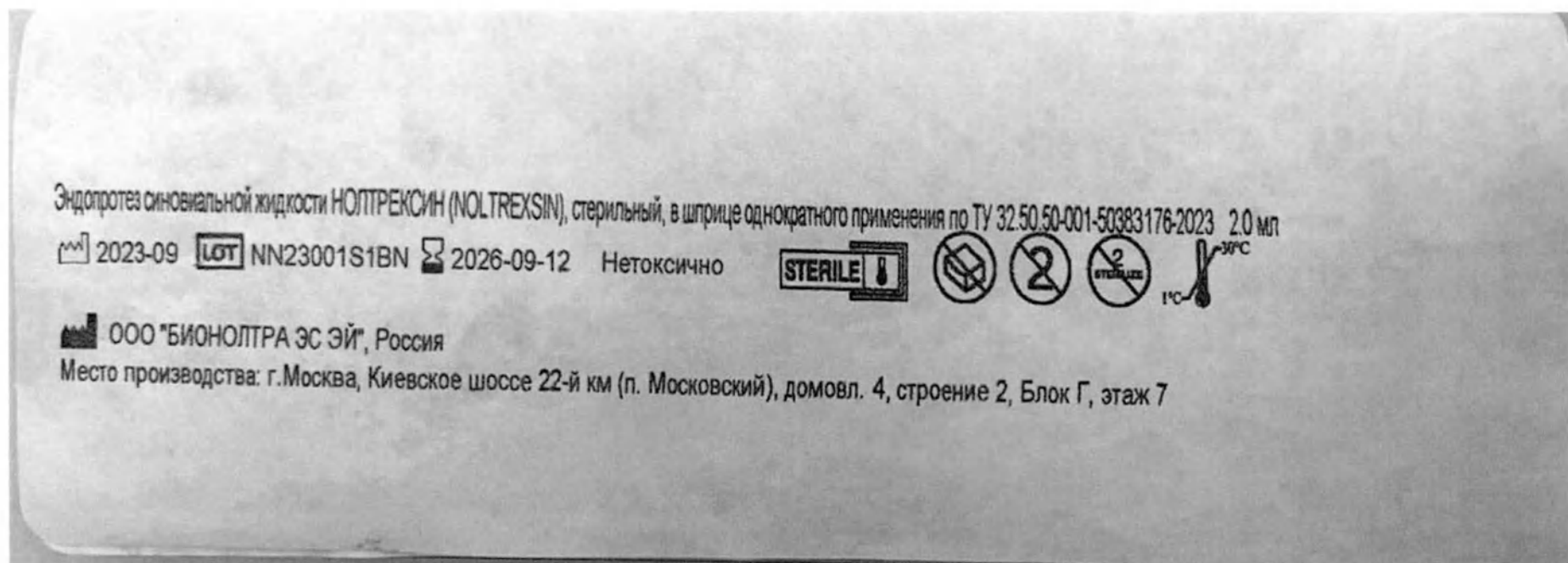




(Фото крышки блистера (контейнера) с маркировкой для шприца 3,0 мл наполнением 2,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным, производства ООО «Альфа»)

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях.


Для Вариантов исполнения:

- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

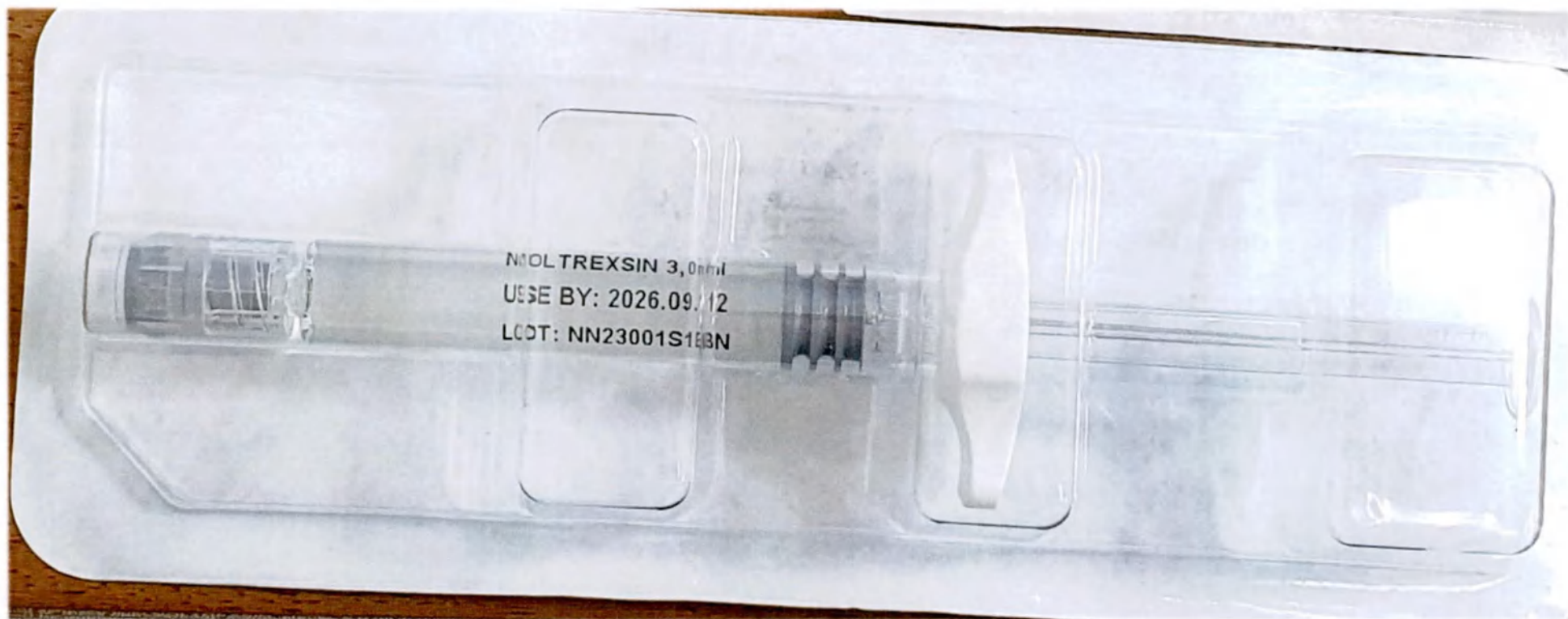

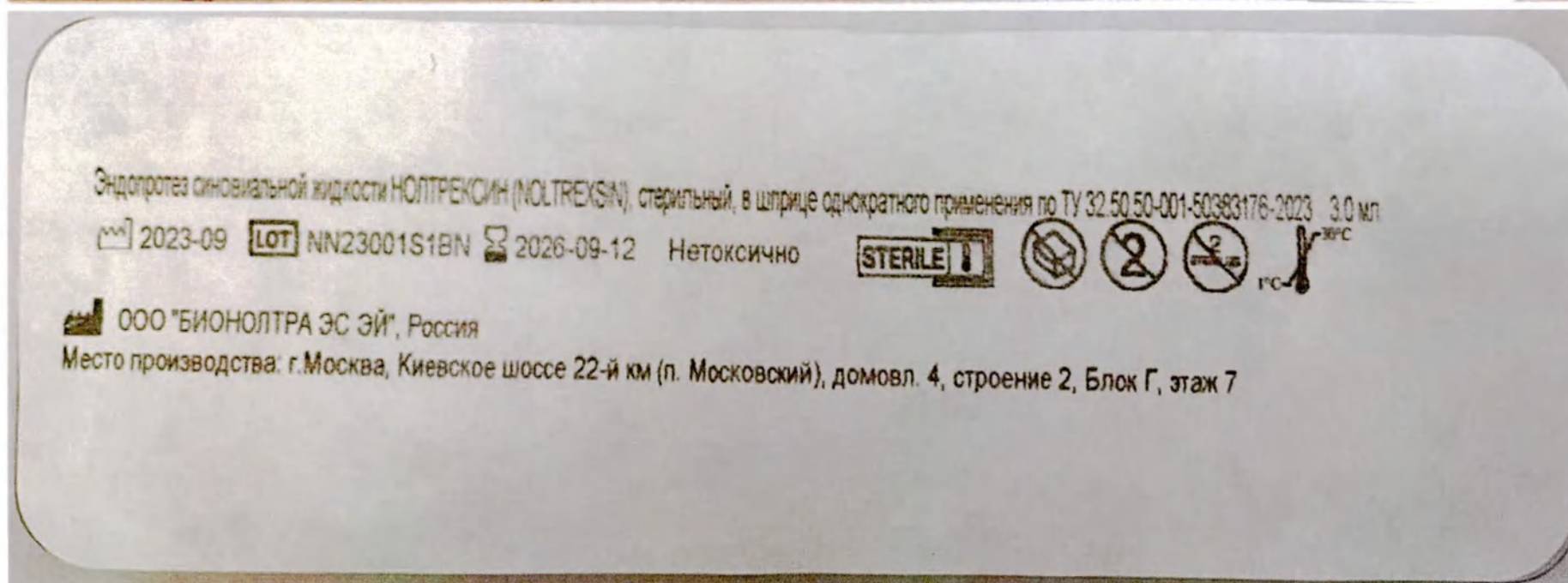
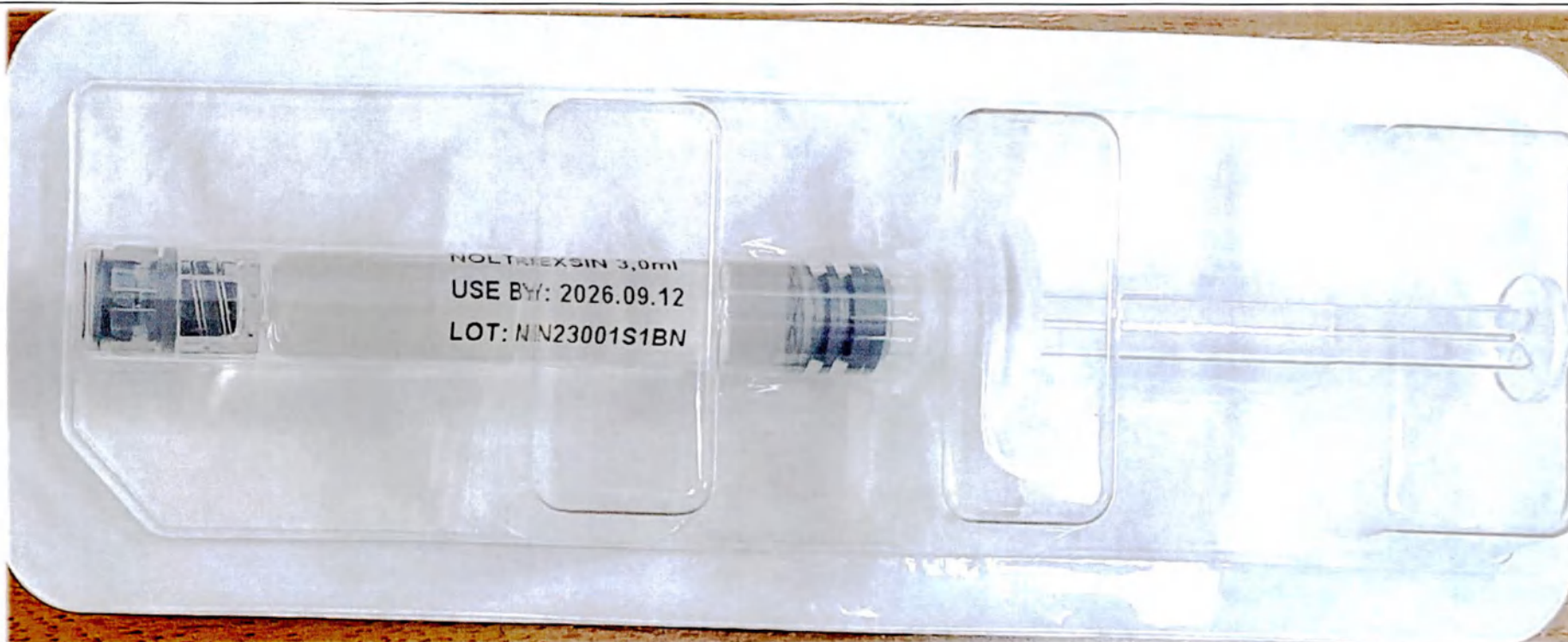


Пример блистера для шприца 3,0 мл наполнением 3,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый или бесцветный), производства ООО «Альфа»

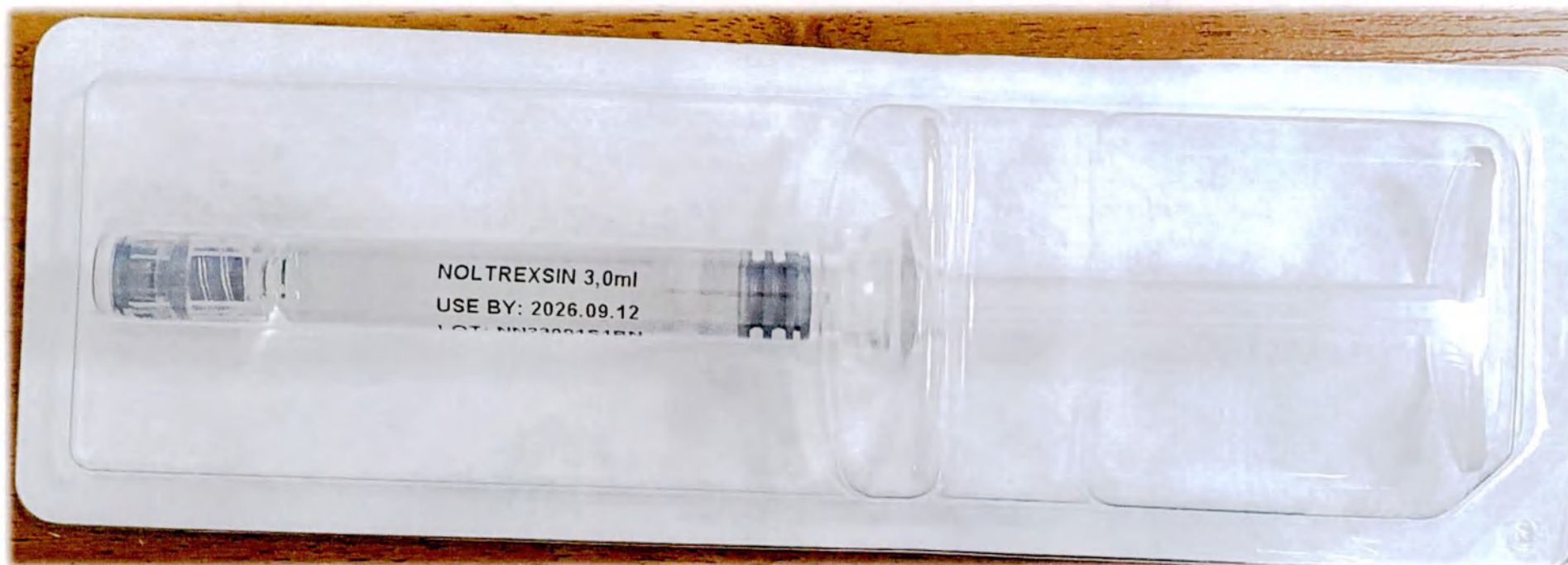

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 3,0 мл

2023-09 **LOT** NN23001S1BN 2026-09-12 Нетоксично

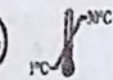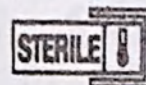


ООО "БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ", Россия

Место производства: г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

*(Фото крышки блистера (контейнера) с маркировкой для шприца 3,0 мл наполнением 3,0 мл
в комплектации штоком 3 мл усиленными для стеклянного шприца
и упором для пальцев усиленным, производства ООО «Альфа»)*

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия, потребительской упаковки (коробки) и транспортной упаковки (гофротара) в соответствии с вариантами исполнения медицинского изделия

1. **1. Общий вид медицинского изделия** Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях. **Вариант исполнения:** Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
Комплектация: эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

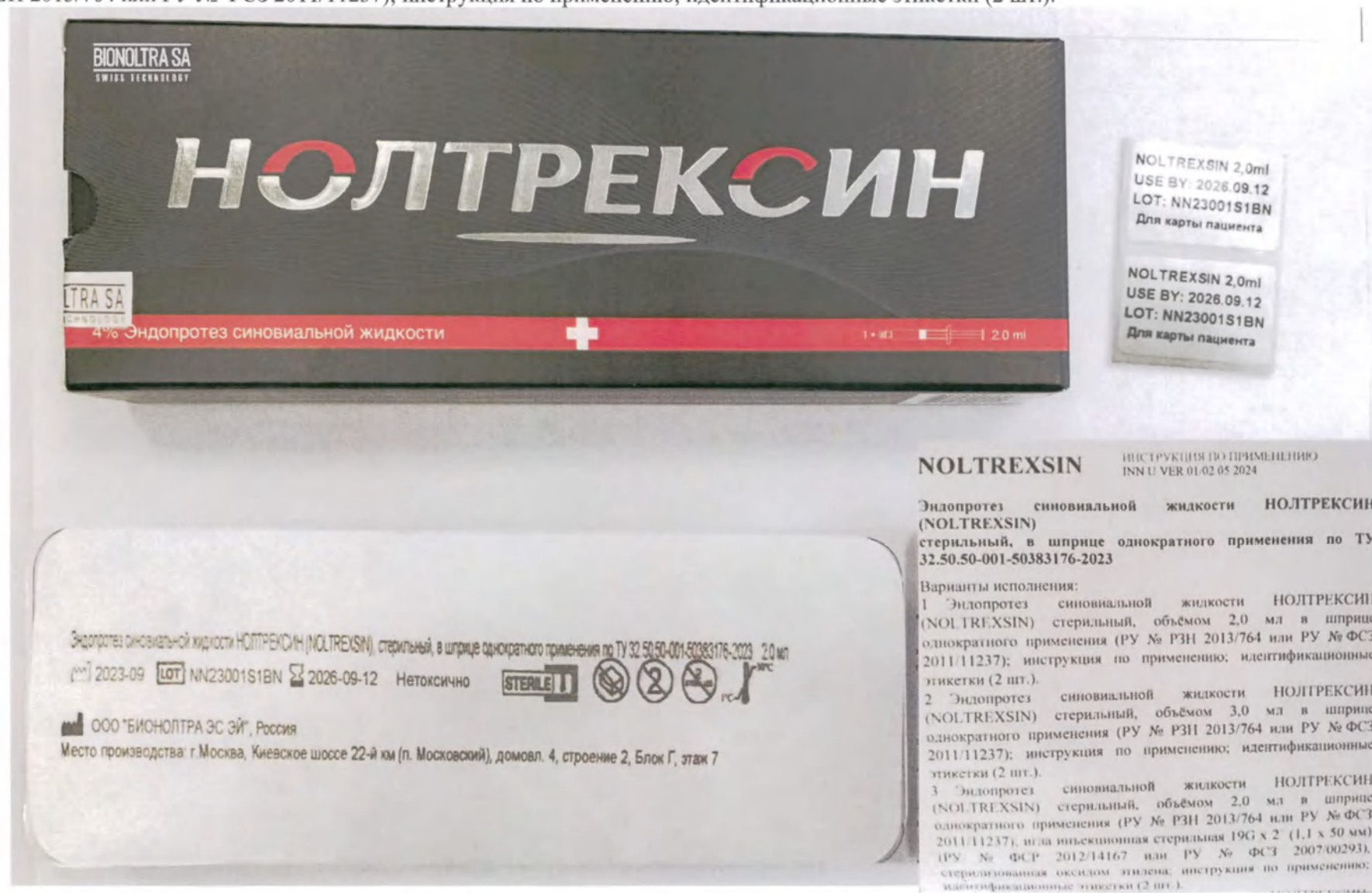

А) Пример - в шприце производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4,38801 Le Pont-de-Glaix, France. РУ № ФСЗ 2011/11237

Объем шприца 2,25 мл, наполнение 2,0 мл



NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента



NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01.02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293); стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 2,0 мл



NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента


NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01.02.05 2024


Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

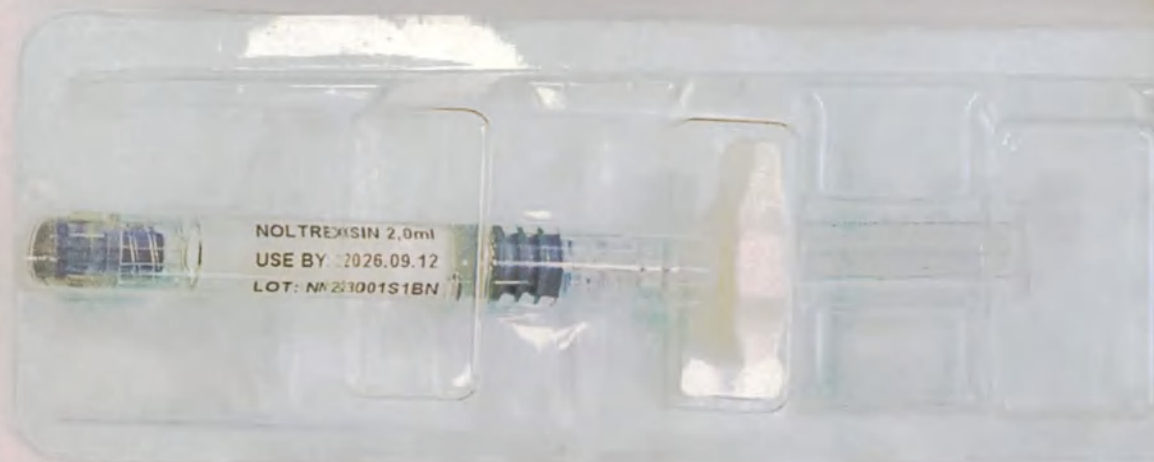

Б) Пример - в шприце производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР, РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023
Объем шприца 3,0 мл, наполнение 2,0 мл

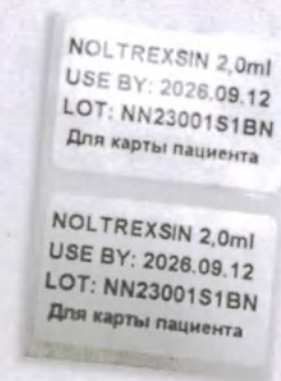

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02 05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293); стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

В) Пример - в шприце 3,0 мл (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237), наполнение 2,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет бесцветный) производства ООО «Альфа» (Россия)



NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Г) Пример - в шприце 3,0 мл (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237), наполнение 2,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый) производства ООО «Альфа» (Россия)



NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02/05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).



Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки)

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).



Contents: three-dimensional polyacrylamide, %: $4,0 \pm 1,0$; water for injections, %: $96,0 \pm 1,0$; silver ions, %: 0,0001 – 0,0005.
Состав: трехмерный полиакриламид, %: $4,0 \pm 1,0$; вода для инъекций, %: $96,0 \pm 1,0$; ионы серебра, %: 0,0001 – 0,0005.



PNN 2.0 UG REV.01/06.05.2024; PY

REF 001NN-2.0UG

Manufacturer: BIONOLTRA SA, LLC, room 68H/2, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia
Place of manufacture: 7 floor, Block G, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia.

Производитель: ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), длд. 4, стр. 2, помещ. 68H/2
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7.

Тел: +7 925 441-30-80; e-mail: office@bionoltra.com

EN Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, in disposable syringe, TU 32.50.50-001-50383176-2023

MD version: Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, 2.0 ml in disposable syringe (Reg № РЗН 2013/764 or № ФСЗ 2011/11237); instruction for use leaflet; patient labels (2 pcs.)

To be administered by authorized personnel only in accordance with local legislation


Swiss technology

RU Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.)

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.

Произведено по швейцарской технологии

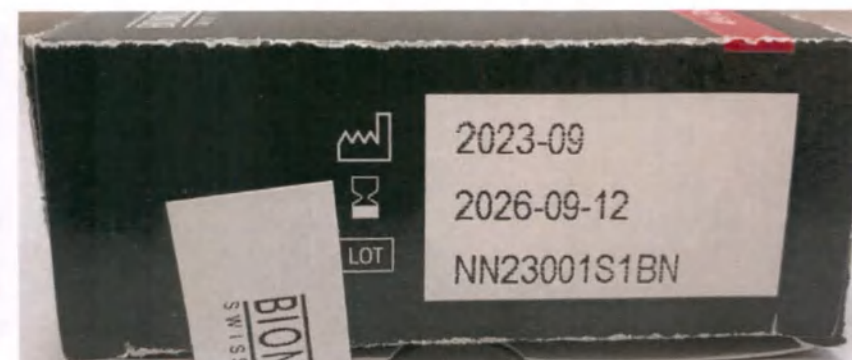

Фотографическое изображение транспортной упаковки



Фотографическое изображение упаковочного листа

Упаковочный лист
ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN), стерильный, в
шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023
Вариант исполнения
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN) стерильный,
объёмом 2,0 мл в шприце однократного
применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ
2011/11237); инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.).
Объём 2,0 мл
Количество изделий — 20 шт.
№ партии NN23001S1BN
Дата упаковки: 12.09.2023г.
Годен до: 12.09.2026г.
Упаковщик Сафонов П.А.



2. Общий вид медицинского изделия Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях. **Вариант исполнения:** Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
Комплектация: эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237), инструкция по применению, идентификационные этикетки (2 шт.).



NOLTREXSIN 3,0ml
 USE BY: 2026.09.12
 LOT: NN23001S1BN
 Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
 USE BY: 2026.09.12
 LOT: NN23001S1BN
 Для карты пациента

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 3.0 мл
 2023-09 LOT NN23001S1BN 2026-09-12 Нетоксично

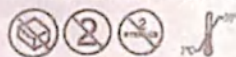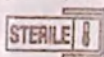

ООО "БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ", Россия

Место производства: г.Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 INN U VER 01.02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСЗ 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293); стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).


А) Пример в шприце производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, Becton Dickinson France S.A.S., 11 rue Aristide Berges, BP4,38801 Le Pont-de-Glaix, France. РУ № ФСЗ 2011/11237

Объем шприца 3,0 мл, наполнение 3,0 мл



NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

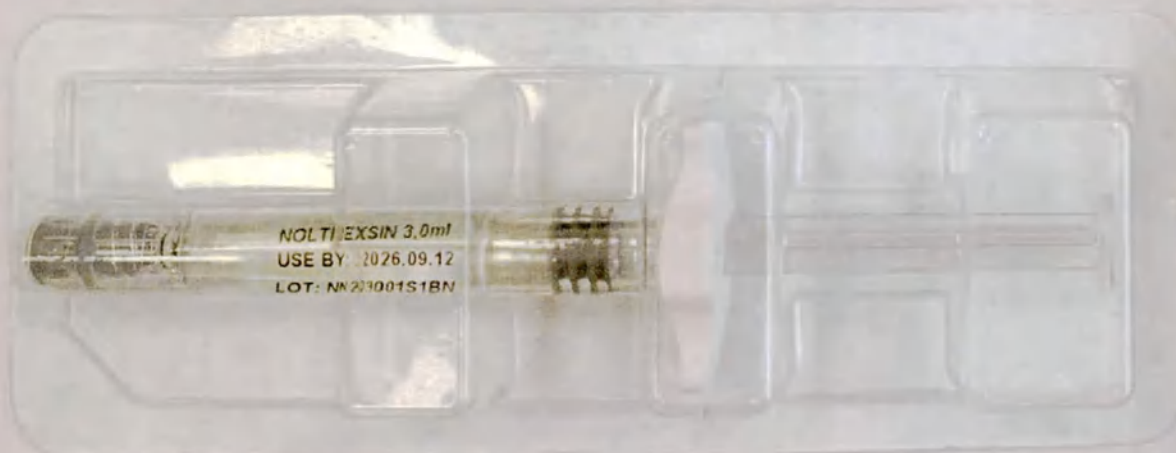

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02 05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)**

стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).


3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2 (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Б) Пример - в шприце производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР, РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023
Объем шприца 3,0 мл, наполнение 3,0 мл



NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

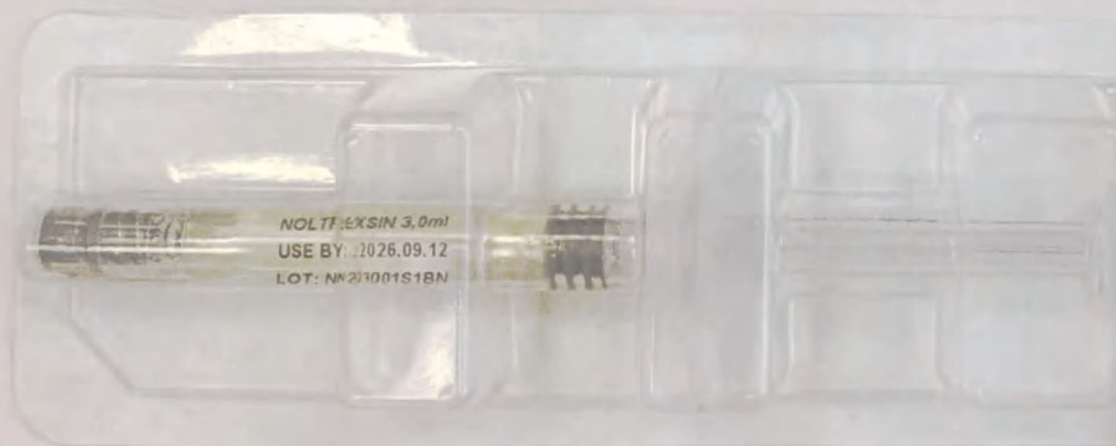

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER. 01/02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN)
стерильный, в шприце однократного применения по ТУ
32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце
однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ
2011/11237); инструкция по применению; идентификационные
этикетки (2 шт.).

2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце
однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ
2011/11237); инструкция по применению; идентификационные
этикетки (2 шт.).

3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце
однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ
2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм)
(РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293),
стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.).

В) Пример - в шприце 3,0 мл (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237), наполнение 3,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет неокрашенный) производства ООО «Альфа» (Россия)



NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента



NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02/05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Г) Пример - в шприце 3,0 мл (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237), наполнение 3,0 мл в комплектации штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца и упором для пальцев усиленным (цвет серый) производства ООО «Альфа» (Россия)



NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента



NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

- 1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
- 3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН** (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки)

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237).



Contents: three-dimensional polyacrylamide, %: $4,0 \pm 1,0$; water for injections, %: $96,0 \pm 1,0$; silver ions, %: 0,0001 – 0,0005.
Состав: трехмерный полиакриламид, %: $4,0 \pm 1,0$; вода для инъекций, %: $96,0 \pm 1,0$; ионы серебра, %: 0,0001 – 0,0005.



PNN 3.0 UG REV.01/06.05.2024; PY

REF 001NN-3.0UG

Manufacturer: BIONOLTRA SA, LLC, room 68H/2, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia
Place of manufacture: 7 floor, Block G, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia.

Производитель: ООО «БИОНОЛТРА ЭС Эй», Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), длд. 4, стр. 2, помещ. 68H/2
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7.

Тел: +7 925 441-30-80; e-mail: office@bionoltra.com

EN Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, in disposable syringe, TU 32.50.50-001-50383176-2023

MD version: Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, 3.0 ml in disposable syringe (Reg № PЗН 2013/764 or № ФСЗ 2011/11237); instruction for use leaflet; patient labels (2 pcs.)

To be administered by authorized personnel only in accordance with local legislation

Swiss technology

RU Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023


Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № PЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.)

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.

Произведено по швейцарской технологии



NOLTREXSIN 3.0 ml

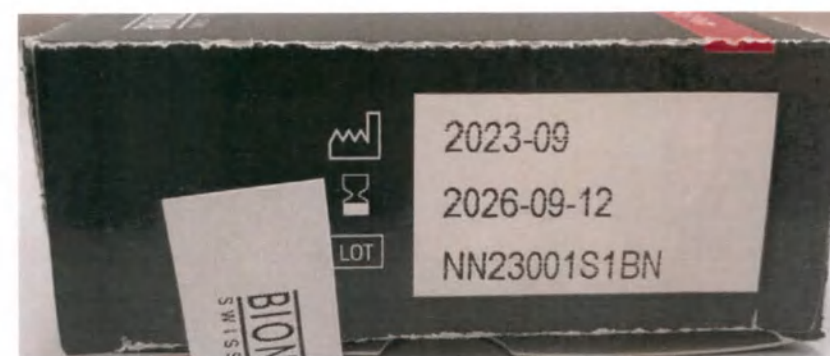


Фотографическое изображение упаковочного листа

Упаковочный лист
ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN), стерильный, в
шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023
Вариант исполнения
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN) стерильный,
объемом 3,0 мл в шприце однократного
применения (ПУ № РЗН-2013/764 или ПУ №ФСЗ
2011/11237); инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.)
Объем 3,0 мл
Количество изделий — 20 шт.
№ партии NN23001S1BN
Дата упаковки: 12.09.2023г.
Годен до: 12.09.2026г.
Упаковщик Сафонов П.А.

3. Общий вид медицинского изделия Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях. **Вариант исполнения:** Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Комплектация: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Производитель инъекционной иглы: B.BRAUN Melsungen AG (Б. Браун Мельзунген АГ), Германия. Иглы «Стерикан» (Sterican). ПУ № ФСЗ 2007/00293

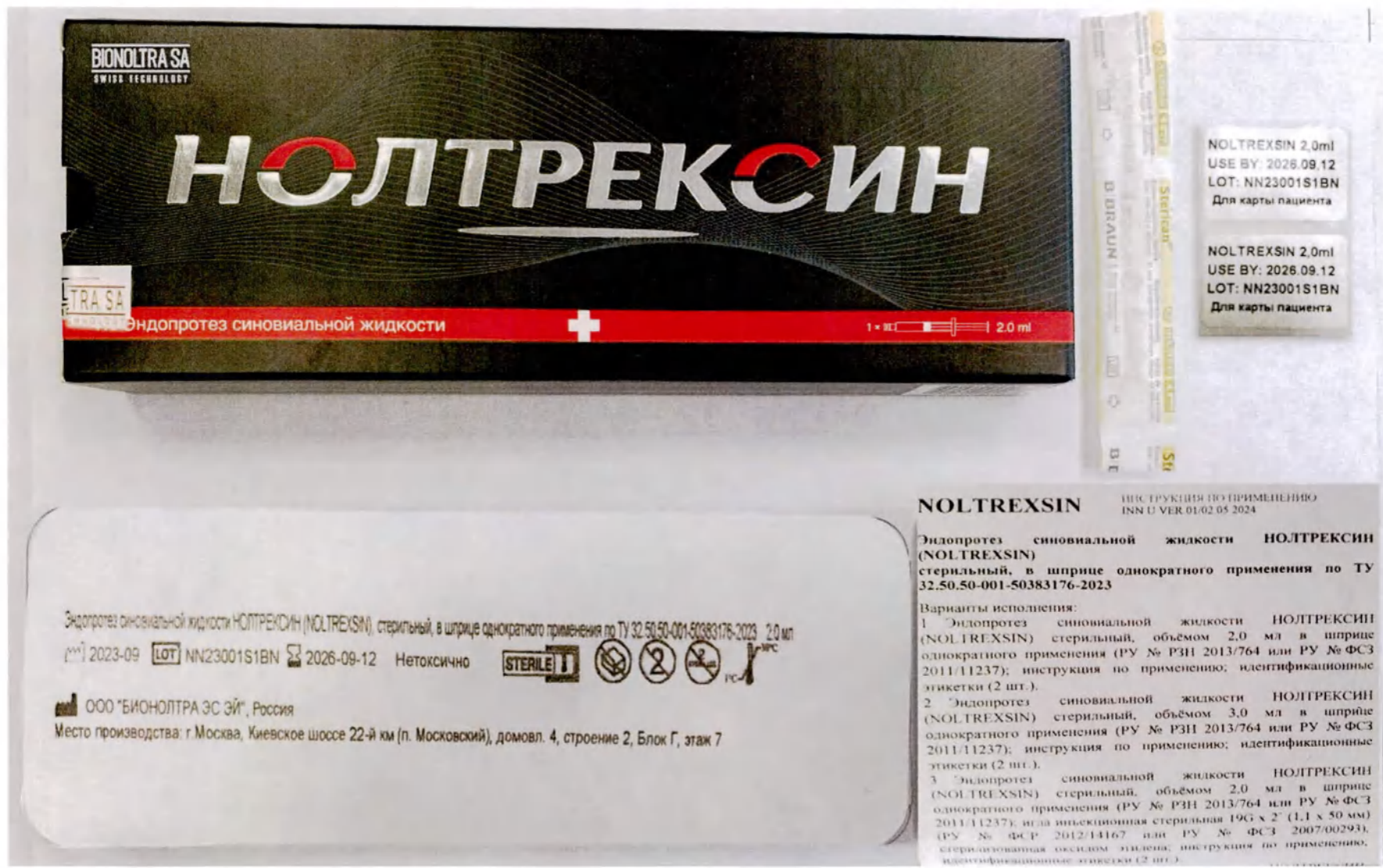



NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 2,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

Microbiology, c/o, 1 Pym
pt, Pymms & Co
e-mail: store@pymms.co.uk
Tel: +44 195 972 34 92

8114 Independence Ave
 Westborough, MA 01581
 Telephone: 508/336-1100
 Fax: 508/336-1101
 E-mail: info@harsco.com
 Web: www.harsco.com

STERILE/ECO
♻️

Исследования
по теме
научно-технической работы
по теме
научно-технической работы
на тему

11x50
135x2
LOT 102201
EXP 10/2027

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02 05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN)
стерильный, в шприце однократного применения по ТУ
32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1. Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

2. Эндопротез синовиальной жидкости ПОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

3 Эндотрезол синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН**
(NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце
однократного применения (ПУ № ПЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ
2011/11237); или инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм)
(ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293),
стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.).

Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-80383176-2023 2,0 мл

2023-09 LOT NN23001S1BN 2026-09-12 Нетоксично

STERILE

ООО "БИОНОЛТРАЭС ЭЙ", Россия

Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки)

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).












 НЕТОКСИЧНО

REF	001NN-2.0UGn
-----	--------------

Производитель: ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселения Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), длд. 4, стр. 2, помещ. 68Н/2
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7.

Произведено по швейцарской технологии

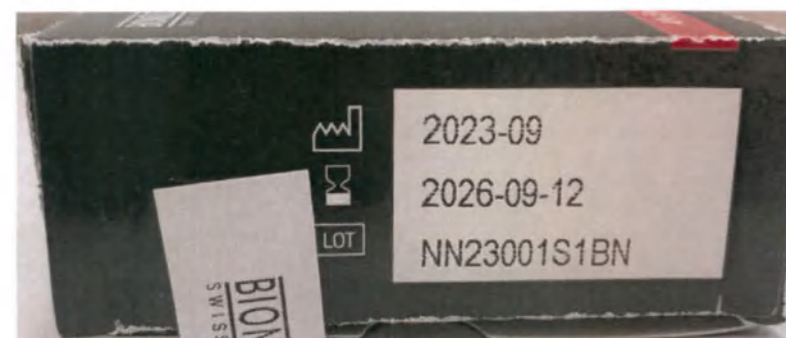

Фотографическое изображение транспортной упаковки



Фотографическое изображение упаковочного листа

Упаковочный лист
ООО «БИОНОЛТРА-ЭС-ЭЙ»
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в
шприце однократного применения
ТУ 32.50.50-001-50383176-2023
Вариант исполнения:
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный,
объемом 2,0 мл в шприце однократного
применения (ПУ № РЗН-2013/764 или ПУ № ФСЗ-
2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G х
2" (1,1 х 50 мм) (ПУ № ФСР-2012/14167 или ПУ №
ФСЗ-2007/00293), стерилизованная оксидом
этилена; инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.).
Объем 2,0 мл
Количество изделий — 20 шт.
№ партии NN23001S1BN
Дата упаковки: 12.09.2023г.
Годен до: 12.09.2026г.
Упаковщик *Сафонов П.А.*

3. Общий вид медицинского изделия Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, в шприце однократного применения, в исполнениях. **Вариант исполнения:** Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Комплектация: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Производитель инъекционной иглы: B.BRAUN Melsungen AG (Б. Браун Мельзунген АГ), Германия. Иглы «Стерикан» (Sterican). ПУ № ФСЗ 2007/00293




NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента



Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023 3.0 мл
2023-09 LOT NN23001S1BN 2026-09-12 Нетоксично

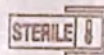

ООО "БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ", Россия

Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01/02 05 2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

2 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

3 Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № РЗН 2013/764 или ПУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (ПУ № ФСР 2012/14167 или ПУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Производитель инъекционной иглы: ООО "Стерин", Россия РУ № ФСР 2012/14167



Применение: 1. Внутрисуставное введение.
Место введения: 1. Внутрисуставное введение.
Путь введения: 1. Внутрисуставное введение.
Температура: 1. Внутрисуставное введение.
Срок годности: 1. Внутрисуставное введение.
Срок хранения: 1. Внутрисуставное введение.

Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:


STERILE
STERILE
STERILE
STERILE
STERILE

Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:

Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:
Идентификация:

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

NOLTREXSIN 3,0ml
USE BY: 2026.09.12
LOT: NN23001S1BN
Для карты пациента

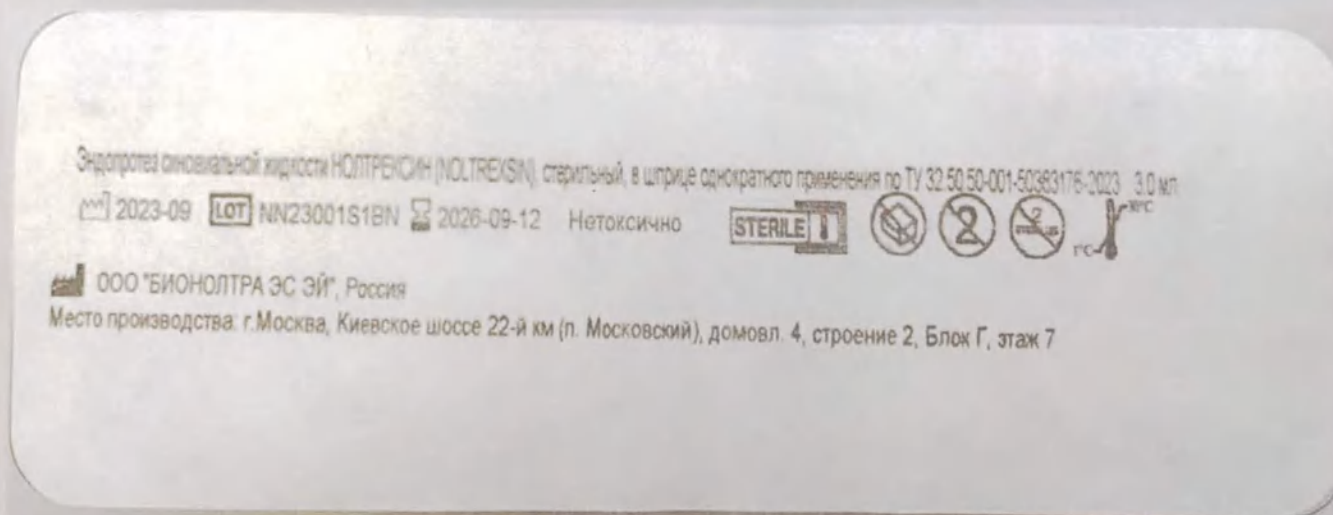

NOLTREXSIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
INN U VER 01.02.05.2024

Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Варианты исполнения:

1. Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
2. Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).
3. Эндопротез синовиальной жидкости **НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN)** стерильный, объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).

Фотографические изображения потребительской упаковки (коробки)

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объёмом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № РЗН 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСР 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.).



Contents: three-dimensional polyacrylamide, %: $4,0 \pm 1,0$; water for injections, %: $96,0 \pm 1,0$; silver ions, %: 0,0001 – 0,0005.
Состав: трехмерный полиакриламид, %: $4,0 \pm 1,0$; вода для инъекций, %: $96,0 \pm 1,0$; ионы серебра, %: 0,0001 – 0,0005.



PNN 3.0 UGn REV.01/06.05.2024; PY

REF 001NN-3.0UGn

Manufacturer: BIONOLTRA SA, LLC, room 68H/2, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia
Place of manufacture: 7 floor, Block G, bldg 2, housing estate 4, 22 km of Kievskoe highway (Moskovskiy), intracity territory of Moskovskiy settlement, Moscow, Russia.

Производитель: ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ», Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п. Московский), длд. 4, стр. 2, помещ. 68H/2
Место производства: г. Москва, Киевское шоссе 22-й км. (п. Московский), домовл. 4, строение 2, Блок Г, этаж 7.

Тел: +7 925 441-30-80; e-mail: office@bionoltra.com

EN Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, in disposable syringe, TU 32.50.50-001-50383176-2023

MD version: Endoprosthesis of synovial fluid NOLTREXSIN, sterile, 3.0 ml in disposable syringe (Reg. № P3H 2013/764 or № ФСЗ 2011/11237); sterile (EO sterilized) injection needle 19G x 2" (1,1 x 50 mm) (Reg. № ФСЗ 2012/14167 or № ФСЗ 2007/00293); instruction for use leaflet; patient labels (2 pcs.)

To be administered by authorized personnel only in accordance with local legislation

Swiss technology

RU Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN), стерильный, в шприце однократного применения по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости НОЛТРЕКСИН (NOLTREXSIN) стерильный, объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № P3H 2013/764 или РУ № ФСЗ 2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСЗ 2012/14167 или РУ № ФСЗ 2007/00293), стерилизованная оксидом этилена; инструкция по применению; идентификационные этикетки (2 шт.)

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами

Произведено по швейцарской технологии



Фотографическое изображение транспортной упаковки



Фотографическое изображение упаковочного листа

Упаковочный лист
ООО «БИОНОЛТРА ЭС-ЭЙ»
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN), стерильный, в
шприце однократного применения
по ТУ 32.50.50-001-50383176-2023.
Вариант исполнения:
Эндопротез синовиальной жидкости
НОЛТРЕКСИН (NOL TREXSIN) стерильный,
объемом 3,0 мл в шприце однократного
применения (РУ № РЗН-2013/764 или РУ № ФСЗ-
2011/11237); игла инъекционная стерильная 19G х
2" (1,1 х 50 мм) (РУ № ФСР-2012/14167 или РУ №
ФСЗ-2007/00293), стерилизованная оксидом
этилена; инструкция по применению;
идентификационные этикетки (2 шт.).
Объем 3,0 мл
Количество изделий — 20 шт.
№ партии NN23001S1BN
Дата упаковки: 12.09.2023г.
Годен до: 12.09.2026г.
Упаковщик Сафонов П.А.

Макет этикетки для защиты от вскрытия

(для нанесения на клапаны потребительской упаковки (при необходимости и по запросу заказчика))



Фотографические изображения этикетки для защиты от вскрытия

Пример нанесения защитной этикетки от вскрытия на клапаны потребительской упаковки (с одной или с двух сторон)



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью 47/сорок семь лист 08

Генеральный директор ООО «БИОНОЛТРА ЭС ЭЙ»



Еременко О.Н. Еременко О.Н.