

8  
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО  
«Ковидиен Евразия»

М.Л. Бокова

2012 г.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

### «Имплантаты для внутреннего протезирования»

## **Этапы операции**

### **1. Техника**

- Выполните разрез размером от 5 до 8 см, после этого выполните диссекцию апоневроза наружной косой мышцы, выделите семенной канатик.
- Вправьте грыжевой мешок.
- Выполните диссекцию внутренней косой мышцы и поперечной фасции.

### **2. Сетка**

## **Пример использования фигурной сетки с клапаном.**

1. Извлеките сетку, откройте клапан и направьте цветную нитяную метку к лобку; при этом сторона с крючками должна быть направлена на глубокий мышечный слой.
2. Расположите семенной канатик в разрезе сетки.
  - А) ВНУТРЕННЯЯ КОСАЯ МЫШЦА
  - В) ВНЕШНЯЯ КОСАЯ МЫШЦА
  - С) РАЗРЕЗ НА КОЖЕ
  - Д) СЕМЕННОЙ КАНАТИК
  - Е) БОЛЬШОЙ ФРАГМЕНТ
3. Закройте клапан на сетке. Можно открывать и закрывать клапан для коррекции формы сетки, и обеспечения максимально правильного смыкания разреза. Разверните большой фрагмент сетки так, чтобы он полностью покрывал паховую связку, а затем разверните оставшуюся часть сетки так, чтобы канатик находился в центре отверстия, чтобы обеспечить полное покрытие всех слабых участков.
4. Необходимость в фиксации сетки определяется хирургом. Благодаря способности материала сетки закрепляться автоматически, можно не фиксировать сетку в соответствии с размером дефекта, местом расположения грыжи и состоянием анатомических структур.
5. Наложите швы на апоневроз внешней косой мышцы и кожу.

## **Пример использования прямоугольной сетки.**

Эту сетку можно использовать как целиком, так и фрагментами. Ее можно прикрепить к связке Купера и/или наружному мышечному слою. Кроме того, ее можно располагать между глубоким мышечным слоем и апоневрозом наружной косой мышцы. Необходимость в фиксации сетки определяется хирургом. Благодаря способности ткани закрепляться автоматически, можно не фиксировать сетку в соответствии с размером дефекта, местом расположения грыжи и состоянием анатомических структур.

## **УПАКОВКА**

Одноразовое устройство. Стерилизовано этиленоксидом.

## **ХРАНЕНИЕ**

1. Рекомендованные условия хранения продукта: при комнатной температуре в темном месте.
2. Запрещается использовать данное изделие после завершения последнего месяца срока годности, указанного на упаковке.
3. При получении изделия убедитесь в целостности и герметичности упаковки. Не используйте изделие, если упаковка кажется поврежденной.

Всего прошено  
и скреплено  
2 листа

