

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会

中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade

China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



244403A0/026667

号码 No.

兹证明：在所附文件上的深圳市顺美医疗股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:

Hu Na

日期：2024年05月29日

(Date: May. 29, 2024)

证书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано/APPROVED

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116
Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

14.05.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY

Подпись/Signature



Инструкция по применению
Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в
вариантах исполнения

Instruction for use
Shunmei Detachable Coil with delivery system in variations

2024

Наименование медицинского изделия / Name of the medical device	
Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в вариантах исполнения 1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, размеры: 1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм, в составе: 1.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм - 1 шт.; 1.1.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 30 мм, в составе: 1.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 30 мм - 1 шт.; 1.2.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе: 1.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.; 1.3.2. Инструкция по применению – 1 шт.	Shunmei Detachable coil with delivery system in variations 1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, sizes: 1.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 20 mm, consisting of: 1.1.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 20 mm - 1 pc.; 1.1.2. Instructions for use – 1 pc. 1.2. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 30 mm, consisting of: 1.2.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 30 mm - 1 pc.; 1.2.2. Instructions for use – 1 pc. 1.3. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 20 mm, consisting of: 1.3.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 20 mm - 1 pc.; 1.3.2. Instructions for use – 1 pc.

1.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе: 1.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.; 1.4.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе: 1.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.; 1.5.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм, в составе: 1.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм - 1 шт.; 1.6.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм, в составе: 1.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм - 1 шт.; 1.7.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм, в составе:	1.4. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 30 mm, consisting of: 1.4.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 30 mm - 1 pc.; 1.4.2. Instructions for use – 1 pc. 1.5. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 40 mm, consisting of: 1.5.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 40 mm - 1 pc.; 1.5.2. Instructions for use – 1 pc. 1.6. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 60 mm, consisting of: 1.6.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 60 mm - 1 pc.; 1.6.2. Instructions for use – 1 pc. 1.7. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 80 mm, consisting of: 1.7.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2 x 80 mm - 1 pc.; 1.7.2. Instructions for use – 1 pc. 1.8. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 20 mm, consisting of:
---	--

1.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм - 1 шт.;

1.8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм, в составе:

1.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм - 1 шт.;

1.9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм, в составе:

1.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм - 1 шт.;

1.10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм, в составе:

1.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм - 1 шт.;

1.11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм, в составе:

1.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм - 1 шт.;

1.8.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 20 mm - 1 pc.;

1.8.2. Instructions for use – 1 pc.

1.9. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm, consisting of:

1.9.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm - 1 pc.;

1.9.2. Instructions for use – 1 pc.

1.10. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm, consisting of:

1.10.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm - 1 pc.;

1.10.2. Instructions for use – 1 pc.

1.11. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm, consisting of:

1.11.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm - 1 pc.;

1.11.2. Instructions for use – 1 pc.

1.12. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 80 mm, consisting of:

1.12.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 80 mm - 1 pc.;

1.12.2. Instructions for use – 1 pc.

1.12.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм, в составе: 1.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм - 1 шт.; 1.13.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм, в составе: 1.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм - 1 шт.; 1.14.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе: 1.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм - 1 шт.; 1.15.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе: 1.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм - 1 шт.; 1.16.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.13. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 100 mm, consisting of: 1.13.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 2.5 x 100 mm - 1 pc.; 1.13.2. Instructions for use – 1 pc. 1.14. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 30 mm, consisting of: 1.14.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 30 mm - 1 pc.; 1.14.2. Instructions for use – 1 pc. 1.15. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 40 mm, consisting of: 1.15.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 40 mm - 1 pc.; 1.15.2. Instructions for use – 1 pc. 1.16. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 60 mm, consisting of: 1.16.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 60 mm - 1 pc.; 1.16.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе: 1.17.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.; 1.17.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе: 1.18.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.; 1.18.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм, в составе: 1.19.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм - 1 шт.; 1.19.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм, в составе: 1.20.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм - 1 шт.; 1.20.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:	1.17. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 80 mm, consisting of: 1.17.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 80 mm - 1 pc.; 1.17.2. Instructions for use – 1 pc. 1.18. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 100 mm, consisting of: 1.18.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 100 mm - 1 pc.; 1.18.2. Instructions for use – 1 pc. 1.19. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 120 mm, consisting of: 1.19.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3 x 120 mm - 1 pc.; 1.19.2. Instructions for use – 1 pc. 1.20. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 40 mm, consisting of: 1.20.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 40 mm - 1 pc.; 1.20.2. Instructions for use – 1 pc. 1.21. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm, consisting of:
--	---

1.21.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.; 1.21.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе: 1.22.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.; 1.22.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм, в составе: 1.23.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.; 1.23.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм, в составе: 1.24.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм - 1 шт.; 1.24.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм, в составе: 1.25.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм - 1 шт.;	1.21.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm - 1 pc.; 1.21.2. Instructions for use – 1 pc. 1.22. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm, consisting of: 1.22.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm - 1 pc.; 1.22.2. Instructions for use – 1 pc. 1.23. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm, consisting of: 1.23.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm - 1 pc.; 1.23.2. Instructions for use – 1 pc. 1.24. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 120 mm, consisting of: 1.24.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 120 mm - 1 pc.; 1.24.2. Instructions for use – 1 pc. 1.25. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 150 mm, consisting of: 1.25.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 3.5 x 150 mm - 1 pc.; 1.25.2. Instructions for use – 1 pc.
---	--

1.25.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм, в составе: 1.26.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм - 1 шт.; 1.26.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе: 1.27.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.; 1.27.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе: 1.28.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.; 1.28.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе: 1.29.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.; 1.29.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.26. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 40 mm, consisting of: 1.26.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 40 mm - 1 pc.; 1.26.2. Instructions for use – 1 pc. 1.27. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 60 mm, consisting of: 1.27.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 60 mm - 1 pc.; 1.27.2. Instructions for use – 1 pc. 1.28. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 80 mm, consisting of: 1.28.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 80 mm - 1 pc.; 1.28.2. Instructions for use – 1 pc. 1.29. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 100 mm, consisting of: 1.29.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 100 mm - 1 pc.; 1.29.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе: 1.30.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.; 1.30.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм, в составе: 1.31.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм - 1 шт.; 1.31.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм, в составе: 1.32.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм - 1 шт.; 1.32.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм, в составе: 1.33.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм - 1 шт.; 1.33.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм, в составе:	1.30. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 120 mm, consisting of: 1.30.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 120 mm - 1 pc.; 1.30.2. Instructions for use – 1 pc. 1.31. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 150 mm, consisting of: 1.31.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4 x 150 mm - 1 pc.; 1.31.2. Instructions for use – 1 pc. 1.32. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 60 mm, consisting of: 1.32.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 60 mm - 1 pc.; 1.32.2. Instructions for use – 1 pc. 1.33. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 80 mm, consisting of: 1.33.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 80 mm - 1 pc.; 1.33.2. Instructions for use – 1 pc. 1.34. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 100 mm, consisting of:
---	--

1.34.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм - 1 шт.;

1.34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм, в составе:

1.35.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм - 1 шт.;

1.35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм, в составе:

1.36.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм - 1 шт.;

1.36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм, в составе:

1.37.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм - 1 шт.;

1.37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

1.38.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.;

1.34.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 100 mm - 1 pc.;

1.34.2. Instructions for use – 1 pc.

1.35. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 120 mm, consisting of:

1.35.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 120 mm - 1 pc.;

1.35.2. Instructions for use – 1 pc.

1.36. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 150 mm, consisting of:

1.36.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 150 mm - 1 pc.;

1.36.2. Instructions for use – 1 pc.

1.37. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 200 mm, consisting of:

1.37.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 4.5 x 200 mm - 1 pc.;

1.37.2. Instructions for use – 1 pc.

1.38. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 80 mm, consisting of:

1.38.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 80 mm - 1 pc.;

1.38.2. Instructions for use – 1 pc.

1.38.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе: 1.39.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.; 1.39.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм, в составе: 1.40.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм - 1 шт.; 1.40.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе: 1.41.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.; 1.41.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм, в составе: 1.42.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм - 1 шт.; 1.42.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.39. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 100 mm, consisting of: 1.39.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 100 mm - 1 pc.; 1.39.2. Instructions for use – 1 pc. 1.40. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 120 mm, consisting of: 1.40.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 120 mm - 1 pc.; 1.40.2. Instructions for use – 1 pc. 1.41. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 150 mm, consisting of: 1.41.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 150 mm - 1 pc.; 1.41.2. Instructions for use – 1 pc. 1.42. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 200 mm, consisting of: 1.42.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 5 x 200 mm - 1 pc.; 1.42.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм, в составе:

1.43.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм - 1 шт.;

1.43.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе:

1.44.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм - 1 шт.;

1.44.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм, в составе:

1.45.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм - 1 шт.;

1.45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм, в составе:

1.46.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм - 1 шт.;

1.46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм, в составе:

1.43. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 80 mm, consisting of:

1.43.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 80 mm - 1 pc.;

1.43.2. Instructions for use – 1 pc.

1.44. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 100 mm, consisting of:

1.44.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 100 mm - 1 pc.;

1.44.2. Instructions for use – 1 pc.

1.45. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 120 mm, consisting of:

1.45.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 120 mm - 1 pc.;

1.45.2. Instructions for use – 1 pc.

1.46. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 150 mm, consisting of:

1.46.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 150 mm - 1 pc.;

1.46.2. Instructions for use – 1 pc.

1.47. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 200 mm, consisting of:

1.47.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм - 1 шт.;

1.47.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм, в составе:

1.48.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм - 1 шт.;

1.48.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм, в составе:

1.49.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм - 1 шт.;

1.49.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм, в составе:

1.50.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм - 1 шт.;

1.50.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм, в составе:

1.51.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм - 1 шт.;

1.47.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 6 x 200 mm - 1 pc.;

1.47.2. Instructions for use – 1 pc.

1.48. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 100 mm, consisting of:

1.48.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 100 mm - 1 pc.;

1.48.2. Instructions for use – 1 pc.

1.49. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 120 mm, consisting of:

1.49.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 120 mm - 1 pc.;

1.49.2. Instructions for use – 1 pc.

1.50. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 150 mm, consisting of:

1.50.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 150 mm - 1 pc.;

1.50.2. Instructions for use – 1 pc.

1.51. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 200 mm, consisting of:

1.51.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 200 mm - 1 pc.;

1.51.2. Instructions for use – 1 pc.

1.51.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм, в составе: 1.52.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм - 1 шт.; 1.52.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм, в составе 1.53.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм - 1 шт.; 1.53.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм, в составе: 1.54.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм - 1 шт.; 1.54.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.55. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм, в составе: 1.55.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.; 1.55.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.52. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 250 mm, consisting of: 1.52.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 250 mm - 1 pc.; 1.52.2. Instructions for use – 1 pc. 1.53. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 300 mm, consisting of: 1.53.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 7 x 300 mm - 1 pc.; 1.53.2. Instructions for use – 1 pc. 1.54. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 120 mm, consisting of: 1.54.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 120 mm - 1 pc.; 1.54.2. Instructions for use – 1 pc. 1.55. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 150 mm, consisting of: 1.55.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 150 mm - 1 pc.; 1.55.2. Instructions for use – 1 pc.
--	---

1.56. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе:

1.56.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.;

1.56.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.57. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе:

1.57.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.;

1.57.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.58. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм, в составе:

1.58.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм - 1 шт.;

1.58.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.59. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе:

1.59.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.;

1.59.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.60. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе:

1.56. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 200 mm, consisting of:

1.56.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 200 mm - 1 pc.;

1.56.2. Instructions for use – 1 pc.

1.57. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 250 mm, consisting of:

1.57.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 250 mm - 1 pc.;

1.57.2. Instructions for use – 1 pc.

1.58. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 300 mm, consisting of:

1.58.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 8 x 300 mm - 1 pc.;

1.58.2. Instructions for use – 1 pc.

1.59. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 150 mm, consisting of:

1.59.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 150 mm - 1 pc.;

1.59.2. Instructions for use – 1 pc.

1.60. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 200 mm, consisting of:

1.60.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.;

1.60.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.61. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе:

1.61.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9x 250 мм - 1 шт.;

1.61.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.62. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе:

1.62.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.;

1.62.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.63. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм, в составе:

1.63.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм - 1 шт.;

1.63.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.64. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм, в составе:

1.64.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм - 1 шт.;

1.60.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 200 mm - 1 pc.;

1.60.2. Instructions for use – 1 pc.

1.61. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 250 mm, consisting of:

1.61.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9x 250 mm - 1 pc.;

1.61.2. Instructions for use – 1 pc.

1.62. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 300 mm, consisting of:

1.62.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 300 mm - 1 pc.;

1.62.2. Instructions for use – 1 pc.

1.63. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 400 mm, consisting of:

1.63.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 9 x 400 mm - 1 pc.;

1.63.2. Instructions for use – 1 pc.

1.64. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 150 mm, consisting of:

1.64.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 150 mm - 1 pc.;

1.64.2. Instructions for use – 1 pc.

1.64.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.65. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе: 1.65.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.; 1.65.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.66. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе: 1.66.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.; 1.66.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.67. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм, в составе: 1.67.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм - 1 шт.; 1.67.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.68. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм, в составе: 1.68.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм - 1 шт.; 1.68.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.65. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 200 mm, consisting of: 1.65.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 200 mm - 1 pc.; 1.65.2. Instructions for use – 1 pc. 1.66. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 300 mm, consisting of: 1.66.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 300 mm - 1 pc.; 1.66.2. Instructions for use – 1 pc. 1.67. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 400 mm, consisting of: 1.67.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 10 x 400 mm - 1 pc.; 1.67.2. Instructions for use – 1 pc. 1.68. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 150 mm, consisting of: 1.68.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 150 mm - 1 pc.; 1.68.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.69. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм, в составе:

1.69.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм - 1 шт.;

1.69.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.70. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе:

1.70.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.;

1.70.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.71. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе:

1.71.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.;

1.71.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.72. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм, в составе:

1.72.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм - 1 шт.;

1.72.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.73. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм, в составе:

1.69. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 200 mm, consisting of:

1.69.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 200 mm - 1 pc.;

1.69.2. Instructions for use – 1 pc.

1.70. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 300 mm, consisting of:

1.70.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 300 mm - 1 pc.;

1.70.2. Instructions for use – 1 pc.

1.71. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 400 mm, consisting of:

1.71.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 400 mm - 1 pc.;

1.71.2. Instructions for use – 1 pc.

1.72. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 500 mm, consisting of:

1.72.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 12 x 500 mm - 1 pc.;

1.72.2. Instructions for use – 1 pc.

1.73. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 200 mm, consisting of:

1.73.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм - 1 шт.; 1.73.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.74. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе: 1.74.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.; 1.74.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.75. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе: 1.75.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм - 1 шт.; 1.75.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.76. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм, в составе: 1.76.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм - 1 шт.; 1.76.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.77. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм, в составе: 1.77.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм - 1 шт.;	1.73.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 200 mm - 1 pc.; 1.73.2. Instructions for use – 1 pc. 1.74. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 300 mm, consisting of: 1.74.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 300 mm - 1 pc.; 1.74.2. Instructions for use – 1 pc. 1.75. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 400 mm, consisting of: 1.75.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 400 mm - 1 pc.; 1.75.2. Instructions for use – 1 pc. 1.76. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 500 mm, consisting of: 1.76.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 14 x 500 mm - 1 pc.; 1.76.2. Instructions for use – 1 pc. 1.77. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 200 mm, consisting of: 1.77.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 200 mm - 1 pc.; 1.77.2. Instructions for use – 1 pc.
--	---

1.77.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.78. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе: 1.78.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.; 1.78.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.79. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе: 1.79.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.; 1.79.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.80. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе: 1.80.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.; 1.80.2. Инструкция по применению – 1 шт. 1.81. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе: 1.81.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.; 1.81.2. Инструкция по применению – 1 шт.	1.78. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 300 mm, consisting of: 1.78.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 300 mm - 1 pc.; 1.78.2. Instructions for use – 1 pc. 1.79. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 400 mm, consisting of: 1.79.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 400 mm - 1 pc.; 1.79.2. Instructions for use – 1 pc. 1.80. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 500 mm, consisting of: 1.80.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 16 x 500 mm - 1 pc.; 1.80.2. Instructions for use – 1 pc. 1.81. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 300 mm, consisting of: 1.81.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 300 mm - 1 pc.; 1.81.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.82. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе:

1.82.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.;

1.82.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.83. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе:

1.83.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.;

1.83.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.84. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе:

1.84.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.;

1.84.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.85. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе:

1.85.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм - 1 шт.;

1.85.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.86. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе:

1.82. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 400 mm, consisting of:

1.82.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 400 mm - 1 pc.;

1.82.2. Instructions for use – 1 pc.

1.83. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 500 mm, consisting of:

1.83.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 18 x 500 mm - 1 pc.;

1.83.2. Instructions for use – 1 pc.

1.84. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 300 mm, consisting of:

1.84.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 300 mm - 1 pc.;

1.84.2. Instructions for use – 1 pc.

1.85. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 400 mm, consisting of:

1.85.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 400 mm - 1 pc.;

1.85.2. Instructions for use – 1 pc.

1.86. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 500 mm, consisting of:

1.86.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.;

1.86.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, размеры:

2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе:

2.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.;

2.1.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе:

2.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.;

2.2.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе:

2.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.;

2.3.2. Инструкция по применению – 1 шт.

1.86.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 20 x 500 mm - 1 pc.;

1.86.2. Instructions for use – 1 pc.

2. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, sizes:

2.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 20 mm, consisting of:

2.1.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 20 mm - 1 pc.;

2.1.2. Instructions for use – 1 pc.

2.2. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 30 mm, consisting of:

2.2.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 30 mm - 1 pc.;

2.2.2. Instructions for use – 1 pc.

2.3. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 40 mm, consisting of:

2.3.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 40 mm - 1 pc.;

2.3.2. Instructions for use – 1 pc.

2.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм, в составе: 2.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм - 1 шт.; 2.4.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм, в составе: 2.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм - 1 шт.; 2.5.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм, в составе: 2.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм - 1 шт.; 2.6.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм, в составе: 2.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм - 1 шт.; 2.7.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм, в составе:	2.4. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 60 mm, consisting of: 2.4.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 60 mm - 1 pc.; 2.4.2. Instructions for use – 1 pc. 2.5. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 80 mm, consisting of: 2.5.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 80 mm - 1 pc.; 2.5.2. Instructions for use – 1 pc. 2.6. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 20 mm, consisting of: 2.6.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 20 mm - 1 pc.; 2.6.2. Instructions for use – 1 pc. 2.7. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm, consisting of: 2.7.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm - 1 pc.; 2.7.2. Instructions for use – 1 pc. 2.8. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm, consisting of:
---	--

2.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм - 1 шт.;

2.8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм, в составе:

2.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм - 1 шт.;

2.9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм, в составе:

2.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм - 1 шт.;

2.10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм, в составе:

2.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм - 1 шт.;

2.11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм, в составе:

2.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм - 1 шт.;

2.8.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm - 1 pc.;

2.8.2. Instructions for use – 1 pc.

2.9. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm, consisting of:

2.9.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm - 1 pc.;

2.9.2. Instructions for use – 1 pc.

2.10. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 80 mm, consisting of:

2.10.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 80 mm - 1 pc.;

2.10.2. Instructions for use – 1 pc.

2.11. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 100 mm, consisting of:

2.11.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2.5 x 100 mm - 1 pc.;

2.11.2. Instructions for use – 1 pc.

2.12. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 30 mm, consisting of:

2.12.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 30 mm - 1 pc.;

2.12.2. Instructions for use – 1 pc.

2.12.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе: 2.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм - 1 шт.; 2.13.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе: 2.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм - 1 шт.; 2.14.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе: 2.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.; 2.15.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе: 2.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.; 2.16.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.13. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 40 mm, consisting of: 2.13.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 40 mm - 1 pc.; 2.13.2. Instructions for use – 1 pc. 2.14. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 60 mm, consisting of: 2.14.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 60 mm - 1 pc.; 2.14.2. Instructions for use – 1 pc. 2.15. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 80 mm, consisting of: 2.15.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 80 mm - 1 pc.; 2.15.2. Instructions for use – 1 pc. 2.16. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 100 mm, consisting of: 2.16.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 100 mm - 1 pc.; 2.16.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм, в составе:

2.17.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм - 1 шт.;

2.17.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм, в составе:

2.18.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм - 1 шт.;

2.18.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:

2.19.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.;

2.19.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе:

2.20.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.;

2.20.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм, в составе:

2.17. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 120 mm, consisting of:

2.17.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3 x 120 mm - 1 pc.;

2.17.2. Instructions for use – 1 pc.

2.18. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 40 mm, consisting of:

2.18.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 40 mm - 1 pc.;

2.18.2. Instructions for use – 1 pc.

2.19. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm, consisting of:

2.19.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm - 1 pc.;

2.19.2. Instructions for use – 1 pc.

2.20. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm, consisting of:

2.20.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm - 1 pc.;

2.20.2. Instructions for use – 1 pc.

2.21. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm, consisting of:

2.21.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm - 1 pc.;

2.21.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.; 2.21.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм, в составе: 2.22.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм - 1 шт.; 2.22.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм, в составе: 2.23.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм - 1 шт.; 2.23.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм, в составе: 2.24.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм - 1 шт.; 2.24.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизаций кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе: 2.25.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.;	2.21.2. Instructions for use – 1 pc. 2.22. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 120 mm, consisting of: 2.22.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 120 mm - 1 pc.; 2.22.2. Instructions for use – 1 pc. 2.23. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 150 mm, consisting of: 2.23.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 3.5 x 150 mm - 1 pc.; 2.23.2. Instructions for use – 1 pc. 2.24. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 40 mm, consisting of: 2.24.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 40 mm - 1 pc.; 2.24.2. Instructions for use – 1 pc. 2.25. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 60 mm, consisting of: 2.25.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 60 mm - 1 pc.; 2.25.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.25.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе: 2.26.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.; 2.26.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе: 2.27.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.; 2.27.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе: 2.28.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.; 2.28.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм, в составе: 2.29.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм - 1 шт.; 2.29.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.26. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 80 mm, consisting of: 2.26.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 80 mm - 1 pc.; 2.26.2. Instructions for use – 1 pc. 2.27. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 100 mm, consisting of: 2.27.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 100 mm - 1 pc.; 2.27.2. Instructions for use – 1 pc. 2.28. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 120 mm, consisting of: 2.28.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 120 mm - 1 pc.; 2.28.2. Instructions for use – 1 pc. 2.29. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 150 mm, consisting of: 2.29.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4 x 150 mm - 1 pc.; 2.29.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм, в составе: 2.30.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм - 1 шт.; 2.30.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм, в составе: 2.31.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм - 1 шт.; 2.31.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм, в составе: 2.32.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм - 1 шт.; 2.32.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм, в составе: 2.33.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм - 1 шт.; 2.33.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм, в составе:	2.30. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 60 mm, consisting of: 2.30.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 60 mm - 1 pc.; 2.30.2. Instructions for use – 1 pc. 2.31. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 80 mm, consisting of: 2.31.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 80 mm - 1 pc.; 2.31.2. Instructions for use – 1 pc. 2.32. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 100 mm, consisting of: 2.32.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 100 mm - 1 pc.; 2.32.2. Instructions for use – 1 pc. 2.33. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 120 mm, consisting of: 2.33.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 120 mm - 1 pc.; 2.33.2. Instructions for use – 1 pc. 2.34. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 150 mm, consisting of:
---	--

2.34.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм - 1 шт.;

2.34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм, в составе:

2.35.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм - 1 шт.;

2.35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

2.36.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.;

2.36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе:

2.37.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.;

2.37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм, в составе:

2.38.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм - 1 шт.;

2.34.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 150 mm - 1 pc.;

2.34.2. Instructions for use – 1 pc.

2.35. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 200 mm, consisting of:

2.35.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 4.5 x 200 mm - 1 pc.;

2.35.2. Instructions for use – 1 pc.

2.36. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 80 mm, consisting of:

2.36.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 80 mm - 1 pc.;

2.36.2. Instructions for use – 1 pc.

2.37. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 100 mm, consisting of:

2.37.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 100 mm - 1 pc.;

2.37.2. Instructions for use – 1 pc.

2.38. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 120 mm, consisting of:

2.38.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 120 mm - 1 pc.;

2.38.2. Instructions for use – 1 pc.

2.38.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе: 2.39.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.; 2.39.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм, в составе: 2.40.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм - 1 шт.; 2.40.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм, в составе: 2.41.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм - 1 шт.; 2.41.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе: 2.42.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм - 1 шт.; 2.42.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.39. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 150 mm, consisting of: 2.39.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 150 mm - 1 pc.; 2.39.2. Instructions for use – 1 pc. 2.40. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 200 mm, consisting of: 2.40.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 5 x 200 mm - 1 pc.; 2.40.2. Instructions for use – 1 pc. 2.41. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 80 mm, consisting of: 2.41.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 80 mm - 1 pc.; 2.41.2. Instructions for use – 1 pc. 2.42. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 100 mm, consisting of: 2.42.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 100 mm - 1 pc.; 2.42.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм, в составе:

2.43.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм - 1 шт.;

2.43.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм, в составе:

2.44.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм - 1 шт.;

2.44.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм, в составе:

2.45.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм - 1 шт.;

2.45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм, в составе:

2.46.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм - 1 шт.;

2.46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм, в составе:

2.43. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 120 mm, consisting of:

2.43.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 120 mm - 1 pc.;

2.43.2. Instructions for use – 1 pc.

2.44. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 150 mm, consisting of:

2.44.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 150 mm - 1 pc.;

2.44.2. Instructions for use – 1 pc.

2.45. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 200 mm, consisting of:

2.45.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 6 x 200 mm - 1 pc.;

2.45.2. Instructions for use – 1 pc.

2.46. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 100 mm, consisting of:

2.46.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 100 mm - 1 pc.;

2.46.2. Instructions for use – 1 pc.

2.47. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 120 mm, consisting of:

2.47.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм - 1 шт.; 2.47.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм, в составе: 2.48.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм - 1 шт.; 2.48.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм, в составе: 2.49.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм - 1 шт.; 2.49.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм, в составе: 2.50.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм - 1 шт.; 2.50.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм, в составе: 2.51.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм - 1 шт.;	2.47.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 120 mm - 1 pc.; 2.47.2. Instructions for use – 1 pc. 2.48. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 150 mm, consisting of: 2.48.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 150 mm - 1 pc.; 2.48.2. Instructions for use – 1 pc. 2.49. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 200 mm, consisting of: 2.49.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 200 mm - 1 pc.; 2.49.2. Instructions for use – 1 pc. 2.50. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 250 mm, consisting of: 2.50.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 250 mm - 1 pc.; 2.50.2. Instructions for use – 1 pc. 2.51. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 300 mm, consisting of: 2.51.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 7 x 300 mm - 1 pc.; 2.51.2. Instructions for use – 1 pc.
---	--

2.51.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм, в составе: 2.52.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм - 1 шт.; 2.52.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм, в составе: 2.53.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.; 2.53.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе: 2.54.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.; 2.54.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.55. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе: 2.55.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.; 2.55.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.52. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 120 mm, consisting of: 2.52.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 120 mm - 1 pc.; 2.52.2. Instructions for use – 1 pc. 2.53. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 150 mm, consisting of: 2.53.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 150 mm - 1 pc.; 2.53.2. Instructions for use – 1 pc. 2.54. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 200 mm, consisting of: 2.54.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 200 mm - 1 pc.; 2.54.2. Instructions for use – 1 pc. 2.55. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 250 mm, consisting of: 2.55.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 250 mm - 1 pc.; 2.55.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.56. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм, в составе: 2.56.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм - 1 шт.; 2.56.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.57. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе: 2.57.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.; 2.57.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.58. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе: 2.58.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.; 2.58.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.59. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе: 2.59.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм - 1 шт.; 2.59.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.60. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе:	2.56. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 300 mm, consisting of: 2.56.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 8 x 300 mm - 1 pc.; 2.56.2. Instructions for use – 1 pc. 2.57. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 150 mm, consisting of: 2.57.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 150 mm - 1 pc.; 2.57.2. Instructions for use – 1 pc. 2.58. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 200 mm, consisting of: 2.58.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 200 mm - 1 pc.; 2.58.2. Instructions for use – 1 pc. 2.59. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 250 mm, consisting of: 2.59.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 250 mm - 1 pc.; 2.59.2. Instructions for use – 1 pc. 2.60. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 300 mm, consisting of:
---	--

2.60.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.;

2.60.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.61. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм, в составе:

2.61.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм - 1 шт.;

2.61.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.62. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм, в составе:

2.62.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм - 1 шт.;

2.62.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.63. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе:

2.63.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.;

2.63.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.64. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе:

2.64.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.;

2.60.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 300 mm - 1 pc.;

2.60.2. Instructions for use – 1 pc.

2.61. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 400 mm, consisting of:

2.61.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 9 x 400 mm - 1 pc.;

2.61.2. Instructions for use – 1 pc.

2.62. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 150 mm, consisting of:

2.62.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 150 mm - 1 pc.;

2.62.2. Instructions for use – 1 pc.

2.63. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 200 mm, consisting of:

2.63.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 200 mm - 1 pc.;

2.63.2. Instructions for use – 1 pc.

2.64. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 300 mm, consisting of:

2.64.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 300 mm - 1 pc.;

2.64.2. Instructions for use – 1 pc.

2.64.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.65. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм, в составе: 2.65.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм - 1 шт.; 2.65.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.66. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм, в составе: 2.66.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм - 1 шт.; 2.66.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.67. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм, в составе: 2.67.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм - 1 шт.; 2.67.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.68. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе: 2.68.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.; 2.68.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.65. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 400 mm, consisting of: 2.65.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 10 x 400 mm - 1 pc.; 2.65.2. Instructions for use – 1 pc. 2.66. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 150 mm, consisting of: 2.66.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 150 mm - 1 pc.; 2.66.2. Instructions for use – 1 pc. 2.67. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 200 mm, consisting of: 2.67.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 200 mm - 1 pc.; 2.67.2. Instructions for use – 1 pc. 2.68. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 300 mm, consisting of: 2.68.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 300 mm - 1 pc.; 2.68.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

2.69. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе: 2.69.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.; 2.69.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.70. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм, в составе: 2.70.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм - 1 шт.; 2.70.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.71. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм, в составе: 2.71.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм - 1 шт.; 2.71.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.72. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе: 2.72.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.; 2.72.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.73. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе:	2.69. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 400 mm, consisting of: 2.69.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 400 mm - 1 pc.; 2.69.2. Instructions for use – 1 pc. 2.70. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 500 mm, consisting of: 2.70.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 12 x 500 mm - 1 pc.; 2.70.2. Instructions for use – 1 pc. 2.71. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 200 mm, consisting of: 2.71.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 200 mm - 1 pc.; 2.71.2. Instructions for use – 1 pc. 2.72. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 300 mm, consisting of: 2.72.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 300 mm - 1 pc.; 2.72.2. Instructions for use – 1 pc. 2.73. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 400 mm, consisting of: 2.73.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 400 mm - 1 pc.;
--	---

2.73.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм - 1 шт.; 2.73.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.74. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм, в составе: 2.74.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм - 1 шт.; 2.74.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.75. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм, в составе: 2.75.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм - 1 шт.; 2.75.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.76. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе: 2.76.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.; 2.76.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.77. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе: 2.77.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.;	2.73.2. Instructions for use – 1 pc. 2.74. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 500 mm, consisting of: 2.74.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 14 x 500 mm - 1 pc.; 2.74.2. Instructions for use – 1 pc. 2.75. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 200 mm, consisting of: 2.75.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 200 mm - 1 pc.; 2.75.2. Instructions for use – 1 pc. 2.76. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 300 mm, consisting of: 2.76.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 300 mm - 1 pc.; 2.76.2. Instructions for use – 1 pc. 2.77. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 400 mm, consisting of: 2.77.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 400 mm - 1 pc.; 2.77.2. Instructions for use – 1 pc.
--	---

2.77.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.78. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе:

2.78.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.;

2.78.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.79. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе:

2.79.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.;

2.79.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.80. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе:

2.80.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.;

2.80.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.81. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе:

2.81.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.;

2.81.2. Инструкция по применению – 1 шт.

2.78. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 500 mm, consisting of:

2.78.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 16 x 500 mm - 1 pc.;

2.78.2. Instructions for use – 1 pc.

2.79. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 300 mm, consisting of:

2.79.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 300 mm - 1 pc.;

2.79.2. Instructions for use – 1 pc.

2.80. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 400 mm, consisting of:

2.80.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 400 mm - 1 pc.;

2.80.2. Instructions for use – 1 pc.

2.81. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 500 mm, consisting of:

2.81.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 18 x 500 mm - 1 pc.;

2.81.2. Instructions for use – 1 pc.

2.82. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе: 2.82.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.; 2.82.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.83. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе: 2.83.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм - 1 шт.; 2.83.2. Инструкция по применению – 1 шт. 2.84. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе: 2.84.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.; 2.84.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов серия 3D, размеры: 3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе: 3.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.; 3.1.2. Инструкция по применению – 1 шт.	2.82. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 300 mm, consisting of: 2.82.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 300 mm - 1 pc.; 2.82.2. Instructions for use – 1 pc. 2.83. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 400 mm, consisting of: 2.83.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 400 mm - 1 pc.; 2.83.2. Instructions for use – 1 pc. 2.84. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 500 mm, consisting of: 2.84.1 Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 20 x 500 mm - 1 pc.; 2.84.2. Instructions for use – 1 pc. 3. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, sizes: 3.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 20 mm, consisting of: 3.1.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 20 mm - 1 pc.; 3.1.2. Instructions for use – 1 pc.
---	--

3.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе:

3.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.;

3.2.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе:

3.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.;

3.3.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 50 мм, в составе:

3.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 50 мм - 1 шт.;

3.4.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм, в составе:

3.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм - 1 шт.;

3.5.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм, в составе:

3.2. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 30 mm, consisting of:

3.2.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 30 mm - 1 pc.;

3.2.2. Instructions for use – 1 pc.

3.3. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 40 mm, consisting of:

3.3.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 40 mm - 1 pc.;

3.3.2. Instructions for use – 1 pc.

3.4. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 50 mm, consisting of:

3.4.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 50 mm - 1 pc.;

3.4.2. Instructions for use – 1 pc.

3.5. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm, consisting of:

3.5.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 30 mm - 1 pc.;

3.5.2. Instructions for use – 1 pc.

3.6. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm, consisting of:

3.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм - 1 шт.; 3.6.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.6.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 40 mm - 1 pc.; 3.6.2. Instructions for use – 1 pc.
3.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм, в составе: 3.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм - 1 шт.; 3.7.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.7. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm, consisting of: 3.7.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2.5 x 60 mm - 1 pc.; 3.7.2. Instructions for use – 1 pc.
3.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе: 3.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм - 1 шт.; 3.8.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.8. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 40 mm, consisting of: 3.8.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 40 mm - 1 pc.; 3.8.2. Instructions for use – 1 pc.
3.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе: 3.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм - 1 шт.; 3.9.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.9. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 60 mm, consisting of: 3.9.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 60 mm - 1 pc.; 3.9.2. Instructions for use – 1 pc.
3.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе: 3.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.;	3.10. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 80 mm, consisting of: 3.10.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 80 mm - 1 pc.; 3.10.2. Instructions for use – 1 pc.

3.10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе:

3.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.;

3.11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 50 мм, в составе:

3.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 50 мм - 1 шт.;

3.12.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:

3.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.;

3.13.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе:

3.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.;

3.14.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.11. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 100 mm, consisting of:

3.11.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3 x 100 mm - 1 pc.;

3.11.2. Instructions for use – 1 pc.

3.12. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 50 mm, consisting of:

3.12.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 50 mm - 1 pc.;

3.12.2. Instructions for use – 1 pc.

3.13. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm, consisting of:

3.13.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 60 mm - 1 pc.;

3.13.2. Instructions for use – 1 pc.

3.14. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm, consisting of:

3.14.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 80 mm - 1 pc.;

3.14.2. Instructions for use – 1 pc.

3.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм, в составе: 3.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.; 3.15.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе: 3.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.; 3.16.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе: 3.17.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.; 3.17.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе: 3.18.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.; 3.18.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе:	3.15. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm, consisting of: 3.15.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 3.5 x 100 mm - 1 pc.; 3.15.2. Instructions for use – 1 pc. 3.16. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 60 mm, consisting of: 3.16.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 60 mm - 1 pc.; 3.16.2. Instructions for use – 1 pc. 3.17. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 80 mm, consisting of: 3.17.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 80 mm - 1 pc.; 3.17.2. Instructions for use – 1 pc. 3.18. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 100 mm, consisting of: 3.18.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 100 mm - 1 pc.; 3.18.2. Instructions for use – 1 pc. 3.19. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 120 mm, consisting of: 3.19.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 4 x 120 mm - 1 pc.;
---	--

3.19.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.;

3.19.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

3.20.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.;

3.20.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе:

3.21.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.;

3.21.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 130 мм, в составе:

3.22.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 130 мм - 1 шт.;

3.22.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе:

3.23.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.;

3.19.2. Instructions for use – 1 pc.

3.20. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 80 mm, consisting of:

3.20.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 80 mm - 1 pc.;

3.20.2. Instructions for use – 1 pc.

3.21. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 100 mm, consisting of:

3.21.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 100 mm - 1 pc.;

3.21.2. Instructions for use – 1 pc.

3.22. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 130 mm, consisting of:

3.22.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 130 mm - 1 pc.;

3.22.2. Instructions for use – 1 pc.

3.23. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 150 mm, consisting of:

3.23.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 5 x 150 mm - 1 pc.;

3.23.2. Instructions for use – 1 pc.

3.23.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе: 3.24.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм - 1 шт.; 3.24.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм, в составе: 3.25.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм - 1 шт.; 3.25.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм, в составе: 3.26.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм - 1 шт.; 3.26.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм, в составе: 3.27.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм - 1 шт.; 3.27.2. Инструкция по применению - 1 шт.	3.24. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 100 mm, consisting of: 3.24.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 100 mm - 1 pc.; 3.24.2. Instructions for use – 1 pc. 3.25. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 150 mm, consisting of: 3.25.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 150 mm - 1 pc.; 3.25.2. Instructions for use – 1 pc. 3.26. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 200 mm, consisting of: 3.26.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 6 x 200 mm - 1 pc.; 3.26.2. Instructions for use – 1 pc. 3.27. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 120 mm, consisting of: 3.27.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 120 mm - 1 pc.; 3.27.2. Instructions for use - 1 pc.
---	---

3.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм, в составе:

3.28.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм - 1 шт.;

3.28.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм, в составе:

3.29.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм - 1 шт.;

3.29.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм, в составе:

3.30.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.;

3.30.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе:

3.31.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.;

3.31.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе:

3.28. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 150 mm, consisting of:

3.28.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 150 mm - 1 pc.;

3.28.2. Instructions for use – 1 pc.

3.29. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 200 mm, consisting of:

3.29.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 7 x 200 mm - 1 pc.;

3.29.2. Instructions for use – 1 pc.

3.30. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 150 mm, consisting of:

3.30.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 150 mm - 1 pc.;

3.30.2. Instructions for use – 1 pc.

3.31. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 200 mm, consisting of:

3.31.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 200 mm - 1 pc.;

3.31.2. Instructions for use – 1 pc.

3.32. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 250 mm, consisting of:

3.32.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 8 x 250 mm - 1 pc.;

3.32.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.; 3.32.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе: 3.33.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.; 3.33.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе: 3.34.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.; 3.34.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе: 3.35.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм - 1 шт.; 3.35.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе: 3.36.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.;	3.32.2. Instructions for use – 1 pc. 3.33. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 150 mm, consisting of: 3.33.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 150 mm - 1 pc.; 3.33.2. Instructions for use – 1 pc. 3.34. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 200 mm, consisting of: 3.34.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 200 mm - 1 pc.; 3.34.2. Instructions for use – 1 pc. 3.35. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 250 mm, consisting of: 3.35.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 250 mm - 1 pc.; 3.35.2. Instructions for use – 1 pc. 3.36. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 300 mm, consisting of: 3.36.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 9 x 300 mm - 1 pc.; 3.36.2. Instructions for use – 1 pc.
--	---

3.36.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе: 3.37.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.; 3.37.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 250 мм, в составе: 3.38.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 250 мм - 1 шт.; 3.38.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе: 3.39.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.; 3.39.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 250 мм, в составе: 3.40.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 250 мм - 1 шт.; 3.40.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.37. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 200 mm, consisting of: 3.37.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 200 mm - 1 pc.; 3.37.2. Instructions for use – 1 pc. 3.38. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 250 mm, consisting of: 3.38.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 250 mm - 1 pc.; 3.38.2. Instructions for use – 1 pc. 3.39. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 300 mm, consisting of: 3.39.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 10 x 300 mm - 1 pc.; 3.39.2. Instructions for use – 1 pc. 3.40. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 250 mm, consisting of: 3.40.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 250 mm - 1 pc.; 3.40.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

3.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе: 3.41.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.; 3.41.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе: 3.42.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.; 3.42.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 250 мм, в составе: 3.43.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 250 мм - 1 шт.; 3.43.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе: 3.44.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.; 3.44.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе:	3.41. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 300 mm, consisting of: 3.41.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 300 mm - 1 pc.; 3.41.2. Instructions for use – 1 pc. 3.42. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 400 mm, consisting of: 3.42.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 12 x 400 mm - 1 pc.; 3.42.2. Instructions for use – 1 pc. 3.43. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 250 mm, consisting of: 3.43.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 250 mm - 1 pc.; 3.43.2. Instructions for use – 1 pc. 3.44. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 300 mm, consisting of: 3.44.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 300 mm - 1 pc.; 3.44.2. Instructions for use – 1 pc. 3.45. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 400 mm, consisting of: 3.45.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 14 x 400 mm - 1 pc.;
--	--

3.45.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм - 1 шт.;

3.45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе:

3.46.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.;

3.46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе:

3.47.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.;

3.47.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе:

3.48.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.;

3.48.2. Инструкция по применению – 1 шт.

3.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе:

3.49.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.;

3.45.2. Instructions for use – 1 pc.

3.46. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 300 mm, consisting of:

3.46.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 300 mm - 1 pc.;

3.46.2. Instructions for use – 1 pc.

3.47. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 400 mm, consisting of:

3.47.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 400 mm - 1 pc.;

3.47.2. Instructions for use – 1 pc.

3.48. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 500 mm, consisting of:

3.48.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 16 x 500 mm - 1 pc.;

3.48.2. Instructions for use – 1 pc.

3.49. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 300 mm, consisting of:

3.49.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 300 mm - 1 pc.;

3.49.2. Instructions for use – 1 pc.

3.49.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе: 3.50.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.; 3.50.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе: 3.51.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.; 3.51.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе: 3.52.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.; 3.52.2. Инструкция по применению – 1 шт. 3.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе: 3.53.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм - 1 шт.; 3.53.2. Инструкция по применению – 1 шт.	3.50. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 400 mm, consisting of: 3.50.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 400 mm - 1 pc.; 3.50.2. Instructions for use – 1 pc. 3.51. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 500 mm, consisting of: 3.51.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 18 x 500 mm - 1 pc.; 3.51.2. Instructions for use – 1 pc. 3.52. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 300 mm, consisting of: 3.52.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 300 mm - 1 pc.; 3.52.2. Instructions for use – 1 pc. 3.53. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 400 mm, consisting of: 3.53.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 400 mm - 1 pc.; 3.53.2. Instructions for use – 1 pc.
---	---

3.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе: 3.54.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.; 3.54.2. Инструкция по применению – 1 шт. Далее – медицинское изделие (МИ), спираль отсоединяемая, спираль спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов.	3.54. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 500 mm, consisting of: 3.54.1. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 20 x 500 mm - 1 pc.; 3.54.2. Instructions for use – 1 pc. Next – a medical device (MD), Detachable Coil, coil, Detachable Coil with delivery system
Назначение медицинского изделия/ Intended use of the medical device	
Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов предназначена для эмболизации внутричерепных аневризм, а также может использоваться для лечения других нейрососудистых мальформаций, таких как артериовенозная фистула и артериовенозная мальформация.	Detachable Coil with delivery system is suitable for embolizing intracranial aneurysms and can also be used for other neurovascular malformations, such as arteriovenous fistula and arteriovenous malformation.
Показания/ Indications	
Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов предназначена для эмболизации внутричерепных аневризм, а также нейрососудистых мальформаций, таких как артериовенозная фистула и артериовенозная мальформация любых размеров и внутричерепной локализации. Хирург принимает решение о применении спирали, основываясь на собственном опыте и учитывая, что минимальный диаметр аневризмы должен соответствовать диаметру вторичной спирали, чтобы предотвратить разрыв аневризмы.	Detachable Coil with delivery system is intended for embolisation of intracranial aneurysms as well as neurovascular malformations such as arteriovenous fistula and arteriovenous malformation of any size and intracranial localisation. The surgeon decides on the use of a coil based on his own experience and taking into account that the minimum diameter of the aneurysm must match the diameter of the secondary coil to prevent aneurysm rupture.
Противопоказания/ Contraindications	
• Аллергия на контрастное вещество и металл спирали (платина, вольфрам). • Аномальное повышение вязкости крови. • Тромбоцитоз, тяжелое нарушение функции печени и почек, осложненное нарушением свертываемости крови.	• Allergy to contrast media and coil metal (platinum, tungsten). • Abnormal increase of blood viscosity. • Thrombocytosis, severe impairment of liver and kidney function complicated with coagulation disorder.
Возможные осложнения и побочные эффекты / Possible complications and side effects	
К возможным осложнениям и нежелательным явлениям относятся: • Гематома в месте пункции; • Перфорация сосуда; • Диссекция сосуда; • Вазоспазм, вазоконстрикция;	Potential complications and adverse events include: • Puncture site hematoma; • Vessel perforation; • Vascular Dissection; • Vasospasm, Vasoconstriction;

• Геморрагия; • Тромбоэмболические эпизоды; • Неврологические расстройства, включая инсульт и смерть; • Тромбоз сосудов; • Ишемия; • Разорванная аневризма; • Иноородное тело в теле пациента; • Фистула; • Воздушная эмболия; • Остановка сердца;	• Hemorrhage; • Thromboembolic episodes; • Neurological deficits including stroke and death; • Vascular thrombosis; • Ischemia; • Ruptured Aneurysm; • Foreign Body In Patient; • Fistula; • Air Embolism; • Cardiac Arrest;
Сведения о производителе медицинского изделия/ Information about manufacturer of the medical device	
Шунмей Медикал Ко., Лтд, Китайская Народная Республика (Shunmei Medical Co., Ltd) 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Тел. 0086-0752-3306949 Website: www.shunmed.com Email: nora@shunmed.com Место производства: Shunmei Medical Co., Ltd Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China	Shunmei Medical Co., Ltd 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Тел. 0086-0752-3306949 Website: www.shunmed.com Email: nora@shunmed.com Manufacturing site: Shunmei Medical Co., Ltd Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Условия применения/ Usage conditions	
Условия использования: - Работа в чистом, светлом, стерильном помещении - Под рентгеноскопией - В операционной	Conditions of usage: - Operation in clean, bright, sterile environment - Under the fluoroscopy - In operation room
Потенциальный потребитель/ Potential users	
Изделие должно использоваться только опытными врачами, которые профессионально обучены ангиографии и чрескожным нейроринтервенционным процедурам и знакомы с принципами, клиническим применением, побочными эффектами и рисками.	It should only be used by experienced physicians who are professionally trained in angiography and percutaneous neurointerventional procedures and are familiar with the principles, clinical applications, side effects, and risks.
Предполагаемая группа пациентов/ Intended patient population	
В популяцию входят преимущественно взрослые люди в возрасте от 20 до 92 лет. Исключение составляют беременные, кормящие грудью женщины, пациенты с онкологическими заболеваниями или химиотерапией.	The populations mainly include adults, with the age range from 20-92 years old. Except for pregnancy, breast-feeding women, patients with cancer or chemotherapy.
Требования безопасности и меры предосторожности	
• Следует проявлять особую осторожность при обращении со спиралью	Warnings and precautions • Handle the Microcatheter Release Coil System with care to avoid damage

отсоединяемой, чтобы избежать повреждение изделия до или во время использования. • Не следует продвигать изделие при возникновении чрезмерного сопротивления до тех пор, пока причина сопротивления не будет устранена под рентгеноскопическим контролем во избежание повреждения спирали и/или катетера или перфорации сосуда. • Важно убедиться в совместимости катетера с изделием. Следует проверить внешний диаметр спирали с целью подтвердить, что спираль не застрянет в катетере. • Не использовать изделие после истечения срока годности, указанного на маркировке. • Для получения оптимальных рабочих характеристик изделия и снижения риска тромбозмобилических осложнений рекомендуется поддерживать непрерывный поток промывающего физиологического раствора. • Следует медленно и плавно продвигать вперед и оттягивать спираль, особенно при нахождении в извилистых сосудах. При ощущении необычного трения или «царапания» следует извлечь спираль. Если трение отмечается со второй спиралью, тщательно проверьте спираль и катетер на предмет возможных повреждений, таких как перекручивание или перегиб трубки катетера или неправильной спайки на стыке. • Если наблюдается перекручивание или перегиб толкателя, следует крепко зажать дистальную часть толкателя дистальнее места перегиба и извлечь его из микрокатетера. Не следует с усилием продвигать вперед спираль, застрявшую в микрокатетере или за его пределами. Необходимо установить причину сопротивления и при необходимости извлечь микрокатетер и спираль. • Если при извлечении толкателя ощущается сопротивление, одновременно оттягивайте инфузионный катетер до тех пор, пока не станет возможным извлечение толкателя без сопротивления. • Если при доставке спирали ощущается сопротивление, необходимо проверить микрокатетер на предмет возможного повреждения	before or during treatment. • Do not advance the product against a noted resistance until the cause of the resistance is cleared by fluoroscopy. This may lead to the destruction of the coil and/or catheter or perforation of the vessel. • It is essential to confirm catheter compatibility with the product. The outer diameter of the product should be checked to ensure that the coil will not block the catheter • Do not use the product after the expiration date printed on the product label. • In order to achieve optimal performance of the product and to reduce the risk of thromboembolic complications, it is critical that a continuous infusion of appropriate flush solution be maintained. • Mechanical Release Coil System slowly and smoothly, especially in tortuous anatomy. Remove the coil if unusual friction or «scratching» is noted. If friction is noted in a second soil, carefully examine both the coil and the catheter for possible damage such as catheter shaft bucking or kinking, or an improperly fused joint. • If delivery pusher buckling or kinking is noted, grasp the distal most portion of the delivery pusher, distal to the kink, buckle or break and remove from microcatheter. Do not advance the coil with force if the coil becomes lodged within or outside the microcatheter. Determine the cause of resistance and remove the system when necessary. • If resistance is encountered when withdrawing the implant delivery pusher, draw back on the infusion catheter simultaneously until the delivery pusher can be removed without resistance. • If resistance is noted during coil delivery, remove the system and check for possible damage to the catheter
Изображение и описание изделия Медицинское изделие спираль отсоединяемая для эмболизации кровеносных сосудов состоит из спирали отсоединяемой, толкателя и рентгеноконтрастной маркировки, покрытие отсутствует. Толкатель помещен в интродьюсерную оболочку и проталкивает спираль в оболочку интродьюсера. Спираль представляет собой двойную спиральную структуру, намотанную проволокой из платино-вольфрамового сплава, а	Picture and description of device Medical device The Detachable Coil System consists of a coil, a pusher and radiopaque marker band, and there is no coating. The pusher has an introducer sheath on the outside and incorporates the coil into the introducer sheath. The coil is a double helix structure wound by platinum-tungsten alloy wire, and there is polypropylene suture inside as an anti-unwinding structure; The delivery system consists of a push rod The pusher is composed of stainless steel

внутри находится полипропиленовый шов для защиты от разматывания. Система доставки состоит из толкателя. Толкатель состоит из стержня из нержавеющей стали, термоусадочной трубки и пружинной проволоки из нержавеющей стали. Платино-вольфрамовая спираль из платиново-вольфрамового сплава и толкатель механически соединены с помощью разжимного шарика и разжимного проводника.

В системе доставки используется метод механического отсоединения. Спираль отсоединяемая фиксируется с помощью разжимного шарика, а другой конец разжимного шарика вставляется в дистальное отверстие толкателя. На толкатель надет разжимной проводник, а разжимной проводник проходит через дистальный конец толкателя для соединения спирали с толкателем. Проксимальный конец толкателя имеет точку разрыва, вырезанную лазером. После ручного отсоединения потяните за толкатель, чтобы привести в движение внутренний разжимной проводник, и спираль отсоединится от толкателя.

Подробный чертеж спирали отсоединяемой соответствует рисункам 1-7

Назначение каждого компонента:

1. Спираль: Изолирует повреждения благодаря механическому блокирующему эффекту спирали и закупориванию тромба.
2. Точка отсоединения: Используется для отсоединения спирали.
3. Платиновая рентгеноконтрастная точка: Используется для определения положения устройства в микрокатетере.
4. Отметка положения от толкателя до дистального конца 1м-1,1м (не включает длину спирали): Позволяет узнать длину устройства в микрокатетере в момент использования.
5. Система доставки - толкатель: Используется для транспортировки спирали к очагу поражения.
6. Точка разрыва: используется для разрыва, чтобы отсоединить спираль.
7. Черная маркировка: Используется для определения места разрыва и имеет внутри разделительную проволоку, которая заставляет разделительную проволоку двигаться после разрыва, чтобы способствовать отсоединению спирали.

rod, heat shrink tube and stainless steel spring wire. The platinum-tungsten alloy coil and the pusher are mechanically connected by releasing ball and releasing wires.

The delivery system adopts the method of mechanical release. The spring coil implant is fixed with a release ball, and the other end of the releasing ball is inserted into the distal hole of the pusher. The pusher is threaded with a release wire, and the release wire passes through the distal end of the push rod to connect the implant with the pusher. The proximal end of the pusher has a break point cut by a laser. After manual fracture, pull the pusher to drive the movement of the internal release wire, and the spring coil is separated from the push rod.

A detailed drawing of the detachable coil corresponds to Figures 1-7

Function of each component:

1. Coil: Isolate the lesion by the mechanical blocking effect of the coil and the secondary thrombus blocking effect.
2. Release point: Used to release Coil
3. Platinum radiopaque point: Used to identify the position of the device in the Microcatheter.
4. Position mark from the pusher to the distal end of 1m-1.1m (does not include the length of the coil): Easy to know the length of the device into the microcatheter at the time of use.
5. Delivery system - pusher: It is used to transport the coil to the lesion.
6. Break point: Used to break to release coil.
7. Black mark: Used to identify the breaking point and it has a release wire inside, which drives the release wire to move after breaking to promote the release of coil.

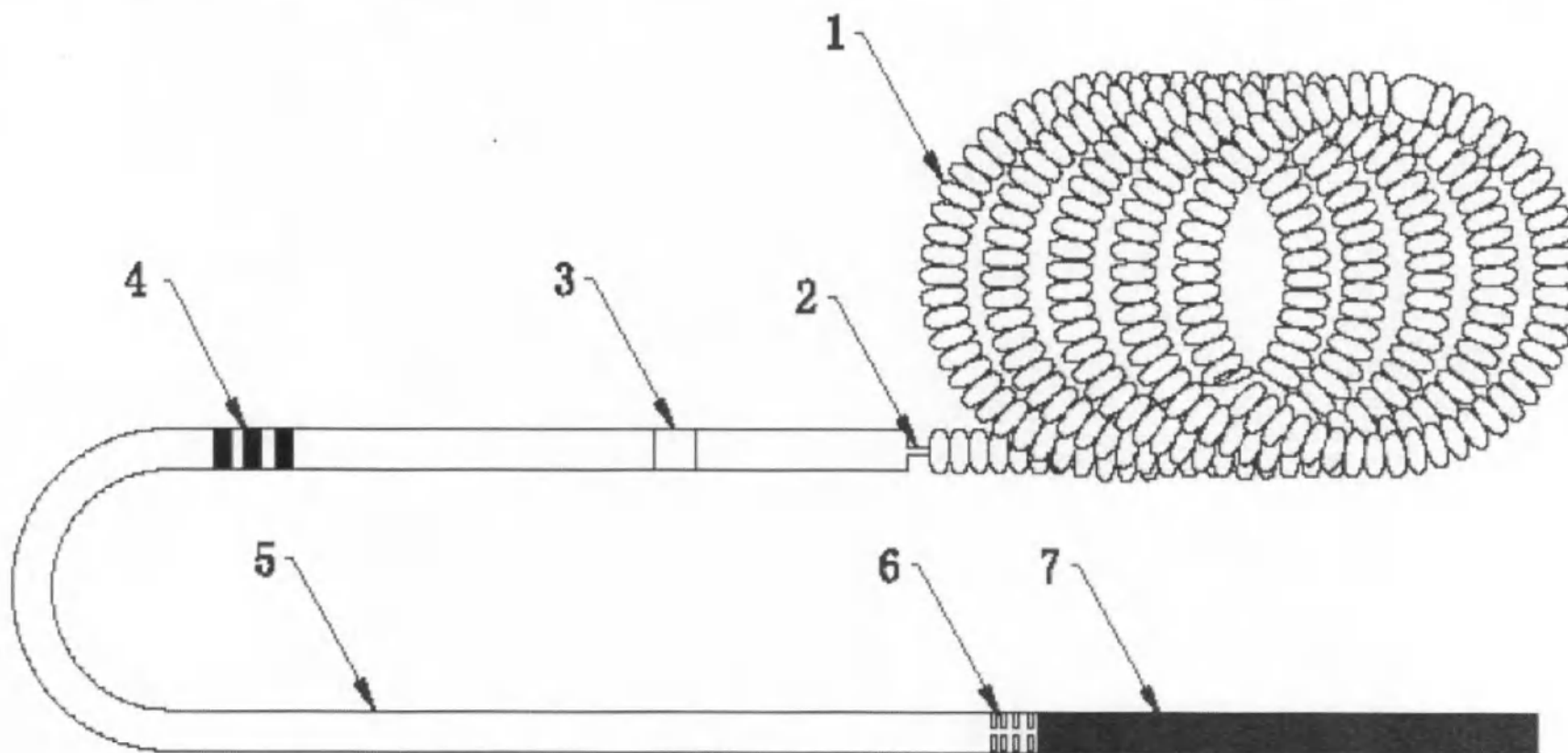


Рис. 1 Компоненты спирали отсоединяемой /Fig. 1 Illustration of the content of Detachable Coil System

1. Спираль/Coil
2. Точка отсоединения/Release point
3. Платиновая рентгеноконтрастная точка/Platinum radiopaque point
4. Отметка положения от толкателя до дистального конца 1м-1,1м (не включает длину спирали)/Position mark from the pusher to the distal end of 1m-1.1m (does not include the length of the coil)
5. Система доставки - толкатель/Delivery system - Pusher
6. Точка разрыва/Break point
7. Черная маркировка/Black mark

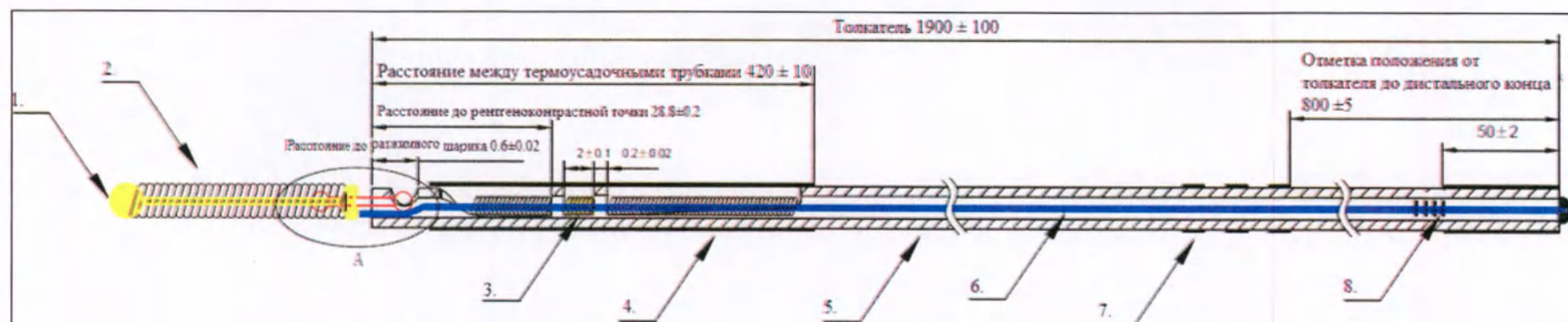


Рис. 2 Схематический чертеж спирали отсоединяемой/ Fig. 2 Schematic drawing of Detachable Coil System

1. Швы против разматывания/Anti-unwinding sutures

2. Спираль/Coil

3. Платиновая рентгеноконтрастная точка/Platinum radiopaque point


4. Термоусадочная трубка/Heat shrink tube


5. Система доставки - толкатель/Delivery system - Pusher

6. Разжимной проводник/Releasing wire



7. Метка положения/Position mark

8. Точка разрыва/Breaking point

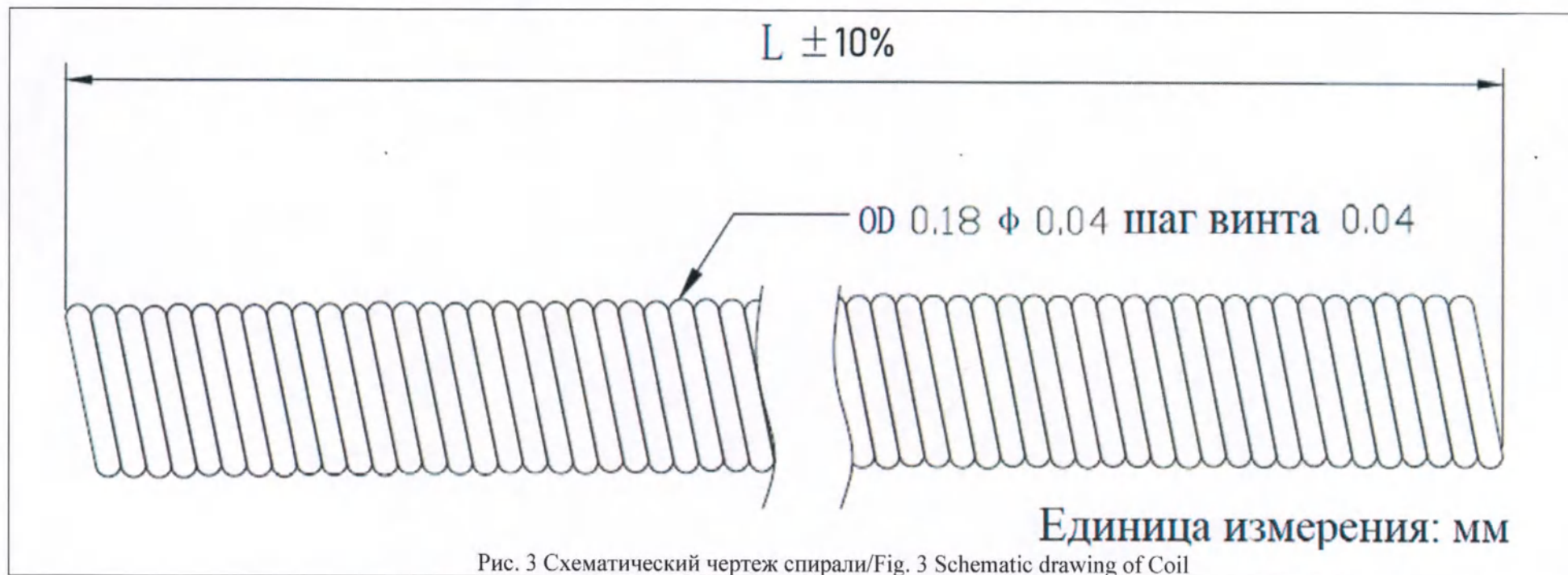

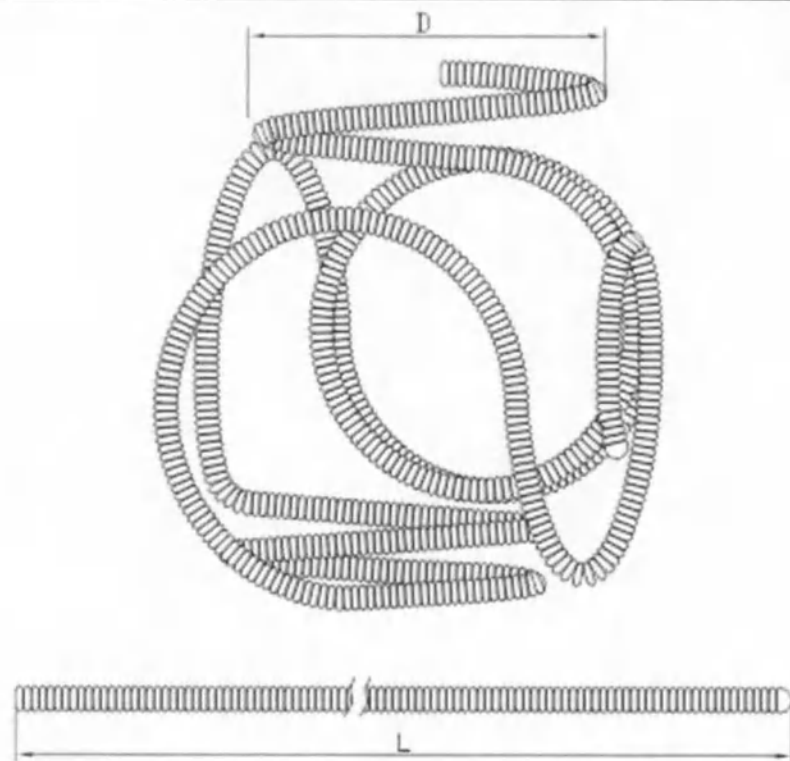

Серия 3D

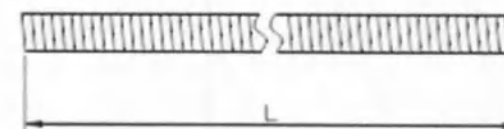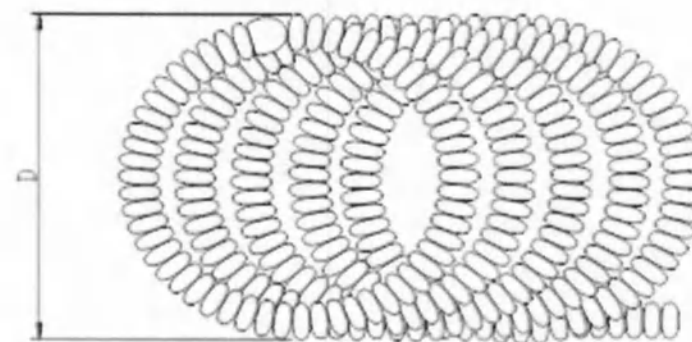

Серия 10, Серия 14

Рис. 4 Структурный чертеж вариантов исполнения, Серия 3D, Серия 10, Серия 14, /Fig. 4 Schematic drawing of variants Series MDS 3D, Series MDS 10, Series MDS 14

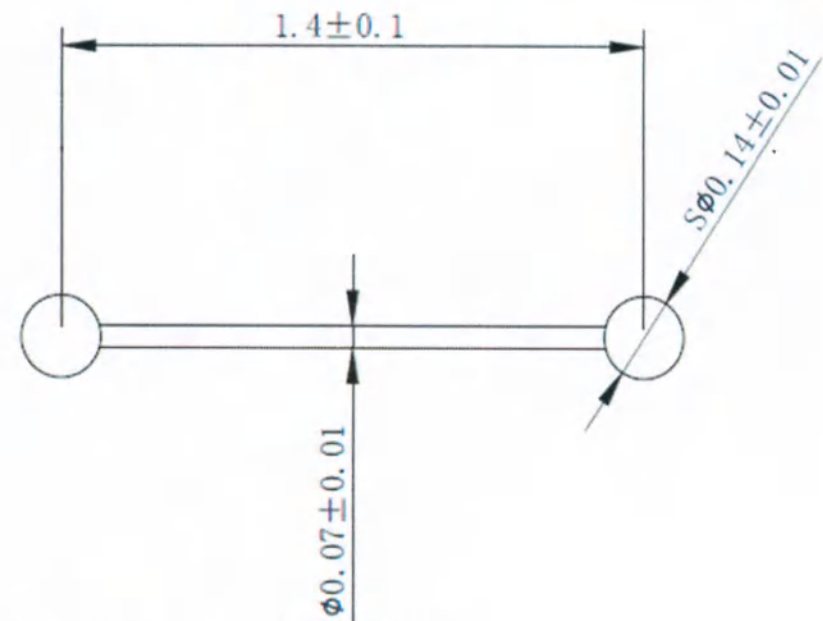
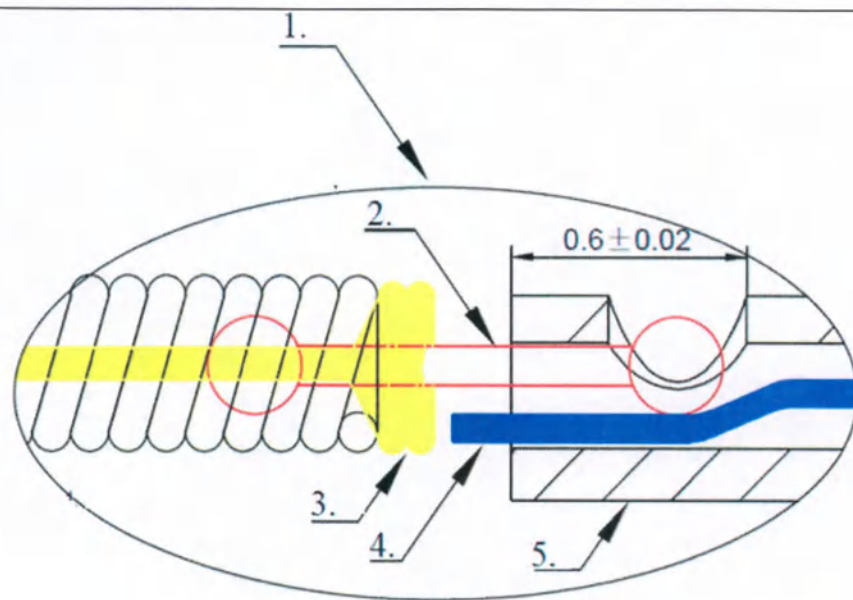


Рис. 5 Структурный чертеж точки разрыва/ Fig 5 Schematic drawing of Release Point

1. Точка разрыва/Release Point
2. Разжимной шарик/Release ball
3. Швы против разматывания/Anti-unwinding sutures
4. Разжимной проводник/Release wire
5. Толкатель/Pusher

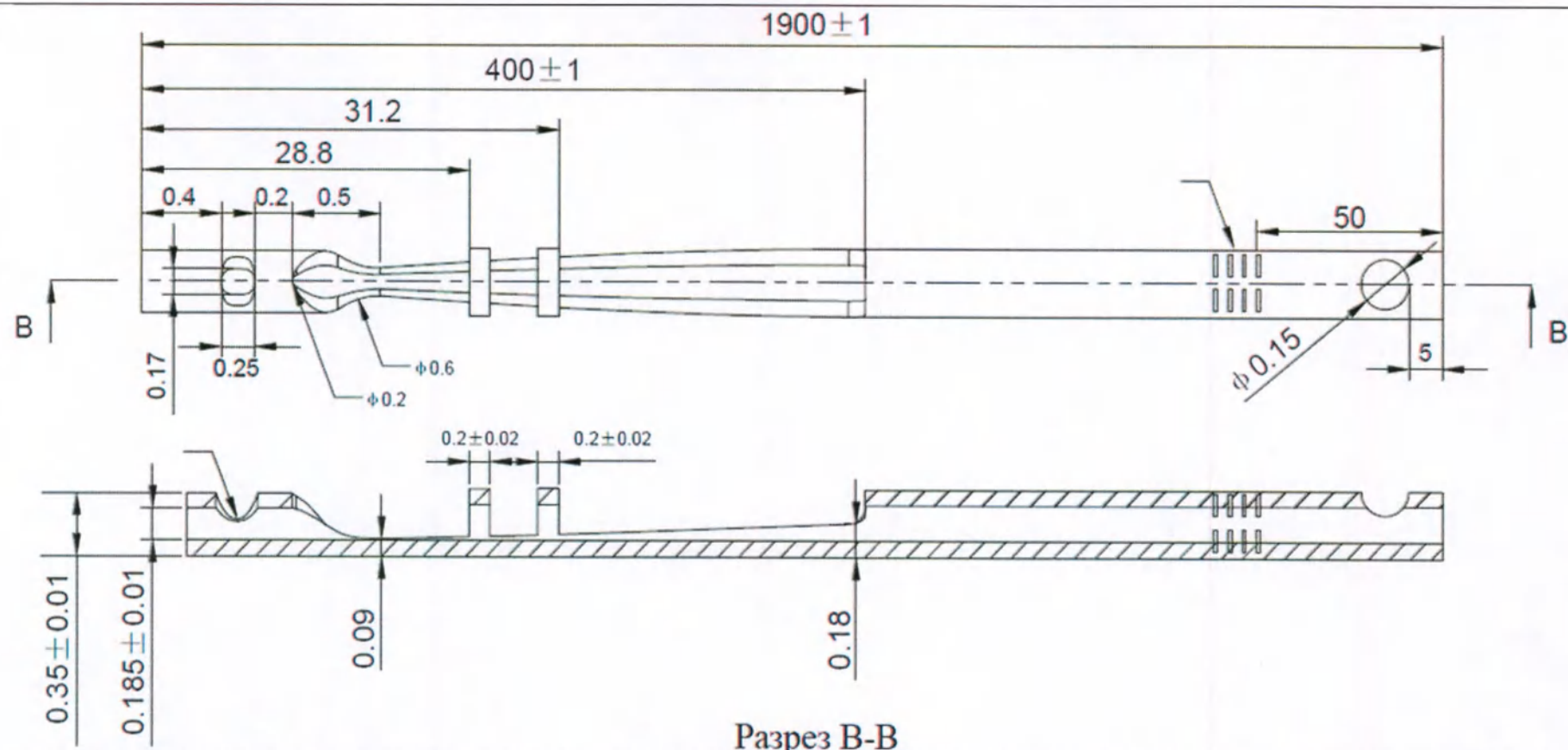


Рис. 6 Схематический чертеж системы доставки. Разрез стержня толкателя/ Fig 6. Schematic drawing of delivery system. Section of the push rod

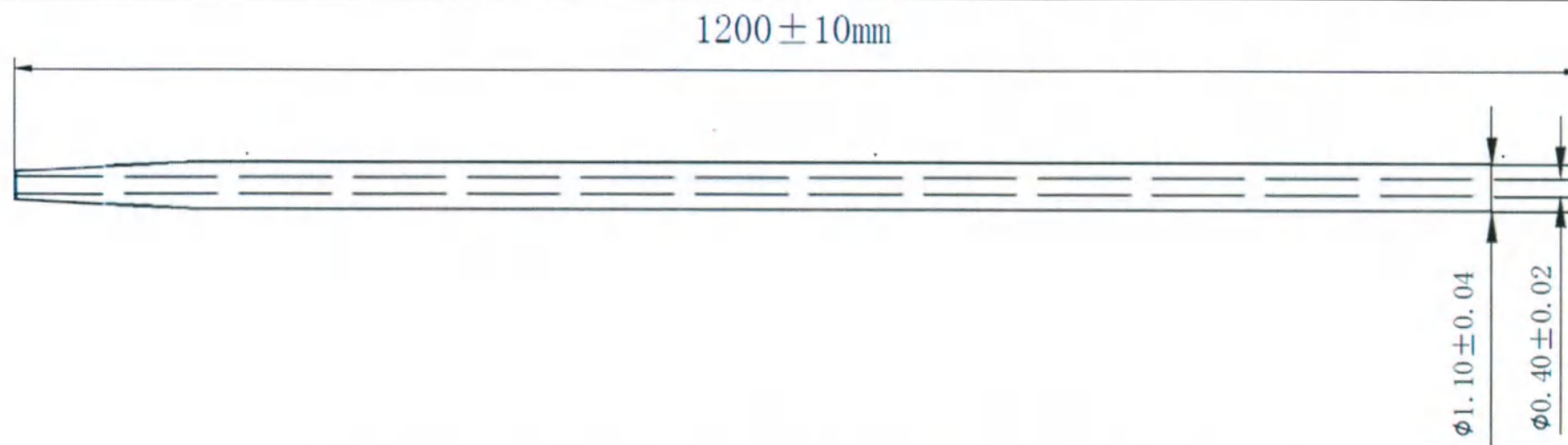


Рис. 7 Схематический чертеж интродьюсера/ Fig 7 Schematic drawing of introducer sheath

Подготовка к использованию

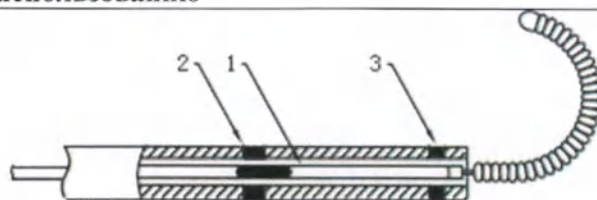


Рис. 8

1. Платиново-вольфрамовая рентгеноконтрастная точка 2. Маркировка проксимального конца катетера 3. Маркировка дистального конца катетера

- Спираль отсоединяемая расположена корректно, если при рентгенокопии подтверждается, что платиново-вольфрамовая рентгеноконтрастная точка на толкателе находится точно между двух меток на микрокатетере с двойной рентгеноконтрастной маркировкой. Затем толкатель медленно вытягивается, чтобы снять внутреннее напряжение спирали в микрокатетере. Затяните гемостатический клапан, чтобы предотвратить смещение толкателя.
- Под рентгенокопией убедитесь, что толкатель совмещен с дистальной стороной проксимальных рентгеноконтрастных меток микрокатетера.
- Убедитесь, что гемостатический клапан фиксирует толкатель, чтобы исключить перемещение спирали отсоединяемой при отсоединении. Убедитесь, что толкатель внутри гемостатического клапана расположен прямо.
- Зажмите часть толкателя с черной маркировкой и часть толкателя без черной

Preparation for use

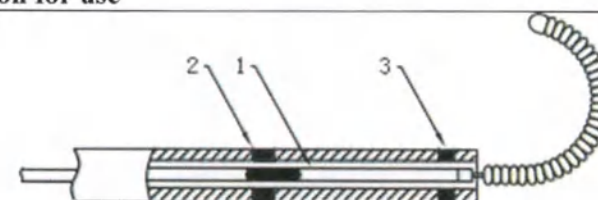


Fig. 8

1. Platinum tungsten radiopaque point 2. Marks of the proximal end of catheter 3. Marks of the distal end of catheter

- Confirm that the Detachable Coil System is pushed into place. Under fluoroscopy, it is confirmed that the platinum tungsten radiopaque point on the pusher is just in the middle of the two marks on the double radiopaque marked microcatheter. During this process, the pusher is slowly pulled to remove the internal stress of the coil in the microcatheter. Tighten the hemostatic valve to prevent displacement of push.
- Under fluoroscopy, reconfirm that the pusher is aligned with the distal side of the proximal radiopaque marks of the microcatheter.
- Confirm that the hemostatic valve locks the pusher to ensure that the Detachable Coil System will not move during release. Ensure that the portion of the pusher inside the hemostatic valve is straight.

маркировки на проксимальном конце толкателя большим и указательным пальцами левой и правой рук соответственно (как показано на рис. 9). Рука, удерживающая часть толкателя с черной маркировкой на проксимальном конце толкателя, находится рядом с краем дистального конца черной маркировки, а расстояние между двумя руками составляет 1-2 см.

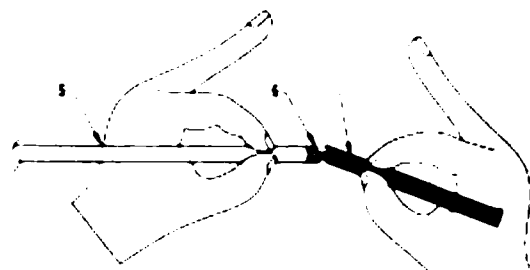


Рис. 9

5. Толкатель 6. Точка разрыва 7. Черная маркировка

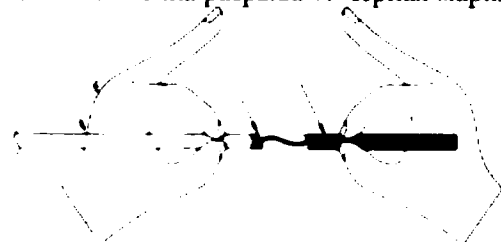


Рис. 10

- Затем отсоедините спираль, удерживая руку на части толкателя без черной маркировки, и сломайте толкатель движением вниз рукой, удерживающей черную маркировку толкателя (как показано на рис. 9). После того как толкатель сломается, медленно тяните часть с черной маркировкой (как показано на рис. 10).
- Под рентгеноскопией медленно перемещайте толкатель и наблюдайте за успешным отсоединением. Если отсоединение не удалось, возьмитесь за толкатель обеими руками и тяните его для завершения отсоединения. (как показано на рис. 11).

- Pinch the part with black mark and the part without black mark at the proximal end of the pusher with the thumb and forefinger of the left and right hands respectively (as shown in Fig. 9). The hand holding the black mark part at the proximal end of the pusher is close to the edge of the distal end of the black mark, and the distance between the two hands is 1-2cm.

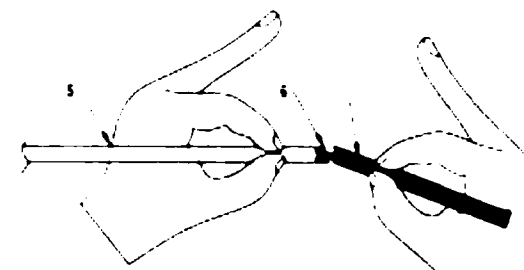


Fig. 9

5. Pusher 6. Break point 7. Black mark

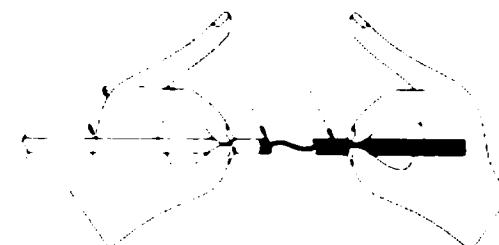


Fig. 10

- Next, release the coil, keep the hand at the part of the pusher without the black mark still, and break the pusher downward with the hand holding the black mark of the pusher (as shown in Fig. 9). After the pusher breaks, slowly pull the part with black mark (as shown in Fig. 10)
- Under fluoroscopy, slowly move the pusher and observe whether the release is successful. If the release is unsuccessful, hold the pusher with both hands and push them to separate further. (as shown in Fig. 11).

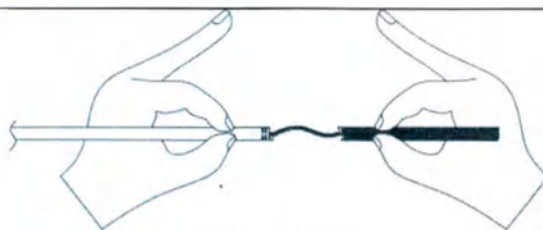


Рис. 11

- Проверив и убедившись, что спираль отделена от толкателя, медленно извлеките толкатель из микрокатетера.
- Метод извлечения (если необходимо)**
Неприменимо, так как спираль отсоединяемая это имплантируемое изделие
- **Предупреждение:**
 - а. Если отсоединение не удастся, извлеките отсоединяемую спираль из микрокатетера и замените ее новой отсоединяемой спиралью.
 - б. Если спираль отсоединилась преждевременно, сначала извлеките толкатель и:
 - 1) Внедрите следующую спираль и продвиньте оставшийся кончик преждевременно отсоединившейся спирали в идеальное положение (внутри аневризмы).
 - 2) Используйте толкатель для извлечения спирали. Если спираль необходимо установить снова, повторите все вышеописанные действия.
- Спираль должна использоваться с микрокатетером с двойной маркировкой, иначе это может привести к сгибанию, блокированию, перерастяжению или разрыву спирали в микрокатетере.
- Подготовка промывочной жидкости под давлением. Перед вводом спирали в микрокатетер промывочная жидкость под давлением должна быть непрерывной и открытой. Проверьте систему промывочной жидкости под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
- После ввода спирали отсоединяемой в микрокатетер рекомендуется поддерживать скорость подачи промывочной жидкости под давлением на уровне 3~5 капель/сек.

Способ применения

Подготовка к введению

- Когда наконечник микрокатетера с двойной маркировкой оказывается в соответствующем положении в просвете аневризмы, спираль отсоединяемую и интродьюсер медленно вынимают из трубки-оболочки, а внешний вид тщательно проверяется на предмет регулярной деформации. При наличии деформации необходимо заменить спираль на новую.
- В стерильных перчатках медленно вынимайте спираль отсоединяемую из оболочки интродьюсера, положите на ладонь и проверьте спираль и

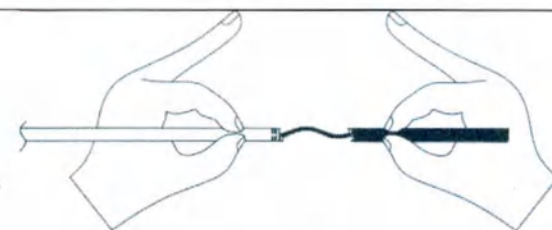


Fig. 11

- After checking and confirming that the coil is separated from the pusher, slowly remove the pusher from the microcatheter.
- Method of extraction (if necessary):**
Not applicable, since detachable coil System is a implantable device
- **Warning:**
 - а. If the release fails, withdraw the detached coil system from the microcatheter and replace it with a new detached coil system.
 - б. If the coil released prematurely, first pull out the pusher and:
 - 1) Push the next coil, and push the remaining tail of the prematurely detached coil into the ideal position (inside the aneurysm).
 - 2) Use the recovery device to recover the coil. If the coil needs to be placed again, repeat the necessary steps above.
- Coil must be used with a double-labelled microcatheter, otherwise it may cause the coil to bend, block, overstretch or break in the microcatheter.
- Pressure Wash Fluid Preparation. Before inserting the coil into the microcatheter, the pressure washing fluid must be continuous and open. Check the pressure washer fluid system to ensure there are no leaks.
- After inserting the detachable coil into the microcatheter, it is recommended to keep the pressure washer fluid flow rate at 3~5 drops/sec.

Mode of application

Preparation procedure

- When the tip of the double-marked microcatheter enters the appropriate position in the aneurysm lumen, the Detachable Coil System and the introducer sheath are slowly taken out of the sheath tube, and the appearance is carefully checked for regular deformation. If there is deformation, please replace it with a new Detachable Coil System.
- Slowly push the Detachable Coil System from the introducer sheath to the palm wearing sterile gloves, and check the coil and the pusher for

толкатель на наличие неровностей, изменение формы пружинной спирали и поломку толкателя. При наличии одного из дефектов замените спираль отсоединяемую на новую. - Затем дистальный конец пружинной спирали до зоны разжима смачивается гепариновым раствором. Чтобы сохранить форму спирали, не растягивайте ее во время этого процесса. Вставьте дистальный конец спирали отсоединяемой вертикально в гепариновый раствор и осторожно втяните в интродьюсер. Способ применения (имплантации) - Вставьте интродьюсер в отверстие микрокатетера с двойной маркировкой через гемостатический клапан, пока интродьюсер не будут полностью установлен на место. Правильно заблокируйте гемостатический клапан до полного отсутствия утечки. - Система доставки состоит из толкателя. Мягко, плавно и непрерывно продвигайте толкатель спирали отсоединяемой до тех пор, пока мягкие части спирали и толкатель не войдут в корпус микрокатетера, затем ослабьте гемостатический клапан, продвиньте толкатель спирали отсоединяемой из интродьюсера, а затем закройте гемостатический клапан. - Убедитесь, что промывочная жидкость вводится равномерно, и продолжите промывку. - Введите спираль под рентгеноскопией и аккуратно расположите ее в том месте, где ее необходимо отсоединить. Если положение спирали неудовлетворительно, можно медленно потянуть за толкатель, чтобы переместить и снова расположить ее. - Если при проведении спирали обнаружено сопротивление, микрокатетер/спираль следует извлечь, а микрокатетер осмотреть на предмет повреждений. - Если размер и форма продвигаемой спирали не подходят, замените спираль. - Изделие не подлежит извлечению. Внимание: Не используйте гемостатический клапан для проталкивания толкателя. Это приведет к тому, что спираль растянется, деформируется, не достигнет заданного положения и неправильно отсоединится. Если это произошло, вытащите микрокатетер/спираль отсоединяемую.	irregularity, loss of memory coil shape of the spring coil and breakage of the pusher. If one of the defects occurs, please replace it with a new Detachable Coil System. - Then the distal end to the release area of the spring coil is soaked in heparin saline. To ensure the shape of the coil, do not stretch the coil during this process. Insert the distal end of the coil system vertically into heparin saline and gently retract the introducer sheath. Method of application (implantation) - Insert the introducer sheath into the entry of the double-marked microcatheter through the hemostatic valve until the introducer sheath is completely in place. Properly lock the hemostatic valve until there is no leakage. - The delivery system consists of a push rod. Push the pusher of the Detachable Coil System in a soft, smooth and continuous way until the soft parts of the coil and the pusher all enter the trunk of the microcatheter, loosen the hemostatic valve, exit the introducer sheath, and then lock the hemostatic valve. - Visually check whether the flushing liquid is injected normally and continue to flush. - Push the coil under fluoroscopy and carefully position it where it needs to be released. If the position of the coil is not satisfactory, you can slowly pull the pusher to withdraw and reposition it. - If resistance is found during the delivery of the coil, the microcatheter/coil should be withdrawn and the microcatheter should be inspected for damage. - If the size and shape of the advancing coil are not suitable, please replace the coil. - The product cannot be removed. Attention: Do not use the hemostatic valve to push the pusher. This will cause the coil to stretch, deform, not reach the designated position and release incorrectly in advance. If this occurs, please exit the microcatheter/ Detachable Coil System.
Информация об очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского изделия (для стерилизуемых изделий), порядке действий при нарушении стерильной упаковки (для изделий, поставляемых в стерильном виде)	Information on cleaning, disinfection and sterilization of a medical device (for sterilized products), the procedure in case of package appears damaged (for sterilize products)
Газовым методом с помощью этиленоксида	Ethylene oxide
Техническое обслуживание	Maintenance
Неприменимо	Not applicable.
Основные технические и функциональные характеристики	Основные технические и функциональные характеристики

Таблица 1. Технические характеристики спирали отсоединяемой / Table 1. Technical characteristics of detachable coil

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов / Shunmei Detachable Coil with delivery system

Серия 10 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов / Series 10 Shunmei Detachable Coil with delivery system

Каталожный номер / Code	Диаметр первичной спирали, мм (допуск $\pm 0,05$) / Primary coil diameter, mm (tolerance $\pm 0,05$)	Длина спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Length of coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Диаметр вторичной спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Diameter of second level coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Масса, г / Weight, g
628097	0,25	20	1,5	Не более чем 3 / Not more than 3
628098	0,25	30	1,5	
628099	0,25	20	2	
628100	0,25	30	2	
628101	0,25	40	2	
628102	0,25	60	2	
628103	0,25	80	2	
628104	0,25	20	2,5	
628105	0,25	30	2,5	
628106	0,25	40	2,5	
628107	0,25	60	2,5	
628108	0,25	80	2,5	
628109	0,25	100	2,5	
628110	0,25	30	3	
628111	0,25	40	3	
628112	0,25	60	3	
628113	0,25	80	3	
628114	0,25	100	3	
628115	0,25	120	3	
628116	0,25	40	3,5	
628117	0,25	60	3,5	
628118	0,25	80	3,5	
628119	0,25	100	3,5	
628120	0,25	120	3,5	

628121	0,25	150	3,5	Не более чем 3 / Not more than 3
628122	0,25	40	4	
628123	0,25	60	4	
628124	0,25	80	4	
628125	0,25	100	4	
628126	0,25	120	4	
628127	0,25	150	4	
628128	0,25	60	4,5	
628129	0,25	80	4,5	
628130	0,25	100	4,5	
628131	0,25	120	4,5	
628132	0,25	150	4,5	
628133	0,25	200	4,5	
628134	0,25	80	5	
628135	0,25	100	5	
628136	0,25	120	5	
628137	0,25	150	5	
628138	0,25	200	5	
628139	0,25	80	6	
628140	0,25	100	6	
628141	0,25	120	6	
628142	0,25	150	6	
628143	0,25	200	6	
628144	0,25	100	7	
628145	0,25	120	7	
628146	0,25	150	7	
628147	0,25	200	7	
628148	0,25	250	7	
628149	0,25	300	7	
628150	0,25	120	8	
628151	0,25	150	8	
628152	0,25	200	8	
628153	0,25	250	8	

628154	0,25	300	8	Не более чем 3 / Not more than 3
628155	0,25	150	9	
628156	0,25	200	9	
628157	0,25	250	9	
628158	0,25	300	9	
628159	0,25	400	9	
628160	0,25	150	10	
628161	0,25	200	10	
628162	0,25	300	10	
628163	0,25	400	10	
628164	0,25	150	12	
628165	0,25	200	12	
628166	0,25	300	12	
628167	0,25	400	12	
628168	0,25	500	12	
628169	0,25	200	14	
628170	0,25	300	14	
628171	0,25	400	14	
628172	0,25	500	14	
628173	0,25	200	16	
628174	0,25	300	16	
628175	0,25	400	16	
628176	0,25	500	16	
628177	0,25	300	18	
628178	0,25	400	18	
628179	0,25	500	18	
628180	0,25	300	20	
628181	0,25	400	20	
628182	0,25	500	20	
Серия 14 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов / Series 14 Shunmei Detachable Coil with delivery system				

Code	Диаметр первичной спирали, мм (допуск $\pm 0,075$) / Primary coil diameter, mm (tolerance $\pm 0,075$)	Длина спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Length of coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Диаметр вторичной спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Diameter of second level coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Масса, г / Weight, g
628183	0,325	20	2	Не более чем 3 / Not more than 3
628184	0,325	30	2	
628185	0,325	40	2	
628186	0,325	60	2	
628187	0,325	80	2	
628188	0,325	20	2,5	
628189	0,325	30	2,5	
628190	0,325	40	2,5	
628191	0,325	60	2,5	
628192	0,325	80	2,5	
628193	0,325	100	2,5	
628194	0,325	30	3	
628195	0,325	40	3	
628196	0,325	60	3	
628197	0,325	80	3	
628198	0,325	100	3	
628199	0,325	120	3	
628200	0,325	40	3,5	
628201	0,325	60	3,5	
628202	0,325	80	3,5	
628203	0,325	100	3,5	
628204	0,325	120	3,5	
628205	0,325	150	3,5	
628206	0,325	40	4	
628207	0,325	60	4	
628208	0,325	80	4	
628209	0,325	100	4	
628210	0,325	120	4	
628211	0,325	150	4	

628212	0,325	60	4,5	Не более чем 3 / Not more than 3
628213	0,325	80	4,5	
628214	0,325	100	4,5	
628215	0,325	120	4,5	
628216	0,325	150	4,5	
628217	0,325	200	4,5	
628218	0,325	80	5	
628219	0,325	100	5	
628220	0,325	120	5	
628221	0,325	150	5	
628222	0,325	200	5	
628223	0,325	80	6	
628224	0,325	100	6	
628225	0,325	120	6	
628226	0,325	150	6	
628227	0,325	200	6	
628228	0,325	100	7	
628229	0,325	120	7	
628230	0,325	150	7	
628231	0,325	200	7	
628232	0,325	250	7	
628233	0,325	300	7	
628234	0,325	120	8	
628235	0,325	150	8	
628236	0,325	200	8	
628237	0,325	250	8	
628238	0,325	300	8	
628239	0,325	150	9	
628240	0,325	200	9	
628241	0,325	250	9	
628242	0,325	300	9	
628243	0,325	400	9	
628244	0,325	150	10	

628245	0,325	200	10	Не более чем 3 / Not more than 3
628246	0,325	300	10	
628247	0,325	400	10	
628248	0,325	150	12	
628249	0,325	200	12	
628250	0,325	300	12	
628251	0,325	400	12	
628252	0,325	500	12	
628253	0,325	200	14	
628254	0,325	300	14	
628255	0,325	400	14	
628256	0,325	500	14	
628257	0,325	200	16	
628258	0,325	300	16	
628259	0,325	400	16	
628260	0,325	500	16	
628261	0,325	300	18	
628262	0,325	400	18	
628263	0,325	500	18	
628264	0,325	300	20	
628265	0,325	400	20	
628266	0,325	500	20	
Серия 3D Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов / Series 3D Shunmei Detachable Coil with delivery system				
Code	Диаметр первичной спирали, мм (допуск $\pm 0,075$) / Primary coil diameter, mm (tolerance $\pm 0,075$)	Длина спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Length of coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Диаметр вторичной спирали, мм (допуск $\pm 10\%$) / Diameter of second level coil, mm (tolerance $\pm 10\%$)	Масса, г / Weight, g
628267	0,275	20	2	Не более чем 3 / Not more than 3
628268	0,275	30	2	
628269	0,275	40	2	
628270	0,275	50	2	
628271	0,275	30	2,5	

628272	0,275	40	2,5	Не более чем 3 / Not more than 3
628273	0,275	60	2,5	
628274	0,275	40	3	
628275	0,275	60	3	
628276	0,275	80	3	
628277	0,275	100	3	
628278	0,275	50	3,5	
628279	0,275	60	3,5	
628280	0,275	80	3,5	
628281	0,275	100	3,5	
628282	0,275	60	4	
628283	0,275	80	4	
628284	0,275	100	4	
628285	0,275	120	4	
628286	0,275	80	5	
628287	0,275	100	5	
628288	0,275	130	5	
628289	0,275	150	5	
628290	0,275	100	6	
628291	0,275	150	6	
628292	0,275	200	6	
628293	0,275	120	7	
628294	0,275	150	7	
628295	0,275	200	7	
628296	0,275	150	8	
628297	0,275	200	8	
628298	0,275	250	8	
628299	0,275	150	9	
628300	0,275	200	9	
628301	0,275	250	9	
628302	0,275	300	9	
628303	0,275	200	10	
628304	0,275	250	10	

628305	0,275	300	10	Не более чем 3 / Not more than 3
628306	0,275	250	12	
628307	0,275	300	12	
628308	0,275	400	12	
628309	0,275	250	14	
628310	0,275	300	14	
628311	0,275	400	14	
628312	0,275	300	16	
628313	0,275	400	16	
628314	0,275	500	16	
628315	0,275	300	18	
628316	0,275	400	18	
628317	0,275	500	18	
628318	0,275	300	20	
628319	0,275	400	20	
628320	0,275	500	20	

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов / Shunmei Detachable Coil with delivery system

Усилие вталкивания/Push force	Усилие вытаскивания/Retraction force	Прочность соединения в зоне отсоединения/Connection strength of detachment zone
<1 Н / <1 N	<1 Н / <1 N	>0,1 Н / > 0,1 N

Система доставки - толкатель/Delivery system - pusher

Длина, см (допуск ±10 см)/Length, cm (tolerance ±10 cm)	Диаметр, мм (допуск ±10%)/Diameter, mm (tolerance ±10%)
190	0,35

Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием	Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used in combination with medical device submitted for registration
Основные принадлежности: Неприменимо Изделия для совместного использования: Медицинские одноразовые шприцы общего назначения или устройство для рентгенэндоваскулярных процедур, общий Y-коннектор Шприц: не менее чем 2,5 мл Устройство для рентгенэндоваскулярных проце не менее чем 20 мл	Key accessories: N/A Joint use devices: Medical general single-use Syringe or Balloon inflation devices, general Y connector. Syringe: not less than 2,5 ML Balloon inflation ices: not less than 20 ML

Y коннектор: тип Пуш-пул, тип винта, тип Пуш-клик • Микрокатетер с двойной рентгеноконтрастной маркировкой с минимальным внутренним диаметром 0,017 дюймов (0,43 мм.) длиной не более чем 170 см и соответствующий ему микропроводник с максимальным внутренним диаметром 0,014 дюймов (0,36 мм). • Медицинские изделия должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в соответствии с установленным порядком	Y connector: Push-pull type, Screw type, Push-click type • Double radiopaque marked microcatheter with a minimum inner diameter of 0,017 inch (0.43 mm.) length not more than 170 cm, and its matching micro guidewire with a maximum inner diameter of 0,014 inch (0.36 mm). • Medical devices must be registered in the Russian Federation in accordance with the established procedure
Сведения о лекарственных средствах, входящих в состав медицинского изделия	Information about the medicines included in the medical device
Неприменимо.	Not applicable
Сведения о материалах животного/человеческого происхождения	Information about materials of animal/human origin
Неприменимо.	Not applicable
Информация об МРТ-совместимости	MRI Compatibility
Медицинское изделие является МРТ совместимым. Условия испытаний МРТ, использованные для оценки этого изделия, были следующими: — Интенсивность магнитного поля: 3,0 Тесла; — Диаметр полости = 60 см; — Активное экранирование, длинный магнит (длина магнита - 198 см) — Максимальная интенсивность поля градиента: 80 мТ/м, максимальная скорость переключения градиента: 200 мТ/м/мс На основании испытаний при вышеуказанных условиях: Максимальный угол смещения образца для испытания в срезе магнитно-резонансного оборудования 3,0 Тесла составляет менее 45°, то есть магнитно-индуцированная сила смещения меньше гравитации, в связи с чем можно считать, что риск образца, подвергнутого магнитно-индуцированной силе смещения, меньше, чем риск ежедневной активности гравитационного поля Земли, таким образом, медицинское изделие является МРТ совместимым.	Medical device is MRI compatible. The MRI test conditions used to evaluate this device were as follows: — Magnetic field intensity: 3.0 Tesla; — Cavity diameter = 60 cm; — Active shielding, long magnet (magnet length - 198 cm) — Maximum gradient field intensity: 80 mT/m, maximum gradient switching speed: 200 mT/m/ms Based on testing under the above conditions: The maximum displacement angle of the specimen for shear testing of 3.0 Tesla magnetic resonance equipment is less than 45°, that is, the magnetically induced displacement force is less than gravity, so the risk of the specimen can be considered, subjected to magnetically induced displacement forces, less than the risk of daily activity of the Earth's gravitational field, thus, medical device is MRI compatible.
Условия эксплуатации медицинского изделия	Operating conditions of the medical device
Медицинские изделия, предназначенные для использования во внутренней среде организма, эксплуатируются в диапазоне температур от 32 до 42°C.	Medical devices, that are intended to be used in the body's internal environment, are used in temperature range from 32°C to 42°C.

Условия транспортировки и хранения медицинского изделия/	Storage and transportation conditions of the medical device
Условия хранения и транспортировки: Храните изделие в чистом, прохладном, сухом и темном месте, избегая длительного воздействия света и влаги; Условия хранения должны быть защищены от крыс и моли, чтобы сохранить целостность упаковки; Не допускать контакта с коррозионными газами; Температура хранения: 0°C - 40°C; Влажность при хранении: ≤ 80%.	Storage and transportation conditions: Store the device in a clean, cool, dry and dark place to avoid extended exposure to light and moisture; Storage environment should be rat-proof and moth-proof in order to keep the integrity of package; Keep it from contacting corrosion gas; Storage temperature: 0°C to 40°C; Storage humidity: ≤ 80%.
Комплект поставки	Package contents
Пример комплекта поставки в индивидуальной упаковке: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм - 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.;	An example of inner package content: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 20 mm - 1 pc.; Instructions for use - 1 pc.;
Срок годности / срок службы	Shelf life / Service life
3 года	3 years.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	Disposal
Изделия, контактирующие с кровью и/или биологическими жидкостями, относятся к медицинским изделиям класса Б по классификации медицинских отходов и могут быть переработаны и/или утилизированы в соответствии с действующими национальными нормативными документами. Неиспользованные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, относятся к изделиям медицинского назначения класса А по классификации медицинских отходов и могут быть переработаны и/или утилизированы в соответствии с действующими национальными нормативными документами (СанПиН 2.1.3684-21).	Products coming into contact with blood and/or biological fluids are class B medical devices under medical wastes classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations. Unused products (not having contact with blood and/or biological fluids), including those with expired shelf life, belong to class A medical devices under medical waste classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations (SanPiN 2.1.3684-21).
Гарантийные обязательства	Warranty
Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Телефон: 0086-0752-3306949 Электронная почта: nora@shunmed.com Сайт: www.shunmed.com Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232 Срок сохранения стерильности изделия – 3 года	Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Telephone: 0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Website: www.shunmed.com Authorised representative: LLC «HEALTH SYSTEMS KNOWLEDGE CENTER LTD» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st., 11A, building 2, floor/room/office 2/30,32/232 Shelf life – 3 years
Рекламация	Reclamation

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Телефон: 0086-0752-3306949 Электронная почта: nora@shunmed.com Сайт: www.shunmed.com Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232	Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Telephone: 0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Website: www.shunmed.com Authorised representative: LLC «HEALTH SYSTEMS KNOWLEDGE CENTER LTD» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st., 11A, building 2, floor/room/office 2/30,32/232
Сведения о маркировке	Labeling
Первичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ, размер МИ; - схематичное изображение содержимого упаковки - наименование места производства - наименование и адрес производителя - логотип Shunmei; - длина толкателя – 190 см. - QR-код - уникальный идентификатор устройства; - Штрих-код; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - надпись «Сделано в Китае» - символ «Осторожно» - символ «Код партии»	The pouch contains the following information: - name of MD, size of MD - schematic representation of the contents of the package - place of production - name of manufacturer and address - Shunmei logo; - push rod length – 190 cm. - QR-code; - unique device identifier; - Barcode; - information about authorized representative of European Community - «Made in China» inscription - symbol «Caution» - symbol «Batch code»

- символ «Не подвергать повторной стерилизации» - символ «Использовать до» - символ «Стерилизация оксидом этилена» - символ «Номер по каталогу» - символ «Изготовитель» - символ «Температурный диапазон» - символ «Маркировка CE» - символ «Не допускать воздействия влаги» - символ «Апирогенно» - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению» - символ «Запрет на повторное применение» - символ «Дата изготовления» - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде» - символ «Не допускать воздействия солнечного света» - символ «Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе» - символ «Идентификационный номер уполномоченного органа» Вторичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ, размер МИ; - схематичное изображение содержимого упаковки - наименование места производства - наименование и адрес производителя - логотип Shunmei; - длина толкателя – 190 см. - QR-код	- symbol «Do not re-sterilize» - symbol «Use by date» - symbol «Sterilized by ethylene oxide» - symbol «Catalogue number» - symbol «Manufacturer» - symbol «Temperature limit» - symbol «CE Marking» - symbol «Keep dry» - symbol «Non-pyrogenic» - symbol «Do not use if package is damaged» - symbol «Do not re-use» - symbol «Date of manufacture» - symbol «Consult instructions for use» - symbol «Keep away from sunlight» - symbol «Authorized representative of European Community» - symbol «Notified Body ID number» The secondary package contains the following information: - name of MD, size of MD - schematic representation of the contents of the package - place of production - name of manufacturer and address - Shunmei logo; - push rod length – 190 cm. - QR-code;
---	--

- уникальный идентификатор устройства; - Штрих-код; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - надпись «Сделано в Китае» - символ «Осторожно» - символ «Код партии» - символ «Не подвергать повторной стерилизации» - символ «Использовать до» - символ «Стерилизация оксидом этилена» - символ «Номер по каталогу» - символ «Изготовитель» - символ «Температурный диапазон» - символ «Маркировка CE» - символ «Не допускать воздействия влаги» - символ «Апирогенно» - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению» - символ «Запрет на повторное применение» - символ «Дата изготовления» - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде» - символ «Не допускать воздействия солнечного света» - символ «Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе» - символ «Идентификационный номер уполномоченного органа» - символ «Количество изделий в упаковке – 1» Третичная упаковка содержит следующую информацию - наименование МИ, размер МИ;	- unique device identifier; - Barcode; - information about authorized representative of European Community - «Made in China» inscription - symbol «Caution» - symbol «Batch code» - symbol «Do not re-sterilize» - symbol «Use by date» - symbol «Sterilized by ethylene oxide» - symbol «Catalogue number» - symbol «Manufacturer» - symbol «Temperature limit» - symbol «CE Marking» - symbol «Keep dry» - symbol «Non-pyrogenic» - symbol «Do not use if package is damaged» - symbol «Do not re-use» - symbol «Date of manufacture» - symbol «Consult instructions for use» - symbol «Keep away from sunlight» - symbol «Authorized representative of European Community» - symbol «Notified Body ID number» - symbol «Number of products in the package – 1» The third package contains the following information: - name of MD, size of MD
--	--

- схематичное изображение содержимого упаковки - наименование места производства - наименование и адрес производителя - логотип Shunmei; - длина толкателя – 190 см. - QR-код - уникальный идентификатор устройства; - Штрих-код; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - надпись «Сделано в Китае» - символ «Осторожно» - символ «Код партии» - символ «Не подвергать повторной стерилизации» - символ «Использовать до» - символ «Стерилизация оксидом этилена» - символ «Номер по каталогу» - символ «Изготовитель» - символ «Температурный диапазон» - символ «Маркировка CE» - символ «Не допускать воздействия влаги» - символ «Апирогенно» - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению» - символ «Запрет на повторное применение» - символ «Дата изготовления» - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»	- schematic representation of the contents of the package - place of production - name of manufacturer and address - Shunmei logo; - push rod length – 190 cm. - QR-code; - unique device identifier; - Barcode; - information about authorized representative of European Community - «Made in China» inscription - symbol «Caution» - symbol «Batch code» - symbol «Do not re-sterilize» - symbol «Use by date» - symbol «Sterilized by ethylene oxide» - symbol «Catalogue number» - symbol «Manufacturer» - symbol «Temperature limit» - symbol «CE Marking» - symbol «Keep dry» - symbol «Non-pyrogenic» - symbol «Do not use if package is damaged» - symbol «Do not re-use» - symbol «Date of manufacture» - symbol «Consult instructions for use» - symbol «Keep away from sunlight» - symbol «Authorized representative of European Community»
--	---

- символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- символ «Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе»
- символ «Идентификационный номер уполномоченного органа»
- символ «Количество изделий в упаковке – 5»

Транспортная упаковка содержит следующую информацию:

- наименование МИ, размер МИ;
- схематичное изображение содержимого упаковки
- наименование места производства
- наименование и адрес производителя
- логотип Shunmei;
- длина толкателя – 190 см.
- QR-код
- уникальный идентификатор устройства;
- Штрих-код;
- сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе;
- надпись «Сделано в Китае»
- символ «Осторожно»
- символ «Код партии»
- символ «Не подвергать повторной стерилизации»
- символ «Использовать до»
- символ «Стерилизация оксидом этилена»
- символ «Номер по каталогу»
- символ «Изготовитель»
- символ «Температурный диапазон»
- символ «Маркировка CE»
- символ «Не допускать воздействия влаги»
- символ «Апирогенно»

- symbol «Notified Body ID number»
- symbol «Number of products in the package – 5»


The transport package contains the following information:

- name of MD, size of MD
- schematic representation of the contents of the package
- place of production
- name of manufacturer and address
- Shunmei logo;
- push rod length – 190 cm.
- QR-code;
- unique device identifier;
- Barcode;
- information about authorized representative of European Community
- «Made in China» inscription
- symbol «Caution»
- symbol «Batch code»
- symbol «Do not re-sterilize»
- symbol «Use by date»
- symbol «Sterilized by ethylene oxide»
- symbol «Catalogue number»
- symbol «Manufacturer»
- symbol «Temperature limit»
- symbol «CE Marking»
- symbol «Keep dry»
- symbol «Non-pyrogenic»

- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению» - символ «Запрет на повторное применение» - символ «Дата изготовления» - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде» - символ «Не допускать воздействия солнечного света» - символ «Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе» - символ «Идентификационный номер уполномоченного органа» - символ «Количество изделий в упаковке – 10»	- symbol «Do not use if package is damaged» - symbol «Do not re-use» - symbol «Date of manufacture» - symbol «Consult instructions for use» - symbol «Keep away from sunlight» - symbol «Authorized representative of European Community» - symbol «Notified Body ID number» - symbol «Number of products in the package – 10»
--	---

Shunmei[®]
Medical technology creates future

MD Detachable Coil with delivery system

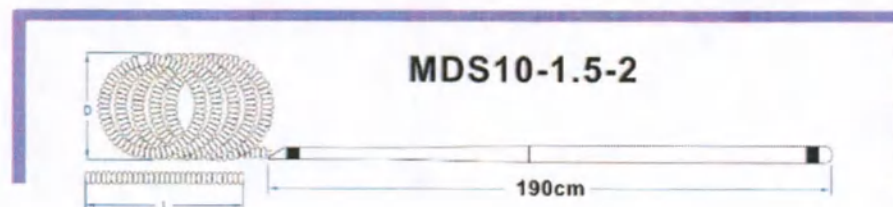

1.5 x 20

mm mm
D-Diameter L-Length

REF 628097

LOT 2309045L

202309

202608



Shunmei Medical Co., Ltd

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-MDS-001 A.0
Effective date: 2023.09.25

CE

XXXX



made in China

Detachable Coil with delivery system MDS10-1.5-2

UDI



01:09959014450977



17:2026081012309045L

REF 628097

LOT 2309045L

Detachable Coil with delivery system MDS10-1.5-2

UDI



01:09959014450977



17:2026081012309045L

REF 628097


LOT 2309045L



Рис. 12. Макет маркировки первичной упаковки Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, размеры: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм / Fig. 12 Pouch Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, sizes: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10, coil diameter x length: 1.5 x 20 mm

Shunmei®

MD Detachable coil with delivery system

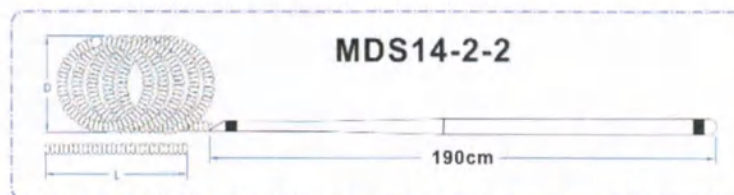

2 x 20
mm mm
D-Diameter L-Length

REF 628183 LOT 2309045L
202309 202608


Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jintong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd 2509AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-1B-MDS 001 A.0
Effective date: 2023.09.25

CE

XXXX

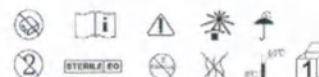

Shunmei®

MDS


2 x 20
mm mm
D-Diameter L-Length

REF 628183 LOT 2309045L
202309 202608

Shunmei®
Medical technology creates future

MDS

Рис. 13. Макет маркировки вторичной упаковки Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, размеры: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм / Fig. 13 Secondary package Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, sizes: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14, coil diameter x length: 2 x 20 mm

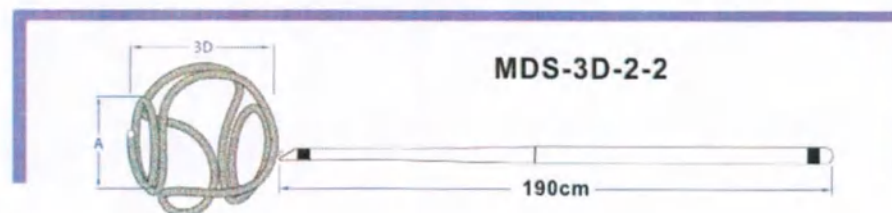

2 x 20
mm mm
D-Diameter L-Length

REF 628267 LOT 2309045L
202309 202608

Shunmei Medical Co., Ltd
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: +0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-MDS-001 A.0
Effective date: 2023.09.25


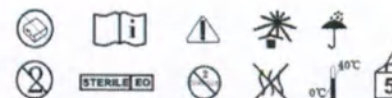


Рис. 14. Макет маркировки третичной упаковки Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, размеры: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм / Fig. 14 Third package. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, size's: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 20 mm

MD Detachable Coil with delivery system

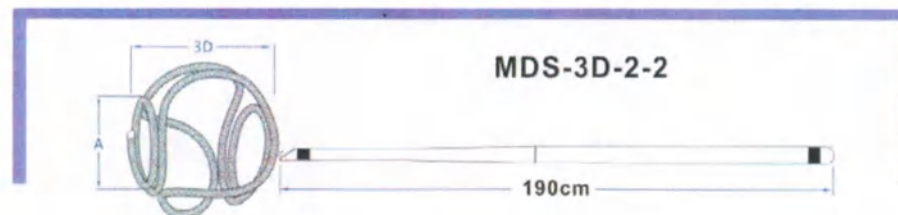

2 x 20
mm mm
D-Diameter L-Length

REF 628267 LOT 2309045L
202309 202608

 **Shunmei Medical Co., Ltd**
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
 No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
 LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory:
 Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
 Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
 Tel: +0086-0752-3306949
 Email: nora@shunmed.com
 Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com

SM-LB-MDS-001 A.0
Effective date:2023.09.25

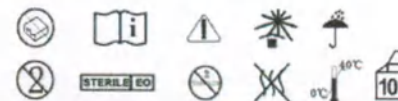


Рис. 15. Макет маркировки транспортной упаковки Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, размеры: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм / Fig. 15 Transport package. Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, sizes: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D, coil diameter x length: 2 x 20 mm

Макет маркировки для РФ/ Labelling layout for RF

Макет русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10 / Layout of the Russian-language labelling on the example of a variation: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 10

Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в вариантах исполнения

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, размеры:

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX мм, в составе:

1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX - 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China.

Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (☐): см. на упаковке

Номер по каталогу (☐): см. на упаковке

Использовать до (☐): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

РУ и дата Регистрационного удостоверения:

Сделано в Китае

Макет русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14 / Layout of the Russian-language labelling on the example of a variation: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 14

Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в вариантах исполнения

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, размеры: .

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX мм, в составе:

1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX - 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China.

Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (LOT): см. на упаковке

Номер по каталогу (REF): см. на упаковке

Использовать до (M): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

РУ и дата Регистрационного удостоверения:

Сделано в Китае

Макет русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения: Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D/ Layout of the Russian-language labelling on the example of a variation: Shunmei Detachable coil with delivery system (pusher, length 190 cm), series 3D

Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в вариантах исполнения

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, размеры:

Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX мм, в составе:

1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: XXXX мм x XXXX - 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China.

Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (): см. на упаковке

Номер по каталогу (): см. на упаковке

Использовать до (): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

РУ и дата Регистрационного удостоверения:

Сделано в Китае

Символы/Symbol			
	Caution/Осторожно		Keep dry/ Не допускать воздействия влаги
	Batch code/Код партии		Non-pyrogenic/ Апирогенно
	Do not re-sterilize/Не подвергать повторной стерилизации		Do not use if package is damaged/ Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Use by date/ Использовать до		Do not re-use/ Запрет на повторное применение
	Sterilized by ethylene oxide/ Стерилизация оксидом этилена		Date of manufacture/ Дата изготовления
	Catalogue number/ Номер по каталогу		Consult instructions for use/ Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Manufacturer/ Изготовитель		Keep away from sunlight/ Не допускать воздействия солнечного света
	Temperature limit/ Температурный диапазон		Authorized representative of European Community/Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	CE Marking/Маркировка CE	XXXX	Notified Body ID number/Идентификационный номер уполномоченного органа
	Number of products in the package – 1/Количество изделий в упаковке - 1		Number of products in the package – 5/Количество изделий в упаковке - 5
	Number of products in the package – 10/Количество изделий в упаковке - 10		

Стандарты, составляющие нормативную базу токсикологических исследований и технических испытаний

Стандарты технических испытаний

ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;

ГОСТ Р ИСО 14630-2017 «Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования»;

ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Стандарты токсикологических испытаний

ГОСТ Р 52770-2023. «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». п. 2;

ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» п. 4;

МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;

ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида» п. 6;

МВИ.МН.1924-2003 «Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты»;

ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;

Standards that form the regulatory framework for toxicological research and technical testing

Technical test standards

ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems»;

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Medical devices Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer Part 1: General requirements»;

ГОСТ Р ИСО 14630-2017 «Non-active surgical implants. General requirements»;

ГОСТ 20790-93 «Medical instruments, apparatus and equipment. General specifications».

Toxicological testing standards

ГОСТ Р 52770-2023. «Medical devices. Biological impact evaluation system. General requirements for safety»;

ГОСТ 31209-2003 «Containers for blood and its components. Requirements for chemical and biological safety and methods of testing»;

ГОСТ 4011-72 «Drinking water. Methods for determination of total iron». p. 2;

ГОСТ 31870-2012 «Drinking water. Determination of elements content by atomic spectrometry methods» p. 4;

МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;

ГОСТ Р 55227-2012 «Water. Methods for determination of formaldehyde content» p. 6;

МВИ.МН.1924-2003 «Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты»;

ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Biological evaluation of medical devices -- Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals»;

ГОСТ 31214-2016 «Medical devices. Requirements for samples and documentation presented for toxicological tests, sanitary and chemical analyses, tests for sterility and pyrogenicity»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 2. Animal welfare requirements»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследование местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibiliзирующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследование общетоксического действия»; ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований»; ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия»; ОФС.1.2.4.0005.15 Пирогенность; ОФС.1.2.4.0003.15 Стерильность.	ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 5. Tests for in vitro* cytotoxicity»; ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 6. Tests for local effects after implantation»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 10. Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity»; ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 11. Tests for systemic toxicity»; ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 12. Sample preparation and reference materials»; ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 23. Irritant studies»; ОФС.1.2.4.0005.15 Pyrogenicity; ОФС.1.2.4.0003.15 Sterility.
Дата выпуска или пересмотра инструкции	Date of issue or revision of instructions
14.05.2024	14.05.2024

СЕРТИФИКАТ

/логотип/
СКРМТ

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли (ССРІТ) -
Китайская палата международной торговли**



**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли**

/QR-код/

СЕРТИФИКАТ

№ 244403A0/026667

Печать:
**КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
СКРМТ
(24)**

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО., ЛТД.» (SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Печать:
**СКРМТ
СЕРТИФИКАТ
(24)**

Китайский комитет содействия развитию
международной торговли

Печать:
**КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
СКРМТ
(24)
/подпись/**

Подпись уполномоченного лица: Ху На

Дата: 29 мая 2024 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано

«Шунмей Медикал Ко. Лтд.» (Shunmei Medical Co., Ltd)

Организация

3-й этаж и R401 здание В, № 8 1-й дороги Цзиньлун,
промышленная зона Баолун, район Лунган, Шэньчжэнь
518116, Гуандун, Китай

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ту Чжэньцзинь (Tu Zhenjin)

Фамилия, имя

14.05.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

/подпись/

Подпись

Печать:

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД. (SHUNMEI
MEDICAL CO., LTD)» * ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Инструкция по применению

«Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки в вариантах
исполнения»

2024

Печать:

КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ

СКРМТ

(24)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем.

Российская Федерация
Город Москва

Первого августа две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024-37-1092

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



М.А. Корсик

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
54 лист(-а/-ов)

Нотариус

