


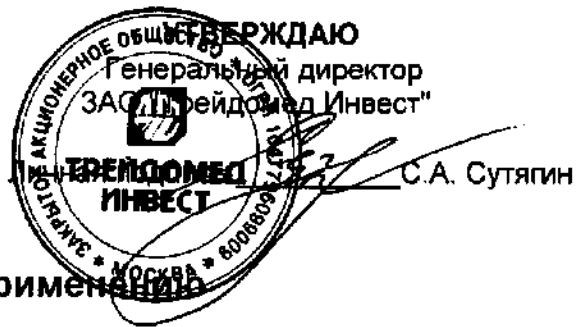

Инструкция по применению

Головка одноразовая: One Use Plus, CB Single Use, M2 Single Use, Epi-K

Изготовитель: фирма MORIA SA (Франция) 15 rue Georges BESSE, 92160 ANTONY, France, Phone: +33146744674 Fax: +33146744690

Введение

материалы, предназначенные для работы микрокератома.

Показания

Головка одноразовая предназначена для среза роговицы и состоит из пластмассового корпуса, внутри которого находится предустановленное лезвие, которым производится срез.

Способ применения

Головка является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. Проверьте упаковку: она не должна быть повреждена или вскрыта, обратите внимание на дату, до которой продукт должен быть использован.

Лезвие может быть повреждено во время вставления в головку микрокератома. Настоятельно рекомендуется проверять лезвие, особенно его режущую кромку перед и после вставления. Лезвие со следами частиц, осадка, окисления и повреждений должно быть удалено. Перед операцией рекомендуется обработать головку и вакуумное кольцо раствором BSS или аналогичным сбалансированным раствором для улучшения скольжения.

Соблюдая правила асептики вскройте стерильную упаковку.

Положите упаковку на ровную поверхность и аккуратно снимите верхнюю сторону упаковки

Теперь головка микрокератома готова для установки на рукоятку.

Рукоятка микрокератома состоит из двух электродвигателей, один создает осцилляцию лезвия, а второй перемещает кератом относительно вакуумного кольца.

Прежде чем использовать рукоятку электродвигателя убедитесь в том, что он хорошо очищен и находится в надлежащем рабочем состоянии.

Фиксация головки микрокератома на рукоятку электродвигателя

- ❖ Удерживая головку микрокератома, совместите плоские площадки на головке и электродвигателе.
- ❖ Наверните головку против часовой стрелки на 1/4 оборота на ось электродвигателя (с усилием только от руки).

Проверьте, чтобы головка была надежно закреплена на электродвигателе. Слегка надавите на него и вставьте до конца в рукоятку, так, чтобы лезвие не выступало за

боковые стороны рукоятки. Если головка не вставляется плавно, проверьте, нет ли сколов и налетов на корпусе и на самом лезвии.

- Конструкция лезвия позволяет вставлять его только в одном направлении, что предотвращает неправильную сборку.

Прежде чем устанавливать головку, убедитесь в том, что прорезь держателя лезвия отцентрирована внутри головки (отцентрирована во внутреннем кольце).

Предупреждения и меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОЛОВКА МИКРОКЕРАТОМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНА С УСИЛИЕМ ТОЛЬКО ОТ РУКИ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО НИКАКИХ КЛЮЧЕЙ ИЛИ ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ. ЕСЛИ ГОЛОВКА БУДЕТ ПЛОХО ЗАФИКСИРОВАНА, ТОГДА СОЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ + ГОЛОВКА" НА КОЛЬЦЕ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.

Головка микрокератома и вспомогательные принадлежности представляют собой высокоточные и хрупкие устройства. Для того, чтобы обеспечить многие годы службы при сохранении первоначальных характеристик точности и безопасности они требуют очень осторожного обращения

- ❖ Все детали микрокератома должны быть тщательно очищены и проверены перед использованием.
- ❖ Головка микрокератома перед сборкой должна быть промыта раствором BSS™ или другим подходящим раствором.
- ❖ Перед операцией нужно обработать глаз, головку микрокератома и лезвие раствором BSS™ или другим подходящим раствором
- ❖ Головку микрокератома нужно заменять после каждой хирургической процедуры.

Упаковка

Головка имеет стерильную герметичную упаковку размером 7X7 см.

Не использовать головку в случае, если упаковка была повреждена!

