

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Русский медицинский
экспорт инструментов»

Троицкая Т.Ю.
2012 г.



Инструкция по применению

СКАЛЬПЕЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ «МАНИ»

Повторное использование запрещено
Обязательно прочитать перед использованием

[Рекомендации]

- 1) Пользователи должны быть хорошо осведомлены о хирургических методах и приемах.
- 2) Выбирайте соответствующие материалы и соблюдайте обычные хирургические процедуры.
- 3) Если упаковка повреждена или загрязнена, либо на самом изделии замечены повреждения, загрязнения или иные необычные особенности, не используйте его.

[Запрещения]

- 1) Не используйте данное изделие на пациентах с признаками сенсibilизации и аллергии на металлы.
- 2) Не используйте данное изделие в иных целях, кроме операций на глазах.
- 3) Не используйте данное изделие, если оно контактировало с иными предметами, кроме глазного яблока.
- 4) Данное изделие является одноразовым, не используйте его более одного раза.

[Форма и структура]

- 1) Данное изделие имеет специальную конфигурацию и стерильно.
Основные материалы, из которых изготовлено данное изделие: 1) лезвие: нержавеющая сталь (с содержанием никеля и хрома); 2) рукоятка: полибутилентефталат (ПБФ).

[Характеристики, назначение, эффект и результаты]

Данное изделие используется при хирургических операциях для выполнения надрезов и прокалываний.

[Способ применения (включая способ использования)]

1. Общепринятый метод выполнения надрезов.
2. Обращение со скальпелем
 - 1) Обращение с лезвием
Возьмитесь пальцами за часть 1 лезвия и осторожно поднимите так, чтобы оно нигде ни к чему не прикасалось. Если вы заденете лезвие, оно может затупиться.

2) Убирание лезвия

Опустите конец лезвия, доведя часть 2 до упора. Затем легонько нажмите на часть 1 до щелчка. После этого разместите лезвие по всей длине внутри детали (обозначенной тремя стрелками), как в футляре.

[Меры предосторожности при работе]

1. Меры предосторожности при работе

- 1) Неправильное использование может привести к сенсibilизации и дать аллергическую реакцию.

2. Важные меры предосторожности

- 1) Используйте скальпель сразу после извлечения из упаковки, а после использования избавьтесь от него безопасным методом, чтобы исключить заражение.
- 2) Поскольку данное изделие имеет острый клинок, будьте особенно осторожны. Если по неосторожности будет нанесена рана загрязненным лезвием, в результате попадания в кровь патогенных организмов может развиваться заражение крови.
- 3) Не пользуйтесь деформированными или поврежденными изделиями.
- 4) Не пользуйтесь разобранными и модифицированными изделиями.
- 5) Использованное изделие удаляется в таре, на которой должно быть ясно указано ее содержимое.

[Принцип использования]

Специальные указания отсутствуют.

[Результаты клинических испытаний]

Специальные указания отсутствуют.

[Методы и условия хранения, срок годности и другие сведения]

1. Методы и условия хранения

- 1) Храните при комнатной температуре, оберегая от сильного нагрева, высокой влажности, попадания прямых солнечных лучей и намокания.
- 2) Следите за тем, чтобы не было разрывов упаковки и проколов на ней.
- 3) Изделие совершенствуется, поэтому строго соблюдайте правило «первую положил, первую достал».
- 4) Проверьте срок годности, указанный на изделии; если срок годности истек, изделии необходимо выбросить.

2. Срок использования

- 1) Срок использования указан на этикетке, расположенной на наружной упаковке; при условии правильного хранения он составляет пять лет после месяца и года изготовления (согласно внутреннему сертификату – данные Компании).

[Указания по обращению с изделием]

Специальные указания отсутствуют.

[Обслуживание и инспекции]

Специальные указания отсутствуют.

[Условия одобрения]

Специальные указания отсутствуют.

[Упаковка]

1 коробка, содержащая 6 изделий.

[Основная литература и заказы на нее]

Специальные указания отсутствуют.

[Наименование и адрес изготовителя, и наименование импортера]

Контактная информация для заказов:

Компания «Мани»:

Завод Киёхара, отдел медицинского оборудования

Почтовый индекс 321-3231

Преф. Тотиги, г. Уцуномия, промышленная зона Киёхара, 8-3

Тел.: 028-667-9911

Контактная информация по вопросам производства и сбыта:

Компания «Мани»:

Почтовый индекс 329-1234

Преф. Тотиги, Сиоя-гун, г. Таканедзава, Накакуцу, 743

Сохраните прилагаемый документ.

В случае его утери, незамедлительно обратитесь по контактными адресам.

Данное изделие постоянно модифицируется и совершенствуется. Все возможные изменения методов использования, конфигурации и свойств материалов будут осуществляться без уведомления.

Содержание данного документа может быть изменено без уведомления.

«МАНИ, ИНК.»

Промышленная зона Киёхара,

8-3, Уцуномия-Си, Тотиги-Кен, 321-3231 ЯПОНИЯ

Телефон: 81-28-667-6177 Телефакс: 81-28-667-9265



Примечание: Замечено

08.10.2012

Поступ. в банк плат.

0401060

Списано по сч. плат.

8 ОКТ 2012

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5227

08.10.2012

Дата

Электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Три тысячи рублей 00 копеек

ИНН 6228038595	КПП 622901001	Сумма	3000-00		
ООО "РУМЭКС инструмент"		Сч. №	40702810300010001707		
Платательщик		БИК	046126708		
Прио-Внешторгбанк (ОАО), г. Рязань		Сч. №	30101810500000000708		
Банк плательщика		БИК	044583001		
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, Г МОСКВА 705		Сч. №			
Банк получателя		Сч. №	40101810800000010041		
ИНН 7710537160		КПП 771001001			
УФК по г.Москве (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат	5
		Код		Рез. поле	
Получатель	06010807200011000110	45286585000	0	0	0 0 ГП

Гос. пошлина за гос. регистрацию изделия медицинской техники Скальпели офтальмологические

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПРИО - ВНЕШТОРГБАНК
ОАО Г.РЯЗАНЬ

- 8 ОКТ 2012

БИК 046126708
ИСП. ЖУРАВЛЕВА Е.В.

55-2-10-5135290,98