

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce



证明书

CERTIFICATE



244403A0/026671

号码 No.

兹证明：在所附文件上的深圳市顺美医疗股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature: Hu Na

日期: 2024年05月29日
(Date: May. 29, 2024)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано/APPROVED

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116
Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY

Подпись/Signature

Инструкция по применению
на медицинское изделие: «Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения»

Instructions for Use
for medical device: «Shun Guider Introducer Set Shunmei in variants»

2024

RUS	ENG
1. Наименование медицинского изделия	1. Name of the medical device
Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения:	Shun Guider Introducer Set Shunmei in variants:
1. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, типоразмеры:	1. Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral, standard sizes:
1.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	1.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
1.1.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.;	1.1.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm – 1 pc.;
1.1.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.;	1.1.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.;
1.1.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	1.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
1.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
1.1.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	1.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
1.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	1.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
1.1.7 Скальпель – 1 шт.;	1.1.7 Scalpel – 1 pc.;
1.1.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.1.8 Instructions for use – 1 pc.
1.2 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	1.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
1.2.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.;	1.2.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm – 1 pc.;
1.2.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.;	1.2.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.;
1.2.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	1.2.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
1.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
	1.2.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.2.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.2.6 Скальпель – 1 шт.; 1.2.7 Инструкция по применению – 1 шт. 1.3 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 1.3.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.3.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.3.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.3.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 1.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.3.7 Скальпель – 1 шт.; 1.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.4 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.4.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.4.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.4.3 Инструкция по применению – 1 шт. 1.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.5.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.5.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.5.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.2.6 Scalpel— 1 pc.; 1.2.7 Instructions for use – 1 pc. 1.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 1.3.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm – 1pc.; 1.3.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.3.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.3.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 1.3.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 1.3.7 Scalpel – 1 pc.; 1.3.8 Instructions for use – 1 pc. 1.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral, consist of: 1.4.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.4.3 Instructions for use – 1 pc. 1.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.5.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.5.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.5.3 Instructions for use – 1 pc.
---	--

1.6 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе:

- 1.6.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.;
- 1.6.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;
- 1.6.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 1.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 1.6.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;
- 1.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 1.6.7 Скальпель – 1 шт.;
- 1.6.8 Инструкция по применению – 1 шт.

1.7 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе:

- 1.7.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.;
- 1.7.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;
- 1.7.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 1.7.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 1.7.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;
- 1.7.6 Инструкция по применению – 1 шт.

1.8 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой

1.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of:

- 1.6.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.;
- 1.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
- 1.6.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 1.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 1.6.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
- 1.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 1.6.7 Scalpel – 1 pc.;
- 1.6.8 Instructions for use – 1 pc.

1.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of:

- 1.7.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.;
- 1.7.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
- 1.7.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 1.7.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 1.7.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
- 1.7.6 Instructions for use – 1 pc.

1.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71

18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.8.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.8.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.8.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.8.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.8.7 Скальпель – 1 шт.; 1.8.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.9.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.9.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.9.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.9.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.9.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) в составе: 1.10.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.;	mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2.5 ml, consist of: 1.8.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.8.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.8.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.8.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.8.7 Scalpel – 1 pc.; 1.8.8 Instructions for use – 1 pc. 1.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.9.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.9.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.9.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.9.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.9.6 Instructions for use – 1 pc. 1.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.10.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.;
---	--

1.10.2	Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	1.10.2	Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
1.10.3	Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.;	1.10.3	Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.;
1.10.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.10.4	Guidewire advancer – 1 pc.;
1.10.5	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	1.10.5	Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
1.10.6	Скальпель – 1 шт.;	1.10.6	Scalpel – 1 pc.;
1.10.7	Инструкция по применению – 1 шт.	1.10.7	Instructions for use – 1 pc.
1.11	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе:	1.11.	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, consist of:
1.11.1	Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.;	1.11.1	Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.;
1.11.2	Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	1.11.2	Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
1.11.3	Инструкция по применению – 1 шт.	1.11.3	Instructions for use – 1 pc.
1.12	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:	1.12.	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:
1.12.1	Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.;	1.12.1	Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.;
1.12.2	Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;	1.12.2	Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;
1.12.3	Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;	1.12.3	Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.;
1.12.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.12.4	Guidewire advancer – 1 pc.;
1.12.5	Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	1.12.5	Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
1.12.6	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	1.12.6	Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
1.12.7	Скальпель – 1 шт.;	1.12.7	Scalpel – 1 pc.;
1.12.8	Инструкция по применению – 1 шт.	1.12.8	Instructions for use – 1 pc.
1.13	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной	1.13.	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71

иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.13.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.13.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.13.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.13.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.13.7 Скальпель – 1 шт.; 1.13.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.14 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.14.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.14.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.14.3 Инструкция по применению – 1 шт. 1.15 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 1.15.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.15.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.15.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.15.5 Инструкция по применению – 1 шт.	mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.13.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.13.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.13.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.13.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.13.7 Scalpel – 1 pc.; 1.13.8 Instructions for use – 1 pc. 1.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.14.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.14.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.14.3 Instructions for use – 1 pc. 1.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 1.15.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.15.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.15.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.15.5 Instructions for use – 1 pc.
--	--

1.16 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.16.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 1.16.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 1.16.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.16.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.16.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.16.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.16.7 Скальпель – 1 шт.; 1.16.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.17 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.17.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.17.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.17.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.17.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.17.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.17.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.17.7 Скальпель – 1 шт.; 1.17.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.16.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 1.16.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 1.16.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.16.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.16.7 Scalpel – 1 pc.; 1.16.8 Instructions for use – 1 pc. 1.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.17.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.17.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.17.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.17.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.17.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.17.7 Scalpel – 1 pc.; 1.17.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.18 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1.20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.18.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.18.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.18.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.18.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.18.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.18.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.18.7 Скальпель – 1 шт.; 1.18.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.19 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.19.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.19.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.19.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.19.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.19.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.19.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.20 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе:	1.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.18.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.18.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.18.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.18.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.18.7 Scalpel – 1 pc.; 1.18.8 Instructions for use – 1 pc. 1.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.19.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.19.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.19.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.19.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.19.6 Instructions for use – 1 pc. 1.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, consist of:
--	--

1.20.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.20.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.20.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.20.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.20.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.20.3 Instructions for use – 1 pc.
1.21 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.21.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.21.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.21.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.21.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.21.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.21.6 Скальпель – 1 шт.; 1.21.7 Инструкция по применению – 1 шт.	1.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.21.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.21.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.21.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.21.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.21.6 Scalpel – 1 pc.; 1.21.7 Instructions for use – 1 pc.
1.22 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.22.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.22.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.22.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.22.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.22.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.22.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.22.7 Скальпель – 1 шт.; 1.22.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.22.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.22.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.22.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.22.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.22.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.22.7 Scalpel – 1 pc.; 1.22.8 Instructions for use – 1 pc.

1.23 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1.20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.23.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.23.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.23.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.23.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.23.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.23.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.23.7 Скальпель – 1 шт.; 1.23.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.24 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе: 1.24.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.24.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.24.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.24.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.24.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.24.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.24.7 Скальпель – 1 шт.; 1.24.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.23. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.23.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.23.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.23.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.23.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.23.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.23.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.23.7 Scalpel – 1 pc.; 1.23.8 Instructions for use – 1 pc. 1.24. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of: 1.24.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.24.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.24.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.24.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.24.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.24.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.24.7 Scalpel – 1 pc.; 1.24.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.25 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.25.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.25.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.25.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.25. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.25.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.25.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.25.3 Instructions for use – 1 pc.
1.26 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 1.26.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.26.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.26.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.26.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.26.5 Инструкция по применению – 1 шт.	1.26. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 1.26.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.26.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.26.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.26.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.26.5 Instructions for use – 1 pc.
1.27 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.27.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 1.27.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 1.27.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.27.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.27.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.27.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.27.7 Скальпель – 1 шт.; 1.27.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.27. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.27.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm – 1pc.; 1.27.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 1.27.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.27.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.27.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.27.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 1.27.7 Scalpel – 1 pc.; 1.27.8 Instructions for use – 1 pc.

1.28 Набор интродьюсера диаметром 7F (2.3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1.20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.28.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.28.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.28.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.28.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.28.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.28.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.28.7 Скальпель – 1 шт.; 1.28.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.29 Набор интродьюсера диаметром 7F (2.3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1.20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.29.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.29.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.29.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.29.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.29.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.29.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.30 Набор интродьюсера диаметром 7F (2.3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной	1.28. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.28.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.28.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.28.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.28.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.28.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.28.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.28.7 Scalpel – 1 pc.; 1.28.8 Instructions for use – 1 pc. 1.29. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.29.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.29.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.29.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.29.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.29.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.29.6 Instructions for use – 1 pc. 1.30. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71
--	--

иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.30.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.30.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.30.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.30.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.30.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.30.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.31 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.31.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.31.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.31.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.31.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.31.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.31.6 Скальпель – 1 шт.; 1.31.7 Инструкция по применению – 1 шт. 1.32 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.32.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.32.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.32.3 Инструкция по применению – 1 шт.	mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97mm), length 45 cm), consist of: 1.30.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.30.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.30.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.30.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.30.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.30.6 Instructions for use – 1 pc. 1.31. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.31.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.31.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.31.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.31.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.31.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.31.6 Scalpel – 1 pc.; 1.31.7 Instructions for use – 1 pc. 1.32. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, consist of: 1.32.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.32.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.32.3 Instructions for use – 1 pc.
--	---

1.33 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.33.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.33.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.33.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.33.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.33.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.33.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.33.7 Скальпель – 1 шт.; 1.33.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.34 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе: 1.34.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.34.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.34.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.34.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.34.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.34.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.34.7 Скальпель – 1 шт.; 1.34.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.33. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.33.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.33.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.33.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.33.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.33.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.33.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.33.7 Scalpel – 1 pc.; 1.33.8 Instructions for use – 1 pc. 1.34. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of: 1.34.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.34.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.34.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.34.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.34.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.34.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.34.7 Scalpel – 1 pc.; 1.34.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.35 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.35.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.35.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.35.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.35. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.35.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.35.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.35.3 Instructions for use – 1 pc.
1.36 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.36.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.36.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.36.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.36.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.36.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.36.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.36. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.36.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.36.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.36.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.36.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.36.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.36.6 Instructions for use – 1 pc.
1.37 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.37.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.37.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.37.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.37.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.37.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	1.37. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2.5 ml, consist of: 1.37.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.37.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.37.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.37.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.37.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.37.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 1.37.7 Scalpel – 1 pc.;

1.37.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.37.7 Скальпель – 1 шт.; 1.37.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.37.8 Instructions for use – 1 pc.
1.38 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.38.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.38.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.38.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.38.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.38.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.38.6 Скальпель – 1 шт.; 1.38.7 Инструкция по применению – 1 шт.	1.38. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.38.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.38.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.38.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.38.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.38.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.38.6 Scalpel – 1 pc.; 1.38.7 Instructions for use – 1 pc.
1.39 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.39.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.39.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.39.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.39.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.39.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.39.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.39. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.39.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.39.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.39.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.39.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.39.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.39.6 Instructions for use – 1 pc.
1.40 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе:	1.40. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, consist of:

1.40.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.40.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.40.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.40.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.40.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.40.3 Instructions for use – 1 pc.
1.41 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.41.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.41.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.41.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.41.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.41.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.41.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.41.7 Скальпель – 1 шт.; 1.41.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.41. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.41.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.41.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.41.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.41.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.41.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.41.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.41.7 Scalpel – 1 pc.; 1.41.8 Instructions for use – 1 pc.
1.42 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.42.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.42.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.42.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.42.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.42.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	1.42. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.42.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.42.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.42.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.42.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.42.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.42.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.42.7 Scalpel – 1 pc.;

1.42.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.42.7 Скальпель – 1 шт.; 1.42.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.42.8 Instructions for use – 1 pc.
1.43 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.43.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.43.2 Дилататор сосудистый, длина 23,8 см – 1 шт.; 1.43.3 Инструкция по применению – 1 шт.	1.43. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.43.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.43.2 Vascular dilator, length 23.8 cm – 1 pc.; 1.43.3 Instructions for use – 1 pc.
1.44 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.44.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.44.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.44.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.44.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.44.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.44.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.44.7 Скальпель – 1 шт.; 1.44.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.44. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.44.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.44.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.44.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.44.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.44.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.44.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.44.7 Scalpel – 1 pc.; 1.44.8 Instructions for use – 1 pc.
1.45 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.45.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.45.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	1.45. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.45.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.45.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;

1.45.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.45.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.45.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.45.6 Скальпель – 1 шт.; 1.45.7 Инструкция по применению – 1 шт.	1.45.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.45.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.45.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.45.6 Scalpel – 1 pc.; 1.45.7 Instructions for use – 1 pc.
1.46 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.46.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 16 см – 1 шт.; 1.46.2 Дилататор сосудистый, длина 22,8 см – 1 шт.; 1.46.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.46.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.46.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.46.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.46.7 Скальпель – 1 шт.; 1.46.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.46. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 16 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.46.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 16 cm - 1pc.; 1.46.2 Vascular dilator, length 22.8 cm – 1 pc.; 1.46.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.46.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.46.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.46.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.46.7 Scalpel – 1 pc.; 1.46.8 Instructions for use – 1 pc.
1.47 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.47.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.47.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.47.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.47.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.47. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.47.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.47.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.47.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.47.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.47.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.47.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.47.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.47.7 Скальпель – 1 шт.; 1.47.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.48 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.49 1.48.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.48.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.48.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.48.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.48.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.48.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.48.7 Скальпель – 1 шт.; 1.48.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.50 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.49.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.49.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.49.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.49.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.47.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.47.7 Scalpel – 1 pc.; 1.47.8 Instructions for use – 1 pc. 1.48. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.48.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.48.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.48.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.48.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.48.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.48.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.48.7 Scalpel – 1 pc.; 1.48.8 Instructions for use – 1 pc. 1.49. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.49.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.49.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.49.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.49.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.49.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.49.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
--	--

1.49.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.49.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.49.7 Скальпель – 1 шт.; 1.49.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.49.7 Scalpel – 1 pc.; 1.49.8 Instructions for use – 1 pc.
1.50 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.50.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.50.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.50.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.50.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.50.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.50.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.50.7 Скальпель – 1 шт.; 1.50.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.50. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.50.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.50.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.50.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.50.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.50.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.50.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.50.7 Scalpel – 1 pc.; 1.50.8 Instructions for use – 1 pc.
1.51 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.51.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.51.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.51.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.51.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.51. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.51.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.51.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.51.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.51.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.51.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.51.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.51.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.51.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.51.7 Скальпель – 1 шт.; 1.51.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.51.7 Scalpel – 1 pc.; 1.51.8 Instructions for use – 1 pc.
1.52 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.52.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.52.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.52.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.52.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.52.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.52.6 Скальпель – 1 шт.; 1.52.7 Инструкция по применению – 1 шт.	1.52. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.52.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.52.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.52.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.52.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.52.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.52.6 Scalpel – 1 pc.; 1.52.7 Instructions for use – 1 pc.
2 Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры: 2.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 2.1.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.; 2.1.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 2.1.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	2. Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating, standard sizes: 2.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 2.1.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm - 1pc.; 2.1.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 2.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 2.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

2.1.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 2.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.1.7 Скальпель – 1 шт.; 2.1.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.2 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 2.2.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.2.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.2.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.2.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.2.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.2.7 Скальпель – 1 шт.; 2.2.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.3 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.3.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.3.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.3.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;	2.1.7 Scalpel – 1 pc.; 2.1.8 Instructions for use – 1 pc. 2.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 2.2.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.2.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.2.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.2.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.2.7 Scalpel – 1 pc.; 2.2.8 Instructions for use – 1 pc. 2.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.3.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 2.3.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.3.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.3.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
--	---

2.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.3.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.3.7 Скальпель – 1 шт.; 2.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.4 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.4.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.4.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.4.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.4.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.4.7 Скальпель – 1 шт.; 2.4.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.5 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 2.5.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	2.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.3.7 Scalpel – 1 pc.; 2.3.8 Instructions for use – 1 pc. 2.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.4.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.4.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.4.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.4.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.4.7 Scalpel – 1 pc.; 2.4.8 Instructions for use – 1 pc. 2.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 2.5.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.5.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
---	--

2.5.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.;	2.5.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
2.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	2.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
2.5.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	2.5.7 Scalpel – 1 pc.;
2.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	2.5.8 Instructions for use – 1 pc.
2.5.7 Скальпель – 1 шт.;	
2.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
2.6 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:	2.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:
2.6.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.;	2.6.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.;
2.6.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;	2.6.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;
2.6.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;	2.6.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.;
2.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	2.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
2.6.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	2.6.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
2.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	2.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
2.6.7 Скальпель – 1 шт.;	2.6.7 Scalpel – 1 pc.;
2.6.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.6.8 Instructions for use – 1 pc.
2.7 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе:	2.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of:
2.7.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.;	2.7.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.;
	2.7.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

2.7.2	Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;	2.7.3	Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.;
2.7.3	Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.;	2.7.4	Guidewire advancer – 1 pc.;
2.7.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	2.7.5	Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
2.7.5	Интродюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	2.7.6	Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
2.7.6	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	2.7.7	Scalpel – 1 pc.;
2.7.7	Скальпель – 1 шт.;	2.7.8	Instructions for use – 1 pc.
2.7.8	Инструкция по применению – 1 шт.		
2.8 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе:		2.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of:	
2.8.1	Интродюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;	2.8.1	Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;
2.8.2	Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	2.8.2	Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
2.8.3	Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.;	2.8.3	Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.;
2.8.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	2.8.4	Guidewire advancer – 1 pc.;
2.8.5	Интродюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	2.8.5	Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
2.8.6	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	2.8.6	Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
2.8.7	Скальпель – 1 шт.;	2.8.7	Scalpel – 1 pc.;
2.8.8	Инструкция по применению – 1 шт.	2.8.8	Instructions for use – 1 pc.
2.9 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:		2.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:	
		2.9.1	Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.;

2.9.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.9.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.9.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.9.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.9.7 Скальпель – 1 шт.; 2.9.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.9.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.9.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.9.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.9.7 Scalpel – 1 pc.; 2.9.8 Instructions for use – 1 pc.
2.10 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.10.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.10.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.10.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.10.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.10.7 Скальпель – 1 шт.; 2.10.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.10.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.10.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.10.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.10.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.10.7 Scalpel – 1 pc.; 2.10.8 Instructions for use – 1 pc.
2.11 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71	2.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:

мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.11.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.11.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.11.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.11.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.11.7 Скальпель – 1 шт.; 2.11.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.12 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.12.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.12.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.12.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.12.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.12.7 Скальпель – 1 шт.; 2.12.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.13 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным	2.11.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1 pc.; 2.11.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.11.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.11.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.11.7 Scalpel – 1 pc.; 2.11.8 Instructions for use – 1 pc. 2.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.12.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.12.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.12.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.12.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.12.7 Scalpel – 1 pc.; 2.12.8 Instructions for use – 1 pc. 2.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G
---	--

покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.13.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.13.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.13.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.13.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.13.7 Скальпель – 1 шт.; 2.13.8 Инструкция по применению – 1 шт.	(diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.13.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1 pc.; 2.13.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.13.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.13.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.13.7 Scalpel – 1 pc.; 2.13.8 Instructions for use – 1 pc.
2.14 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.14.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.14.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.14.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.14.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.14.7 Скальпель – 1 шт.; 2.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.14.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 2.14.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.14.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.14.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.14.7 Scalpel – 1 pc.; 2.14.8 Instructions for use – 1 pc.

2.15 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см). в составе: 2.15.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.15.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.15.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.15.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.15.7 Скальпель – 1 шт.; 2.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.15.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1 pc.; 2.15.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.15.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.15.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.15.7 Scalpel – 1 pc.; 2.15.8 Instructions for use – 1 pc.
3 Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, типоразмеры: 3.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.1.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.1.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.1.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3. Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial, standard sizes: 3.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.1.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.1.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.1.7 Scalpel – 1 pc.; 3.1.8 Instructions for use – 1 pc.

3.1.7	Скальпель – 1 шт.;	
3.1.8	Инструкция по применению – 1 шт.	
3.2	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе:	3.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of:
3.2.1	Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.;	3.2.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.;
3.2.2	Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.2.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
3.2.3	Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.;	3.2.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.;
3.2.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
3.2.5	Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	3.2.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
3.2.6	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
3.2.7	Скальпель – 1 шт.;	3.2.7 Scalpel – 1 pc.;
3.2.8	Инструкция по применению – 1 шт.	3.2.8 Instructions for use – 1 pc.
3.3	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе:	3.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:
3.3.1	Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.;	3.3.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.;
3.3.2	Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.3.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
3.3.3	Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	3.3.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;
3.3.4	Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
3.3.5	Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	3.3.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
3.3.6	Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
3.3.7	Скальпель – 1 шт.;	3.3.7 Scalpel – 1 pc.;
		3.3.8 Instructions for use – 1 pc.

3.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.4 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.4.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.4.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.4.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.4.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.4.7 Скальпель – 1 шт.; 3.4.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.5.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.5.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.5.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.5.7 Скальпель – 1 шт.; 3.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.4.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 3.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.4.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.4.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.4.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.4.7 Scalpel – 1 pc.; 3.4.8 Instructions for use – 1 pc. 3.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.5.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 3.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.5.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.5.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.5.7 Scalpel – 1 pc.; 3.5.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

3.6 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.6.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.6.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.6.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.6.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.6.7 Скальпель – 1 шт.; 3.6.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.7 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shunmei для трансрадиального доступа, в составе: 3.7.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.7.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.7.3 Инструкция по применению – 1 шт. 3.8 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.8.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.8.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.8.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	3.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1,4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.6.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.6.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.6.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.6.7 Scalpel – 1 pc.; 3.6.8 Instructions for use – 1 pc. 3.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, consist of: 3.7.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.7.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.7.3 Instructions for use – 1 pc. 3.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.8.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.8.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.8.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.8.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.8.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.;
--	--

3.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.8.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.8.7 Скальпель – 1 шт.; 3.8.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.8.7 Scalpel – 1 pc.; 3.8.8 Instructions for use – 1 pc.
3.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.9.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.9.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.9.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.9.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.9.7 Скальпель – 1 шт.; 3.9.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.9.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1,7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.9.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.9.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.9.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.9.7 Scalpel – 1 pc.; 3.9.8 Instructions for use – 1 pc.
3.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.10.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.10.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.10.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.10.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.10.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.10.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.10.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.10.7 Scalpel – 1 pc.;

3.10.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.10.7 Скальпель – 1 шт.; 3.10.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.10.8 Instructions for use – 1 pc.
3.11 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.11.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.11.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.11.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.11.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.11.7 Скальпель – 1 шт.; 3.11.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.11.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.11.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.11.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.11.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.11.7 Scalpel – 1 pc.; 3.11.8 Instructions for use – 1 pc.
3.12 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.12.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.12.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.12.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.12.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1 pc.; 3.12.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.12.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.12.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

3.12.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.12.7 Скальпель – 1 шт.; 3.12.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.12.7 Scalpel – 1 pc.; 3.12.8 Instructions for use – 1 pc.
3.13 Набор интродьюсера диаметром 5F (1.7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0.90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0.53 мм), длина 45 см), в составе: 3.13.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.13.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.13.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.13.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.13.7 Скальпель – 1 шт.; 3.13.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.13.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.13.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.13.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.13.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.13.7 Scalpel – 1 pc.; 3.13.8 Instructions for use – 1 pc.
3.14 Набор интродьюсера диаметром 5F (1.7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0.90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.14.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.14.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.14.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.;	3.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.14.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.14.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.14.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.14.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;

3.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.14.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.14.7 Скальпель – 1 шт.; 3.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.14.7 Scalpel – 1 pc.; 3.14.8 Instructions for use – 1 pc.
3.15 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.15.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.15.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.15.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.15.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.15.7 Скальпель – 1 шт.; 3.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.15.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.15.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.15.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.15.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.15.7 Scalpel – 1 pc.; 3.15.8 Instructions for use – 1 pc.
3.16 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.16.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.16.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	3.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.16.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.16.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.16.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

3.16.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.16.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.16.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.16.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.16.7 Скальпель – 1 шт.; 3.16.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.16.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.16.7 Scalpel – 1 pc.; 3.16.8 Instructions for use – 1 pc.
3.17 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, в составе: 3.17.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.17.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.17.3 Инструкция по применению – 1 шт.	3.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, consist of: 3.17.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.17.3 Instructions for use – 1 pc.
3.18 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.18.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.18.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.18.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.18.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.18.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.18.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.18.7 Скальпель – 1 шт.; 3.18.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.18.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.18.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.18.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.18.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.18.7 Scalpel – 1 pc.; 3.18.8 Instructions for use – 1 pc.

3.19 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.19.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.19.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.19.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.19.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.19.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.19.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.19.7 Скальпель – 1 шт.; 3.19.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.20 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.20.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.20.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.20.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.20.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.20.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.20.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.20.7 Скальпель – 1 шт.; 3.20.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.19.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.19.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.19.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.19.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.19.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.19.7 Scalpel – 1 pc.; 3.19.8 Instructions for use – 1 pc. 3.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.20.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.20.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.20.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.20.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.20.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.20.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.20.7 Scalpel – 1 pc.; 3.20.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

3.21 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.21.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.21.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.21.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.21.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.21.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.21.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.21.7 Скальпель – 1 шт.; 3.21.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.22 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.22.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.22.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.22.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.22.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.22.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.22.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.22.7 Скальпель – 1 шт.; 3.22.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.21.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.21.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.21.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.21.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.21.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.21.7 Scalpel – 1 pc.; 3.21.8 Instructions for use – 1 pc. 3.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.22.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.22.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.22.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.22.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.22.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.22.7 Scalpel – 1 pc.; 3.22.8 Instructions for use – 1 pc.
---	--

3.23 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.23.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.23.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.23.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.23.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.23.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.23.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.23.7 Скальпель – 1 шт.; 3.23.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.23. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.23.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.23.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.23.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.23.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.23.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.23.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.23.7 Scalpel – 1 pc.; 3.23.8 Instructions for use – 1 pc.
3.24 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.24.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.24.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.24.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.24.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.24.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.24.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.24.7 Скальпель – 1 шт.; 3.24.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.24. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.24.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.24.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.24.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.24.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.24.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.24.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.24.7 Scalpel – 1 pc.; 3.24.8 Instructions for use – 1 pc.

3.25 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.25.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.25.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.25.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.25.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.25.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.25.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.25.7 Скальпель – 1 шт.; 3.25.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.26 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.26.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.26.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.26.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.26.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.26.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.26.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.26.7 Скальпель – 1 шт.;	3.25. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.25.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.25.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.25.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.25.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.25.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.25.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.25.7 Scalpel – 1 pc.; 3.25.8 Instructions for use – 1 pc. 3.26. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.26.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.26.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.26.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.26.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.26.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.26.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.26.7 Scalpel – 1 pc.; 3.26.8 Instructions for use – 1 pc.
--	---

3.26.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.27 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, в составе: 3.27.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.27.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.27.3 Инструкция по применению – 1 шт. 3.28 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.28.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 16 см – 1 шт.; 3.28.2 Дилататор сосудистый, длина 22,8 см – 1 шт.; 3.28.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.28.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.28.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.28.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.28.7 Скальпель – 1 шт.; 3.28.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.29 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.29.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.29.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.27. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, consist of: 3.27.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.27.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.27.3 Instructions for use – 1 pc. 3.28. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 16 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.28.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 16 cm - 1pc.; 3.28.2 Vascular dilator, length 22.8 cm – 1 pc.; 3.28.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.28.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.28.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.28.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.28.7 Scalpel – 1 pc.; 3.28.8 Instructions for use – 1 pc. 3.29. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.29.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.29.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.29.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.29.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
--	---

3.29.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.29.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.29.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.29.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.29.7 Скальпель – 1 шт.; 3.29.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.29.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.29.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.29.7 Scalpel – 1 pc.; 3.29.8 Instructions for use – 1 pc.
3.30 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.30.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.30.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.30.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.30.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.30.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.30.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.30.7 Скальпель – 1 шт.; 3.30.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.30. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.30.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.30.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.30.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.30.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.30.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.30.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.30.7 Scalpel – 1 pc.; 3.30.8 Instructions for use – 1 pc.
3.31 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.31.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.31.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	3.31. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.31.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.31.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.31.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;

3.31.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.31.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.31.5 Интродюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.31.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.31.7 Скальпель – 1 шт.; 3.31.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.31.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.31.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.31.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.31.7 Scalpel – 1 pc.; 3.31.8 Instructions for use – 1 pc.
3.32 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.32.1 Интродюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.32.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.32.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.32.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.32.5 Интродюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.32.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.32.7 Скальпель – 1 шт.; 3.32.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.32. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.32.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.32.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.32.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.32.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.32.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.32.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.32.7 Scalpel – 1 pc.; 3.32.8 Instructions for use – 1 pc.
4 Набор интродюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры:	4. Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating, standard sizes:
4.1 Набор интродюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38	4.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:

мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.1.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.1.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.1.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.1.7 Скальпель – 1 шт.; 4.1.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.1.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.1.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.1.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.1.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.1.7 Scalpel – 1 pc.; 4.1.8 Instructions for use – 1 pc.
4.2 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.2.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.2.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.2.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.2.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.2.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.2.7 Скальпель – 1 шт.; 4.2.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.2.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.2.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.2.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.2.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.2.7 Scalpel – 1 pc.; 4.2.8 Instructions for use – 1 pc.
4.3 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным	4.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter

покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.3.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.3.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.3.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.3.5 Интродьюсерный катетер 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) – 1 шт.; 4.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.3.7 Скальпель – 1 шт.; 4.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.4 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.4.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.; 4.4.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 4.4.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.4.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.4.7 Скальпель – 1 шт.; 4.4.8 Инструкция по применению – 1 шт.	1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.3.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.3.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.3.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.3.5 Introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) – 1 pc.; 4.3.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 4.3.7 Scalpel – 1 pc.; 4.3.8 Instructions for use – 1 pc. 4.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.4.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm - 1 pc.; 4.4.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 4.4.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.4.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.4.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 4.4.7 Scalpel – 1 pc.; 4.4.8 Instructions for use – 1 pc.
--	---

4.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.5.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.5.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.5.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.5.7 Скальпель – 1 шт.; 4.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.5.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 4.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.5.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.5.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.5.7 Scalpel— 1 pc.; 4.5.8 Instructions for use – 1 pc.
4.6 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.6.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.6.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.6.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.6.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.6.7 Скальпель – 1 шт.; 4.6.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.6.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 4.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.6.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.6.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.6.7 Scalpel – 1 pc.; 4.6.8 Instructions for use – 1 pc.

4.7 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.7.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.7.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.7.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.7.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.7.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.7.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.7.7 Скальпель – 1 шт.; 4.7.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.8 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.8.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.8.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.8.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.8.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.8.7 Скальпель – 1 шт.;	4.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.7.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.7.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.7.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.7.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.7.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.7.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.7.7 Scalpel – 1 pc.; 4.7.8 Instructions for use – 1 pc. 4.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.8.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.8.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.8.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.8.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.8.7 Scalpel – 1 pc.; 4.8.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

4.8.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.9.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.9.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.9.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.9.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.9.7 Скальпель – 1 шт.; 4.9.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.10.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.10.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.10.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.10.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.9.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.9.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.9.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.9.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.9.7 Scalpel – 1 pc.; 4.9.8 Instructions for use – 1 pc. 4.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.10.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.10.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.10.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.10.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.10.7 Scalpel – 1 pc.; 4.10.8 Instructions for use – 1 pc.
--	---

4.10.7 Скальпель – 1 шт.; 4.10.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
4.11 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.11.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.11.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.11.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.11.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.11.7 Скальпель – 1 шт.; 4.11.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.11.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.11.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.11.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.11.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.11.7 Scalpel – 1 pc.; 4.11.8 Instructions for use – 1 pc.
4.12 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.12.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.12.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.12.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.12.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.12.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2,0 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.12.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.12.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.12.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.12.7 Scalpel – 1 pc.; 4.12.8 Instructions for use – 1 pc.

4.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.12.7 Скальпель – 1 шт.; 4.12.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.13 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.13.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.13.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.13.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.13.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.13.7 Скальпель – 1 шт.; 4.13.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.14 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.14.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.14.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.14.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.13.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.13.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.13.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.13.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.13.7 Scalpel – 1 pc.; 4.13.8 Instructions for use – 1 pc. 4.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.14.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.14.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.14.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.14.5 Introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) – 1 pc.; 4.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.14.7 Scalpel – 1 pc.;
---	--

4.14.5 Интродьюсерный катетер 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) – 1 шт.; 4.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.14.7 Скальпель – 1 шт.; 4.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.14.8 Instructions for use – 1 pc.
4.15 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.15.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 9 см – 1 шт.; 4.15.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 4.15.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.15.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.15.7 Скальпель – 1 шт.; 4.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.15.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 9 cm - 1pc.; 4.15.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 4.15.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.15.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.15.7 Scalpel – 1 pc.; 4.15.8 Instructions for use – 1 pc.
4.16 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.16.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.16.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.16.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.16.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.16.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.16.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.16.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;

4.16.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.16.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.16.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.16.7 Скальпель – 1 шт.; 4.16.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.16.7 Scalpel – 1 pc.; 4.16.8 Instructions for use – 1 pc.
4.17 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.17.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.17.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.17.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.17.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.17.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.17.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.17.7 Скальпель – 1 шт.; 4.17.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.17.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2,0 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.17.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.17.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.17.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.17.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.17.7 Scalpel – 1 pc.; 4.17.8 Instructions for use – 1 pc.
4.18 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.18.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.18.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	4.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.18.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.18.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.18.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

4.18.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.18.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
4.18.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
4.18.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.18.7 Scalpel – 1 pc.;
4.18.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.18.8 Instructions for use – 1 pc.
4.18.7 Скальпель – 1 шт.;	
4.18.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
4.19 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	4.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
4.19.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.;	4.19.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1 pc.;
4.19.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	4.19.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
4.19.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.19.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
4.19.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
4.19.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.19.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
4.19.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.19.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
4.19.7 Скальпель – 1 шт.;	4.19.7 Scalpel – 1 pc.;
4.19.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.19.8 Instructions for use – 1 pc.
4.20 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе:	4.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:
4.20.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;	4.20.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1 pc.;
	4.20.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;

4.20.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	4.20.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;
4.20.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.20.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
4.20.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.20.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
4.20.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.20.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
4.20.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.20.7 Scalpel – 1 pc.;
4.20.7 Скальпель – 1 шт.;	4.20.8 Instructions for use – 1 pc.
4.20.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
4.21 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	4.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
4.21.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;	4.21.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;
4.21.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	4.21.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
4.21.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.21.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
4.21.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
4.21.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.21.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
4.21.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.21.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
4.21.7 Скальпель – 1 шт.;	4.21.7 Scalpel – 1 pc.;
4.21.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.21.8 Instructions for use – 1 pc.
4.22 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	4.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
	4.22.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;

4.22.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.22.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.22.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.22.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.22.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.22.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.22.7 Скальпель – 1 шт.; 4.22.8 Инструкция по применению – 1 шт. Далее – медицинское изделие (МИ), набор интродьюсера, набор, изделие, интродьюсер.	4.22.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.22.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.22.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.22.6 Syringe, 2.5 ml – 1 pc.; 4.22.7 Scalpel – 1 pc.; 4.22.8 Instructions for use – 1 pc. Next – a medical device (MD), an introducer set, a set, a device, a introducer.
2. Назначение медицинского изделия	2. Purpose of the medical device
Набор предназначен для обеспечения доступа и облегчения чрескожного введения различных изделий (дилататоры, проводники, катетеры, изделия для интервенционных вмешательств) в лучевую или бедренную артерию при поддержании гемостаза для выполнения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур.	The set is intended to provide access and facilitate percutaneous introduction of various devices (dilators, guide wires, catheters, interventional devices) into radial artery or femoral artery while maintaining hemostasis for diagnostic and therapeutic X-ray endovascular procedures.
3. Показания	3. Indications
Набор предназначен для обеспечения доступа и облегчения чрескожного введения различных изделий (дилататоры, проводники, катетеры, изделия для интервенционных вмешательств) в лучевую или бедренную артерию при поддержании гемостаза для выполнения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур: - внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки; - коронарография трансфеморальным и трансрадиальным доступом; - бронхиальная артериография; - шунтография; - вентрикулография сердца;	The set is intended to provide access and facilitate percutaneous introduction of various devices (dilators, guide wires, catheters, interventional devices) into radial artery or femoral artery while maintaining hemostasis for diagnostic and therapeutic X-ray endovascular procedures: - intravascular ultrasound examination of the vascular wall; - coronary angiography via transfemoral access or via transradial access; - bronchial arteriography; - shuntography; - cardiac ventriculography;

- ангиография позвоночной артерии, внутренней сонной артерии, наружной сонной артерии, общей сонной артерии; - ангиография артерий щитовидной железы; - ангиография подключичной артерии, брахиоцефального ствола, грудной аорты, брюшной аорты; - биопсия миокарда; - артериография тазовых органов; - ангиография бедренных артерий, артерий верхней конечности; - панаортография; - ангиография почечных артерий; - флебография нижней конечности трансартериальная; - флебография верхней конечности трансартериальная; - ангиография артерий нижней конечности; - ангиография сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства; - ангиография брыжеечных сосудов; - ангиография чревного ствола и его ветвей; - измерение фракционного резерва коронарного кровотока; - оптическая когерентная томография коронарных артерий; - ретроградная катетеризация левых отделов сердца; - катетеризация камер сердца; - катетеризация аорты; - катетеризация висцеральных артерий; - катетеризация артерий конечностей; - баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии и магистральных артерий голени, в том числе со стентированием; - транслуминальная баллонная ангиопластика почечной артерии; - транслуминальная баллонная ангиопластика (в том числе баллоном с лекарственным покрытием) и стентирование коронарных артерий через трансрадиальный или трансфemorальный доступ; - баллонная ангиопластика подключичной артерии, подвздошной	- angiography of the vertebral artery, internal carotid artery, external carotid artery, common carotid artery; - angiography of the thyroid arteries; - angiography of the subclavian artery, brachiocephalic trunk, thoracic aorta, abdominal aorta; - myocardial biopsy; - arteriography of the pelvic organs; - angiography of the femoral arteries, arteries of the upper limb; - panaortography; - angiography of renal artery; - transarterial phlebography of the lower limb; - transarterial phlebography of the upper limb; - angiography of the arteries of the lower limb; - angiography of the vessels of the abdominal organs and retroperitoneal organs; - angiography of mesenteric vessels; - angiography of the celiac trunk and its branches; - measurement of the fractional reserve of coronary blood flow; - optical coherence tomography of the coronary arteries; - retrograde catheterization of the left heart; - catheterization of cardiac chambers; - catheterization of the aorta; - catheterization of visceral arteries; - catheterization of arteries of the extremities; - balloon angioplasty of the superficial femoral artery, popliteal artery and main arteries of the leg with stenting; - transluminal balloon angioplasty of the renal artery; - transluminal balloon angioplasty (including drug-coated balloon) and stenting of the coronary arteries via transradial or transfemoral access; - balloon angioplasty of the subclavian artery, iliac artery; - balloon angioplasty of vascular access for extracorporeal dialysis; - stenting of the arteries of the lower extremities, renal arteries, subclavian artery;
---	---

артерии; - баллонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа; - стентирование артерий нижних конечностей, почечных артерий, подключичной артерии; - стентирование артерий сосудистого доступа для экстракорпорального диализа; - эндоваскулярная эмболизация сосудов, в том числе микроэмболами; - эндоваскулярная спиральная эмболизация, имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке.	- stenting of artery vascular access for extracorporeal dialysis; - endovascular embolization of blood vessels, including microembolization; - endovascular coil embolization occluder implantation for ductus arteriosus.
4. Противопоказания	4. Contraindications
Абсолютные: - склонность к кровотечениям (пациенты, принимающие большие дозы антикоагулянтов или принимающие антагонисты рецепторов гликопротеина IIb/IIIa на фоне приема аспирина и антиагрегантных препаратов); - активная местная инфекция; - невозможность выполнить катетеризацию сосуда (отсутствие пульсации пунктируемой артерии, тяжелое окклюзионное заболевание бедренной артерии (атеросклеротические бляшки, кальцификация), сложная анатомия подвздошно-бедренного сегмента (извитость), недавно перенесенное шунтирование (аорто-бифemorальное, бедренно-подколенное), ожирение III-IV степени). Относительные: - беременность; - декомпенсированная застойная сердечная недостаточность; - неконтролируемая артериальная гипертензия; - активная инфекция; - хроническая болезнь почек.	Absolute: - bleeding tendency (Highly anticoagulated patients or those on glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonist on the background of aspirin and ADP-platelet inhibition therapy) - in the infection stage; - intolerance of the catheterization technique (absent artery pulse, severe femoral artery disease (plaques, calcification), difficult ilio-femoral anatomy (tortuosity), recent femoral bypass (aorto-bifemoral, femoral-popliteal), and morbid obesity). Relative: - pregnancy; - decompensated congestive heart failure; - uncontrolled Hypertension; - active infection; - renal failure.
5. Возможные осложнения и побочные эффекты	5. Possible complications and side effects
Возможные риски, связанные с применением медицинского изделия:	Possible risks associated with the use of medical products: - air embolism;

- воздушная эмболия; - инфицирование; - разрыв интимы сосуда; - гематома; - перфорация стенки сосуда; - тромбоз сосуда в зоне вмешательства. Возможные риски, связанные с хирургическим вмешательством: - боль; - отек; - псевдоаневризма; - артериовенозная фистула; - окклюзия лучевой артерии; - неврологические осложнения после пункции лучевой артерии; - окклюзия бедренной артерии; - кровопотеря, требующая переливания крови; - ишемия кисти; - спазм лучевой артерии; - экхимоз; - раневая инфекция и абсцесс; - кровотечение.	- infection; - intimal tear; - hematoma; - perforation of the vessel wall; - thrombus formation. Possible risks associated with surgery: - pain; - swelling; - pseudoaneurysm; - arterio-venous fistula; - radial artery occlusion; - neurological complications at the radial puncture site; - femoral artery occlusion; - transfusion requirements; - hand ischemic; - radial artery spasm; - ecchymosis; - local wound infection and abscess; - bleeding.
6. Сведения о производителе медицинского изделия Наименование производителя: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Телефон: 0086-0752-3306949 Электронная почта: nora@shunmed.com Сайт: www.shunmed.com	6. Information about manufacturer of the medical device Name of manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Telephone: 0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Website: www.shunmed.com

Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd 1. Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China. 2. 3rd and 4th Floor, Building 7, Phase II, Innovation and Pioneer Park, Tianyue New District, Pingjiang County, Yueyang City, Hunan Province.	Manufacturing site: Shunmei Medical Co., Ltd 1. Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China. 2. 3rd and 4th Floor, Building 7, Phase II, Innovation and Pioneer Park, Tianyue New District, Pingjiang County, Yueyang City, Hunan Province.
7. Условия применения	7. Usage conditions
Набор предназначен для использования в стандартных условиях больничной операционной, при рентгеноскопии.	The kit is intended for use at the standard conditions of hospital operating room environment, under the fluoroscopy.
8. Потенциальный потребитель	8. Potential users
Изделие должно использоваться только хирургами или врачами, специализирующимися в области сосудистой хирургии.	The product should only be used by surgeons or doctors specializing in in the vascular surgery.
9. Популяция пациентов	9. Patient population
Популяция пациентов включает детей, подростков, взрослых, как правило, в возрасте от 5 до 92 лет.	The patient population include children, adolescent, adults, generally with the age from 5-92 years old.
10. Требования безопасности и меры предосторожности	10. Warnings and precautions
Требования безопасности: • Запрещено применять изделие в случае нарушения целостности или повреждения упаковки • Запрещены повторные стерилизация или применение изделия • Не допускается использование изделия с истекшим сроком годности • Не допускается изменение конструкции каких-либо компонентов, из которых состоит изделие • Запрещено подвергать поверхность изделия воздействию органических растворителей, напр. таких как спирт • Изделие предназначено для использования только хирургами или врачами, специализирующимися в области сосудистой хирургии • Не следует оставлять интродьюсер на месте в течение длительного периода времени без установленного катетера. • Прежде чем извлекать интродьюсер через извилистое сосудистое русло следует ввести дилататор во избежание возможного	Warnings • Do not use if the product is open or damaged. • Do not resterilize or reuse. • Do not use this device if it is out of date. • Do not alter the structure of all components. • Do not expose to organic solvent, e.g.alcohol. • The device is intended used by surgeons or doctors specializing in in the vascular surgery. • Do not leave the introducer sheath in place for extended period of time without a catheter in place. • Before withdrawing the sheath through tortuous anatomy, insert the introducer dilator to avoid possible breakage.

повреждения стенки сосуда. Меры предосторожности • Изделие должно использоваться только хирургами или врачами, специализирующимися в области сосудистой хирургии. Следует использовать стандартные методы установки интродьюсеров для сосудистого доступа. • Следует определить максимальный диаметр вводимого инструмента или катетера для того, чтобы обеспечить его прохождение через интродьюсер. Все интервенционные или диагностические инструменты, используемые с данным изделием, должны свободно перемещаться через клапан и оболочку интродьюсера во избежание повреждений. • При введении, выполнении манипуляций или извлечении изделия через оболочку интродьюсера следует сохранять положение оболочки. • Прежде чем извлекать или повторно вводить изделия через оболочку интродьюсера следует выполнить аспирацию через клапан с замком типа «Люэр» для очистки оболочки, и затем промыть гепаринизированным физиологическим раствором. • При раздувании баллона на кончике интродьюсера или вблизи него следует убедиться в том, что он не раздут внутри дистального конца интродьюсера. • При проколе, наложении швов или рассечении тканей вблизи интродьюсера следует соблюдать осторожность для того, чтобы не повредить оболочку интродьюсера. • Не следует продвигать или извлекать проводник и/или интродьюсер при возникновении чрезмерного сопротивления. • Извлечение или манипуляции с дистальной катушки сердечника проводника через кончик иглы может привести к поломке.	Precautions • This product is intended for use by surgeons or doctors specializing in in the vascular surgery. Standard techniques for placement of vascular access sheaths should be employed. • The maximum diameter of the instrument or catheter to be introduced should be determined to ensure its passage through the sheath. All interventional or diagnostic instruments used with this product should move freely through the valve and sheath to avoid damage. • When inserting, manipulating or withdrawing a device through the sheath, always maintain the sheath position. • Before removing or reserting devices through the sheath, aspirate through the side-arm of the valve with lock type "Luer" to clear the sheath, then flush with heparinized saline. • When inflating a balloon at, or close to, the sheath tip, ensure the balloon is not inside the distal tip of the sheath. • When puncturing, suturing or incising the tissue near the sheath, use caution to avoid damaging the sheath. • Do not attempt to insert or withdraw the guidewire and/or sheath if resistance is felt. • Withdrawal or manipulation of the distal spring coil portion of the mandril guidewire through a needle tip may result in breakage.
11. Изображение и описание изделия Набор интродьюсера выпускается в четырех вариантах исполнения: набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа,	11. Picture and description of device Introducer set has four variants: Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral, Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic

набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием.

Набор интродьюсера состоит из интродьюсера и дилататора; проводника, устройства для введения проводника, интродьюсерной иглы, интродьюсерного катетера, шприца и скальпеля, которые не являются обязательными.

Интродьюсер используется для создания канала для катетеризации или забора крови и инфузии.

Общий вид набора интродьюсера представлен на рисунке 1.

Интродьюсер состоит из: наконечника, соединительного устройства, оболочки, клапана с замком типа «Люэр», соединительной втулки, кровоостанавливающего клапана, защитного колпачка (заглушки) клапана с замком типа «Люэр», корпуса интродьюсера и гидрофильного покрытия (только для набора интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием и набора интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием).

Схематичный чертеж интродьюсера в сборке представлен на рисунке 2.

Схематичный чертеж интродьюсера представлен на рисунке 2.1.

Схематичный чертеж кровоостанавливающего клапана представлен на рисунке 3. Схематичный чертеж клапана с замком типа «Люэр» представлен на рисунке 4.

Схематичный чертеж защитного колпачка (заглушки) клапана с замком типа «Люэр» представлен на рисунке 5.

Схематичный чертеж дилататора сосудистого представлен на рисунке 6. Схематичный чертеж соединительной втулки интродьюсера и дилататора сосудистого представлен на рисунке 7.

Схематичный чертеж проводника с прямым и J-образным кончиком представлен на рисунке 8. Схематичный чертеж устройства для введения проводника представлен на рисунке 9.

Схематичный чертеж интродьюсерной иглы представлен на рисунке 10.

coating, Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial, Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating.

For introducer set consists of introducer sheath and dilator; guidewire, guidewire advancer, introducer needle, introducer catheter, syringe, scalpel are optional.

The introducer sheath is used to construct a channel for catheterization or blood sampling and infusion.

General assembly drawing of Introducer set follows Figure 1.

Introducer consist of: tip, connecting tube, sheath, valve with lock type "Luer", connecting hub, hemostatic valve, protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer", introducer body and hydrophilic coating (only for Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating and Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating).

Structural drawing of introducer in the assembly follows Figure 2.

Structural drawing of introducer in the assembly follows Figure 2.1.

Structural drawing of hemostatic valve follows Figure 3.

Structural drawing of valve with lock type "Luer" follows Figure 4.

Structural drawing of protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer" follows Figure 5.

Structural drawing of vascular dilator follows Figure 6.

Structural drawing of connecting hub of the introducer and vascular dilator follows Figure 7.

Structural drawing of guidewire with straight and J Tip follows Figure 8.

Structural drawing of guidewire advancer follows Figure 9.

Structural drawing of introducer needle follows Figure 10.

Structural drawing of connecting hub of the introducer needle and introducer catheter follows Figure 11.

Structural drawing of introducer catheter follows Figure 12.1-12.4.

Structural drawing of syringe follows Figure 13.

Structural drawing of scalpel follows Figures 14,14.1-14.2.

Схематичный чертеж соединительной втулки интродьюсерной иглы и интродьюсерного катетера представлен на рисунке 11. Схематичный чертеж интродьюсерного катетера представлен на рисунке 12.1-12.4. Схематичный чертеж шприца представлен на рисунке 13. Схематичный чертеж скальпеля представлен на рисунках 14,14.1-14.2.

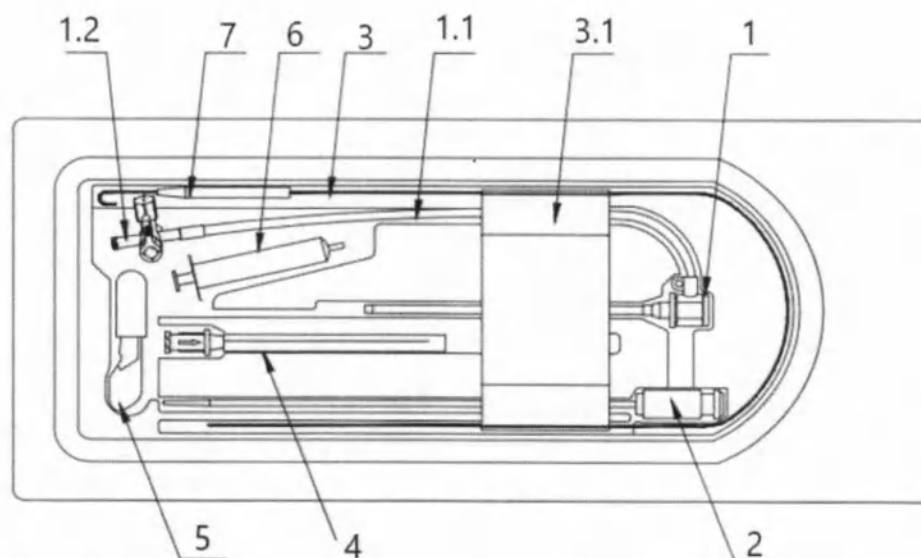


Рисунок 1 Общий вид набора интродьюсера/ Figure 1 General assembly drawing of Introducer set

1.	Интродьюсер	Introducer
1.1	Соединительное устройство	Connecting tube
1.2	Клапан с замком типа «Люэр»	Valve with lock type «Luer»
2.	Дилататор сосудистый	Vascular dilator
3.	Проводник	Guidewire
3.1	Крепежная пластина	Fixing plate
4.	Интродьюсерная игла	Introducer needle

5.	Скальпель	Scalpel
6.	Шприц	Syringe
7.	Устройство для введения проводника	Guidewire advancer

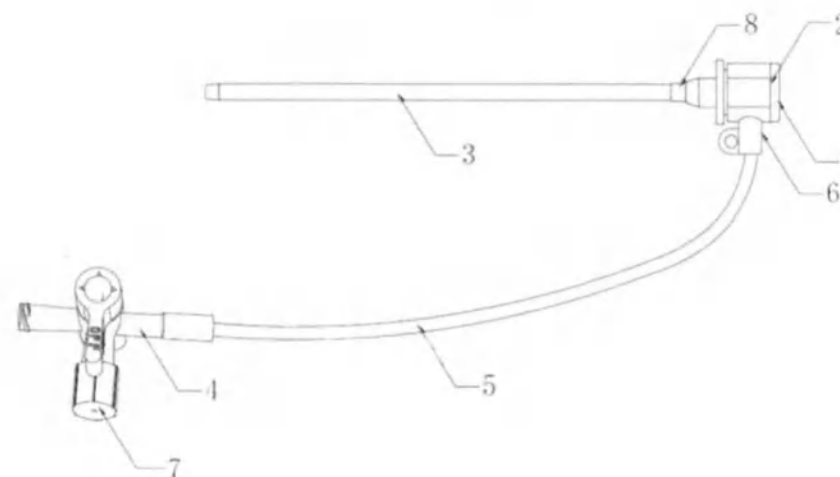


Рисунок 2 Схематичный чертеж интродьюсера в сборке / Figure 2 Structural drawing of introducer in the assembly

1.	Наконечник	Sheath Cap
2.	Соединительная втулка	Sheath Connector
3.	Оболочка	Sheath
4.	Клапан с замком типа «Люэр»	Valve with lock type "Luer"
5.	Соединительное устройство	Connecting Tube
6.	Кровоостанавливающий клапан	Hemostatic Valve
7.	Защитный колпачок (заглушка) клапана с замком типа «Люэр»	Protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer"
8.	Корпус интродьюсера	Sheath Cover




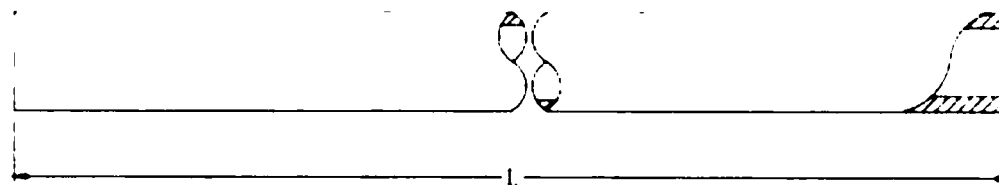


Рисунок 2.1 Схематичный чертеж интродьюсера / Figure 2 Structural drawing of introducer
L – эффективная длина/ L - effective length

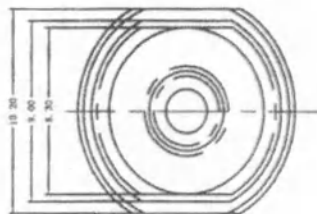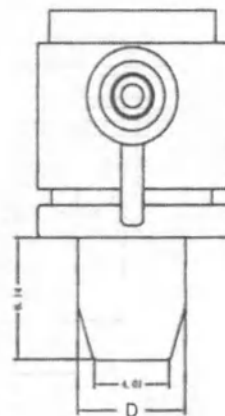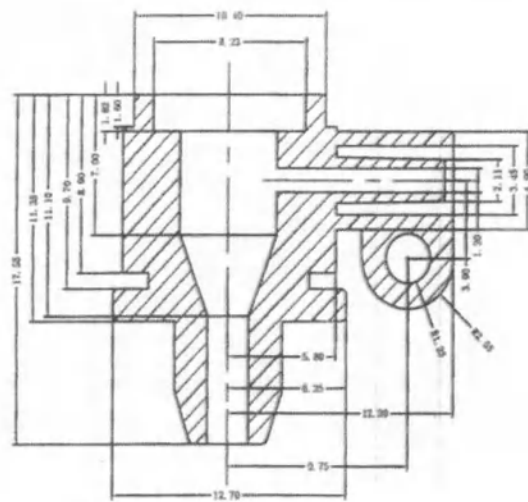

Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)/ Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	D, мм/ D mm
4F (1,4 мм)	5,80
5F (1,7 мм)	5,80
6F (2,0 мм)	6,20
7F (2,3 мм)	6,20
8 F (2,7 мм)	6,20

Рисунок 3 Схематичный чертеж кровоостанавливающего клапана/ Figure 3 Structural drawing of hemostatic valve
Допустимое отклонение 5 %/Permissible deviation $\pm 5\%$.

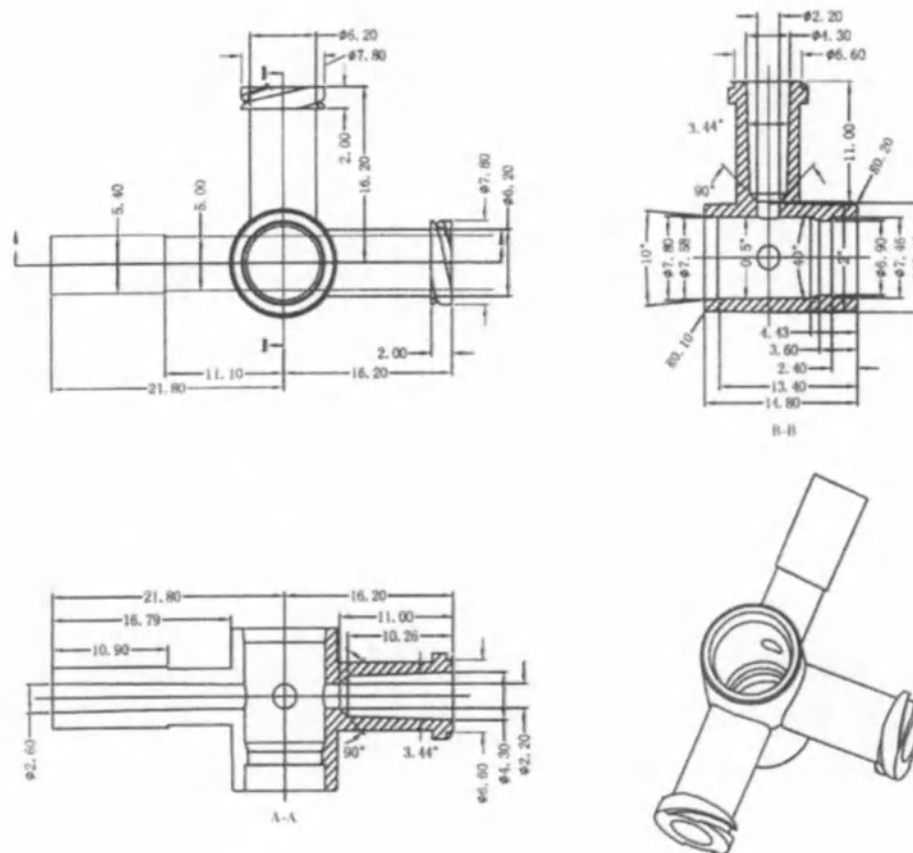


Рисунок 4 Схематичный чертеж клапана с замком типа «Люэр» / Figure 4 Structural drawing of valve with lock type "Luer"
Допустимое отклонение 5 %/Permissible deviation $\pm 5\%$

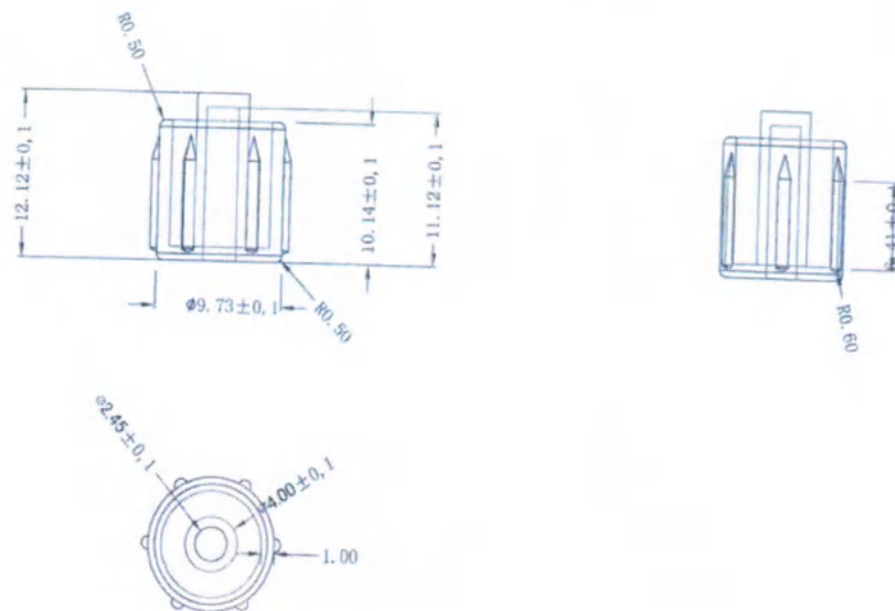


Рисунок 5 Схематичный чертеж защитного колпачка (заглушки) клапана с замком типа «Люэр» / Figure 5 Structural drawing of protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer"

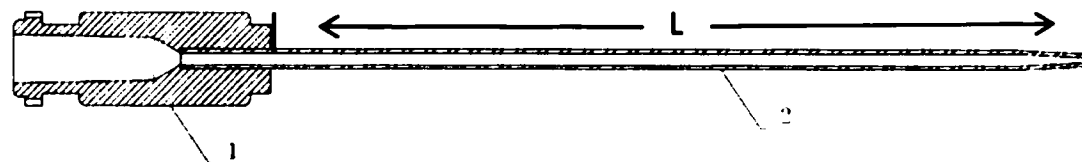


Рисунок 6 Схематичный чертеж дилататора сосудистого/ Figure 6 Structural drawing of vascular dilator
L – эффективная длина/ L - effective length

1.	Соединительная втулка интродьюсера и дилататора сосудистого	Connecting hub of the introducer and dilator
2.	Дилататор	Dilator

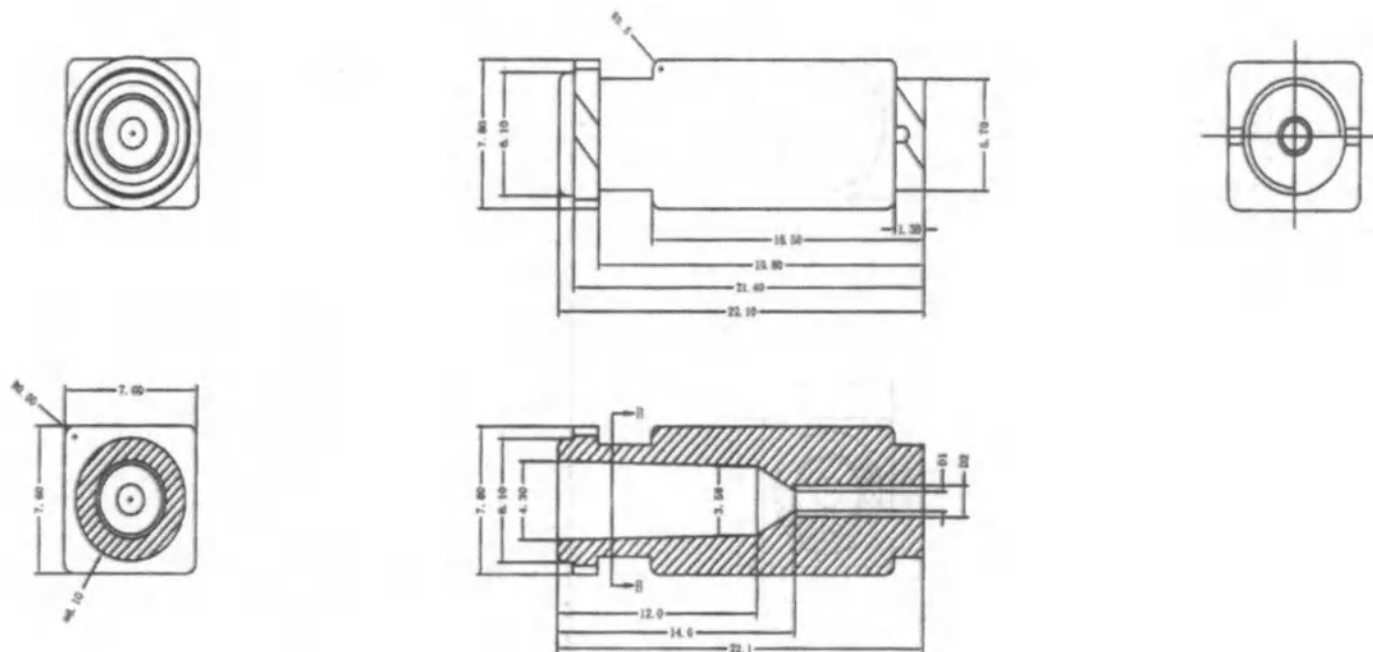


Рисунок 7 Схематичный чертеж соединительной втулки интродьюсера и дилататора сосу­дистого / Figure 7 Structural drawing of connecting hub of the introducer and vascular dilator

Допустимое отклонение 5 %/Permissible deviation $\pm 5\%$

D1 – внутренний диаметр дилататора сосу­дистого/ D1 - inner diameter of the vascular dilator

D2 – внешний диаметр дилататора сосу­дистого/ D2 - outer diameter of the vascular dilator

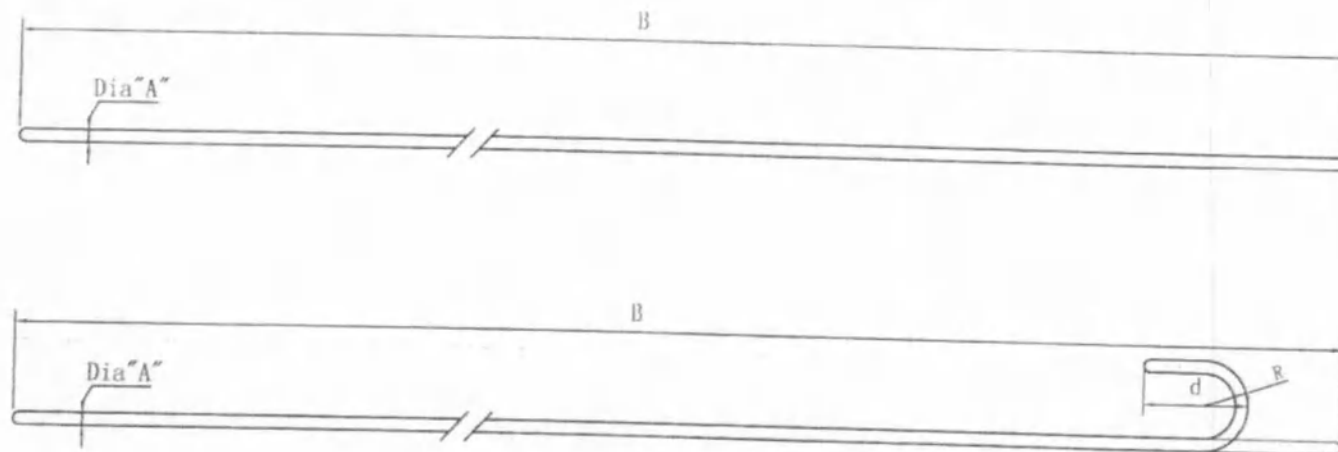


Рисунок 8 Схематичный чертеж проводника с прямым и J-образным кончиком / Figure 8 Structural drawing of guidewire with straight and J Tip

Внешний диаметр, (дюйм/мм), $\pm 5\%$ / Outer diameter, (inch/mm), $\pm 5\%$	A (дюйм/мм)/ A (inch/mm)	d, мм, ± 1 мм/ length d, mm, ± 1 mm	R, мм, $\pm 0,5$ мм/ R, mm, $\pm 0,5$ mm	B, мм, ± 10 мм/ B, mm, $\pm$ 10 mm
0,018/0,46	0,018/0,46	6,0	4,0	450 430 700
0,021/0,53	0,021/0,53	6,0	4,0	
0,035/0,89	0,035/0,89	8,0	5,0	
0,038/0,97	0,038/0,97	8,0	5,0	

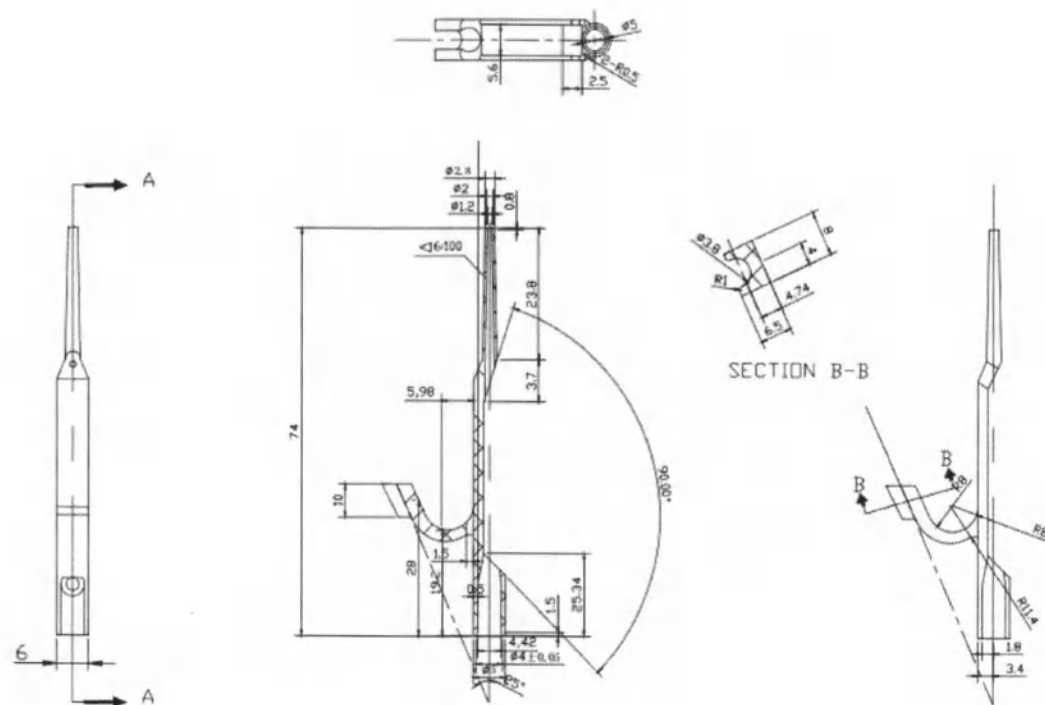


Рисунок 9 Схематичный чертеж устройства для введения проводника/ Figure 9 Structural drawing of guidewire advancer
 Допустимое отклонение $\pm 0,1$ мм/Permissible deviation $\pm 0,1$ mm
 Масса устройства для введения проводника $0,3 \text{ г} \pm 0,04 \text{ г}$ / Weight of the guidewire advancer is $0.3 \text{ g} \pm 0.04 \text{ g}$

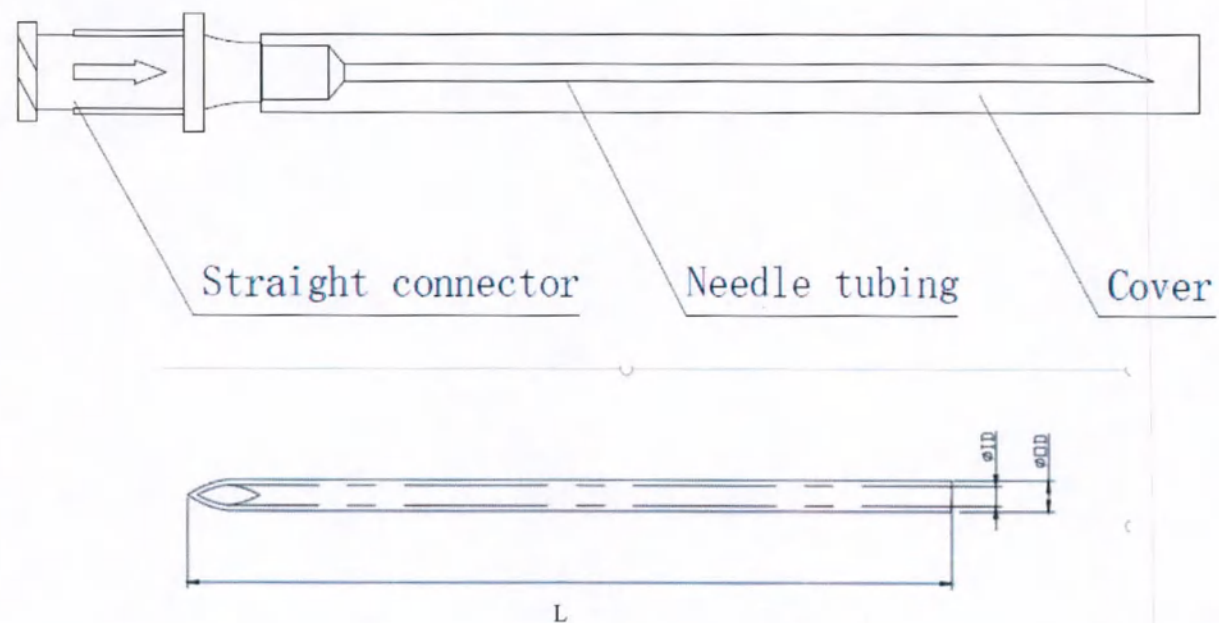


Рисунок 10 Схематичный чертеж интродьюсерной иглы / Figure 10 Structural drawing of introducer needle

Соединительная втулка	Straight connector
Трубка иглы	Needle tubing
Оболочка	Cover
Эффективная длина	L
Внутренний диаметр	ID
Внешний диаметр	OD

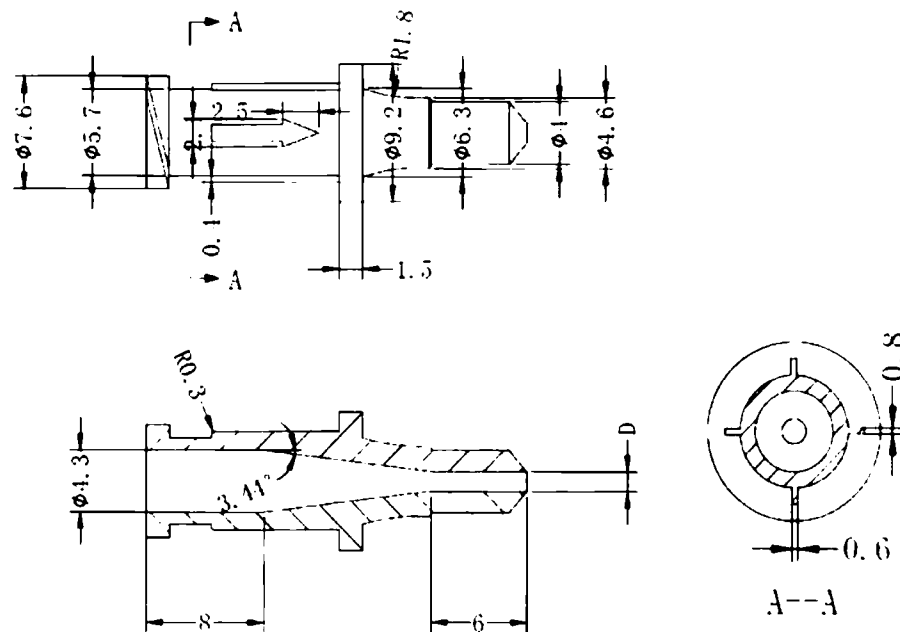


Рисунок 11 Схематичный чертеж соединительной втулки интродьюсерной иглы и интродьюсерного катетера / Figure 11 Structural drawing of connecting hub of the introducer needle and introducer catheter
Допустимое отклонение 5 %/Permissible deviation $\pm 5\%$

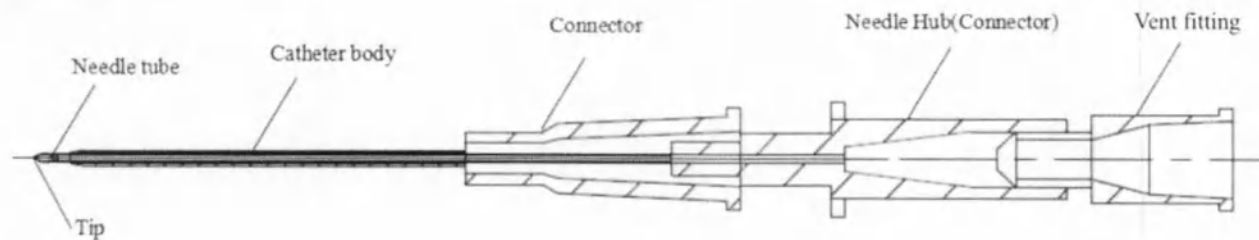


Рисунок 12.1 Схематичный чертеж интродьюсерного катетера в сборке/ Figure 12.1 Structural drawing of introducer catheter in the assembly

Насадка с клапаном	Vent fitting
Втулка иглы (соединительная втулка)	Needle tube (Connector)
Соединительная втулка	Connector
Корпус катетера	Catheter body
Трубка иглы	Needle tube
Кончик	Tip

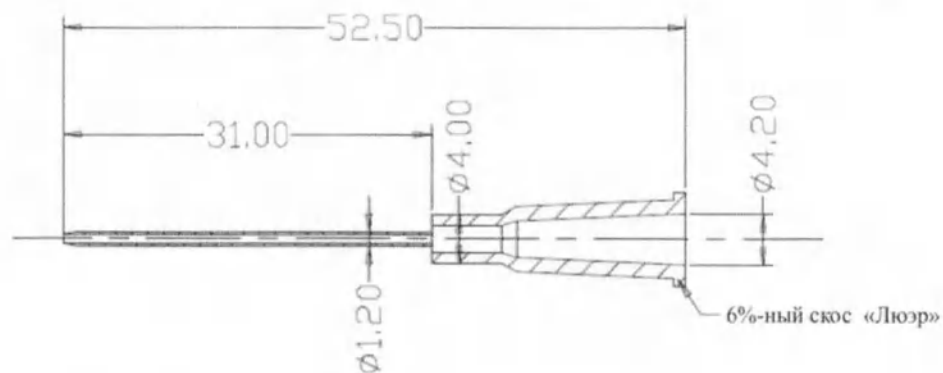


Рисунок 12.2 Схематичный чертеж трубки интродьюсерного катетера/ Figure 12.2 Structural drawing of introducer catheter tube
Все размеры на схематичном чертеже указаны в мм./All dimensions in the structure are indicated in mm.

Допустимое отклонение $\pm 5\%$ /The permissible deviation $\pm 5\%$

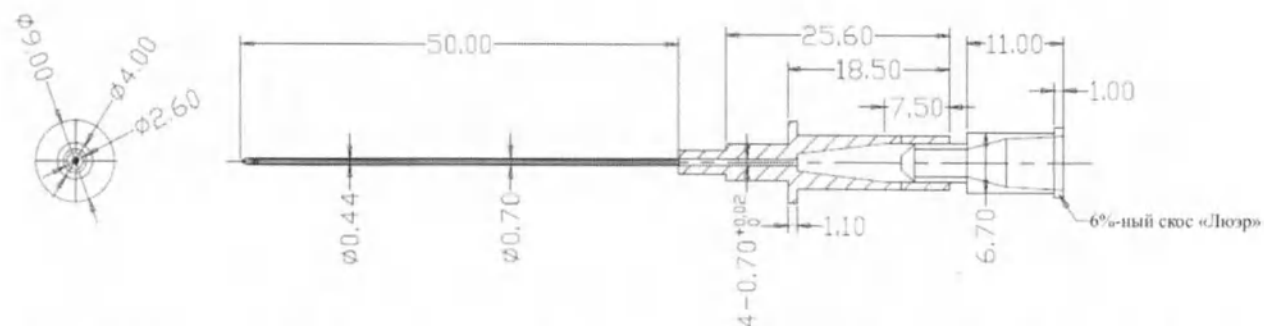


Рисунок 12.3 Схематичный чертеж интродьюсерной иглы/ Figure 12.3 Structural drawing of introducer needle
Все размеры на схематичном чертеже указаны в мм./All dimensions in the structure are indicated in mm.

Допустимое отклонение $\pm 5\%$ /The permissible deviation $\pm 5\%$

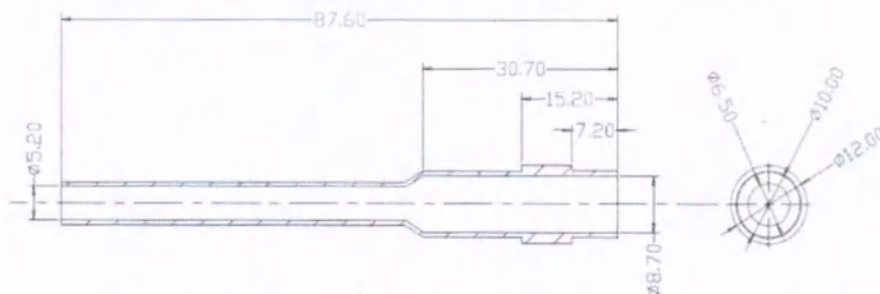


Рисунок 12.4 Схематичный чертеж оболочки интродьюсерного катетера/ Figure 12.4 Structural drawing of introducer catheter sheath
Все размеры на схематичном чертеже указаны в мм./All dimensions in the structure are indicated in mm.

Допустимое отклонение $\pm 5\%$ /The permissible deviation $\pm 5\%$

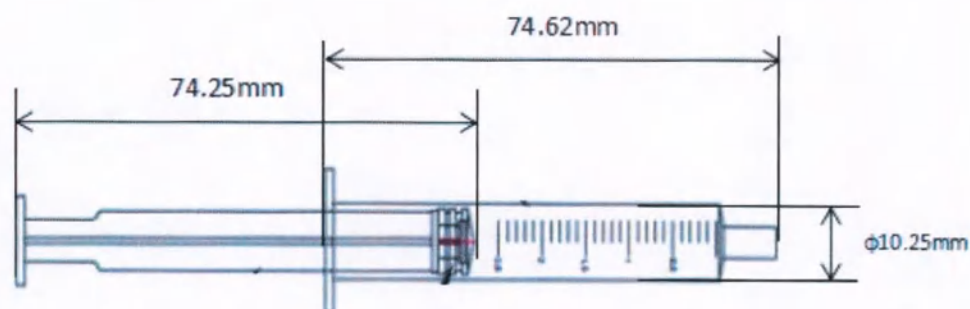


Рисунок 13 Схематичный чертеж шприца/ Figure 13 Structural drawing of syringe
Все размеры на схематичном чертеже указаны в мм./All dimensions in the structure are indicated in mm.

Scalpel handle base Scalpel handle cover Scalpel

Ручка скальпеля	Scalpel handle base
Защитный колпачок	Scalpel handle cover
Скальпель	Scalpel

Рисунок 14 Схематичный чертеж скальпеля/ Figure 14 Structural drawing of scalpel

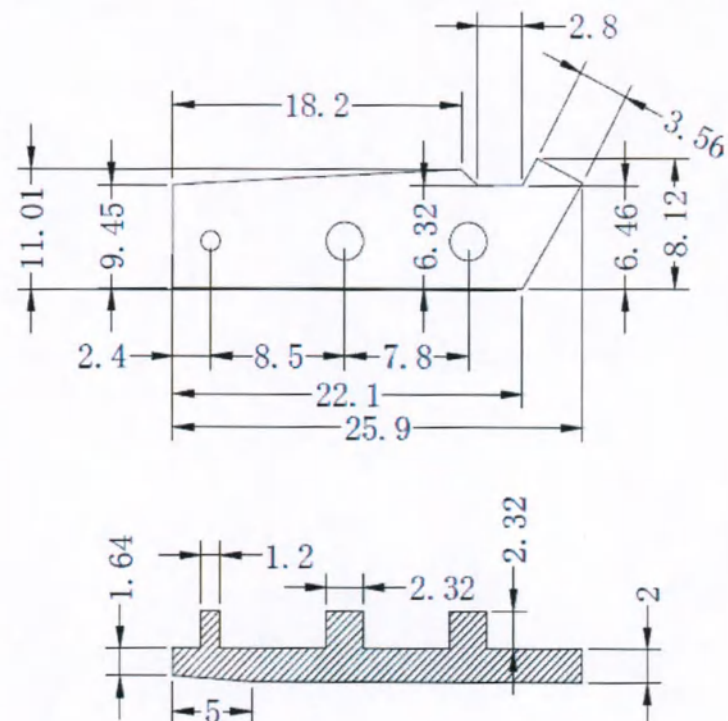


Рисунок 14.1 Схематичный чертеж защитного колпачка скальпеля/ Figure 14.1 Structural drawing of scalpel handle cover
Если не указано иное, допустимое отклонение $\pm 5\%$ /Unless otherwise specified, the permissible deviation $\pm 5\%$

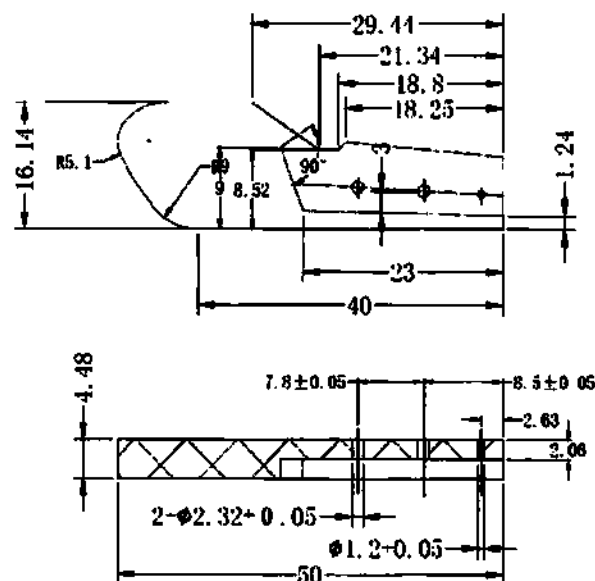


Рисунок 14.2 Схематичный чертеж ручки скальпеля/ Figure 14.2 Structural drawing of scalpel handle base
Если не указано иное, допустимое отклонение $\pm 5\%$ /Unless otherwise specified, the permissible deviation $\pm 5\%$

12. Подготовка к использованию	12. Preparation for use
Перед началом применения изделия: извлечь интродьюсер из упаковки, соблюдая правила асептики. Проверить целостность упаковки, целостность изделия и срок годности. Не используйте изделие: - по истечении срока годности; - при обнаружении дефектов изделия; - при нарушении целостности стерильной упаковки.	Before application, Remove the device from package using sterile technique. Check the integrity of the package, the integrity of the product and the expiration date. Do not use the device: - after the expiration date; - when device defects are detected; - in case of violation of the integrity of the sterile packaging.
13. Способ применения	13. Mode of application
Принцип работы с интродьюсерной иглой: 1) Определите место введения и подготовьте его при помощи	Principle of operation with introducer needle: 1) Determine the injection site and prepare it with appropriate aseptic

соответствующих асептических средств и местной анестезии. 2) Удалите упаковку. Извлеките компоненты набора интродьюсера из упаковки с применением соответствующих асептических методов. 3) Промойте все компоненты физиологическим раствором или соответствующим изотоническим раствором. После промывания соединительного устройства установите клапан с замком типа «Люэр» в закрытое положение, чтобы поддерживать проток в соединительном устройстве и предотвратить обратный ток крови после введения в сосуд. 4) Введите дилатор в интродьюсер через кровоостанавливающий клапан и зафиксируйте его на месте. Дилатор должен быть надежно зафиксирован на месте во избежание повреждения сосуда. 5) Вставьте в сосуд соответствующую интродьюсерную иглу. При необходимости сделайте скальпелем кожный разрез под местной анестезией. Проведите аспирацию с помощью прилагаемого шприца. Удерживая интродьюсерную иглу, проведите кончик проводника через интродьюсерную иглу в сосуд. 6) Удерживая проводник на месте, извлеките интродьюсерную иглу и выполните расширение с помощью полностью собранного дилатора. Прижимайте пальцем область над местом пункции во время извлечения иглы и до тех пор, пока пара интродьюсер/дилатор не будет установлена. 7) Введите пару интродьюсер/дилатор через проводник в сосуд. Вращательным движением продвигайте пару интродьюсер/дилатор через ткани в сосуд. Возьмитесь за собранную пару ближе к коже у места пункции, чтобы избежать перегиба. 8) После введения пары интродьюсер/дилатор в сосуд отсоедините дилатор от интродьюсера, слегка отогнув разъем дилатора вниз (это позволит отделить разъем дилатора от защитного колпачка (пробки) клапана с замком типа «Люэр»). Удерживая интродьюсер, осторожно извлеките дилатор вместе с проводником, оставив интродьюсер в сосуде.	agents and local anesthesia. 2) Remove the packaging. Remove the components of the introducer set from the packaging using appropriate aseptic methods. 3) Rinse all components with saline solution or an appropriate isotonic solution. After rinsing the connecting tube, place valve with lock type "Luer" in the closed position to maintain the duct in the connecting tube and prevent the reverse flow of blood after insertion into the vessel. 4) Insert the dilator into the introducer through the hemostatic valve and fix it in place. The dilator must be securely fixed in place to avoid damage to the vessel. 5) Insert the appropriate introducer needle into the vessel. If necessary, make a skin incision with a scalpel under local anesthesia. Perform aspiration using the supplied syringe. While holding the introducer needle, guidewire the tip of the guidewire through the introducer needle into the vessel. 6) While holding the guidewire in place, remove the introducer needle and perform the expansion using a fully assembled dilator. Press the area above the puncture site with your finger during needle extraction and until the introducer/dilator pair is installed. 7) Insert the introducer/dilator pair through the guidewire into the vessel. Rotate the introducer/dilator pair through the tissues and into the vessel. Grasp the assembled pair closer to the skin at the puncture site to avoid inflection. 8) After inserting the introducer/dilator pair into the vessel, disconnect the dilator from the introducer by slightly bending the dilator connector down (this will separate the dilator connector from the protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer"). While holding the introducer, carefully remove the dilator along with the guidewire, leaving the introducer in the vessel. 9) Aspirate through the connecting tube to remove the air. After aspiration is complete, rinse the connecting tube with an appropriate solution. The valve with lock type "Luer" must be closed to maintain the flow in the connecting tube.
--	--

9) Проведите аспирацию через соединительное устройство, чтобы удалить воздух. По завершении аспирации промойте соединительное устройство соответствующим раствором. Клапан с замком типа «Люэр» должен быть закрыт, чтобы поддерживать проток в соединительном устройстве. 10) Вставьте соответствующие устройства (проводники, катетеры и т. д.) через набор интродьюсера. Принцип работы с интродьюсерным катетером: 1. Выполните разрез кожи под местной анестезией. 2. Интродьюсерный катетер (трубка интродьюсерного катетера + игла интродьюсера) используется для прокола кровеносного сосуда. После пункции аспирируйте кровь прилагаемым шприцем, чтобы убедиться в успешности пункции. 3. После успешной пункции извлеките интродьюсерную иглу и продвиньте проводник через трубку интродьюсерного катетера. 4. После установки проводника извлеките трубку интродьюсерного катетера и расширьте с помощью полностью собранной пары интродьюсер/дилататор. 5. Ослабьте дилататор, убедившись, что кончик внешней оболочки правильно помещен внутри кровеносного сосуда. 6. Извлеките дилататор и проводник. 7. Продвиньте проводник, необходимый для операции. После операции сначала извлеките проводник, затем извлеките оболочку интродьюсера. Важно! Из-за риска заражения ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) или другими в патогенами крови, медицинские работники должны регулярно использовать «универсальные меры предосторожности в отношении крови и жидкости организма» при уходе за всеми пациентами.	10) Insert the appropriate devices (guidewires, catheters, etc.) through the introducer set. Principle of operation with introducer catheter 1. Perform a skin incision under local anesthesia. 2. The introducer catheter (Introducer catheter tube +Introducer needle) is used to puncture the blood vessel. After puncture, aspirate blood with the attached syringe to ensure the puncture is successful. 3. After successful puncture, withdraw the Introducer needle, and advance the guidewire through introducer catheter tube. 4. After positioning the guidewire, remove the introducer catheter tube and dilate with the fully assembled coaxial sheath and dilator. 5. Loosen the dilator, checking that the tip of the outer sheath has been properly placed inside the blood vessel. 6. Remove the dilator and guidewire. 7. Advance the guidewire required for surgery. After surgery, withdraw the guidewire first, then withdraw the sheath. Important! 1) Due to the risk of infection with HIV (human immunodeficiency virus) or other blood pathogens, healthcare professionals should regularly use "universal precautions for blood and body fluids" when caring for all patients.
14. Информация об очистке, дезинфекции и стерилизации	14. Information on cleaning, disinfection and sterilization of a

медицинского изделия (для стерилизуемых изделий), порядке действий при нарушении стерильной упаковки (для изделий, поставляемых в стерильном виде)		medical device (for sterilized products), the procedure in case of package appears damaged (for sterilize products)
Изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации - газовый методом, с помощью этиленоксида. Изделие предназначено только для одноразового использования и не может использоваться повторно.		Sterile. Method of sterilization is Ethylene Oxide. The device is only for single-use and cannot be recycled or reused.
15. Техническое обслуживание		15. Maintenance
Неприменимо. Медицинское изделие не требует технического обслуживания.		Not applicable. The medical device does not require maintenance.
16. Основные технические и функциональные характеристики		16. Main technical and functional characteristics
Таблица 1. Перечень каталожных номеров изделия /Table 1. Catalogue numbers list		
№	Варианты исполнения, типоразмеры / variants, standard sizes	Каталожный номер/ Catalogue number
I Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения / Shun Guider Introducer Set Shunmei in variants		
1. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, типоразмеры / Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral, standard sizes		
1.1.	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615401
1.2.	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615411
1.3.	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/	615706

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	
1.4.	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral	615914
1.5.	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 23 cm femoral	615925
1.6.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml	615501
1.7.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615909
1.8.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml	615705
1.9.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615918
1.10.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615511
1.11.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral	615913

1.12.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615502
1.13.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615944
1.14.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral	615921
1.15.	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615924
1.16.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615965
1.17.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615601
1.18.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2.5 ml	615906

1.19.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615908
1.20.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral	615912
1.21.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615611
1.22.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615945
1.23.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615602
1.24.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm)	615907
1.25.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral	615917
1.26.	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615926

1.27.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615704
1.28.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml	615701
1.29.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615910
1.30.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97mm), length 45 cm)	615923
1.31.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615711
1.32.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral	615915
1.33.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615702

1.34.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm)	615946
1.35.	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral	615920
1.36.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615911
1.37.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml	615801
1.38.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615811
1.39.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615922
1.40.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral	615916
1.41.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/	615947

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	
1.42.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615802
1.43.	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral	615919
1.44.	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615901
1.45.	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615812
1.46.	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 16 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615952
1.47.	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615902
1.48.	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/	615948

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	
1.49.	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615101
1.50.	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615102
1.51.	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615949
1.52.	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615011
2. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры/ Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating, standard sizes		
2.1	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615972
2.2	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/	615973

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	
2.3	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615984
2.4	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615974
2.5	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm)	615986
2.6	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615980
2.7	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm)	615987
2.8	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615975

2.9	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615981
2.10	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615976
2.11	Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615982
2.12	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615977
2.13	Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	615983
2.14	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm)	615978
2.15	Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см)/	615985

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm)	
3. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, типоразмеры/ Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial, standard sizes		
3.1	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615419
3.2	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615961
3.3	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615968
3.4	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615420
3.5	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615962
3.6	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/	615969

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1,4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	
3.7	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial	615515
3.8	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615423
3.9	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615955
3.10	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615959
3.11	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615964
3.12	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615540
3.13	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/	615996

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	
3.14	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615956
3.15	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615960
3.16	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615967
3.17	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial	615418
3.18	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615953
3.19	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615957
3.20	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/	615963

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	
3.21	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615542
3.22	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615954
3.23	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615543
3.24	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm)	615958
3.25	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615821
3.26	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615966

3.27	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial	615421
3.28	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 16 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615820
3.29	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615545
3.30	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615970
3.31	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615971
3.32	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615546
4. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating, standard sizes		
4.1	Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/	615988

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	
4.2	Набор интродьюсера диаметром 4F (1.4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615840
4.3	Набор интродьюсера диаметром 4F (1.4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615858
4.4	Набор интродьюсера диаметром 4F (1.4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615854
4.5	Набор интродьюсера диаметром 4F (1.4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615989
4.6	Набор интродьюсера диаметром 4F (1.4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615841
4.7	Набор интродьюсера диаметром 5F (1.7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615992

4.8	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615844
4.9	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615855
4.10	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615993
4.11	Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615845
4.12	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615990
4.13	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615842
4.14	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/	615859

	Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	
4.15	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615856
4.16	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615991
4.17	Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615843
4.18	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615994
4.19	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615846
4.20	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm)	615995

4.21	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615847
4.22	Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)/ Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)	615857

Для всех значений в таблице технический допуск составляет $\pm 10\%$, если не указано иное/ For all values in the table, the technical tolerance is $\pm 10\%$, unless otherwise specified.

Таблица 2 Номинальные размеры и масса интродьюсера/ Table 2. Nominal dimensions and weight of introducer

Каталожный номер/ Catalogue number	Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)/ Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	Эффективная длина (см), $\pm 5\%$ / Effective length(cm), $\pm 5\%$	Внутренний диаметр (мм), $\pm 0,05$ мм/ Inner diameter (mm), $\pm 0,05$ mm	Масса (г) $\pm 0,4$ г/ Weight (g) $\pm 0,4$ g	Варианты исполнения / variants
615401	4 (1,4)	9	1,50	5,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа / Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral
615411	4 (1,4)	9	1,50	5,20	
615706	4 (1,4)	11	1,50	5,40	
615914	4 (1,4)	11	1,50	5,40	
615925	4 (1,4)	23	1,50	5,80	
615501	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615909	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615705	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615918	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615511	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615913	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615502	5 (1,7)	23	1,85	5,80	

615944	5 (1,7)	23	1,85	5,80
615921	5 (1,7)	23	1,85	5,80
615924	5 (1,7)	23	1,85	5,80
615965	6 (2,0)	7	2,16	5,20
615601	6 (2,0)	11	2,16	5,40
615906	6 (2,0)	11	2,16	5,40
615908	6 (2,0)	11	2,16	5,40
615912	6 (2,0)	11	2,16	5,40
615611	6 (2,0)	11	2,16	5,40
615945	6 (2,0)	23	2,16	6,20
615602	6 (2,0)	23	2,16	6,20
615907	6 (2,0)	23	2,16	6,20
615917	6 (2,0)	23	2,16	6,20
615926	6 (2,0)	23	2,16	6,20
615704	7 (2,3)	7	2,53	5,40
615701	7 (2,3)	11	2,53	5,60
615910	7 (2,3)	11	2,53	5,60
615923	7 (2,3)	11	2,53	5,60
615711	7 (2,3)	11	2,53	5,60
615915	7 (2,3)	11	2,53	5,60
615702	7 (2,3)	23	2,53	6,20
615946	7 (2,3)	23	2,53	6,20
615920	7 (2,3)	23	2,53	6,20
615911	8 (2,7)	11	2,72	5,60
615801	8 (2,7)	11	2,72	5,60
615811	8 (2,7)	11	2,72	5,60
615922	8 (2,7)	11	2,72	5,60
615916	8 (2,7)	11	2,72	5,60
615947	8 (2,7)	23	2,72	6,40
615802	8 (2,7)	23	2,72	6,40

615919	8 (2,7)	23	2,72	6,40	
615901	9 (3,0)	11	3,05	5,60	
615812	9 (3,0)	11	3,05	5,60	
615952	9 (3,0)	16	3,05	5,60	
615902	9 (3,0)	23	3,05	6,40	
615948	9 (3,0)	23	3,05	6,40	
615101	10 (3,4)	11	3,45	5,60	
615102	10 (3,4)	23	3,45	6,40	
615949	10 (3,4)	23	3,45	6,40	
615011	10 (3,4)	11	3,45	5,60	
615972	4 (1,4)	9	1,50	5,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием/ Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating
615973	5 (1,7)	11	1,85	5,40	
615984	5 (1,7)	23	1,85	5,80	
615974	6 (2,0)	11	2,16	5,40	
615986	6 (2,0)	11	2,16	5,40	
615980	6 (2,0)	23	2,16	6,20	
615987	6 (2,0)	23	2,16	6,20	
615975	7 (2,3)	11	2,53	5,60	
615981	7 (2,3)	23	2,53	6,20	
615976	8 (2,7)	11	2,72	5,60	
615982	8 (2,7)	23	2,72	6,40	
615977	9 (3,0)	11	3,05	5,60	
615983	9 (3,0)	23	3,05	6,40	
615978	10 (3,4)	11	3,45	5,60	
615985	10 (3,4)	23	3,45	6,40	
615419	4 (1,4)	7	1,50	5,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider
615961	4 (1,4)	7	1,50	5,20	
615968	4 (1,4)	7	1,50	5,20	
615420	4 (1,4)	11	1,50	5,40	
615962	4 (1,4)	11	1,50	5,40	

615969	4 (1,4)	11	1,50	5,40	Introducer Set Shunmei, radial	
615515	4 (1,4)	11	1,50	5,40		
615423	5 (1,7)	7	1,92	5,20		
615955	5 (1,7)	7	1,92	5,20		
615959	5 (1,7)	7	1,92	5,20		
615964	5 (1,7)	7	1,92	5,20		
615540	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615996	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615956	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615960	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615967	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615418	5 (1,7)	11	1,92	5,40		
615953	6 (2,0)	7	2,22	5,40		
615957	6 (2,0)	7	2,22	5,40		
615963	6 (2,0)	7	2,22	5,40		
615542	6 (2,0)	7	2,22	5,40		
615954	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615543	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615958	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615821	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615966	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615421	6 (2,0)	11	2,22	5,40		
615820	6 (2,0)	16	2,22	5,40		
615545	7 (2,3)	7	2,53	5,20		
615970	7 (2,3)	7	2,53	5,20		
615971	7 (2,3)	11	2,53	5,40		
615546	7 (2,3)	11	2,53	5,40		
615988	4 (1,4)	7	1,50	5,00	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального	
615840	4 (1,4)	7	1,50	5,00		
615858	4 (1,4)	7	1,50	5,00		

615854	4 (1,4)	9	1,50	5,20	доступа с гидрофильным покрытием / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating
615989	4 (1,4)	11	1,50	5,40	
615841	4 (1,4)	11	1,50	5,40	
615992	5 (1,7)	7	1,50	5,20	
615844	5 (1,7)	7	1,92	5,20	
615855	5 (1,7)	7	1,92	5,20	
615993	5 (1,7)	11	1,92	5,40	
615845	5 (1,7)	11	1,92	5,40	
615990	6 (2,0)	7	2,22	5,40	
615842	6 (2,0)	7	2,22	5,40	
615859	6 (2,0)	7	2,22	5,40	
615856	6 (2,0)	9	2,22	5,40	
615991	6 (2,0)	11	2,22	5,40	
615843	6 (2,0)	11	2,22	5,40	
615994	7 (2,3)	7	2,53	5,20	
615846	7 (2,3)	7	2,53	5,20	
615995	7 (2,3)	11	2,53	5,40	
615847	7 (2,3)	11	2,53	5,40	
615857	7 (2,3)	11	2,53	5,40	

Таблица 2.1. Технические характеристики интродьюсера

Table 2.1. Technical characteristics of introducer

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрения при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.	Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter.
--------------------	--	----------------	---

Контроль утечек через оболочку интродьюсера	Оболочка интродьюсера не должна иметь утечек в объеме, достаточном для формирования падающих капель, при работе под давлением 300 кПа.	Leak monitoring through the introducer sheath	The introducer sheath shall have no leakage in a volume sufficient to form a falling drop under pressure of 300 kPa.
Контроль утечек через кровоостанавливающий клапан	Кровоостанавливающий клапан оболочки интродьюсера не должен иметь утечки в объеме при работе под давлением 38 кПа.	Leak monitoring through the hemostatic valve	The hemostatic valve of the introducer sheath should not leak in volume when operating at a pressure of 38 kPa.
Гидрофильное покрытие	Наборы интродьюсеров с гидрофильным покрытием, не должны иметь признаков отслаивания гидрофильного покрытия.	Hydrophilic coating	Introducer sets with a hydrophilic coating should not show signs of peeling of the hydrophilic coating.
Соединительная втулка	Соединительная втулка, клапан с замком типа «Люэр» должны иметь тип разъема «Люэр». Соединительная втулка должна иметь 6%-ный скос конической части соединения. Соединительная втулка должна соответствовать рис. 7. Клапан с замком типа «Люэр» должен соответствовать рис. 4. Защитный колпачок (заглушка) клапана с замком типа «Люэр» должен соответствовать чертежу рис. 5.	Connecting hub	The connecting hub, the valve with lock type "Luer" should have a "Luer" connector type. The connecting hub should have a 6% bevel of the conical part of the joint. The connecting hub should correspond to Fig. 7. The valve with a lock type "Luer" should correspond to Fig. 4. The protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer" should correspond to the drawing of Fig. 5.
Прочность на разрыв	Прочность на разрыв соединения оболочки интродьюсера и соединительной втулки должна быть не менее 15 Н в течение 10 секунд без ослабления.	Tensile force	The tensile force of the joint of the introducer sheath and the connecting hub should be at least 15 N for 10s without looseness.
Рентгенконтрастность	Интродьюсер должен быть рентгеноконтрастным.	Radiodetectability	The introducer set should be radiodetectable.

Таблица 3. Номинальные размеры и масса дилататора/ Table 3. Nominal dimensions and weight of dilator

Каталожный номер/ Catalogue number	Эффективная длина (см), $\pm 0,5$ см / Effective length(cm), $\pm 0,5$ cm	Внешний диаметр, (мм), $\pm 0,1$ мм / Outer diameter, (mm), $\pm 0,1$ mm	Внутренний диаметр (мм), $\pm 0,1$ мм / Inner diameter (mm), $\pm 0,1$ mm	Масса (г) $\pm 0,4$ г/ Weight (g) $\pm 0,4$ g	Варианты исполнения / variants
615401	13,6	1,49	0,65	1,00	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа / Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral
615411	13,6	1,49	0,65	1,00	
615706	15,8	1,49	0,65	1,00	
615914	15,8	1,49	0,65	1,00	
615925	28,2	1,49	0,65	1,20	
615501	15,8	1,82	1,15	1,00	
615909	15,8	1,82	1,15	1,00	
615705	15,8	1,82	1,15	1,00	
615918	15,8	1,82	1,15	1,00	
615511	15,8	1,82	1,15	1,00	
615913	15,8	1,82	1,15	1,00	
615502	28,2	1,82	1,15	1,30	
615944	28,2	1,82	1,15	1,30	
615921	28,2	1,82	1,15	1,30	
615924	28,2	1,82	1,15	1,30	
615965	11,9	2,16	1,15	1,00	
615601	15,8	2,16	1,15	1,00	
615906	15,8	2,16	1,15	1,00	
615908	15,8	2,16	1,15	1,00	
615912	15,8	2,16	1,15	1,00	
615611	15,8	2,16	1,15	1,00	
615945	28,2	2,16	1,15	1,40	
615602	28,2	2,16	1,15	1,40	
615907	28,2	2,16	1,15	1,40	
615917	28,2	2,16	1,15	1,40	
615926	28,2	2,16	1,15	1,40	

615704	11,9	2,49	1,30	1,17		
615701	15,8	2,49	1,30	1,17		
615910	15,8	2,49	1,30	1,17		
615923	15,8	2,49	1,30	1,17		
615711	15,8	2,49	1,30	1,17		
615915	15,8	2,49	1,30	1,17		
615702	28,2	2,49	1,30	1,20		
615946	28,2	2,49	1,30	1,20		
615920	28,2	2,49	1,30	1,20		
615911	15,8	2,72	1,30	1,20		
615801	15,8	2,72	1,30	1,20		
615811	15,8	2,72	1,30	1,20		
615922	15,8	2,72	1,30	1,20		
615916	15,8	2,72	1,30	1,20		
615947	28,2	2,72	1,30	1,40		
615802	28,2	2,72	1,30	1,40		
615919	23,8	2,72	1,30	1,40		
615901	15,8	3,05	1,30	1,27		
615812	15,8	3,05	1,30	1,27		
615952	22,8	3,05	1,30	1,40		
615902	28,2	3,05	1,30	1,60		
615948	28,2	3,05	1,30	1,60		
615101	15,8	3,45	1,30	1,37		
615102	28,2	3,45	1,30	1,60		
615949	28,2	3,45	1,30	1,60		
615011	15,8	3,45	1,30	1,37		
615972	13,6	1,49	0,65	1,00	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с	
615973	15,8	1,82	1,15	1,00		
615984	28,2	1,82	1,15	1,30		
615974	15,8	2,16	1,15	1,00		

615986	15,8	2,16	1,15	1,00	гидрофильным покрытием/ Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating
615980	28,2	2,16	1,15	1,40	
615987	28,2	2,16	1,15	1,40	
615975	15,8	2,49	1,30	1,17	
615981	28,2	2,49	1,30	1,20	
615976	15,8	2,72	1,30	1,20	
615982	28,2	2,72	1,30	1,40	
615977	15,8	3,05	1,30	1,27	
615983	28,2	3,05	1,30	1,60	
615978	15,8	3,45	1,30	1,37	
615985	28,2	3,45	1,30	1,60	
615419	11,9	1,49	0,65	1,00	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial
615961	11,9	1,49	0,65	1,00	
615968	11,9	1,49	0,65	1,00	
615420	15,8	1,49	0,65	1,00	
615962	15,8	1,49	0,65	1,00	
615969	15,8	1,49	0,65	1,00	
615515	15,8	1,49	0,65	1,00	
615423	11,9	1,89	1,15	1,00	
615955	11,9	1,89	1,15	1,00	
615959	11,9	1,89	1,15	1,00	
615964	11,9	1,89	1,15	1,00	
615540	15,8	1,89	1,15	1,00	
615996	15,8	1,89	1,15	1,00	
615956	15,8	1,89	1,15	1,00	
615960	15,8	1,89	1,15	1,00	
615967	15,8	1,89	1,15	1,00	
615418	15,8	1,89	1,15	1,00	
615953	11,9	2,22	1,15	1,00	
615957	11,9	2,22	1,15	1,00	

615963	11,9	2,22	1,15	1,00	
615542	11,9	2,22	1,15	1,00	
615954	15,8	2,22	1,15	1,00	
615543	15,8	2,22	1,15	1,00	
615958	15,8	2,22	1,15	1,00	
615821	15,8	2,22	1,15	1,00	
615966	15,8	2,22	1,15	1,00	
615421	15,8	2,22	1,15	1,00	
615820	22,8	2,22	1,15	1,00	
615545	11,9	2,56	1,30	1,10	
615970	11,9	2,56	1,30	1,10	
615971	15,8	2,56	1,30	1,00	
615546	15,8	2,56	1,30	1,00	
615988	11,9	1,49	0,65	1,00	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating
615840	11,9	1,49	0,65	1,00	
615858	11,9	1,49	0,65	1,00	
615854	13,6	1,49	0,65	1,00	
615989	15,8	1,49	0,65	1,00	
615841	15,8	1,49	0,65	1,00	
615992	11,9	1,89	1,15	1,00	
615844	11,9	1,89	1,15	1,00	
615855	11,9	1,89	1,15	1,00	
615993	15,8	1,89	1,15	1,00	
615845	15,8	1,89	1,15	1,00	
615990	11,9	2,22	1,15	1,00	
615842	11,9	2,22	1,15	1,00	
615859	11,9	2,22	1,15	1,00	
615856	13,6	2,22	1,15	1,00	
615991	15,8	2,22	1,15	1,00	
615843	15,8	2,22	1,15	1,00	

615994	11,9	2,56	1,30	1,10
615846	11,9	2,56	1,30	1,10
615995	15,8	2,56	1,30	1,00
615847	15,8	2,56	1,30	1,00
615857	15,8	2,56	1,30	1,00

Таблица 3.1. Технические характеристики дилатора

Table 3.1. Technical characteristics of dilator

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрения при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.
Соединительная втулка	Соединительная втулка дилатора сосудистого должна иметь 6%-ный скос конической части соединения и соответствовать рисунку 7.
Прочность соединения соединительной втулки с дилатором	Соединение втулки с дилатором сосудистым должно выдерживать нагрузку не менее 15 Н.

Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter.
Connecting hub	The connecting hub of the dilator should have a 6% bevel of the conical part of the joint and correspond to Figure 7.
Strength of union between hub and dilator	The connection of the hub with the dilator should withstand a load of at least 15 N.

Таблица 4. Номинальные размеры и масса проводника/ Table 4. Nominal dimensions and weight of guidewire

Каталожный номер/ Catalogue number	Эффективная длина (см), $\pm 5\%$ / Effective length(cm), $\pm 5\%$	Внешний диаметр, (дюйм/мм), $\pm 5\%$ / Outer diameter, (inch/mm), $\pm 5\%$	Тип кончика/ Tip type	Тип покрытия/ Type of coating	Масса (г) $\pm 0,4$ г/ Weight (g) $\pm 0,4$ g	Варианты исполнения / variants
615401	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	1,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для
615411	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615706	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615914	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	

615925	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	бедренного доступа / Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral
615501	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615909	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615705	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615918	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615511	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615913	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615502	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615944	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615921	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615924	45	0,018/0,46	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615965	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615601	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615906	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615908	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615912	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615611	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615945	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615602	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615907	70	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615917	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615926	45	0,018/0,46	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615704	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615701	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615910	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615923	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615711	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615915	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615702	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615946	70	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	

615920	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615911	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615801	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615811	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615922	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615916	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615947	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615802	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615919	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615901	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615812	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615952	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615902	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,80	
615948	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615101	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,80	
615102	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,80	
615949	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,80	
615011	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,80	
615972	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	1,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием/ Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating
615973	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,20	
615984	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615974	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615986	45	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615980	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615987	70	0,035/0,89	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615975	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,40	
615981	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615976	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	
615982	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,60	
615977	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,60	

615983	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,80	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа/ Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial	
615978	45	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	1,80		
615985	70	0,038/0,97	J-образный/J Tip	ПТФЭ/ PTFE	2,80		
615419	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615961	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615968	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615420	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615962	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615969	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615515	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA		
615423	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615955	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615959	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615964	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615540	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615996	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615956	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615960	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615967	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615418	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA		
615953	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615957	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615963	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615542	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615954	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615543	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615958	43	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615821	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615966	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50		
615421	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA		

615820	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating
615545	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615970	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615971	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615546	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615988	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615840	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615858	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615854	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615989	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615841	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615992	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615844	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615855	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615993	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615845	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615990	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615842	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615859	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615856	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615991	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615843	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615994	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615846	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615995	45	0,018/0,46	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615847	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	
615857	45	0,021/0,53	Прямой/Straight	ПТФЭ/ PTFE	0,50	

Таблица 4.1. Технические характеристики проводника

Table 4.1. Technical characteristics of guidewire

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений. Проводник имеет покрытие, которое не должно быть заметно в виде капель жидкости.	Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter. The guidewire is coated, the external surface shall not be visible as drops of liquid on the external surface.
Предохранительная проволока	Неприменимо	Safety wire	NA
Коррозионная стойкость	Металлические части проводника не должны иметь признаков коррозии, влияющей на функционирование изделий и биологическую совместимость.	Corrosion resistance	The Metal parts of the Guidewire shall show no signs of corrosion that affects functional performance or biocompatibility test results.
Рентгенконтрастность	Проводник должен быть рентгеноконтрастным.	Radiodetectability	The guidewire should be radiodetectable.
Испытания на разрушение	Проводник, исключая зону фиксации и первого витка, не должен иметь признаков разрушения, при разматывании проводника, намотанного вокруг валика, диаметр которого равен десятикратному максимальному наружному диаметру проводника (не менее 8 оборотов). Для покрытых проводников не должно быть признаков отслаивания покрытия.	Fracture test	The guidewire, excluding the region of fixation and first turn, shall show no signs of fracture when unwinding a guidewire wound around a roller whose diameter is ten times the maximum outer diameter of the guidewire (at least 8 revolutions). For coated guidewires, there should be no signs of flaking of the coating.
Испытания на изгиб	Проводник должен быть устойчив к изгибу при обмотке не менее чем 8 раз вокруг двух жестких валиков, диаметр которых равен двадцатикратному максимальному наружному диаметру	Flexing test	The guidewire should be resistant to bending when winding at least 8 times around two rigid rollers, the diameter of which is equal to twenty times the maximum outer diameter of the

	проводника. Ни дистальный кончик проводника, ни остающаяся часть проводника не должны иметь признаков дефектов или повреждений, вызванных изгибом. Покрытые проводники не должны проявлять признаков отслаивания покрытия.		guidewire. Neither the distal tip of the guidewire nor the remaining part of the guidewire should show signs of defects or damage caused by bending. Coated guidewire should not show signs of peeling of the coating.
Прочность соединения ядра проводника и его оболочки	Приложите растягивающее усилие ≥ 10 Н, соединения ядра проводника и его оболочки не должны ослабевать в области дистального наконечника и в проксимальном отделе.	Union strength between Core wire and spring coil	Exert a tensile force ≥ 10 N, core wire and spring coil shall not loose in the area of the distal tip and in the proximal part.

Таблица 5. Номинальные размеры и масса интродьюсерной иглы/ Table 5. Nominal dimensions and weight of introducer needle

Каталожный номер/ Catalogue number	Обозначение диаметра интродьюсерной иглы, G (мм)/ Designation of the diameter of the introducer needle G (mm)	Эффективная длина (мм), $\pm 5\%$ / Effective length (mm), $\pm 5\%$	Диапазон внешнего диаметра, (мм)/ Outer diameter range, (mm)	Минимальный внутренний диаметр, (мм)/ Minimum inner diameter, (mm)	Масса (г) $\pm 0,4$ г / Weight (g) $\pm 0,4$ g	Варианты исполнения / variants
615401	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,28	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа / Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral
615411	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615706	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615914	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615925	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615501	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615909	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615705	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615918	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615511	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615913	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615502	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	

615944	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615921	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615924	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615965	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615601	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615906	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615908	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615912	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615611	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615945	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615602	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615907	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615917	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615926	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615704	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615701	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615910	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615923	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615711	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615915	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615702	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615946	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615920	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615911	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615801	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615811	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615922	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615916	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA
615947	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58
615802	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58

615919	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615901	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615812	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615952	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615902	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615948	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615101	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615102	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615949	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615011	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием/ Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating
615972	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,28	
615973	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615984	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615974	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615986	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615980	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615987	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615975	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615981	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615976	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615982	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615977	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615983	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615978	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615985	18G (1,20)	71	1,200-1,300	0,910	1,58	
615419	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиально го доступа/
615961	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615968	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615420	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615962	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	

615969	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial
615515	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615423	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615955	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615959	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615964	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615540	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615996	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	0,30	
615956	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615960	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615967	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615418	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615953	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615957	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615963	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615542	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615954	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615543	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615958	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615821	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	0,30	
615966	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615421	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615820	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615545	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615970	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615971	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615546	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615988	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615840	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615858	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрединально го доступа с
615854	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615989	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615841	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	

615992	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	гидрофильным покрытием / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating
615844	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615855	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615993	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615845	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615990	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615842	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615859	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	Неприменимо/ NA	
615856	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615991	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615843	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615994	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615846	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615995	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	
615847	20G (0,90)	38	0,860-0,920	0,635	1,20	
615857	21G (0,80)	38	0,800-0,830	0,547	1,20	

Таблица 5.1. Технические характеристики интродьюсерной иглы

Table 5.1. Technical characteristics of introducer needle

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.					Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter.				
Коррозионная стойкость	Металлические части интродьюсерной иглы не должны иметь признаков коррозии, влияющей на функционирование изделий и биологическую совместимость.					Corrosion resistance	The Metal parts of the introducer needle shall show no signs of corrosion that affects functional performance or biocompatibility test results.				
Острые иглы	Острые иглы не должно иметь неровных краев, кромок, заусенцев и должно быть защищено от повреждений.					Needle point	The needle point should not have uneven edges, edges, burrs and should be protected from damage.				
Жесткость	Обозначение диаметра	Диапазон, мм, ±0,1	Изгибающая сила, Н	Максимальное	Максимальное	Stiffness	Designation of the diameter of the	Range, mm, ±0,1	Bending force, N	Maximum	um

	интродьюсерной иглы, G (мм)		H, ±0,1	отклонение, мм	отклонение, мм		introducer needle G (mm)		±0,1	deviation, mm
	18G (1,20)	25,0	12,2	0,51	≤0,51		18G (1,20)	25,0	12,2	0,51
	20G (0,90)	17,5	9,0	0,48	≤0,48		20G (0,90)	17,5	9,0	0,48
	21G (0,80)	15,0	9,6	0,38	≤0,38		21G (0,80)	15,0	9,6	0,38
Сопротивление к излому	При двунаправленном изгибе на угол 20° (20 раз) трубка иглы не должна иметь видимых повреждений при осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением.					Toughness	With a bidirectional bend at an angle of 20° (20 times), the needle tube should not have visible damage when viewed with normal or adjusted to normal vision.			
	Обозначение диаметра интродьюсерной иглы, G (мм)	Расстояние между жесткой опорой и точкой приложения изгибающего усилия, мм, ±0,1					Designation of the diameter of the introducer needle G (mm)	The distance between the rigid support and the point of application of the bending force, mm, ± 0,1		
	18G (1,20)	30					18G (1,20)	30		
	20G (0,90)	25					20G (0,90)	25		
	21G (0,80)	20					21G (0,80)	20		
Коническое соединение	Соединительная втулка должна иметь тип разъема «Люэр». Соединительная втулка должна иметь 6%-ный скос конической части соединения должна соответствовать рисунку 11.					Conical fittings	The connecting hub should be of the type "Luer". The connecting hub should have a 6% bevel of the conical part of the joint should correspond to Figure 11.			
Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы	Соединение трубки иглы с втулкой должно выдерживать нагрузку не менее 20 Н.					Strength of union between needle hub and tube	The connection of the needle tube to the hub should withstand a load of at least 20 N.			
Усилие прокола кончика иглы	Прокол иглы должен осуществляться при усилии не более 2,5 Н.					Puncture force of needle tip	The needle puncture should be carried out with a force of no more than 2.5 N.			
Показатель шероховатости	Максимальный показатель шероховатости трубки иглы Ra должен составлять 0,4 мкм.					Roughness index	The maximum roughness index of the needle tube Ra should be 0.4 μm.			
Твердость трубки иглы	Максимальная твердость трубки иглы должна быть 90 HRC.					Hardness of the needle tube	The maximum hardness of the needle tube should be 90 HRC.			

Таблица 6. Номинальные размеры и масса интродьюсерного катетера/ Table 6. Nominal dimensions and weight of introducer catheter

Каталожный номер/ Catalogue number	Трубки интродьюсерного катетера/ Introducer catheter tube					Интродьюсерная игла/ Introducer needle					Масса интродьюсерного катетера в сборке с оболочкой (г) $\pm 0,4$ г/ Weight Introducer catheter in the assembly with sheath (g) $\pm 0,4$ g	Варианты исполнения / variants
	Обозначение диаметра, G (мм)/ Designation of the diameter, G (mm)	Эффективная длина (мм), $\pm 5\%$ / Effective length (mm), $\pm 5\%$	Внешний диаметр, (мм), $\pm 0,1$ / Outer diameter, (mm), $\pm 0,1$	Внутренний диаметр, (мм), $\pm 0,13$ / Inner diameter, (mm), $\pm 0,13$	Масса (г) $\pm 0,4$ г/ Weight (g) $\pm 0,4$ g	Обозначение диаметра, G (мм)/ Designation of the diameter, G (mm)	Эффективная длина (мм), $\pm 5\%$ / Effective length (mm), $\pm 5\%$	Диапазон внешнего диаметра, (мм)/ Outer diameter range, (mm)	Минимальный внутренний диаметр, (мм)/ Minimum inner diameter, (mm)	Масса (г) $\pm 0,4$ г/ Weight (g) $\pm 0,4$ g		
615858	20G (1,10)	32	1,100	0,700	0,30	22G (0,70)	38	0,698-0,730	0,440	0,95	1,77	Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием / Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating
615859	20G (1,10)	32	1,100	0,700	0,30	22G (0,70)	38	0,698-0,730	0,440	0,95	1,77	

Таблица 6.1. Технические характеристики интродьюсерного катетера

Table 6.1. Technical characteristics of introducer catheter

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.	Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter.
Рентгенконтрастность	Интродюсерный катетер должен быть рентгеноконтрастным.	Radiodetectability	The introducer catheter should be radiodetectable.
Дистальный наконечник	При поставке в комплекте с иглой, когда игла размещена внутри интродюсерного катетера, последний не должен выступать за пределы острия иглы и не должен отстоять от кромки скоса иглы более чем на 1 мм. Чтобы свести к минимуму травмирование кровеносных сосудов во время использования, дистальный кончик катетера должен быть гладким, конусообразным или обработанным подобным образом.	Distal tip	If supplied with an introducer needle, when the needle is fully inserted into the introducer catheter, the catheter shall neither extend beyond the heel of the needle bevel no be more than 1 mm from it. In order to reduce damage to blood vessels during use, the distal tip of the catheter should be smooth, tapered or similarly treated.
Разрывное усилие	Минимальное значение разрывного усилия при оценке прочности соединения между интродюсерным катетером и соединительной втулкой составляет 5 Н.	Breaking force	The minimum value of the breaking force when assessing the strength of the connection between the introducer catheter and the connecting hub is 5 N.
Соединительная втулка	Должна позволять определять обратный поток и быть разработана таким образом, чтобы сообщаться с входным отверстием в трубке иглы. Соединительная втулка должна иметь тип разъема «Люэр». Соединительная втулка должна иметь 6%-ный скос конической части соединения должна соответствовать рисункам 11, 12.2, 12.3.	Connecting hub	Shall permit detection of flashback and shall be designed to communicate with the bore of the introducer needle tube. The connecting hub should be of the type "Luer". The connecting hub should have a 6% bevel of the conical part of the joint should correspond to Figures 11, 12.2, 12.3.
Герметичность	Не должно быть утечки жидкости из втулки катетера или других частей катетера. Во время непрерывного всасывания, воздух не должен попадать в узел втулки катетера.	Freedom from leakage	There should be no fluid leakage from the catheter hub or other parts of the catheter. During continuous suction, air should not enter the catheter hub assembly.

Скорость потока	Каталожный номер	Скорость потока*, мл/с		Максимальное номинальное (статическое) давление, кПа (фунтов на кв. дюйм)	
	615858	52		27,5 Н	
	615859	52		27,5 Н	
	* Физиологический раствор (100%)				
Высокопоточная инъекция	Неприменимо				
Боковые отверстия	Отсутствуют				
Интродюсерная игла					
Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.				
Коррозионная стойкость	Металлические части интродюсерной иглы не должны иметь признаков коррозии, влияющей на функционирование изделий и биологическую совместимость.				
Острые иглы	Острые иглы не должно иметь неровных краев, кромок, заусенцев и должно быть защищено от повреждений.				
Жесткость	Обозначение диаметра интродюсерной иглы, G (мм)	Диапазон, мм, ±0,1	Изгибающая сила, Н, ±0,1	Максимальное отклонение, мм	Максимальное отклонение, мм
	22G (0,70)	15	6,7	0,42	≤0,42
Сопротивление к излому	При двунаправленном изгибе на угол 20° (20 раз) трубка иглы не должна иметь видимых повреждений при осмотре нормальным или				

Flow rate	Catalogue number	Flow rate*, ml/s	Maximum nominal (static) pressure, kPa (psi)		
	615858	52	27,5 N		
	615859	52	27,5 N		
	* Saline solution (100%)				
High-flow injection	NA				
Side ports	NA				
Introducer needle					
Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall appear free from extraneous matter.				
Corrosion resistance	The Metal parts of the introducer needle shall show no signs of corrosion that affects functional performance or biocompatibility test results.				
Needle point	The needle point should not have uneven edges, hooks, burrs and should be protected from damage.				
Stiffness	Designation of the diameter of the introducer needle G (mm)	Range, mm, ±0,1	Bending force, N, ±0,1	Maximum deviation, mm	Maximum deviation, mm
	22G (0,70)	15	6,7	0,42	≤0,42
Toughness	With a bidirectional bend at an angle of 20° (20 times), the needle tube should not have visible damage when viewed with normal or adjusted to				

	скорректированным до нормального зрением.			normal vision.	
	Обозначение диаметра интродьюсерной иглы, G (мм)	Расстояние между жесткой опорой и точкой приложения изгибающего усилия, мм, ±0,1		Designation of the diameter of the introducer needle G (mm)	The distance between the rigid support and the point of application of the bending force, mm, ± 0,1
	22G (0,70)	17,5		22G (0,70)	17,5
Коническое соединение	Соединительная втулка должна иметь тип разъема «Люэр». Соединительная втулка должна иметь 6%-ный скос конической части соединения должна соответствовать рисунку 11.		Conical fittings	The connecting hub should be of the type "Luer". The connecting hub should have a 6% bevel of the conical part of the joint should correspond to Figure 11.	
Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы	Соединение трубки иглы с втулкой должно выдерживать нагрузку не менее 20 Н.		Strength of union between needle hub and tube	The connection of the needle tube to the hub should withstand a load of at least 20 N.	
Усилие прокола кончика иглы	Прокол иглы должен осуществляться при усилии не более 1,15 Н.		Puncture force of needle tip	The needle puncture should be carried out with a force of no more than 1.15 N.	
Показатель шероховатости	Максимальный показатель шероховатости трубки иглы Ra должен составлять 0,4 мкм.		Roughness index	The maximum roughness index of the needle tube Ra should be 0.4 μm.	
Твердость трубки иглы	Максимальная твердость трубки иглы должна быть 90 HRC.		Hardness of the needle tube	The maximum hardness of the needle tube should be 90 HRC.	
Насадка с клапаном	Должна быть предусмотрена насадка с клапаном. В течении 15 с жидкость не должна вытекать из насадки с клапаном.		Vent fitting	A vent fitting shall be provided. There should be not leak out of the vent fitting within 15s.	

Таблица 7. Технические характеристики скальпеля

Table 7. Technical characteristics of scalpel

Поверхность	При визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением при 2,5-	Surface	When examined by normal or corrected-to-normal vision with 2.5x magnification, the external surface of the effective length of the device shall
--------------------	---	----------------	---

	кратном увеличении внешняя поверхность эффективной длины устройства не должна иметь посторонних включений.		appear free from extraneous matter.
Конструкция лезвия	Скальпель по конструкции лезвия является остроконечным.	Blade design	Scalpel by blade design it is pointed.
Габаритные размеры скальпеля с защитным колпачком (длина × ширина), мм, ±10%	70,0×16,1	Overall dimensions of the scalpel with a protective cap (length × width), mm, ± 10%	70,0×16,1
Габаритные размеры лезвия (длина × ширина), мм, ±10%	40,0×8,5	Overall dimensions of the blade (length × width), mm, ± 10%	40,0×8,5
Габаритные размеры рукоятки (длина × ширина), мм, ±10%	50,0×16,1	Overall dimensions of the handle (length × width), mm, ± 10%	50,0×16,1
Габаритные размеры защитного колпачка (длина × ширина), мм, ±10%	25,9×11,0	Overall dimensions of the protective cap (length × width), mm, ± 10%	25,9×11,0
Масса скальпеля с защитным колпачком (г), ±0,4 г	3,8	The weight of the scalpel with a protective cap (g), ±0,4 g	3,8
Твердость лезвия	Минимальная твердость лезвия должна быть 58 HRC.	Blade hardness	The minimum hardness of the blade should be 58 HRC.
Минимальная прочность соединения лезвия и рукоятки	15 Н	The minimum strength of the blade and handle connection	15 N
Режущие кромки скальпеля	Режущие кромки скальпеля должны быть острыми по всей длине и не должны иметь	Scalpel Cutting edges	The cutting edges of the scalpel should be sharp along the entire length and should not have cracks, notches and

	трещин, зазубрин и выкрошенных мест.		gouged places.
	Ширина режущей кромки скальпеля должна быть не более 3 мкм.		The width of the cutting edge of the scalpel should be no more than 3 μm .
Острые скальпеля	Острые скальпеля должно быть острым.	The edge of a scalpel	The edge of the scalpel should be sharp.
Показатель шероховатости поверхности лезвия	Максимальный показатель шероховатости поверхности лезвия Ra должен составлять 0,4 мкм.	The roughness index of the blade surface	The maximum roughness index of the blade surface Ra should be 0.4 μm .
Показатель шероховатости режущего края	Максимальный показатель шероховатости режущего края Ra должен составлять 0,8 мкм.	The roughness index of the cutting edge	The maximum roughness index of the cutting edge Ra should be 0.8 μm .

Таблица 8. Технические характеристики шприца

Поверхность шприца	Поверхность шприца должна быть чистой, без частиц и посторонних веществ. Шприцы не должны иметь таких дефектов, как заусенцы, трещины, пластической деформации и других механических дефектов. Цилиндр шприца должен быть достаточно прозрачным, чтобы четко видеть исходный уровень. На внутренней поверхности шприца (включая резиновый поршень) не должно быть четко видимых скоплений смазки.
Конструкция шприца	Конструкция шприца должна соответствовать рисунку 13. Линии шкалы градуировки, ее расположение и цифровое обозначение номинальной вместимости должны соответствовать ГОСТ ISO 7886-1.
Габаритные размеры (наружный диаметр × длина), (мм) ±	10,25 × 80,62

Table 8. Technical characteristics of Syringe

Syringe surface	The syringe surface should be clean, free of particles and foreign matter. Syringes must not have defects such as burrs, rags, plastic flow, and defects. The barrel of the syringe should be transparent enough to observe baseline clearly. The inner surface of the syringe (including the rubber piston) shall not have significant agglomeration of the lubricant.
Syringe design	The design of the syringe must correspond to Figure 13. The lines of the calibration scale, its location and the digital designation of the nominal capacity must comply with ISO 7886-1.
Overall dimensions (outer diameter × length), (mm) ± 0,05 (mm)	10,25 × 80,62

0,05 (мм)			
Высота цилиндра шприца, (мм) $\pm 0,05$ (мм)	74,62	Height of the syringe cylinder, (mm) ± 0.05 (mm)	74,62
Масса (г), $\pm 0,4$ г	3,0	Weight (g), $\pm 0,4$ g	2,88
Номинальная вместимость шприца, мл	2,5	Nominal capacity of the syringe, ml	2,5
Расположение шкалы	При нахождении штока в крайнем положении, когда он до упора смещен к отверстию наконечника цилиндра, нулевая линия градуировки шкалы должна совпадать с линией отсчета поршня в пределах четверти длины наименьшего деления шкалы.	Location of the scale	When the plunger is fully inserted, that is as near to the nozzle end of the barrel as it will go, the zero-graduation line of the scale shall coincide with the fiducial line on the piston to within a quarter of the smallest scale interval.
Шкала	При вертикальном положении шприца концы линий градуировки равной длины должны быть строго вертикальны один под другим. Длина коротких линий градуировки любой шкалы должна быть равна половине длины длинных линий.	Scale	When the syringe is held vertically, the ends of all graduation lines of similar length shall be vertically beneath each other. The lengths of the short graduation lines on each scale shall be approximately half the length of the long lines.
Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее, мм	27	Overall length of scale to nominal capacity mark, not less than, mm	27
Деление шкалы, мл	0,1	Scale interval, ml	0,1
Вместимость между линиями градуировки с числами, мл	0,5	Increment between graduation lines to be numbered, ml	0,5

Цилиндр	Размеры	Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10% больше номинальной вместимости.				Barrel	Sizes	The length of the barrel shall be such that the syringe has a maximum usable capacity of at least 10 % more than the nominal capacity.					
	Упоры для пальцев	Открытый конец цилиндра должен иметь упоры для пальцев, которые должны обеспечивать, чтобы шприц не поворачивался более больше чем на 180° при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности, расположенной под углом 10° к горизонтали.					Finger grips	The open end of the barrel shall be provided with finger grips that shall ensure that the syringe will not roll more than 180°when it is placed with its scale up on a flat surface at an angle of 10° to the horizontal.					
Шток		Когда линия отсчета поршня совпадает с нулевой линией градуировки цилиндра, предпочтительна минимальная длина выступания штока из цилиндра, от поверхности упора для пальцев до верха стержня штока, должна соответствовать расстоянию, указанному в таблице ниже:				Plunger	When the reference line of the piston coincides with the zero line, the preferred minimum length from protrusions of the stem from the cylinder, from the surface of the finger rest to the top of the stem rod: should conform to the spacing specified in the table below.						
		Номинальная вместимость шприца, V, мл		Значение D, мм			Nominal capacity, V, ml		Spacing D/mm				
		2≤V<5		9			2≤V<5		9				
Поршень		При заполнении шприца водой и удерживании его в вертикальном положении сначала одним, а затем другим концом вверх, поршень не должен двигаться под действием своей собственной массы и массы воды.				Piston	When filling the syringe with water and holding it in an upright position, first with one end and then with the other end up, the piston should not move under the influence of its own mass and the mass of water.						
Усилие, требуемое для движения штока		Шприц должен обладать хорошей функцией скольжения, а его толкающее и вытягивающее усилие должно соответствовать требованиям предъявляемым в Приложении G ISO 7886-1:				Sliding performance	The syringe should have a good sliding function, and its pushing and pulling force should meet the requirements of Annex G ISO 7886-1:						
		Номинальная вместимость шприца, V, мл	Начальное усилие, $\bar{F}_{s\max}$, Н	Среднее усилие, $\bar{F}_{\max}$, Н	Максимальное усилие, $\bar{F}_{\max}$, Н		Минимальное усилие, $\bar{F}_{\min}$, Н	Nominal capacity of the syringe V/ml	Initial force, $\bar{F}_{s\max}$, Н	Average force, $\bar{F}_{\max}$, Н	Maximum force, $\bar{F}_{\max}$, Н	Minimum force, $\bar{F}_{\min}$, Н	
		2≤V<50	25	10	не более (2,0 × измеренное $\bar{F}$) или		не менее (2,0 × измеренное $\bar{F}$) или	2<V<50	25	10	≤ (2,0 × measured $\bar{F}$) or (measured	≥ (2,0 × measured $\bar{F}$) или (measured	

				(измеренное $\bar{F} + 1,5$ Н) смотря, что больше	(измеренное $\bar{F} + 1,5$ Н) смотря, что меньше					$\bar{F} + 1,5$ N) whichever is higher	$\bar{F} + 1,5$ N) whichever is less
Усилие при испытаниях на герметичность: - боковое усилие ($\pm 5\%$), Н - аксиальное давление ($\pm 5\%$), кПа	1,0 300					Pressure during leakproofness tests: - side force ($\pm 5\%$), N - axial pressure ($\pm 5\%$), kPa	1,0 300				
Допуски на градуированную вместимость: - меньше половины номинальной вместимости - равно или больше половины номинальной вместимости	$\pm (1,5\% \text{ от } V; +2\% \text{ слитого объема});$ $\pm 5\% \text{ слитого объема.}$					Tolerances for graduated capacity: - less than half of the nominal capacity - equal to or greater than half nominal capacity	$\pm (1,5\% \text{ of } V; + 2\% \text{ of expelled volume});$ $\pm 5\% \text{ of expelled volume.}$				
Максимальное "мертвое" пространство, мл	0,07					Maximum "dead" space, ml	0,07				
17. Описание принадлежностей, медицинских изделий или						17. Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used					

изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием	in combination with medical device submitted for registration
При использовании с набором интродьюсера будут применяться следующие изделия: • катетер ангиографический, максимальный наружный диаметр катетера ангиографического = “внутренний диаметр интродьюсера” - 0,05 мм (допустимый внутренний диаметр интродьюсера); • дилататор, длина 11,9, 13,6, 15,8, 22,8, 23,8, 28,2 см с учетом применимого внутреннего диаметра интродьюсера; • проводник, максимальный наружный диаметр проводника = внутреннему диаметру дилататора и интродьюсера - 0,05 мм (допустимое отклонение внутреннего диаметра дилататора и интродьюсера); • катетер интродьюсерный, минимальный внутренний диаметр которого должен быть больше наружного диаметра проводника; Изделия для хирургического вмешательства: • игла интродьюсерная, минимальный внутренний диаметр интродьюсерной должен превышать максимальный наружный диаметр проводника; • шприц, минимальный объем 2,5 мл; • скальпель - на усмотрение медицинского работника; • микрокатетер, максимальный наружный диаметр микрокатетера = “внутренний диаметр интродьюсера” - 0,05 мм (допустимое значение внутреннего диаметра интродьюсера). • микропроводник, максимальный наружный диаметр проводника = внутреннему диаметру дилататора - 0,05 мм (допустимое значение внутреннего диаметра дилататора). Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в Российской Федерации в установленном порядке.	When used, the following devices will be in combination with the introducer set: • angiographic catheter, maximum outer diameter of an angiographic catheter = “inner diameter of introducer sheath” - 0.05 mm (the tolerance of inner diameter of an introducer sheath); • dilator, length 11,9, 13,6, 15,8, 22,8, 23,8, 28,2 cm with regard to applicable inner diameter of an introducer; • guidewire, maximum outer diameter of Guidewire = inner diameter of dilator and introducer needle - 0.05 mm (the tolerance of dilator’s and introducer needle’s inner diameter); • introducer catheter, minimum inner diameter should be more than the outer diameter of a guidewire; Interventional devices: • introducer needle, the minimum inner diameter of the introducer needle should larger than the maximum outer diameter of the guidewire.; • syringe, minimum volume 2,5 ml; • scalpel, - it is chosen at the discretion of a medical professional; • microcatheter, maximum outer diameter of an microcatheter = “inner diameter of introducer sheath” - 0.05 mm (the tolerance of inner diameter of an introducer sheath). • microguidewire, maximum outer diameter of Guidewire = inner diameter of dilator - 0.05 mm (the tolerance of dilator’s inner diameter). Medical devices must be registered in the Russian Federation in accordance with the established procedure.

18. Материалы

Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа;
Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа:

Интродьюсер:

Наконечник, соединительная втулка: полипропилен;

Цветовая кодировка наконечника интродьюсера представлена в таблице 9:

Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)	Краситель наконечника интродьюсера
4F (1,4 мм)	Красный
5F (1,7 мм)	Серый
6F (2,0 мм)	Зеленый
7F (2,3 мм)	Оранжевый
8 F (2,7 мм)	Синий
9 F (3,0 мм)	Черный
10 F (3,4 мм)	Голубой

Оболочка: фторированный этилен пропилен;

Клапан с замком типа «Люэр»: поликарбонат, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), краситель фиолетовый;

Соединительное устройство: полиуретан;

Кровоостанавливающий клапан: корпус – полипропилен, внутреннее покрытие – силикон;

Защитный колпачок (заглушка) клапана с замком типа «Люэр»: акрилонитрил бутадиен стирол, краситель белый

Корпус интродьюсера: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)

Дилататор сосудистый:

Соединительная втулка: полипропилен;

Цветовая кодировка соединительной втулки дилататора сосудистого представлена в таблице 10:

Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)	Краситель соединительной втулки дилататора сосудистого
---	--

18. Materials

Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral and Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial:

Introducer:

Sheath cap, sheath connector: polypropylene;

The color coding of the introducer sheath cap is shown in Table 9:

Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	Toner sheath cap
4F (1,4 mm)	Red
5F (1,7 mm)	Gray
6F (2,0 mm)	Green
7F (2,3 mm)	Orange
8 F (2,7 mm)	Blue
9 F (3,0 mm)	dark Gray
10 F (3,4 mm)	sky Blue

Sheath: FEP;

Valve with lock type "Luer": polycarbonate, high-density polyethylene (HDPE), toner: purple;

Connecting tube: polyurethane;

Hemostatic Valve: body – polypropylene, inner coating – silicone;

Protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer": acrylonitrile butadiene styrene, toner: white;

Sheath cover: High-density polyethylene (HDPE)

Vascular dilator:

Connector: polypropylene;

The color coding of the connector of vascular dilator is shown in Table 10:

Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	Toner connector of vascular dilator
4F (1,4 mm)	Red
5F (1,7 mm)	Gray
6F (2,0 mm)	Green

4F (1,4 мм)	Красный
5F (1,7 мм)	Серый
6F (2,0 мм)	Зеленый
7F (2,3 мм)	Оранжевый
8 F (2,7 мм)	Синий
9 F (3,0 мм)	Черный
10 F (3,4 мм)	Голубой

Трубка дилататора: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), краситель голубой

Интродьюсерная игла:

Кончик: нержавеющая сталь;

Соединительная втулка иглы: поликарбонат;

Цветовая кодировка соединительной втулки иглы представлена в таблице 11:

Обозначение диаметра интродьюсерной иглы, G (мм)	Краситель соединительной втулки дилататора сосудистого
18G (1,25 мм)	Розовый
20 G (0,83 мм)	Жёлтый
21G (0,81 мм)	Жёлтый

Трубка иглы: нержавеющая сталь;

Колпачок иглы: акрилонитрил бутадиен стирол.

Скальпель:

Защитный колпачок, ручка скальпеля: акрилонитрил бутадиен стирол, краситель белый;

Лезвие: нержавеющая сталь;

Проводник:

Корпус: нержавеющая сталь;

Покрывание из гидрофобного полимера: Смесь политетрафторэтилена (ПТФЭ), полиэфирсульфона (ПЭС) и полиамид-имида (ПАИ);

Фиксирующая пластина: полипропилен;

7F (2,3 мм)	Orange
8 F (2,7 мм)	Blue
9 F (3,0 мм)	dark Gray
10 F (3,4 мм)	sky Blue

Dilator tube: high-density polyethylene (HDPE), toner: blue

Introducer needle:

Tip: stainless steel;

Connector: polycarbonate;

The color coding of the connector of introducer needle is shown in Table 11:

Designation of the diameter of the introducer needle, G (mm)	Toner connector of introducer needle
18G (1,25 мм)	bright red
20 G (0,83 мм)	bright yellow
21G (0,81 мм)	bright yellow

Needle tube: stainless steel;

Needle cover: acrylonitrile butadiene styrene

Scalpel:

Scalpel handle cover, scalpel handle base: acrylonitrile butadiene styrene, toner: white

Blade: stainless steel

Guide wire:

Body: stainless steel

Covering from a hydrophobic polymer: Mixture polytetrafluoroethylene (PTFE), polyether sulfone (PES) and polyamide-imide (PAI)

Fixing plate: polypropylene

Устройство для введения проводника: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП); краситель голубой

Шприц:

Уплотнитель: силикон;

Цилиндр, поршень: полипропилен;

Индивидуальная упаковка: бумага, композитная пленка из ПЭТ/ПЭ

Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием; Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием:

Интродьюсер:

Наконечник, соединительная втулка: полипропилен;

Цветовая кодировка наконечника интродьюсера представлена в таблице 12:

Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)	Краситель наконечника интродьюсера
4F (1,4 мм)	Красный
5F (1,7 мм)	Серый
6F (2,0 мм)	Зеленый
7F (2,3 мм)	Оранжевый
8 F (2,7 мм)	Синий
9 F (3,0 мм)	Черный
10 F (3,4 мм)	Голубой

Оболочка: фторированный этилен пропилен;

Клапан с замком типа «Люэр»: поликарбонат, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), краситель фиолетовый;

Соединительное устройство: полиуретан;

Кровоостанавливающий клапан: корпус – полипропилен, внутреннее покрытие – силикон;

Защитный колпачок (заглушка) клапана с замком типа «Люэр»:

Guidewire advancer: high-density polyethylene (HDPE); toner Blue;

Syringe:

Piston: silicone rubber

Barrel, plunger: polypropylene

Primary Packaging: paper, PET/PE complex film

Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating and Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating:

Introducer:

Sheath cap, sheath connector: polypropylene;

The color coding of the introducer sheath cap is shown in Table 12:

Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	Toner sheath cap
4F (1,4 mm)	Red
5F (1,7 mm)	Gray
6F (2,0 mm)	Green
7F (2,3 mm)	Orange
8 F (2,7 mm)	Blue
9 F (3,0 mm)	dark Gray
10 F (3,4 mm)	sky Blue

Sheath: FEP;

Valve with lock type "Luer": polycarbonate, high-density polyethylene (HDPE), toner: purple;

Connecting tube: polyurethane;

Hemostatic Valve: body – polypropylene, inner coating – silicone;

Protective cap (plug) of the valve with lock type "Luer": acrylonitrile butadiene styrene, toner: white;

Hydrophilic coating: alcohol coating

акрилонитрил бутадиен стирол, краситель белый;
Гидрофильное покрытие: спиртовое покрытие;
Корпус интродьюсера: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)

Дилататор сосудистый:

Соединительная втулка: полипропилен

Цветовая кодировка соединительной втулки дилататора сосудистого представлена в таблице 13:

Обозначение размера оболочки интродьюсера, F (мм)	Краситель соединительной втулки дилататора сосудистого
4F (1,4 мм)	Красный
5F (1,7 мм)	Серый
6F (2,0 мм)	Зеленый
7F (2,3 мм)	Оранжевый
8 F (2,7 мм)	Синий
9 F (3,0 мм)	Черный
10 F (3,4 мм)	Голубой

Трубка дилататора: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), краситель голубой

Интродьюсерная игла:

Кончик: нержавеющая сталь;

Соединительная втулка иглы: поликарбонат;

Цветовая кодировка соединительной втулки иглы представлена в таблице 14:

Обозначение диаметра интродьюсерной иглы, G (мм)	Краситель соединительной втулки дилататора сосудистого
18G (1,25 мм)	Розовый
20 G (0,83 мм)	Желтый
21G (0,81 мм)	Желтый

Трубка иглы: нержавеющая сталь;

Колпачок иглы: акрилонитрил бутадиен стирол.

Sheath cover: High-density polyethylene (HDPE)

Vascular dilator:

Connector: polypropylene;

The color coding of the connector of vascular dilator is shown in Table 13:

Designation of the size of the introducer sheath, F (mm)	Toner connector of vascular dilator
4F (1,4 mm)	Red
5F (1,7 mm)	Gray
6F (2,0 mm)	Green
7F (2,3 mm)	Orange
8 F (2,7 mm)	Blue
9 F (3,0 mm)	dark Gray
10 F (3,4 mm)	sky Blue

Dilator tube: high-density polyethylene (HDPE), toner: blue

Introducer needle:

Tip: stainless steel;

Connector: polycarbonate;

The color coding of the connector of introducer needle is shown in Table 14:

Designation of the diameter of the introducer needle, G (mm)	Toner connector of introducer needle
18G (1,25 mm)	bright red
20 G (0,83 mm)	bright yellow
21G (0,81 mm)	bright yellow

Needle tube: stainless steel;

Needle cover: acrylonitrile butadiene styrene.

Introducer catheter:

Introducer catheter tube: connector – polycarbonate, toner bright red;

Интродьюсерный катетер: Трубка интродьюсерного катетера: соединительная втулка – поликарбонат; краситель розовый; корпус катетера – полиуретан; Интродьюсерная игла: втулка иглы (соединительная втулка), насадка с клапаном – поликарбонат; корпус иглы, кончик – нержавеющая сталь; Оболочка – полипропилен. Скальпель: Защитный колпачок, ручка скальпеля: акрилонитрил бутадиенстирол, краситель белый; Лезвие: нержавеющая сталь; Проводник: Корпус: нержавеющая сталь; Покрытие из гидрофобного полимера: Смесь политетрафторэтилена (ПТФЭ), полиэфирсульфона (ПЭС) и полиамид-имида (ПАИ); Фиксирующая пластина: полипропилен; Устройство для введения проводника: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП); краситель голубой; Шприц: Уплотнитель: силикон; Цилиндр, поршень: полипропилен; Индивидуальная упаковка: бумага, композитная пленка из ПЭТ/ПЭ	catheter body – polyurethane; Introducer needle: connector (Needle hub), vent fitting – polycarbonate; needle body, tip - stainless steel; Sheath – polypropylene. Scalpel: Scalpel handle cover, scalpel handle base: acrylonitrile butadiene styrene, toner: white Blade: stainless steel Guide wire: Body: stainless steel Covering from a hydrophobic polymer: Mixture polytetrafluoroethylene (PTFE), polyether sulfone (PES) and polyamide-imide (PAI) Fixing plate: polypropylene Guidewire advancer: high-density polyethylene (HDPE); toner Blue; Syringe: Piston: silicone rubber Barrel, plunger: polypropylene Primary Packaging: paper, PET/PE complex film
19. Сведения о лекарственных средствах входящих в состав медицинского изделия	19. Information about the medicines included in the medical device
Неприменимо.	Not applicable.
20. Сведения о материалах животного/человеческого происхождения	20. Information about materials of animal/human origin
Неприменимо.	Not applicable.

21. Условия эксплуатации медицинского изделия	21. Operating conditions of the medical device								
Медицинское изделие предназначено для использования во внутренней среде организма, использовать при температуре от 32°C до 42°C.	Medical devices, that are intended to be used in the body's internal environment, are used in temperature range from 32°C to 42°C.								
22. Условия хранения и транспортирования медицинского изделия	22. Storage and transportation conditions of the medical device								
Таблица 15 Условия хранения и транспортирования	Table 15 Storage and transportation conditions								
<table border="1"> <tr> <td>Температурный диапазон:</td><td>от 0 до 40 °C</td></tr> <tr> <td>Диапазон влажности:</td><td>≤ 80%</td></tr> </table> • Храните изделие в прохладном и сухом месте, вдали от света и влаги; • Во время транспортирования избегайте давления груза, попадания прямых солнечных лучей, намокания под дождем и снегом, а также высокой температуры.	Температурный диапазон:	от 0 до 40 °C	Диапазон влажности:	≤ 80%	<table border="1"> <tr> <td>Temperature Range:</td><td>from 0 to 40 °C</td></tr> <tr> <td>Humidity Range:</td><td>≤ 80%</td></tr> </table> • Store the device in a cool and dry area, away from light and moisture; • During transportation avoid weight pressing, direct sunlight, rain and snow soaking, and high temperature.	Temperature Range:	from 0 to 40 °C	Humidity Range:	≤ 80%
Температурный диапазон:	от 0 до 40 °C								
Диапазон влажности:	≤ 80%								
Temperature Range:	from 0 to 40 °C								
Humidity Range:	≤ 80%								
23. Комплект поставки	23. Package contents								
Индивидуальная упаковка: 1 набор. Вторичная упаковка: 20 наборов (включает 20 индивидуальных упаковок). Транспортная упаковка: 200 наборов (включает 10 вторичных упаковок).	Inner package: 1 kit. Middle package: 20 kit (Including 20 Inner package). Outer package: 200 kit (Including 10 Middle package).								

Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения:	Shun Guider Introducer Set Shunmei in variants:
1. Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, типоразмеры:	1. Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral, standard sizes:
1.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	1.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
1.1.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.;	1.1.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm – 1 pc.;
1.1.10 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.;	1.1.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.;
1.1.11 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	1.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
1.1.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
1.1.13 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	1.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
1.1.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	1.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
1.1.15 Скальпель – 1 шт.;	1.1.7 Scalpel – 1 pc.;
1.1.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.1.8 Instructions for use – 1 pc.
1.2 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	1.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
1.2.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.;	1.2.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm – 1 pc.;
1.2.9 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.;	1.2.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.;
1.2.10 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	1.2.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
1.2.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
1.2.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	1.2.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
1.2.13 Скальпель – 1 шт.;	1.2.6 Scalpel – 1 pc.;
	1.2.7 Instructions for use – 1 pc.

1.2.14 Инструкция по применению – 1 шт. 1.3 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 1.3.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.3.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.3.11 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.3.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.3.13 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 1.3.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.3.15 Скальпель – 1 шт.; 1.3.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.4 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.4.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.4.5 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.4.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.5.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.5.5 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.5.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 1.3.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm – 1pc.; 1.3.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.3.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.3.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 1.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.3.7 Scalpel – 1 pc.; 1.3.8 Instructions for use – 1 pc. 1.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm femoral, consist of: 1.4.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm – 1pc.; 1.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.4.3 Instructions for use – 1 pc. 1.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.5.1 Femoral introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.5.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.5.3 Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.6Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.6.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.6.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.6.11 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.6.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.6.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.6.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.6.15 Скальпель – 1 шт.; 1.6.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.6.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.6.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.6.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.6.7 Scalpel – 1 pc.; 1.6.8 Instructions for use – 1 pc.
1.7Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.7.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.7.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.7.9 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.7.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.7.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.7.12 Инструкция по применению – 1 шт.	1.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.7.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.7.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.7.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.7.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.7.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.7.6 Instructions for use – 1 pc.
1.8Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой	1.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71

18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.8.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.8.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.8.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.8.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.8.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.8.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.8.15 Скальпель – 1 шт.; 1.8.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.9.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.9.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.9.9 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.9.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.9.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.9.12 Инструкция по применению – 1 шт. 1.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) в составе: 1.10.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.;	mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.8.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.8.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.8.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.8.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.8.7 Scalpel – 1 pc.; 1.8.8 Instructions for use – 1 pc. 1.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.9.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.9.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.9.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.9.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.9.6 Instructions for use – 1 pc. 1.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.10.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.;
---	--

1.10.9 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.10.10 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.10.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.10.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.10.13 Скальпель – 1 шт.; 1.10.14 Инструкция по применению – 1 шт.	1.10.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.10.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.10.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.10.6 Scalpel – 1 pc.; 1.10.7 Instructions for use – 1 pc.
1.11 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.11.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.11.5 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.11.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral, consist of: 1.11.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.11.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.11.3 Instructions for use – 1 pc.
1.12 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.12.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.12.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.12.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.12.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.12.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.12.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.12.15 Скальпель – 1 шт.; 1.12.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.12.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.12.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.12.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.12.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.12.7 Scalpel – 1 pc.; 1.12.8 Instructions for use – 1 pc.
1.13 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной	1.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71

иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.13.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.13.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.13.11 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.13.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.13.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.13.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.13.15 Скальпель – 1 шт.; 1.13.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.14 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.14.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.14.5 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.14.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.15 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 1.15.6 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.15.7 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.15.8 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.15.9 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.15.10 Инструкция по применению – 1 шт.	mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.13.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.13.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.13.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.13.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.13.7 Scalpel – 1 pc.; 1.13.8 Instructions for use – 1 pc. 1.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.14.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.14.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.14.3 Instructions for use – 1 pc. 1.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 1.15.1 Femoral introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.15.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.15.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.15.5 Instructions for use – 1 pc.
--	--

1.16 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.16.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 1.16.10 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 1.16.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.16.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.16.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.16.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.16.15 Скальпель – 1 шт.; 1.16.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.17 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.17.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.17.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.17.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.17.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.17.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.17.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.17.15 Скальпель – 1 шт.; 1.17.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.16.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 1.16.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 1.16.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.16.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.16.7 Scalpel – 1 pc.; 1.16.8 Instructions for use – 1 pc. 1.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.17.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.17.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.17.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.17.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.17.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.17.7 Scalpel – 1 pc.; 1.17.8 Instructions for use – 1 pc.
--	--

1.18 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.18.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.18.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.18.11 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.18.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.18.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.18.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.18.15 Скальпель – 1 шт.; 1.18.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.19 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.19.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.19.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.19.9 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.19.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.19.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.19.12 Инструкция по применению – 1 шт. 1.20 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе:	1.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.18.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.18.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.18.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.18.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.18.7 Scalpel – 1 pc.; 1.18.8 Instructions for use – 1 pc. 1.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.19.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.19.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.19.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.19.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.19.6 Instructions for use – 1 pc. 1.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, consist of:
--	--

1.20.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.20.5 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.20.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.21 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.21.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.21.9 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.21.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.21.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.21.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.21.13 Скальпель – 1 шт.; 1.21.14 Инструкция по применению – 1 шт. 1.22 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.22.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.22.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.22.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.22.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.22.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.22.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.22.15 Скальпель – 1 шт.; 1.22.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.20.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.20.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.20.3 Instructions for use – 1 pc. 1.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.21.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.21.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.21.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.21.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.21.6 Scalpel – 1 pc.; 1.21.7 Instructions for use – 1 pc. 1.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.22.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.22.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.22.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.22.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.22.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.22.7 Scalpel – 1 pc.; 1.22.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

1.23 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:

1.23.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.;

1.23.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;

1.23.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;

1.23.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.23.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.23.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

1.23.15 Скальпель – 1 шт.;

1.23.16 Инструкция по применению – 1 шт.

1.24 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе:

1.24.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.;

1.24.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;

1.24.11 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.;

1.24.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.24.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.24.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

1.24.15 Скальпель – 1 шт.;

1.24.16 Инструкция по применению – 1 шт.

1.23. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:

1.23.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.;

1.23.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

1.23.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.;

1.23.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.23.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.23.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.23.7 Scalpel – 1 pc.;

1.23.8 Instructions for use – 1 pc.

1.24. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of:

1.24.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.;

1.24.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

1.24.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.;

1.24.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.24.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.24.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.24.7 Scalpel – 1 pc.;

1.24.8 Instructions for use – 1 pc.

1.25 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.25.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.25.5 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.25.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.25. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.25.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.25.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.25.3 Instructions for use – 1 pc.
1.26 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 1.26.6 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.26.7 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.26.8 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.26.9 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.26.10 Инструкция по применению – 1 шт.	1.26. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral, with guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 1.26.1 Femoral introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm – 1pc.; 1.26.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.26.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.26.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.26.5 Instructions for use – 1 pc.
1.27 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.27.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 1.27.10 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 1.27.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.27.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.27.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.27.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.27.15 Скальпель – 1 шт.; 1.27.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.27. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.27.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 1.27.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 1.27.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.27.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.27.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.27.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.27.7 Scalpel – 1 pc.; 1.27.8 Instructions for use – 1 pc.

1.28 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе:

1.28.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;

1.28.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;

1.28.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.;

1.28.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.28.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.28.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

1.28.15 Скальпель – 1 шт.;

1.28.16 Инструкция по применению – 1 шт.

1.29 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе:

1.29.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;

1.29.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;

1.29.9 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.;

1.29.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.29.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.29.12 Инструкция по применению – 1 шт.

1.30 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной

1.28. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of:

1.28.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;

1.28.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;

1.28.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.;

1.28.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.28.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.28.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.28.7 Scalpel – 1 pc.;

1.28.8 Instructions for use – 1 pc.

1.29. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of:

1.29.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;

1.29.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;

1.29.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.;

1.29.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.29.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.29.6 Instructions for use – 1 pc.

1.30. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71

иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.30.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.30.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.30.9 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.30.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.30.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.30.12 Инструкция по применению – 1 шт. 1.31 Набор интродьюсера диаметром 7F (2.3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.31.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2.3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.31.9 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.31.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.31.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.31.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.31.13 Скальпель – 1 шт.; 1.31.14 Инструкция по применению – 1 шт. 1.32 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.32.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.32.5 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.32.6 Инструкция по применению – 1 шт.	mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97mm), length 45 cm), consist of: 1.30.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.30.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.30.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.30.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.30.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.30.6 Instructions for use – 1 pc. 1.31. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.31.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.31.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.31.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.31.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.31.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.31.6 Scalpel – 1 pc.; 1.31.7 Instructions for use – 1 pc. 1.32. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral, consist of: 1.32.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.32.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.32.3 Instructions for use – 1 pc.
--	---

1.33 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:

1.33.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.;

1.33.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;

1.33.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;

1.33.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.33.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.33.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

1.33.15 Скальпель – 1 шт.;

1.33.16 Инструкция по применению – 1 шт.

1.34 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе:

1.34.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.;

1.34.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;

1.34.11 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.;

1.34.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;

1.34.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;

1.34.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

1.34.15 Скальпель – 1 шт.;

1.34.16 Инструкция по применению – 1 шт.

1.33. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:

1.33.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1 pc.;

1.33.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

1.33.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.;

1.33.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.33.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.33.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.33.7 Scalpel – 1 pc.;

1.33.8 Instructions for use – 1 pc.

1.34. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of:

1.34.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1 pc.;

1.34.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

1.34.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.;

1.34.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

1.34.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.34.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;

1.34.7 Scalpel – 1 pc.;

1.34.8 Instructions for use – 1 pc.

1.35 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.35.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.35.5 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.35.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.35. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.35.1 Femoral introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.35.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.35.3 Instructions for use – 1 pc.
1.36 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 1.36.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.36.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.36.9 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.36.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.36.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.36.12 Инструкция по применению – 1 шт.	1.36. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 1.36.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.36.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.36.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.36.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.36.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.36.6 Instructions for use – 1 pc.
1.37 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм), проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см) и шприцом, 2,5 мл, в составе: 1.37.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.37.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.37.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.37.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.37.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	1.37. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm), guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm) and syringe, 2,5 ml, consist of: 1.37.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.37.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.37.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.37.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.37.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.37.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.37.7 Scalpel – 1 pc.;

1.37.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.37.15 Скальпель – 1 шт.; 1.37.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.38 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.38.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.38.9 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.38.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.38.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.38.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.38.13 Скальпель – 1 шт.; 1.38.14 Инструкция по применению – 1 шт. 1.39 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.39.7 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.39.8 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.39.9 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.39.10 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.39.11 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.39.12 Инструкция по применению – 1 шт. 1.40 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе:	1.37.8 Instructions for use – 1 pc. 1.38. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.38.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.38.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.38.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.38.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.38.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.38.6 Scalpel – 1 pc.; 1.38.7 Instructions for use – 1 pc. 1.39. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.39.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.39.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.39.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.39.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.39.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.39.6 Instructions for use – 1 pc. 1.40. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral, consist of:
---	---

1.40.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.40.5 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.40.6 Инструкция по применению – 1 шт.	1.40.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.40.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.40.3 Instructions for use – 1 pc.
1.41 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.41.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.41.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.41.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.41.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.41.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.41.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.41.15 Скальпель – 1 шт.; 1.41.16 Инструкция по применению – 1 шт.	1.41. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.41.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.41.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.41.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.41.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.41.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.41.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.41.7 Scalpel – 1 pc.; 1.41.8 Instructions for use – 1 pc.
1.42 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.42.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.42.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.42.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.42.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.42.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;	1.42. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.42.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.42.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.42.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.42.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.42.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.42.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.42.7 Scalpel – 1 pc.;

1.42.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.42.15 Скальпель – 1 шт.; 1.42.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.43 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, в составе: 1.43.4 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.43.5 Дилататор сосудистый, длина 23,8 см – 1 шт.; 1.43.6 Инструкция по применению – 1 шт. 1.44 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.44.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.44.10 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.44.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.44.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.44.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.44.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.44.15 Скальпель – 1 шт.; 1.44.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.45 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.45.8 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.45.9 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	1.42.8 Instructions for use – 1 pc. 1.43. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral, consist of: 1.43.1 Femoral introducer sheath, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.43.2 Vascular dilator, length 23.8 cm – 1 pc.; 1.43.3 Instructions for use – 1 pc. 1.44. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.44.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.44.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.44.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.44.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.44.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.44.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.44.7 Scalpel – 1 pc.; 1.44.8 Instructions for use – 1 pc. 1.45. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.45.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.45.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
--	--

1.45.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.45.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.45.12 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.45.13 Скальпель – 1 шт.; 1.45.14 Инструкция по применению – 1 шт.	1.45.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.45.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.45.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.45.6 Scalpel – 1 pc.; 1.45.7 Instructions for use – 1 pc.
1.46 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.46.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 16 см – 1 шт.; 1.46.9 Дилататор сосудистый, длина 22,8 см – 1 шт.; 1.46.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.46.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.46.12 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.46.13 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.46.14 Скальпель – 1 шт.; 1.46.15 Инструкция по применению – 1 шт.	1.46. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 16 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.46.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 16 cm - 1pc.; 1.46.2 Vascular dilator, length 22.8 cm – 1 pc.; 1.46.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.46.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.46.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.46.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.46.7 Scalpel – 1 pc.; 1.46.8 Instructions for use – 1 pc.
1.47 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.47.9 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.47.10 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.47.11 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.47.12 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.47. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.47.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.47.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.47.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.47.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.47.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;

1.47.13 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.47.14 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.47.15 Скальпель – 1 шт.; 1.47.16 Инструкция по применению – 1 шт. 1.48 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.49 1.48.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.48.9 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.48.10 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.48.11 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.48.12 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.48.13 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.48.14 Скальпель – 1 шт.; 1.48.15 Инструкция по применению – 1 шт. 1.50 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.49.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.49.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.49.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.49.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.47.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.47.7 Scalpel – 1 pc.; 1.47.8 Instructions for use – 1 pc. 1.48. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.48.1 Femoral introducer sheath, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.48.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.48.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.48.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.48.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.48.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.48.7 Scalpel – 1 pc.; 1.48.8 Instructions for use – 1 pc. 1.49. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.49.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.49.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.49.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.49.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.49.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.49.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
--	--

1.49.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.49.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.49.7 Скальпель – 1 шт.; 1.49.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.50 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 1.50.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.50.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.50.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 1.50.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.50.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.50.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.50.7 Скальпель – 1 шт.; 1.50.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.51 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.51.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.; 1.51.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 1.51.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.51.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.49.7 Scalpel – 1 pc.; 1.49.8 Instructions for use – 1 pc. 1.50. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 1.50.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.50.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.50.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 1.50.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.50.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.50.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.50.7 Scalpel – 1 pc.; 1.50.8 Instructions for use – 1 pc. 1.51. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.51.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1pc.; 1.51.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 1.51.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.51.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.51.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 1.51.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
---	---

1.51.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 1.51.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.51.7 Скальпель – 1 шт.; 1.51.8 Инструкция по применению – 1 шт. 1.52 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 1.52.1 Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 1.52.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 1.52.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 1.52.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 1.52.5 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 1.52.6 Скальпель – 1 шт.; 1.52.7 Инструкция по применению – 1 шт. 2 Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры: 2.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 2.1.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.; 2.1.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 2.1.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	1.51.7 Scalpel – 1 pc.; 1.51.8 Instructions for use – 1 pc. 1.52. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral, with guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 1.52.1 Femoral introducer sheath, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 1.52.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 1.52.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 1.52.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 1.52.5 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 1.52.6 Scalpel – 1 pc.; 1.52.7 Instructions for use – 1 pc. 2. Shun Guider Introducer Set Shunmei femoral with hydrophilic coating, standard sizes: 2.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 2.1.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm - 1pc.; 2.1.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 2.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 2.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
---	--

2.1.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 2.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.1.7 Скальпель – 1 шт.; 2.1.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.2 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 2.2.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.2.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.2.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.2.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.2.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.2.7 Скальпель – 1 шт.; 2.2.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.3 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.3.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.3.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.3.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;	2.1.7 Scalpel – 1 pc.; 2.1.8 Instructions for use – 1 pc. 2.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 2.2.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.2.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.2.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.2.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.2.7 Scalpel – 1 pc.; 2.2.8 Instructions for use – 1 pc. 2.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.3.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 23 cm - 1pc.; 2.3.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.3.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.3.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
--	---

2.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.3.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.3.7 Скальпель – 1 шт.; 2.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.4 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.4.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.4.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.4.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.4.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.4.7 Скальпель – 1 шт.; 2.4.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.5 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см), в составе: 2.5.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	2.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.3.7 Scalpel – 1 pc.; 2.3.8 Instructions for use – 1 pc. 2.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.4.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.4.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.4.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.4.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.4.7 Scalpel – 1 pc.; 2.4.8 Instructions for use – 1 pc. 2.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm), consist of: 2.5.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.5.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
---	--

2.5.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.5.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.5.7 Скальпель – 1 шт.; 2.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.5.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.5.7 Scalpel – 1 pc.; 2.5.8 Instructions for use – 1 pc.
2.6 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.6.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.6.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.6.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.6.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.6.7 Скальпель – 1 шт.; 2.6.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.6.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 2.6.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.6.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.6.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.6.7 Scalpel – 1 pc.; 2.6.8 Instructions for use – 1 pc.
2.7 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см), в составе: 2.7.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 23 см – 1 шт.;	2.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm), consist of: 2.7.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 23 cm - 1pc.; 2.7.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;

2.7.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.7.3 Проводник, диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.7.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.7.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.7.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.7.7 Скальпель – 1 шт.; 2.7.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.8 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.8.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.8.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.8.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.8.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.8.7 Скальпель – 1 шт.; 2.8.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.9 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:	2.7.3 Guidewire diameter 0.035 inch (0.89 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.7.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.7.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.7.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.7.7 Scalpel – 1 pc.; 2.7.8 Instructions for use – 1 pc. 2.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.8.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.8.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.8.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.8.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.8.7 Scalpel – 1 pc.; 2.8.8 Instructions for use – 1 pc. 2.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.9.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 23 cm - 1pc.;
---	--

2.9.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.9.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.9.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.9.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.9.7 Скальпель – 1 шт.; 2.9.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.9.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.9.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.9.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.9.7 Scalpel – 1 pc.; 2.9.8 Instructions for use – 1 pc.
2.10 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.10.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 8F (2,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.10.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.10.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.10.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.10.7 Скальпель – 1 шт.; 2.10.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.10.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 8F (2.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 2.10.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.10.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.10.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.10.7 Scalpel – 1 pc.; 2.10.8 Instructions for use – 1 pc.
2.11 Набор интродьюсера диаметром 8F (2,7 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71	2.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:

мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.11.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 8F (2,7 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.11.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.11.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.11.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.11.7 Скальпель – 1 шт.; 2.11.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.12 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.12.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 9F (3,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.12.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.12.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.12.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.12.7 Скальпель – 1 шт.; 2.12.8 Инструкция по применению – 1 шт. 2.13 Набор интродьюсера диаметром 9F (3,0 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным	2.11.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 8F (2.7 mm), length 23 cm - 1 pc.; 2.11.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.11.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.11.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.11.7 Scalpel – 1 pc.; 2.11.8 Instructions for use – 1 pc. 2.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.12.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 9F (3.0 mm), length 11 cm - 1 pc.; 2.12.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.12.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.12.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.12.7 Scalpel – 1 pc.; 2.12.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе: 2.13.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 9F (3,0 мм), длина 23 см – 1 шт.; 2.13.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.; 2.13.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.; 2.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.13.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.13.7 Скальпель – 1 шт.; 2.13.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of: 2.13.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 9F (3.0 mm), length 23 cm - 1 pc.; 2.13.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.; 2.13.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.; 2.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.13.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.13.7 Scalpel – 1 pc.; 2.13.8 Instructions for use – 1 pc.
2.14 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см), в составе: 2.14.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 10F (3,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 2.14.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 2.14.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 45 см – 1 шт.; 2.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 2.14.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.; 2.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 2.14.7 Скальпель – 1 шт.; 2.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	2.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm), consist of: 2.14.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 10F (3.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 2.14.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 2.14.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 45 cm – 1 pc.; 2.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 2.14.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.; 2.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 2.14.7 Scalpel – 1 pc.; 2.14.8 Instructions for use – 1 pc.

2.15 Набор интродьюсера диаметром 10F (3,4 мм), длина 23 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) и проводником (диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см), в составе:

- 2.15.1 Интродьюсер для бедренного доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 10F (3,4 мм), длина 23 см – 1 шт.;
- 2.15.2 Дилататор сосудистый, длина 28,2 см – 1 шт.;
- 2.15.3 Проводник, диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина 70 см – 1 шт.;
- 2.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 2.15.5 Интродьюсерная игла 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.;
- 2.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 2.15.7 Скальпель – 1 шт.;
- 2.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.

3 Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, типоразмеры:

3.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:

- 3.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.;
- 3.1.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;
- 3.1.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 3.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 3.1.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;
- 3.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;

2.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm femoral with hydrophilic coating, with introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) and guidewire (diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm), consist of:

- 2.15.1 Femoral introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 10F (3.4 mm), length 23 cm - 1 pc.;
- 2.15.2 Vascular dilator, length 28.2 cm – 1 pc.;
- 2.15.3 Guidewire diameter 0.038 inch (0.97 mm), length 70 cm – 1 pc.;
- 2.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 2.15.5 Introducer needle 18G (diameter 1.20 mm, length 71 mm) – 1 pc.;
- 2.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 2.15.7 Scalpel – 1 pc.;
- 2.15.8 Instructions for use – 1 pc.

3. Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial, standard sizes:

3.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:

- 3.1.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.;
- 3.1.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
- 3.1.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 3.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 3.1.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
- 3.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 3.1.7 Scalpel – 1 pc.;
- 3.1.8 Instructions for use – 1 pc.

3.1.7 Скальпель – 1 шт.;	
3.1.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
3.2 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе:	3.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of:
3.2.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.;	3.2.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1,4 mm), length 7 cm - 1 pc.;
3.2.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.2.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
3.2.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.;	3.2.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.;
3.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
3.2.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	3.2.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
3.2.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
3.2.7 Скальпель – 1 шт.;	3.2.7 Scalpel – 1 pc.;
3.2.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.2.8 Instructions for use – 1 pc.
3.3 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе:	3.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:
3.3.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.;	3.3.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1 pc.;
3.3.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.3.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
3.3.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	3.3.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;
3.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
3.3.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	3.3.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
3.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
3.3.7 Скальпель – 1 шт.;	3.3.7 Scalpel – 1 pc.;
	3.3.8 Instructions for use – 1 pc.

3.3.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.4 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.4.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.4.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.4.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.4.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.4.7 Скальпель – 1 шт.; 3.4.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.5.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.5.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.5.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.5.7 Скальпель – 1 шт.; 3.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.4.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 3.4.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.4.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.4.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.4.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.4.7 Scalpel – 1 pc.; 3.4.8 Instructions for use – 1 pc. 3.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.5.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1 pc.; 3.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.5.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.5.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.5.7 Scalpel – 1 pc.; 3.5.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

3.6Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.6.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.6.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.6.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.6.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.6.7 Скальпель – 1 шт.; 3.6.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.7Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shunmei для трансрадиального доступа, в составе: 3.7.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.7.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.7.3 Инструкция по применению – 1 шт. 3.8Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.8.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.8.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.8.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	3.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1,4 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.6.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.6.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.6.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.6.7 Scalpel – 1 pc.; 3.6.8 Instructions for use – 1 pc. 3.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial, consist of: 3.7.1 Radial introducer sheath, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.7.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.7.3 Instructions for use – 1 pc. 3.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.8.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.8.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.8.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.8.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
---	--

3.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.8.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.8.7 Скальпель – 1 шт.; 3.8.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.9.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.9.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.9.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.9.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.9.7 Скальпель – 1 шт.; 3.9.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.10.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.10.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.10.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.8.7 Scalpel – 1 pc.; 3.8.8 Instructions for use – 1 pc. 3.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.9.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.9.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.9.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.9.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.9.7 Scalpel – 1 pc.; 3.9.8 Instructions for use – 1 pc. 3.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.10.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.10.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.10.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.10.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
---	--

3.10.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.10.7 Скальпель – 1 шт.; 3.10.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.11 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.11.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.11.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.11.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.11.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.11.7 Скальпель – 1 шт.; 3.11.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.12 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.12.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.12.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.12.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.10.7 Scalpel – 1 pc.; 3.10.8 Instructions for use – 1 pc. 3.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.11.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.11.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.11.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.11.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.11.7 Scalpel – 1 pc.; 3.11.8 Instructions for use – 1 pc. 3.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.12.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.12.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.12.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.12.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
---	---

3.12.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.12.7 Скальпель – 1 шт.; 3.12.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.13 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.13.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.13.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.13.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.13.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.13.7 Скальпель – 1 шт.; 3.13.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.14 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.14.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.14.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.14.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.;	3.12.7 Scalpel – 1 pc.; 3.12.8 Instructions for use – 1 pc. 3.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.13.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.13.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.13.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.13.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.13.7 Scalpel – 1 pc.; 3.13.8 Instructions for use – 1 pc. 3.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.14.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.14.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.14.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.14.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
---	--

3.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.14.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.14.7 Скальпель – 1 шт.; 3.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.14.7 Scalpel – 1 pc.; 3.14.8 Instructions for use – 1 pc.
3.15 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.15.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.15.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.15.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.15.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.15.7 Скальпель – 1 шт.; 3.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.15.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.15.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.15.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.15.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.15.7 Scalpel – 1 pc.; 3.15.8 Instructions for use – 1 pc.
3.16 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.16.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.16.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	3.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.16.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.16.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.16.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

3.16.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.16.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.16.5 Интродюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.16.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.16.7 Скальпель – 1 шт.; 3.16.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.16.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.16.7 Scalpel – 1 pc.; 3.16.8 Instructions for use – 1 pc.
3.17 Набор интродюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, в составе: 3.17.1 Интродюсер для трансрадиального доступа, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.17.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.17.3 Инструкция по применению – 1 шт.	3.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial, consist of: 3.17.1 Radial introducer sheath, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.17.3 Instructions for use – 1 pc.
3.18 Набор интродюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.18.1 Интродюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.18.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.18.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.18.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.18.5 Интродюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.18.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.18.7 Скальпель – 1 шт.; 3.18.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.18.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.18.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.18.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.18.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.18.7 Scalpel – 1 pc.; 3.18.8 Instructions for use – 1 pc.

3.19 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.19.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.19.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.19.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.19.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.19.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.19.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.19.7 Скальпель – 1 шт.; 3.19.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.20 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.20.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.20.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.20.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.20.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.20.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.20.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.20.7 Скальпель – 1 шт.; 3.20.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.19.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.19.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.19.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.19.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.19.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.19.7 Scalpel – 1 pc.; 3.19.8 Instructions for use – 1 pc. 3.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.20.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 3.20.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.20.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.20.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.20.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.20.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.20.7 Scalpel – 1 pc.; 3.20.8 Instructions for use – 1 pc. 3.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38
---	---

3.21 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:

- 3.21.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.;
- 3.21.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;
- 3.21.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 3.21.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 3.21.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;
- 3.21.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 3.21.7 Скальпель – 1 шт.;
- 3.21.8 Инструкция по применению – 1 шт.

3.22 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе:

- 3.22.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.;
- 3.22.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;
- 3.22.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.;
- 3.22.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 3.22.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;
- 3.22.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 3.22.7 Скальпель – 1 шт.;
- 3.22.8 Инструкция по применению – 1 шт.

mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:

- 3.21.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1 pc.;
- 3.21.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
- 3.21.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 3.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 3.21.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
- 3.21.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 3.21.7 Scalpel – 1 pc.;
- 3.21.8 Instructions for use – 1 pc.

3.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of:

- 3.22.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.;
- 3.22.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
- 3.22.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.;
- 3.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 3.22.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
- 3.22.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 3.22.7 Scalpel – 1 pc.;
- 3.22.8 Instructions for use – 1 pc.

3.23 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 3.23.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.23.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.23.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.23.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.23.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.23.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.23.7 Скальпель – 1 шт.; 3.23.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.23. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.23.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.23.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.23.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.23.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.23.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.23.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.23.7 Scalpel – 1 pc.; 3.23.8 Instructions for use – 1 pc.
3.24 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см), в составе: 3.24.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.24.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.24.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 43 см – 1 шт.; 3.24.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.24.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.24.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.24.7 Скальпель – 1 шт.; 3.24.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.24. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm), consist of: 3.24.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.24.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.24.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 43 cm – 1 pc.; 3.24.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.24.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.24.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.24.7 Scalpel – 1 pc.; 3.24.8 Instructions for use – 1 pc.

3.25 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:

- 3.25.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.;
- 3.25.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;
- 3.25.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 3.25.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 3.25.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;
- 3.25.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 3.25.7 Скальпель – 1 шт.;
- 3.25.8 Инструкция по применению – 1 шт.

3.26 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе:

- 3.26.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.;
- 3.26.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;
- 3.26.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;
- 3.26.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;
- 3.26.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;
- 3.26.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
- 3.26.7 Скальпель – 1 шт.;

3.25. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:

- 3.25.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.;
- 3.25.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
- 3.25.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 3.25.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 3.25.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
- 3.25.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 3.25.7 Scalpel – 1 pc.;
- 3.25.8 Instructions for use – 1 pc.

3.26. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:

- 3.26.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.;
- 3.26.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
- 3.26.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;
- 3.26.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
- 3.26.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
- 3.26.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
- 3.26.7 Scalpel – 1 pc.;
- 3.26.8 Instructions for use – 1 pc.

3.26.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
3.27 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, в составе:	3.27. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial, consist of:
3.27.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.;	3.27.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.;
3.27.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	3.27.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;
3.27.3 Инструкция по применению – 1 шт.	3.27.3 Instructions for use – 1 pc.
3.28 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 16 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	3.28. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 16 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
3.28.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 6F (2,0 мм), длина 16 см – 1 шт.;	3.28.1 Radial introducer sheath, diameter 6F (2.0 mm), length 16 cm - 1pc.;
3.28.2 Дилататор сосудистый, длина 22,8 см – 1 шт.;	3.28.2 Vascular dilator, length 22.8 cm – 1 pc.;
3.28.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.;	3.28.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;
3.28.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	3.28.4 Guidewire advancer – 1 pc.;
3.28.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	3.28.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.;
3.28.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	3.28.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.;
3.28.7 Скальпель – 1 шт.;	3.28.7 Scalpel – 1 pc.;
3.28.8 Инструкция по применению – 1 шт.	3.28.8 Instructions for use – 1 pc.
3.29 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	3.29. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of:
3.29.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.;	3.29.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.;
3.29.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	3.29.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.;
	3.29.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.;

3.29.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.29.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.29.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.29.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.29.7 Скальпель – 1 шт.; 3.29.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.30 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.30.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 3.30.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 3.30.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.30.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.30.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.30.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.30.7 Скальпель – 1 шт.; 3.30.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.31 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 3.31.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.31.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.;	3.29.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.29.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.29.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.29.7 Scalpel – 1 pc.; 3.29.8 Instructions for use – 1 pc. 3.30. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.30.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 3.30.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 3.30.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.30.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.30.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.30.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.30.7 Scalpel – 1 pc.; 3.30.8 Instructions for use – 1 pc. 3.31. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 3.31.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.31.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.31.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.;
---	---

3.31.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.31.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.31.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.31.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.31.7 Скальпель – 1 шт.; 3.31.8 Инструкция по применению – 1 шт. 3.32 Набор интродьюсера диаметром 7F (2.3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0.53 мм), длина 45 см), в составе: 3.32.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 3.32.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 3.32.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 3.32.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 3.32.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 3.32.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 3.32.7 Скальпель – 1 шт.; 3.32.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4 Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, типоразмеры: 4.1 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38	3.31.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.31.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.31.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.31.7 Scalpel – 1 pc.; 3.31.8 Instructions for use – 1 pc. 3.32. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 3.32.1 Radial introducer sheath, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 3.32.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 3.32.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 3.32.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 3.32.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 3.32.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 3.32.7 Scalpel – 1 pc.; 3.32.8 Instructions for use – 1 pc. 4. Shun Guider Introducer Set Shunmei, radial with hydrophilic coating, standard sizes: 4.1. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of:
---	---

мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.1.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.1.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.1.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.1.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.1.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.1.7 Скальпель – 1 шт.; 4.1.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.2 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.2.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.2.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.2.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.2.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.2.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.2.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.2.7 Скальпель – 1 шт.; 4.2.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.3 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным	4.1.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.1.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.1.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.1.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.1.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.1.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.1.7 Scalpel – 1 pc.; 4.1.8 Instructions for use – 1 pc. 4.2. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.2.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.2.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.2.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.2.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.2.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.2.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.2.7 Scalpel – 1 pc.; 4.2.8 Instructions for use – 1 pc.
---	--

покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.3.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.3.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.3.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.3.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.3.5 Интродьюсерный катетер 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) – 1 шт.; 4.3.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.3.7 Скальпель – 1 шт.; 4.3.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.3. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.3.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.3.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.3.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.3.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.3.5 Introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) – 1 pc.; 4.3.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.3.7 Scalpel – 1 pc.; 4.3.8 Instructions for use – 1 pc.
4.4.Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.4.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 9 см – 1 шт.; 4.4.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 4.4.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.4.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.4.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.4.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.4.7 Скальпель – 1 шт.; 4.4.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.4. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.4.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm - 1pc.; 4.4.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 4.4.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.4.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.4.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.4.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.4.7 Scalpel – 1 pc.; 4.4.8 Instructions for use – 1 pc.

4.5 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.5.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.5.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.5.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.5.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.5.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.5.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.5.7 Скальпель – 1 шт.; 4.5.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.5. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.5.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.5.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.5.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.5.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.5.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.5.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.5.7 Scalpel— 1 pc.; 4.5.8 Instructions for use – 1 pc.
4.6 Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.6.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.6.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.6.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.6.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.6.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.6.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.6.7 Скальпель – 1 шт.; 4.6.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.6. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.6.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 4F (1.4 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.6.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.6.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.6.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.6.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.6.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.6.7 Scalpel – 1 pc.; 4.6.8 Instructions for use – 1 pc.

4.7Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.7.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.7.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.7.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.7.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.7.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.7.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.7.7 Скальпель – 1 шт.; 4.7.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.8Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.8.1.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.8.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.8.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.8.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.8.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.8.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.8.7 Скальпель – 1 шт.;	4.7. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.7.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.7.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.7.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.7.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.7.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.7.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.7.7 Scalpel – 1 pc.; 4.7.8 Instructions for use – 1 pc. 4.8. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.8.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.8.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.8.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.8.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.8.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.8.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.8.7 Scalpel – 1 pc.; 4.8.8 Instructions for use – 1 pc.
---	---

4.8.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.9 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.9.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.9.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.9.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.9.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.9.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.9.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.9.7 Скальпель – 1 шт.; 4.9.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.10 Набор интродьюсера диаметром 5F (1,7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.10.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.10.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.10.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.10.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.10.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.10.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;	4.9. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.9.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.9.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.9.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.9.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.9.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.9.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.9.7 Scalpel – 1 pc.; 4.9.8 Instructions for use – 1 pc. 4.10. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.10.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1 pc.; 4.10.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.10.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.10.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.10.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.10.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.10.7 Scalpel – 1 pc.; 4.10.8 Instructions for use – 1 pc.
--	--

4.10.7 Скальпель – 1 шт.; 4.10.8 Инструкция по применению – 1 шт.	
4.11 Набор интродьюсера диаметром 5F (1.7 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.11.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 5F (1,7 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.11.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.11.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.11.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.11.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.11.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.11.7 Скальпель – 1 шт.; 4.11.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.11. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.11.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 5F (1.7 mm), length 11 cm - 1 pc.; 4.11.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.11.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.11.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.11.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.11.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.11.7 Scalpel – 1 pc.; 4.11.8 Instructions for use – 1 pc.
4.12 Набор интродьюсера диаметром 6F (2.0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.12.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.12.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.12.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.12.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.12.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.;	4.12. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.12.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2,0 mm), length 7 cm - 1 pc.; 4.12.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.12.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.12.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.12.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.12.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.12.7 Scalpel – 1 pc.; 4.12.8 Instructions for use – 1 pc.

4.12.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.12.7 Скальпель – 1 шт.; 4.12.8 Инструкция по применению – 1 шт. 4.13 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.13.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.13.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.13.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.13.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.13.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.13.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.13.7 Скальпель – 1 шт.; 4.13.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.13. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.13.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.13.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.13.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.13.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.13.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.13.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.13.7 Scalpel – 1 pc.; 4.13.8 Instructions for use – 1 pc.
4.14 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерным катетером 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.14.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.14.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.14.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.14.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.;	4.14. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.14.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.14.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.14.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.14.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.14.5 Introducer catheter 20G (diameter 1.10 mm, length 32 mm) – 1 pc.; 4.14.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.14.7 Scalpel – 1 pc.;

4.14.5 Интродьюсерный катетер 20G (диаметр 1,10 мм, длина 32 мм) – 1 шт.; 4.14.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.14.7 Скальпель – 1 шт.; 4.14.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.14.8 Instructions for use – 1 pc.
4.15 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.15.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 9 см – 1 шт.; 4.15.2 Дилататор сосудистый, длина 13,6 см – 1 шт.; 4.15.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.15.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.15.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.15.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.15.7 Скальпель – 1 шт.; 4.15.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.15. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 9 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.15.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 9 cm - 1pc.; 4.15.2 Vascular dilator, length 13.6 cm – 1 pc.; 4.15.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.15.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.15.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.15.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.15.7 Scalpel – 1 pc.; 4.15.8 Instructions for use – 1 pc.
4.16 Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.16.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.16.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.16.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.;	4.16. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.16.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.16.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.16.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.16.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.16.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.;

4.16.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.16.5 Интродюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.16.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.16.7 Скальпель – 1 шт.; 4.16.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.16.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.16.7 Scalpel – 1 pc.; 4.16.8 Instructions for use – 1 pc.
4.17 Набор интродюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.17.1 Интродюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.17.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.17.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.17.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.17.5 Интродюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.17.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.17.7 Скальпель – 1 шт.; 4.17.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.17. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 6F (2.0 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.17.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 6F (2,0 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.17.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.17.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.17.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.17.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.17.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.17.7 Scalpel – 1 pc.; 4.17.8 Instructions for use – 1 pc.
4.18 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.18.1 Интродюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.18.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.;	4.18. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.18.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.18.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.18.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.18.4 Guidewire advancer – 1 pc.;

4.18.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.18.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.18.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.18.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.18.7 Скальпель – 1 шт.; 4.18.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.18.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.18.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.18.7 Scalpel – 1 pc.; 4.18.8 Instructions for use – 1 pc.
4.19 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.19.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.; 4.19.2 Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.; 4.19.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.19.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.19.5 Интродьюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.19.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.19.7 Скальпель – 1 шт.; 4.19.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.19. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.19.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 7 cm - 1pc.; 4.19.2 Vascular dilator, length 11.9 cm – 1 pc.; 4.19.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.19.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.19.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.19.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.19.7 Scalpel – 1 pc.; 4.19.8 Instructions for use – 1 pc.
4.20 Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродьюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см), в составе: 4.20.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.;	4.20. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm), consist of: 4.20.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.20.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.;

4.20.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.20.3 Проводник, диаметр 0,018 дюйма (0,46 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.20.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.20.5 Интродюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.20.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.20.7 Скальпель – 1 шт.; 4.20.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.20.3 Guidewire diameter 0.018 inch (0.46 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.20.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.20.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.20.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.20.7 Scalpel – 1 pc.; 4.20.8 Instructions for use – 1 pc.
4.21 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе: 4.21.1 Интродюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.21.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.21.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.21.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.21.5 Интродюсерная игла 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.21.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.21.7 Скальпель – 1 шт.; 4.21.8 Инструкция по применению – 1 шт.	4.21. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.21.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.; 4.21.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.21.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.21.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.21.5 Introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.21.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.21.7 Scalpel – 1 pc.; 4.21.8 Instructions for use – 1 pc.
4.22 Набор интродюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 11 см Shun Guider, Shunmei для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, с интродюсерной иглой 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см), в составе:	4.22. Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm radial with hydrophilic coating, with introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm), consist of: 4.22.1 Radial introducer sheath with hydrophilic coating, diameter 7F (2.3 mm), length 11 cm - 1pc.;

4.22.1 Интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным покрытием, диаметр 7F (2,3 мм), длина 11 см – 1 шт.; 4.22.2 Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.; 4.22.3 Проводник, диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см – 1 шт.; 4.22.4 Устройство для введения проводника – 1 шт.; 4.22.5 Интродьюсерная игла 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.; 4.22.6 Шприц, 2,5 мл – 1 шт.; 4.22.7 Скальпель – 1 шт.; 4.22.8 Инструкция по применению – 1 шт.			4.22.2 Vascular dilator, length 15.8 cm – 1 pc.; 4.22.3 Guidewire diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm – 1 pc.; 4.22.4 Guidewire advancer – 1 pc.; 4.22.5 Introducer needle 21G (diameter 0.80 mm, length 38 mm) – 1 pc.; 4.22.6 Syringe, 2,5 ml – 1 pc.; 4.22.7 Scalpel – 1 pc.; 4.22.8 Instructions for use – 1 pc.		
24. Срок годности / срок службы			24. Shelf life / Service life		
Срок годности набора интродьюсера, составляет три года . То есть при соблюдении условий хранения, описанных в инструкции по применению, Shunmei Medical гарантирует, что в течение трех лет после стерилизации набор интродьюсера является стерильными и все характеристики соответствуют требованиям стандарта продукта.			The expiration date of introducer set is three years . That is to say, when products are stored as instruction for use claimed, Shunmei Medical insures that within three years after sterilization, introducer set are sterile, and all performances meet the requirements of product standard.		
25. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия			25. Procedure for the disposal and destruction of a medical device		
Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относится к классу Б классификации медицинских отходов, и подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам. Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в т.ч. с истекшим сроком годности, относится к классу А классификации медицинских отходов, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно применяемым национальным законодательным нормам. (СанПиН 2.1.3684).			Products coming into contact with blood and/or biological fluids are class B medical devices under medical wastes classification and may be recycled and / or disposed in accordance with applicable national regulations. Unused products (not having contact with blood and/or biological fluids), including those with expired shelf life, belong to class A medical devices under medical waste classification and may be recycled and/or disposed in accordance with applicable national regulations. (SanPiN 2.1.3684).		
26. Перечень стандартов, применяемых производителем медицинского изделия			26. List of standards applied by the manufacturer of the medical device		
№	Обозначение	Стандарты	№	Applicable standard	Standards
1.	ISO 10993-1	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.			

		Оценка и исследования в процессе менеджмента риска			1. ISO 10993-1	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process
2.	ISO 10993-4	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью			2. ISO 10993-4	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood
3.	ISO 10993-5	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro			3. ISO 10993-5	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 5. Tests for in vitro cytotoxicity
4.	ISO 10993-7	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации			4. ISO 10993-7	Biological evaluation of medical devices-Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals
5.	ISO 10993-10	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия			5. ISO 10993-10	Medical devices. Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity
6.	ISO 10993-12	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы			6. ISO 10993-12	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 12. Sample preparation and reference materials
7.	ISO 10993-17	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ			7. ISO 10993-17	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 17. Establishment of allowable limits for leachable substances
8.	ISO 10993-18	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов в рамках процесса менеджмента риска			8. ISO 10993-18	Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 18. Chemical characterization of medical device materials within a risk management process
9.	ISO 11737-1	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции			9. ISO 11737-1	Sterilization of medical devices. Microbiological methods. Part 1. Estimation of population of microorganisms on products
10.	ISO 11737-2	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации			10. ISO 11737-2	Sterilization of medical devices. Microbiological methods. Part 2. Tests of sterility performed in the validation of a sterilization process
11.	ISO 11135	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке,			11. ISO 11135	Sterilization of health-care products. Ethylene oxide. Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
					12. ISO 11607-1	Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 1. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
					13. ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 2. Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

		валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий			Cleanrooms and associated controlled environments. Part 1. Classification of air cleanliness by particle concentration
12.	ISO 11607-1	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам	14.	ISO 14644-1	Cleanrooms and associated controlled environments. Part 2. Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration
13.	ISO 11607-2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки	16.	ISO 14698-1	Cleanrooms and associated controlled environments. Biocontamination control. Part 1. General principles and methods
14.	ISO 14644-1	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц	17.	ISO 14698-2	Cleanrooms and associated controlled environments. Biocontamination control. Part 2. Evaluation and interpretation of biocontamination data
15.	ISO 14644-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц	18.	ISO 14971	Medical devices. Application of risk management to medical devices
16.	ISO 14698-1	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы	19.	ISO 15223-1	Medical devices. Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied. Part 1. General requirements
17.	ISO 14698-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биозагрязнениях	20.	EN 556-1	Sterilization of medical devices-Requirements for medical devices to be designated "STERILE"-part1:Requirements for terminally sterilization medical devices
18.	ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	21.	EN 1041	Information supplied by the manufacturer with medical devices
19.	ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	22.	ISO 11070	Sterile single-use intravascular catheter introducers. Technical requirements and test methods
20.	EN 556-1	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории стерильные. Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации	23.	ISO 10555-1	Intravascular sterile and single-use catheters. Part 1. General requirements
			24.	ISO 10555-5	Intravascular sterile and single-use catheters. Part 5. Over-needle peripheral catheters
			25.	ASTM F1980	Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices
			26.	ISO 7886-1	Sterile hypodermic syringes for single use. Part 1. Syringes for manual use
			27.	ISO 9626	Stainless steel needle tubing for manufacture of medical devices
			28.	MDD 93/42/EEC	Medical Device Directive 93/42/EEC

21.	EN 1041	Общие требования к информации изготовителя, сопровождающей медицинские изделия	29.	MEDDEV 2.7.1 Rev 4.	Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies under directives 93/42/EEC and 90/385/EEC
22.	ISO 11070	Интродьюсеры однократного применения стерильные. Технические требования и методы испытаний	30.	NBOG 2010-1	Guidance for Notified Bodies auditing suppliers to medical device manufacturers
23.	ISO 10555-1	Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования	31.	MEDDEV 2.12-2 rev.2	Post market clinical follow-up studies: A guide for manufacturers and notified bodies
24.	ISO 10555-5	Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой	32.	MEDDEV 2,12-1 rev.8	Guidelines on a medical devices vigilance system
25.	ASTM F1980	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских устройств	33.	ISO/TR 24971	Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971
26.	ISO 7886-1	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования	34.	GOST 19126	Medical metallic instruments. General specifications
27.	ISO 9626	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл			
28.	MDD 93/42/EEC	Директива по медицинскому оборудованию: Директива Совета 93/42/EEC, касающаяся медицинских устройств, включая все поправки			
29.	MEDDEV 2.7.1 Rev 4.	Клиническая оценка: руководство для производителей и уполномоченных органов в соответствии с директивами 93/42/EEC и 90/385/EEC			
30.	NBOG 2010-1	Руководство для уполномоченных органов, проводящих аудит поставщиков для производителей медицинского оборудования			
31.	MEDDEV 2.12-2 rev.2	Клинические исследования, следующие после маркетинга: руководство для производителей и уполномоченных органов			
32.	MEDDEV 2,12-1 rev.8	Рекомендации по системе контроля за медицинскими изделиями			
33.	ISO/TR 24971	Изделия медицинские. Руководство по применению ИСО 14971			
34.	ГОСТ 19126	Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия			

27. Гарантийные обязательства Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Телефон: 0086-0752-3306949 Электронная почта: nora@shunmed.com Сайт: www.shunmed.com Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232 Срок сохранения стерильности изделия – 3 года	27. Warranty Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Telephone: 0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Website: www.shunmed.com Authorised representative: LLC «HEALTH SYSTEMS KNOWLEDGE CENTER LTD» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st., 11A, building 2, floor/room/office 2/30,32/232 Shelf life – 3 years
28.Рекламация Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Телефон: 0086-0752-3306949 Электронная почта: nora@shunmed.com Сайт: www.shunmed.com Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"	28. Reclamation Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China. Telephone: 0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Website: www.shunmed.com Authorised representative: LLC «HEALTH SYSTEMS KNOWLEDGE CENTER LTD»

Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232	Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st., 11A, building 2, floor/room/office 2/30,32/232
29. Расшифровка символов, применяемых при маркировке медицинского изделия	29. Explanation of symbols used in labelling the medical device
Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ; - логотип Shunmei; - схематичное изображение содержимого упаковки; - наименование и адрес производителя; - номер по каталогу; - код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ «Запрет на повторное применение»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»; - символ «Осторожно»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»; - символ «Изготовитель»; - символ «Не допускать воздействия солнечного света»; - символ «Температурный диапазон»; - QR-код; - Штрих-код; - символ «Апирогенно»; - символ «Стерилизация оксидом этилена»; - символ «Не допускать воздействия влаги»; - символ «Не стерилизовать повторно»; - символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»;	Inner package contains following information: - name of MD; - Shunmei logo; - schematic representation of the contents of the package; - name of manufacturer and address; - catalogue number; - batch code; - use by date; - date of manufacture; - symbol «Do not re-use»; - symbol «Do not use if package is damaged and consult instructions for use»; - symbol «Caution»; - symbol «Consult instructions for use or consult electronic instructions for use»; - symbol «Manufacturer»; - symbol «Keep away from sunlight»; - symbol «Temperature limit»; - QR-code; - Barcode; - symbol «Non-pyrogenic»; - symbol «Sterilized using ethylene oxide»; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize »; - symbol «Authorized representative in the European Community»; - information about the authorized representative in the European Community;

- сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - сведения о месте производства; - маркировка CE; - обозначение размера оболочки интродьюсера (например 4F); - надпись «Бедренный», или «Трансрадиальный», или «Бедренный+гидрофильное», или «Трансрадиальный+гидрофильное», в зависимости от варианта исполнения. Вторичная и транспортная упаковка содержат следующую информацию: - наименование МИ; - логотип Shunmei; - схематичное изображение содержимого упаковки; - количество в упаковке; - наименование и адрес производителя; - номер по каталогу; - код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ «Запрет на повторное применение»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»; - символ «Осторожно»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»; - символ «Изготовитель»; - символ «Не допускать воздействия солнечного света»; - символ «Температурный диапазон»; - QR-код; - Штрих-код; - символ «Апирогенно»; - символ «Стерилизация оксидом этилена»;	- information about the manufacturing site; - CE Marking; - designation of the size of the introducer sheath (for example 4F); - inscription «Femoral» or «Radial» or «Femoral+hydrophilic» or «Radial+hydrophilic», depending on the variant. Middle and Outer package contains following information: - name of MD; - Shunmei logo; - schematic representation of the contents of the package; - quantity in the package; - name of manufacturer and address; - catalogue number; - batch code; - use by date; - date of manufacture; - symbol «Do not re-use»; - symbol «Do not use if package is damaged and consult instructions for use»; - symbol «Caution»; - symbol «Consult instructions for use or consult electronic instructions for use»; - symbol «Manufacturer»; - symbol «Keep away from sunlight»; - symbol «Temperature limit»; - QR-code; - Barcode; - symbol «Non-pyrogenic»; - symbol «Sterilized using ethylene oxide»; - symbol «Keep dry»;
--	--

- символ «Не допускать воздействия влаги»; - символ «Не стерилизовать повторно»; - надпись «Требования безопасности и меры предосторожности: «Содержимое стерильно и апирогенно. В закрытой, неповрежденной упаковке. Только для одноразового использования. Не стерилизуйте повторно катетер или принадлежности каким-либо способом. Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный в случае повторного использования или повторной стерилизации принадлежностей для катетера». - символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - сведения о месте производства; - маркировка CE; - обозначение размера оболочки интродьюсера (например 4F); - надпись «Бедренный», или «Трансрадиальный», или «Бедренный +гидрофильное», или «Трансрадиальный+гидрофильное», в зависимости от варианта исполнения.	- symbol «Do not re-sterilize»; - inscription: «WARNINGS AND PRECAUTION: Contents Sterile And Non-pyrogen In Unopened, Undamaged Package. Single use only. Do not resterilize the catheter or accessories by any method. The manufacturer will not be responsible for any damages caused by re-use or resterilization of the catheter accessories.»; - symbol «Authorized representative in the European Community»; - information about the authorized representative in the European Community; - information about the manufacturing site; - CE Marking; - designation of the size of the introducer sheath (for example 4F); - inscription «Femoral» or «Radial» or «Femoral+hydrophilic» or «Radial+hydrophilic», depending on the variant.
---	---

Символы/Symbols:


	Caution/Осторожно		Keep dry/ Не допускать воздействия влаги
	Batch code/Код партии		Non-pyrogenic/Апирогенно
	Do not re-sterilize/ Не стерилизовать повторно		Do not use if package is damaged and consult instructions for use / Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Use by date/Использовать до		Do not re-use/ Запрет на повторное применение
	Sterilized using ethylene oxide / Стерилизация оксидом этилена		Date of manufacture/ Дата изготовления
	Catalogue number/Номер по каталогу		Consult instructions for use or consult electronic instructions for use / Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Manufacturer/Изготовитель		Keep away from sunlight/ Не допускать воздействия солнечного света
	Temperature limit / Температурный диапазон		Authorized representative in the European Community /Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	CE Marking/Маркировка CE	XXXX	Notified Body ID number/Идентификационный номер уполномоченного органа

Femoral

Shunmei

4F

SHUN GUIDER INTRODUCER SET

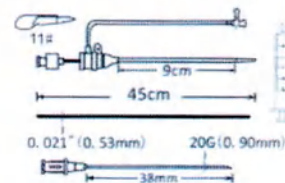

REF 615401

202311

LOT 2311015X

202610



SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.

Head office:
3rd Floor and R401 of building B, No. 8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com
EC REP Lotus NL B.V.
Add: Koningin Julianaplein 10,
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com



made in China

CE XXXX



01306956014454015

1732026101612311015X

SM-LB-4S-001 A.6
Effective date: 2021.05.10


Рисунок 15 Макет маркировки индивидуальной упаковки на примере варианта исполнения «Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)» /

Figure 15 «Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)» labeling layout on Inner package

Femoral

Shunmei[®] SHUN GUIDER INTRODUCER SET

4F

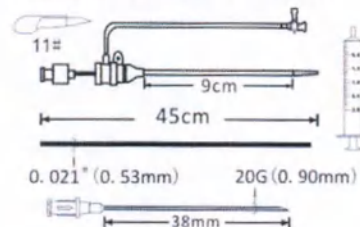

20 UNITS

REF 615401 202311

LOT 2311015X 202610

WARNINGS AND PRECAUTION:

Contents Sterile And Non-pyrogen In Unopened,
Undamaged Package

Single use only. Do not resterilize the catheter
or accessories by any method.

The manufacture will not be responsible for any
damages caused by re-use or re-sterilization
of the catheter accessories

SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.

Head office:

3rd Floor and R401 of building B,
No. 8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-0752-3306949

Email: nora@shunmed.com

Web: www.shunmed.com


EC REP Lotus NL B.V.

Add: Koningin Julianaplein 10,

1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

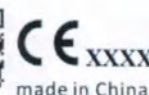

SM-LB-IS-001 A.6

Effective date: 2021.05.10


Рисунок 16 Макет маркировки вторичной упаковки на примере варианта исполнения «Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)» /

Figure 16 «Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)» labeling layout on Middle package

Femoral

Shunmei® SHUN GUIDER INTRODUCER SET

4F

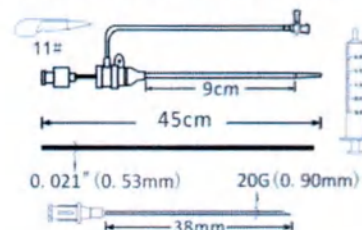

200 UNITS

REF 615401 202311

LOT 2311015X 202610

WARNINGS AND PRECAUTION:

Contents Sterile And Non-pyrogen In Unopened, Undamaged Package

Single use only. Do not resterilize the catheter or accessories by any method.

The manufacture will not be responsible for any damages caused by re-use or re-sterilization of the catheter accessories

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head office:

3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road,
Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REP Lotus NL B.V.
Add: Koningin Julianaplein 10,
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Tel: +31644168999
Email: peter@lotusnl.com



SM-LB-IS-001 A.6
Effective date: 2021.05.10

Рисунок 17 Макет маркировки транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 9 см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) и проводником (диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), длина 45 см)» /

Figure 17 « Shun Guider Introducer Set Shunmei diameter 4F (1.4 mm), length 9 cm femoral, with introducer needle 20G (diameter 0.90 mm, length 38 mm) and guidewire (diameter 0.021 inch (0.53 mm), length 45 cm)» labeling layout on Outer package

Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения

Набор интродьюсера диаметром X F (XX мм), длина X см Shun Guider, Shunmei для бедренного доступа, с интродьюсерной иглой XX G (диаметр XXX мм, длина XX мм) и проводником (диаметр XXXX дюйма (XXX мм), длина XX см), в составе:

1. Интродьюсер для бедренного доступа, диаметр X F (XX мм), длина X см – 1 шт.;
2. Дилататор сосудистый, длина XXX см – 1 шт.;
3. Проводник, диаметр XXXX дюйма (XXX мм), длина XX см – 1 шт.;
4. Устройство для введения проводника – 1 шт.;
5. Интродьюсерная игла XX G (диаметр XXX мм, длина XX мм) – 1 шт.;
6. Шприц, 2,5 мл – 1 шт.;
7. Скальпель – 1 шт.;
8. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China.

Место производства медицинского изделия:

Shunmei Medical Co., Ltd

1. Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China.

2. 3rd and 4th Floor, Building 7, Phase II, Innovation and Pioneer Park, Tianyue New District, Pingjiang County, Yueyang City, Hunan Province.

Серия (☐): см. на упаковке

Номер по каталогу (☐): см. на упаковке

Использовать до (☐): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции по применению.

Нетоксично

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

РУ и дата Регистрационного удостоверения:

Сделано в Китае

Рисунок 18 Пример макета маркировки для РФ/ Figure 18 Example labelling layout for RF

Дата выпуска или пересмотра инструкции	Date of issue or revision of instructions
27.05.2024 Версия 3	27.05.2024 Version 3

СЕРТИФИКАТ

/логотип/
ККСРМТ

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли - Торгово-
промышленная палата Китая**

02195532

Логотип «ККСРМТ»

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Торгово-промышленная палата Китая

/QR-код/

СЕРТИФИКАТ

№ 244403A0/026671

Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «Шунмей Медикал Ко. Лтд.» на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Печать:
ККСРМТ
СЕРТИФИКАТ
(24)

КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ

Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)

/подпись/

Подпись уполномоченного лица: Ху На

Дата: 29 мая 2024 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано

«Шунмей Медикал Ко. Лтд.» (Shunmei Medical Co., Ltd)

Организация

3-й этаж и R401 здание В, № 8 1-й дороги Цзиньлун,
промышленная зона Баолун, район Лунган, Шэньчжэнь
518116, Гуандун, Китай

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ту Чжэньцин

Фамилия, имя

27.05.2024 г.

Дата ДД.ММ.ГГГГ

/подпись/

Подпись

Печать:

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.» (SHUNMEI MEDICAL
CO., LTD) * ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Инструкция по применению
на медицинское изделие: «Набор интродьюсера Shun Guider, Shunmei, в вариантах исполнения»

2024

Печать:

КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ

ККСРМТ

(24)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем.

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать второго июля две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 34-1845

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



М.А. Корсик

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
112 лист(-а/-ов)

Нотариус

