
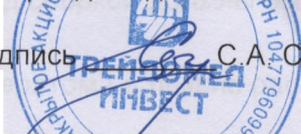


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "Трейдомед Инвест"

Личная подпись  С.А. Сутягин

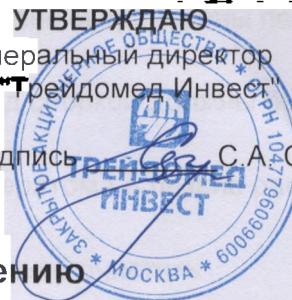

Инструкция по применению

материалы расходные к микроккератому: трубки вакуумные; лезвия одноразовые ONE, CB, M2; головки одноразовые "One Use," "CB Single Use", "M2 Single Use"
готовитель: фирма MORIA SA (Франция) 15 rue Geroges BESSE, 92160 ANTONY,
ce, Phone:+33146744674 Fax:+33146744690

ение

дные материалы, предназначенные для работы микроккератома.

зания

мные трубки используются для подсоединения к вакуумному кольцу, которое в свою очередь обеспечивает надежное присасывание к роговице для создания вакуума. Вакуумная а состоит непосредственно из трубки и капельной камеры, которая предназначена для вы вакуумного контура внутри консоли от утечки жидкости.

я предназначены для точного среза определенной толщины роговицы глаза. Лезвие представляет из себя пластину из хирургического металла с небольшой рукояткой для тва расположения лезвия в головку микроккератома.

ки одноразовые предназначены для среза роговицы и состоят из пластмассового корпуса и которого находится лезвие.

упреждения и меры предосторожности

чная или полная непроходимость трубок может появиться в результате сгибания, ививания в упаковке или скручивания при установке. Аспирация через частично рованную трубку может увеличить степень непроходимости. Поэтому необходимо льно проверять отсутствие изгибов трубки до и после ее установки.

омнениях относительно целостности трубок просим Вас возвращать их для обмена в изационной упаковке в фирму Мориа или ее представительство.

и, плохо присоединенные к консоли или к кольцу, могут также стать причиной аточной аспирации. Очень важно проверить целостность обоих коннекторов. Трубки ет заменять после каждого пациента

ка микроккератома и вспомогательные принадлежности представляют собой аточные и хрупкие устройства. Для того, чтобы обеспечить многие годы службы при и первоначальных характеристик точности и безопасности они требуют очень ожного обращения

изуально проверьте, чтобы на трубке не было никаких перегибов до и после ее установки.

астичное или полное перекрытие трубки может произойти вследствие неправильной ее кладки в упаковке или перекручивания при установке. Отсасывание через частично аблокированную трубку может еще больше усилить засорение и привести к потере вакуума во время операции.

фирма Moria настоятельно предостерегает против повторного использования вакуумных трубок, поскольку это может привести к следующему:

повреждению соединителя, что приведет к потере вакуума

повреждению вакуумного насоса

дите за тем, чтобы внутренние воздуховоды кольца не были засорены отходами ргической операции. Такие засоры могут привести к возникновению псевдо-аспирации и у потери вакуума.

- ❖ Все детали микрокератома должны быть тщательно очищены и проверены перед использованием.
- ❖ Головка, лезвие и вакуумное кольцо микрокератома перед сборкой должны быть промыты раствором BSS™ или другим подходящим раствором.
- ❖ Перед операцией нужно обработать глаз, головку микрокератома и лезвие раствором BSS™ или другим подходящим раствором
- ❖ После процедуры, все части микрокератома нужно тщательно очистить
- ❖ Головку микрокератома и все отсасывающие трубки нужно заменять после каждой хирургической процедуры.

Упаковка

Трубки вакуумные имеют стерильную полиэтиленовую упаковку, абсолютно герметичную размером 20X30 см.

Лезвия упакованы в стерильный пластмассовый контейнер, плотно прилегающий со всех сторон, герметичный, размером 4X5 см.

Головки имеют стерильную герметичную упаковку размером 7X7 см.

Не использовать расходные материалы в случае, если упаковка была повреждена!