

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГБОУ ВПО
«Новосибирский Государственный
медицинский университет»
Минздравсоцразвития России
Д.м.н., профессор
Маринкин И.О.

« »

2011 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ -Н»
А.И.Клевасов

« »

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Комплекта одежды хирургической одноразовой стерильной
«ЗДРАВМЕДТЕХ»

(стерильные и нестерильные шапочка, маска, халат, фартук,
бахилы, костюм (куртка, брюки), комбинезон, нарукавники)
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ»
(стерильные и нестерильные шапочка, маска, халат, фартук, бахилы, костюм
(куртка, брюки), комбинезон, нарукавники) применяется с целью создания
барьера между операционным полем и потребителем.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ»
предназначен для применения в операционных, родовых, перевязочных,
процедурных кабинетах лечебных учреждений для защиты персонала от
возможного профессионального заражения.

Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «ЗДРАВМЕДТЕХ»
изготовлен из нетканого многослойного материала на полипропиленовой основе,
из материала нетканого «Softesse».

Комплекты поставляются в стерильном виде в индивидуальной упаковке
готовые к эксплуатации.

Комплекты должны быть стерильными. Стерилизация осуществляется
радиационным способом согласно инструкции по стерилизации,
разработанной уполномоченной организацией.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны

Наименование комплекта,

Наименование страны-изготовителя;

Наименование фирмы-изготовителя;

Основное назначение комплекта или область его применения;

Правила и условия безопасного хранения, транспортировки;

Основные потребительские свойства или характеристики;

Информация об обязательной сертификации;
Юридический адрес изготовителя и (или) продавца.
Срок годности и дату изготовления;
Номер партии.

А также: состав, размеры, плотность материалов, количество каждого изделия, номер комплектовщика и ОТК.

Средний срок годности стерильных комплектов не менее 5 лет.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомиться с этикеткой.
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву.
- Выложить халат в упаковочной пеленке на маточный или сестринский стол.
- Развернуть упаковочную пеленку.
- Надеть куртку и брюки хирургические.
- Надеть шапочку-колпак, бахилы, маску хирургическую.
- При помощи операционной медсестры надеть стерильный халат.

УТИЛИЗАЦИЯ:

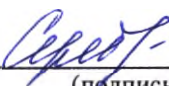
Дезинфекция комплекта после его использования возможна автоклавированием, камерным или химическими методами.

Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по группе 1 по ГОСТ 15150.

Зам.генерального директора
по производству


(подпись)

Серебрякова И.Д.

2 лист

