

РЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

БОУ ВПО
бирский Государственный
динский университет»
Минздравсоцразвития России
Д.м.н., профессор
Маринкин И.О.



« » _____

Генеральный директор
ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ -Н»
А.И.Клевасов



« » _____

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Комплекта белья хирургического одноразового стерильного
«ЗДРАВМЕДТЕХ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект белья хирургического одноразового стерильного «ЗДРАВМЕДТЕХ» предназначен для применения при операционных вмешательствах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект белья хирургического одноразового стерильного «ЗДРАВМЕДТЕХ» предназначен для применения при операционных вмешательствах.

Комплект изготовлен из нетканого материала.

Комплект поставляется в стерильном виде в индивидуальной упаковке готовый к эксплуатации.

Стерилизация осуществляется радиационным способом. Значение поглощенной дозы в продукции 20+/- 5 килотрей.

Упаковка составляющих комплектов герметична.

На этикетке, находящейся внутри упаковки, указаны состав, размеры, плотность и количество каждого изделия, срок годности комплекта, дата выпуска, номер партии.

Гарантийный срок хранения 5 лет.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе изделия не требуется.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Ознакомится с этикеткой;
- Аккуратно вскрыть наружный пакет по линии отрыва от насечки параллельно сварному шву;
- Выложить комплект в упаковочной пленке на маточный или сестринский стол;
- Развернуть упаковочную пленку;

- Простыню, предназначенную для покрытия операционного стола, разложить на операционном столе сначала в продольном, затем в поперечном направлении;
- На простыне с операционной пленкой снять покрытие с липкого слоя, зафиксировать простыню на пациенте;
- Расправить простыню с операционной пленкой в сторону дуги, закрепить при помощи фиксаторов; затем расправить простыню в сторону ног; расправить карманы вокруг операционного поля;
- Снять покрытие с операционной пленки и зафиксировать в области операционного поля;
- Дополнительные простыни использовать в ходе операции.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Дезинфекция комплекта после его использования возможна автоклавированием, камерным или химическими методами. Простерилизованный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения 1 ГОСТ 15150.

Зам.генерального директора
по производству



Серебрякова И.Д.

