

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce



证明书 CERTIFICATE



244403A0/026669

号码 No.

兹证明：在所附文件上的深圳市顺美医疗股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Hu Na

日期: 2024年05月29日

(Date: May. 29, 2024)

证明 网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY



**Инструкция по применению на медицинское изделие:
«Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в
вариантах исполнения»**

**Instruction for use
«Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty in variations»**

2024

Наименование медицинского изделия	Name of the medical device
I. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в вариантах исполнения	I. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty in variations
1. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, типоразмеры:	1. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, sizes:
1.1. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм	1.1. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 5 mm
1.2. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 8 мм	1.2. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 8 mm
1.3. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 9 мм	1.3. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 9 mm
1.4. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 10 мм	1.4. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 10 mm
1.5. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 12 мм	1.5. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 12 mm
1.6. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 15 мм	1.6. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 15 mm
1.7. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 18 мм	1.7. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 18 mm
1.8. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 20 мм	1.8. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 20 mm
1.9. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 25 мм	1.9. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 25 mm
1.10. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 30 мм	1.10. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 30 mm
1.11. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 5 мм	1.11. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 5 mm
1.12. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 8 мм	1.12. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 8 mm
1.13. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 9 мм	1.13. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 9 mm
1.14. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 10 мм	1.14. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 10 mm
1.15. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 10 мм	1.15. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 10 mm

- 1.33. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 9 mm
- 1.34. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 10 mm
- 1.35. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 12 mm
- 1.36. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 15 mm
- 1.37. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 18 mm
- 1.38. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 20 mm
- 1.39. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 25 mm
- 1.40. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 30 mm
- 1.41. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 5 mm
- 1.42. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 8 mm
- 1.43. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 9 mm
- 1.44. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 10 mm
- 1.45. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 12 mm
- 1.46. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 15 mm
- 1.47. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 18 mm
- 1.48. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 20 mm
- 1.49. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 25 mm
- 1.50. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty

1.103. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 9 mm

1.104. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 10 mm

1.105. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 12 mm

1.106. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 15 mm

1.107. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 18 mm

1.108. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 20 mm

1.109. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 25 mm

1.110. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 30 mm

1.111. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 5 mm

1.112. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 8 mm

1.113. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 9 mm

1.114. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 10 mm

1.115. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 12 mm

1.116. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 15 mm

1.117. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 18 mm

1.118. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 20 mm

1.119. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty
PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 25 mm

1.120. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty

ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 30 мм 1.121. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 5 мм 1.122. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 8 мм 1.123. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 9 мм 1.124. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 10 мм 1.125. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 12 мм 1.126. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 15 мм 1.127. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 18 мм 1.128. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 20 мм 1.129. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 25 мм 1.130. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм 2. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, типоразмеры: 2.1 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм 2.2 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 8 мм 2.3 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 9 мм 2.4 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 10 мм 2.5 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 12 мм 2.6 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной	PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 30 mm 1.121. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 5 mm 1.122. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 8 mm 1.123. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 9 mm 1.124. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 10 mm 1.125. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 12 mm 1.126. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 15 mm 1.127. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 18 mm 1.128. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 20 mm 1.129. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 25 mm 1.130. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 30 mm 2. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, sizes: 2.1 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 6 mm 2.2 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 8 mm 2.3 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 9 mm 2.4 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 10 mm 2.5 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 12 mm 2.6 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC
--	---

[illegible]

ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 6 мм	Loach, balloon size: 3.0 mm x 6 mm
2.42 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 8 мм	2.42 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 8mm
2.43 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 9 мм	2.43 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 9 mm
2.44 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 10 мм	2.44 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 10 mm
2.45 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 12 мм	2.45 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 12mm
2.46 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 15 мм	2.46 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 15 mm
2.47 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 18 мм	2.47 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 18 mm
2.48 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 20 мм	2.48 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 20mm
2.49 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 25 мм	2.49 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 25 mm
2.50 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 30 мм	2.50 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0 mm x 30 mm
2.51 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 6 мм	2.51 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 6 mm
2.52 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 8 мм	2.52 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 8mm
2.53 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 9 мм	2.53 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 9 mm
2.54 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 10 мм	2.54 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 10 mm
2.55 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 12 мм	2.55 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 12 mm
2.56 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 15 мм	2.56 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 15 mm
2.57 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 18 мм	2.57 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 18 mm
2.58 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 20 мм	2.58 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 20 mm

ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 15 мм	Loach, Balloon Size: 3.75mm x 15 mm
2.77 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 18 мм	2.77 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 18 mm
2.78 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 20 мм	2.78 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.75mm x 20 mm
2.79 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 25 мм	2.79 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 25 mm
2.80 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 30 мм	2.80 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 30 mm
2.81 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 6 мм	2.81 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 6 mm
2.82 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 8 мм	2.82 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 8 mm
2.83 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 9 мм	2.83 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 9 mm
2.84 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 10 мм	2.84 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 10 mm
2.85 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 12 мм	2.85 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 12 mm
2.86 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 15 мм	2.86 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 15 mm
2.87 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 18 мм	2.87 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 18 mm
2.88 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 20 мм	2.88 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 20 mm
2.89 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 25 мм	2.89 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 25 mm
2.90 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм	2.90 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 30 mm
2.91 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 6 мм	2.91 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 6 mm
2.92 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 8 мм	2.92 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.5 mm x 8 mm
2.93 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 9 мм	2.93 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 9 mm

2.94 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 10 мм	2.94 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 10 mm
2.95 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 12 мм	2.95 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 12 mm
2.96 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 15 мм	2.96 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 15 mm
2.97 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 18 мм	2.97 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 18 mm
2.98 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 20 мм	2.98 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 20 mm
2.99 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 6 мм	2.99 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 5.0 mm x 6 mm
2.100 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 8 мм	2.100 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0mm x 8 mm
2.101 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 9 мм	2.101 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 9 mm
2.102 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 10 мм	2.102 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 10 mm
2.103 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 12 мм	2.103 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 12 mm
2.104 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 15 мм	2.104 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 15 mm
2.105 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 18 мм	2.105 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0mm x 18 mm
2.106 Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм	2.106 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 20 mm
II. Эксплуатационная документация	II. Operational documentation
1. Инструкция по применению	1. Instructions for use
Назначение медицинского изделия	Purpose of the medical device
Предназначено для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозированного участка коронарной артерии или шунта путем контролируемого раздувания эластичного баллона на	Intended for use in percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) for dilatation of stenotic coronary artery or bypass graft stenosis by controlled inflation of an elastic balloon at the distal end of the catheter for the purpose of improving myocardial perfusion.

дистальном конце катетера с целью улучшения кровоснабжения миокарда. Катетер NC Loach также может использоваться для дилатации баллонорасширяемых стентов после их установки в коронарных артериях.	NC Loach Catheter can also be used for post-dilatation of deployed balloon-expandable stent in coronary arteries.
Показания Баллонная дилатация стенозированного участка коронарной артерии или шунта с целью улучшения кровоснабжения миокарда, у пациентов со стабильной стенокардией, нестабильной стенокардией, атипичными проявлениями ишемии миокарда (безболевая ишемия, аритмии, нетипичная локализация и иррадиация болей при ангинозном приступе), острым инфарктом миокарда с элевацией ST-сегмента или без элевации, высоким кардиальным риском по результатам нагрузочных тестов. Катетер NC Loach также может использоваться для дилатации баллонорасширяемых стентов после их установки в коронарных артериях.	Indications For balloon dilatation of the affected area of the coronary artery or bypass for stenosis to improve myocardial perfusion in patients with stable angina, unstable angina, anginal equivalent (painless ischemia, arrhythmias, non-typical localization and irradiation of pain during an angina attacks), acute ST-elevation myocardial infarction, non-ST-elevation myocardial infarction, high-risk stress testing. NC Loach Catheter can also be used for post-dilatation of deployed balloon-expandable stent in coronary arteries.
Противопоказания Противопоказания для применения Катетера баллонного дилатационного Shunmei для коронарной ангиопластики: - Выраженный стеноз ствола левой коронарной артерии без предшествующего шунтирования - Спазм коронарной артерии при отсутствии значительного стеноза - Беременность - Кормление грудью - Одновременное проведение химиотерапии. Противопоказания для проведения ЧТКА: - Ригидность или кальцификация стенки коронарной артерии, эксцентрический стеноз - Хроническая тотальная окклюзия коронарных артерий с тяжелой кальцификацией - Множественные протяженные поражения коронарных артерий - Рефрактерная сердечная недостаточность (фракция выброса <35%)	Contraindications Contraindications for the use of Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty: - Unprotected left main coronary artery - Coronary artery spasm in the absence of significant stenosis - Pregnancy - Breast-feeding - Chemotherapy. Contraindications for the use of PTCA: - Coronary artery is rigid or calcified, eccentric stenosis - Chronic total occlusive disease with severe calcification. - Multiple extensive diffuse lesions - Patient with refractory heart failure (ejection fraction <35%) - Severe ventricular arrhythmia

- Тяжелая желудочковая аритмия Противопоказания для проведения ЧКВ: • Коагулопатии • Известная аллергия на контрастное вещество • Известная аллергия на антиагреганты и/или материалы стента • Диаметр целевого сосуда менее 2,25 мм • Предварительная дилатация кальцинированных поражений недостаточна • Общие заболевания с высоким риском развития тяжелых осложнений и высокой летальности • Диффузное поражение артерии малого калибра или аутовенозного коронарного шунта • Другие заболевания коронарных артерий, не подлежащие ЧКВ	Contraindications for PCI: - Hemorrhagic diseases - Allergy to contrast agent - Those who are allergic to antiplatelet agents and/or stent materials. - The diameter of the target vessel is less than 2.25 mm. - Preliminary dilatation of severe calcified lesions is not sufficient. - Diseases with severe complications and high mortality. - Diffusely affected small-caliber artery or vein graft. - Other coronary diseases not amenable to PCI.
Возможные осложнения и побочные эффекты Потенциальные нежелательные явления / побочные эффекты и осложнения, связанные с использованием Катетера баллонного дилатационного Shunmei для коронарной ангиопластики: • Острый инфаркт миокарда • Кардиогенный шок • Аритмии, включая фибрилляцию желудочков • Артериовенозная фистула • Спазм коронарной артерии • Феномен «no-reflow» • Диссекция, перфорация, разрыв или повреждение, аневризма коронарной артерии. • Лекарственные реакции, аллергическая реакция на контрастное вещество • Гематома или кровотечение в месте сосудистого доступа • Эмболия • Инфицирование • Рестеноз расширенного сосуда	Possible complications and side effects Possible adverse events / side effects and complications associated with the use of Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty: • Acute myocardial infarction • Cardiogenic shock • Arrhythmias, including ventricular fibrillation • Arteriovenous fistula • Coronary artery spasm • No-reflow phenomenon • Coronary dissection, perforation, rupture or injury, aneurysm. • Drug reactions, allergic reaction to contrast agent. • Hematoma or bleeding • Embolism • Infection • Restenosis of the dilated vessel • Hypo/hypertension • Unstable angina • Complete coronary artery or bypass graft occlusion

• Артериальная гипо/гипертензия • Нестабильная стенокардия • Полная окклюзия коронарной артерии или шунта • Экстренная операция аортокоронарного шунтирования • Разрыв баллона • Острое нарушение мозгового кровообращения • Почечная недостаточность Возможные побочные эффекты и осложнения, связанные с использованием Катетера NC Loach: • Подострый тромбоз стента • Дислокация/миграция стента	• Emergent bypass surgery • Balloon burst • Stroke • Kidney failure Possible side effects and complications associated with the use of NC Loach Catheter: • Subacute stent thrombosis • Stent dislocation/migration
Сведения о производителе	Information about manufacturer
Наименование производителя: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China	Name of manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Manufacturing site: Shunmei Medical Co., Ltd Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Условия применения	Usage conditions
- Работа в чистой, светлой, стерильной среде - Под рентгеноскопией - В операционной	- Work in a clean, bright, sterile environment - Under fluoroscopy - In the operating room
Потенциальный потребитель	Potential consumer
Интервенционные кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, владеющие методикой вмешательства.	Interventional cardiologist, endovascular intervention specialist, cardiovascular surgeons, trained in intervention technique.
Целевая группа пациентов	Target patient population

Целевая группа – взрослые пациенты (старше 18 лет)	Patient Profile - adults (18+).
Требования безопасности и меры предосторожности	Warnings and precautions
1) Катетер PTCA Shun Loach Предупреждения Данное изделие разработано и предназначено только для одноразового использования. Не подвергайте повторной обработке, повторной стерилизации и/или повторному использованию, так как это потенциально может ухудшить работу устройства и увеличить риск перекрестного заражения, что может привести к травме, заболеванию или смерти пациента. Чтобы снизить частоту повреждения сосудов, диаметр надутго баллона должен приближаться к диаметру сосуда, расположенного проксимальнее и дистальнее места стеноза. Чрескожную транслуминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) следует проводить только в больницах, где можно быстро выполнить экстренное аортокоронарное шунтирование в случае потенциально опасного или опасного для жизни осложнения. ЧТКА у пациентов, которые не являются приемлемыми кандидатами на операцию аортокоронарного шунтирования, требует тщательного рассмотрения, включая возможную гемодинамическую поддержку во время ЧТКА, поскольку лечение этой группы пациентов сопряжено с особым риском. Используйте только рекомендованную среду для надувания баллона. Никогда не используйте воздух или любую газообразную среду для надувания баллона. Давление баллона не должно превышать номинальное давление разрыва (RBP). RBP основан на результатах испытаний in vitro. По крайней мере, 99,9% баллонов (с достоверностью 95%) не лопнут при уровне RBP или ниже него. Для предотвращения избыточного давления рекомендуется использовать изделие контроля давления. Когда катетер подвергается воздействию сосудистой системы, манипулировать им следует под высококачественным рентгеноскопическим наблюдением. Не продвигайте и не вытягивайте катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут под вакуумом. Если во время манипуляции возникает	1) PTCA Shun Loach catheter Warnings This device is designed and intended for single use only. Do not reprocess, resterilize and/or reuse, as it can potentially compromise device performance and increase the risk of cross infection, which may lead to injury, illness or death of the patient. To reduce the incidence rate for vessel damage, the inflated diameter of the balloon should approximate the diameter of the vessel just proximal and distal to the stenosis. Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) should only be performed at hospitals where emergency coronary artery bypass graft surgery can be quickly performed in the event of a potentially injurious or life-threatening complication. PTCA in patients who are not acceptable candidates for coronary artery bypass graft surgery requires careful consideration, including possible hemodynamic support during PTCA, as treatment of this patient population carries special risk. Use only the recommended balloon inflation medium. Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon. Balloon pressure should not exceed the rated burst pressure (RBP). The RBP is based on results of in vitro testing. At least 99.9% of the balloons (with a 95% confidence) will not burst at or below their RBP. Use of a pressure-monitoring device is recommended to prevent over pressurization. When the catheter is exposed to the vascular system, it should be manipulated while under high quality fluoroscopic observation. Do not advance or retract the catheter unless the balloon is fully deflated under vacuum. If resistance is met during manipulation, determine the cause of the resistance before proceeding. Do not use, or attempt to straighten a catheter if it has become bent or kinked; this may result in the catheter breaking. Instead, prepare a new catheter. The removal and dispose of the product should only be performed by

сопротивление, прежде чем продолжить, определите причину сопротивления.

Не используйте и не пытайтесь выпрямить катетер, если он погнулся или перекручен; это может привести к поломке катетера. Вместо этого подготовьте новый катетер.

Извлечение и утилизацию изделия должны выполнять только хирурги, прошедшие соответствующую подготовку.

Используйте катетер до срока, указанного на упаковке.

Меры предосторожности

Используйте изделие в течение срока годности, указанного на упаковке.

Это изделие является стерильным апиrogenным изделием. Не используйте, если упаковка повреждена.

Не вставляйте катетер в диспенсер повторно после процедурного использования.

Перед использованием необходимо подробно изучить использование и функции этого изделия, чтобы гарантировать, что его размер подходит для конкретной процедуры, для которой он будет использоваться, а также обеспечить безопасность и эффективность использования.

Во время процедуры пациенту при необходимости должна быть назначена соответствующая антикоагулянтная и коронарная вазодилататорная терапия. После процедуры антикоагулянтную терапию следует продолжать в течение периода времени, определяемого хирургом.

Следует использовать ручное изделие расширения давления, а не автоматическое изделие расширения.

Перед использованием удалите воздух и жидкость внутри баллона. Не используйте контрастное вещество на масляной основе, органические растворители или спирты; существует вероятность утечки катетера, его повреждения или потери смазки.

Изделие должно использоваться только хирургами, имеющими опыт ангиографии при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике.

surgeons who have recieved adequate training.

Use the catheter prior to the "USE BY-DATE" specified on the package.

Precautions

Use the product in the period of validity specified on the package.

This product is a kind of sterile non-pyrogenic product. Do not use if the package is damaged.

Do not reinsert the catheter into the coil dispenser after procedural use.

The usage and functions of this product must be known in details before using so as to ensure that its size is suitable for the specific procedure for which it is to be used, and to ensure safety and effectiveness in using.

During the procedure, appropriate anticoagulant and coronary vasodilator therapy must be provided to the patient as needed. After the procedure, anticoagulant therapy should be continued for a period of time as determined by the surgeon.

A manual pressure expansion device should be used, rather than an automatic expansion device.

Purge the air and liquid inside the balloon before using. Do not use oil-based contrast medium, organic solvents or alcohols; there is a possibility of catheter leak, damage or lubrication loss.

The device should be used only by surgeons trained in angiography of percutaneous transluminal coronary angioplasty.

Discard all disposable devices used during this procedure per local requirements for medical device waste disposal.

Утилизируйте все одноразовые устройства, использованные во время этой процедуры, в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов медицинского оборудования.

2) Катетер NC Loach

Предупреждения

Данное изделие разработано и предназначено только для одноразового использования. Не подвергайте повторной обработке, повторной стерилизации и/или повторному использованию, так как это потенциально может ухудшить работу устройства и увеличить риск перекрестного заражения, что может привести к травме, заболеванию или смерти пациента.

Чтобы снизить частоту повреждения сосудов, диаметр надутго баллона должен приближаться к диаметру сосуда, расположенного проксимальнее и дистальнее места стеноза.

Чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) следует проводить только в больницах, где можно быстро выполнить экстренное аортокоронарное шунтирование в случае потенциально опасного или опасного для жизни осложнения.

ЧТКА у пациентов, которые не являются приемлемыми кандидатами на операцию аортокоронарного шунтирования, требует тщательного рассмотрения, включая возможную гемодинамическую поддержку во время ЧТКА, поскольку лечение этой группы пациентов сопряжено с особым риском.

Используйте только рекомендованную среду для надувания баллона. Никогда не используйте воздух или любую газообразную среду для надувания баллона.

Давление баллона не должно превышать номинальное давление разрыва (RBP). RBP основан на результатах испытаний in vitro. По крайней мере, 99,9% баллонов (с достоверностью 95%) не лопнут при уровне RBP или ниже него. Для предотвращения избыточного давления рекомендуется использовать изделие контроля давления. Когда катетер подвергается воздействию сосудистой системы, манипулировать им следует под высококачественным рентгеноскопическим наблюдением. Не продвигайте и не

2) NC Loach catheter

Warnings

This device is designed and intended for single use only. Do not reprocess, resterilize and/or reuse, as it can potentially compromise device performance and increase the risk of cross infection, which may lead to injury, illness or death of the patient.

To reduce the incidence rate for vessel damage, the inflated diameter of the balloon should approximate the diameter of the vessel just proximal and distal to the stenosis.

Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) should only be performed at hospitals where emergency coronary artery bypass graft surgery can be quickly performed in the event of a potentially injurious or life-threatening complication.

PTCA in patients who are not acceptable candidates for coronary artery bypass graft surgery requires careful consideration, including possible hemodynamic support during PTCA, as treatment of this patient population carries special risk.

Use only the recommended balloon inflation medium. Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon.

Balloon pressure should not exceed the rated burst pressure (RBP). The RBP is based on results of in vitro testing. At least 99.9% of the balloons (with a 95% confidence) will not burst at or below their RBP. Use of a pressure-monitoring device is recommended to prevent over pressurization.

When the catheter is exposed to the vascular system, it should be manipulated while under high quality fluoroscopic observation. Do not advance or retract the catheter unless the balloon is fully deflated under vacuum. If resistance is met during manipulation, determine the cause of the resistance before proceeding.

Do not use, or attempt to straighten a catheter if it has become bent or kinked; this may result in the catheter breaking. Instead, prepare a new

втягивайте катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут под вакуумом. Если во время манипуляции возникает сопротивление, прежде чем продолжить, определите причину сопротивления.

Не используйте и не пытайтесь выпрямить катетер, если он погнулся или перекручен; это может привести к поломке катетера. Вместо этого подготовьте новый катетер.

Извлечение и утилизацию изделия должны выполнять только хирурги, прошедшие соответствующую подготовку.

Используйте катетер до срока, указанного на упаковке.

Меры предосторожности

Используйте изделие в течение срока годности, указанного на упаковке.

Это изделие является стерильным апиогенным изделием. Не используйте, если упаковка повреждена.

Не вставляйте катетер в диспенсер повторно после процедурного использования.

Перед использованием необходимо подробно изучить использование и функции этого изделия, чтобы гарантировать, что его размер подходит для конкретной процедуры, для которой он будет использоваться, а также обеспечить безопасность и эффективность использования.

Во время процедуры пациенту при необходимости должна быть назначена соответствующая антикоагулянтная и коронарная вазодилаторная терапия. После процедуры антикоагулянтную терапию следует продолжать в течение периода времени, определяемого хирургом.

Следует использовать ручное изделие расширения давления, а не автоматическое изделие расширения.

Перед использованием удалите воздух и жидкость внутри баллона. Не используйте контрастное вещество на масляной основе, органические растворители или спирты; существует вероятность утечки катетера, его повреждения или потери смазки.

Изделие должно использоваться только хирургами, имеющими опыт ангиографии при чрескожной транслюминальной коронарной

катетер.

The removal and dispose of the product should only be performed by surgeons who have recieved adequate training.

Use the catheter prior to the "USE BY-DATE" specified on the package.

Precautions

Use the product in the period of validity specified on the package.

This product is a kind of sterile non-pyrogenic product. Do not use if the package is damaged.

Do not reinsert the catheter into the coil dispenser after procedural use.

The usage and functions of this product must be known in details before using so as to ensure that its size is suitable for the specific procedure for which it is to be used, and to ensure safety and effectiveness in using.

During the procedure, appropriate anticoagulant and coronary vasodilator therapy must be provided to the patient as needed. After the procedure, anticoagulant therapy should be continued for a period of time as determined by the surgeon.


A manual pressure expansion device should be used, rather than an automatic expansion device.

Purge the air and liquid inside the balloon before using. Do not use oil-based contrast medium, organic solvents or alcohols; there is a possibility of catheter leak, damage or lubrication loss.

The device should be used only by surgeons trained in angiography of percutaneous transluminal coronary angioplasty.

Discard all disposable devices used during this procedure per local requirements for medical device waste disposal.

ангиопластике. Утилизируйте все одноразовые устройства, использованные во время этой процедуры, в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов медицинского оборудования	
Изображение и описание изделия	Picture and description of device
I. Катетер для баллонной дилатации PTCA Shun Loach: Катетер для баллонной дилатации PTCA Shun Loach состоит из проксимальной и дистальной частей. Проксимальная часть состоит из гипотрубки и разъема. Стальная конструкция гипотрубки разработана для оптимизации способности проксимального толкания с плавным переходом к дистальной части, специально разработанной для обеспечения высокой проходимости. Баллон, внутренний корпус, внешний корпус и рентгеноконтрастный платиновый маркер(ы) составляют дистальную часть. Один (для диаметров 1,0–1,5 мм) или два (для диаметров 1,75–4,0 мм) рентгеноконтрастных платиновых маркера указывают положение баллона в кровеносном сосуде. Катетер совместим с проводниковыми катетерами 5F или большего размера. Внутренний просвет катетера принимает стандартный проводник ЧТКА диаметром 0,014 дюйма. Проксимальная часть проводника входит в кончик катетера и коаксиально продвигается из проксимального порта катетера, тем самым обеспечивая как коаксиальное наведение, так и быструю замену катетеров с помощью одного проводника стандартной длины. На стержне гипотрубки расположены две отмеченные секции, указывающие положение катетера относительно кончика плечевого или бедренного проводникового катетера. Структурная схема представлена на рис. 1.	I. PTCA Shun Loach: PTCA Shun Loach Balloon Dilatation Catheter is made up of proximal and distal subassemblies. The proximal subassembly consists of hypotube and hub. The hypotube steel construction is designed to optimize proximal push ability with a smooth transition to a distal shaft specifically designed to be highly traffic ability. The balloon, inner body, outer body and radiopaque platinum marker(s) comprise the distal subassembly. One (for □1.0- 1.5mm) or two (for □1.75-4.0mm) radiopaque platinum marker(s) indicate the position of balloon in blood vessel. The catheter is compatible with 5F or larger guiding catheters. The internal lumen of the catheter accepts a standard 0.014" PTCA guide wire. The proximal part of the guide wire enters the catheter's tip and advances coaxially out the catheter's proximal port, thereby allowing both coaxial guidance and rapid exchange of catheters with a single standard length guide wire. Two marked sections are located on the hypotube shaft to indicate catheter position relative to the tip of either a brachial or femoral guiding catheter. The structure diagram is shown in Fig. 1.

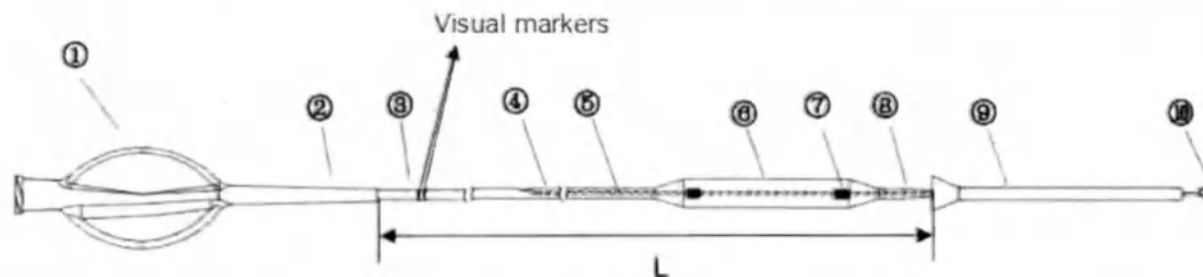

① Разъем/Hub	② Разгрузочная муфта/ Strain relief	③ Гипотрубка/ Hypotube	④ Дистальный внешний корпус/ Distal Outer body	⑤ Дистальный внутренний корпус/ Distal Inner body
⑥ Баллон/ Balloon	⑦ Рентгеноконтрастные маркеры/ Radiopaque Marker Bands	⑧ Кончик катетера/ Catheter tip	⑨ Защитный чехол баллона/ Balloon Sheath	⑩ Стиллет/Stylet

Примечание/Note:

L: Эффективная длина/L: Effective length

Visual markers: Визуальные маркеры

Гипотрубка представляет собой трубку из нержавеющей стали с покрытием из ПТФЭ, которая используется в катетере для баллонной дилатации **PTCA Shun Loach**./ The hypotube is a PTFE-coated stainless steel tube that is used in the PTCA Shun Loach Balloon Dilatation Catheter

Рисунок. 1 Структурная схема изделия/Figure 1. Medical device diagram

II. Катетер для коронарной дилатации **NC Loach**:


Катетер для коронарной дилатации **NC Loach** состоит из проксимальной и дистальной частей. Проксимальная часть состоит из гипотрубки и разъема. Стальная конструкция гипотрубки разработана для оптимизации способности проксимального толкания с плавным переходом к дистальной части, специально разработанной для обеспечения высокой проходимости. Баллон, внутренний корпус, внешний корпус и рентгеноконтрастный платиновый маркер(ы) составляют дистальную часть. Два рентгеноконтрастных платиновых маркера указывают положение баллона в кровеносном сосуде. Катетер совместим с проводниковыми катетерами 5F или большего размера. Внутренний просвет катетера принимает стандартный проводник ЧТКА диаметром 0,014 дюйма. Проксимальная часть проводника входит в кончик катетера и коаксиально продвигается из

II. **NC Loach**:

NC Loach coronary dilatation catheter is made up of proximal and distal subassemblies. The proximal subassembly consists of hypotube and hub. The hypotube steel construction is designed to optimize proximal push ability with a smooth transition to a distal shaft specifically designed to be highly traffic ability. The balloon, inner body, outer body and radiopaque platinum markers comprise the distal subassembly. Two radiopaque platinum markers indicate the position of balloon in blood vessel. The catheter is compatible with 5F or larger guiding catheters. The internal lumen of the catheter accepts a standard 0.014" PTCA guide wire. The proximal part of the guide wire enters the catheter's tip and advances coaxially out the catheter's proximal port, thereby allowing both coaxial guidance and rapid exchange of catheters with a single

проксимального порта катетера, тем самым обеспечивая как коаксиальное наведение, так и быструю замену катетеров с помощью одного проводника стандартной длины. На стержне гипотрубки расположены две отмеченные секции, указывающие положение катетера относительно кончика плечевого или бедренного проводникового катетера. Структурная схема представлена на рис. 2.

standard length guide wire. Two marked sections are located on the hypotube shaft to indicate catheter position relative to the tip of either a brachial or femoral guiding catheter. The structure diagram is shown in Fig. 2.

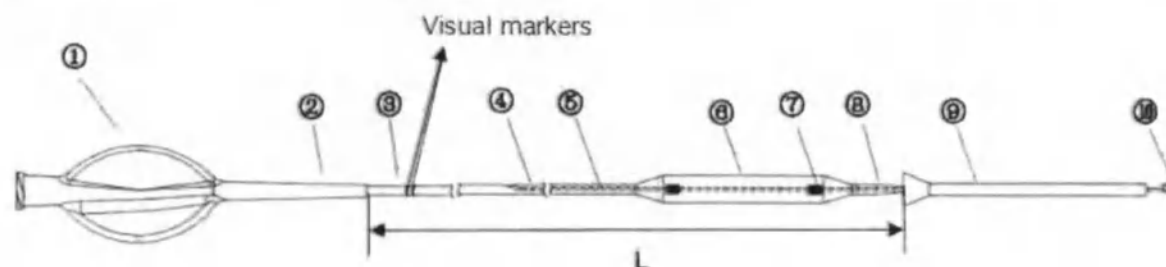

① Разъем/Hub	② Разгрузочная муфта/ Strain relief	③ Гипотрубка/ Hypotube	④ Дистальный внешний корпус/ Distal Outer body	⑤ Дистальный внутренний корпус/ Distal Inner body
⑥ Баллон/ Balloon	⑦ Рентгеноконтрастные маркеры/ Radiopaque Marker Bands	⑧ Кончик катетера/ Catheter tip	⑨ Защитный чехол баллона/ Balloon Sheath	⑩ Стиллет/Stylet

Примечание/Note:

L: Эффективная длина/L: Effective Length

Visual markers: Визуальные маркеры

Гипотрубка представляет собой трубку из нержавеющей стали с покрытием из ПТФЭ, которая используется в катетере для коронарной дилатации **NC Loach**./ The hypotube is a PTFE coated stainless steel tube used in the **NC Loach** coronary dilation catheter.

Рисунок. 2 Структурная схема изделия/Figure 2. Medical device diagram

Подготовка к использованию	Preparation for use
1) Катетер PTCA Shun Loach Перед использованием тщательно осмотрите все оборудование на наличие дефектов. Осмотрите дилатационный катетер на наличие	1) PTCA Shun Loach catheter Prior to use, examine all equipment carefully for defects. Examine the dilatation catheter for bends, kinks or other damage. Do not use any

изгибов, перегибов и других повреждений. Не используйте неисправное оборудование.

Подготовьте оборудование для использования, следуя инструкциям производителя или стандартной процедуре.

Выполните следующие шаги, чтобы подготовить катетер ПТКА к использованию:

1) Приготовьте контрастное вещество (стерильная смесь контрастного вещества и физиологического раствора 50:50). Не используйте контрастное вещество, в состав которого входят компоненты этиодола, липиодола или аналогичных веществ.

2) Снимите стилет с кончика катетера; Снимите защитный чехол баллона.

3) Промывание катетера для баллонной дилатации ПТКА: прикрепите шприц, наполненный физиологическим раствором, к инструменту для промывания, вставьте инструмент для промывки в дистальный конец катетера и введите физиологический раствор в просвет. Следуйте этой процедуре для последующей промывки.

4) Подготовьте изделие для раздувания с рекомендуемым контрастным веществом в соответствии с инструкциями производителя.

5) Удалите воздух из сегмента баллона, выполнив следующую процедуру:

а. Заполните шприц инфляционного устройства объемом 20 мл примерно 4 мл контрастного вещества.

б. После прикрепления шприца или устройства для надувания к просвету надувания баллона расположите дилатационный катетер дистальным кончиком и баллоном в вертикальном положении вниз.

в. Примените отрицательное давление и аспирируйте в течение 15 секунд. Медленно сбросьте давление до нейтрального уровня, позволяя контрасту заполнить стержень дилатационного катетера.

г. Отсоедините шприц инфляционного устройства от инфляционного порта дилатационного катетера.

д. Удалите весь воздух из цилиндра шприца или устройства для надувания. Снова подсоедините шприц или изделие для надувания к порту для надувания дилатационного катетера. Поддерживайте

defective equipment.

Prepare equipment to be used following manufacturer's instructions or standard procedure.

Complete the following steps to prepare the PTCA catheter for use:

1) Prepare contrast medium (50:50 sterile mixture of a contrast medium and saline). Do not use the contrast medium which incorporates the components of Ethiodol, Lipiodol or same kind of agents.

2) Remove the stylet from the catheter tip; Slide the Sheath off the balloon.

3) Flush PTCA Balloon dilatation catheter: Attach a syringe filled with normal saline to the flushing tool, insert the flushing tool in the distal end of the catheter, and inject normal saline into the lumen. Follow this procedure for subsequent flushing.

4) Prepare an inflation device with the recommended contrast medium according to the manufacturer's instructions.

5) Evacuate air from the balloon segment using the following procedure:
a. Fill a 20 cc syringe of the inflation device with approximately 4 cc of contrast medium.

b. After attaching the syringe or inflation device to the balloon inflation lumen, orient the dilatation catheter with the distal tip and the balloon pointing in a downward vertical position.

c. Apply negative pressure and aspirate for 15 seconds. Slowly release the pressure to neutral, allowing contrast to fill the shaft of the dilatation catheter.

d. Disconnect the syringe of inflation device from the inflation port of the dilatation catheter.

e. Remove all air from the syringe or inflation device barrel. Reconnect the syringe or inflation device to the inflation port of the dilatation catheter. Maintain negative pressure on the balloon until air no longer returns to the device.

f. Slowly release the device pressure to neutral.

g. Disconnect the 20 cc syringe (if used) and connect the inflation device to the inflation port of the dilatation catheter without introducing air into the system.

CAUTION: All air must be removed from the balloon and displaced with

отрицательное давление на баллоне до тех пор, пока воздух не перестанет возвращаться в изделие.

е. Медленно сбросьте давление устройства до нейтрального.

ж. Отсоедините шприц объемом 20 мл (если он используется) и подсоедините изделие для накачивания к порту для надувания дилатационного катетера, не вводя воздух в систему.

ВНИМАНИЕ: Весь воздух должен быть удален из баллона и вытеснен контрастом перед его введением в тело (при необходимости повторите шаги с 5.а по 5.ж); в противном случае могут возникнуть осложнения.

б) Во время подготовки баллона погрузите баллон в стерильный физиологический раствор, чтобы активировать покрытие.

2) Катетер NC Loach

Перед использованием тщательно осмотрите все оборудование на наличие дефектов. Осмотрите дилатационный катетер на наличие изгибов, перегибов и других повреждений. Не используйте неисправное оборудование.

Подготовьте оборудование для использования, следуя инструкциям производителя или стандартной процедуре.

Выполните следующие шаги, чтобы подготовить катетер NC к использованию:

1) Приготовьте контрастное вещество (стерильная смесь контрастного вещества и физиологического раствора 50:50). Не используйте контрастное вещество, в состав которого входят компоненты этиодола, липиодола или аналогичных веществ.

2) Снимите стилет с кончика катетера; Снимите защитный чехол баллона.

3) Промывание катетера для баллонной дилатации NC: прикрепите шприц, наполненный физиологическим раствором, к инструменту для промывания, вставьте инструмент для промывки в дистальный конец катетера и введите физиологический раствор в просвет. Следуйте этой процедуре для последующей промывки.

4) Подготовьте изделие для раздувания с рекомендуемым контрастным веществом в соответствии с инструкциями производителя.

contrast prior to inserting into the body, (repeat steps 5.a through 5.g, if necessary); otherwise, complication may occur.

6) Submerge the balloon in sterile normal saline during balloon preparation to activate the coating.

2) NC Loach catheter

Prior to use, examine all equipment carefully for defects. Examine the dilatation catheter for bends, kinks or other damage. Do not use any defective equipment.

Prepare equipment to be used following manufacturer's instructions or standard procedure.

Complete the following steps to prepare the NC catheter for use:

1) Prepare contrast medium (50:50 sterile mixture of a contrast medium and saline). Do not use the contrast medium which incorporates the components of Ethiodol, Lipiodol or same kind of agents.

2) Remove the stylet from the catheter tip; Slide the Sheath off the balloon.

3) Flush NC Balloon dilatation catheter: Attach a syringe filled with normal saline to the flushing tool, insert the flushing tool in the distal end of the catheter, and inject normal saline into the lumen. Follow this procedure for subsequent flushing.

4) Prepare an inflation device with the recommended contrast medium according to the manufacturer's instructions.

5) Evacuate air from the balloon segment using the following procedure:
a. Fill a 20 cc syringe of the inflation device with approximately 4 cc of contrast medium.

b. After attaching the syringe or inflation device to the balloon inflation lumen, orient the dilatation catheter with the distal tip and the balloon

5) Удалите воздух из сегмента баллона, выполнив следующую процедуру: а. Заполните шприц инфляционного устройства объемом 20 мл примерно 4 мл контрастного вещества. б. После прикрепления шприца или устройства для надувания к просвету надувания баллона расположите дилатационный катетер дистальным кончиком и баллоном в вертикальном положении вниз. в. Примените отрицательное давление и аспирируйте в течение 15 секунд. Медленно сбросьте давление до нейтрального уровня, позволяя контрасту заполнить стержень дилатационного катетера. г. Отсоедините шприц инфляционного устройства от инфляционного порта дилатационного катетера. д. Удалите весь воздух из цилиндра шприца или устройства для надувания. Снова подсоедините шприц или изделие для надувания к порту для надувания дилатационного катетера. Поддерживайте отрицательное давление на баллоне до тех пор, пока воздух не перестанет возвращаться в изделие. е. Медленно сбросьте давление устройства до нейтрального. ж. Отсоедините шприц объемом 20 мл (если он используется) и подсоедините изделие для накачивания к порту для надувания дилатационного катетера, не вводя воздух в систему. ВНИМАНИЕ: Весь воздух должен быть удален из баллона и вытеснен контрастом перед его введением в тело (при необходимости повторите шаги с 5.а по 5.ж); в противном случае могут возникнуть осложнения. 6) Во время подготовки баллона погрузите баллон в стерильный физиологический раствор, чтобы активировать покрытие.	pointing in a downward vertical position. с. Apply negative pressure and aspirate for 15 seconds. Slowly release the pressure to neutral, allowing contrast to fill the shaft of the dilatation catheter. д. Disconnect the syringe of inflation device from the inflation port of the dilatation catheter. е. Remove all air from the syringe or inflation device barrel. Reconnect the syringe or inflation device to the inflation port of the dilatation catheter. Maintain negative pressure on the balloon until air no longer returns to the device. ф. Slowly release the device pressure to neutral. г. Disconnect the 20 cc syringe (if used) and connect the inflation device to the inflation port of the dilatation catheter without introducing air into the system. CAUTION: All air must be removed from the balloon and displaced with contrast prior to inserting into the body, (repeat steps 5.a through 5.g, if necessary); otherwise, complication may occur. 6) Submerge the balloon in sterile normal saline during balloon preparation to activate the coating.
Способ применения 1) Введите проводник через гемостатический клапан, следуя инструкциям производителя. Осторожно продвигайте проводник в направляющий катетер и через него. По завершении вытащите проводник, если он используется. 2) При необходимости прикрепите к направляющему устройству изделие крутящего момента. Под рентгеноскопией продвиньте проводник к нужному сосуду, а затем через стеноз.	Mode of application 1) Insert guide wire through the hemostatic valve following the manufacturer's instructions. Advance the guide wire carefully into and through the guiding catheter. When complete, withdraw the guide wire introduce, if used. 2) Attach a torque device to the guide wire, if desired. Under fluoroscopy, advance the guide wire to the desired vessel, then across the stenosis.

3) Наденьте дистальный конец дилатационного катетера обратно на проводник, убедившись, что проводник выходит из паза (бокового отверстия катетера).

Примечание. При установке дилатационного катетера на проводник необходимо поддерживать дилатационный катетер. При продвижении дилатационного катетера в направляющий катетер следует поддерживать дилатационный катетер и крепко удерживать гипотрубку. Различия в диаметрах стержня следует учитывать при открытии и затягивании гемостатического клапана, а также при извлечении дилатационного катетера.

4) Продвигайте дилатационный катетер по проводнику до тех пор, пока он не приблизится к гемостатическому клапану. Откройте кровоостанавливающий клапан. Вставьте дилатационный катетер, сохраняя положение проводника, и затяните гемостатический клапан. Для облегчения введения баллон должен быть полностью сдут до отрицательного давления.

5) Затяните гемостатический клапан, чтобы создать уплотнение вокруг дилатационного катетера, не препятствуя движению дилатационного катетера. Это позволит непрерывно регистрировать давление в проксимальной коронарной артерии.

6) Продвигайте дилатационный катетер до тех пор, пока соответствующий проксимальный маркер не выровняется с коннектором гемостатического клапана. Это указывает на то, что наконечник дилатационного катетера достиг наконечника интродьюсера.

7) Продвиньте дилатационный катетер по проводнику в стеноз, продолжите рентгеноскопию и используйте рентгеноконтрастные маркерные ленты, чтобы расположить пригодную к использованию часть баллона в пределах стеноза.

8) Продолжайте процедуру, используя общепринятую технику коронарной ангиопластики, чтобы разгрузить стеноз.

Примечание. Не превышайте номинальное разрывное давление, указанное на этикетке упаковки. Поддерживайте отрицательное давление на баллон между надуваниями.

Внимание: баллон может выскользнуть из очага поражения при

3) Back load the distal tip of the dilatation catheter onto the guide wire ensuring that the guide wire exits the notch (side hole of catheter).

Note: When back loading the dilatation catheter onto the guide wire, the dilatation catheter should be supported. In advancing the dilatation catheter into the guiding catheter, one's hand should support the dilatation catheter and firmly grasp the Hypotube. Shaft diameter differences should be taken into consideration when opening and tightening the hemostatic valve and upon withdrawal of the dilatation catheter.

4) Advance the dilatation catheter over the guide wire until it approaches the hemostatic valve. Open the hemostatic valve. Insert the dilatation catheter while maintaining guidewire position and tighten the hemostatic valve. To facilitate insertion, the balloon must be fully deflated to negative pressure.

5) Tighten the hemostatic valve to create a seal around the dilatation catheter without inhibiting movement of the dilatation catheter. This will allow continuous recording of proximal coronary artery pressure.

6) Advance the dilatation catheter until the appropriate proximal marker aligns with the hemostatic valve hub. This indicates that the dilatation catheter tip has reached the guiding catheter tip.

7) Advance the dilatation catheter over the guide wire and into the stenosis, continue under fluoroscopy and use the radiopaque marker bands to position the usable section of the balloon within stenosis.

8) Continue the procedure using accepted coronary angioplasty technique to dilate the stenosis.

Note: Do not exceed the rated burst pressure printed on the package label. Maintain negative pressure on the balloon between inflations.

Caution: The balloon may slip out of the lesion when inflated because of the hydrophilic coating. Inflate the balloon carefully under the guidance of high resolution fluoroscopy so that the balloon does not change position in the lesion.

9) Withdraw the deflated dilatation catheter and guide wire from the guiding catheter through the hemostatic valve. Tighten the hemostatic valve.

Caution: After the deflated balloon dilatation catheter is withdrawn, it

надувании из-за гидрофильного покрытия. Осторожно надувайте баллон под контролем рентгеноскопии высокого разрешения, чтобы баллон не изменил положение в очаге поражения.

9) Извлеките спущенный дилатационный катетер и проволочный направитель из направляющего катетера через гемостатический клапан. Затяните гемостатический клапан.

Внимание: после извлечения сдутого баллонного дилатационного катетера его следует протереть марлей, смоченной стерильным гепаринизированным физиологическим раствором, и хранить. Перед повторным введением баллон следует погрузить в стерильный гепаринизированный физиологический раствор для реактивации покрытия.

10) После операции катетер для баллонной дилатации и другие одноразовые устройства следует утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Техника процедуры обмена.

Катетер для баллонной дилатации был специально разработан для быстрой замены баллонов одним оператором. Чтобы выполнить дилатационную замену катетера:

- 1) Ослабьте гемостатический клапан.
- 2) Держите проводник и гемостатический клапан в одной руке, а в другой держите стержень баллона.
- 3) Поддерживайте положение проводника в коронарной артерии, удерживая его неподвижно, и начните вытягивать дилатационный катетер из направляющего катетера, одновременно контролируя положение проводника под рентгеноскопией.
- 4) Извлеките сдутый дилатационный катетер до достижения просвета проводника. Осторожно вытяните назад гибкую дистальную часть дилатационного катетера из вращающегося гемостатического клапана, сохраняя при этом положение проводника поперек стеноза.
- 5) Выдвиньте дистальный конец дилатационного катетера из гемостатического клапана и затяните клапан на проволочном направителе, чтобы надежно зафиксировать его на месте.

should be wiped clean with gauze soaked with sterile, heparinized normal saline and stored. Prior to reinsertion, the balloon should be submerged in sterile, heparinized normal saline to reactivate the coating.

10) After the operation, the balloon dilatation catheter and other disposable device should be disposed according to local law.

Exchange procedure technique.

The balloon dilatation catheter has been specifically designed for rapid, single operator balloon exchanges. To perform a dilatation catheter exchange:

- 1) Loosen the hemostatic valve.
- 2) Hold the guide wire and hemostatic valve in one hand, while grasping the balloon shaft in the other hand.
- 3) Maintain guide wire position in the coronary artery by holding the wire stationary, and begin pulling the dilatation catheter out of the guiding catheter while monitoring the wire position under fluoroscopy.
- 4) Withdraw the deflated dilatation catheter until the guide wire lumen is reached. Carefully pull back the flexible, distal portion of the dilatation catheter out of the rotating hemostatic valve while maintaining the guide wire's position across the stenosis.
- 5) Slide the distal tip of the dilatation catheter out of the hemostatic valve, and tighten valve onto the guide wire to hold it securely in place.
- 6) Prepare the next dilatation catheter to be used, as previously described in the PREPARATION FOR USE section.
- 7) Back load another dilatation catheter onto the guide wire as previously described under the INSTRUCTION FOR USE section, step 3, and continue the procedure accordingly.

6) Подготовьте следующий дилатационный катетер, как описано ранее в разделе ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 7) Установите еще один дилатационный катетер на проводник, как описано ранее в разделе ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, шаг 3, и продолжайте процедуру соответствующим образом.	
Информация об очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского изделия (для стерилизуемых изделий), порядке действий при нарушении стерильной упаковки (для изделий, поставляемых в стерильном виде)	Information on cleaning, disinfection and sterilization of a medical device (for sterilized products), the procedure in case of package appears damaged (for sterilize products)
Газовым методом с помощью этиленоксида	Ethylene oxide
Техническое обслуживание	Maintenance
Неприменимо.	Not applicable.
Основные технические и функциональные характеристики	Main technical and functional characteristics
Таблица 1. Технические характеристики/ Table 1. Technical characteristics	

Наименование варианта исполнения	Variations	Диаметр баллона, мм, ±10%/ Balloon diameter, mm, ±10%	Эффективна я длина баллона, мм, ±10%/ Effective balloon length, mm, ±10%	Эффективна я длина катетера, см, ±10 см/ Effective catheter length, cm, ±10 cm	Диаметр центральног о просвета катетера, мм (дюйм), ± 0,0381 мм (0.0015 дюйма)/ Diameter of the central lumen of the catheter, mm (inch), ± 0.0381 mm (0.0015 inch)	Наружный диаметр дистального конца катетера, мм, ±10%/ Outer diameter of the distal end of the catheter, mm, ±10%	Наружный диаметр проксималь ного конца катетера, мм, ±10%/Outer diameter of the proximal end of the catheter, mm, ±10%	Масса, г, ±20%/Weigh t, g, ±20%	Диаметр самого большого направителя , используемо го с катетером при необходимо сти, не более мм (дюйм)/ Diameter of the largest guide wire used with a catheter if necessary, not more than mm (inch)
1.1. Катетер баллонный дилатационны й Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм	1.1. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 5mm	1	5	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.2. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 8 мм	1.2. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 8mm	1	8	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.3. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 9 мм	1.3. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 9mm	1	9	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.4. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 10 мм	1.4. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 10mm	1	10	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.5. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 12 мм	1.5. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 12mm	1	12	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.6. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 15 мм	1.6. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 15mm	1	15	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.7. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 18 мм	1.7. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 18mm	1	18	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.8. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 20 мм	1.8. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 20mm	1	20	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.9. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 25 мм	1.9. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 25mm	1	25	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.10. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 30 мм	1.10. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.0mm x 30mm	1	30	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.11. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 5 мм	1.11. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 5mm	1,25	5	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.12. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 8 мм	1.12. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 8mm	1,25	8	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.13. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 9 мм	1.13. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 9mm	1,25	9	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.14. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 10 мм	1.14. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 10mm	1,25	10	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.15. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 12 мм	1.15. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 12mm	1,25	12	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.16. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 15 мм	1.16. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 15mm	1,25	15	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.17. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 18 мм	1.17. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 18mm	1,25	18	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.18. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 20 мм	1.18. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 20mm	1,25	20	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.19. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 25 мм	1.19. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 25mm	1,25	25	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.20. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,25 мм x 30 мм	1.20. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.25mm x 30mm	1,25	30	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.21. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 5 мм	1.21. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 5mm	1,5	5	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.22. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 8 мм	1.22. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 8mm	1,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.23. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 9 мм	1.23. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 9mm	1,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.24. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 10 мм	1.24. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 10mm	1,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.25. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 12 мм	1.25. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 12mm	1,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.26. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 15 мм	1.26. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 15mm	1,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.27. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 18 мм	1.27. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 18mm	1,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.28. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 20 мм	1.28. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 20mm	1,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.29. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 25 мм	1.29. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 25mm	1,5	25	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.30. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,5 мм x 30 мм	1.30. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.5mm x 30mm	1,5	30	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.31. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 5 мм	1.31. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 5mm	1,75	5	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.32. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 8 мм	1.32. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 8mm	1,75	8	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.33. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 9 мм	1.33. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 9mm	1,75	9	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.34. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 10 мм	1.34. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 10mm	1,75	10	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.35. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 12 мм	1.35. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 12mm	1,75	12	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.36. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 15 мм	1.36. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 15mm	1,75	15	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.37. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 18 мм	1.37. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 18mm	1,75	18	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.38. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 20 мм	1.38. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 20mm	1,75	20	140	0,3937 (0,0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.39. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 25 мм	1.39. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 25mm	1,75	25	140	0,3937 (0,0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.40. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,75 мм x 30 мм	1.40. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 1.75mm x 30mm	1,75	30	140	0,3937 (0,0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.41. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 5 мм	1.41. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 5mm	2	5	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.42. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 8 мм	1.42. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 8mm	2	8	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.43. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 9 мм	1.43. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 9mm	2	9	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.44. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 10 мм	1.44. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 10mm	2	10	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.45. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 12 мм	1.45. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 12mm	2	12	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.46. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 15 мм	1.46. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 15mm	2	15	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.47. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 18 мм	1.47. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 18mm	2	18	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.48. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 20 мм	1.48. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 20mm	2	20	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.49. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 25 мм	1.49. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 25mm	2	25	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.50. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,0 мм x 30 мм	1.50. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.0mm x 30mm	2	30	140	0,3937 (0.0155)	0,80	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.51. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 5 мм	1.51. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 5mm	2,25	5	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.52. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 8 мм	1.52. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 8mm	2,25	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.53. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 9 мм	1.53. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 9mm	2,25	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.54. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 10 мм	1.54. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 10mm	2,25	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.55. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 12 мм	1.55. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 12mm	2,25	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.56. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 15 мм	1.56. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 15mm	2,25	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.57. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 18 мм	1.57. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 18mm	2,25	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.58. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 20 мм	1.58. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 20mm	2,25	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.59. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 25 мм	1.59. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 25mm	2,25	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.60. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,25 мм x 30 мм	1.60. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.25mm x 30mm	2,25	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.61. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 5 мм	1.61. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 5mm	2,5	5	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.62. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 8 мм	1.62. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 8mm	2,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.63. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 9 мм	1.63. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 9mm	2,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.64. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 10 мм	1.64. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 10mm	2,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.65. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 12 мм	1.65. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 12mm	2,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.66. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 15 мм	1.66. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 15mm	2,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.67. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 18 мм	1.67. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 18mm	2,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.68. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 20 мм	1.68. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 20mm	2,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.69. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 25 мм	1.69. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 25mm	2,5	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.70. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,5 мм x 30 мм	1.70. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.5mm x 30mm	2,5	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.71. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 5 мм	1.71. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 5mm	2,75	5	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.72. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 8 мм	1.72. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 8mm	2,75	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.73. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 9 мм	1.73. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 9mm	2,75	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.74. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 10 мм	1.74. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 10mm	2,75	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.75. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 12 мм	1.75. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 12mm	2,75	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.76. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 15 мм	1.76. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 15mm	2,75	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.77. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 18 мм	1.77. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 18mm	2,75	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.78. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 20 мм	1.78. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 20mm	2,75	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.79. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 25 мм	1.79. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 25mm	2,75	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.80. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 2,75 мм x 30 мм	1.80. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 2.75mm x 30mm	2,75	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.81. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 5 мм	1.81. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 5mm	3	5	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.82. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 8 мм	1.82. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 8mm	3	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.83. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм х 9 мм	1.83. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 9mm	3	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.84. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм х 10 мм	1.84. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 10mm	3	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.85. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм х 12 мм	1.85. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 12mm	3	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.86. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 15 мм	1.86. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 15mm	3	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.87. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 18 мм	1.87. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 18mm	3	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.88. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 20 мм	1.88. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 20mm	3	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.89. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 25 мм	1.89. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 25mm	3	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.90. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,0 мм x 30 мм	1.90. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.0mm x 30mm	3	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.91. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 5 мм	1.91. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 5mm	3,25	5	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.92. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 8 мм	1.92. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 8mm	3,25	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.93. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 9 мм	1.93. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 9mm	3,25	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.94. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 10 мм	1.94. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 10mm	3,25	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.95. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 12 мм	1.95. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 12mm	3,25	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.96. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 15 мм	1.96. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 15mm	3,25	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.97. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 18 мм	1.97. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 18mm	3,25	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.98. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 20 мм	1.98. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 20mm	3,25	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.99. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 25 мм	1.99. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 25mm	3,25	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.100. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,25 мм x 30 мм	1.100. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.25mm x 30mm	3,25	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.101. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 5 мм	1.101. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 5mm	3,5	5	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.102. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 8 мм	1.102. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 8mm	3,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.103. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 9 мм	1.103. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 9mm	3,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.104. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 10 мм	1.104. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 10mm	3,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.105. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 12 мм	1.105. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 12mm	3,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.106. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 15 мм	1.106. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 15mm	3,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.107. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 18 мм	1.107. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 18mm	3,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.108. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 20 мм	1.108. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 20mm	3,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.109. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 25 мм	1.109. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 25mm	3,5	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.110. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,5 мм x 30 мм	1.110. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.5mm x 30mm	3,5	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.111. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 5 мм	1.111. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 5mm	3,75	5	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.112. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 8 мм	1.112. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 8mm	3,75	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.113. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 9 мм	1.113. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 9mm	3,75	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.114. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 10 мм	1.114. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 10mm	3,75	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.115. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 12 мм	1.115. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 12mm	3,75	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.116. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 15 мм	1.116. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 15mm	3,75	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.117. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 18 мм	1.117. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 18mm	3,75	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.118. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 20 мм	1.118. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 20mm	3,75	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.119. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 25 мм	1.119. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 25mm	3,75	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.120. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 3,75 мм x 30 мм	1.120. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 3.75mm x 30mm	3,75	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.121. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 5 мм	1.121. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 5mm	4	5	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.122. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 8 мм	1.122. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 8mm	4	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.123. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 9 мм	1.123. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 9mm	4	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.124. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 10 мм	1.124. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 10mm	4	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.125. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 12 мм	1.125. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 12mm	4	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.126. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 15 мм	1.126. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 15mm	4	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.127. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 18 мм	1.127. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 18mm	4	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.128. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 20 мм	1.128. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 20mm	4	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
1.129. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 25 мм	1.129. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 25mm	4	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

1.130. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм	1.130. Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, Balloon Size: 4.0mm x 30mm	4	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.1. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 6 мм	2.1 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 6mm	2	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.2. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 8 мм	2.2 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 8mm	2	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.3. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 9 мм	2.3 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 9mm	2	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.4. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 10 мм	2.4 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 10mm	2	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.5. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 12 мм	2.5 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 12mm	2	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.6. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 15 мм	2.6 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 15mm	2	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.7. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 18 мм	2.7 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 18mm	2	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.8. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 20 мм	2.8 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 20mm	2	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.9. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 25 мм	2.9 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 25mm	2	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.10. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,0 мм x 30 мм	2.10 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 2.0mm x 30mm	2	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.11. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 6 мм	2.11 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 6 mm	2,25	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.12. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 8 мм	2.12 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 8 mm	2,25	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.13. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 9 мм	2.13 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 9 mm	2,25	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.14. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 10 мм	2.14 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 10 mm	2,25	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.15. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 12 мм	2.15 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 12 mm	2,25	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.16. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 15 мм	2.16 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 15 mm	2,25	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.17. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 18 мм	2.17 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 18 mm	2,25	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.18. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 20 мм	2.18 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 20 mm	2,25	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.19. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 25 мм	2.19 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 25 mm	2,25	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.20. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,25 мм x 30 мм	2.20 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.25 mm x 30 mm	2,25	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.21. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 6 мм	2.21 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 6 mm	2,5	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.22. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 8 мм	2.22 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 8 mm	2,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.23. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 9 мм	2.23 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 9 mm	2,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.24. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 10 мм	2.24 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 10 mm	2,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.25. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 12 мм	2.25 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 12 mm	2,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.26. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 15 мм	2.26 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 15 mm	2,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.27. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 18 мм	2.27 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 18 mm	2,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.28. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 20 мм	2.28 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 20 mm	2,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.29. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 25 мм	2.29 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 25 mm	2,5	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.30. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,5 мм x 30 мм	2.30 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.5 mm x 30 mm	2,5	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.31. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 6 мм	2.31 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 6 mm	2,75	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.32. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 8 мм	2.32 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 8 mm	2,75	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.33. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 9 мм	2.33 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 9 mm	2,75	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.34. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 10 мм	2.34 Shunmei balloon dilation catheter for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 10 mm	2,75	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.35. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 12 мм	2.35 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 12 mm	2,75	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.36. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 15 мм	2.36 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 15 mm	2,75	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.37. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 18 мм	2.37 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 18 mm	2,75	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.38. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 20 мм	2.38 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 20 mm	2,75	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.39. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 25 мм	2.39 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 25 mm	2,75	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.40. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 2,75 мм x 30 мм	2.40 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 2.75 mm x 30 mm	2,75	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.41. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 6 мм	2.41 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 6 mm	3	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.42. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 8 мм	2.42 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 8mm	3	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.43. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 9 мм	2.43 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 9 mm	3	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.44. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 10 мм	2.44 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 10 mm	3	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.45. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 12 мм	2.45 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 12mm	3	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.46. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 15 мм	2.46 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 15 mm	3	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.47. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 18 мм	2.47 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 18 mm	3	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.48. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 20 мм	2.48 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0mm x 20mm	3	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.49. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 25 мм	2.49 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.0 mm x 25 mm	3	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.50. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,0 мм x 30 мм	2.50 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.0 mm x 30 mm	3	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.51. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 6 мм	2.51 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 6 mm	3,25	6	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.52. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 8 мм	2.52 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 8mm	3,25	8	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.53. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 9 мм	2.53 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 9 mm	3,25	9	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.54. Катетер баллонный дилатационн ый Shunmei для коронарной ангиопластик и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 10 мм	2.54 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 10 mm	3,25	10	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.55. Катетер баллонный дилатационн ый Shunmei для коронарной ангиопластик и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 12 мм	2.55 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 12mm	3,25	12	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.56. Катетер баллонный дилатационн ый Shunmei для коронарной ангиопластик и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 15 мм	2.56 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 15mm	3,25	15	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.57. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 18 мм	2.57 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 18 mm	3,25	18	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.58. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 20 мм	2.58 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25mm x 20mm	3,25	20	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.59. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 25 мм	2.59 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.25 mm x 25 mm	3,25	25	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.60. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,25 мм x 30 мм	2.60 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.25 mm x 30 mm	3,25	30	140	0,3937 (0.0155)	0,85	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.61. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 6 мм	2.61 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 6 mm	3,5	6	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.62. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 8 мм	2.62 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.5mm x 8mm	3,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.63. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 9 мм	2.63 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 9 mm	3,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.64. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 10 мм	2.64 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 10 mm	3,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.65. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 12 мм	2.65 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.5mm x 12mm	3,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.66. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 15 мм	2.66 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 15 mm	3,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.67. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 18 мм	2.67 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 18 mm	3,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.68. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 20 мм	2.68 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.5mm x 20mm	3,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.69. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 25 мм	2.69 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 25 mm	3,5	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.70. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,5 мм x 30 мм	2.70 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.5 mm x 30 mm	3,5	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.71. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 6 мм	2.71 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 6 mm	3,75	6	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.72. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 8 мм	2.72 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.75mm x 8mm	3,75	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.73. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 9 мм	2.73 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 9 mm	3,75	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.74. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 10 мм	2.74 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 10 mm	3,75	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.75. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 12 мм	2.75 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.75 mm x 12 mm	3,75	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.76. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 15 мм	2.76 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.75mm x 15mm	3,75	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.77. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 18 мм	2.77 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 18 mm	3,75	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.78. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 20 мм	2.78 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 3.75mm x 20mm	3,75	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.79. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 25 мм	2.79 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 25 mm	3,75	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.80. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 3,75 мм x 30 мм	2.80 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 3.75 mm x 30 mm	3,75	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.81. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 6 мм	2.81 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 6 mm	4	6	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.82. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 8 мм	2.82 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 8mm	4	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.83. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 9 мм	2.83 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 9mm	4	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.84. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 10 мм	2.84 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 10mm	4	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.85. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 12 мм	2.85 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 12mm	4	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.86. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 15 мм	2.86 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 15mm	4	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.87. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 18 мм	2.87 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 18 mm	4	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.88. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 20 мм	2.88 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0mm x 20mm	4	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.89. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 25 мм	2.89 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 25 mm	4	25	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.90. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм	2.90 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.0 mm x 30 mm	4	30	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.91. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 6 мм	2.91 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 6 mm	4,5	6	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.92. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 8 мм	2.92 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 4.5 mm x 8 mm	4,5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.93. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 9 мм	2.93 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 9 mm	4,5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.94. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 10 мм	2.94 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 10 mm	4,5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.95. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 12 мм	2.95 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 12 mm	4,5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.96. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 15 мм	2.96 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 15 mm	4,5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.97. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 18 мм	2.97 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 18 mm	4,5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.98. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 4,5 мм x 20 мм	2.98 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 4.5 mm x 20 mm	4,5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.99. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 6 мм	2.99 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, balloon size: 5.0 mm x 6 mm	5	6	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.100. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 8 мм	2.100 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0mm x 8mm	5	8	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.101. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 9 мм	2.101 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 9 mm	5	9	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.102. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 10 мм	2.102 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 10 mm	5	10	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.103. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 12 мм	2.103 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 12 mm	5	12	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.104. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 15 мм	2.104 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 15 mm	5	15	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

2.105. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 18 мм	2.105 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0mm x 18mm	5	18	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)
2.106. Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики и NC Loach, размер баллона: 5,0 мм x 20 мм	2.106 Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty NC Loach, Balloon Size: 5.0 mm x 20 mm	5	20	140	0,3937 (0.0155)	0,89	0,65	3,2	0,36 (0,014)

Катетер баллонный PTCA Shun Loach/ Balloon catheter PTCA Shun Loach

Номинальное давление в баллоне/Nominal Balloon Pressure	608 кПа/608 kPa
Максимально допустимое давление в баллоне (номинальное давление разрыва)/ Maximum permissible balloon pressure (nominal burst pressure)	Номинальное давление разрыва баллона диаметром 1,0–4,0 мм должно быть больше или равно 1621 кПа (16 атм)/ The nominal burst pressure of a balloon with a diameter of 1.0–4.0 mm must be greater than or equal to 1621 kPa (16 atm)
Внутренний диаметр совместимого проводникового катетера/Inner diameter of compatible guiding catheter	Не менее 1,42 мм /Not less than 1,42 mm
Внешний диаметр совместимого проводникового катетера/Outer diameter of compatible guiding catheter	Не менее 5F (1,67 мм)/Not less than 5F (1,67 mm)

Устойчивость к коррозии/corrosion resistance	На металлических компонентах катетера, предназначенных для контакта с путем прохождения жидкостей, не должно быть признаков коррозии. / Metal components of the catheter intended to come into contact with the fluid path should not show signs of corrosion.	
Прочность соединения катетера/ Catheter connection strength	Место соединения/Connection	Значение/Value
	Кончик/Внутренний корпус-Баллон/Tip/Inner body - Balloon	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Внутренний корпус/Inner body	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Внешний корпус-Баллон/Outer body - Balloon	Не менее 5Н/ Not less than 5N
	Внешний корпус/Outer body	Не менее 5Н Not less than 5N
	Внешний корпус-Внутренний корпус (Rx Порт)/Outer body – Inner body (Rx Port)	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Гипотрубка-Внешний корпус/Hypotube-Outer body	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Гипотрубка/Hypotube	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Разъем-Гипотрубка/Hub-Hypotube	Не менее 3Н/Not less than 3N
Герметичность/Leak integrity	- Основной корпус, узел соединения фитингов или другие части катетера не должны допускать утечку жидкости при испытании в соответствии с методом, приведенным в Приложении С стандарта EN ISO 10555-1. - Не должно быть утечки воздуха в основной корпус в процессе аспирации при испытании в соответствии с методом, приведенным в Приложении D стандарта EN ISO 10555-1. Отсутствие утечек и повреждений при надувании: При испытании, как описано в приложении В стандарта EN ISO 10555-4, не должно быть утечек или признаков повреждений, таких как разбухание или разрыв стержня или баллона./	

	- The main body, fitting assembly or other parts of the catheter shall not leak liquid when tested in accordance with the method given in Annex C of EN ISO 10555-1. - There shall be no air leakage into the main body during aspiration when tested in accordance with the method given in Annex D of EN ISO 10555-1. No leakages or damage during inflation: When tested as described in Annex B of EN ISO 10555-4, there shall be no leakage or evidence of damage such as swelling or rupture of the stylet or balloon.
Поверхность/Surface	Внешняя поверхность эффективной длины катетера должна быть свободной от инородных веществ. На внешней поверхности эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должно быть следов обработки или дефектов, которые могут травмировать сосуды при использовании. / The outer surface of the effective length of the catheter should be free of foreign matter. The outer surface of the effective length of the catheter, including the distal end, should be free of any traces of processing or defects that could injure the vessels during use.
Время наполнения баллона и время спуска/ Balloon inflation time and deflation time	Время надувания баллона должно быть менее 10 с Время сдувания баллона должно составлять менее 15 с/ The balloon inflation time should be less than 10 s The balloon deflation time should be less than 15 s
Соотношение между диаметром баллона и давлением наполнения баллона/ The diameter of the balloon and the inflation pressure of the balloon ratio	Номинальное давление разрыва баллона диаметром 1,0–4,0 мм должно быть больше или равно 1621 кПа (16 атм)/ The nominal burst pressure of a balloon with a diameter of 1.0–4.0 mm must be greater than or equal to 1621 kPa (16 atm)
Катетер баллонный NC Loach/ Balloon catheter NC Loach	
Номинальное давление в баллоне/ Nominal Balloon Pressure	1216 кПа/1216 kPa
Максимально допустимое давление в баллоне (номинальное давление разрыва)/ Maximum permissible balloon pressure (nominal burst pressure)	Для баллонов диаметром 1,5–4,0 мм/For balloon diameters 1,5–4,0 mm Больше или равно 2229 кПа (22 атм)/Greater than or equal 2229 kPa

	(22 atm) Для баллонов диаметром 4,5–6,0 мм/For balloon diameters 4,5–6,0 mm Больше или равно 2026 кПа (20 атм)/Greater than or equal 2026 kPa (20 atm)	
Внутренний диаметр совместимого проводникового катетера/Inner diameter of compatible guiding catheter	Не менее 1,42 мм /Not less than 1,42 mm	
Внешний диаметр совместимого проводникового катетера/Outer diameter of compatible guiding catheter	Не менее 5F (1,67 мм)/Not less than 5F (1,67 mm)	
Устойчивость к коррозии/corrosion resistance	На металлических компонентах катетера, предназначенных для контакта с путем прохождения жидкостей, не должно быть признаков коррозии. / Metal components of the catheter intended to come into contact with the fluid path should not show signs of corrosion.	
Прочность соединения катетера/ Catheter connection strength	Место соединения/Connection	Значение/Value
	Кончик/Внутренний корпус-Баллон/Tip/Inner body-Balloon	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Внутренний корпус/Inner body	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Внешний корпус-Баллон/Outer body-Balloon	Не менее 5Н/Not less than 5N
	Внешний корпус/Outer body	Не менее 5Н/Not less than 5N
	Внешний корпус-Внутренний корпус (Rx Порт)/Outer body – Inner body (Rx Port)	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Гипотрубка-Внешний корпус/Hypotube-Outer body	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Гипотрубка/Hypotube	Не менее 3Н/Not less than 3N
	Разъем-Гипотрубка/Hub-Hypotube	Не менее 3Н/Not less than 3N
Герметичность/Leak integrity	- Основной корпус, узел соединения фитингов или другие части катетера не должны допускать утечку жидкости при испытании в соответствии с методом, приведенным в Приложении С стандарта	

	EN ISO 10555-1. - Не должно быть утечки воздуха в основной корпус в процессе аспирации при испытании в соответствии с методом, приведенным в Приложении D стандарта EN ISO 10555-1. Отсутствие утечек и повреждений при надувании: При испытании, как описано в приложении B стандарта EN ISO 10555-4, не должно быть утечек или признаков повреждений, таких как разбухание или разрыв стержня или баллона. / - The main body, fitting assembly or other parts of the catheter shall not leak liquid when tested in accordance with the method given in Annex C of EN ISO 10555-1. - There shall be no leakage of air into the main body during aspiration when tested in accordance with the method given in Annex D of EN ISO 10555-1. No leakages or damage during inflation: When tested as described in Annex B of EN ISO 10555-4, there shall be no leakage or evidence of damage such as swelling or rupture of the stylet or balloon.
Поверхность/Surface	Внешняя поверхность эффективной длины катетера должна быть свободной от инородных веществ. На внешней поверхности эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должно быть следов обработки или дефектов, которые могут травмировать сосуды при использовании. / The outer surface of the effective length of the catheter should be free of foreign matter. The outer surface of the effective length of the catheter, including the distal end, should be free of any traces of processing or defects that could injure the vessels during use.
Время наполнения баллона и время спуска/ Balloon inflation time and deflation time	Время надувания баллона должно быть менее 10 с Время сдувания баллона должно составлять менее 15 с/ The balloon inflation time should be less than 10 s The balloon deflation time should be less than 15 s
Соотношение между диаметром баллона и давлением наполнения	Номинальное давление разрыва/Nominal balloon burst pressure:

баллона/ The diameter of the balloon and the inflation pressure of the balloon ratio	Для баллонов диаметром 1,5–4,0 мм/For balloon diameters 1,5–4,0 mm Больше или равно 2229 кПа (22 атм)/Greater than or equal 2229 kPa (22 atm) Для баллонов диаметром 4,5–6,0 мм/For balloon diameters 4,5–6,0 mm Больше или равно 2026 кПа (20 атм)/Greater than or equal 2026 kPa (20 atm)
Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием	Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used in combination with medical device submitted for registration
В комбинации с заявленным медицинским изделием могут использоваться: • Артериальная трубка • Проводниковый катетер соответствующего размера и конфигурации. • Проводник соответствующего размера (диаметр не должен превышать максимальный диаметр проводника для расширения). • Шприц с разъемом Люэр объемом 20 мл. • Подходящая среда для раздувания (например, стерильная смесь контрастного вещества и физиологического раствора в соотношении 50:50). • Индефлятор • Гемостатический клапан	The following may be used in combination with the declared medical device: • Arterial tube • Guiding catheter of appropriate size and configuration. • Guide wire of appropriate size (diameter should not exceed the maximum diameter of the guide wire for expansion). • 20 ml luer lock syringe. • Suitable inflation medium (eg, a sterile 50:50 mixture of contrast agent and saline). • Inflator • Hemostatic valve
Сведения о лекарственных средствах входящих в состав медицинского изделия	Information about the medicines included in the medical device
Неприменимо.	Not applicable.
Сведения о материалах животного/человеческого происхождения	Information about materials of animal/human origin
Неприменимо.	Not applicable.
Условия эксплуатации медицинского изделия	Operating conditions of the medical device
Условия применения:	Operating conditions:

Температура: 32-42°C	Temperature: 32-42°C
Условия транспортировки и хранения медицинского изделия	Storage and transportation conditions
Условия хранения и транспортирования: Температура: 0–40 °C Влажность: ≤80% Во время транспортировки избегайте смятия груза, прямых солнечных лучей, намокания от дождя и снега, а также высоких температур.	Storage and transportation conditions: Temperature: 0-40°C Humidity: ≤80%. During transportation, avoid weight pressing, direct sunlight, rain and snow soaking, and high temperature.
Состав упаковки	Package contents
Пример комплекта поставки в индивидуальной упаковке: 1) Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики PTCA Shun Loach, размер баллона: 1,0 мм x 5 мм – 1 шт. 2) Инструкция по применению – 1 шт.	Example of a delivery set in individual packaging: 1) Balloon dilatation catheter Shunmei for coronary angioplasty PTCA Shun Loach, balloon size: 1.0 mm x 5 mm – 1 pc. 2) Instructions for use – 1 pc.
Срок годности / срок эксплуатации	Shelf life / Service life
3 года	3 years
Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	Disposal
Утилизируйте в соответствии с применимыми местными, региональными нормами. По истечении срока годности или при наличии дефектов изделие утилизируют согласно СанПиН 2.1.3684, класс А. Утилизация изделия, имевшего контакт с биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, класс Б.	Dispose in accordance with applicable local, regional regulations. After the expiration date or in the presence of defects, the device is disposed of in accordance with SanPiN 2.1.3684, class A. Disposal of a product that has come into contact with biological fluids must be in accordance with the requirements of SanPiN 2.1.3684, class B.
Гарантийные обязательства	Warranty
Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика) Телефон: +0086-0752-3306949 Электронный адрес: nora@shunmed.com Юридический адрес: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116	Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Telephone: +0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Legal address: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen, Guangdong, China Уполномоченный представитель: ООО «ЦИСЗ» Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232 Срок сохранения стерильности изделия – 3 года		Authorised representative: LLC «HSC» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st, 11A, building 2, floor/room/office 2/30, 32/232 Shelf life – 3 years	
Рекламация		Reclamation	
Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», Китайская Народная Республика) Телефон: +0086-0752-3306949 Электронный адрес: nora@shunmed.com Юридический адрес: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Уполномоченный представитель: ООО «ЦИСЗ» Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232		Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Telephone: +0086-0752-3306949 Email address:nora@shunmed.com Legal address: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Authorised representative: LLC «HSC» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st, 11A, building 2, floor/room/office 2/30, 32/232	
Расшифровка символов и надписей, применяемых при маркировке медицинского изделия		Explanation of symbols and inscriptions used in labelling the medical device	
Символы/Symbol			
	Caution/Осторожно		Keep dry/Не допускать воздействия влаги
	Batch code/Код партии		Non-pyrogenic/Апирогенно

	Do not re-sterilize/Не стерилизовать повторно		Do not use if package is damaged and consult instructions for use/Не использовать, при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Use by date/Использовать до		Do not re-use/Запрет на повторное применение
	Sterilized by ethylene oxide/Стерилизация оксидом этилена		Date of manufacture/Дата изготовления
	Catalogue number/Номер по каталогу		Consult instructions for use or consult electronic instructions for use /Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Manufacturer/Изготовитель		Keep away from sunlight/Не допускать воздействия солнечного света
	Temperature limit/Температурный диапазон		Authorized representative of European Community/Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	CE Marking/Маркировка CE	XXXX	Notified Body ID number/Идентификационный номер уполномоченного органа
	Количество изделий в упаковке - 1		Количество изделий в упаковке - 50

Надписи на маркировке/ Inscriptions on the label

Pressure	Давление	NP (Nominal Pressure)	Номинальное давление в баллоне
ATM	атм	RBP (Rated Burst Pressure)	Номинальное давление разрыва баллона
KPa	кПа	Do not exceed the rated burst pressure (RBP)	Не превышайте номинальное давление разрыва.
Balloon Diameter (mm)	Диаметр баллона (мм)		

Дата выпуска или пересмотра инструкции
27.05.2024

Date of issue or revision of instructions
27.05.2024

СЕРТИФИКАТ

/логотип/
ККСРМТ

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли -
Торгово-промышленная палата Китая**

02195534

Логотип «ККСРМТ»

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Торгово-промышленная палата Китая**

/QR-код/

СЕРТИФИКАТ

№ 244403A0/026669

**Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)**

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «Шунмей Медикал Ко. Лтд.» на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

**Печать:
ККСРМТ
СЕРТИФИКАТ
(24)**

**КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ**

**Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)
/подпись/**

Подпись уполномоченного лица: Ху На

Дата: 29 мая 2024 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано

«Шунмей Медикал Ко. Лтд.» (Shunmei Medical Co., Ltd)

Организация

3-й этаж и R401 здание В, № 8 1-й дороги Цзиньлун,
промышленная зона Баолун, район Лунган, Шэньчжэнь
518116, Гуандун, Китай

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ту Чжэньцзинь (Tu Zhenjin)

Фамилия, имя

27.05.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

/подпись/

Подпись

Печать:

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.» (SHUNMEI
MEDICAL CO., LTD) * ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

**Инструкция по применению
на медицинское изделие: «Катетер баллонный дилатационный Shunmei для коронарной ангиопластики в
вариантах исполнения»
2024**

Печать:

КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем.

**Российская Федерация
Город Москва**

Девятого июля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 32-1703

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Д.Ш. Юракова

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
130 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

