


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»


Проценко Р. М.
Проценко Р. М.
« » _____ 2008 г.
М.П. «МедИнформ»

Инструкция по применению:


Ланцеты Микролет (Microlet) к устройству для прокалывания пальца.

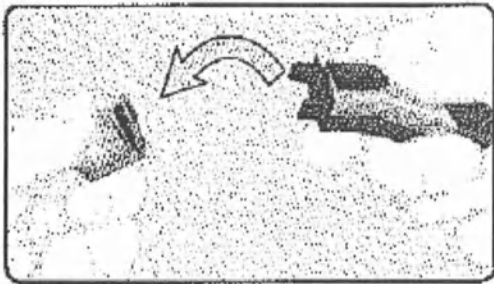


1. Снимите наконечник с устройства для прокалывания пальца.

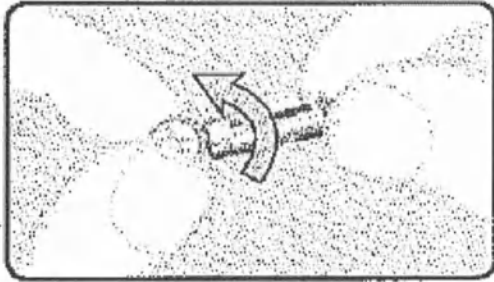

2. Поверните (не снимайте) защитный колпачок ланцета на $\frac{1}{4}$ оборота.

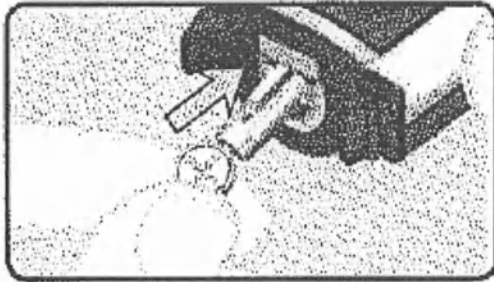

3. Вставьте ланцет в устройство для прокалывания пальца до упора. Устройство будет поставлено на взвод.

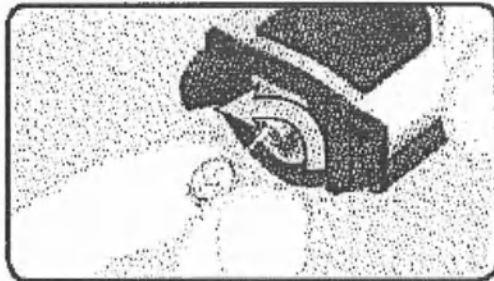

4. Открутите колпачок ланцета.

