

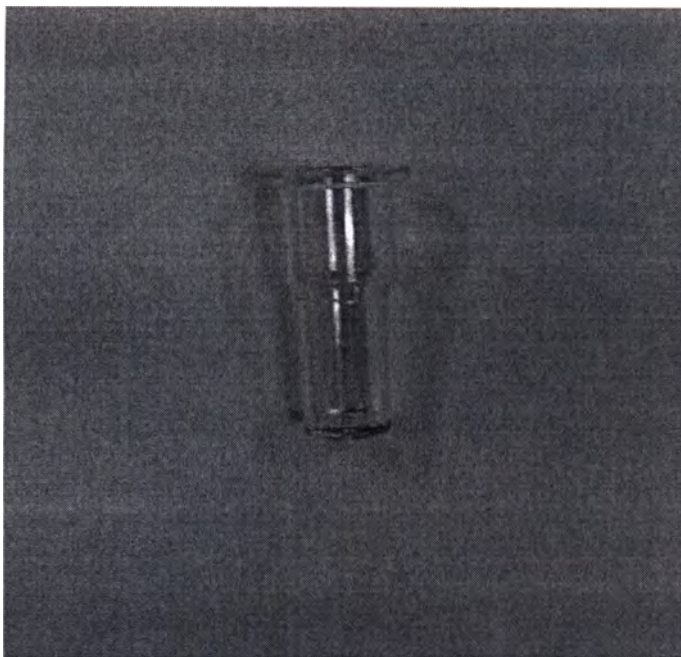


Рис. 1 Фотография кюветы одноразовой.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Кювета одноразовая предназначена для размещения образцов плазмы крови, реактивов, перемешивания и определения времени свертывания проб плазмы крови на коагулометре автоматическом АК-37, анализаторе свертывания крови автоматизированном АСКa 2-01-«Астра».

Кювета одноразовая применяется в клинико-диагностических, научных и экспресс - лабораториях медицинских учреждений, предназначена только для диагностики *in vitro*.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Кюветы одноразовые изготавливаются из материалов не являющимися источниками вредных веществ. Конструкция исключает возможность нанесения травм медицинскому персоналу. Изделия являются одноразовыми, после применения они подлежат утилизации в установленном порядке. Однократное применение изделий исключает возможность контакта персонала с потенциально опасным биологическим материалом.

### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Габаритные размеры:

Высота кюветы, мм.:  $25,2 \pm 0.1$ .

Диаметр кюветы, мм. :  $14 \pm 0.2$ .

Кювета одноразовая изготавливается из полистирола ТУ 2214-126-05766801-2003 или другого полистирола. Материал, применяемый для изготовления кюветы, должен быть оптически прозрачен в диапазоне длин световых волн от 400 до 700 нм. Не допускается