

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Здравмедтех-Н»
А.И. Клевасов
«10» ноября 2024 г.



**Одежда хирургическая одноразовая стерильная в комплектах
по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Версия 5

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Общая информация

Одежда хирургическая одноразовая стерильная (далее по тексту – Изделие) в комплектах по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021 (далее по тексту – комплект).

Производитель Изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Н» (ООО «Здравмедтех-Н»).

Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, г.о. г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64/1, оф. 607.

тел: 209-22-30, e-mail: info@zmt-nsk.ru

Место производства: ООО «Здравмедтех-Н», Россия, 633004, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/90.

Класс Изделия в зависимости от степени потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ 31508 – 1.

Изделие поставляется стерильным.

Изделие однократного применения.

Вид контакта с организмом – изделие поверхностного кратковременного (≤ 24 ч.) контакта с неповрежденной кожей.

1.2 Назначение изделия

Изделие предназначено для применения при выполнении медицинских процедур и при оперативных вмешательствах в медицинских организациях.

Область применения: общепольничные медицинские изделия.

Потенциальные потребители: медицинский персонал медицинских организаций, пациенты.

Показания к применению: проведение медицинских процедур, проведение хирургических операций.

Противопоказания: не выявлены.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты, входящие в состав комплектов, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Компоненты комплектов

№	Наименование	№ рисунка Приложения 2
1.	Бахилы-тапочки	1
2.	Бахилы полиэтиленовые	2
3.	Бахилы хирургические Варианты исполнения: 1) Бахилы хирургические высокие (с резинкой или с завязками) 2) Бахилы хирургические низкие	3а, 3б
4.	Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76,	4

	длина 900-1200 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке, или на манжете, с карманами или без карманов)	
5.	Комбинезон <i>Варианты исполнения:</i> 1) Комбинезон (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1800-2000 мм, рукава на резинке или на манжете, низ брюк на резинке или на манжете, застежка молния или липа) 2) Комбинезон (размеры 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 68-72, 74-76, длина 1780-2500 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка молния или липа, встроенные бахилы)	5а, 5б
6.	Костюм хирургический (куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете) или куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов), рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав) или рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав), брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов), юбка (размер 40-76, длина 500-2000 мм, пояс на резинке или на завязках)	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е
7.	Куртка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете, с карманами или без карманов) 2) Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)	7а, 7б
8.	Накидка (500-1700)х(800-1500)мм	8
9.	Нарукавники <i>Варианты исполнения:</i> 1) Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на резинке, низ на манжете) 2) Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на резинке, низ на резинке) 3) Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на манжете, низ на манжете)	9а, 9б, 9в
10.	Перчатки <i>Варианты исполнения:</i> 1) Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011 следующих типоразмеров: 1. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 2. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 3. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 4. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса опудренные №№ XS, S, M, L, XL. 5. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 6. Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL по РУ № ФСР 2011/12244 2) Перчатки медицинские NG MEDICAL по ТУ 9398-001-90610765-2012, варианты исполнения: 1. Перчатки хирургические стерильные NG Medical Master St, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 по РУ № РЗН 2013/701 3) Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) стерильные «Basic» Optima латексные неопудренные текстурированные по РУ № РЗН 2013/1070	-
11.	Рубашка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав) 2) Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)	10а, 10б

12.	Рубашка для роженницы (800-1500)х(700-1700)мм (с круглой или с V-образной горловиной)	11
13.	Салфетка хирургическая (50-1000)х(50-1000)мм	12
14.	Фартук (500-900)х(800-1200)мм	13
15.	Халат процедурный <i>Варианты исполнения:</i> 1) Халат процедурный (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка липа или кнопки) 2) Халат процедурный (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)	14а, 14б
16.	Халат хирургический <i>Варианты исполнения:</i> 1) Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 2) Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с запахом) 3) Халат хирургический (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 4) Халат хирургический (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)	15а, 15б, 15в, 15г
17.	Халат хирургический «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, с застежкой сзади, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)	16
18.	Халат хирургический стандартного покроя (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, с воротником или без воротника, рукава на манжете или на резинке, застежка на кнопках или на пуговицах, с карманами или без карманов)	17
19.	Шапочка <i>Варианты исполнения:</i> 1) Шапочка-берет 2) Шапочка-колпак 3) Шапочка-шлем (с маской-экраном или без маски-экрана) 4) Шапочка-косынка 5) Шапочка-пилотка (с завязками или без завязок) 6) Шапочка-шлем 7) Шапочка-косак 8) Шапочка-шлем (пелерина, кулиски) (с маской-экраном или без маски-экрана) 9) Шапочка-колпак (окантовка)	18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18е, 18ж, 18з, 18и
20.	Шорты (трусы) (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 300-700 мм, на завязках или на резинке)	19
21.	Юбка (размер 40-76, длина 500-2000 мм, пояс на резинке или на завязках)	20

Халат хирургический, халат хирургический «Евростандарт» соответствуют требованиям к исполнению по ГОСТ EN 13795-3 и ГОСТ 12.4.175, указанным в таблице 2:

Таблица 2. Требования к исполнению халата хирургического, халата хирургического «Евростандарт»

Характеристика	Единица измерения	Требование	
		стандартное исполнение	высококачественное

		исполнение			
		Критическая* зона изделия	менее критическая зона изделия	Критическая* зона изделия	менее критическая зона изделия
Микробная проницаемость	%	Не более 22		Не более 14	
Водоупорность	см H ₂ O	≥20	≥10	100	≥10
Прочность на растяжение в сухом состоянии	Н	≥20	≥20	20	≥20
Прочность на растяжение во влажном состоянии	Н	≥20	Не требуется	20	Не требуется
* Критическая зона халата – передняя полочка и рукава					

Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка), комбинезон, халат хирургический стандартного покрова соответствуют требованиям к исполнению по ГОСТ EN 13795-3 и ГОСТ 12.4.175, указанным в таблице 3:

Таблица 3. Требования к исполнению костюма хирургического (куртка, рубашка, брюки, юбка), комбинезона, халата хирургического стандартного покрова

Характеристика	Единица измерения	Требование
Микробная проницаемость	%	Не более 22
Прочность на растяжение в сухом состоянии	Н	≥20

Прочность швов Изделия - не менее 10 Н/м.

3. МАТЕРИАЛЫ

Изделие производится из нетоксичных материалов, указанных в таблице 4.

Таблица 4. Материалы, используемые при производстве

№ п/ п	Наименован ие	Состав (марка)	Производи тель	Плотность / толщина	Перечень применения
1.	Нетканый многослойны й материал на основе полипропилен а	Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010- 74582615-2009 Марка: СМС Состав: 100% полипропилен Материал нетканый из химических нитей по ТУ 13.95.10.112-001- 77056896-2019 Марка: спанбонд SB, СМС, SMS Сырьевой состав: полипропилен 100% Материал: CREATEX-	ООО «Завод Эластик» ООО «Авгол» ООО «Нетканика»	(12-80) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Брюки 4. Комбинезон 5. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 6. Куртка 7. Накидка 8. Нарукавники 9. Полотенце 10. Рубашка 11. Рубашка для роженицы 12. Салфетка хирургическая 13. Фартук 14. Халат процедурный 15. Халат хирургический 16. Халат хирургический «Евростандарт» 17. Халат хирургический стандартного покрова 18. Шапочка 19. Шорты (трусы) 20. Юбка

		КОМФОРТ K20035-68-103 CREATEX- КОМФОРТ K20035-68-104 по ТУ 13.95.10-001- 28566401-18 Сырьевой состав: полипропилен 100% Полотно нетканое «Полиспан Мед» по СТО 96891647- 002-2009 Марка: СМС Сырьевой состав: полипропилен 100 %	АО «Полиматиз»		
2.	Нетканый многослойный материал на основе вискозы и полиэтилена.	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRA DE CO.LTD Сырьевой состав: - вискоза (51,8%) - полиэтилен (48,2%)	ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY &TRADE CO.LTD (Китай)	(54-90) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Брюки 4. Накидка 5. Салфетка хирургическая 6. Шапочка
3.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена, вискозы и полиэтилена	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRA DE CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (39,1%), - вискоза (30%), - полиэтилен (30,9%)	ZHEJIANG BAIHAO IN- DUSTRY& TRADE CO.LTD (Китай)	(68-76) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Накидка 4. Полотенце 5. Салфетка хирургическая 6. Шапочка 7. Юбка
4.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена и полиэтилена	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY&TRA DE CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (51,8%), - полиэтилен (48,2%)	ZHEJIANG BAIHAO IN- DUSTRY& TRADE CO.LTD (Китай)	(40-116) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Брюки 4. Комбинезон 5. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 6. Куртка 7. Накидка 8. Нарукавники 9. Полотенце 10. Рубашка 11. Салфетка хирургическая 12. Фартук 13. Халат процедурный 14. Халат хирургический 15. Халат хирургический «Евростандарт» 16. Халат хирургический стандартного покроя 17. Юбка
5.	Нетканый многослойный материал «Спанлейс», изготовленный на основе	Марка: материал нетканый «Спанлейс» по ТУ 13.95.10-006- 56176857-2018 Сырьевой состав:	ООО «Авангард»	(40-100) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Накидка 4. Полотенце 5. Рубашка для роженицы 6. Салфетка хирургическая

	вискозы и полиэфира по технологии спанлейс	- вискоза (30%), - полиэфир (70%)			7. Шапочка
6.	Нетканый многослойный материал «Спанлейс», изготовленный на основе вискозы и полиэфира по технологии спанлейс, ламинированный полиэтиленом	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY & TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - вискоза (20-30%), - полиэфир (30-40%), полиэтилен (20-30%)	ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY & TRADE CO.LTD (Китай)	(40-80) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Накладка 4. Полотенце 5. Салфетка хирургическая 6. Фартук
7.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена и целлюлозы	Марка: Silk Soft СТБ 2204-20114 Сырьевой состав: - полипропилен (45%) - целлюлоза (55%)	NANLIU ENTERPRISE (PINGHU) CO.,LTD (Китай)	(65-75) г/м ²	1. Бахилы хирургические 2. Брюки 3. Комбинезон 4. Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) 5. Куртка 6. Накладка 7. Полотенце 8. Рубашка 9. Рубашка для роженицы 10. Салфетка хирургическая 11. Халат процедурный 12. Халат хирургический 13. Халат хирургический «Евростандарт» 14. Халат хирургический стандартного покрова 15. Шапочка
8.	Нетканый многослойный материал на основе полипропилена и вискозы	Марка: ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY & TRADE CO.LTD Сырьевой состав: - полипропилен (20%), - вискоза (80%)	ZHEJIANG BAIHAO INDUSTRY & TRADE CO.LTD (Китай)	(20-120) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Накладка 4. Полотенце 5. Рубашка для роженицы 6. Салфетка хирургическая 7. Шапочка 8. Шорты (трусы)
9.	Нетканый многослойный материал на основе целлюлозы и полиэтилена	Марка: НЕОМЕД многослойная бумага НЕОМЕД по ТУ 5456-002-39902546-2016 Сырьевой состав: - полиэтилен – 45 % - целлюлоза – 55 %	ООО «Нео Консалтинг Групп-Инжиниринг»	(65-98) г/м ²	1. Бахилы-тапочки 2. Бахилы хирургические 3. Накладка 4. Полотенце 5. Салфетка хирургическая
10.	Полиэтилен	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354 Состав: полиэтилен 100%	ООО «Геопласт»	(40-200) мкм	1. Бахилы полиэтиленовые 2. Наручники 3. Фартук
11.	ПВХ	пленка ПВХ	YIMA BUSINESS	(80-100) мкм	1. Наручники 2. Фартук

			LIMITED COMPANI OF TACHENG CITY		
12.	Марля медицинская	ПУ № РЗН 2015/2561 ГОСТ 9412 Состав: хлопок- 100%	ООО «ХБК Навтекс»	(20-100) г/м ²	1. Накладка 2. Полотенце 3. Салфетка хирургическая
13.	Материал на основе хлопка и полиэфира (липа, манжеты, резинка)	Изделия текстильно- галантерейные тканые, плетеные, витые, вязанные, метражные и штучные по ГОСТ 18827 Состав: хлопок, полиэфир Трубка манжетная по ТУ 8498-002- 0113682131-2015 Нить шнуровязальная на основе полиэфирной нити Нить латексная в текстильной оплетке по ОСТ - 17-10-043-2001 Изделия галантерейные для швейного производства из синтетических нитей с маркировкой «Veritas». Застежка текстильная «лента контакт» по ГОСТ 30019.1	ООО «КЕС Тек» ООО «Альянс отечественн ых производит елей» ООО «Компания «Глобальны й партнер» Ningo MH Industry Co., Ltd(Китай)	---	1. Брюки (резинка) 2. Комбинезон (манжеты, резинка) 3. Наручники (резинка) 4. Куртка (манжеты, резинка) 5. Халат процедурный (манжеты, липа, резинки) 6. Халат хирургический (манжеты, липа, резинки) 7. Халат хирургический «Евростандарт» (манжеты, липа, резинки) 8. Халат хирургический стандартного покроя (манжеты, липа, резинки) 9. Юбка (резинка)

Примечание: материалы №1, №2, №3, №4, №7, №8 обеспечивают высококачественное исполнение изделий по ГОСТ EN 13795-3 по показателям: микробная проницаемость, водоупорность, прочность на растяжение в сухом состоянии, прочность на растяжение во влажном состоянии.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность должна соответствовать приведенным в таблицах 5.1 – 5.4.

Таблица 5.1 Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021:	1 уп.
1.1	Халат хирургический и/или Халат хирургический стандартного покроя и/или Халат хирургический «Евростандарт» и/или Халат процедурный (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)

1.2	Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.3	Куртка или Рубашка	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.4	Брюки или Юбка	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.5	Комбинезон (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.6	Шапочка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.7	Бахилы хирургические (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.8	Нарукавники (при необходимости)	от 1 до 20 шт. (одного исполнения)
1.9	Фартук (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.10	Салфетка хирургическая (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.11	Перчатки (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.12	Шорты (трусы) (при необходимости)	от 1 до 6 шт. (одного исполнения)
1.13	Накидка (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.14	Бахилы полиэтиленовые (при необходимости)	от 2 до 20 шт.
1.15	Рубашка для роженицы (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.16	Бахилы-тапочки (при необходимости)	от 2 до 10 шт.
Документация:		
1.17	Инструкция по применению	1 шт.

Таблица 5.2 Комплект одежды медицинской врача-инфекциониста одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021

№ п/п	Наименование	Кол-во
1. Комплект одежды медицинской врача-инфекциониста одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021:		1 уп.
1.1	Халат хирургический или Халат хирургический стандартного покроя	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.2	Салфетка хирургическая (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.3	Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.4	Куртка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.5	Рубашка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.6	Брюки (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.7	Юбка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.8	Комбинезон (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.9	Шапочка	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.10	Бахилы хирургические (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.11	Нарукавники (при необходимости)	от 1 до 20 шт. (одного исполнения)
1.12	Фартук (при необходимости)	от 1 до 10 шт.

1.13	Перчатки (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.14	Накидка (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.15	Бахилы полиэтиленовые (при необходимости)	от 2 до 20 шт.
Документация:		
1.16	Инструкция по применению	1 шт.

Таблица 5.3 Комплект одежды медицинской для персонала №1 одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021

№ п/п	Наименование	Кол-во
1. Комплект одежды медицинской для персонала №1 одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021:		1 уп.
1.1	Халат хирургический или Халат хирургический стандартного покроа	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.2	Салфетка хирургическая (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.3	Куртка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.4	Рубашка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.5	Брюки (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.6	Юбка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.7	Комбинезон (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.8	Шапочка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.9	Нарукавники (при необходимости)	от 1 до 20 шт. (одного исполнения)
1.10	Фартук (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.11	Бахилы хирургические	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.12	Перчатки (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
Документация:		
1.13	Инструкция по применению	1 шт.

Таблица 5.4 Комплект одежды медицинской для персонала №2 одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021

№ п/п	Наименование	Кол-во
1. Комплект одежды медицинской для персонала №2 одноразовый стерильный по ТУ 14.12.30-015-70516780-2021:		1 уп.
1.1	Халат хирургический или Халат хирургический стандартного покроа	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.2	Салфетка хирургическая (при необходимости)	от 1 до 10 шт.
1.3	Костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки, юбка) (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.4	Шапочка (при необходимости)	от 1 до 10 шт. (одного исполнения)
1.5	Бахилы хирургические (при необходимости)	от 2 до 20 шт. (одного исполнения)
1.6	Нарукавники (при необходимости)	от 1 до 20 шт. (одного исполнения)
1.7	Фартук	от 1 до 10 шт.
1.8	Перчатки (при необходимости)	от 2 до 20 шт.

		(одного исполнения)
Документация:		
1.9	Инструкция по применению	1 шт.

5. МАРКИРОВКА

Символы, применяемые на маркировочной этикетке:

Ссылочный номер символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1	Наименование символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1	Изображение символа по ГОСТ Р ИСО 15223-1
5.1.1	Изготовитель	
5.1.3	Дата изготовления	
5.1.4	Использовать до	
5.1.5	Код партии	
5.2.4	Радиационная стерилизация	
5.2.6	Не стерилизовать повторно	
5.2.8	Не использовать при повреждении упаковки	
5.3.7	Предел температуры	
5.4.2	Запрет на повторное применение	

6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделие в упаковке стерилизовано радиационным способом по ГОСТ ISO 11137-1-2011 при стерилизующей дозе, составляющей 20 ± 5 кГр (максимально допустимая доза – 55 кГр). Процесс стерилизации валидирован и подвергается текущему контролю.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием необходимо осмотреть упаковку Изделия на отсутствие механических повреждений и убедиться в ее целостности. Запрещается использовать Изделие, если нарушена целостность его упаковки.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для однократного применения. Повторное использование запрещается!

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование

Изделие в упаковке и в транспортной таре следует транспортировать в крытых транспортных средствах транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования Изделия в упаковке и транспортной таре – при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности не более 80%.

При транспортировании транспортные тары с Изделиями должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их самопроизвольного перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного средства.

При погрузке, выгрузке и транспортировании Изделия должны быть приняты меры, предохраняющие его и транспортную тару от загрязнения, повреждения и попадания влаги.

7.2 Хранение

Хранение Изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой упаковке либо транспортной таре – при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия осуществляется с отходами класса Б в соответствии с действующим законодательством РФ на момент утилизации.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ 14.12.30-015-70516780-2021 при соблюдении указаний по транспортированию, хранению и применению.

Гарантийный срок хранения Изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 5 лет с даты изготовления. При наличии в комплекте поставки покупных стерильных медицинских изделий срок хранения комплекта может быть сокращен до срока годности покупных изделий.

11. РЕКЛАМАЦИИ

Запросы любого рода и рекламации следует направлять в ООО «Здравмедтех-Н» по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская 64/1, оф. 603, тел.: 209-22-30, e-mail: Info@zmt-nnsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ EN 13795-3-2011	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровни исполнения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibilизирующего действия
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
ГОСТ ISO 11607-2-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ ISO 11137-1-2011	Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

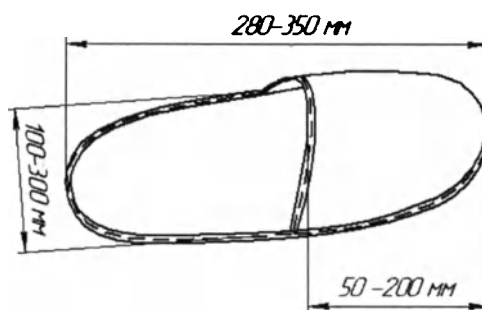


Рис. 1 – Бахилы-тапочки

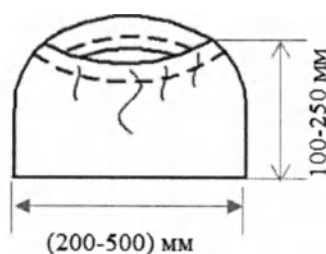


Рис. 2 – Бахилы полиэтиленовые

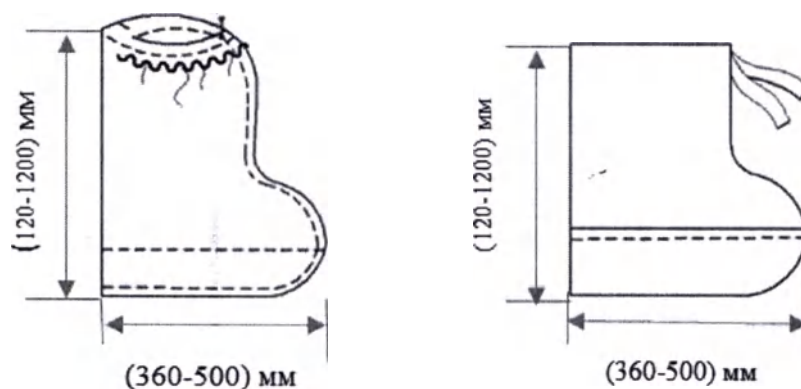


Рис. 3а – Бахилы хирургические, вариант исполнения: бахилы хирургические высокие (с резинкой или с завязками)

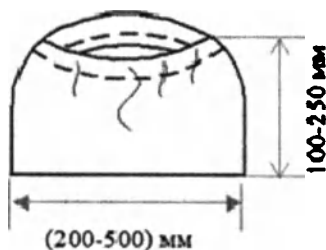


Рис. 3б – Бахилы хирургические, вариант исполнения: бахилы хирургические низкие

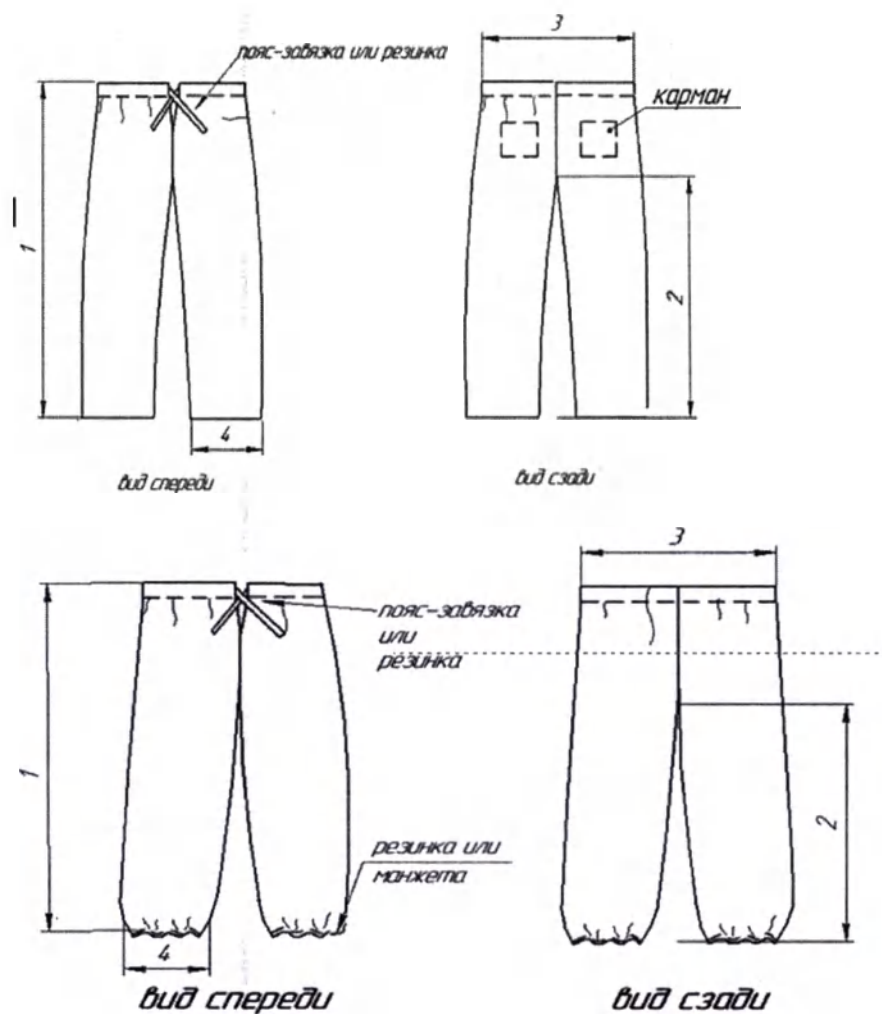


Рис. 4 – Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	900-1200							± 10
2	Длина изделия по шаговому шву, мм	700-900							± 10
3	Ширина изделия на уровне талии, мм (ПО)	520	600	640	720	760	800	840	± 5
4	Ширина брюк внизу, мм (ПО)	210	240	250	280	300	320	340	± 5

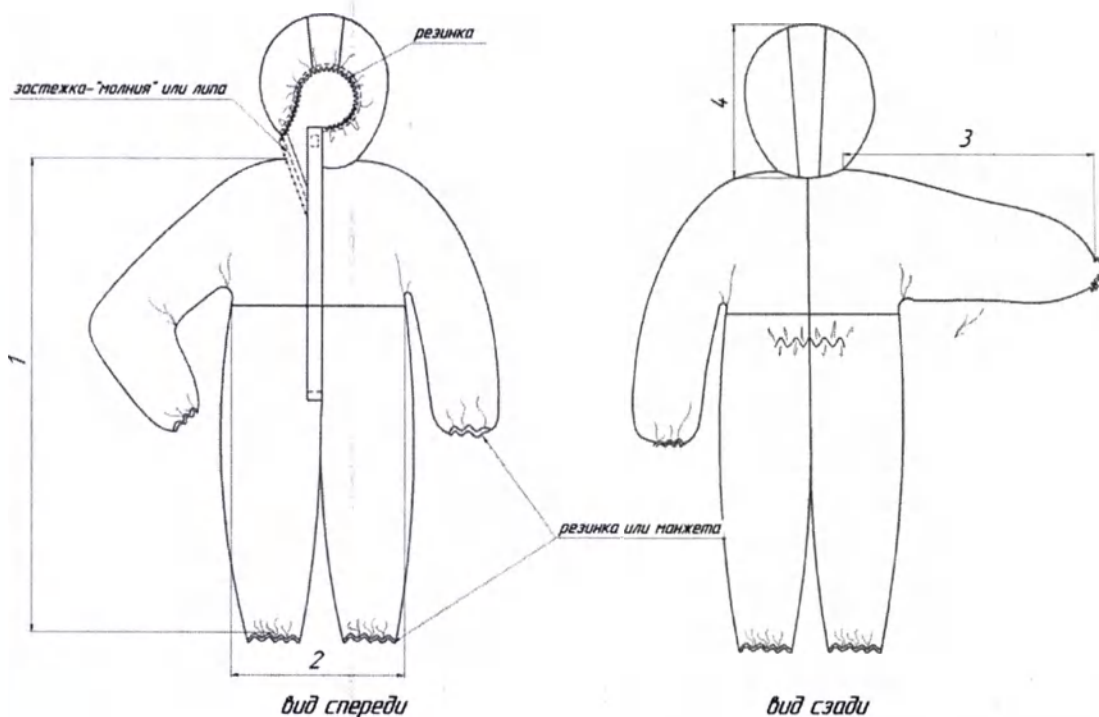


Рис. 5а – Комбинезон, вариант исполнения: Комбинезон (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1800-2000 мм, рукава на резинке или на манжете, низ брюк на резинке или на манжете, застежка молния или липа)

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1800-2000						± 10
2	Ширина изделия на уровне талии (по шву притачивания верхней части изделия к нижней), мм	640	690	740	790	840	890	± 5
3	Длина рукава+длина плеча, мм	880	880	900	910	930	930	± 10
4	Высота капюшона, мм	360-460						± 10

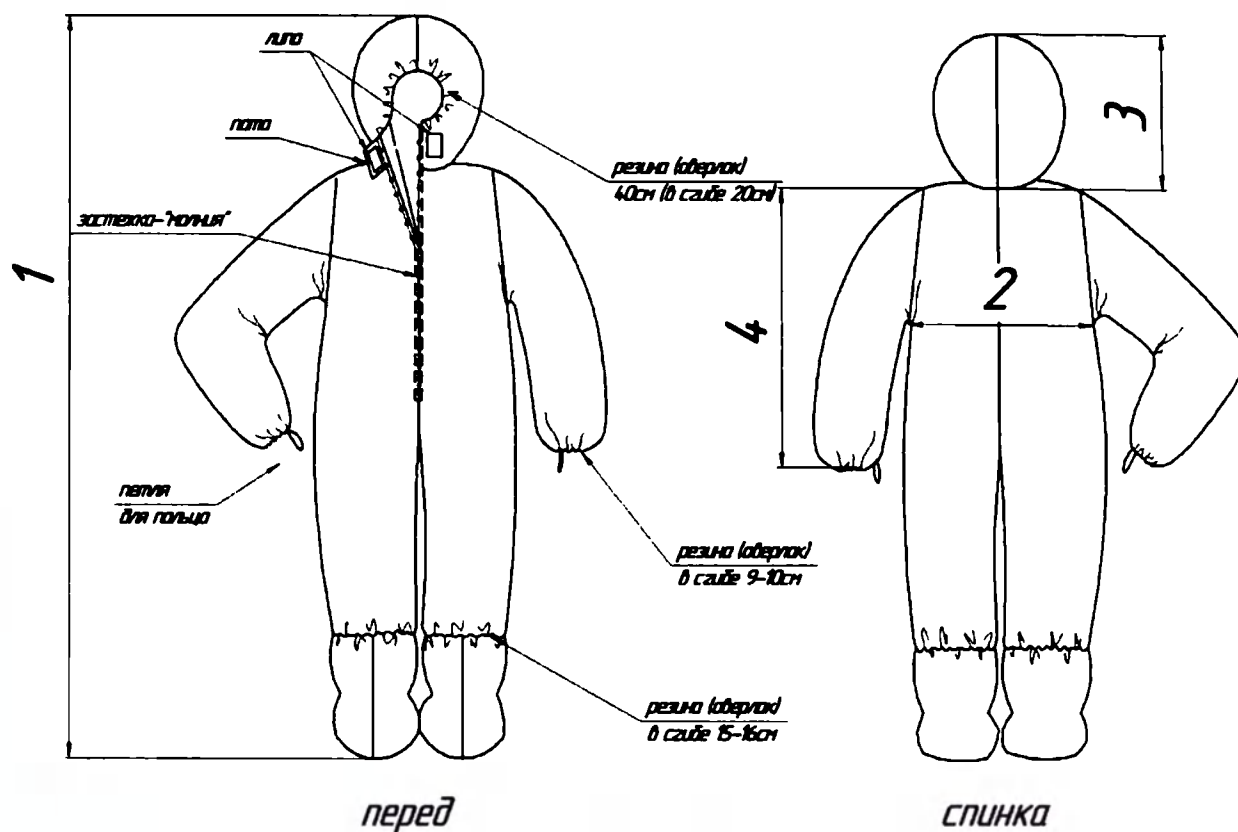


Рис. 56 – Комбинезон, вариант исполнения: Комбинезон (размеры 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 68-72, 74-76, длина 1780-2500 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка молния или липа, встроенные бахилы)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1780 - 2500							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	630	670	710	750	800	850	900	± 5
3	Высота капюшона, мм	390							± 10
4	Длина рукава, мм	500-600							± 10

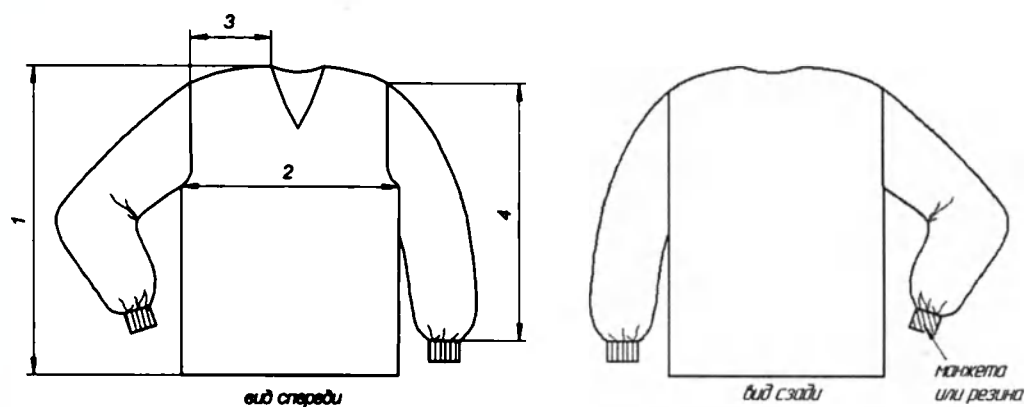


Рис. 6а – Куртка, вариант исполнения: Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	880	940	± 10
2	Ширина изделия на уровне проймы, мм	610	640	700	750	820	870	920	± 10
3	Ширина плеча, мм	200	230	250	270	300	310	320	± 10
4	Длина рукава, мм	200-530	200-550	200-560	200-570	200-600	200-600	200-600	± 10

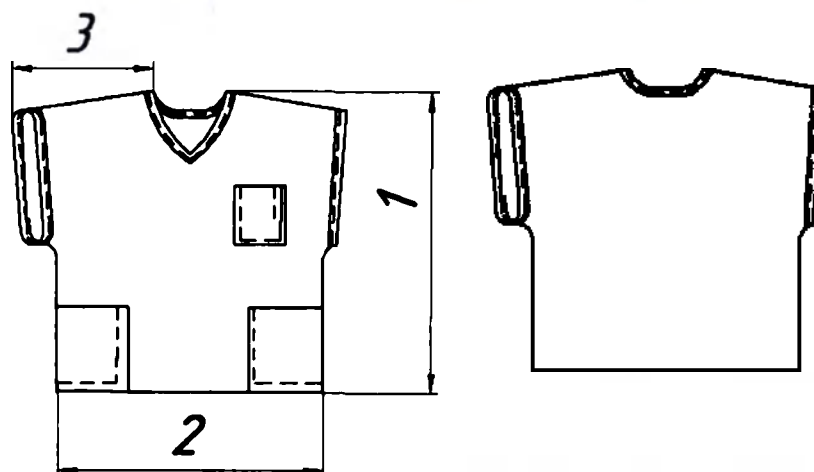


Рис. 6б – Куртка, вариант исполнения: Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

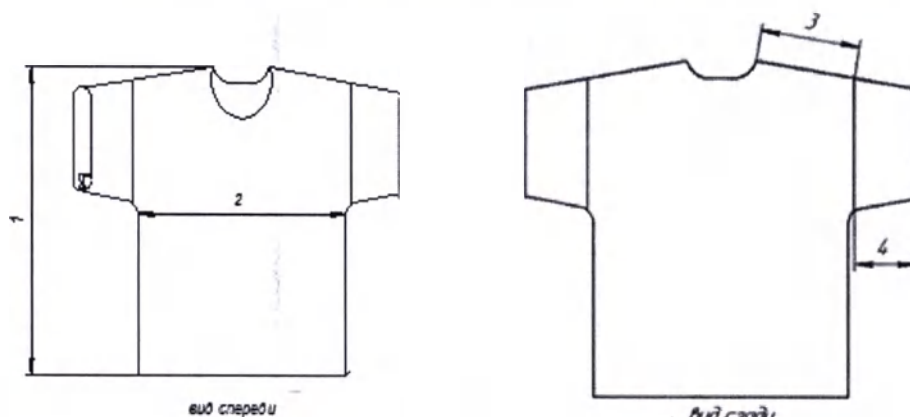


Рис. 6в – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	880	910	± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы, мм	610	640	700	750	820	900	980	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	300	320	350	350	360	± 5

4	Длина рукава, мм	100-200	± 5
---	------------------	---------	---------

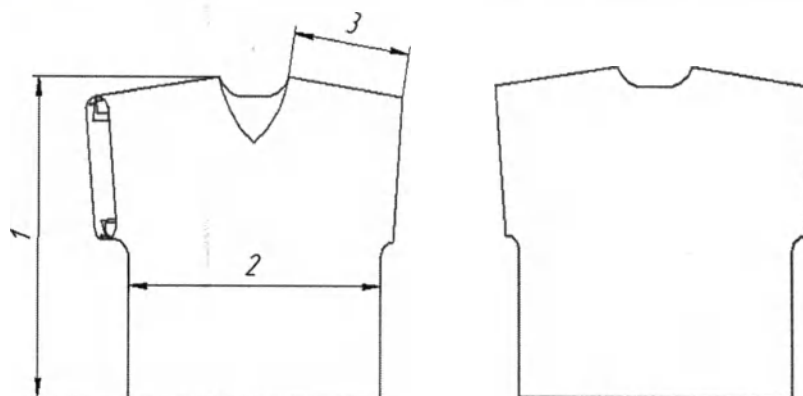


Рис. 6г – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

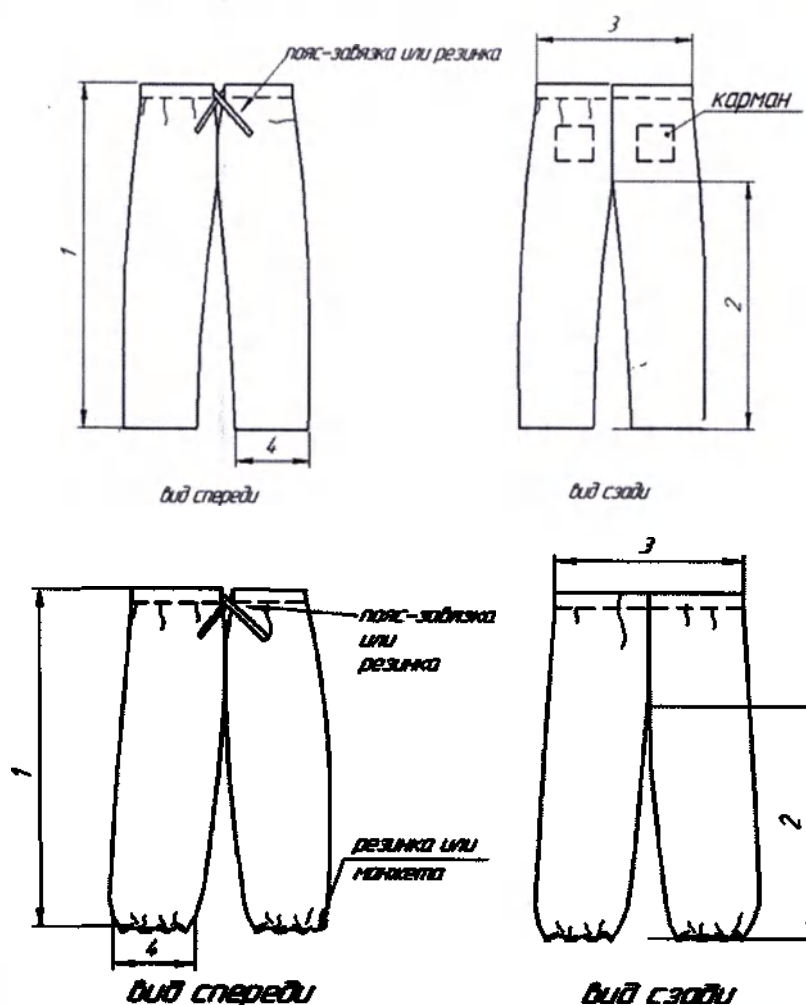


Рис. 6д – Брюки (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 900-1200 мм, пояс на резинке или на завязках, низ прямой или на резинке или на манжете, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	900-1200							± 10
2	Длина изделия по шаговому шву, мм	700-900							± 10
3	Ширина изделия на уровне талии, мм (ПО)	520	600	640	720	760	800	840	± 5
4	Ширина брюк внизу, мм (ПО)	210	240	250	280	300	340	380	± 5

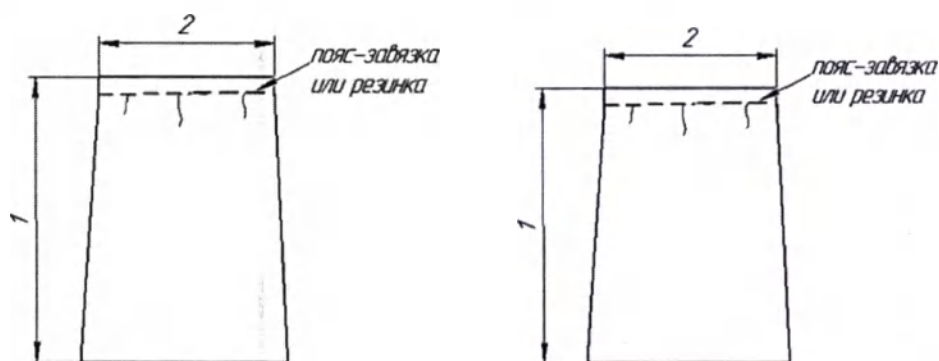


Рис. 6е – Юбка (размер 40-76, длина 500-2000 мм, пояс на резинке или на завязках)

Обозначение	Наименование измерения	Размер	
		40-76	Допуск, %
1	Длина изделия по боковому шву, мм	500-2000	± 5
2	Ширина изделия на уровне талии, мм	300-800	± 5

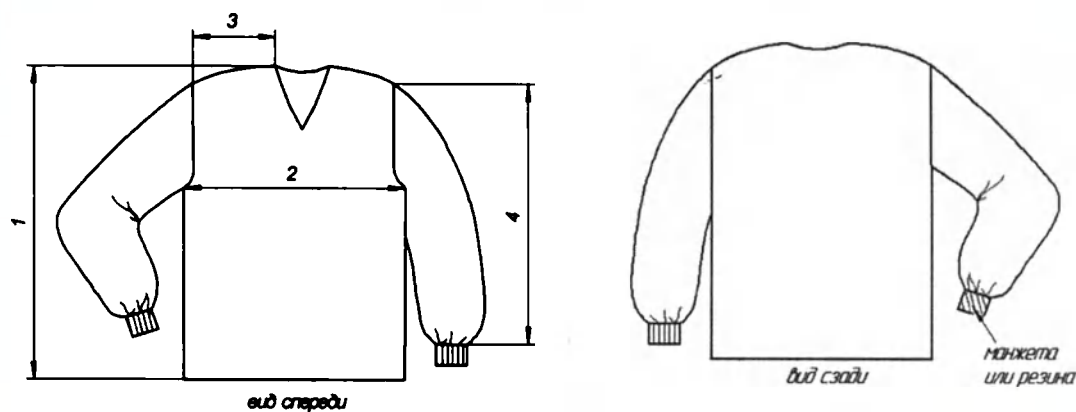


Рис. 7а – Куртка, вариант исполнения: Куртка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, рукава на резинке или на манжете)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	850	890	± 10
2	Ширина изделия на уровне проймы, мм	610	640	700	750	820	870	950	± 10
3	Ширина плеча, мм	200	230	250	270	300	340	370	± 10
4	Длина рукава, мм	200-530	200-550	200-560	200-570	200-600	200-600	200-600	± 10

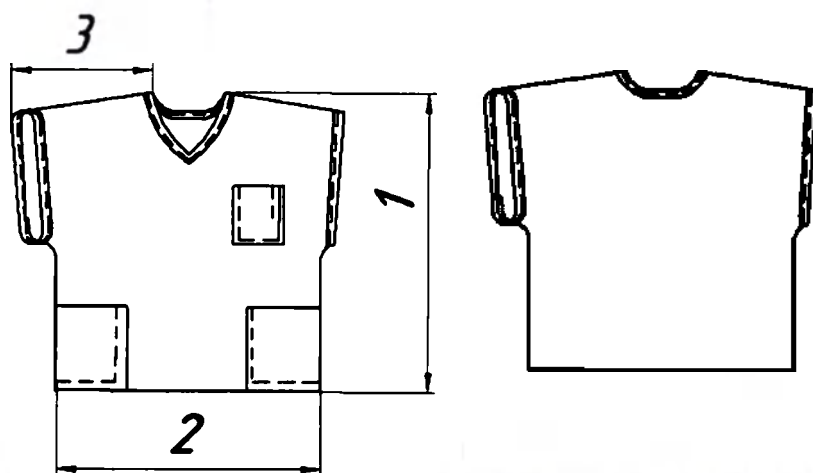


Рис. 76 – Куртка, вариант исполнения: Куртка «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	Допуск, %
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

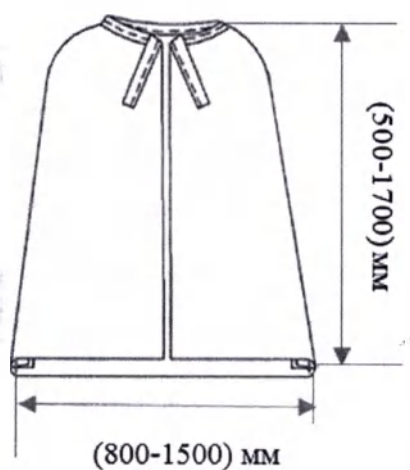


Рис. 8 – Накидка (500-1700)х(800-1500)мм

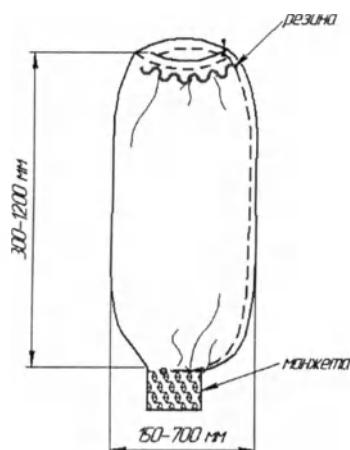


Рис. 9а – Нарукавники, вариант исполнения: Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на резинке, низ на манжете)

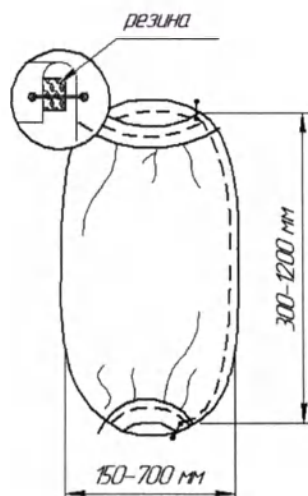


Рис. 9б – Нарукавники, вариант исполнения: Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на резинке, низ на резинке)

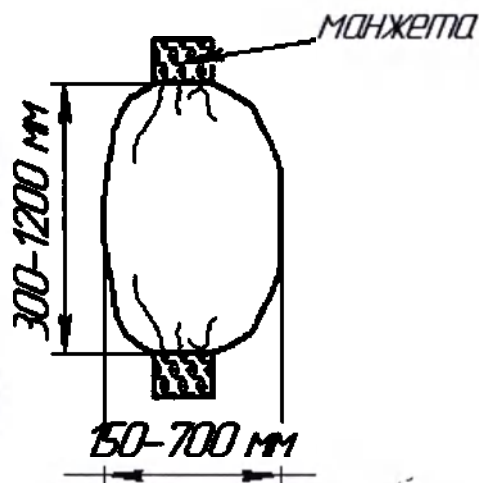


Рис. 9в – Нарукавники, вариант исполнения: Нарукавники (150-700)х(300-1200)мм (верх на манжете, низ на манжете)

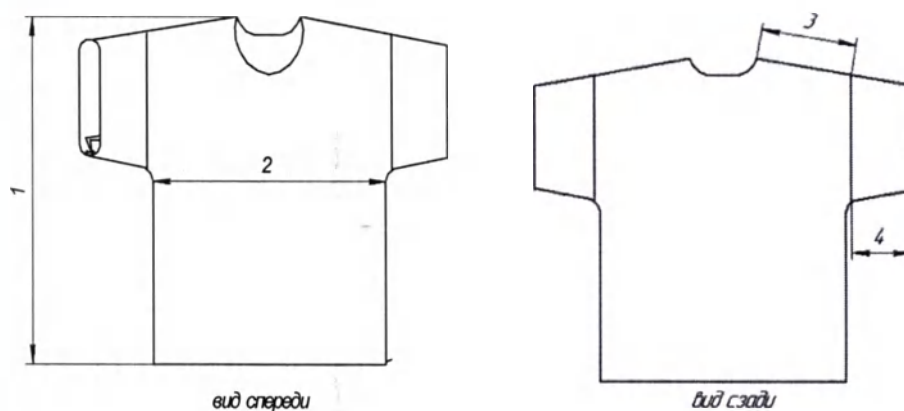


Рис. 10а – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, втачной рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	

1	Длина изделия, мм	720	750	770	790	810	880	910	± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы, мм	610	640	700	750	820	900	980	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	300	320	350	350	360	± 5
4	Длина рукава, мм	100-200							± 5

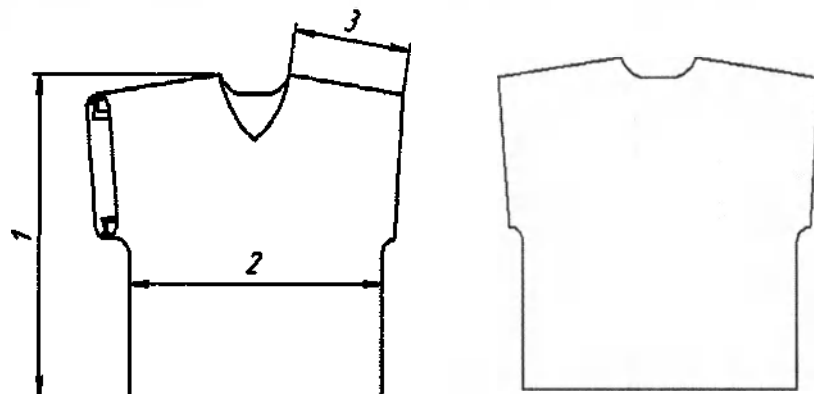


Рис. 106 – Рубашка (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, цельнокроеный рукав)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	700	740	760	780	800	830	960	± 10
2	Ширина изделия внизу, мм	550	620	680	740	800	860	930	± 5
3	Ширина плеча, мм	250	280	310	320	360	380	410	± 5

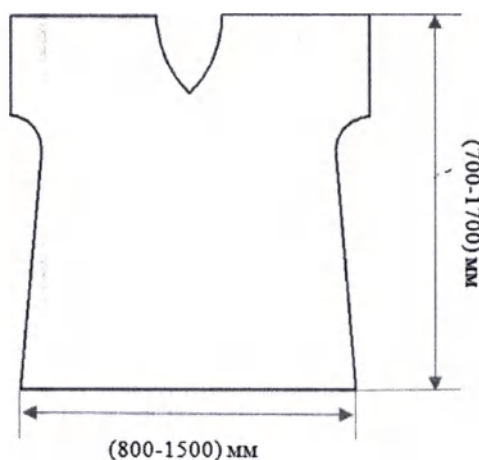


Рис. 11 – Рубашка для роженицы (800-1500)х(700-1700)мм (с круглой или с V-образной горловиной)

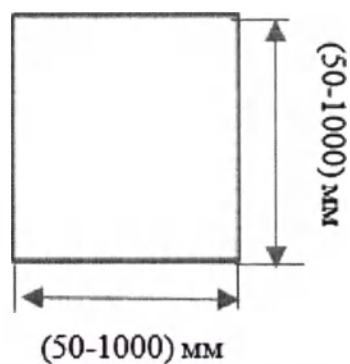


Рис. 12 – Салфетка хирургическая (50-1000)х(50-1000)мм

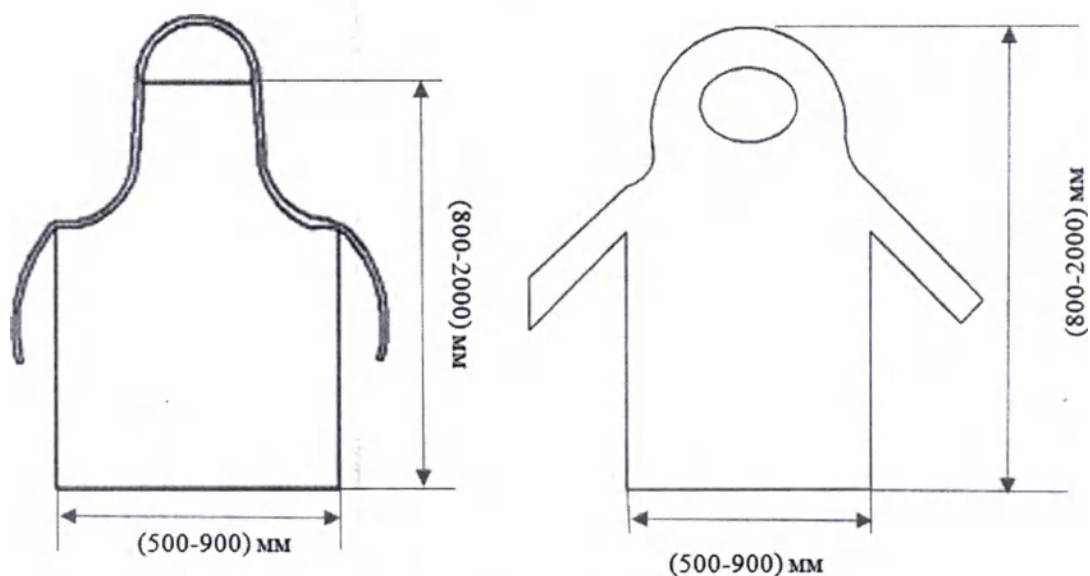


Рис. 13 – Фартук (500-900)х(800-1200)мм

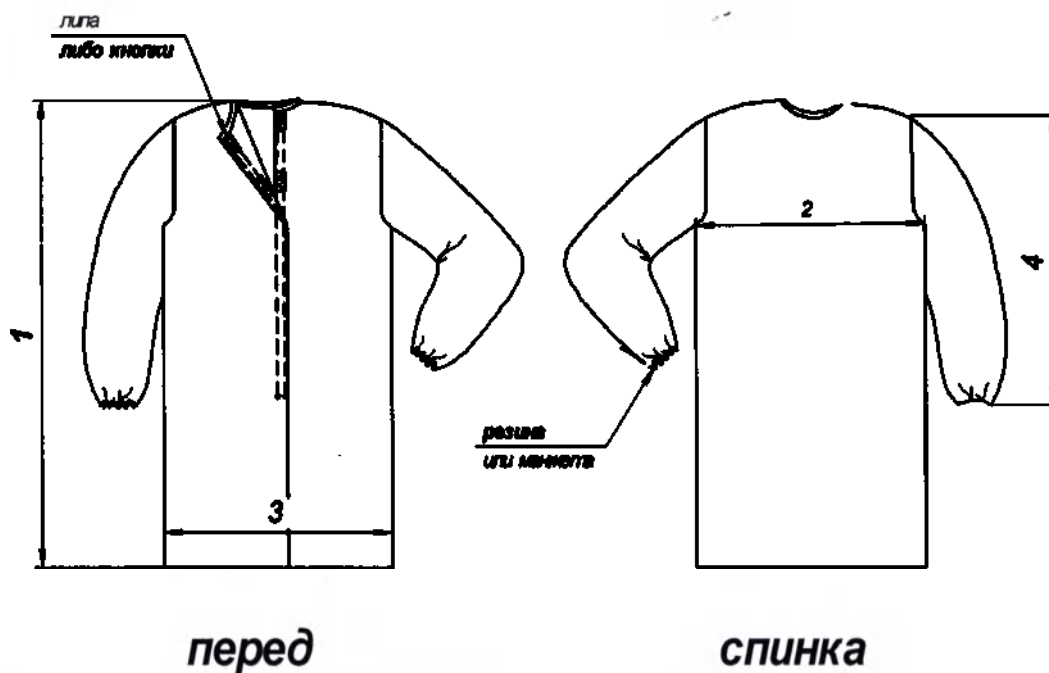


Рис. 14а – Халат процедурный, вариант исполнения: Халат процедурный (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка липа или кнопки)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	615	675	735	795	855	915	975	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	615	675	735	795	855	915	975	± 10
4	Длина рукава, мм	300-700							± 10

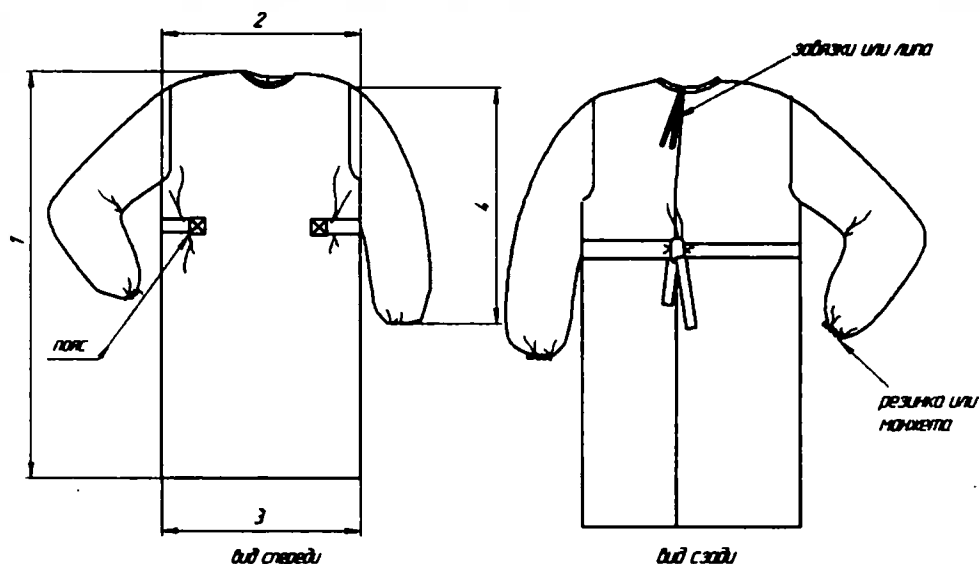


Рис. 146 – Халат процедурный, вариант исполнения: Халат процедурный (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750						± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	685	745	805	865	925	990	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	685	745	805	865	925	990	± 10
4	Длина рукава, мм	300-700						± 10

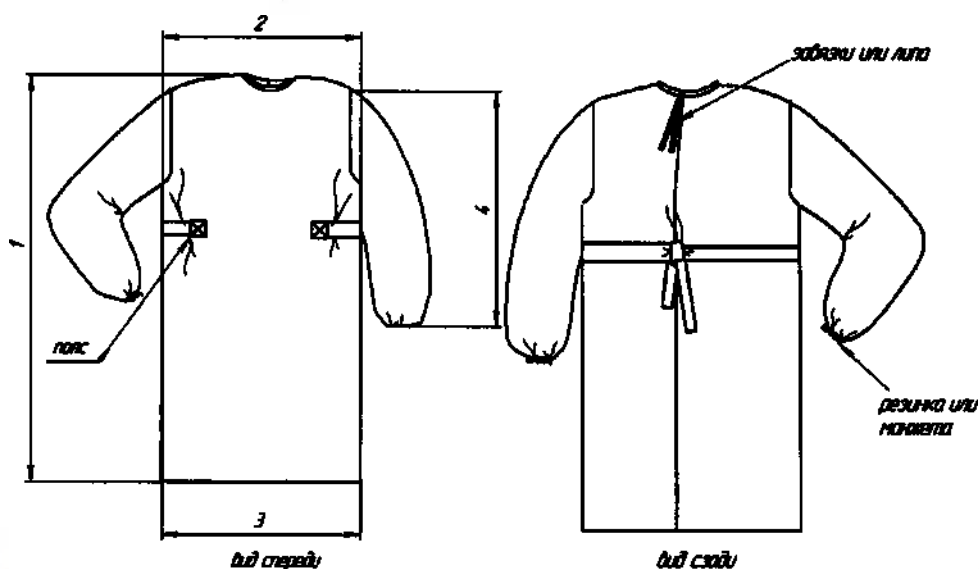


Рис. 15а – Халат хирургический, вариант исполнения: *Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)*

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750						± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	685	745	805	865	925	990	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	685	745	805	865	925	990	± 10
4	Длина рукава, мм	300-700						± 10

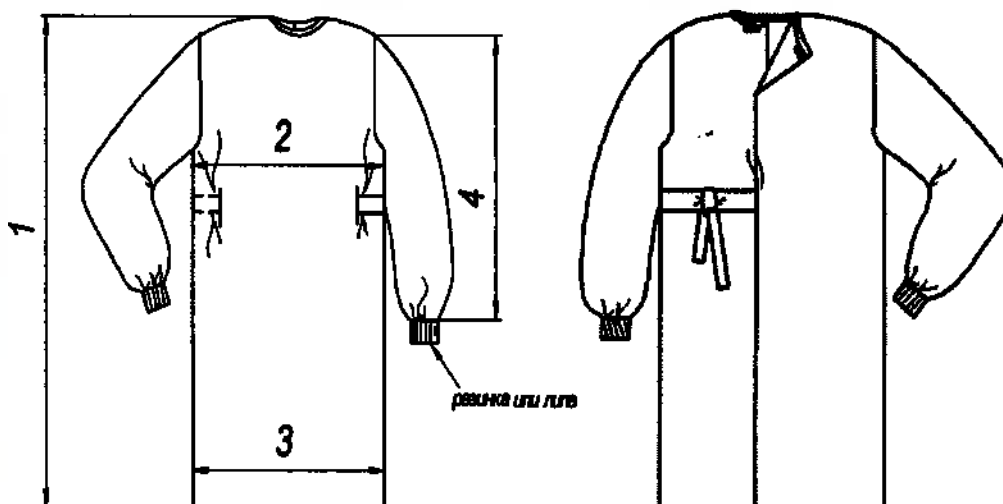


Рис. 15б – Халат хирургический, вариант исполнения: *Халат хирургический (размеры 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с запахом)*

Обозначение	Наименование измерения	Размер						Допуск, %
		44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750						± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	750	805	870	930	990	1050	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	750	805	870	930	990	1050	± 10

4	Длина рукава, мм	300-700	± 10
---	------------------	---------	----------

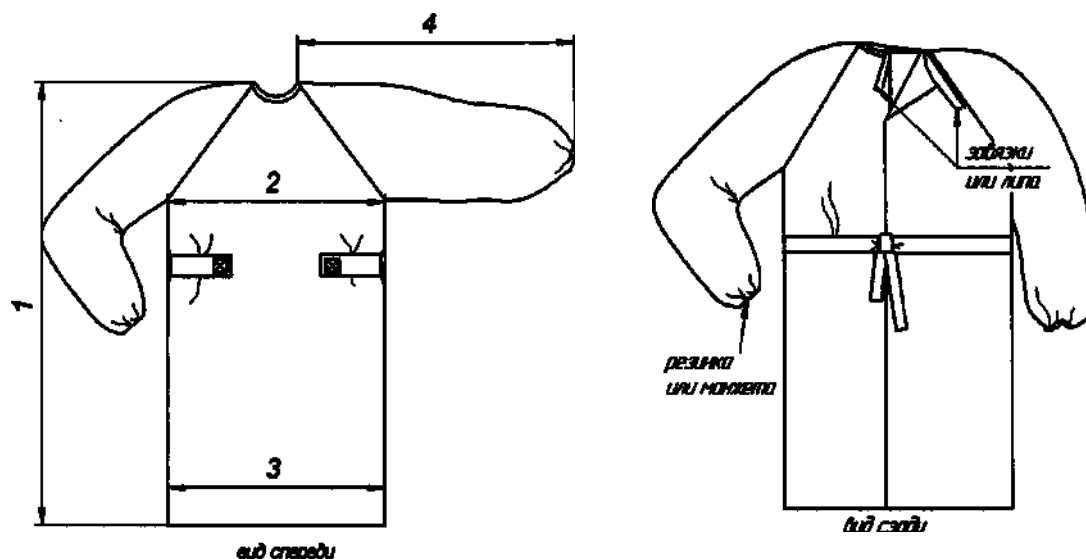


Рис. 15в – Халат хирургический, вариант исполнения: *Халат хирургический (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)*

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	625	685	745	800	865	920	980	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	625	685	745	800	865	920	980	± 10
4	Длина рукава + длина плеча, мм	750-850							± 10

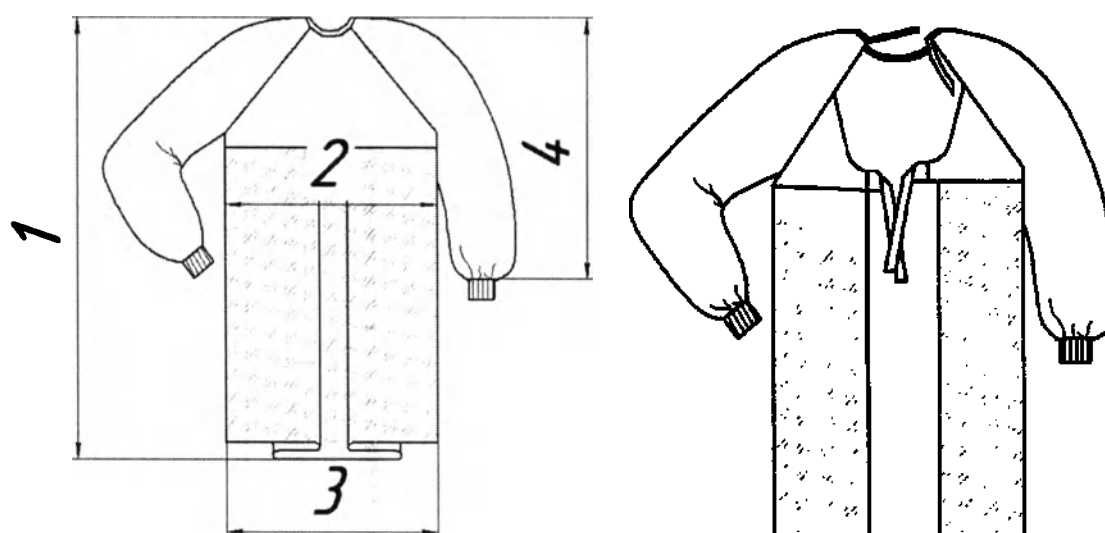


Рис. 15г – Халат хирургический, вариант исполнения: *Халат хирургический (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)*

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	500	560	620	720	780	860	980	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	625	685	880	980	1030	1050	1100	± 10
4	Длина рукава + длина плеча, мм	600-900							± 10

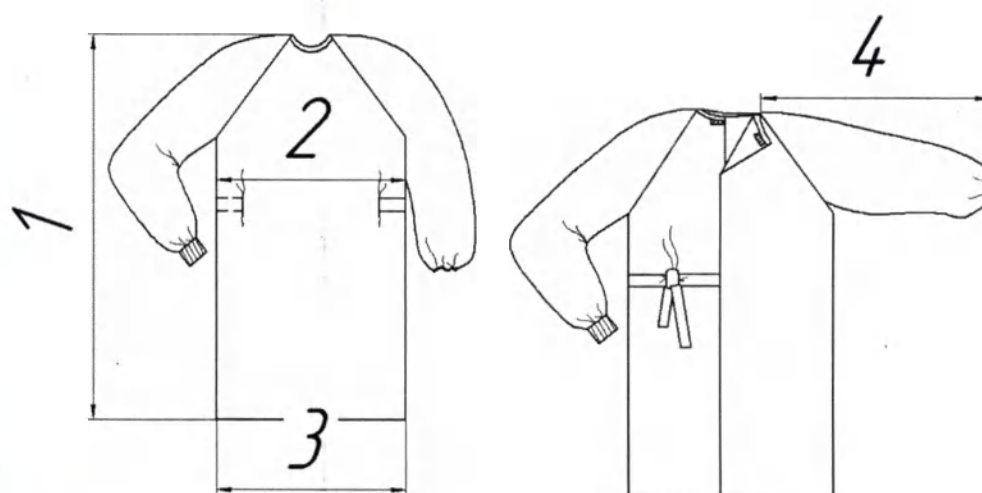


Рис. 16 – Халат хирургический «Евростандарт» (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, с застежкой сзади, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 10
4	Длина рукава+ длина плеча, мм	750-880							± 10

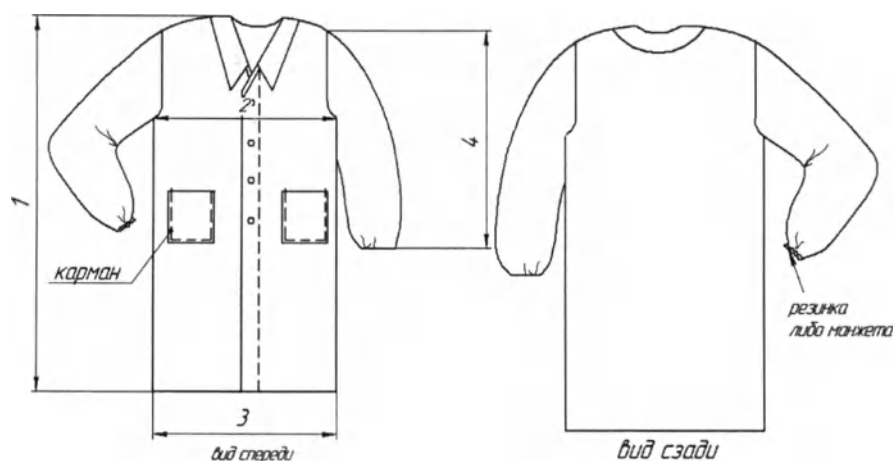


Рис. 17 – Халат хирургический стандартного покроя (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 1050-1750 мм, с воротником или без воротника, рукава на манжете или на резинке, застежка на кнопках или на пуговицах, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия, мм	1050-1750							± 10
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 10
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 10
4	Длина рукава, мм	300-870							± 10

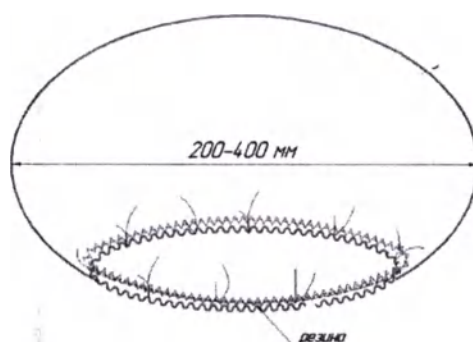


Рис. 18а – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-берет

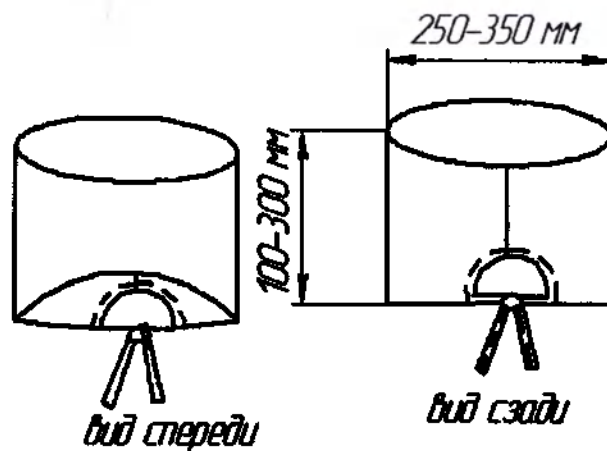


Рис. 18б – Шапочка, вариант исполнения: *Шапочка-коллак*

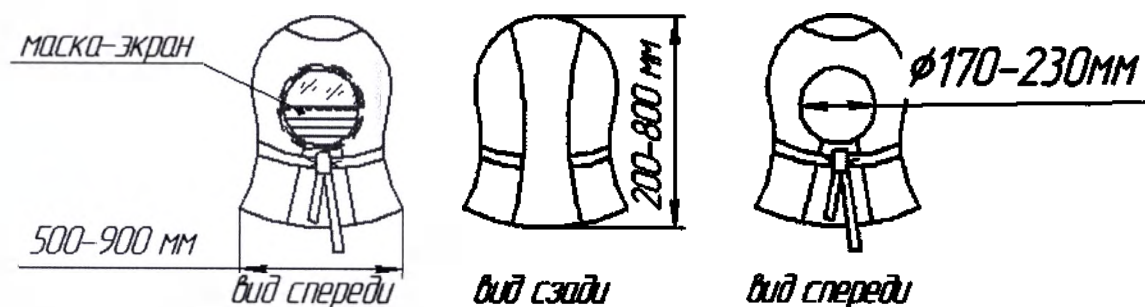


Рис. 18в – Шапочка, вариант исполнения: *Шапочка-шлем* (с маской-экраном или без маски-экрана)
Экран: прозрачная полиэстеровая пленка толщиной 100мкм

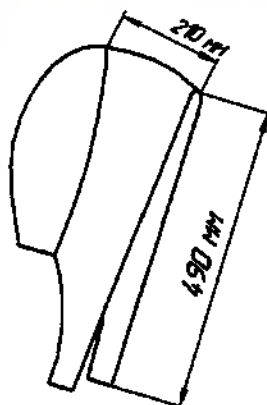


Рис. 18г – Шапочка, вариант исполнения: *Шапочка-косынка*



Рис. 18д – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-пилотка (с завязками или без завязок)

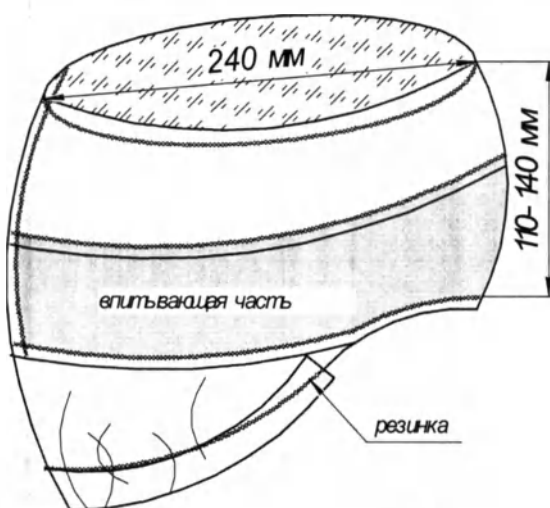


Рис. 18е – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-шлем

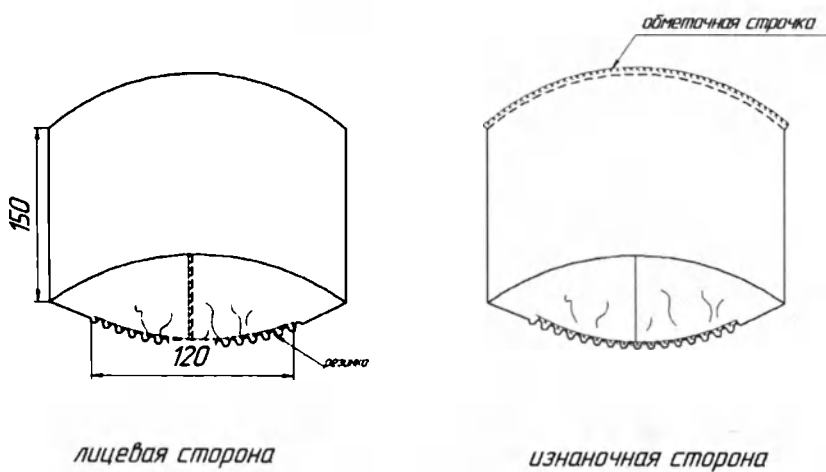


Рис. 18ж – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-косак

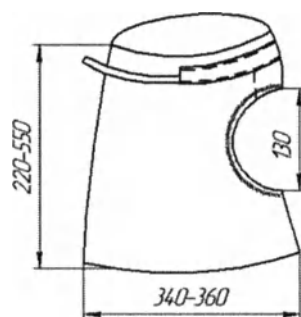


Рис. 18з – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-шлем (пелерина, кулиска) (с маской-экраном или без маски-экрана)

Экран: прозрачная полиэстеровая пленка толщиной 100мкм

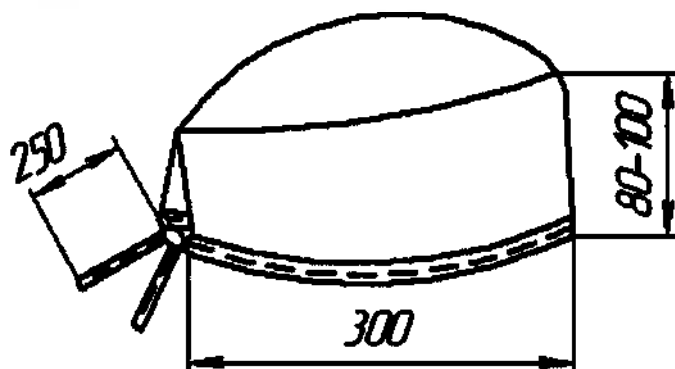


Рис. 18и – Шапочка, вариант исполнения: Шапочка-колпак (окантовка)

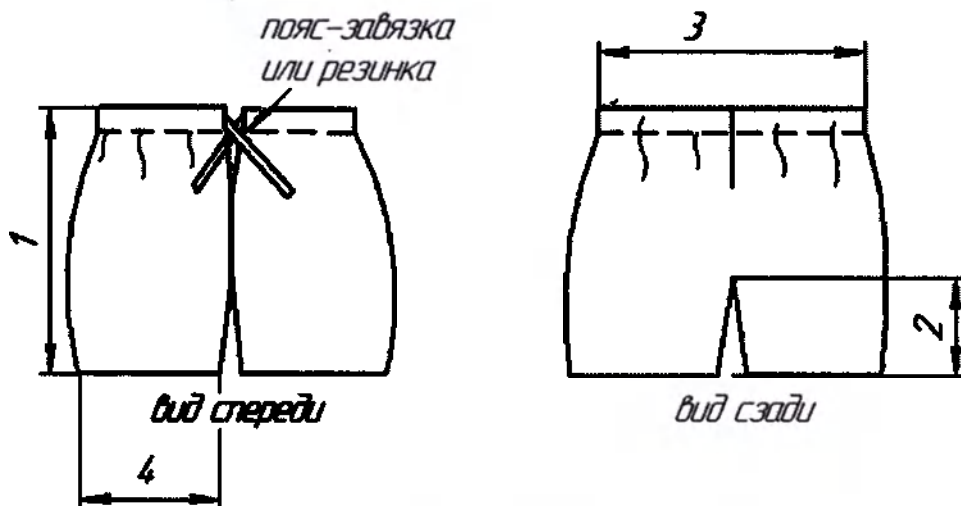


Рис. 19 – Шорты (трусы) (размеры 40-42, 44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68-72, 74-76, длина 300-700 мм, на завязках или на резинке)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42	44-48	50-54	56-60	62-66	68-72	74-76	
1	Длина изделия по боковому шву, мм	300-700							± 10
2	Длина изделия по шаговому шву, мм	120-300							± 10
3	Ширина изделия на уровне талии, мм	520	600	640	720	760	800	840	± 5

4	Ширина изделия внизу, мм	300	330	350	390	420	450	500	± 5
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

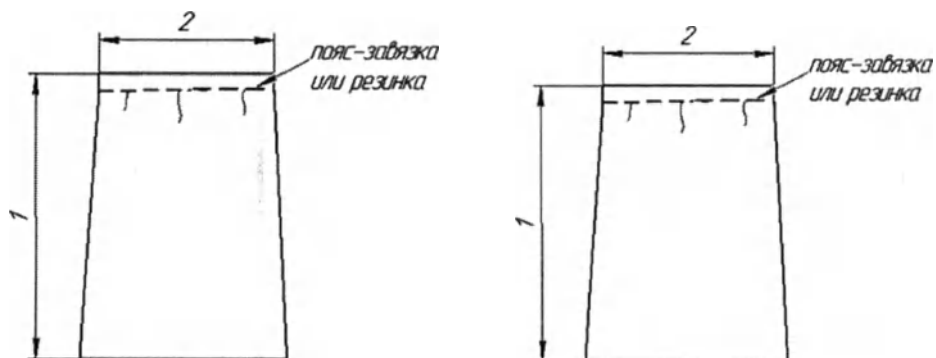


Рис. 20 – Юбка (размер 40-76, длина 500-2000 мм, пояс на резинке или на завязках)

Обозначение	Наименование измерения	Размер	
		40-76	Допуск, %
1	Длина изделия по боковому шву, мм	500-2000	± 5
2	Ширина изделия на уровне талии, мм	300-800	± 5

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
75 *Листов* *Лер*) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Зорамедтех-Н»
А.И. Клевцов