

**Особые указания**

**ВНИМАНИЕ:** рекомендуется опорожнять мочеприемник, как только он заполняется больше, чем на половину.

**Противопоказания**

Противопоказано использование лицами с повышенной чувствительностью к компонентам изделия.

**Меры предосторожности**

Не использовать изделие после окончания срока годности. Мочеприемник можно использовать только один раз, **не использовать повторно!** Производитель не несет ответственности за любые травмы и повреждения, полученные в результате несоблюдения рекомендаций производителя по применению данной продукции.

**Транспортировка и хранение**

Мочеприемники транспортируются всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах и правилами, установленными для каждого вида транспорта при температуре от 0°C до +40°C. При соблюдении рекомендованного способа хранения качество изделий гарантируется до конца срока годности, отмеченного на упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80 %.

**Срок годности**

5 лет с даты производства.

**Требования безопасности**

Мочеприемники безопасны при соблюдении указаний эксплуатационной документации, не оказывают вредного воздействия на организм человека. Обращение с ними не требует принятия особых мер предосторожности.

**Утилизация**

Мочеприемник необходимо опорожнить перед утилизацией, положить использованное изделие в пакет и выбросить вместе с бытовыми отходами. В условиях стационара использованные по назначению мочеприемники относятся к отходам класса Б и утилизируются согласно СанПиН 1.2.3685-21.

**Прием претензий**

Производитель / Организация, принимающая претензии:  
ООО «ГемаТех». Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 6, комната 8.1-23Н.  
Тел: 8 800 511 20 20, info@gema-tech.ru

**Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий**

- |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Код партии                               |
|  | Дата изготовления                        |
|  | Использовать до                          |
|  | Изготовитель                             |
|  | Обратитесь к инструкции по применению    |
|  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Для одноразового использования           |
|  | Беречь от огня                           |
|  | Знак вторичной переработки               |

**Инструкция по применению  
медицинского изделия**

**Мочеприемники медицинские для взрослых прикроватные, ножные, нестерильные с принадлежностями по ТУ 22.19.71-002-32952305-2020**

**Назначение**

Мочеприемник в различных вариантах исполнения представляет собой гибкий резервуар, присоединяемый к катетеру/уропрезервативу, предназначен для сбора мочи. Изделия используются в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Мочеприемник относится к изделиям однократного применения.

**Функциональные характеристики**

Прикроватные мочеприемники — разновидность мочеприемников, предназначенных для применения в стационарных условиях, когда пациент находится в перманентно лежачем состоянии.

Ножной мочеприемник (носимый) — разновидность мочеприемников, предназначенных для сбора мочи у подвижных пациентов.

**Показания к применению медицинского изделия (прикроватный мочеприемник)**

- Пациенты, которым необходим сбор мочи в результате катетеризации или дренирования мочевыводящих путей на любом уровне, когда пациент находится в лежачем положении.
- Пациенты, которые не могут свободно осуществлять и контролировать мочеиспускание, находясь в лежачем положении.

**Показания к применению медицинского изделия (ножной мочеприемник)**

- Пациенты, которым необходим сбор мочи в результате катетеризации или дренирования мочевыводящих путей на любом уровне и в случаях, когда нет возможности свободно осуществлять или контролировать мочеиспускание, у мобильных пациентов при ношении пододежды.

**Возможные осложнения**

При появлении болей или температуры, а также, если моча перестала поступать в мочеприемник — срочно обратитесь к врачу!

**Технические характеристики**

Мочеприемник представляет собой гибкий резервуар для сбора мочи (мешок), оснащенный дренажной и сливной трубками, коннектором и колпачком. Опорожнение мочеприемника осуществляется через сливную трубку с помощью многоразового сливного клапана. Для предотвращения обратного тока мочи каждый мочеприемник снабжен невозвратным (антирефлюксным) клапаном. Антирефлюксный клапан состоит из двух слоев пленки, между которыми одним концом закреплена дренажная трубка. Мешок мочеприемника изготавливают из не пропускающего запах мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Мешки прикроватного мочеприемника оснащены шкалой для измерения объема мочи. Ножные мочеприемники имеют центральную спайку для предотвращения сильного расширения мешка при заполнении. С задней стороны мешок может иметь подложку из нетканого материала.

Для комфортного и надежного ношения ножных мочеприемников используют ремешки для крепления на ноге. Крепление осуществляется с помощью прорезей в верхней и нижней части мешка. Ремешки ножные не входят в поставку.

Крепление прикроватных мочеприемников осуществляется с помощью фиксаторов, для которых в верхней части мешка имеются отверстия. Фиксаторы для прикроватных мочеприемников не входят в поставку.

В каждую коробку с изделиями вложена инструкция по применению.

Наименование и объем изделия указан на упаковке.

#### Общие рекомендации

Мочеприемник необходимо регулярно менять или опорожнять. Рекомендуется опорожнять мочеприемник, как только он заполняется больше, чем на половину. Рекомендованный срок ношения мочеприемника не более 3 дней.

Для эффективного оттока жидкости необходимо держать мочеприемник ниже уровня мочевого пузыря. Трубки мочеприемника не должны перегибаться и путаться.

Для удобства пользователя дренажная трубка может быть укорочена до требуемого размера. Для этого, отмерив необходимую длину трубки, укоротите ее с помощью ножниц, после чего присоедините коннектор.

#### Порядок применения мочеприемника

Перед установкой мочеприемника руки должны быть чистыми и сухими.

#### 1. Установка мочеприемника



Рис. 1

- Закройте сливной клапан мочеприемника (рис.1). Снимите колпачок с коннектора.

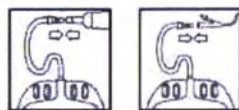


Рис. 2

- Надежно соедините коннектор мочеприемника с катетером или уропрезервативом (рис.2). Убедитесь, что сливной клапан закрыт.

#### 2. Крепление ножного мочеприемника



Рис. 3

- Прикрепите ремешки к мочеприемнику (рис.3). На верхней части мочеприемника используйте более длинный ремешок. Ремешки можно укоротить до необходимой длины, подрезав их ножницами.



Рис. 4

- Закрепите мочеприемник на ноге (рис. 4).

#### 3. Крепление прикроватного мочеприемника



Рис. 5

- Снимите колпачок с коннектора. Надежно соедините коннектор мочеприемника с катетером или уропрезервативом (рис. 5).
- Закройте сливной клапан мочеприемника (рис.6).

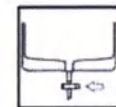


Рис. 6

- Прикроватные мочеприемники используются с фиксаторами для крепления мочеприемника на кровати. Закрепите прикроватный мочеприемник с помощью фиксаторов.

#### 4. Увеличение объема дренажной системы

Для увеличения объема дренажной системы, например, на ночь, прикроватный мочеприемник можно соединить с ножным мочеприемником.



Рис. 7

- Вставьте коннектор дренажной трубки прикроватного мочеприемника в сливную трубку ножного мочеприемника (рис. 7).
- Закройте сливной клапан мочеприемника (рис. 6).

#### 5. Опорожнение мочеприемника



Рис. 8

- Откройте сливной клапан (рис. 8) и опорожните содержимое в унитаз или контейнер.
- Постарайтесь, чтобы мочеприемник и сливной клапан не соприкасались с другими предметами, особенно с ободком унитаза.



Рис. 9

- Убедитесь в том, что сливной клапан надежно закрыт после опорожнения (рис. 9).

#### 6. Удаление мочеприемника



Рис. 10

- Отсоедините мочеприемник от уропрезерватива или катетера (рис. 10).
- Отстегните ремешки и снимите мочеприемник с ноги (для ножного мочеприемника).
- Снимите мочеприемник с прикроватного фиксатора (для прикроватного мочеприемника).

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
2 2025 листа(-ов)

прописью

Должность Генеральный директор  
ООО «Гемамед»

Дрондель А.В.

ФИО  
« 28 »

Подпись  
2025 г.



**Название медицинского изделия:**

Мочеприемники медицинские для взрослых прикроватные, ножные, нестерильные, с принадлежностями по ТУ 22.19.71-002-32952305-2020.

**1. Варианты исполнений:**

1. Мочеприемник ножной, объем 350 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
2. Мочеприемник ножной, объем 350 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
3. Мочеприемник ножной, объем 500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
4. Мочеприемник ножной, объем 500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
5. Мочеприемник ножной, объем 750 мл, сливной кран-зажим, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
6. Мочеприемник ножной, объем 750 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
7. Мочеприемник ножной, объем 800 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
8. Мочеприемник ножной, объем 800 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
9. Мочеприемник ножной, объем 1000 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
10. Мочеприемник ножной, объем 1000 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид (Confid) (вид 156390).
11. Мочеприемник прикроватный, объем 1500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 90 см Конфид (Confid) (вид 156370).
12. Мочеприемник прикроватный, объем 1500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 90 см Конфид (Confid) (вид 156370).
13. Мочеприемник прикроватный, объем 2000 мл, сливной клапан-зажим, трубка 100 см Конфид (Confid) (вид 156370).
14. Мочеприемник прикроватный, объем 2000 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 100 см Конфид (Confid) (вид 156370).
15. Мочеприемник прикроватный, объем 2500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 100 см Конфид (Confid) (вид 156370).
16. Мочеприемник прикроватный, объем 2500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 100 см Конфид (Confid) (вид 156370).
17. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 350 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
18. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 350 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
19. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
20. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
21. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 750 мл, сливной кран-зажим, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
22. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 750 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
23. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 800 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
24. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 800 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
25. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 1000 мл, сливной клапан-зажим, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
26. Мочеприемник ножной с нетканой подложкой, объем 1000 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 30-50 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156390).
27. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 1500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 90 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мочеприемники медицинские для взрослых  
по ТУ 22.19.71-002-32952305-2020

28. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 1500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 90 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).

29. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 2000 мл, сливной клапан-зажим, трубка 100 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).

30. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 2000 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 100 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).

31. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 2500 мл, сливной клапан-зажим, трубка 100 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).

32. Мочеприемник прикроватный с нетканой подложкой, объем 2500 мл, Т-обр. сливной клапан, трубка 100 см Конфид Софт (Confid Soft) (вид 156370).

### II. Состав:

1. Мочеприемник 10, 30, 120 шт./уп.
2. Упаковка.
3. Инструкция по использованию.
4. Маркировка.

### III. Принадлежности:

1. Ремешки ножные (комплект) - 2 шт.
2. Крючок фиксирующий к мочеприемнику прикроватному.

### Производитель медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «ГемаТех» (ООО «ГемаТех»),

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 6, комната 8.1-23Н.

Тел: 8 800 511 20 20

Электронная почта: [info@gema-tech.ru](mailto:info@gema-tech.ru)

прикроватные, ножные, нестерильные, с принадлежностями

### Рекламации:

Общество с ограниченной ответственностью «ГемаТех» (ООО «ГемаТех»)

Адрес: Россия, Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, этаж 6, комната 8.1-23Н.

Т: 8 800 511 20 20

[info@gema-tech.ru](mailto:info@gema-tech.ru)

### Назначение медицинского изделия:

Предназначено для сбора мочи.

### Потенциальный потребитель/пользователь медицинского изделия:

Изделие предназначено для использования в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

### Показания к применению медицинского изделия (прикроватный):

- Пациенты, которым необходим сбор мочи в результате катетеризации или дренировании мочевыводящих путей на любом уровне, когда пациент находится в лежачем положении.
- Пациенты, которые не могут свободно осуществлять и контролировать мочеиспускание, находясь в лежачем положении.

### Показания к применению медицинского изделия (ножной):

- Пациенты, которым необходим сбор мочи в результате катетеризации или дренировании мочевыводящих путей на любом уровне и в случаях, когда нет возможности свободно осуществлять или контролировать мочеиспускание, у мобильных пациентов при ношении под одеждой.


### Противопоказания, связанные с применением медицинского изделия по назначению:

Противопоказано использование лицами с повышенной чувствительностью к компонентам изделия (Поливинилхлорид, пластификатор- Ди(2-этилгексил) терефталат (DEHTP), Ba/Zn стабилизатор).

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению:

Не применимо

#### Состав медицинского изделия:

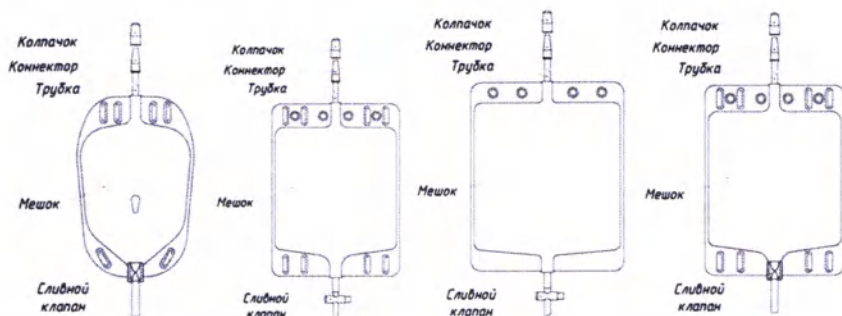

#### Технические характеристики:

Мочеприемник ножной

| Параметр                                | Значение                                      |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Номинальный объем мешка, мл             | 350, 500, 750, 800, 1000 ( $\pm 10\%$ )       |               |
| Длина дренажной трубки, см              | от 30 до 91,5 (от 30 до 95) ( $\pm 10\%$ )    |               |
| Тип клапана                             | Сливной клапан зажим, Т-образный клапан зажим |               |
| Размеры мешка, мм                       | Ширина ( $\pm 10\%$ )                         | 140,0 – 185,0 |
|                                         | Длина ( $\pm 10\%$ )                          | 255,0- 278,0  |
| Масса, г                                | от 20 до 50 ( $\pm 10\%$ )                    |               |
| Внутренний диаметр коннектора, мм       | От 4 до 7 ( $\pm 10\%$ )                      |               |
| Внутренний диаметр дренажной трубки, мм | От 5 до 6,5 ( $\pm 10\%$ )                    |               |

|                                                                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Расстояние от конца трубки (кончика коннектора) до самой нижней части мочеприемника, мм                                | От 300 до 1600 ( $\pm 10\%$ ) |
| Длина дренажной трубки от конца трубки (кончика коннектора) до верхней части мочеприемника, мм                         | От 300 до 1300 ( $\pm 10\%$ ) |
| Расстояние между геометрическими центрами точек (отверстий) крепления, мм                                              | От 44 до 160 ( $\pm 10\%$ )   |
| Расстояние между геометрическими центрами точек (отверстий) крепления, мм                                              | От 65 до 160 ( $\pm 10\%$ )   |
| Расстояние от верхней части до дна мочеприемника, мм                                                                   | 255,0- 278,0 ( $\pm 10\%$ )   |
| Длина сливной трубки/сливного клапана (крана) от нижнего края мочеприемника до нижнего конца мочеприемника в сборе, мм | От 40 до 100 ( $\pm 10\%$ )   |

#### Мочеприемник прикроватный

| Параметр                    | Значение                                          |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Номинальный объем мешка, мл | 1500, 2000, 2500 ( $\pm 10\%$ )                   |               |
| Длина дренажной трубки, см  | от 91,5 до 125 ( $\pm 10\%$ )                     |               |
| Тип клапана                 | Т-образный сливной клапан<br>Сливной клапан зажим |               |
| Размеры мешка (ШхД), мм     | Ширина ( $\pm 10\%$ )                             | 205,0 – 260,0 |
|                             | Длина ( $\pm 10\%$ )                              | 278,0         |
| Масса, г                    | от 45 до 90 ( $\pm 10\%$ )                        |               |

|                                                                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Внутренний диаметр коннектора, мм                                                                                      | От 5 до 7 ( $\pm 10\%$ )      |
| Внутренний диаметр дренажной трубки, мм                                                                                | От 5 до 7 ( $\pm 10\%$ )      |
| Расстояние от конца трубки (кончика коннектора) до самой нижней части мочеприемника, мм                                | От 300 до 1600 ( $\pm 10\%$ ) |
| Длина дренажной трубки от конца трубки (кончика коннектора) до верхней части мочеприемника, мм                         | От 345 до 1300 ( $\pm 10\%$ ) |
| Расстояние между геометрическими центрами точек (отверстий) крепления, мм                                              | От 80 до 165 ( $\pm 10\%$ )   |
| Расстояние от верхней части до дна мочеприемника, мм                                                                   | 278,0 - 300,0 ( $\pm 10\%$ )  |
| Длина сливной трубки/сливного клапана (крана) от нижнего края мочеприемника до нижнего конца мочеприемника в сборе, мм | От 55 до 65 ( $\pm 10\%$ )    |

**Инструкция по использованию медицинского изделия:**

- Освободить мочеприемник от упаковки.
- Проверить, закрыт ли клапан слива мочеприёмника. Если нет, то закрыть.
- Снять защитный колпачок с коннектора.
- Соединить коннектор мочеприемника с коннектором катетера.
- Разместить мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента, при этом необходимо обращать внимание, чтобы трубка не провисала (угроза застоя мочи и развития восходящей инфекции). Использовать ремешки для

крепления мочеприемника на ноге пациента (для ножных мочеприемников) или фиксаторы (крючки фиксирующие) для крепления мочеприёмника на кровати пациента (для прикроватных мочеприемников, не входит в поставку).

- Убедиться, что трубка не перекручена, сливной клапан закрыт.
- Мешок мочеприемника зафиксировать в вертикальном положении.
- Мочеприёмник не должен переполняться. Необходимо опорожнить мочеприёмник, когда объем жидкости в мочеприемнике достигнет максимального уровня шкалы (при наличии).
- Чтобы опорожнить мочеприемник необходимо открыть сливной клапан.
- Убедиться в том, что клапан надежно закрыт после того, как мешок был опорожнен.
- Отсоединить мочеприемник от катетера. Отстегнуть ремешки (для ножного мочеприемника) и снять мочеприемник с ноги или снять мочеприёмник (для прикроватного мочеприемника) с прикроватного фиксатора (крючка фиксирующего).

**Меры предосторожности при эксплуатации, хранении и транспортировке медицинского изделия:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не использовать при нарушении целостности упаковки.
- Не использовать изделие после окончания срока годности.
- **Не использовать мочеприемник повторно!**
- Не подлежит дезинфекции, стерилизации с целью повторного применения.
- Беречь мочеприемник вдали от растворителей или спиртосодержащих жидкостей.

- Не подвергать наполненный мочеприемник сильному давлению.

- Производитель не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования мочеприемника с нарушением способа применения, указанного в данной инструкции.

**ВНИМАНИЕ:** не оставлять мочеприемник прикрепленным на более 1 час. В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый.

**ВНИМАНИЕ:** проконсультироваться с врачом перед применением мочеприемника.

#### **Правила хранения и транспортировки медицинского изделия**

- Хранить в чистом, сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +40°C, относительной влажности воздуха до 80 %.
- Хранить горизонтально.
- Не подвергать нагреванию и замораживанию.
- Мочеприемники могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств и правилами, установленными для каждого вида транспорта при температуре от минус 0°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха до 80 %.
- При соблюдении рекомендованного способа хранения стабильны до конца срока годности, указанного на упаковке медицинского изделия.
- Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности медицинского изделия:**

Срок годности – 5 лет.

**Утилизация медицинского изделия:**

прикроватные, ножные, нестерильные, с принадлежностями

Медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По окончании использования утилизация медицинского изделия на территории РФ проводится в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Упаковочные материалы утилизировать на территории РФ в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Опорожнить мочеприёмник перед утилизацией.

Не смывать в унитаз.

#### **Комплектация медицинского изделия:**

В каждой упаковке может быть по 10, 30, 120 штук мочеприемников.

Комплектация медицинского изделия при поставке:

| Позиция                              | Количество, шт. |
|--------------------------------------|-----------------|
| Мочеприемник                         | 10, 30, 120 шт. |
| Коробка упаковочная, картонная/пакет | 1               |
| Инструкция по использованию          | 1               |
| Маркировка                           | 1               |

Принадлежности поставляются отдельно по заказу.

**Символы и обозначения, используемые на упаковке медицинского изделия:**

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Код партии                               |
|  | Дата изготовления                        |
|  | Использовать до                          |
|  | Изготовитель                             |
|  | Обратитесь к инструкции по применению    |
|  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Для одноразового использования           |
|  | Беречь от влаги                          |
|  | Знак вторичной переработки               |

**Гарантийные обязательства производителя:**

Производитель не несет ответственность за последствия, вызванные использованием медицинского изделия не в соответствии с данной инструкцией по использованию.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
6 шесть листа(-ов)  
прописью

Должность: Руководитель производственной  
службы ООО «ГемаТех»

Дрондель А.В.

ФИО

« 28 » 12

Подпись

20 23

