

Общество с ограниченной ответственностью
«СКИНВЕЛ»

123557, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Пресненский Вал,
дом 14, корпус 2, помещ. пом. ХБ, ком. 4, Р.М. 2
ИНН 7703478682 КПП 770301001 тел. +7 (495) 255-07-82

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «СКИНВЕЛ»

«18» апреля 2024 года

Ко Бум Сук



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Аппарат лазерный тулиевый LaseMD Ultra
производства

Lutronic Corporation / Лутроник Корпорейшн
Республика Корея



Блок основной LaseMD Ultra с кабелем из оптоволокна и манипулой Ultra.
Общий вид.



Блок основной LaseMD Ultra с кабелем из оптоволокну и манипулой Ultra.
Общий вид.



Блок основной. Колесо с тормозом.



Блок основной. Левая боковая панель.

LUTRONIC MD CE 2480 UDI

SN LU223H021
2023.08.18

Product Name : Thulium Laser
Model Name : LaserMD Ultra
Laser Product Class : CLASS IV
Laser Wavelength : 1927 nm
Weight : 33 kg
Electrical Shock Class : CLASS I, TYPE B
Electrical Rating : AC100-240V, 50/60Hz / 150VA

Manufacturer : Lutronic Corporation
Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82-31-908-3440
https://www.lutronic-europe.com

MADE IN KOREA
FAX : +82-31-907-3440
http://www.lutronic.com

Never look directly into the laser aperture or at the end of the handpiece when power is applied. Serious eye injury and/or blindness could result. This system is intended for use by healthcare professionals only. This system may cause radio interference or may disrupt the operation of nearby equipment. It may be necessary to take mitigation measures, such as reorienting the or shielding the location.
Before operating the device, read the operator's manual.
EC Representative : Emergo Europe
Westervoortse dijk 80, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

Storage Conditions:

15°C - 30°C

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS IV LASER PRODUCT

MAX. Thulium LASER POWER: 20W
MAX. PULSE DURATION: 4ms
Thulium LASER WAVELENGTH: 1927nm
MAX. AIMING LASER POWER@ 658nm: 5 mW
IEC 60825-1: 2014

DANGER - CLASS IV VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR UNINTENDED SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

WARNING
ELECTRIC SHOCK HAZARD
Electric current is still alive when cover is removed. This device is to be serviced by trained personnel only.

DANGER

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

MAXIMUM Thulium LASER POWER: 20W
MAX. PULSE DURATION: 4ms
Thulium WAVELENGTH: 1927nm
CLASS IV LASER PRODUCT

Блок основной. Правая боковая панель.



Блок основной. Задняя панель.



Блок основной. Передняя панель.




Блок основной. Передняя панель.




Стойка манипулы в сборе с изделием
(блок основной с кабелем из оптоволокна и манипулой Ultra).


Болт для фиксации стойки манипулы, в сборе с изделием
(стойка манипулы, кабель из оптоволокна).

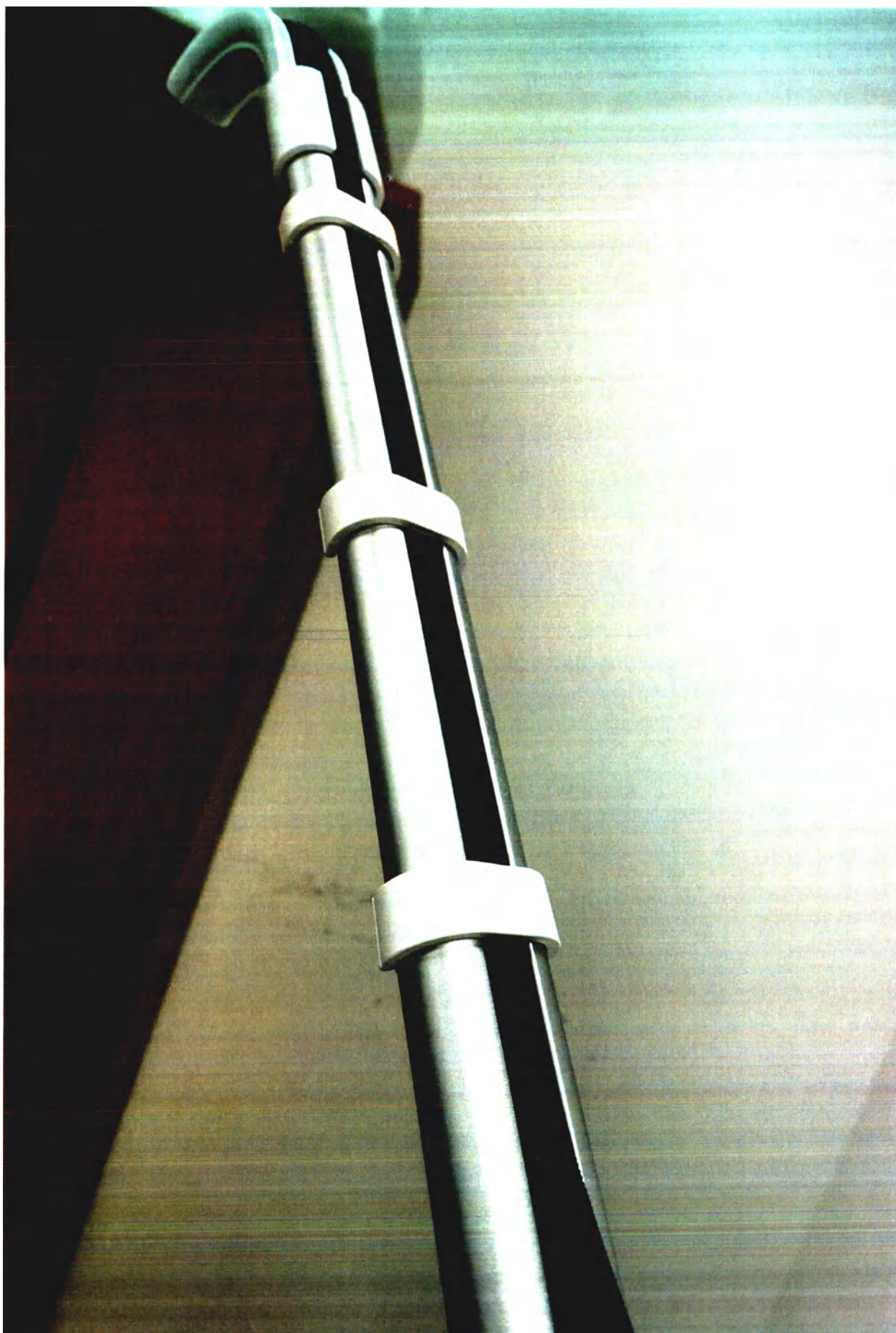



Клипса для стойки манипулы - 3 шт., в сборе с изделием
(стойка манипулы, кабель из оптоволокна).

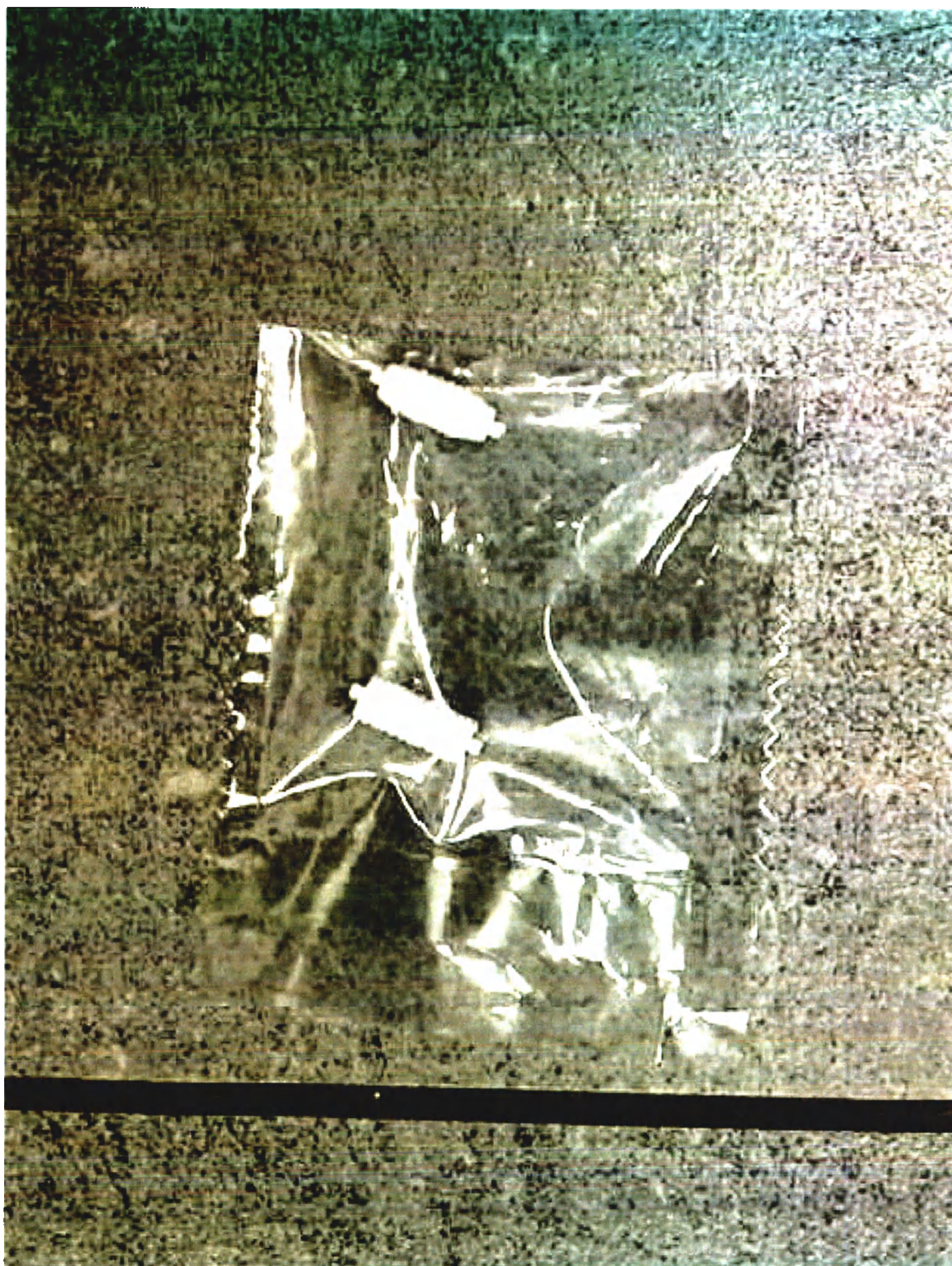

Комплект роликов в составе: ролик конический, ролик прямой.

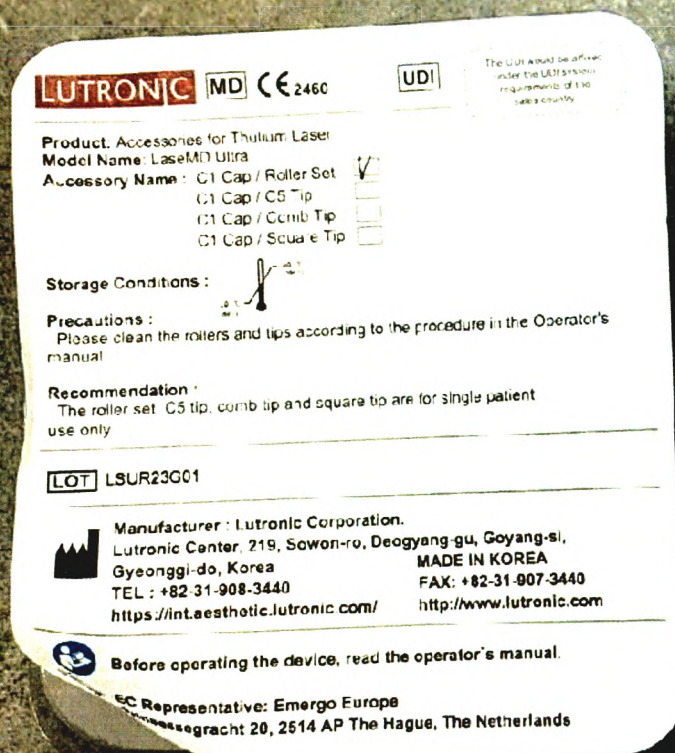

Комплект роликов с колпачком C1 в составе: ролик конический одноразовый; ролик прямой одноразовый, колпачок C1 одноразовый.

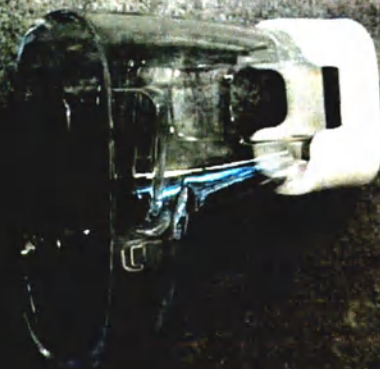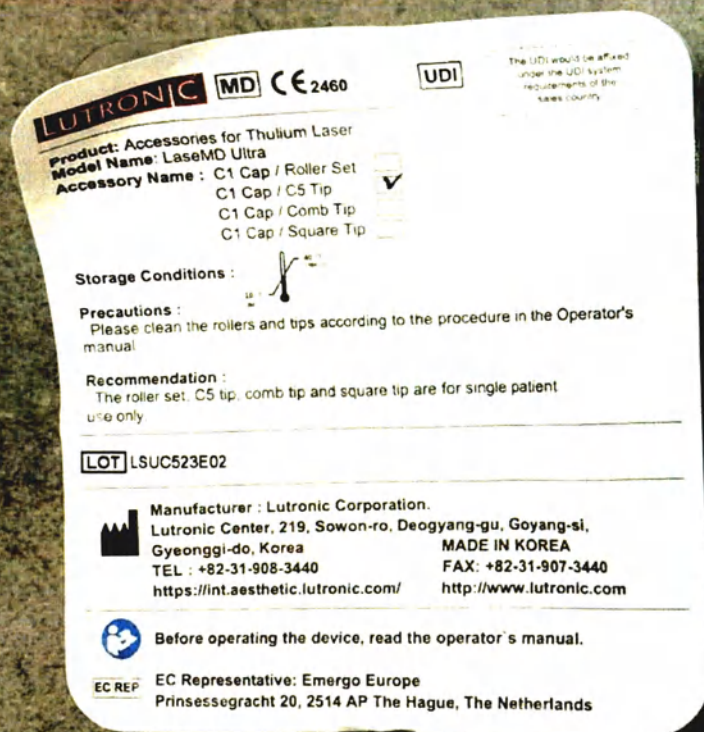

Комплект с колпачком C1 и наконечником C5 в составе: колпачок C1 одноразовый, наконечник C5 одноразовый.

LUTRONIC MD CE 2460 UDI

The UDI would be affixed under the UDI system requirements of the sales country.

Product: Accessories for Thulium Laser
Model Name: LaseMD Ultra
Accessory Name : C1 Cap / Roller Set ☐
 C1 Cap / C5 Tip ☐
 C1 Cap / Comb Tip ☒
 C1 Cap / Square Tip ☐

Storage Conditions : 

Precautions :
 Please clean the rollers and tips according to the procedure in the Operator's manual.


Recommendation :
 The roller set, C5 tip, comb tip and square tip are for single patient use only.

LOT LSUC23B01

Manufacturer : Lutronic Corporation.
 Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
 Gyeonggi-do, Korea
 TEL : +82-31-908-3440
<https://int.aesthetic.lutronic.com/>
 MADE IN KOREA
 FAX: +82-31-907-3440
<http://www.lutronic.com>

 Before operating the device, read the operator's manual.

EC REP EC Representative: Emergo Europe
 Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

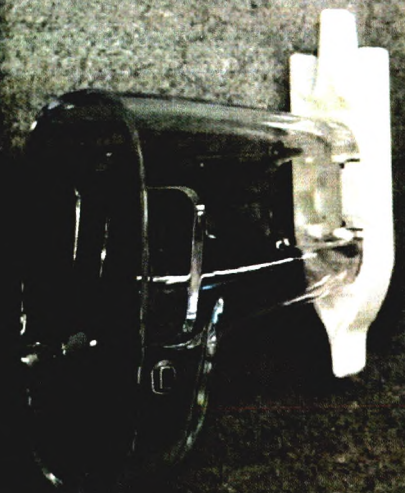

Комплект с колпачком C1 и наконечником гребенчатым в составе: колпачок C1 одноразовый; наконечник гребенчатый одноразовый.

LUTRONIC MD CE 2460

UDI

The UDI would be utilized
under the UDI system
requirements of the
sales country

Product: Accessories for Thulium Laser
Model Name: LaseMD Ultra

Accessory Name: C1 Cap / Roller Set ☐
C1 Cap / C5 Tip ☐
C1 Cap / Comb Tip ☐
C1 Cap / Square Tip ☒

Storage Conditions:



Precautions:

Please clean the rollers and tips according to the procedure in the Operator's manual.

Recommendation:

The roller set, C5 tip, comb tip and square tip are for single patient use only.

LOT LSUS23G01



Manufacturer: Lutronic Corporation.
Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82-31-908-3440
<https://int.aesthetic.lutronic.com/>


MADE IN KOREA
FAX: +82-31-907-3440
<http://www.lutronic.com>




Before operating the device, read the operator's manual.




EC Representative: Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

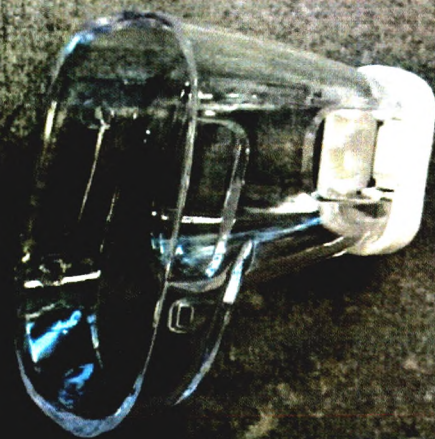

Комплект с колпачком C1 и наконечником квадратным в составе: колпачок C1
одноразовый, наконечник квадратный одноразовый.

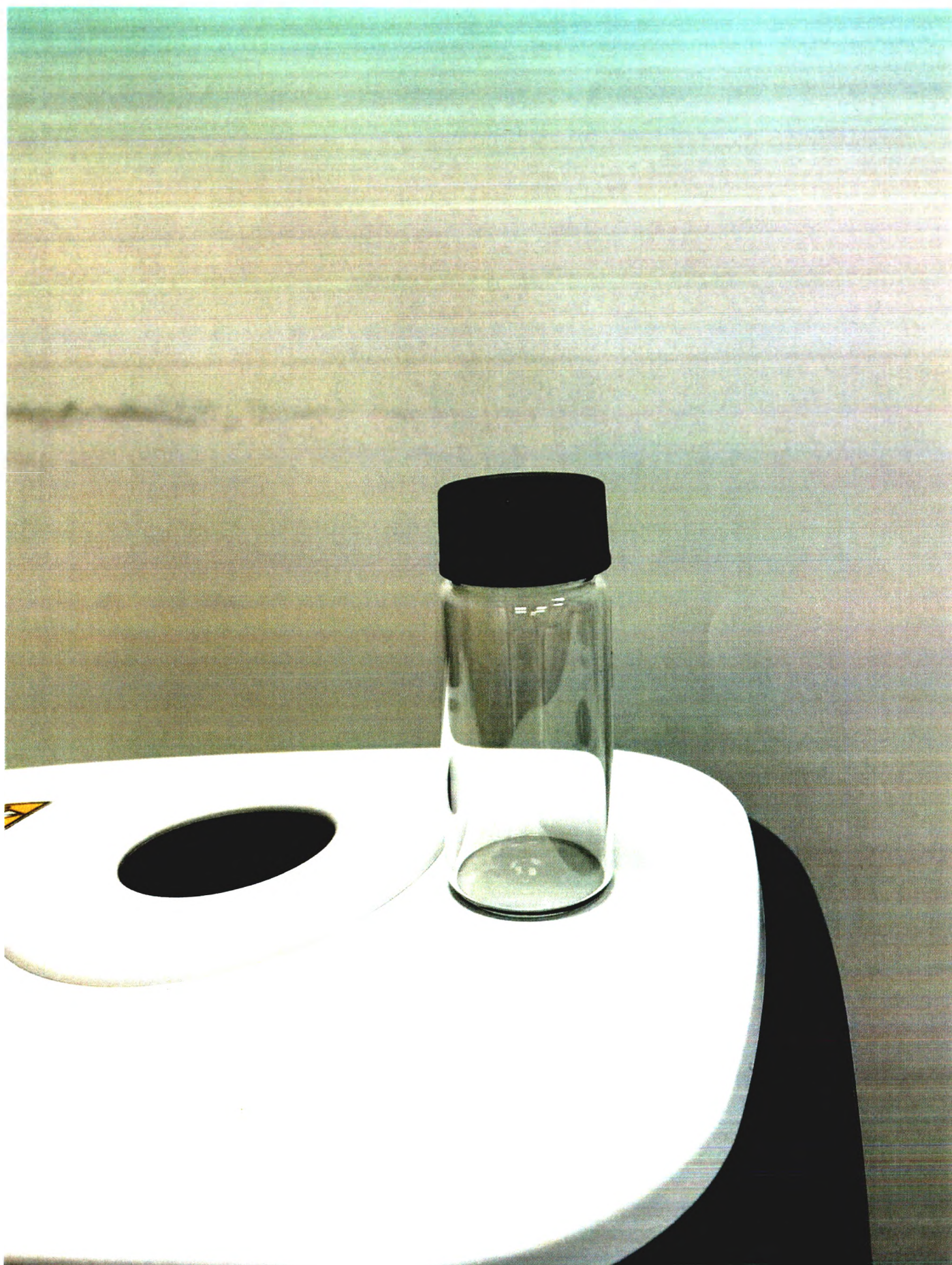

Бутылка для мытья роликов.

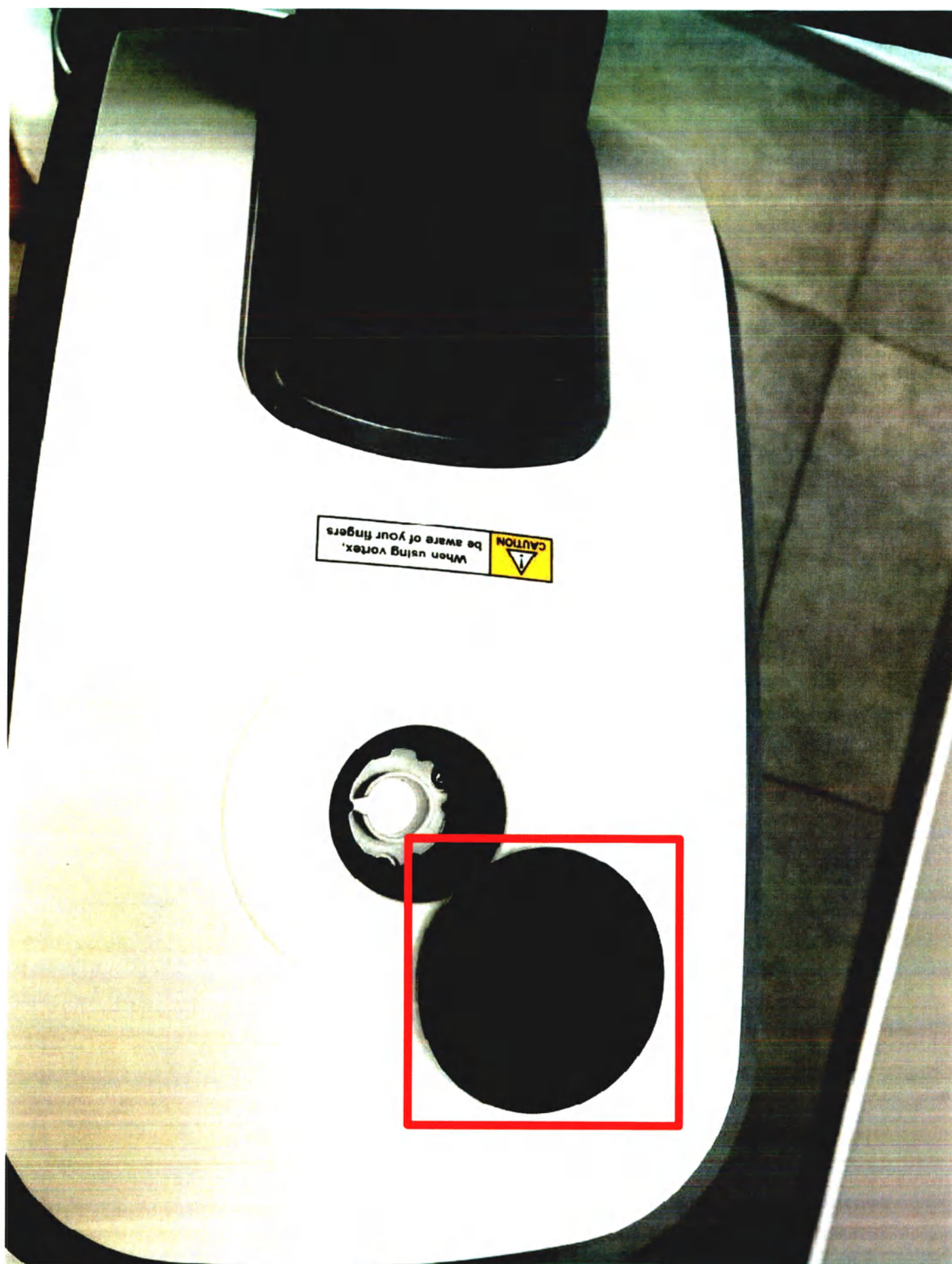

Крышка миксера.




Держатель манипулы.



Держатель манипулы в сборе с изделием
(манипула с кабелем из оптоволокна, рукоятка основного блока).



Манипула Ultra.

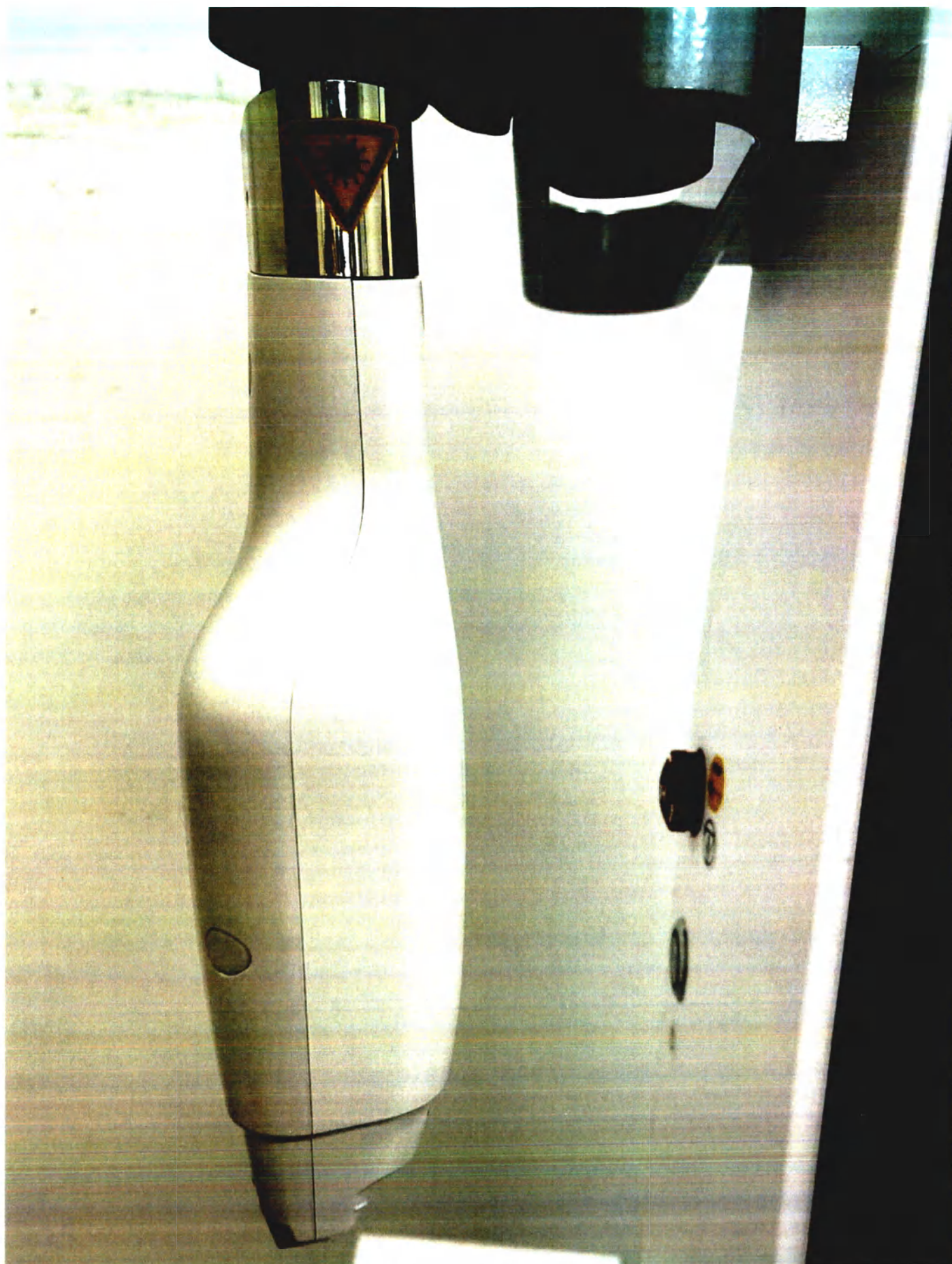


Манипула Ultra.



Переключатель ножной Lutronic.




Предохранитель – 2 шт.

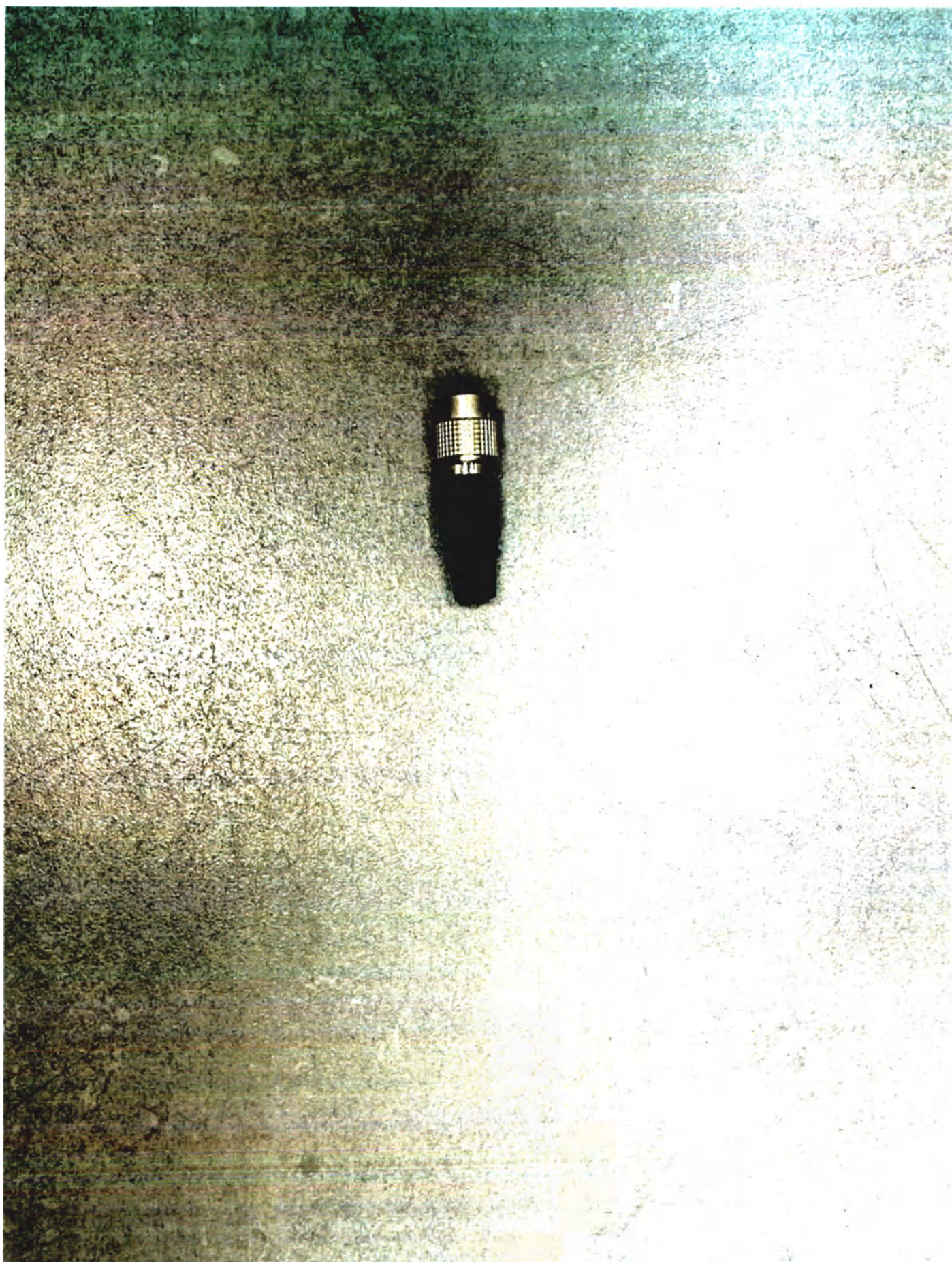

Устройство блокировочное дистанционное. Штекер.




Кабель питания.

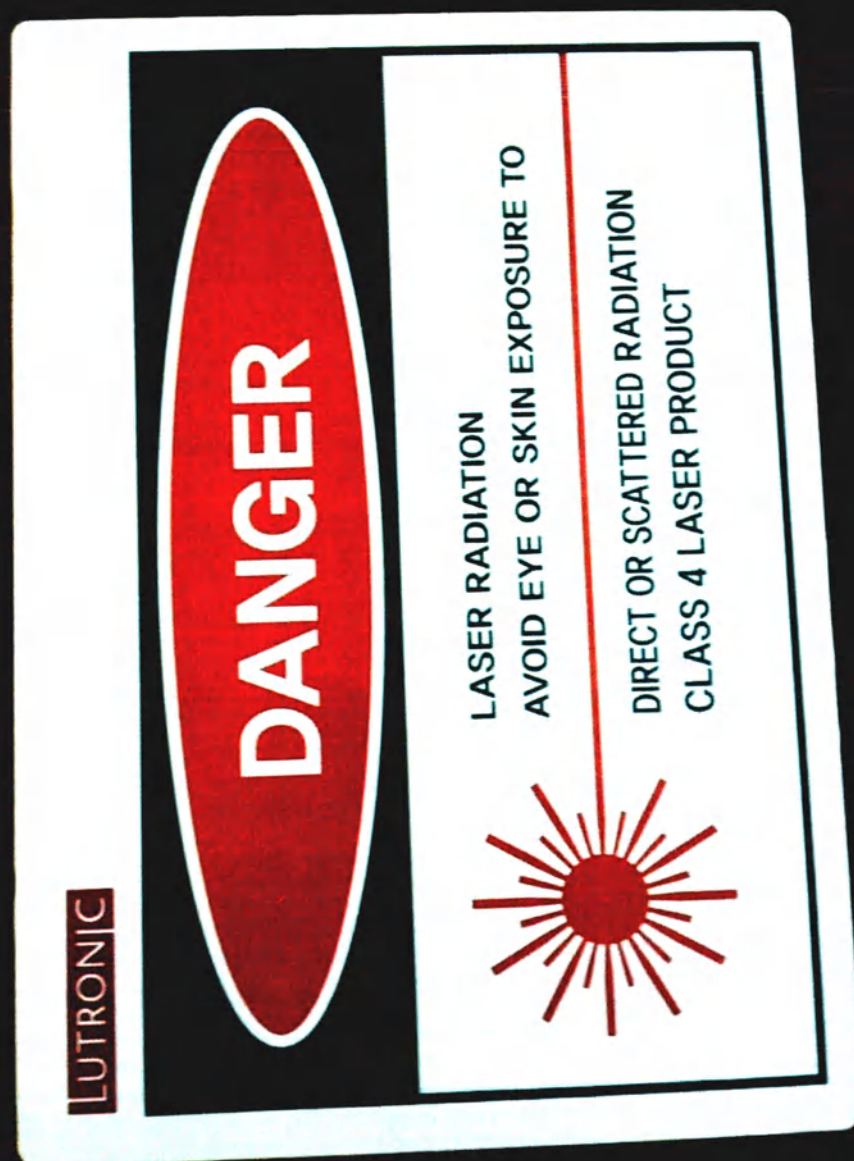

Знак, предупреждающий об опасности лазерного излучения для входной двери кабинета.



Очки Lutronic для защиты оператора от лазерного излучения.

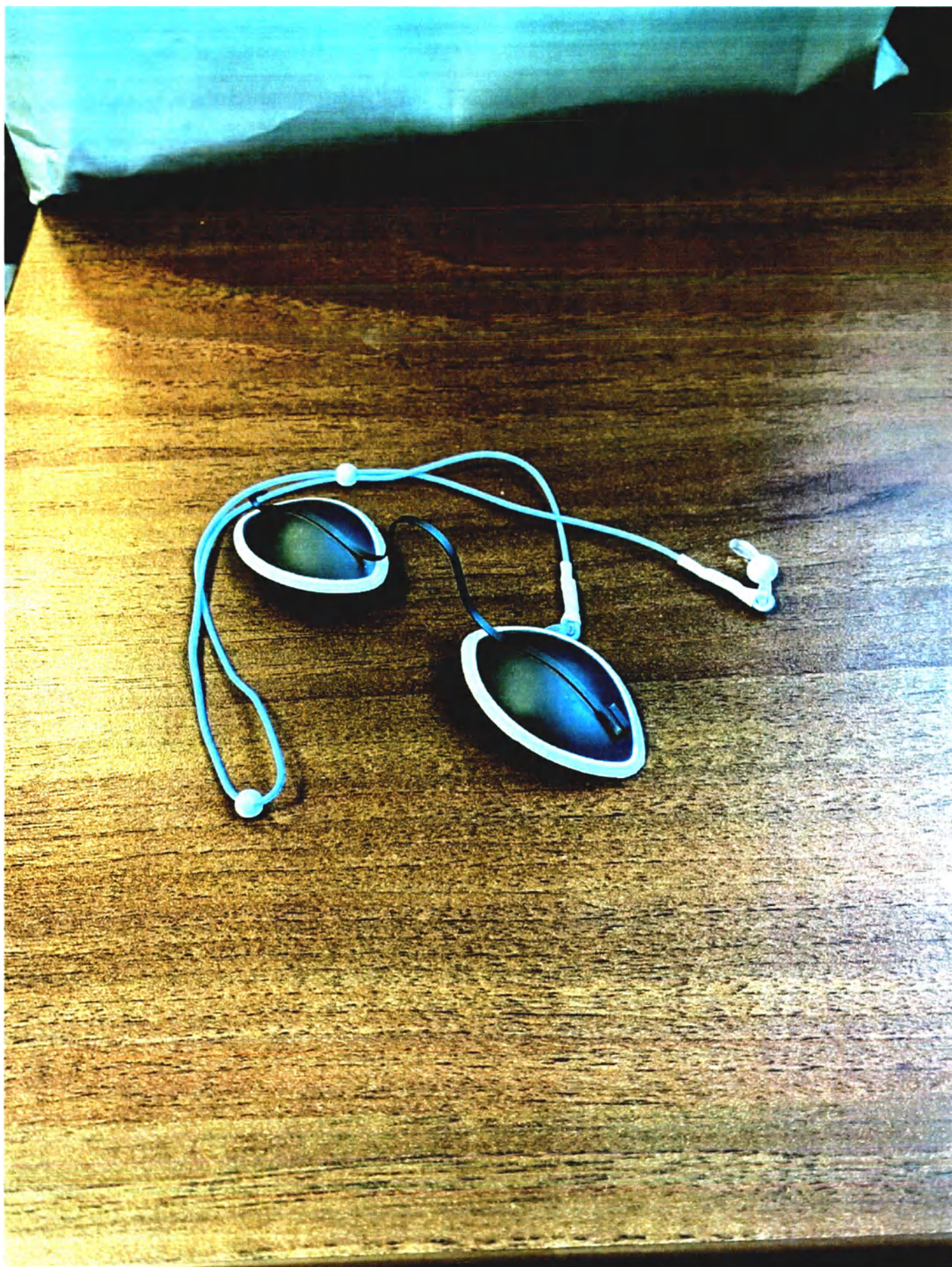

Очки Lutronic для защиты пациента от лазерного излучения.


Брошюра об izdelii.

Материал предоставлен журналом «Эксперт»




Материал подготовлен Агитационным центром У. Давидов. СШ

Омоложение и устранение пигментации

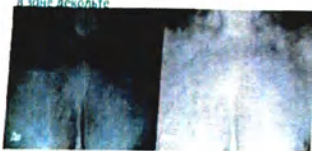

Материал предоставлен
Автомобильным клубом У
Делавэра, США

Выпадение волос

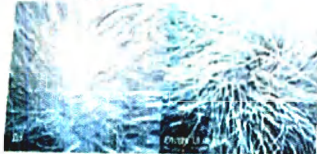

Материал предоставлен Автоэвакуацией города Улан-Удэ



Самое быстрое решение для шлифовки кожи при довольно большом диаметре луча (200 мкм и 350 мкм) и в размере сканируемой области (4 на 10 мм и 6 на 10 мм). Возможность настройки лечения от мягкого к агрессивному обеспечивает индивидуальный подход.



LaseMD Ultra – это единственный аппарат на рынке, который может выдавать максимальную мощность 20 Вт, имеет профиль луча с однородной вершиной и обеспечивает быстрое последовательное лечение



Дисплей с понятной и удобной навигацией обеспечивает обратную связь и предоставляет возможность выбора коэффициента покрытия, общей интенсивности излучения в течение процедуры, плотности энергии и интервалов



Технология ULTRA предназначена для восстановления сияющей, здоровой и эластичной кожи с помощью деликатных неаблятивных лазерных процедур при минимальной стоимости обслуживания оборудования и без ограничения количества импульсов в течение одной процедуры.

ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР ЛУТРОНИК И АКАДЕМИЯ
218, Seowon-ro, Daejeon-gu, Gyeongsang-do, KOREA
(Адрес) TEL: +82 31 958 3440 / ФАКС +82 1620 3440
E-MAIL: info@lutronic.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР LITRONIC
217 Fortune Drive, Billerica, MA 01821 USA
(USA) TEL: +1 800 588 7644
В ЛОНДОНЕ: office@litronic.com / usa@litronic.com

Latronic Germany
Sperbersh 41, 20354 Hamburg, Germany (Tepmawu)
TEL: +49 (0)40 6463 999-50 / FAX: +49 (0)40 6463 999-59
E-MAIL: germany@latronic.com

Lutronic Japan
127, Tokyo Front Terrace, 2-3-14, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
JAPAN 1088508
TEL: +81-3-6433-3041 / FAX: +81-3-6433-3042 / WWW: www.lutronic.jp

Lutronic China
Yuanhe plaza 2801 room, Jingang road 299 no, Pudong district, Shanghai
200120, China (Korea)
TEL: +86-21-5019-1891/3991 / FAX: +86-21-5019-1865
E-MAIL: china@lutronic.com

[illegible]

Самый совершенный тулиевый лазер в мире

«Технология LaserMD — мое самое любимое новшество. Она позволяет обрабатывать несколько участков кожи достаточно быстро, эффективно и с очень низкими затратами. Моим пациентам нравится комфортное лечение и впечатляющие результаты при минимальном времени восстановления»

Доктор Джоэль Коэн, дипломированный врач, США

LUTRONIC
Intelligent Care™

НОВИНКА
Самый совершенный
тулиевый лазер в мире



lasèMD
ULTRA™

- Максимальная среди аналогов мощность позволяет проводить процедуру быстро, возможность настройки под разные зоны воздействия
- Мягкое, эффективное улучшение общего состояния кожи всех типов в любой сезон
- Комфортное лечение, быстрое восстановление, результат, заметный сразу после процедуры
- Минимальная стоимость обслуживания, простота управления и отсутствие ограничений по количеству импульсов в течение одной процедуры

Брошюра для пациента.

ULTRA

Инструкции по проведению процедуры

«Омоложение кожи»

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ
ULTRA-ЭФФЕКТ ЗА 1 ДЕНЬ



[Все лицо] Терapiя UltraGlow
[Веки] Омоложение век
[Область носа и Т-зона] Расширенные поры / Активное акне
[Губы] Омоложение губ
[Руки]
[Шея]
[Декольте] } Омоложение областей нeлицевой локализации

ВСЕ ЛИЦО

Показания	Тип кожи	Тип наконечника	Энергия (мДж)	Режим	Кол-во проходов	Охват %	Объем энергии (мДж)	Кол-во процедур	Интервал (недели)
Неравномерный тон кожи Ухудшение кожи Мелкие морщины (до 50 лет)	I-III	C1	10 ~ 15	Random	4 ~ 6	12 ~ 25	0,2 ~ 0,5	3 ~ 5	3 ~ 4
	III-VI	Ролик	8 ~ 10		2 ~ 4	5 ~ 12			

Неравномерный тон кожи
Ухудшение кожи
Мелкие морщины
(до 50 лет)

- Терапия UltraGlow – это базовый метод омоложения, который позволяет улучшить тон и текстуру кожи, устраняет мелкие морщины, придает коже сияние.
- При работе с лицом следует сначала обработать все лицо, соблюдая параметры терапии UltraGlow, а затем прицельно воздействовать на отдельные участки согласно показаниям ниже
- Общая энергия за процедуру корректируется в зависимости от возраста пациента и состояния кожи
- * 20-30 лет – 0,2-0,3 кДж Общая энергия на все лицо; 40-60 лет – 0,4-0,5 кДж Общая энергия на все лицо;

Фокусированное воздействие

Показания	Тип кожи	Тип наконечника	Энергия (мДж)	Режим	Кол-во проходов	Охват %	Кол-во процедур	Интервал (недели)
Морщины вокруг глаз Веки: верхние, нижние)	I-II	C1	8 ~ 12	Static или Random	2 ~ 4	8 ~ 15	3 ~ 5	3 ~ 4
	III-VI	Ролик	5 ~ 8			5 ~ 8		

Морщины вокруг глаз
Веки: верхние,
нижние)

Наконечник C5

Темный цвет кожи и
тусклость губ
Огрубение кожи и
морщинки на губах

- Обрабатывайте область, аккуратно создавая максимально возможное натяжение кожи над/под глазами.
 - Рекомендуется совершать на 1-2 прохода меньше на верхнем веке по сравнению с нижним.
 - Рекомендуется использовать защитные очки.
- | | | | | | | | |
|------|----|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| I-VI | C5 | 3 ~ 5 | Static | 3 ~ 4 | 15 ~ 22 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 |
|------|----|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
- Для защиты зубов перед процедурой между зубов и губ рекомендуется расположить мокрую марлю.
 - Нанесите анестезирующий крем на 5 - 10 минут.
 - Критерий для прекращения воздействия: Небольшое побеление кожи и отек
 - Последующий уход: Нанесите косметическое средство для защиты губ, пока не отпадут
 - Примечание: Минимизируйте раздражение кожи губ (острая и горячая еда, макияж и т.д.)

Фотостарение за пределами
лица (область шеи,
декольте, руки и т.д.)

- | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|--------|---|---------|-------|-------|
| I-II | C1 | 10 ~ 15 | Random | 4 | 12 ~ 18 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 |
| III-VI | Ролик | 5 ~ 10 | | 4 | 5 ~ 12 | | |
- Наконечником с роликом быстрыми движениями обработайте область в режиме Random
 - Настройте энергию с учетом толщины кожи целевой области.

Критерий для прекращения воздействия: Легкий отек и эритема легкой и умеренной степени

Последующий уход: Увлажните кожу и приложите холодное.

Примечание

- Нанесите анестезирующий крем на 30 - 40 минут.
- После процедуры образуются микро-струпья, которые отпадут естественным образом в течение 3 - 7 дней.
- После процедуры рекомендуется выбрать и нанести состав из наиболее подходящей ампулы в зависимости от состояния кожи пациента.



Краткое руководство для врача.

TotalSkin Solution

LUTRONIC GENIUS + LaseMD ULTRA

Эффективное улучшение состояния всех слоев кожи за одну процедуру с помощью двух лучших систем лечения.

LUTRONIC GENIUS формирует точечные зоны коагуляции в дерме и стимулирует выработку коллагена и эластина для долгосрочного улучшения состояния кожи.

LaseMD ULTRA омолаживает верхний слой кожи для улучшения общего состояния эпидермиса.

ШАГ 1 ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ LUTRONIC GENIUS

Наконечник G49D / Режим Energy

Верхняя часть лица	
1-й проход 1,5 мм 14-16 мдж/игла	2-ой проход 1,5 мм 10 мдж/игла
Средняя часть лица	
1-й проход 1,6-2,0 мм 18-20 мдж/игла	2-ой проход 1,5 мм 10 мдж/игла
Нижняя часть лица	
1-й проход 1,8-2,2 мм 20-22 мдж/игла	2-ой проход 1,5 мм 10 мдж/игла
Область шеи	
1-й проход 1,5-1,8 мм 18-20 мдж/игла	2-ой проход 1,5 мм 10 мдж/игла

ШАГ 2 ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ LaseMD ULTRA

Роликовый наконечник CI /
Режим Energy
Все лицо

2-4 прохода в общей сложности
5-10 мдж
Режим Random

* При лечении меланодермии уменьшите уровень энергии или следуйте протоколу лечения меланодермии во избежание чрезмерного воздействия.

Ход процедуры



01

Очищение
лица



02

Местная анестезия
(как минимум 1 час)



03

Лечение аппаратом
LUTRONIC GENIUS



04

Лечение
аппаратом ULTRA



05

Обертнутый пакет со
льдом или устройство
воздушного охлаждения



06

Последующий
уход

6~
недель

Реакция кожи



До



Сразу после



На следующий день

Последующий уход

01



Гидрокортизоновая мазь
и заживляющий крем

02



Увлажняющий крем
в ампулах или маска

Краткое руководство для врача Total Skin Solution.



ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ INTELLIGENT CARE

Продуманный дизайн для интеллектуальных решений Intelligent Care

Мультиброшюра Lutronic.



Транспортная упаковка.



Манипуляционные знаки и надписи на транспортной упаковке.

ООО «СКИНЗЕЛ»

Итого в настоящем документе
37 (тридцать семь) листа(-ов)

Генеральный директор:

Ко Бум Сук _____

МП

