

Serial No. 12252/24

מס' סידורי 12252/24

Form No. 1

טופס מס' 1

AUTHENTICATION OF SIGNATURE

אימות חתימה

I, the undersigned, Avital Makarevich
Notary holding license no. 2001362 hereby
certify that on 19/05/2024 appeared before
me at my offices located at Ben Yehuda
St.1, Jerusalem Ms. Dabush Inbal.

אני החתומה מטה אביטל מקרביץ, נוטריונית
בעלת רישיון מספר 2001362 מאשרת כי ביום
19/05/2024 ניצבה לפניי במשרדי שבמקן רחוב
בן יהודה 1, ירושלים מרת דבוש ענבל

☐ who is known to me personally

☐ מוכרת לי באופן אישי

☒ whose identity has been proven to me by
ID card of Israel number 033941410 issued
on 18.01.2004

☒ שזהותה הוכחה לי על פי תעודת זהות
ישראלית מספר 033941410 שהונפקה ביום
18.01.2004

And I am convinced that the person
standing before me understood fully the
significance of the action and voluntarily
signed the attached document marked with
the letter / number A

ושוכנעתי כי הניצבת לפניי הבינה הבנה מלאה
את משמעות הפעולה וחתימה מרצונה החופשי
על המסמך המצורף והמסומן באות / מספר א'

In witness whereof I hereby authenticate the
signature of Ms. Dabush Inbal by my own
signature and seal this day 19/05/2024

לראיה אני מאמתת את חתימתה של מרת דבוש
ענבל בחתימת ידי ובחותמי, היום 19.05.2024

Notary fee 218 NIS

שכר נוטריון 218 שקלים חדשים.



Avital Makarevich

חתימה
Signature

יעל שרון טביבי
Yael Sharon Tabibi

24-05-2024

JERUSALEM ירושלים Convention de la Haye du 5 Octobre 1961

APOSTILLE

יעל שרון טביבי
Yael Sharon Tabibi

24-05-2024

JERUSALEM ירושלים

1. STATE OF ISRAEL

This public document

2. Has been signed by

Advocate **AVITAL MAKAREVICH**

3. acting in capacity of Notary.

4. bears the seal/stamp of the above Notary

Certified

5. at the Magistrates' Court, Jerusalem

6. Date 21/5/24

7. by an official appointed by Minister of Justice under the Notaries Law, 1976.

8. Serial number 443004/2

9. Seal/Stamp

10. Signature ז.ר. ט.

1. מדינת ישראל

מסמך ציבורי זה

2. נחתם בידי

עו"ד - **אביטל מקרביץ**

3. המכהן בתור נוטריון.

4. נושא את החותם/החותמת

של הנוטריון הנ"ל

אושר

5. בבית משפט השלום ירושלים

6. ביום 21/5/24

7. על ידי מי שמונה בידי שר המשפטים לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

8. מס' סידורי 443004/2

9. החותם/החותמת

10. חתימה ז.ר. ט.



יעל שרון טביבי
Yael Sharon Tabibi

24-05-2024

JERUSALEM ירושלים

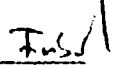
יעל שרון טביבי
Yael Sharon Tabibi

24-05-2024

JERUSALEM ירושלים

APPROVED BY

Inbal Dabush,
Commercial Operations Manager


« 19 » May 2024

Biometrix Ltd
Kiryat Mada 4
Jerusalem 91450 Israel

Инструкция по применению

Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового
использования
BIOMETRIX LIMITED (БИОМЕТРИКС ЛИМИТЕД), Израиль

2024



Название изделия:

«Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования»
(Далее по тексту – набор для дренирования закрытой раны Biovac, набор для дренирования, набор, Biovac, изделие).

Производитель: BIOMETRIX LIMITED (БИОМЕТРИКС ЛИМИТЕД), Израиль.

Kiryat Mada 4 Jerusalem Zip Code 9777604, Israel

Телефон: 972-2-5861241

Адрес электронной почты: info@biometrixmedical.com, Idabush@qco.net

Место производства:

1) Shomrat Molds LTD. Industrial Zone, 1030000 Hatzor Haglilit, ISRAEL.

2) Mediplast Israel Ltd. 7 Hayarkon St., P.O. Box 13214, Industrial Zone, Yavne, 8122710, Israel.

Вид контакта с организмом: см. пункт 4 «Материалы, из которых изготовлено изделие и вид контакта с организмом человека».

Условия применения: в условиях операционной, в больницах или клиниках.
Изделие должно использоваться только опытными врачами-специалистами.

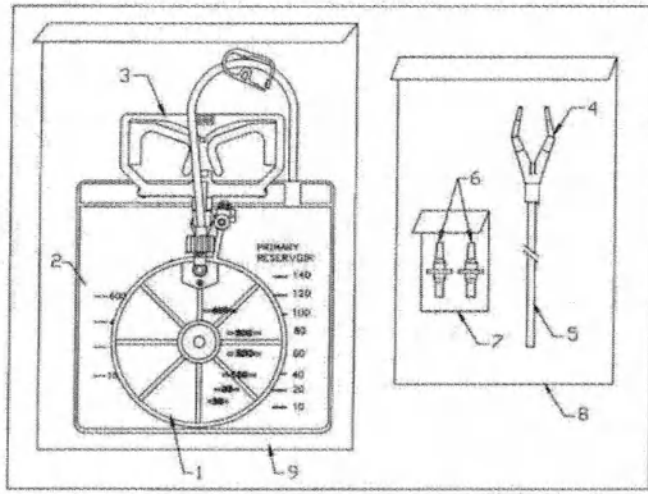
Назначение

Изделие предназначено для осуществления процедуры дренирования, с целью удаления жидкостей или гнойного материала из закрытой раны контролируемым образом.

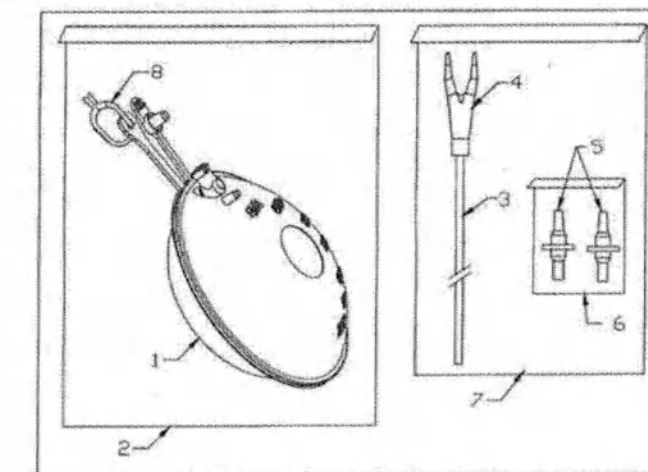
Описание изделия

В зависимости от исполнения, ниже представлены схематичные изображения состава изделия:

MJ-0000

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Пакет из ПЭНП
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

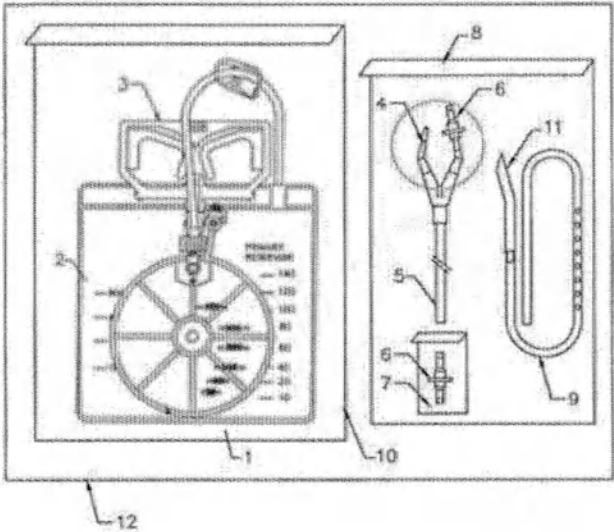
ML-0000

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Пакет ПЭВП 17.5 x 39 см
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	У-коннектор
	5	Коннектор Луер «папа»
	6	Пакет из ПЭНП
	7	Пакет из ПЭВП 10 x 20 см
	8	Фиксатор
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

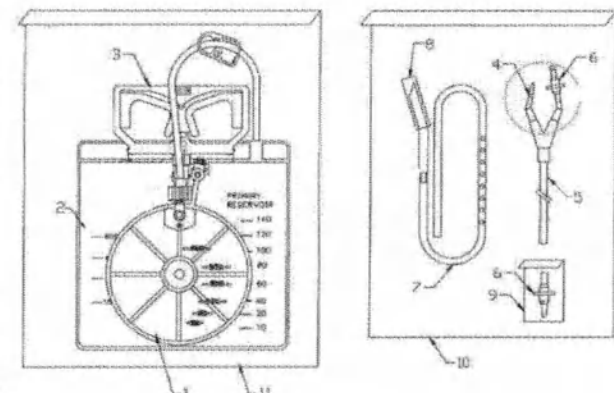
--	--

[illegible]

MJ-2105, MJ-2145, MJ-2185

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Пакет из ПЭНП
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Трубка дренажная круглая: MJ-2105: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм MJ-2145: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм MJ-2185: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм
	10	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
	11	Игла троакарная диаметром: MJ-2105: 3.3 мм MJ-2145: 4.7 мм MJ-2185: 6.4 мм
	12	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MJ-2125

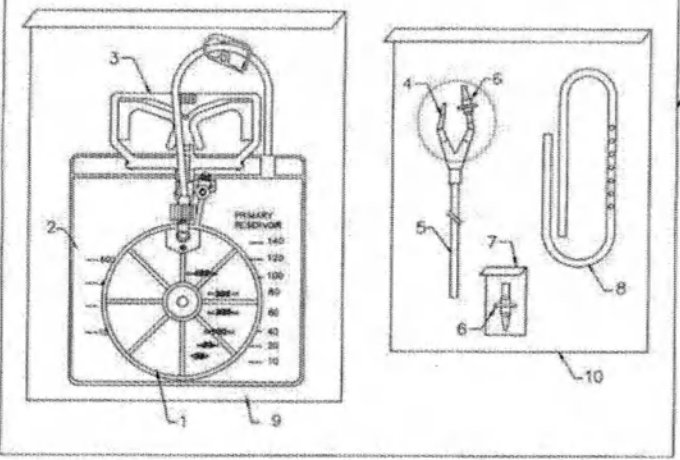
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер

	«папа»	
	7	Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм
	8	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
	9	Пакет из ПЭНП
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	12	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

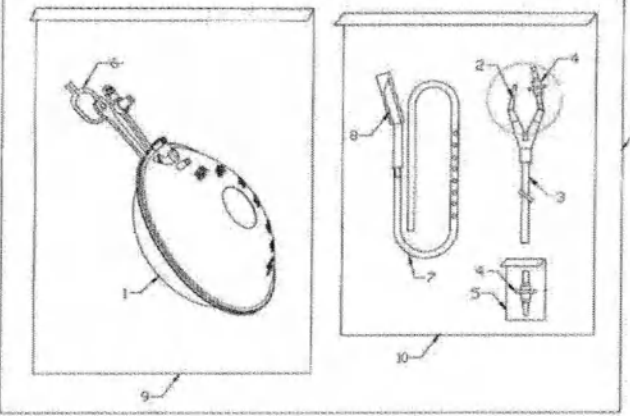
MJ-2165

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм
	8	Игла троакарная диаметром 5.3 мм
	9	Пакет из ПЭНП
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	12	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MJ-2180

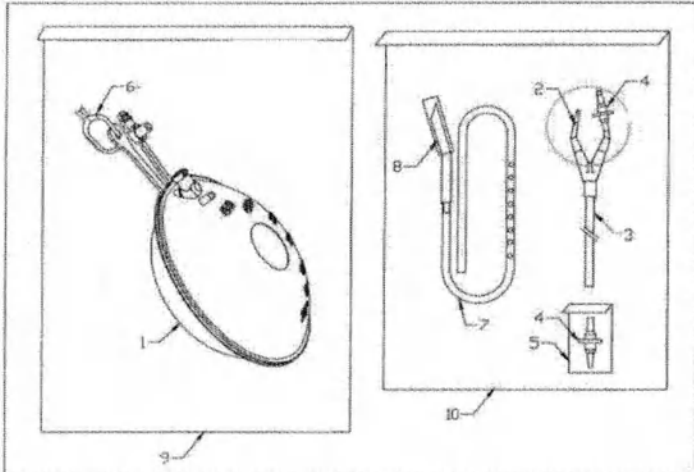
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Пакет из ПЭНП
	8	Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

ML-2105, ML-2145, ML-2185

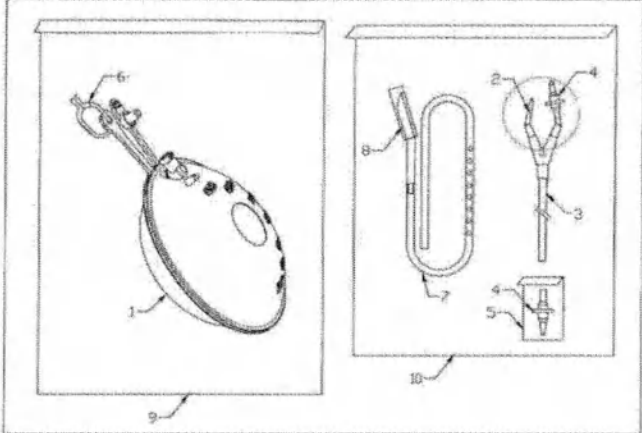
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭНП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная круглая ML-2105 наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм ML-2145 наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм ML-2185 наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм

		диаметр 6.4 мм, длина 1200мм
	8	Игла троакарная диаметром ML-2105 3.3 мм, ML-2145 4.7 мм, ML-2185 6.4 мм.
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

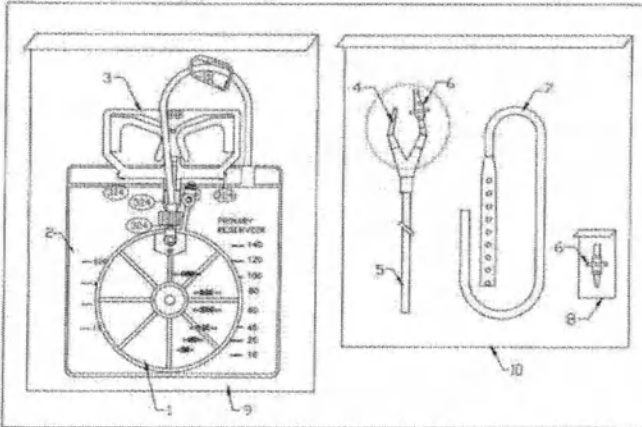
ML-2125

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭВП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная круглая наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм
	8	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

ML-2165

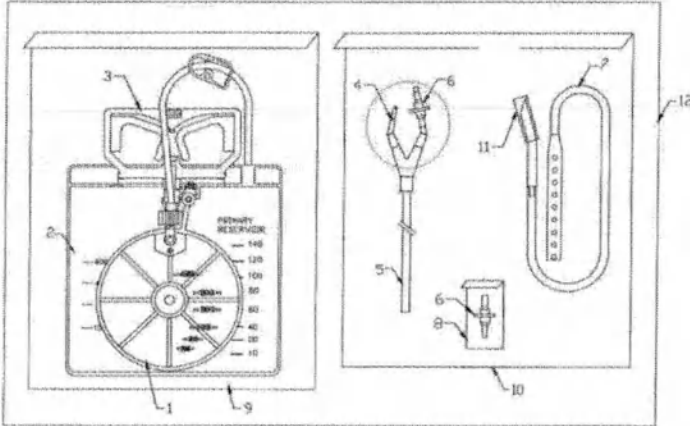
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Y-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭНП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная круглая : наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм
	8	Игла троакарная диаметром 5.3 мм
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

MJ-1070

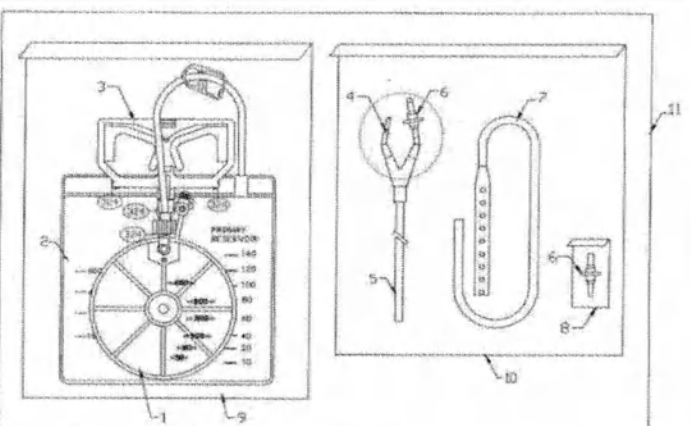
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Y-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Трубка дренажная плоская : ширина 7.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭНП
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная

	упаковка 23 x 43 см

MJ-1075

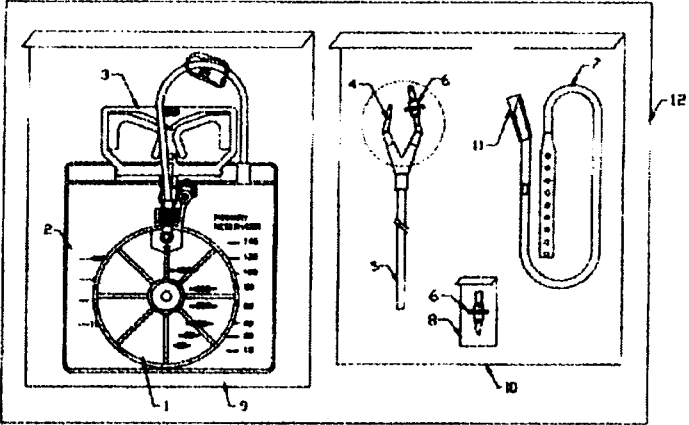
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Трубка дренажная плоская : ширина 7.0 мм, длина 1230 мм
	8	Пакет из ПЭНП
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	12	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MJ-1100

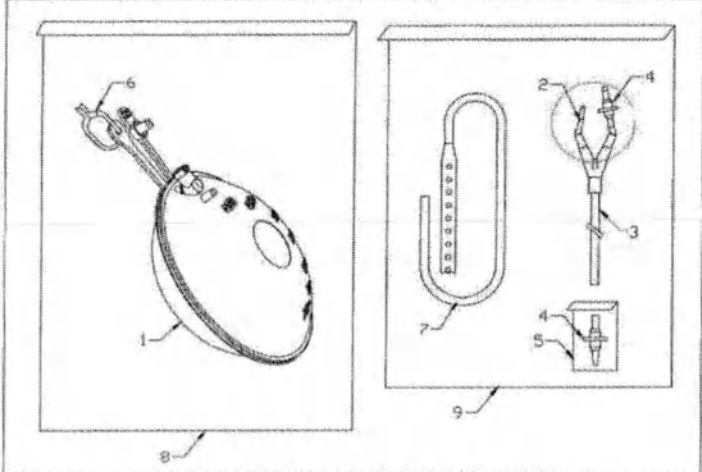
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Трубка дренажная плоская ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭНП

	9	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 23 х 43 см

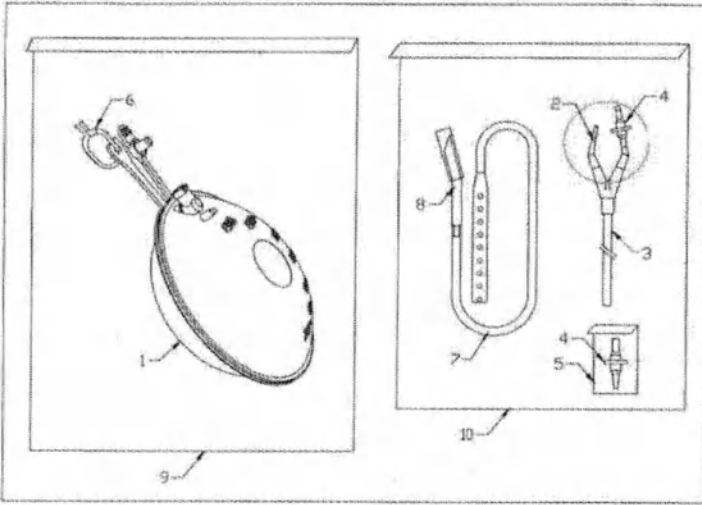
MJ-1105

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Коннектор Луер «папа»
	7	Трубка дренажная плоская : ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭВП
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	11	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	12	Индивидуальная упаковка 23 х 43 см

ML-1070

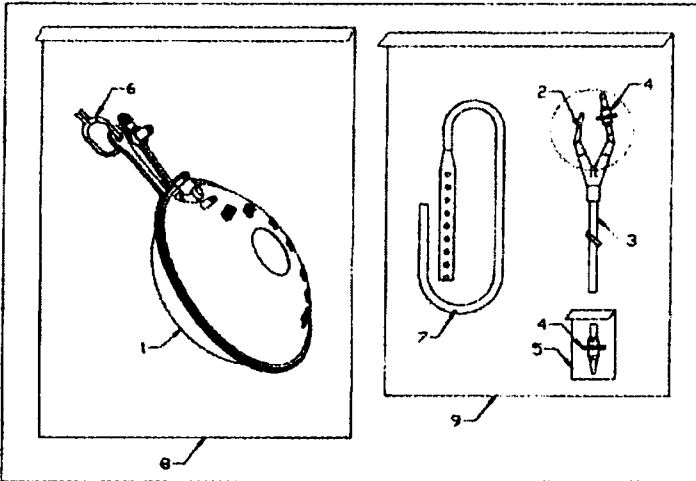
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭНП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная плоская ширина 7.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	9	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

ML-1075, ML-1105

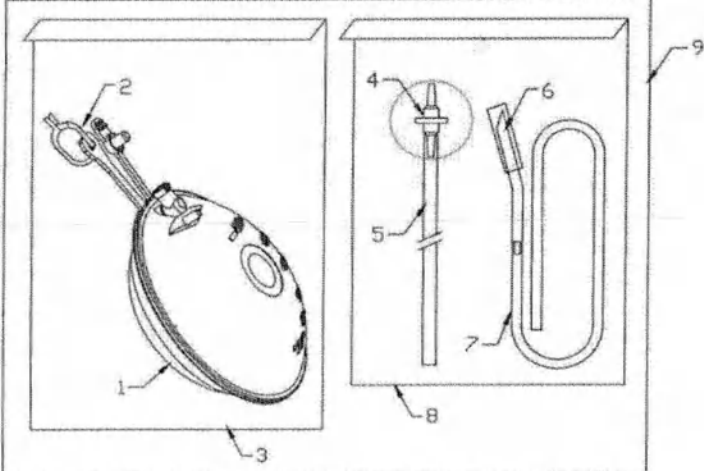
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭНП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная плоская ML-1075 ширина 7.0 мм, длина 1230 мм ML-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	8	Игла троакарная диаметром 5.0 мм

	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	11	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

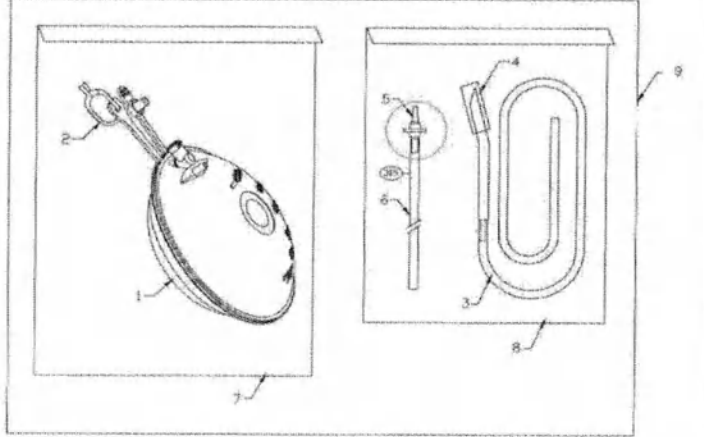
ML-1100

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Пакет из ПЭВП
	6	Фиксатор
	7	Трубка дренажная плоская ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	9	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

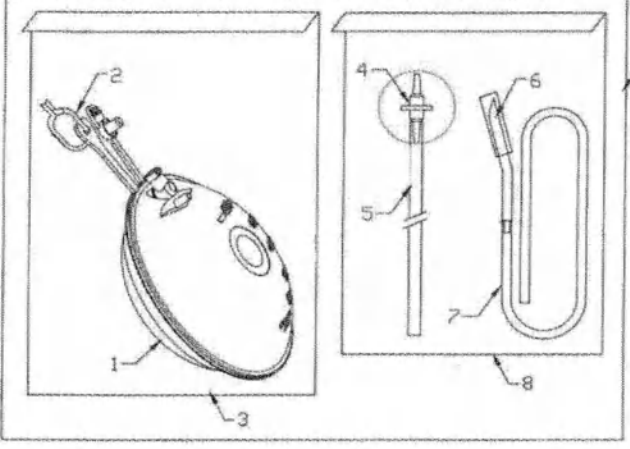
MI-3105

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Фиксатор
	3	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 3.3 мм
	7	Трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

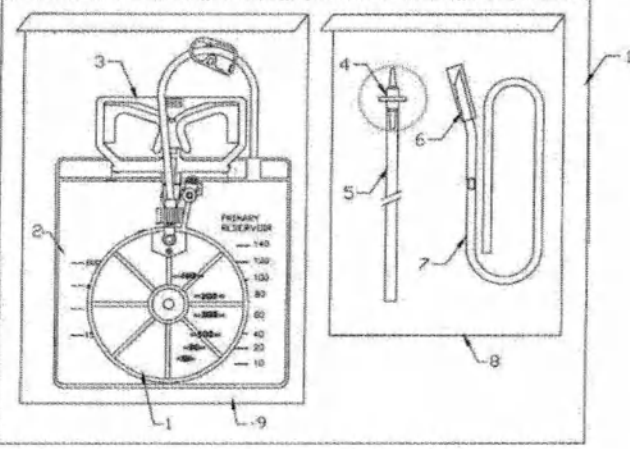
MI-1155

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Фиксатор
	3	Трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм
	4	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	5	Коннектор Луер «папа» симметричный
	6	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

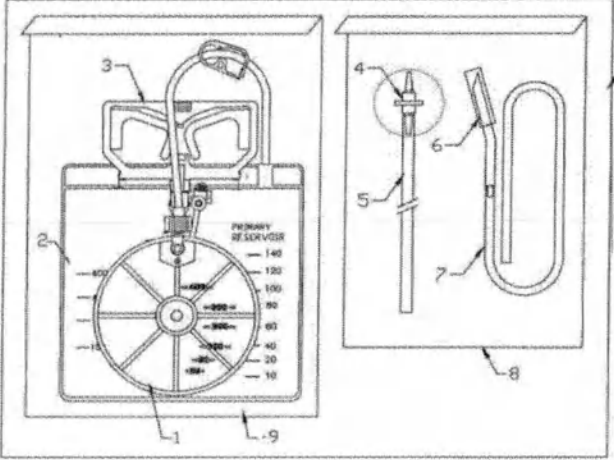
MI-1195

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Фиксатор
	3	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	4	Коннектор Луер «папа» симметричный
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 6.4 мм
	7	Трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

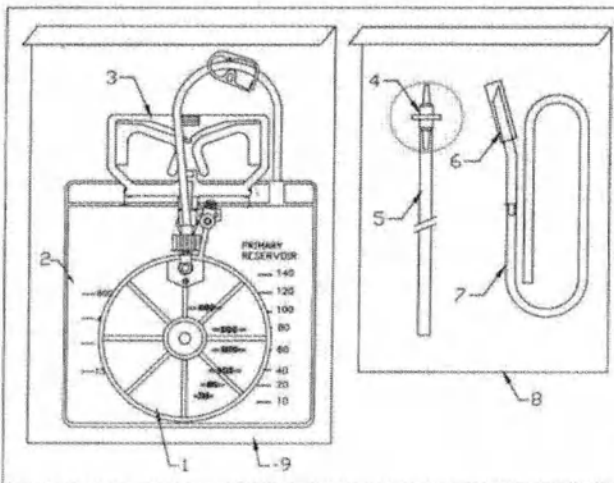
MM-3105

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 3.3 мм
	7	Трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MM-1155

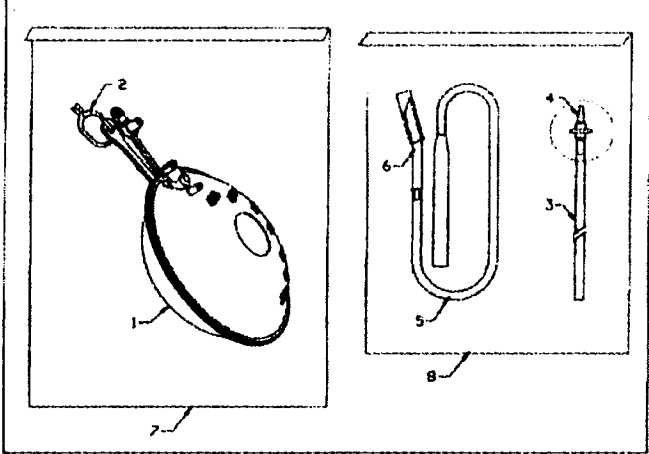
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Коннектор Луер «папа» симметричный
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	7	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MM-1195

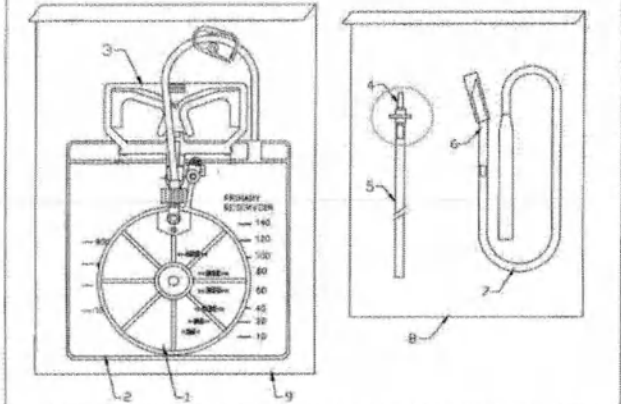
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Коннектор Луер «папа» симметричный
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 6.4 мм
	7	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30

		см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 х 43 см

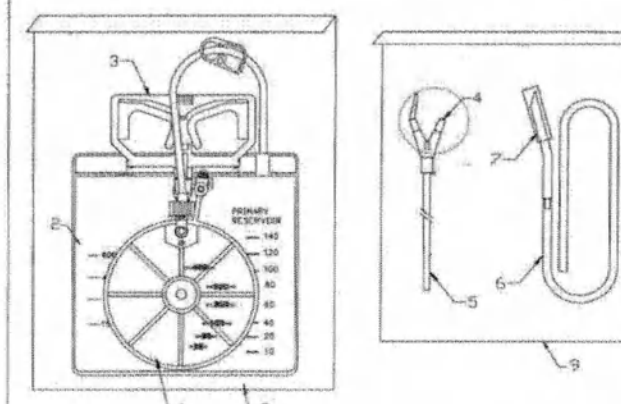
MI-1075, MI-1105

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Фиксатор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа» симметричный
	5	Трубка дренажная плоская рифленая MI-1075 ширина 7.0 мм, длина 1020 мм MI-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	6	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 х 34 см

MM-1075, MM-1105

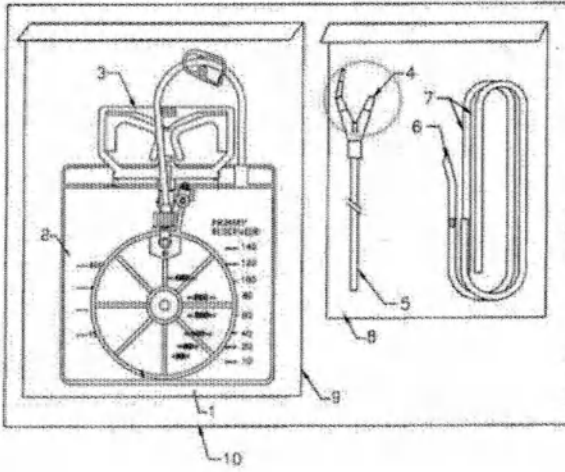
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Коннектор Луер «папа» симметричный
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	7	Трубка дренажная плоская рифленая MM-1075 ширина 7.0 мм, длина 1020 мм MM-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MJ-5105, MJ-5145

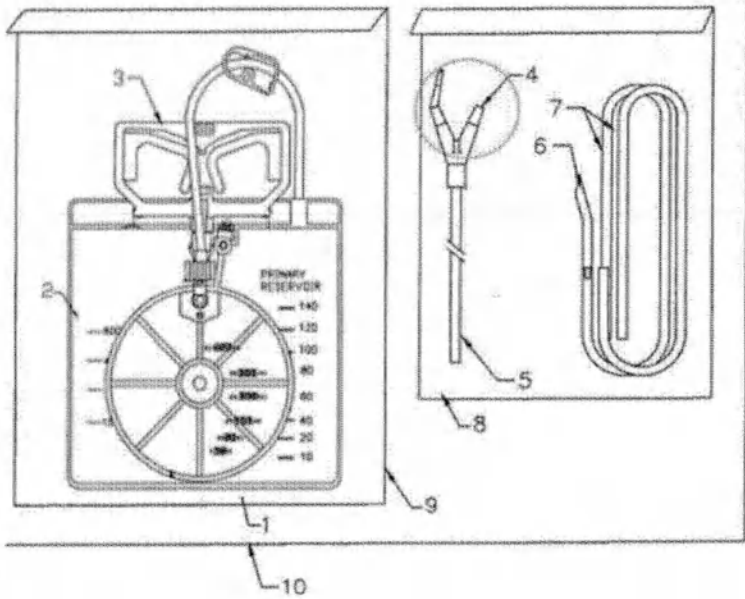
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Y-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Трубка дренажная из ПВХ MJ-5105 наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм MJ-5145 наружный

		диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм
	7	Игла троакарная диаметром MJ-5105 3.3 мм MJ-5145 4.7 мм
	8	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	9	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

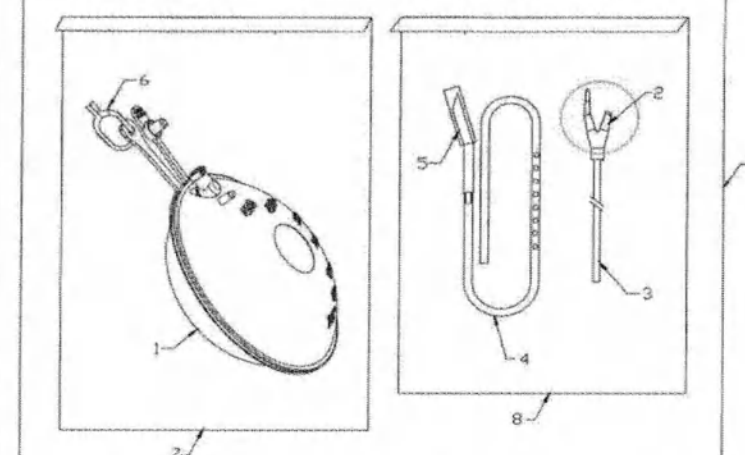
MJ-5125

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
	7	Трубки дренажные из ПВХ наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
	10	Индивидуальная упаковка 23 x 43 см

MJ-5165, MJ-5185

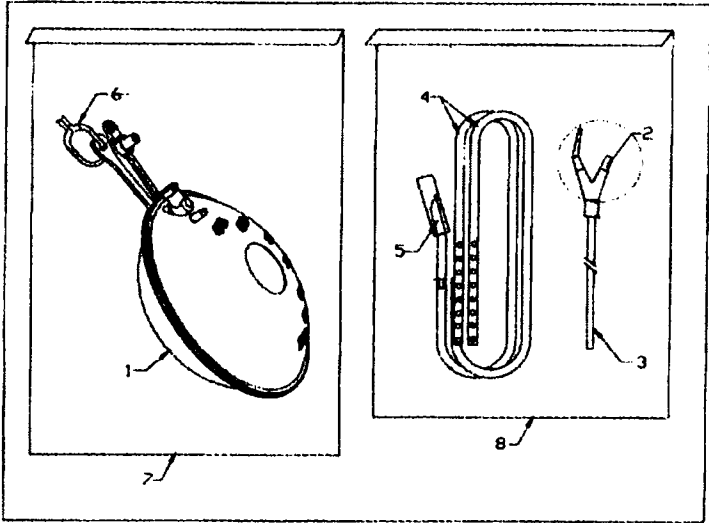
	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	У-коннектор
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Игла троакарная диаметром MJ-5165 5.3 мм MJ-5185 6.0 мм
	7	Трубки дренажные из ПВХ MJ-5165 наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм MJ-5185 наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

ML-5105, ML-5145

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Трубки дренажные из ПВХ ML-5105 наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм ML-5145 наружный диаметр 4.7 мм,

		длина 1100 мм
	5	Игла троакарная Диаметром ML-5105 3.3 мм, ML-5145 4.7 мм
	6	Фиксатор
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 х 34 см

ML-5125

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	У-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Трубки дренажные из ПВХ наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм
	5	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
	6	Фиксатор
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 х 34 см

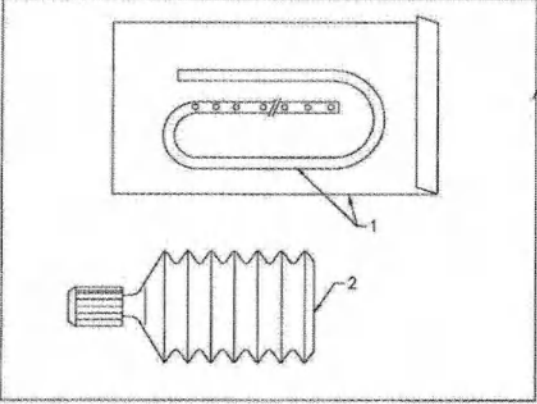
ML-5165

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Y-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Трубки дренажные из ПВХ наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм
	5	Игла троакарная диаметром 5.3 мм
	6	Фиксатор
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

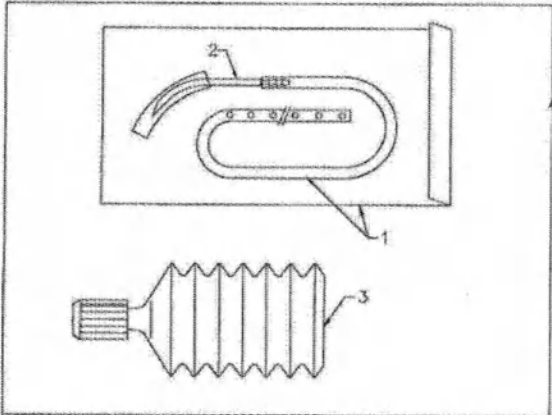
ML-5185

	1	Ёмкость дренажная 450 мл
	2	Y-коннектор
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Трубки дренажные из ПВХ наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм
	5	Игла троакарная диаметром 6.0 мм
	6	Фиксатор
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 34 см

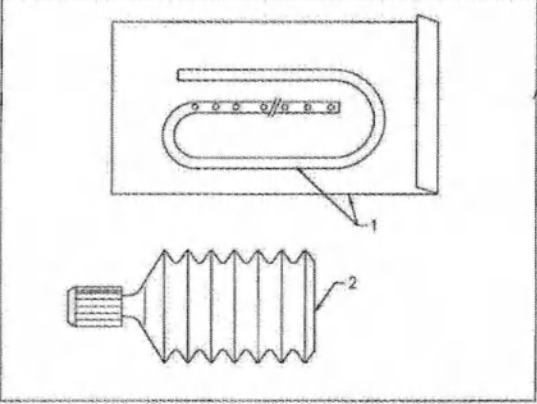
МН-1170

	1	Трубка дренажная из ПВХ наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм в пакете
	2	Ёмкость дренажная 50 мл
	3	Индивидуальная упаковка 18 x 20 см

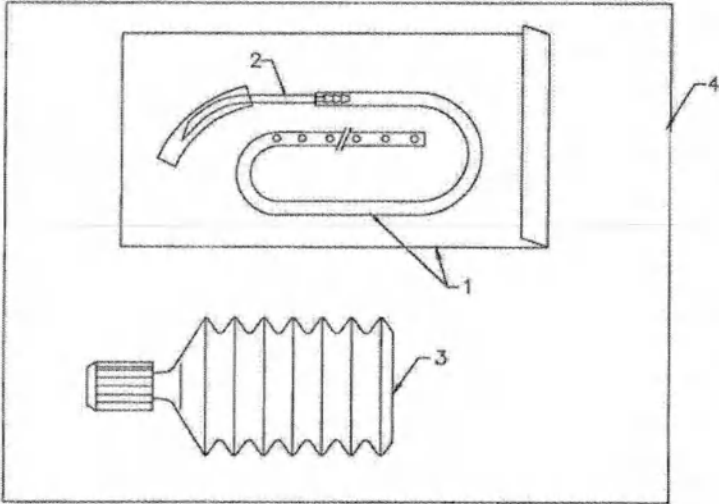
МН-1175

	1	Трубка дренажная из ПВХ наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм в пакете
	2	Игла троакарная изогнутая с диаметром тела 2.0 мм
	3	Ёмкость дренажная 50 мл
	4	Индивидуальная упаковка 18 x 20 см

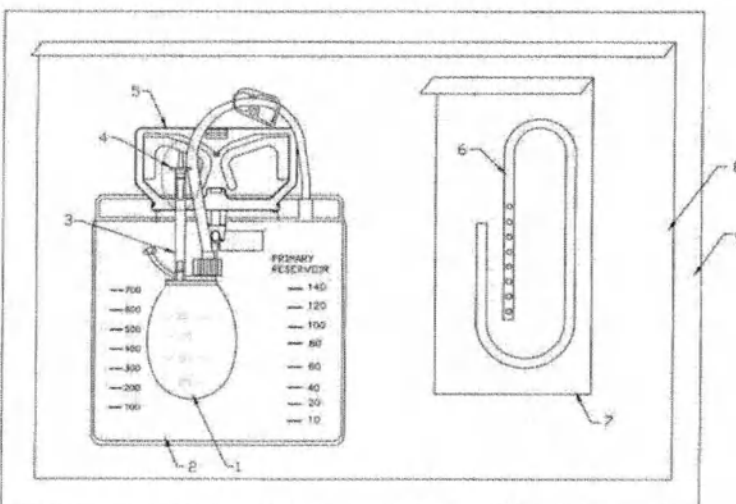
МН-1070

	1	Трубка дренажная из ПВХ наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм в пакете
	2	Ёмкость дренажная 50 мл
	3	Индивидуальная упаковка 18 x 20 см

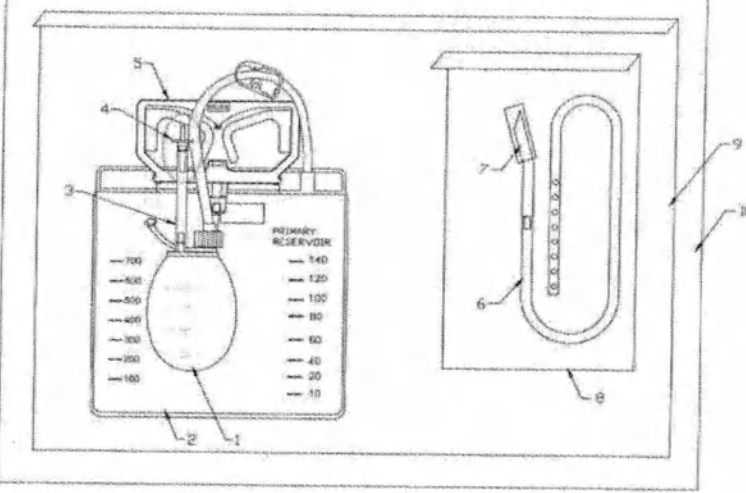
МН-1075

	1	Трубка дренажная из ПВХ наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм в пакете
	2	Игла троакарная изогнутая с диаметром тела 2.7 мм
	3	Ёмкость дренажная 50 мл
	4	Индивидуальная упаковка 18 x 20 см

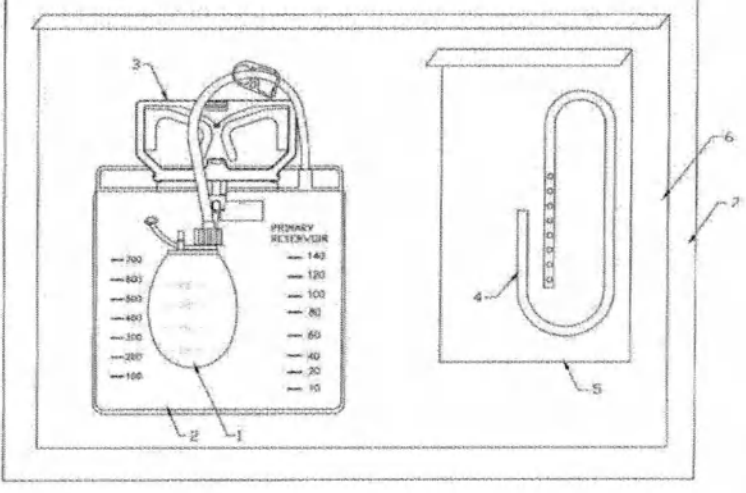
MD-2100

	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Держатель мешка дренажного
	6	Трубка дренажная круглая наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм
	7	Пакет из ПЭВП 10 x 20 см
	8	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	9	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MD-2105

	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	4	Коннектор Луер «папа»
	5	Держатель мешка дренажного
	6	Трубка дренажная круглая : наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм
	7	Игла троакарная диаметром 3.3 мм
	8	Пакет из ПЭВП 15 х 30 см
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 х 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 х 40 см

MD-2140, MD-2180

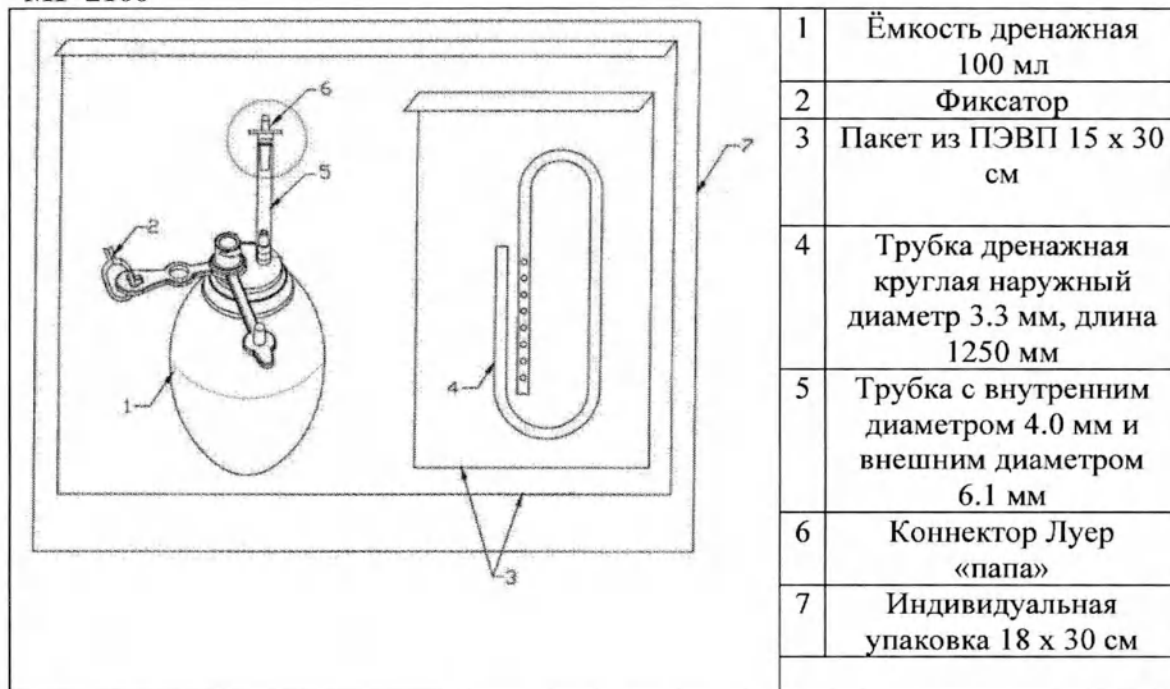
	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Трубка дренажная круглая MD-2140 наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм, MD-2180 наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм
	5	Пакет из ПЭВП 15 х 25 см
	6	Пакет из ПЭВП 17.5

		x 39 см
	7	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

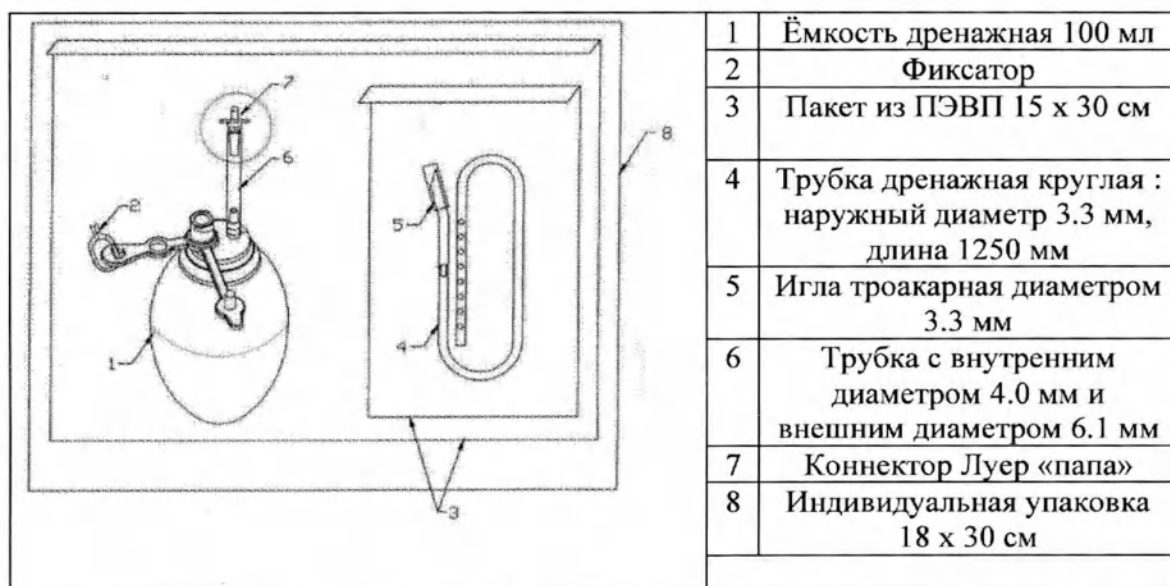
MD-2145, MD-2185

	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Игла троакарная диаметром MD-2145 5.0 мм, MD-2185 6.5 мм
	5	Трубка дренажная круглая MD-2145 наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм, MD-2185 наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм
	6	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	8	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

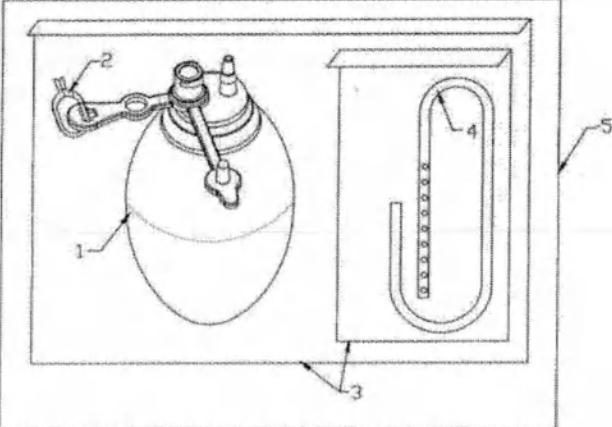
MF-2100



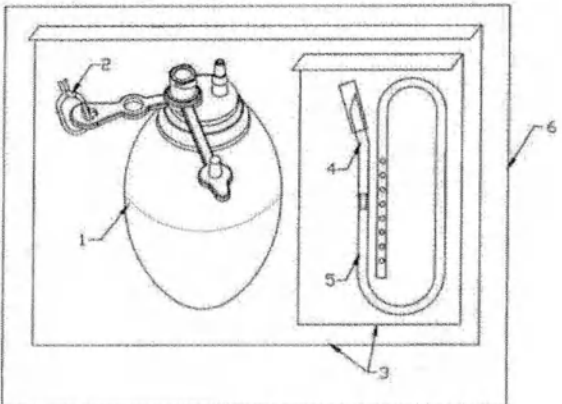
MF-2105



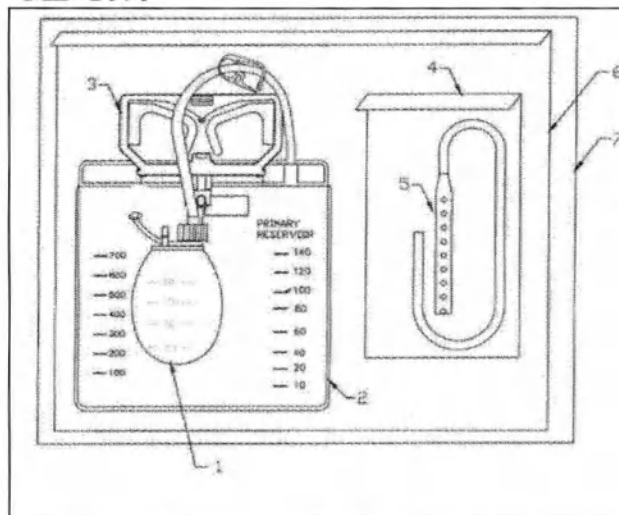
MF-2140, MF-2180

	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Фиксатор
	3	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
	4	Трубка дренажная круглая MF-2140 : наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм MF-2180 : наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм
	5	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

MF-2145, MF-2185

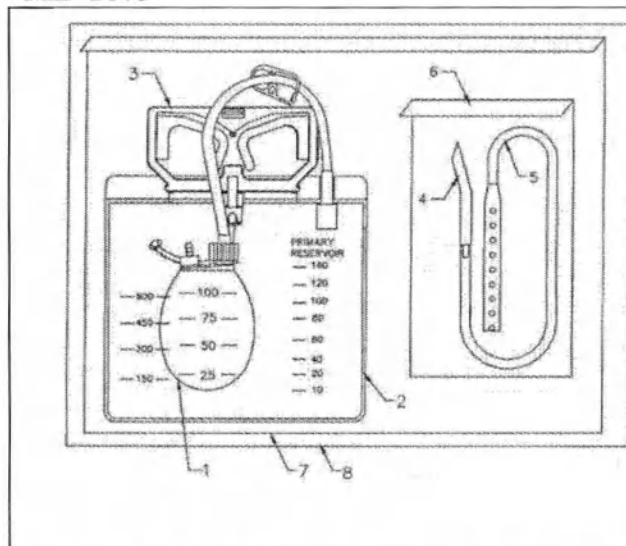
	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Фиксатор
	3	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	4	Игла троакарная диаметром MF-2145 5.0 мм, MF-2185 6.5 мм
	5	Трубка дренажная круглая MF-2145 наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм MF-2185 наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм
	6	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

MD-1070



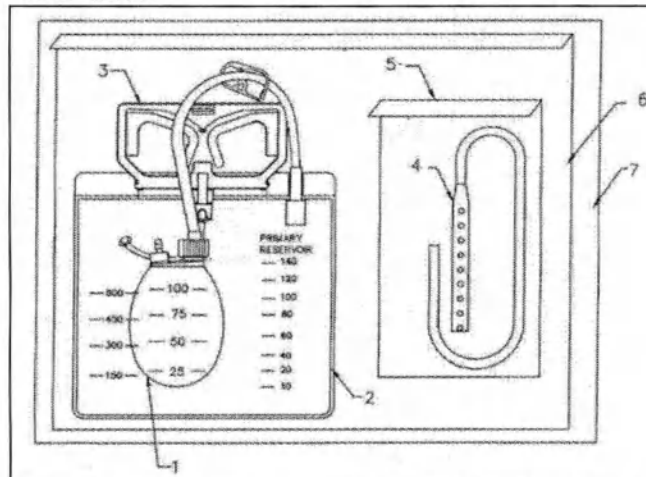
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Мешок дренажный 800 мл
3	Держатель мешка дренажного
4	Пакет из ПЭВП 10 x 20 см
5	Трубка дренажная плоская : ширина 7.0 мм, длина 1020 мм
6	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
7	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MD-1075



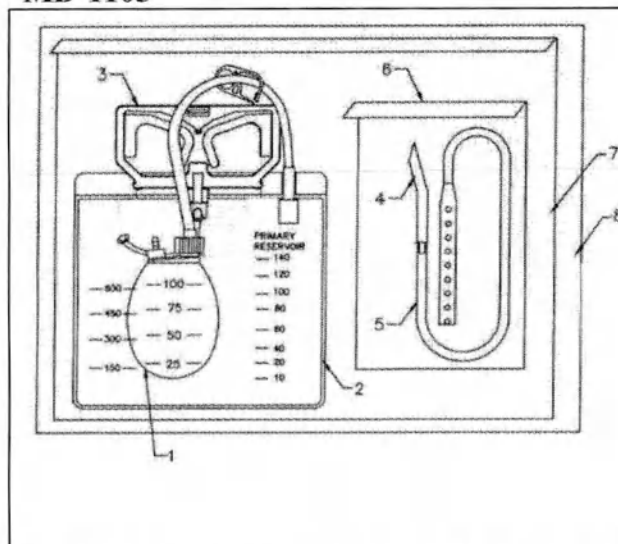
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Мешок дренажный 800 мл
3	Держатель мешка дренажного
4	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
5	Трубка дренажная плоская : ширина 7.0 мм, длина 1230 мм
6	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
8	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MD-1100



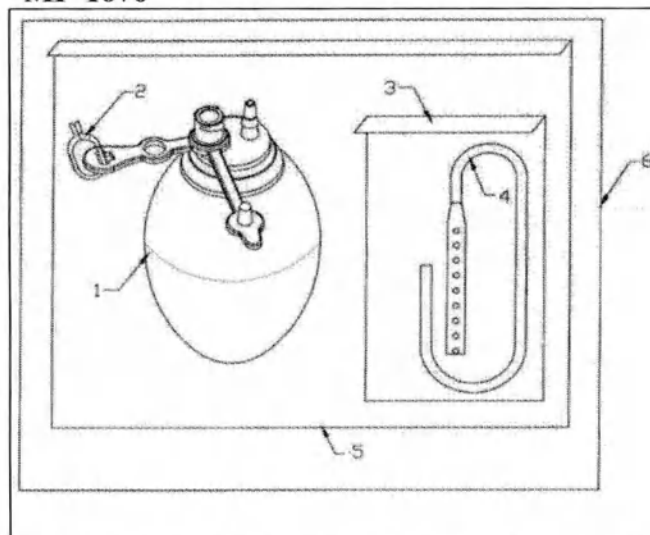
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Мешок дренажный 800 мл
3	Держатель мешка дренажного
4	Трубка дренажная плоская : ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
5	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
6	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
7	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MD-1105



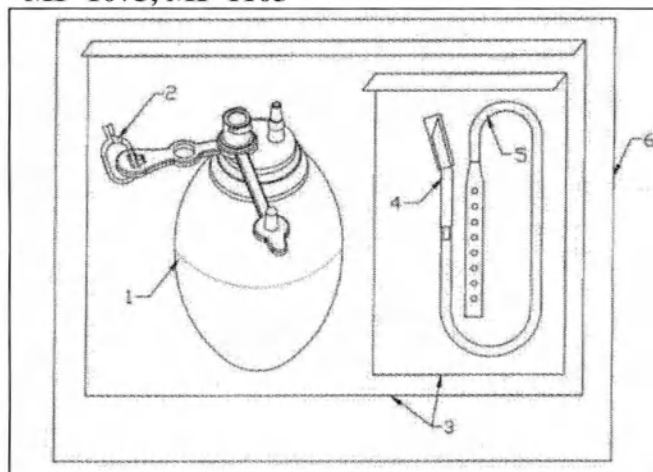
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Мешок дренажный 800 мл
3	Держатель мешка дренажного
4	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
5	Трубка дренажная плоская : ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
6	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см
8	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MF-1070



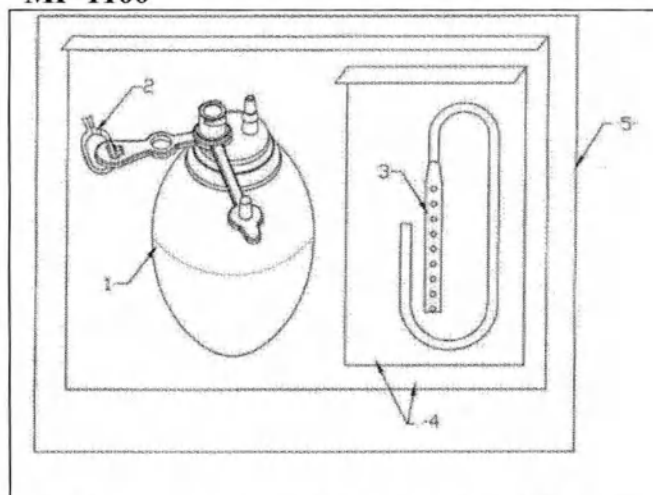
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Фиксатор
3	Пакет из ПЭВП 10 x 20 см
4	Трубка дренажная плоская : ширина 7.0 мм, длина 1020 мм
5	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
6	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

MF-1075, MF-1105



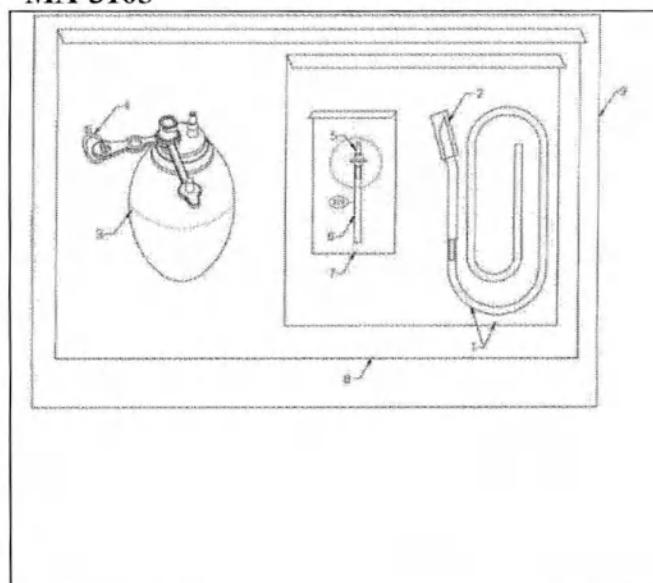
1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Фиксатор
3	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
4	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
5	Трубка дренажная плоская MF-1075 ширина 7.0 мм, длина 1230 мм MF-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
6	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

MF-1100



1	Ёмкость дренажная 100 мл
2	Фиксатор
3	Трубка дренажная плоская ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
4	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
5	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

МА-3105



1	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм
2	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
3	Ёмкость дренажная 100 мл
4	Фиксатор
5	Коннектор Луер «папа»
6	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
7	Пакет из ПЭВП
8	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
9	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

МА-1155

	1	Трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм упакована в пакет
	2	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	3	Ёмкость дренажная 100 мл
	4	Фиксатор
	5	Пакет из ПЭВП 18 x 30 см
	6	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

МА-1195

	1	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм
	2	Игла троакарная диаметром 6.4 мм
	3	Ёмкость дренажная 100 мл
	4	Фиксатор
	5	Коннектор Луер «папа» симметричный
	6	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	7	Пакет из ПЭВП
	8	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
	9	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

МК-3105

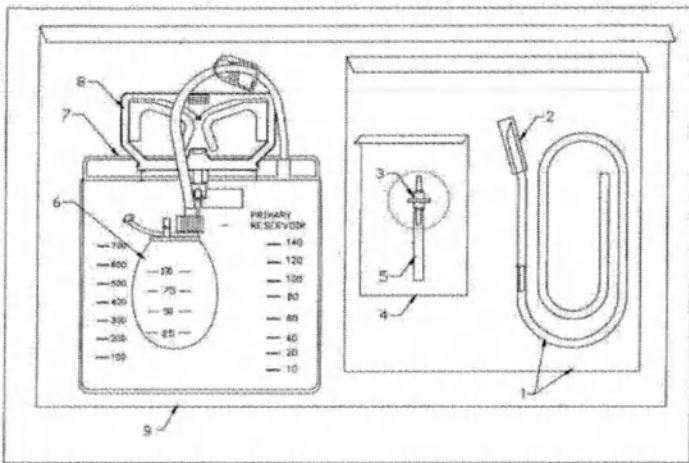
	1	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм
	2	Игла троакарная диаметром 4.0 мм
	3	Коннектор Луер «папа»
	4	Пакет из ПЭНП
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Ёмкость дренажная 100 мл
	7	Мешок дренажный 800 мл
	8	Держатель мешка дренажного
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

МК-1155

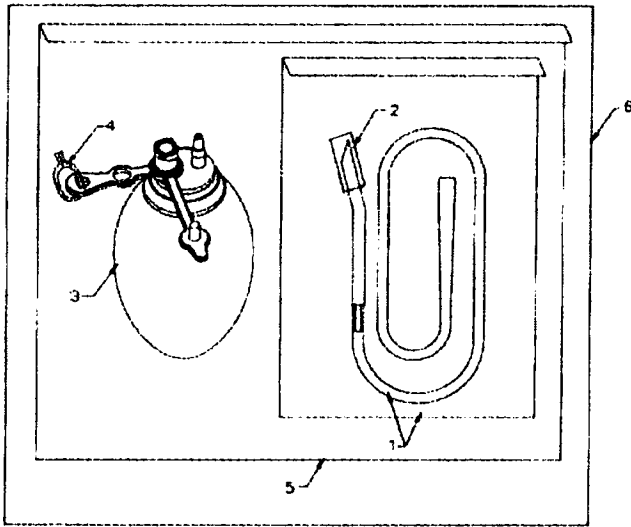
	1	Ёмкость дренажная 100 мл
	2	Мешок дренажный 800 мл
	3	Держатель мешка дренажного
	4	Пакет из ПЭВП 15 x 30 см
	5	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм
	6	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	7	Пакет из ПЭВП 17.5 x 35 см

	8	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

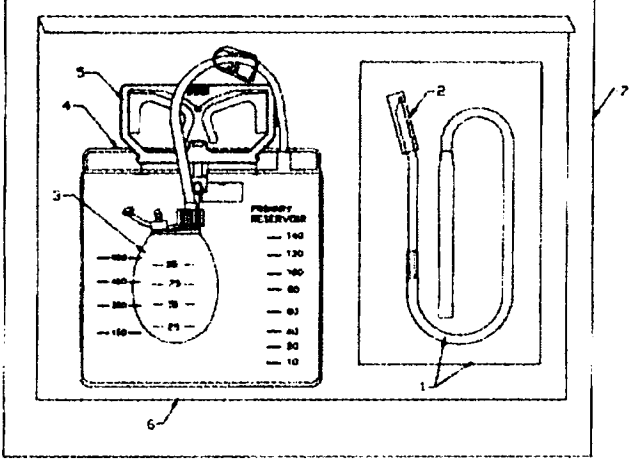
МК-1195

	1	Трубка дренажная круглая рифленая : наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм
	2	Игла троакарная диаметром 6.4 мм
	3	Коннектор Луер «папа» симметричный
	4	Пакет из ПЭНП
	5	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм
	6	Ёмкость дренажная 100 мл
	7	Мешок дренажный 800 мл
	8	Держатель мешка дренажного
	9	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	10	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

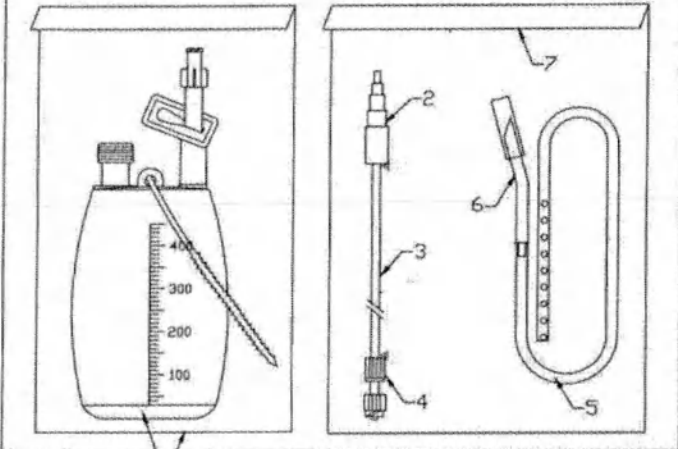
МА-1075, МА-1105

	1	Трубка дренажная плоская рифленая МА-1075 ширина 7.0 мм, длина 1020 мм МА-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	2	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	3	Ёмкость дренажная 100 мл
	4	Фиксатор
	5	Пакет из ПЭВП 15 x 25 см
	6	Индивидуальная упаковка 18 x 30 см

МК-1075, МК-1105

	1	Трубка дренажная плоская рифленая МК-1075 ширина 7.0 мм, длина 1020 мм МК-1105 ширина 10.0 мм, длина 1020 мм
	2	Игла троакарная диаметром 5.0 мм
	3	Ёмкость дренажная 100 мл
	4	Мешок дренажный 800 мл
	5	Держатель мешка дренажного
	6	Пакет из ПЭВП 17.5 x 39 см
	7	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

MQ-5105, MQ-5125, MQ-5145, MQ-5165

	1	Ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл
	2	Адаптер
	3	Трубка 4.8 x 6.8 мм
	4	Ротационный коннектор
	5	Трубка дренажная из ПВХ MQ-5105 наружный диаметр 3.3 мм, длина 500 мм, MQ-5125 наружный диаметр 4.0 мм, длина 500 мм, MQ-5145 наружный диаметр 4.7 мм, длина 500 мм, MQ-5165 наружный диаметр 5.3 мм, длина 500 мм
	6	Игла троакарная диаметром MQ-5105 3.3мм, MQ-5125 4.0мм, MQ-5145 4.7мм, MQ-5165 5.3мм
	7	Пакет из ПЭВП 15х 30 см
	8	Индивидуальная упаковка 20 x 40 см

Описание элементов изделия:

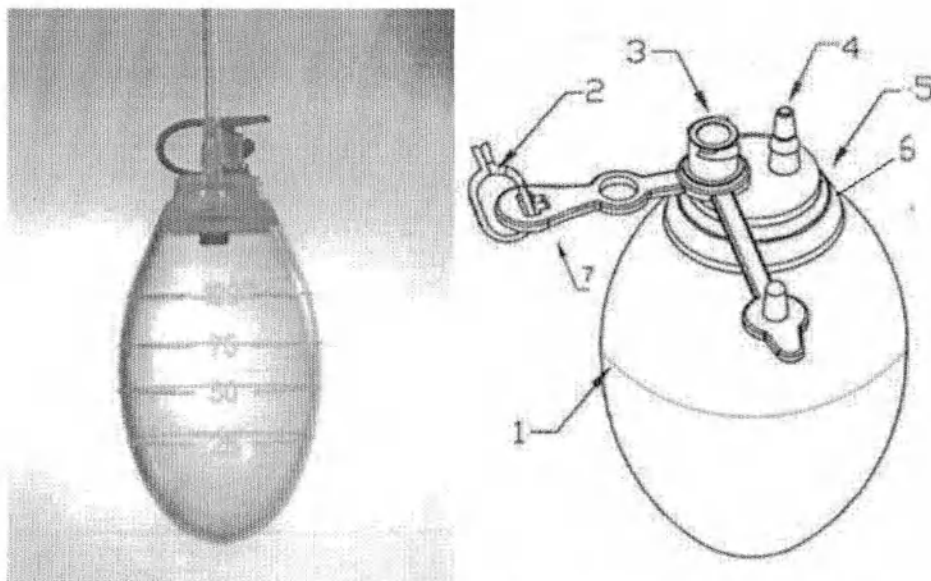
(Примечание: символы в таблицах далее обозначают:

+ изделие входит в состав, - изделие не входит в состав.)

1. Ёмкость дренажная и мешок дренажный

(далее по тексту, в качестве общего наименования: ёмкость дренажная, мешок дренажный)

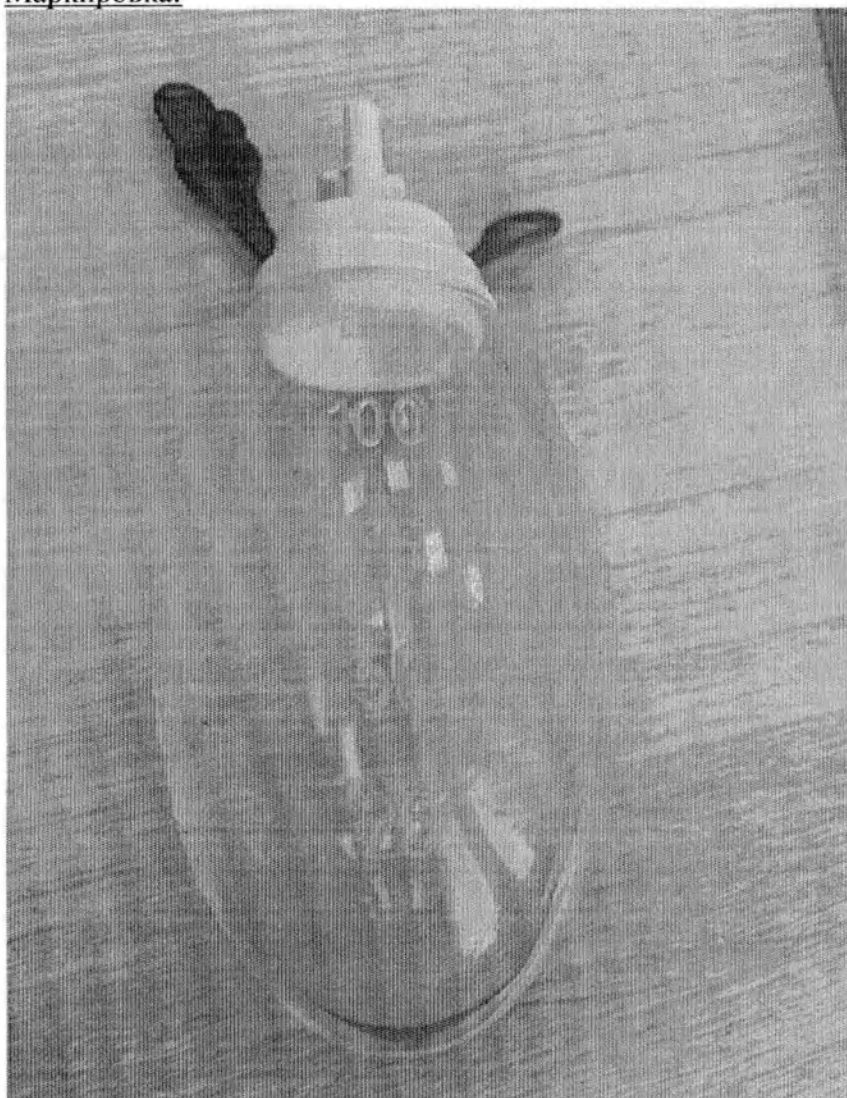
Ёмкость дренажная 100 мл



1. Ёмкость дренажная 2. Фиксатор 3. Порт 4. Антивозвратный клапан 5. Крышка 6. Кольцо 7. Держатель

Ёмкость дренажная имеет прозрачные стенки и градуировку объема, что позволяет точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок ёмкости дренажной. На верхней крышке ёмкости имеется 2 разъема. Антивозвратный клапан предназначен для присоединения трубки дренажной (напрямую или через трубку с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа») и также позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент очистки ёмкости, таким образом, ёмкость может быть реактивирована необходимое количество раз в пределах одного пациента. Порт позволяет удалить содержимое ёмкости, не рассоединяя изделие, если вариант исполнения изделия предполагает наличие мешка дренажного. Если ёмкость идет отдельно, то порт закрывается пробкой на конце держателя.

Маркировка:



На ёмкости дренажной имеется градуировка: 25, 50, 75, 100 cc ml (мл).

Наборы без трубки дренажной	
REF	Мешок дренажный
MD-0000	+

Наборы с трубкой дренажной круглой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MD-2100	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм	-
MF-2100	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм	-

MD-2105	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм	+
MF-2105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм	+
MD-2140	+	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм	-
MF-2140	-	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм	-
MD-2145	+	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм	+
MF-2145	-	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм	+
MD-2180	+	наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм	-
MF-2180	-	наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм	-
MD-2185	+	наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм	+
MF-2185	-	наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм	+

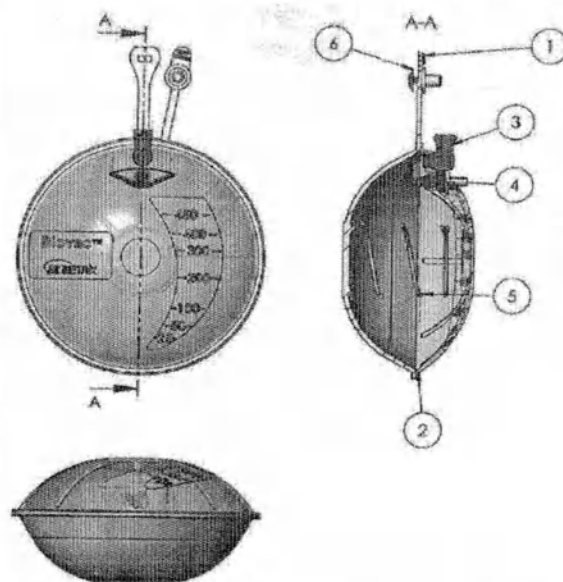
Наборы с трубкой дренажной плоской 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MD-1070	+	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	-
MF-1070	-	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	-
MD-1075	+	ширина 7.0 мм, длина 1230 мм	+
MF-1075	-	ширина 7.0 мм, длина 1230 мм	+
MD-1100	+	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	-
MF-1100	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	-
MD-1105	+	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+

MF-1105	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+
---------	---	----------------------------------	---

Наборы с трубкой дренажной круглой рифленой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
МА-3105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм	+
МК-3105	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм	+
МА-1155	-	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм	+
МК-1155	+	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм	+
МА-1195	-	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм	+
МК-1195	+	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм	+

Наборы с трубкой дренажной плоской рифленой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
МА-1075	-	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	+
МК-1075	+	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	+
МА-1105	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+
МК-1105	+	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+

Ёмкость дренажная 450 мл

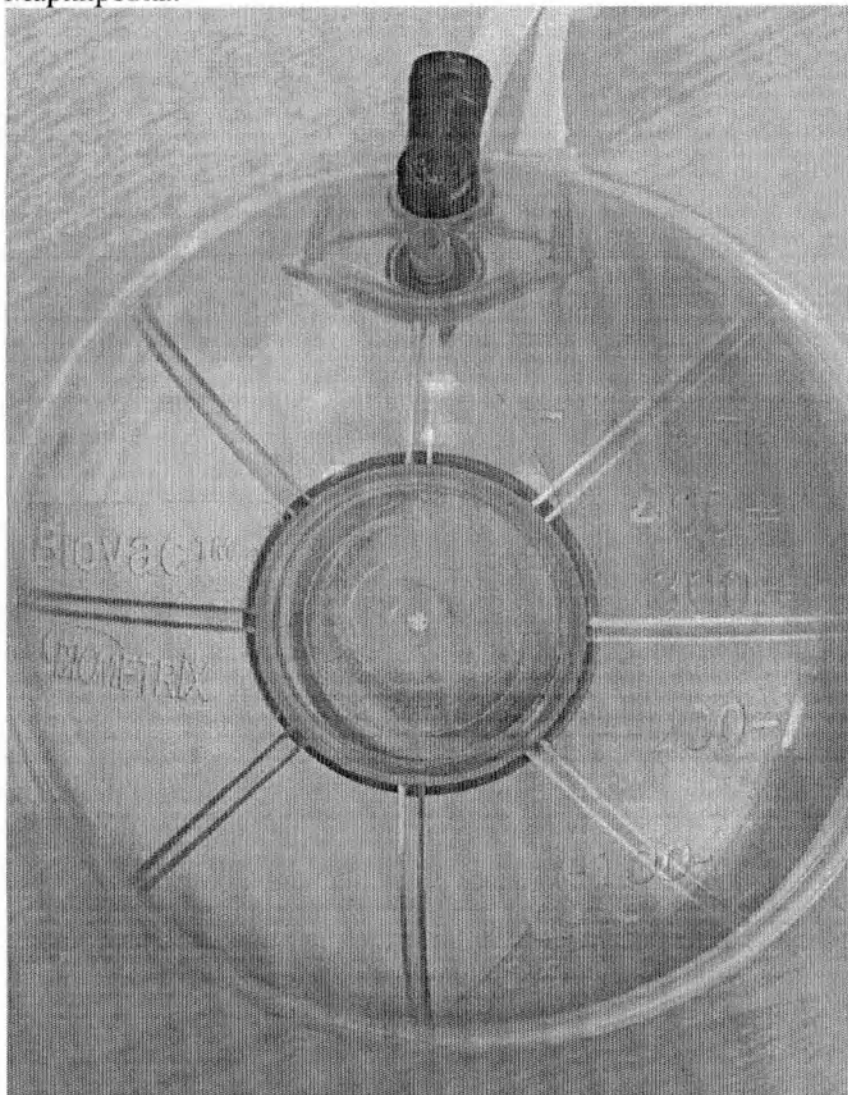


1. Держатель емкости 2. Верхняя часть емкости 3. 'L' соединение 4. Антивозвратный клапан 5. Пружина 6. Заглушка

Ёмкость дренажная имеет градуировку объема на верхней части что позволяет точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого.

Так же оснащена 'L' соединением для подключения к мешку дренажному для удаления содержимого емкости, если вариант исполнения изделия предполагает наличие мешка дренажного. И антивозвратным клапаном, для присоединения трубки дренажной, которое может осуществляться через трубку с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» или через Y-коннектор/ Y-коннектор с коннектором Луер «папа», который дает возможность «двойного» дренирования одной трубкой или подсоединения двух трубок дренажных. Антивозвратный клапан позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент очистки емкости, таким образом, емкость может быть реактивирована необходимое количество раз в пределах одного пациента. Внутри по всей длине расположена упругая пружина из нержавеющей стали для создания высокого разрежения.

Маркировка:



Ёмкость содержит сокращенное наименование и логотип производителя. На верхней части ёмкости дренажной имеется градуировка: 25мл, 50мл, 100мл, 200мл, 300мл, 400мл, 450мл.

Наборы без дренажной трубки	
REF	Мешок дренажный
MJ-0000	+
ML-0000	-

Наборы с трубкой дренажной круглой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MJ-2100	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм	-
MJ-2105	+	наружный диаметр	+

		3.3 мм, длина 1200мм	
ML-2105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм	+
MJ-2125	+	наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм	+
ML-2125	-	наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм	+
MJ-2140	+	наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм	-
MJ-2145	+	наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм	+
ML-2145	-	наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм	+
MJ-2165	+	наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм	+
ML-2165	-	наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм	+
MJ-2180	+	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм	-
MJ-2185	+	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм	+
ML-2185	-	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм	+

Наборы с трубкой дренажной плоской 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MJ-1070	+	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	-
MJ-1075	+	ширина 7.0 мм, длина 1230 мм	+
ML-1070	-	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	-
ML-1075	-	ширина 7.0 мм, длина 1230 мм	+
MJ-1100	+	ширина 10.0 мм,	-

		длина 1020 мм	
MJ-1105	+	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+
ML-1100	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	-
ML-1105	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+

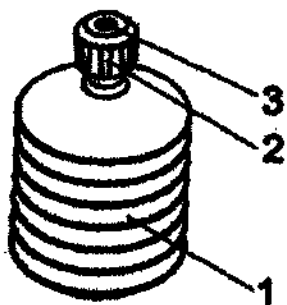
Наборы с трубкой дренажной круглой рифленой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MI-3105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм	+
MM-3105	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм	+
MI-1155	-	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм	+
MM-1155	+	наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм	+
MI-1195	-	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм	+
MM-1195	+	наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм	+

Наборы с трубкой дренажной плоской рифленой 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MI-1075	-	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	+
MM-1075	+	ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	+
MI-1105	-	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+
MM-1105	+	ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	+

Наборы с трубкой дренажной из ПВХ 			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MJ-5105	+	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100	+

		мм	
ML-5105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм	+
MJ-5125	+	наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм	+
ML-5125	-	наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм	+
MJ-5145	+	наружный диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм	+
ML-5145	-	наружный диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм	+
MJ-5165	+	наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм	+
ML-5165	-	наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм	+
MJ-5185	+	наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм	+
ML-5185	-	наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм	+

Ёмкость дренажная 50 мл



1. Ёмкость дренажная 2. Порт 3. Втулка

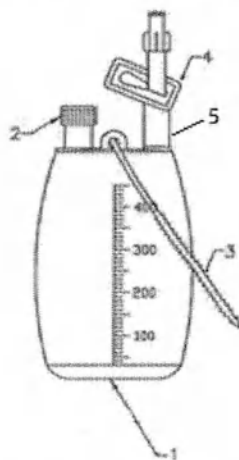
Ёмкость дренажная имеет вид «гармошка» и предназначена для эвакуации раневого содержимого. Трубка дренажная вставляется в емкость через порт и закрепляется при помощи втулки.

Маркировка: отсутствует.

Наборы с трубкой дренажной из ПВХ			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная

			изогнутая
МН-1170	-	наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм	-
МН-1175	-	наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм	+
МН-1070	-	наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм	-
МН-1075	-	наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм	+

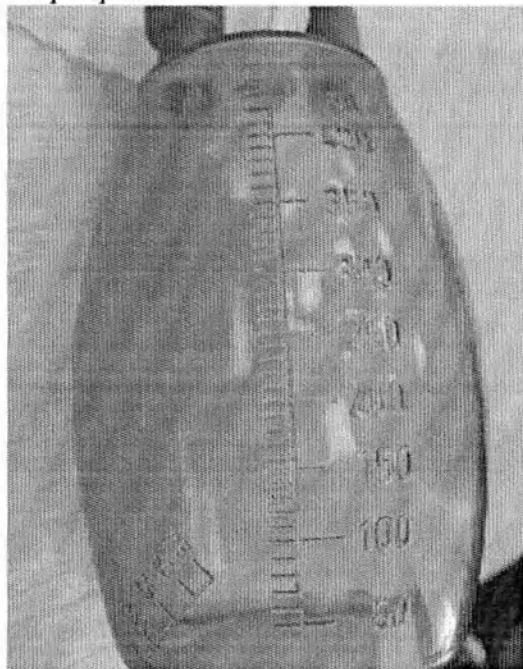
Ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл



1. Ёмкость дренажная 2. Индикатор вакуума 3. Застежка 4. Зажим 5. Порт
Дренаж происходит за счет отрицательного давления до 80 000 Па, которое создается в заводских условиях.

Ёмкость дренажная имеет градуировку объема, что позволяет точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. Индикатор уровня вакуума мин/макс позволяет отслеживать уровень вакуума в ёмкости дренажной.

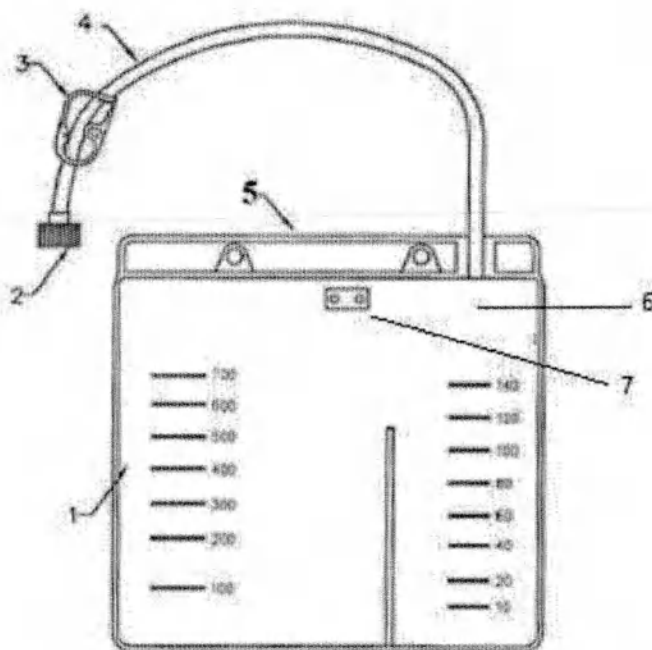
Маркировка:



На ёмкости дренажной имеется градуировка, левая шкала имеет отметки о вместимости от 50-400мл с шагом 50мл, правая шкала без отметок, с шагом 10мл. Так же имеется вторая шкала с отметками 10, 25, 50, 75 мл (градуировка начинается с 5мл, не имеет численного обозначения).

Наборы с трубкой дренажной из ПВХ			
REF	Мешок дренажный	Трубка дренажная	Игла троакарная
MQ-5105	-	наружный диаметр 3.3 мм, длина 500 мм	+
MQ-5125	-	наружный диаметр 4.0 мм, длина 500 мм	+
MQ-5145	-	наружный диаметр 4.7 мм, длина 500 мм	+
MQ-5165	-	наружный диаметр 5.3 мм, длина 500 мм	+

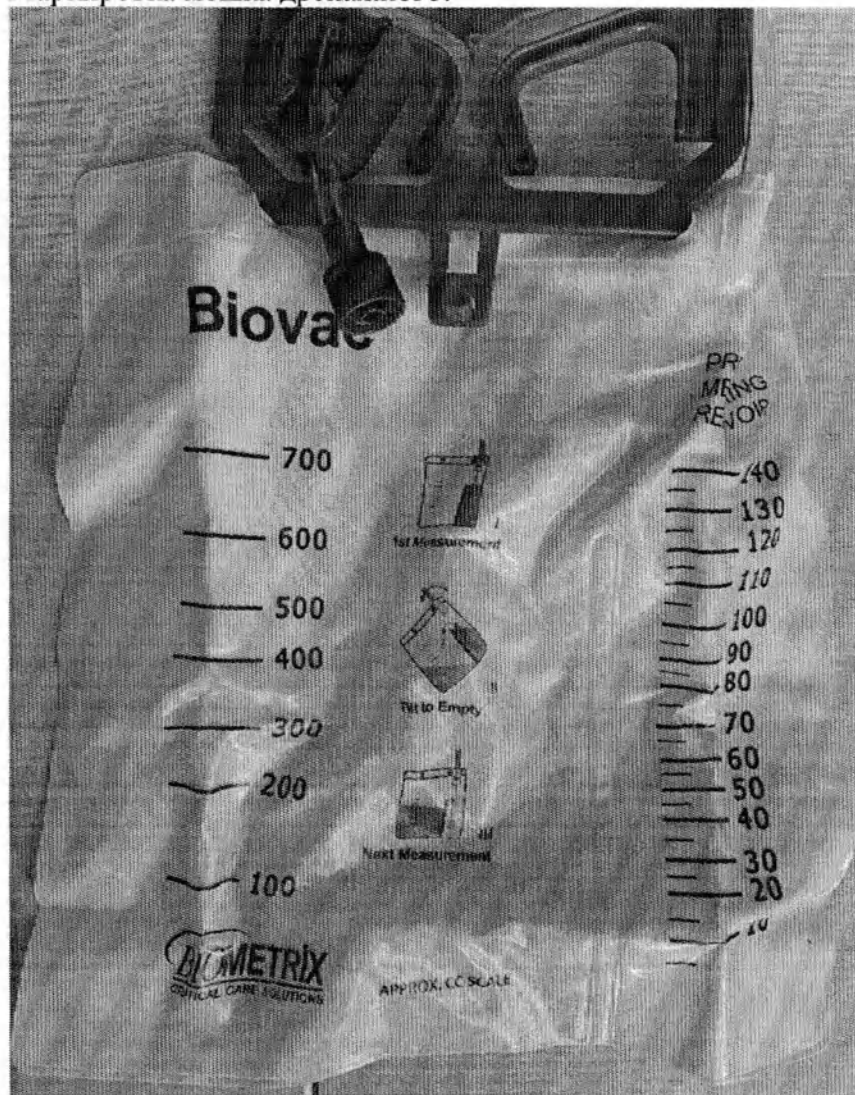
Мешок дренажный 800 мл



1. Мешок 2. Винтовой соединитель с коннектором Луер мама 3. Зажим 4. Трубка 5. Место для крепления держателя 6. Клапан (находится внутри мешка) 7. Фильтр (находится внутри мешка)

Мешок дренажный на половину разделен перегородкой на первичный измерительный резервуар и основной резервуар. На переднюю сторону нанесена градуировка объема. При помощи трубки с коннектором Луер мама, мешок дренажный подключается к ёмкости дренажной. Также мешок снабжён держателем, для крепления у кровати пациента. Наличие мешка дренажного определяется вариантом исполнения изделия.

Маркировка мешка дренажного:



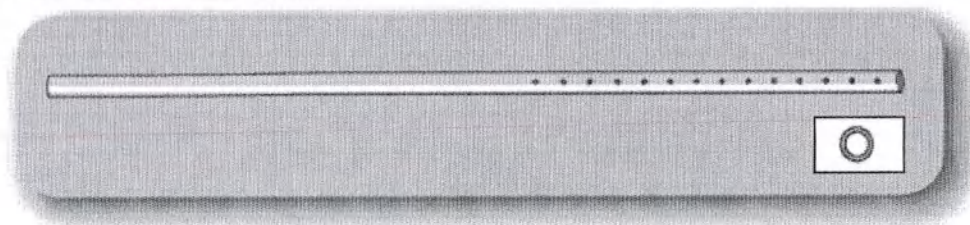
Первичный измерительный резервуар (Primary Measuring reservoir) содержит градуировку от 10 до 140 мл с шагом в 10 мл и дополнительные линии без указания объема в 5 мл.

Основной резервуар содержит сокращенное наименование и логотип производителя. Так же имеется градуировка от 100 до 700 мл с шагом в 100 мл. Изображения: I 1st Measurement – 1ое измерение, II Tilt to Empty – Наклоните, чтобы опустошить, III Next Measurement – следующее измерение. APPROX. CC SCALE- приблизительно, шкала в мл.

2. Трубка дренажная и игла троакарная

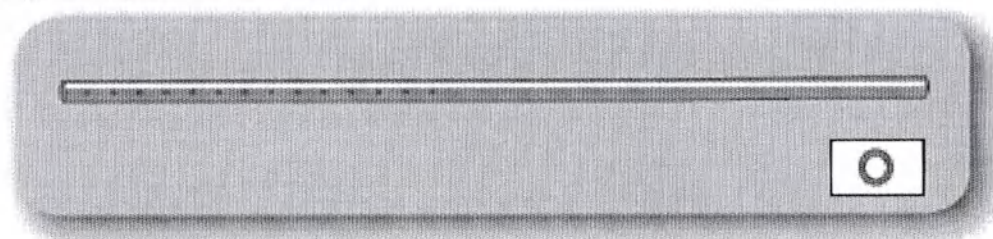
(далее по тексту, в качестве общего наименования: трубка дренажная, игла троакарная)

Трубка дренажная круглая



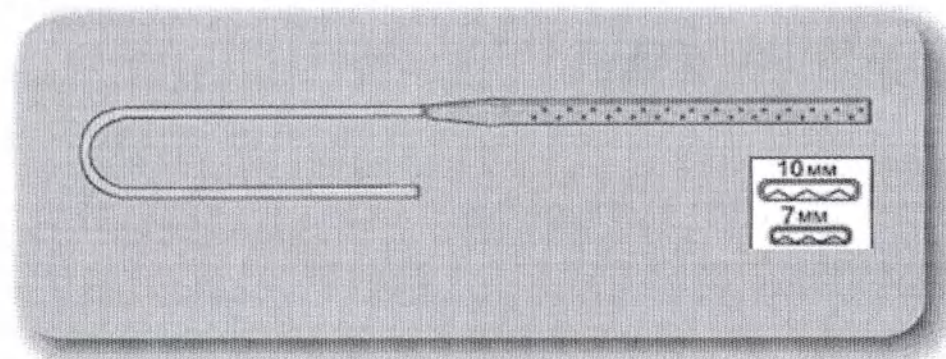
Изделие представляет собой круглую, прозрачную, частично перфорированную трубку с рентгенконтрастной полосой голубого цвета по всей длине, которая позволяет четко определять положение на рентгеновском снимке.

Трубка дренажная из ПВХ



Изделие представляет собой круглую, прозрачную, частично перфорированную трубку с рентгенконтрастной полосой зеленого цвета по всей длине, которая позволяет четко определять положение трубки на рентгеновском снимке. Так же на трубку нанесены 3 отметки черного цвета в области перфорированной части.

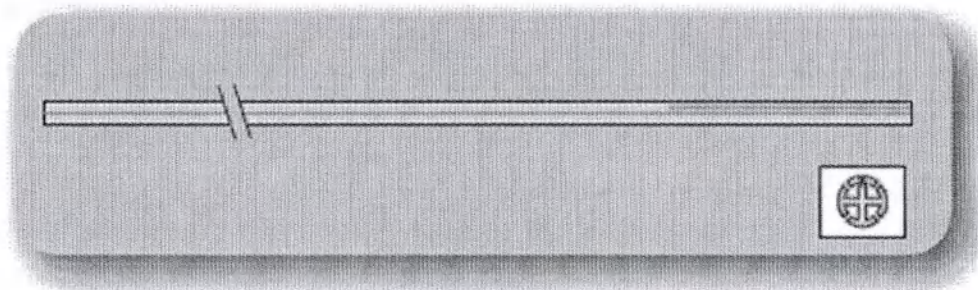
Трубка дренажная плоская



Изделие состоит из двух частей, непрерывно соединенных между собой. Одна часть представляет собой плоскую перфорированную трубку: 10мм имеют рентгенконтрастную белую плоскую часть, 7мм нанесена рентгенконтрастная полоса голубого цвета, что позволяет четко определять положение трубок на рентгеновском снимке. Внутренняя поверхность трубки дренажной оснащена 2-3 зубцами по всей длине, которые служат для предотвращения слипания и окклюзии.

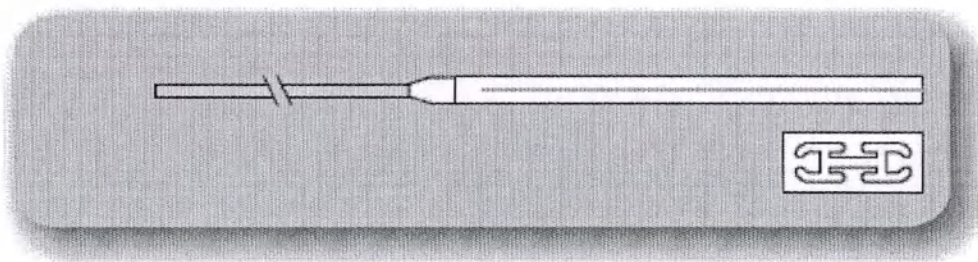
Вторая часть представляет собой круглую прозрачную трубку (проводящая часть).

Трубка дренажная круглая рифленая



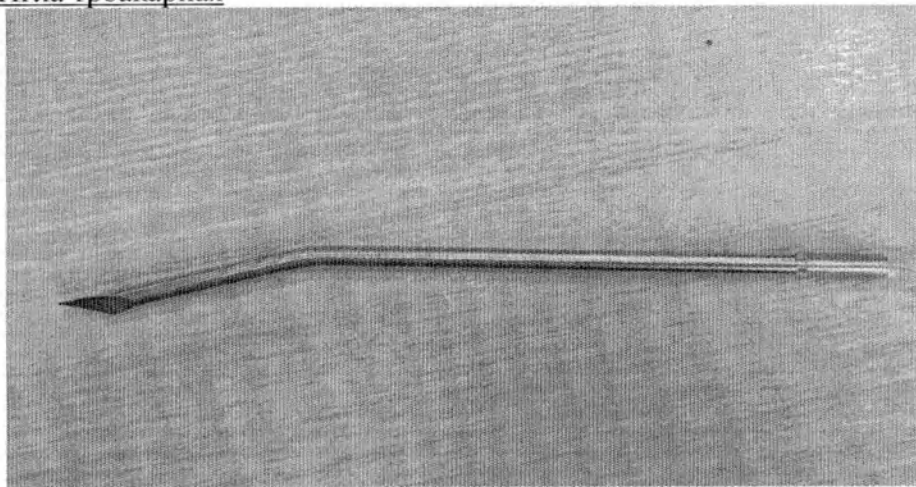
Изделие представляет собой прозрачную трубку, с рентгенконтрастной полосой голубого цвета по всей длине, которая позволяет четко определять положение на рентгеновском снимке. Трубка дренажная имеет непрерывно меняющийся профиль с 3мя зонами: круглая трубка, 4 закрытых канала и 4 открытых канала, которые значительно увеличивают площадь контакта с окружающими тканями.

Трубка дренажная плоская рифленая



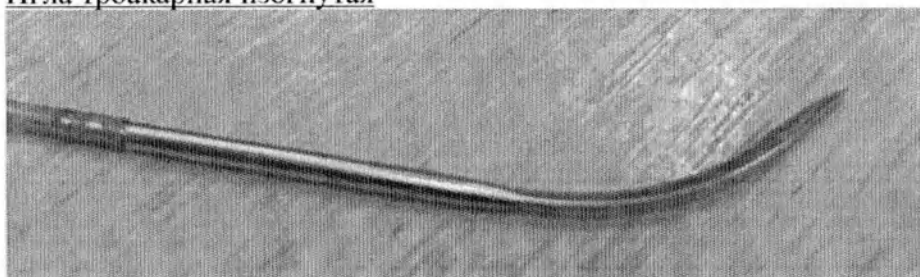
Изделие состоит из двух частей, непрерывно соединенных между собой. Одна часть представляет собой плоскую белую рентгеноконтрастную рифленую трубку с непрерывными дренирующими каналами (4 закрытых канала и 4 открытых канала). Вторая часть представляет собой круглую прозрачную трубку (проводящая часть).

Игла троакарная



Игла троакарная атравматично присоединена к трубке дренажной (наличие иглы троакарной зависит от варианта исполнения) и предназначена для надреза области рядом с областью раны, чтобы вставить трубку дренажную в тело пациента. После введения иглу троакарную удаляют. Изделие защищено защитным колпачком.

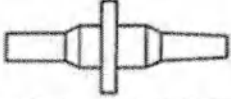
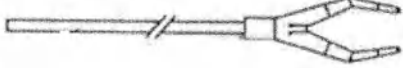
Игла троакарная изогнутая

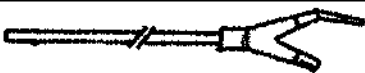
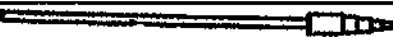
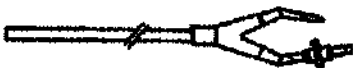
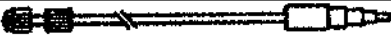


Игла троакарная изогнутая атравматично присоединена к трубке дренажной из ПВХ (наличие троакарной иглы зависит от варианта исполнения) и предназначена для надреза области рядом с областью раны, чтобы вставить трубку дренажную в тело пациента. После введения иглу троакарную удаляют. Изделие защищено защитным колпачком. Данная игла троакарная специфична для введения трубки дренажной из ПВХ малого диаметра (МН-1175, МН-1075).

3. Коннекторы

(далее по тексту, в качестве общего наименования: коннекторы)

Название	Схематичное изображение	Назначение
Коннектор Луер «папа»		Присоединяется к трубке дренажной
Y-коннектор		Одной стороной может присоединяться к двум трубкам дренажным, другой стороной присоединяется к

		ёмкости дренажной
Адаптер		Одной стороной присоединяется к трубке дренажной, другой стороной присоединяется к ёмкости дренажной
Y-коннектор с коннектором Луер «папа»		Одной стороной может присоединяться к двум трубкам дренажным разного диаметра, другой стороной присоединяется к ёмкости дренажной
Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа»/ Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным		Одной стороной присоединяется к трубке дренажной, другой стороной присоединяется к ёмкости дренажной
Адаптер (REF: MQ-5105, MQ-5125, MQ-5145, MQ-5165)		Одной стороной присоединяется к трубке дренажной, другой стороной присоединяется к порту ёмкости дренажной Пред-Вакуумной 400 мл

Материалы, из которых изготовлено изделие и вид контакта с организмом человека.

Таблица – Материалы, из которого изготовлено изделие

Изделие		Материалы, применяемые при изготовлении	Вид контакта
Ёмкость дренажная 100 мл	Ёмкость дренажная	Силикон, (LSL KEG), Shin-Etsu, Великобритания	Кратковременный (менее 24 ч) контакт с неповрежденной кожей.
	Крышка	Полипропилен, (PP QT73), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (TOSAF), Terraflex, Израиль	
	Антивозвратный клапан	Силикон, (Silicone45), Wacker, Германия	
	Кольцо	Нейлон, (PA6PB145NT), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (White117), Terraflex, Израиль	
	Держатель	ПЭНП, (LDPE 800+20% engage), Terraflex, Израиль	
	Фиксатор	Полиацеталь, (57/XXD), Wacker, Германия Краситель синего цвета, (Blue119), Wacker, Германия	
Ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл	Ёмкость дренажная	Силикон, (LSL KEG), Shin-Etsu, Великобритания	
	Крышка	Полипропилен, (PP QT73), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (TOSAF), Terraflex, Израиль	
	Антивозвратный клапан	Силикон, (Silicone45), Wacker, Германия	
	Кольцо	Нейлон, (PA6PB145NT), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (White117), Terraflex, Израиль	
	Держатель	ПЭНП, (LDPE 800+20% engage), Terraflex, Израиль	
	Фиксатор	Полиацеталь, (57/XXD), Wacker, Германия Краситель синего цвета, (Blue119), Wacker, Германия	
	Мешок	ПВХ, (PVC80), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (White11), Terraflex, Израиль	
	Держатель мешка дренажного	Полиэтилен высокой плотности, (HDPE92), Terraflex, Израиль Краситель синего цвета, (Blue1092), Terraflex, Израиль	
	Винтовой соединитель с коннектором Луер-мама	АБС, (ABS-Q12), Terraflex, Израиль Краситель синего цвета, (Blue34), Terraflex, Израиль	
	Зажим	Полипропилен, (PP95678), Wacker, Германия Краситель синего цвета,	

		(Blue0911), Wacker, Германия
	Трубка	ПВХ, (PVC74), Terraflex, Израиль
Ёмкость дренажная 450 мл	Фильтр	Полиэфирное волокно, (PALL V30RS00), Terraflex, Израиль
	Нижняя часть емкости	ПВХ- пластикат, (G- 003/0000), Terraflex, Израиль
		Краситель белого цвета, (White405), Terraflex, Израиль
	Верхняя часть емкости	ПВХ, (39% PVC 235; 61% PVC 506), Terraflex, Израиль
	Пружина	Нержавеющая сталь, (AISI 302), Wacker, Германия
	'L' соединение	ПВХ, (PVC 506), Terraflex, Израиль
		Краситель синего цвета, (Blue43), Terraflex, Израиль
	Антивозвратный клапан	Силикон, (Silicone), Wacker, Германия
	Заглушка	АБС, (ABS (BASF)), Wacker, Германия
Ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл		Краситель синего цвета, (Blue119), Wacker, Германия
	Держатель емкости	ПВХ, (PVC 506), Terraflex, Израиль
		Краситель белого цвета, (White405), Terraflex, Израиль
	Нижняя часть емкости	ПВХ- пластикат, (G- 003/0000), Terraflex, Израиль
		Краситель белого цвета, (White405), Terraflex, Израиль
	Верхняя часть емкости	ПВХ, (39% PVC 235; 61% PVC 506), Terraflex, Израиль
	Пружина	Нержавеющая сталь, (AISI 302), Wacker, Германия
	'L' соединение	ПВХ, (PVC 506), Terraflex, Израиль
		Краситель синего цвета, (Blue43), Terraflex, Израиль
	Антивозвратный клапан	Силикон, (Silicone), Wacker, Германия
	Заглушка	АБС, (ABS (BASF)), Wacker, Германия
		Краситель синего цвета, (Blue119), Wacker, Германия
	Держатель емкости	ПВХ, (PVC 506), Terraflex, Израиль
		Краситель белого цвета, (White405), Terraflex, Израиль
	Мешок	ПВХ, (PVC80), Terraflex, Израиль
		Краситель белого цвета, (White11), Terraflex, Израиль
	Держатель мешка дренажного	Полиэтилен высокой плотности, (HDPE92), Terraflex, Израиль
		Краситель синего цвета, (Blue1092), Terraflex, Израиль

	Винтовой соединитель с коннектором Луер мама	АБС, (ABS-Q12), Terraflex, Израиль Краситель синего цвета, (Blue34), Terraflex, Израиль	
	Зажим	Полипропилен, (PP95678), Wacker, Германия Краситель синего цвета, (Blue0911), Wacker, Германия	
	Трубка	ПВХ, (PVC74), Terraflex, Израиль	
	Фильтр	Полиэфирное волокно, (PALL V30RS00), Terraflex, Израиль	
	Ёмкость дренажная 50 мл	Полиэтилен, (PE65667), Terraflex, Израиль	
Ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл	Втулка	АБС, (ABS-Q12), Terraflex, Израиль Краситель белого цвета, (White07), Terraflex, Израиль	
	Ёмкость дренажная	ПВХ, (PVCQL165), Terraflex, Израиль	
	Индикатор вакуума	Полиуретан, (P22444643), Terraflex, Израиль Краситель зеленого цвета, (Green32432), Terraflex, Израиль	
	Застежка	Полиэтилен высокой плотности, (HDPE92), Terraflex, Израиль	
	Зажим	Полипропилен, (PP95678), Wacker, Германия Краситель белого цвета, (White238), Wacker, Германия	
Y-коннектор, Адаптер	Порт	ТПЭ, (TPE423), Terraflex, Израиль Краситель зеленого цвета, (Green7657567), Terraflex, Израиль	
		ПВХ, (PX-16302E), ModenPlast, Германия ПВХ, (RB5/D NDG), ModenPlast, Германия	
Y-коннектор с коннектором Луер «папа»		ПВХ, (PX-16302E), ModenPlast, Германия ПВХ, (RB5/D NDG), ModenPlast, Германия АБС-пластик, (ABS-389), Borla, США	
	Коннектор Луер «папа»	АБС-пластик, (ABS-389), Borla, США	
	Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа», Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным	ПВХ, (RB5/D NDG), ModenPlast, Германия АБС-пластик, (ABS-389), Borla, США	
Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм; Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм		Силикон, (Elastosil 4305) + Голубой пигмент (8203904) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия	Кратковременный (менее 24 часов) контакт с мягкими тканями

трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм; трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм ; трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм; трубка дренажная круглая наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм		
Трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм; трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм; трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм; трубка дренажная круглая наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм; трубка дренажная круглая : наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм трубка дренажная круглая наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм; трубка дренажная круглая : наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм; трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 6.5 мм трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм трубка дренажная круглая рифленая наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм	Силикон, (Elastosil 4305) + Голубой пигмент (8203904) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия Нержавеющая сталь, (AISI 303), Adroit, Израиль	
Трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм	Силикон, (Elastosil 4305) + Голубой пигмент (8203904) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия	
	Силикон, (Elastosil 4305), Wacker, Германия	
Трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1230 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм	Силикон, (Elastosil 4305) + Голубой пигмент (8203904) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия	
	Силикон, (Elastosil 4305), Wacker, Германия	

	Нержавеющая сталь, (AISI 303), Adroit, Израиль	
Трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм	Силикон, (Elastosil 4305), Wacker, Германия Силикон, (Elastosil 4305) + Краситель белого цвета (White476) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия	
Трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм	Силикон, (Elastosil 4305), Wacker, Германия Силикон, (Elastosil 4305) + Краситель белого цвета (White476) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия Нержавеющая сталь, (AISI 303), Adroit, Израиль	
Трубка дренажная плоская рифленая: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм Трубка дренажная плоская рифленая: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм	Силикон, (Elastosil 4305), Wacker, Германия Силикон, (Elastosil 4305) + Краситель белого цвета (White476) + Основная смесь сульфата бария (60084208), Wacker, Германия Нержавеющая сталь, (AISI 303), Adroit, Израиль	
Трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм с иглой троакарной изогнутой с диаметром тела 2.0 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм с иглой троакарной изогнутой с диаметром тела 2.7 мм Трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм, трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 6.0 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 3.3 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный	ПВХ (RB5/D NDG) + Основная смесь бария сульфата (60084208) + Зеленый пигмент (87778787) + Краситель черного цвета (Black124), Wacker, Германия Нержавеющая сталь, (AISI 303), Adroit, Израиль	

диаметр 4.7 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм			
Трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм, трубка дренажная из ПВХ : наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм, трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм, трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм,		ПВХ (RB5/D NDG) + Основная смесь бария сульфата (60084208) + Зеленый пигмент (87778787) + Краситель черного цвета (Black124), Wacker, Германия	
Упаковка	Пакет	ПЭНП, (QW345), Sigma Medical Supplies Corp., Тайвань	Кратковременный (менее 24 часов) опосредованный контакт с организмом.
	Пакет	ПЭВП, (P5446), Sigma Medical Supplies Corp., Тайвань	
	Нижняя часть индивидуальной упаковки	Бумага плотностью 70 г/м ² (Sigma PeelClean EO (70gsm)), Sigma Medical Supplies Corp., Тайвань	
	Верхняя часть индивидуальной упаковки	ПЭТ /Линейный полиэтилен низкой плотности, (PM51004), Excelsior Packing Co. LTD., США	

Технические характеристики изделия

Ёмкость дренажная 100 мл

Номинальный объем, мл, ±10%	Максимальный объем, мл	Диаметр емкости, мм, ±10%	Высота емкости, мм, ±10%	Наружный диаметр порта, мм, ±10%	Внутренний диаметр порта, мм, ±10%	Наружный диаметр антивозвратного клапана, мм, ±10%	Внутренний диаметр антивозвратного клапана, мм, ±10%	Диаметр кольца, мм, ±10%	Диаметр крышки, мм, ±10%	Диаметр заглушки держателя, мм, ±10%
100	120	55.60	121.0	9.0	7.5	4.8	3.6	32.6	30	6.2

На ёмкости дренажной имеется градуировка: 25мл, 50мл, 75мл, 100мл. Расстояние от кольца до отметки 100мл, составляет 2,2см ±10%, расстояние между градуированными линиями составляет 1,4 см ±10%, расстояние от отметки 25мл до нижней части изделия 3,2 см ±10%. Толщина градуированных линий составляет 1 мм±10%. Величина разрезания: 40-160 мм рг. ст.

Ёмкость дренажная 450 мл

Номинальный объем, мл, ±10%	Максимальный объем, мл	Внешний Диаметр верхней части емкости, мм, ±10%	Внутренний диаметр верхней части емкости, мм, ±10%	Ширина бортика верхней части емкости, мм, ±10%	Высота верхней части емкости, мм, ±10%	Внешний Диаметр нижней части емкости, мм, ±0.5 мм	Внутренний диаметр нижней части емкости, мм, ±10%	Ширина бортика, мм, ±10%	Высота нижней части емкости, мм, ±10%	Диаметр кольца крепежного для пружины, мм, ±10%
450	550	133.80	124.75	0.70	32.50	133	124	0.9	38.0	38.0

Наружный Диаметр входного отверстия, мм, ±10%	Внутренний диаметр входного отверстия, мм, ±10%	Длина, мм, ±10%	Диаметр (А), мм, ±10%	Диаметр (С), мм, ±10%	Внешний Диаметр выходного отверстия (В), мм, ±10%	Внутренний диаметр выходного отверстия, мм, ±10%
10	6.2	19.90	8.90	9.90	7.10	5.7

Внутренняя сторона					Внешняя сторона	
Наружный диаметр, мм, ±10%	Внутренний диаметр, мм, ±10%	Длина, мм, ±10%	Ширина, мм, ±10%	Ширина отверстия узкой части, мм, ±10%	Наружный диаметр мм, ±0.15мм	Внутренний диаметр, мм, ±0.15мм
9.6	7.2	17.7	8	1.06	4.52	3.17
Диаметр широкой части, мм, ±0.5		Диаметр узкой части, мм, -0.50/0		Длина, мм, ±2.0		Толщина, мм, ±0.2

42	36.5	78	1.80
----	------	----	------

На верхней части ёмкости дренажной имеется градуировка: 25мл, 50мл, 100мл, 200мл, 300мл, 400мл, 450мл. Расстояние до отметки 450мл, составляет 4,5см $\pm 10\%$, расстояние между градуированными линиями составляет: 450-400мл: 1,1 см $\pm 10\%$, 400-300мл: 9мм $\pm 10\%$, 300-200мл: 1,4 см $\pm 10\%$, 200-100мл: 1,7 см $\pm 10\%$, 100-50мл: 1,0 см $\pm 10\%$, 50-25мл: 7 мм $\pm 10\%$, расстояние от отметки 25мл до нижней части изделия 2,5 см $\pm 10\%$. Толщина градуированных линий составляет 1,2 мм $\pm 10\%$.

Требования: готовое изделие должно выдерживать испытание на растяжение. Приложенное усилие должно составлять минимум 100 Н.

Готовое изделие должно выдерживать испытание на утечку воздуха при постоянном давлении 0,5 бар. Требования: отсутствие значительного перепада давления в 30 сек.

Величина разрежения: 51 ± 7 мм рт. ст.

Ёмкость дренажная 50 мл

Номинальный объем, мл, $\pm 10\%$	Максимальный объем, мл	Диаметр емкости в широкой части, мм $\pm 10\%$	Диаметр емкости в узкой части, мм $\pm 10\%$	Высота емкости, мм, $\pm 10\%$	Наружный диаметр порта, мм, $\pm 10\%$	Внутренний диаметр порта, мм, $\pm 10\%$	Наружный диаметр втулки, мм, $\pm 10\%$	Внутренний диаметр втулки, мм, $\pm 10\%$
50	60	44.5	41.0	85.1	10.2	2.5	14.6	4.1

Величина разрежения: 150 ± 10 мм рт. ст.

Ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл

Номинальный объем, мл, $\pm 10\%$	Максимальный объем, мл	Диаметр емкости, мм, $\pm 10\%$	Высота емкости, мм, $\pm 10\%$	Длина индикатора вакуума, мм, $\pm 10\%$	Диаметр индикатора вакуума, мм, $\pm 10\%$	Длина застежки, мм, $\pm 10\%$	Длина порта, мм, $\pm 10\%$	Внешний диаметр входного отверстия порта, мм, $\pm 10\%$	Внутренний диаметр входного отверстия порта, мм, $\pm 10\%$	Длина x ширина зажима, мм, $\pm 10\%$
400	470	82	115	23	17	310	68	6.1	4.5	50 x 19

На ёмкости дренажной имеется градуировка, левая шкала имеет отметки о вместимости от 50-400мл с шагом 50мл, правая шкала без отметок, с шагом 10мл. Длина градуированной шкалы составляет 9,5 см $\pm 10\%$. Расстояние между отметками для левой шкалы составляет 9мм $\pm 10\%$, а для правой 2 мм $\pm 10\%$. Толщина градуированных линий составляет 1 мм $\pm 10\%$.

Так же имеется вторая шкала с отметками 10, 25, 50, 75 мл (градуировка начинается с 5мл, без обозначения). Длина градуированной шкалы составляет 2,5 см $\pm 10\%$. Расстояние между отметками 5-10 мл 5 мм $\pm 10\%$, 10-25 мл 7 мм $\pm 10\%$, 25-50 мл 6 мм $\pm 10\%$, 50-75мл 4 мм $\pm 10\%$. Толщина градуированных линий составляет 0,8 мм $\pm 10\%$.

Величина разрежения: 675 ± 10 мм рт. ст.

Мешок дренажный 800 мл

Длина, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Ширина бортика, мм, $\pm 10\%$	Ширина первичного измерительного резервуара, мм, $\pm 10\%$	Диаметр отверстий для крепления держателя, мм, $\pm 10\%$	Ширина места для крепления держателя, мм, $\pm 10\%$	Расстояние от перегородки до верхней части, мм, $\pm 10\%$	Внешняя длина фильтра, мм, $\pm 10\%$	Внутренняя длина фильтра, мм, $\pm 10\%$	Ширина фильтра, мм, $\pm 10\%$	Диаметр отверстий под фильтр, мм, $\pm 10\%$	Внешний диаметр трубки, мм, $\pm 10\%$	Внутренний диаметр трубки, мм, $\pm 10\%$	Длина держателя, мм, $\pm 10\%$	Ширина держателя, мм, $\pm 10\%$
212	235	2	60	7	20.5	68	23.5	17	12	3.4	7.0	5.0	127	67

На мешке дренажном имеется градуировка, левая шкала имеет отметки о вместимости от 100 до 700 мл с шагом в 100 мл, правая шкала содержит градуировку от 10 до 140 мл с шагом в 10 мл и дополнительные линии без указания объема в 5 мл.

Длина градуированной левой шкалы составляет 11,0 см $\pm 10\%$, а правой 12,0 см $\pm 10\%$.

Расстояние между отметками для левой шкалы составляет: от 100-200 мл 2,5 см $\pm 10\%$, 200-300 мл 1,5 см $\pm 10\%$, 300-400 мл 2 см $\pm 10\%$, 400-500 мл 1,2 см $\pm 10\%$, 500-600 1,7 см $\pm 10\%$, 600-700 мл 2 см $\pm 10\%$, а для правой шкалы расстояние между 10-20, 30-40, 70-80, 100-110, 120-130, 130-140 мл 1 см ($\pm 10\%$), между остальными 0,7 см ($\pm 10\%$). Толщина градуированных линий с указанием объема составляет 1 мм $\pm 10\%$, без указания объема 0,7 мм ($\pm 10\%$).

Трубка дренажная круглая

REF	Наружный диаметр, O.D. мм, $\pm 10\%$	Внутренний диаметр, I.D. мм, $\pm 10\%$	Длина, мм, ± 70 мм	Длина перфорированной части, мм, ± 15 мм	Расстояние между отверстиями, мм, ± 2 мм (B)	Диаметр отверстий, мм, $\pm 10\%$ ($\varnothing d$)	Кол-во отверстий	Троакарная игла
MD-2100	3.3	1.6	1250	222.2	6.4	1.2	64	-
MF-2100	3.3	1.6	1250	222.2	6.4	1.2	64	-
MD-2105	3.3	1.6	1250	222.2	6.4	1.2	64	+
MF-2105	3.3	1.6	1250	222.2	6.4	1.2	64	+
MD-2140	5.0	3.0	1250	222.2	9.5	1.7	44	-
MF-2140	5.0	3.0	1250	222.2	9.5	1.7	44	-
MD-2145	5.0	3.0	1250	222.2	9.5	1.7	44	+
MF-2145	5.0	3.0	1250	222.2	9.5	1.7	44	+

MD-2180	6.5	3.3	1250	222.2	12.7	2.5	32	-
MF-2180	6.5	3.3	1250	222.2	12.7	2.5	32	-
MD-2185	6.5	3.3	1250	222.2	12.7	2.5	32	+
MF-2185	6.5	3.3	1250	222.2	12.7	2.5	32	+

REF	Наружный диаметр, O.D. мм, ±10%	Внутренний диаметр, I.D. мм, ±10%	Длина, мм, ±70мм	Длина перфорированной части, мм, ±15мм	Расстояние между отверстиями, мм, ±2 мм (B)	Диаметр отверстий, мм, ±10% (Ød)	Кол-во отверстий	Троакарная игла
MJ-2100	3.3	1.6	1200	383.0	6.4	1.2	64	-
MJ-2105	3.3	1.6	1200	383.0	6.4	1.2	64	+
ML-2105	3.3	1.6	1200	383.0	6.4	1.2	64	+
MJ-2125	4.0	2.0	1200	387.0	6.4	1.2	64	+
ML-2125	4.0	2.0	1200	387.0	6.4	1.2	64	+
MJ-2140	4.7	2.5	1200	391.0	9.5	1.7	44	-
MJ-2145	4.7	2.5	1200	391.0	9.5	1.7	44	+
ML-2145	4.7	2.5	1200	391.0	9.5	1.7	44	+
MJ-2165	5.3	2.9	1200	396.0	9.5	1.7	44	+
ML-2165	5.3	2.9	1200	396.0	9.5	1.7	44	+
MJ-2180	6.4	3.2	1200	391.0	12.7	2.5	32	-
MJ-2185	6.4	3.2	1200	391.0	12.7	2.5	32	+
ML-2185	6.4	3.3	1200	391.0	12.7	2.5	32	+

Усилие на разрыв трубок дренажных с наружным диаметром менее 4 мм составляет $\geq 5H$, а трубок дренажных с наружным диаметром более 4 мм составляет $\geq 15H$.

Трубка дренажная плоская

REF	Ширина мм, ±10% (A)	Толщина мм, ±10% (B)	Длина перфорированной части, мм, ±10% (C)	Длина, мм, ±10% (D)	Диаметр отверстий, мм, ±10% (Ød)	Расстояние между отверстиями, мм, ±10%	Длина, мм, ±10% (E)	Наружный диаметр, O.D. мм, ±10% (G)	Внутренний диаметр, I.D. мм, ±10% (F)	Общая длина, мм, ±10%	Троакарная игла
Плоская часть трубки дренажной							Круглая часть трубки дренажной				
MD-1070	7.0	4.0	185.0	220.0	0.9	0.7	800.0	5.1	2.9	1020	-

MF-1070 MJ-1070 ML-1070											
MD-1100 MF-1100 MJ-1100 ML-1100	10.0	4.2	193.0	220.0	1.4	0.7	800.0	5.1	2.9	1020	-
MD-1075 MF-1075 MJ-1075 ML-1075	7.0	4.0	185.0	220.0	0.9	0.7	1010	5.1	2.9	1230	+
MD-1105 MF-1105 MJ-1105 ML-1105	10.0	4.2	193.0	220.0	1.4	0.7	800.0	5.1	2.9	1020	+

Усилие на разрыв трубок дренажных: 7.0 > 30Н, 10.0 мм > 40Н. Усилие на отрыв плоской части от круглой части: 7.0 > 30Н, 10.0 мм > 50Н.

Трубка дренажная круглая рифленая

REF	Наружный диаметр открытого канала, O.D. мм, ±10% (A)	Наружный диаметр закрытого канала, O.D. мм, ±10% (B)	Наружный диаметр круглой трубки, O.D. мм, ±10% (C)	Внутренний диаметр круглой трубки, I.D. мм, ±10% (D)	Общая длина, мм, ±10% (F)	Длина рифленой части, мм, ±10% (E)	Троакарная игла
MA-3105 MK-3105 MI-3105 MM-3105	3.3	3.7	3.2	1.9	1100	200	+
MA-1155 MK-1155 MI-1155 MM-1155	5.0	5.6	4.6	3.1	1200	300	+
MA-1195 MK-1195 MI-1195	6.4	6.9	6.5	4.0	1200	300	+

ММ-1195											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Усилие на разрыв трубок дренажных с наружным диаметром: 3.3 мм составляет > 25Н; 5.0 мм составляет >30Н; 6.4 мм составляет > 40Н.

Трубка дренажная плоская рифленая

REF	Ширина мм, ±10% (A)	Толщина мм, ±10% (B)	Длина рифленой части, мм, ±10% (C)	Длина, мм, ±10% (D)	Длина мм, ±10% (E)	Ширина мм, ±10% (F)	Длина, мм, ±10% (G)	Наружный диаметр, O.D. мм, ±10% (H)	Внутренний диаметр, I.D. мм, ±10% (I)	Общая длина, мм, ±10% (J)	Троакарная игла
	Плоская рифленая часть трубки дренажной (открытые каналы)				Плоская рифленая часть трубки дренажной (закрытые каналы)		Круглая часть трубки дренажной				
MA-1075 MK-1075 MI-1075 MM-1075	7.0	3.3	198.0	203.0	6.8	3.5	800	5.1	2.9	1020	+
MA-1105 MK-1105 MI-1105 MM-1105	10.0	3.6	198.0	203.0	10.4	3.6	800	5.1	2.9	1020	+

Усилие на разрыв трубок дренажных: 7.0 > 30Н, 10.0 мм > 40Н. Усилие на отрыв плоской рифленой части от круглой части: 7.0 > 30Н, 10.0 мм > 50Н.

Трубка дренажная из ПВХ

REF	Наружный диаметр, O.D. мм, ±10%	Внутренний диаметр, I.D. мм, ±10%	Длина, мм, ±70мм	Длина перфорированной части, мм, ±15мм	Расстояние между отверстиями, мм, ±2 мм	Диаметр отверстий, мм, ±10% (ØdB)	Кол-во отверстий	Расстояние до отметок, мм, ±10%	Расстояние между метками, мм, ±10%	Троакарная игла
ML- 5105 ML-	3.3	1.8	1100	275	5	1.6	112	70	415	+

5105										
MJ- 5125 ML- 5125	4.0	2.0	1100	275	5	1.6	112	70	415	+
MJ- 5145 ML- 5145	4.7	2.5	1100	275	5	1.8	112	70	415	+
MJ- 5165 ML- 5165	5.3	3.1	1100	275	5	1.8	112	70	415	+
MJ- 5185 ML- 5185	6.0	3.0	1100	275	5	1.9	112	70	415	+

REF	Наружный диаметр, O.D. мм, ±10%	Внутренний диаметр, I.D. мм, ±10%	Длина, мм, ±10%	Длина перфорированной части, мм, ±15мм	Расстояние между отверстиями, мм, ±2 мм	Диаметр отверстий, мм, ±10% (ØdB)	Кол-во отверстий	Расстояние до отметок, мм, ±10%	Расстояние между метками, мм, ±10%	Троакарная игла
MH-1170	2.0	1.0	500	140	4	1.2	31	48	2	-
MH-1175	2.0	1.0	500	140	4	1.2	31	48	8	+
MH-1070	2.7	1.5	500	140	4	1.2	31	48	2	-
MH-1075	2.7	1.5	500	140	4	1.2	31	48	2	+

REF	Наружный диаметр, O.D. мм,	Внутренний диаметр, I.D. мм,	Длина, мм, ±10%	Длина перфорированной части, мм, ±15мм	Расстояние между отверстиями,	Диаметр отверстий, мм, ±10%	Кол-во отверстий	Расстояние до отметок, мм, ±10%	Расстояние между метками,	Троакарная игла
-----	----------------------------	------------------------------	-----------------	--	-------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

	±10%	±10%			мм, ±2 мм	(ØdB)			мм, ±10%	
MQ-5105	3.3	1.8	500	150	4	1.6	33	70	2	+
MQ-5125	4.0	2.1	500	150	4	1.6	33	70	2	+
MQ-5145	4.7	2.6	500	150	4	1.8	33	70	2	+
MQ-5165	5.3	3.2	500	150	4	1.8	33	70	2	+

Усилие на разрыв трубок дренажных с наружным диаметром менее 4 мм составляет $\geq 10\text{Н}$, а трубок дренажных с наружным диаметром более 4 мм составляет $\geq 20\text{Н}$.

Игла троакарная

REF	A, мм, (Длина троакарной иглы) ±2.00мм	B, мм, (Диаметр троакарной иглы) +0.05мм -0.1мм	C, мм, ±10%	D, ±2°	E, +3° -1°	F, мм, ±0.10мм	G, мм, ±0.10мм	H, мм, ±1.0мм	I, мм, ±0.10мм
MJ-2105 ML-2105 MI-3105 MM-3105 MJ-5105 ML-5105 MD-2105 MF-2105 MQ-5105	170.0	3.3	16.8	165	22	1.8	1.9	11.0	2.3
MJ-2125 ML-2125 MJ-5125 ML-5125 MA-3105	170.0	4.0	19.9	165	22	2.0	2.2	12.0	2.3

MK-3105 MQ-5125									
MJ-2145 ML-2145 MJ-5145 ML-5145 MQ-5145	170.0	4.7	18.0	165	22	2.5	2.4	15.0	3.1
MJ-1075 MJ-1105 ML-1075 ML-1105 MI-1155 MM-1155 MI-1075 MI-1105 MM-1075 MM-1105 MD-2145 MF-2145 MD-1075 MD-1105 MF-1075 MF-1105 MA-1155 MK-1155 MA-1075 MA-1105 MK-1075 MK-1105	170.0	5.0	20.5	165	22	2.7	2.0	16.0	3.5
MJ-2165 ML-2165 MJ-5165 ML-5165 MQ-5165	170.0	5.3	20.5	165	22	2.5	2.4	18.0	3.2
MJ-5185 ML-5185	170.0	6.0	28.0	165	22	3.0	2.9	19.0	3.9

MJ-2185 ML-2185 MI-1195 MM-1195 MA-1195 MK-1195	170.0	6.4	28.0	165	22	3.7	3.0	22.0	4.3
MD-2185 MF-2185	170.0	6.5	29.0	165	22	3.9	3.2	23.0	4.5

Усилие при разрыве соединений иглы троакарной и трубки дренажной: >30 Н.

Твердость: 30-35 HRC.

Шероховатость поверхности: $Ra \leq 1,6$ мкм

Игла троакарная изогнутая

REF	A, мм, (Общая длина) $\pm 10\%$	B, мм, (Диаметр тела) $\pm 10\%$	a, мм, (Длина места присоединения к трубке дренажной) $\pm 10\%$	Диаметр места присоединения к трубке дренажной, мм, $\pm 10\%$	Угол рабочей части $\pm 10\%$	Ширина режущей кромки, мкм, $\pm 10\%$	Радиус изгиба, мм, ± 5 мм
MH- 1175	60	2.0	6.0	1.4	47°	1.8	15
MH- 1075	80	2.7	8.1	1.9	40°	2.4	30

Усилие при разрыве соединений иглы троакарной и трубки дренажной: >20 Н.

Твердость: 30-35 HRC.

Шероховатость поверхности: $Ra \leq 1,6$ мкм

Коннектор Луер «папа»

REF	Длина, мм, $\pm 10\%$	Внешний диаметр узкого конца, мм, ± 0.03 мм	Внутренний диаметр узкого конца, мм, $+0/-0.1$ мм	Внешний диаметр широкого конца, мм, $+0.1/-0$ мм	Внутренний диаметр широкого конца, мм, $+0/-0.1$ мм	Длина и ширина бортика, мм, $\pm$ 0.1 мм	Диаметр широкой части, мм, ± 0.05 мм
MJ-0000, ML-0000	29.7	2.8	1.9	3.925	2.4	13 x 6.9	6.2

MD-0000, MJ-2100 MJ-2105, MJ-2125 MJ-2140, MJ-2145 MJ-2165, MJ-2180 MJ-2185, ML-2105 ML-2125, ML-2145 ML-2165, ML-2185 MJ-1070, MJ-1075 MJ-1100, MJ-1105 ML-1070, ML-1075 ML-1100, ML-1105							
--	--	--	--	--	--	--	--

Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа»

REF	Коннектор Луер «папа»							Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм				Общая длина, мм, ± 10%
MI-3105 MM-3105 MA-3105 MK-3105	Длина, мм, ± 0.2 мм	Внешний диаметр узкого конца, мм, ± 0.03 мм	Внутренний диаметр узкого конца, мм, +0/- 0.1 мм	Внешний диаметр широкого конца, мм, +0.1/- 0 мм	Внутренний диаметр широкого конца, мм, +0/- 0.1 мм	Длина и ширина бортика, мм, ± 0.1 мм	Диаметр широкой части, мм, ± 0.05 мм	Внутренний диаметр, ID, мм, ± 0.10 мм	Наружный диаметр, OD, мм, ± 0.10 мм	Длина, мм, ± 10%	Твердость по Шору	619
	29.7	2.8	1.9	3.925	2.4	13 x 6.9	6.2	4.0	6.1	600	A/15: 63±2	

Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным

REF	Коннектор Луер «папа» симметричный					Трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм				Общая длина, мм, ± 10%
MI-1155 MI-1195 MM-1155 MM-1195	Длина, мм, ± 0.2 мм	Внешний диаметр, мм, +0.1/- 0 мм	Внутренний диаметр, мм, +0/- 0.1 мм	Длина и ширина бортика, мм, ± 0.1 мм	Диаметр широкой части, мм, +0/- 0.1 мм	Внутренний диаметр, ID, мм, ± 0.10 мм	Внешний диаметр, OD, мм, ± 0.10 мм	Длина, мм, ± 10%	Твердость по Шору	619

MI-1075 MI-1105 MM-1075 MM-1105 MA-1195 MK-1195	29.4	3.925	2.4	12.9 x 7.2	6.2	4.0	6.1	600	A/15: 63±2	
--	------	-------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	------------	--

Адаптер

REF	Общая длина, мм, ± 10%	Длина верхнего коннектора, мм, ± 10%	Длина трубки, мм, ± 10%	Длина нижнего коннектора, мм, ± 10%	a Ø, мм, ± 10%	b, Ø, мм, ± 10%	c Ø, мм, ± 10%	d Ø, мм, ± 10%	e Ø, мм, ± 10%	Внутренний диаметр трубки, ID, мм, ±0.10 мм	Наружный диаметр трубки, OD, мм, ±0.10 мм	Наружный диаметр коннектора, мм, ± 10%	Внутренний диаметр нижнего коннектора, мм, ± 10%
MD-0000	107	47	60	-	4.5	5.9	7.8	9.0	12.0	4.0	6.1	-	-
MQ-5105 MQ-5125 MQ-5145 MQ-5165	960	47	883	30	4.5	5.9	7.8	9.0	12.0	4.0	6.1	10.0	3.0

Y-коннектор

REF	Общая длина, мм, ± 10%	Длина коннектора, мм, ± 10%	A Ø, мм, ± 10%	Длина A, мм, ± 10%	B, Ø, мм, ± 10%	Длина B, мм, ± 10%	B Ø, мм, ± 10%	Длина B, мм, ± 10%	Г Ø, мм, ± 10%	Внутренний диаметр трубки, ID, мм, ±0.10 мм	Наружный диаметр трубки, OD, мм, ±0.10 мм	Длина трубки, мм, ± 10%
MY-0000 ML-0000	663	63	3.1	10	4.2	10	7.8	10	10.1	4.0	6.1	600

Минимальное усилие при разрыве между коннектором и трубкой: 70 Н.

REF	Общая длина, мм, ± 10%	Длина коннектора, мм, ± 10%	A Ø, мм, ± 10%	Длина A, мм ± 10%	Б, Ø, мм, ± 10%	Длина Б, мм ± 10%	В Ø, мм, ± 10%	Длина В, мм ± 10%	Г Ø, мм, ± 10%	Внутренний диаметр трубки, ID, мм, ±0.10 мм	Наружный диаметр трубки, OD, мм, ±0.10 мм	Длина трубки, мм, ± 10%
MJ-5105 MJ-5125 MJ-5145 MJ-5165 MJ-5185 ML-5105 ML-5125 ML-5145 ML-5165 ML-5185	663	63	3.1	10	4.2	10	7.8	10	10.1	4.0	6.1	600

Минимальное усилие при разрыве между коннектором и трубкой: 70 Н.

Y-коннектор с коннектором Луер «папа»

RE F	MJ-2100, MJ-2105, MJ-2125, MJ-2140, MJ-2145, MJ-2165, MJ-2180, MJ-2185, ML-2105, ML-2125, ML-2145, ML-2165, ML-2185, MJ-1070, MJ-1075, MJ-1100, MJ-1105, ML-1070, ML-1075, ML-1100, ML-1105																	
Общая длина, мм, ± 10%	Длина коннектора, мм, ± 10%	A Ø, мм, ± 10%	Длина А, мм± 10%	Б, Ø, мм, ± 10%	Длина Б, мм± 10%	В Ø, мм, ± 10%	Длина В, мм± 10%	Г Ø, мм, ± 10%	Внутренний диаметр трубки, ID, мм, ±0.10 мм	Наружный диаметр трубки, OD, мм, ±0.10 мм	Длина трубки, мм, ± 10%	Длина, мм, ± 0.2 мм	Внешний диаметр узкого конца, мм, ± 0.03 мм	Внутренний диаметр узкого конца, мм, +0/- 0.1 мм	Внешний диаметр широкого конца, мм, +0.1/-0 мм	Внутренний диаметр широкого конца, мм, +0/- 0.1 мм	Длина и ширина бортика, мм, ± 0.1 мм	Диаметр широкой части, мм, ± 0.05 мм
663	63	3.1	10	4.2	10	7.8	10	10.1	4.0	6.1	600	29.7	2.8	1.9	3.925	2.4	13 x 6.9	6.2

Минимальное усилие при разрыве между коннектором и трубкой: 70 Н.

Рекомендации по использованию

Изделия с ёмкостью дренажной 450 мл / Пред-Вакуумной 400 мл используются с целью удаления жидкостей или гнойного материала при таких хирургических вмешательствах, как перелом бедренной кости, замена бедра / колена, ампутация конечностей, операции толстой кишки / прямой кишки, операциях на позвоночнике, в общей хирургии, простатэктомии, мастэктомии и прочих процедурах, связанных с большими кровопотерями.

Изделие с ёмкостью дренажной 100 мл используются с целью удаления жидкостей или гнойного материала при пластической хирургии, нейрохирургии и прочих процедурах, связанных с минимальным послеоперационным кровотечением.

Изделия с ёмкостью дренажной 50 мл используются с целью удаления жидкостей или гнойного материала при операциях на верхних конечностях и небольших пластических операциях.

Рекомендуемая методика использования

Ёмкость дренажная с мешком дренажным

Дренирование раны

1. Если используете отдельную иглу троакарную, введите ее в трубку дренажную.
 2. Разместите трубку дренажную в месте раны.
 3. Отрежьте иглу троакарную и укрепите трубку дренажную.
 4. Присоедините отрезанный конец прямо к входному отверстию ёмкости дренажной, или через коннектор.
 5. Откройте зажим к мешку дренажному.
 6. Сожмите ёмкость дренажную (только в центре) до минимально возможного объема, выпустив как можно воздуха.
 7. Закройте зажим к мешку дренажному сжимая ёмкость дренажную.
 8. Отпустите ёмкость дренажную.
- Начался процесс дренирования.

Опорожнение ёмкости дренажной

1. Откройте зажим к мешку дренажному.
 2. Переверните ёмкость дренажную и поднимите ее выше уровня мешка дренажного.
 3. Сожмите ёмкость дренажную до минимального уровня вместимости для удаления как можно большего количества выделенных жидкостей.
 4. Закройте зажим к мешку дренажному.
 5. Отпустите ёмкость дренажную.
- Сейчас может начаться новый цикл дренирования.

Регистрация выделенных жидкостей

1. Держите мешок дренажный вертикально, за держатель.
2. Запишите ёмкость первичного измерительного резервуара.
3. Зажмите мешок дренажный в нижнем правом углу.
4. Поднимите, чтобы содержимое первичного измерительного резервуара вытекло в основной резервуар.

Замена мешка дренажного

1. Проверьте, что зажим к мешку дренажному закрыт.
2. Расслабьте винтовой соединитель.
3. Отсоедините мешок дренажный.
4. Закройте зажим на мешке дренажном.
5. Присоедините новый мешок дренажный и закрепите винтовой соединитель.

Ёмкость дренажная

Дренирование раны

1. Повторите вышеупомянутые этапы 1 до 4.
2. Удостоверьтесь, что порт ёмкости дренажной открыт.
3. Сожмите ёмкость дренажную до минимального уровня вместимости для удаления как можно больше воздуха.
4. Закройте порт.
5. Отпустите ёмкость дренажную

Начался процесс дренирования.

Опорожнение ёмкости дренажной

1. Откройте порт.
2. Сожмите ёмкость дренажную до минимального уровня вместимости для удаления как можно больше выделенных жидкостей в подходящий сосуд.
3. Закройте колпачок.
4. Отпустите ёмкость дренажную.

Сейчас может начаться новый цикл дренирования.

Ёмкость дренажная 50мл

1. Расслабьте втулку ёмкости дренажной.
2. Сожмите ёмкость дренажную до минимального уровня вместимости.
3. Вставьте трубку дренажную через втулку в порт ёмкости дренажной.
4. Завинтите втулку до упора, чтобы трубка дренажная была надёжно закреплена.

Удаление трубки дренажной из раны.

1. Удалите фиксацию трубки дренажной (шов или лента) в соответствии с больничным протоколом.
2. Осторожно вытяните трубку дренажную из раны.
3. Проверьте целостность трубки дренажной и убедитесь, что она была удалена целиком.

Примечание

Если остается жидкость на месте раны, проверьте следующее:

1. Неподходящее размещение трубки дренажной.
2. Трубка дренажная засорилась.

Рекомендации врачу-специалисту**Материалы (Информация о применении для медицинского работника)**

Изделие и упаковка изделия не содержит натурального латекса.

Технический ремонт и обслуживание

Техническому ремонту и обслуживанию не подлежит. Изделие предназначено только для однократного применения.

Показания:

Установка изделия показана при значительном и умеренном количестве выделений в послеоперационном периоде в области оперативного вмешательства.

Противопоказания:

Противопоказанием является сверхчувствительность к любому из материалов, входящих в состав изделия.

Потенциальные осложнения:

- аллергические реакции;
- кровотечение;
- плохая регенерация раны;
- выпадение катетера из раны;
- сдавление катетером края раны с образованием краевого некроза,
- образование гематомы.

Меры предосторожности:

- а) Изделие предназначено для одноразового использования. Не предназначено для повторного использования или стерилизации. Изделие не следует зашивать или обрабатывать инструментами, которые могут привести к разрыву.
- б) Используйте до истечения даты, указанной на упаковке.
- в) Не используйте поврежденное или вскрытое изделие.
- г) Хранить в сухом и прохладном месте.
- д) Не используйте изделие, если стерильность упаковки каким-либо образом нарушена.
- е) Удаление трубки дренажной должно быть выполнено легким натягиванием в точке, максимально приближенной к коже.

Предупреждения:

1. Удостоверьтесь, что перфорированная часть трубки дренажной находится полностью внутри раны.
2. Нельзя изгибать или перфорировать трубку дренажную.
3. Разместите ёмкость дренажную ниже места раны, чтобы предотвратить течение жидкостей или гнойного материала обратно в рану.
4. Начинайте процесс дренирования как можно раньше, чтобы трубка дренажная не засорилась.
5. Используйте повязки, облегчающие давление, швы и ленты, чтобы фиксировать трубку дренажную.
6. Используя ёмкость дренажную 50 мл, не затягивайте слишком туго втулку вокруг трубки дренажной, чтобы не перекрыть отток жидкостей или гнойного материала.

7. Используя ёмкость дренажную 50 мл, расслабляя втулку, убедитесь, что она не отсоединяется от ёмкости дренажной.
8. Запрещается использовать изделие, если упаковка, обеспечивающая стерильную изоляцию, вскрыта или повреждена.
9. Изделие стерилизовано этиленоксидом и предназначено только для однократного применения. Запрещается повторное использование или повторная стерилизация. Попытки повторно стерилизовать изделие могут привести к нарушению его функции, надлежащей стерилизации или нанесению вреда пациенту.
10. Изделие следует использовать до даты «Использовать до», указанной на этикетке. Перед использованием следует прочитать инструкцию по применению и тщательно проверить все компоненты. Запрещается использовать при наличии каких-либо повреждений.

Комплект поставки изделия:

I. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнениях:

1. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-0000 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-0000 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-0000 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- адаптер – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

4. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2100 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

5. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

6. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2125 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

7. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2140 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

8. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2145 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

9. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2165 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

10. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2180 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.

- инструкция по применению -1 шт.

11. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-2185 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

12. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-2105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

13. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-2125 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

14. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-2145 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

15. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-2165 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

16. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-2185 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- коннектор Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

17. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-1070 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- коннектор Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

18. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1230 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- коннектор Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

19. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-1100 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- коннектор Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

20. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- коннектор Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

21. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-1070 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1шт.

- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

22. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1230 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

23. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-1100 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

24. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- Y-коннектор с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- коннектор Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

25. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MI-3105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

26. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MI-1155 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

27. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MI-1195 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

28. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ММ-3105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

29. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ММ-1155 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

30. Трубка дренажная для закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ММ-1195 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

31. Трубка дренажная для закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МП-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

32. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МП-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.

- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

33. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ММ-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

34. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ММ-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

35. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-5105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

36. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-5125 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

37. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-5145 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

38. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-5165 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

39. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MJ-5185 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 6.0 мм – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

40. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-5105 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

41. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-5125 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

42. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-5145 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.7 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

43. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-5165 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм – 1 шт.

- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

44. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении ML-5185 в составе:

- ёмкость дренажная 450 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 6.0 мм – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 6.0 мм, длина 1100 мм – 1 шт.
- Y-коннектор – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

45. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МН-1170 в составе:

- ёмкость дренажная 50 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

46. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МН-1175 в составе:

- ёмкость дренажная 50 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.0 мм, длина 500 мм с иглой троакарной изогнутой с диаметром тела 2.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

47. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МН-1070 в составе:

- ёмкость дренажная 50 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

48. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МН-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 50 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 2.7 мм, длина 500 мм с иглой троакарной изогнутой с диаметром тела 2.7 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

49. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2100 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

50. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.

- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

51. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2140 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

52. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2145 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

53. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2180 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

54. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-2185 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 6.5 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

55. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2100 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

56. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

57. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2140 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

58. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2145 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

59. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2180 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

60. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-2185 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм с иглой троакарной диаметром 6.5 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

61. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-1070 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

62. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1230 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

63. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-1100 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

64. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MD-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

65. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-1070 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

66. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 7.0 мм, длина 1230 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

67. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-1100 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм – 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

68. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MF-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

69. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МА-3105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» – 1шт.
- инструкция по применению -1 шт.

70. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МА-1155 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

71. Трубка дренажная для закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МА-1195 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

72. Трубка дренажная для закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МК-3105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 3.3 мм, длина 1100 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

73. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МК-1155 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 5.0 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

74. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МК-1195 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная круглая рифленая: наружный диаметр 6.4 мм, длина 1200 мм с иглой троакарной диаметром 6.4 мм – 1 шт.
- трубка с внутренним диаметром 4.0 мм и внешним диаметром 6.1 мм с коннектором Луер «папа» симметричным – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

75. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МА-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

76. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МА-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

77. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МК-1075 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 7.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

78. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении МК-1105 в составе:

- ёмкость дренажная 100 мл с мешком дренажным 800 мл – 1 шт.
- трубка дренажная плоская рифленая: ширина 10.0 мм, длина 1020 мм с иглой троакарной диаметром 5.0 мм – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

79. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MQ-5105 в составе:

- ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 3.3 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 3.3 мм – 1 шт.
- адаптер -1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

80. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MQ-5125 в составе:

- ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.0 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 4.0 мм – 1 шт.
- адаптер -1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

81. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MQ-5145 в составе:

- ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 4.7 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 4.7 мм – 1 шт.
- адаптер -1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

82. Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования, в исполнении MQ-5165 в составе:

- ёмкость дренажная Пред-Вакуумная 400 мл – 1 шт.
- трубка дренажная из ПВХ: наружный диаметр 5.3 мм, длина 500 мм с иглой троакарной диаметром 5.3 мм – 1 шт.
- адаптер – 1 шт.
- инструкция по применению -1 шт.

Маркировка и упаковка

Компоненты изделия отдельно упаковываются в пакеты, для предотвращения повреждения во время транспортировки или хранения.

Изделие поставляется стерильным и герметично запаивается в первичную стерильную упаковку (стерилизационная упаковка): Бумага плотностью 70 г/м² + ПЭТ /Линейный полиэтилен низкой плотности

Нижняя часть упаковки	индивидуальной	Бумага плотностью 70 г/м ² (Sigma PeelClean EO (70gsm)), Sigma Medical Supplies Corp., Тайвань
Верхняя часть упаковки	индивидуальной	ПЭТ /Линейный полиэтилен низкой плотности, (PM51004), Excelsior Packing Co. LTD., США

с соответствующей маркировкой. После чего помещаются в транспортную

упаковку для последующей транспортировки или хранения. Групповая упаковка отсутствует.

Размеры индивидуальных упаковок представлены в таблице далее:

REF	Размеры индивидуальной упаковки, см, $\pm 10\%$
MJ-0000, MJ-2100, MJ-2140, MJ-2125, MJ-2165, MJ-2180, MJ-1070, MJ-1075, MJ-1100, MJ-1105, MM-3105, MM-1155, MM-1195, MM-1075, MM-1105, MJ-5105, MJ-5145, MJ-5125	23 x 43 см
ML-0000, ML-2105, ML-2145, ML-2185, ML-2125, ML-2165 ML-1070, ML-1075, ML-1105, ML-1100, MI-3105, MI-1155, MI-1195 MI-1075, MI-1105, ML-5105, ML-5145, ML-5125, ML-5165, ML-5185	20 x 34 см
MF-2100, MF-2105, MF-2140, MF-2180, MF-2145, MF-2185, MF-1070, MF-1075, MF-1105, MF-1100, MA-3105, MA-1155 MA-1195, MA-1075, MA-1105	18 x 30 см
MD-0000, MJ-2105, MJ-2145, MJ-2185, MJ-5165, MJ-5185, MD-2100 MD-2105, MD-2140, MD-2180, MD-2145, MD-2185, MD-1070, MD-1075, MD-1100, MD-1105, MK-3105, MK-1155, MK-1195, MK-1075, MK-1105, MQ-5105, MQ-5125, MQ-5145, MQ-5165	20 x 40 см
MH-1170, MH-1175, MH-1070, MH-1075	18 x 20 см

Маркировка индивидуальной упаковки изделия содержит следующую информацию:

-Наименование изделия	Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования
-Информацию о производителе	
-Номер по каталогу (REF)	
-Код партии (LOT)	
-Дата изготовления	
-Дата истечения срока годности	

-Символ «Запрет на повторное применение»	
-Символ «не стерилизовать повторно»	
-Символ «обратитесь к инструкции по применению»	
-Символ «Беречь от влаги»	
-Символ «не допускать воздействия солнечного света»	
-Символ «Не использовать при повреждении упаковки»	
-Нетоксично	Слово «нетоксично»
-Символ «Стерилизация оксидом этилена»,	
- Знак CE	
-Состав изделия	Состав: - ёмкость дренажная 100 мл – 1 шт. - трубка дренажная круглая: наружный диаметр 6.5 мм, длина 1250 мм – 1 шт. - инструкция по применению -1 шт.
- Информация об уполномоченном представителе производителя	«Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)). 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.
- Номер регистрационного удостоверения	

Для транспортировки изделия упаковываются в транспортную упаковку из гофрированного картона (Марка VLBC 33 HH) по 20шт. Размеры транспортной упаковки: 600х300х400мм (±10%).

Маркировка транспортной упаковки изделия содержит следующую информацию:

-Наименование изделия	Набор для дренирования закрытой раны Biovac, одноразового использования
-Информацию о производителе	
-Номер по каталогу (REF)	

-Код партии (LOT)	
-Дата изготовления	
-Дата истечения срока годности	
-Символ «обратитесь к инструкции по применению»	
-Символ «Беречь от влаги»	
-Символ «Хрупкое, обращаться осторожно»,	
-Символ «Вверх»	
- Информация о массе нетто и брутто; - Информация о массе нетто потребительской упаковки; - Информация о числе единиц индивидуальных упаковок в транспортной упаковке; - Информация о габаритных размерах транспортной упаковки (длина, ширина, высота).	
- Информация об уполномоченном представителе производителя	«Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)). 129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.
- Номер регистрационного удостоверения	

Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам».

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования».

ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия».

ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы invitro».

ГОСТ ISO 10993-7-2016 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-11-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследование общетоксического действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний».

ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» п. 4

ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида», п. 6

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа», п. 2

МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»

МР 1941-78 «Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания»

МУК 4.1.3169-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»

И-880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»

МР 1436-76 «Методические рекомендации к определению дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии, при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»

МР 2413-81 «Методические рекомендации по определению эпихлоргидрина в

выданных вытяжках из полимерных материалов»

МВИ МН 1924-2003 «Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты»

«Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.1986 № 4077-86

МУК 4.1.3086-13 «Газохроматографическое определение гексаметилендиамина в водных вытяжках из полимерных материалов, применяемых в пищевой промышленности»

ОФС.1.2.4.0003.15. «Стерильность»

Транспортирование, хранение и эксплуатация

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

Условия транспортирования: Изделие следует транспортировать при температуре воздуха от +5°C до 35°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия хранения: Изделие следует хранить при температуре воздуха от +5°C до +35°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия эксплуатации: Температура воздуха от +5°C до +35°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Необходимо хранить изделие сухом прохладном месте, принять меры для предотвращения замерзания, чрезмерного нагрева или воздействия прямых солнечных лучей, которые могут нанести вред упаковке. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется стерильным. Параметры стерилизации: газовый метод стерилизации (окись этилена) в соответствии с требованиями ISO 11135-1 (уровень остаточной контаминации 10^{-6}).

Повторная стерилизация изделия запрещена. Повторное применение запрещено.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов. При неиспользовании изделия, повреждения индивидуальной упаковки и истечении срока хранения утилизацию проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

Гарантии

Гарантийный срок хранения – 5 лет, срок сохранения стерильности – 5 лет.

Для изделий REF MQ-5105, MQ-5125, MQ-5145, MQ-5165: Гарантийный срок хранения – 3 года, срок сохранения стерильности – 3 года.

Производитель:

BIOMETRIX LIMITED (БИОМЕТРИКС ЛИМИТЕД), Израиль.

Kiryat Mada 4 Jerusalem Zip Code 9777604, Israel

Телефон: 972-2-5861241

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.

Тел: +7(499)2816768

Серийный № 12252/24
Форма №1

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

Я, нижеподписавшаяся, нотариус Авиталь Макаревич, лицензия № 2001362, настоящим удостоверяю, что 19.05.2024 г. ко мне в мой офис находящийся по адресу Иерусалим, ул. Бен Иегуда 1, явились г-жа Дабуш Инбал

☐

знакомая мне лично

☒

личность которой была подтверждена мне удостоверением личности Израиля № 033941410, выданного 18.01.2004

И я убеждена, что личность, стоявшая передо мной, полностью понимала значимость действия и добровольно подписала приложенный документ, помеченный буквой / цифрой «А».

В удостоверение чего я заверяю подпись г-жи Дабуш Инбал своей подписью и печатью сегодня 19.05.2024.

Нотариальный сбор: 218 шекелей

Печать: [Нотариус Авиталь Макаревич]
Печать нотариуса

/подпись/
подпись

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Государство Израиль

Настоящий официальный документ

2. подписан адвокатом Авиталь Макаревич

3. выступающим в качестве нотариуса

4. и скреплён печатью/штампом вышеупомянутого нотариуса

Удостоверено

5. В Мировом суде г. Иерусалим

6. Дата: 29.05.2024 г.

7. Должностным лицом, назначенным министром юстиции в соответствии с Законом о нотариате, 1976 г.

8. За номером 447004/2

9. Печать/штамп /Гербовая печать: Мировой суд г. Иерусалим/

10. Подпись /Подпись/

Печать: ЯЕЛ ШАРОН ТАБИБИ г. Иерусалим 29.05.2024

ОДОБРЕНО
Инбал Дабуш,
Коммерческий и операционный директор
/подпись/

Штамп: «Биометрикс Лтд.», Кирьят Мада 4, Иерусалим 91450, Израиль

Печать: [Нотариус Авиталь Макаревич] /подпись/



Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

Российская Федерация

Город Москва.

Восемнадцатого июля две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2024- *от 28.07*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью *52* лист (-а,-ов).

Е.Е. Прокошенкова

