

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

2024 г.



Проект маркировки

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови
«КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021**

1. Образцы маркировки комплекта № 1

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 1

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 1,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) – 1 шт. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 1 шт.
Пипетка	

1.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 1

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

ПУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 1,0 мл
- Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta: варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

1 шт. LOT

1 шт. W

1 шт. H

1 шт. REF GR-006/1.1

1 шт.

Imbian

4 620102 808395

2. Образцы маркировки комплекта № 2

2.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 2

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD i
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C 30°C IVD i
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) – 10 шт.
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 10 шт.

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 2

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

ПУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие:
- 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta; варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

10 шт.

1 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

1 шт.

LOT

REF

GR-006/10.2

Imbian

4 620102 808401

30°C

30°C

IVD

i

Σ

10



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 3

3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 3

3.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 3

5

4. Образцы маркировки комплекта № 4

4.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 4

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) – 20 шт.
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 20 шт.

4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 4

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

ПУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta: варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

20 шт. LOT

1 фл. W

20 шт. S

20 шт. REF GR-006/20.4

20 шт.

1 шт. Imbian

4 620102 808425

30°C

IVD


20



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

5. Образцы маркировки комплекта № 5

5.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 5

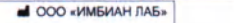Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	 ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска – 1 шт. LOT +30°C -30°C IVD 1 test КК-МВ ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ imbian КК-МВ-ИМБИАН-ИХА IVD открыть ↑
Буферный раствор	 ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT +30°C -30°C IVD

5.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 5

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 5
РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

LOT


25 шт.

1 фл.

1 шт.

REF GR-006/25.5


4 620102 808432

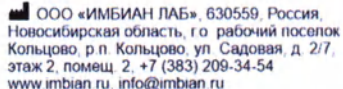
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

+30°C
 -30°C

IVD

6. Образцы маркировки комплекта № 6

6.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 6

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) – 25 шт.
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133- 2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 25 шт.

6.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 6

**КК-МВ-
ИМБИАН-ИХА**

Комплект № 6

ПУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета 25 шт.
- Буферный раствор, 3,0 мл 1 фл.
- Инструменты медицинские колющие: 25 шт.
- 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 25 шт.
- Ипекта: варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению 1 шт.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

LOT

REF GR-006/25.6

Imbian

4 620102 808449

30°C

30°C

IVD

Σ 25



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

7. Образцы маркировки комплекта № 7

7.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 7

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска - 50 шт. LOT 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C IVD

7.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 7

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 7

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbjan.ru

30°C

IVD

Σ 50

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме
и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

50 шт.
2 фл.
1 шт.

LOT

REF GR-006/50.7

Imbian

4 620102 808456

8. Образцы маркировки комплекта № 8

8.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 8

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска - 100 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор – 10,0 мл LOT 30°C 30°C IVD

8.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 8

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 8

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 10,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630558 Россия
Новосибирская область г.о. рабочий поселок
Кольцово р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2 +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru info@imbian.ru

30°C

30°C

IVD

Σ 100

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме
и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

LOT

100 шт.
1 фл.
1 шт.

REF GR-006/100.8

Imbian

4 620102 808463

9. Образцы маркировки комплекта № 9

9.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 9

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска – 1 шт. LOT IVD +30°C -30°C 1 test КК-МВ ООО «ИМБИАН ЛАБ» КК-МВ imbian КК-МВ-ИМБИАН-ИХА открыть
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 10,0 мл LOT IVD +30°C -30°C

9.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 9

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 9

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 10,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

IVD

100

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

LOT

100 шт.

1 фл.

1 шт.

REF GR-006/100.9

Imbian

4 620102 808470

Прошнуповано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист 13
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
14.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



/В.В. Осипова/

2024 г.

Фотографические изображения общего вида

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021**

Комплект № 1

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета 1 шт.
- Буферный раствор, 1,0 мл 1 шт.
- Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Imbiax: варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630556, Россия, Новосибирская область, го. рабочий поселок Колызово, д.п. Колызово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru

LOT 231205
2023-12-05
2026-12-05
REF GR-006/1.1

Imbian

4 620102 808395

30°C
-30°C

IVD

Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи

65*56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетки из нетканого антибактериального материала (70% этиловый спирт, 2% хлоргексидин, 20% декстрозы/глицерина/вода)

Антисептическая активность подтверждена испытаниями ФБУН ГИИ ВОЗ «ВЕКТОР»
Регистрационный от 17.12.2019 г.



Imbian
КК-МВ

C
T
S

Буферный раствор, 1,0 мл
LOT 231205
2023-12-05

Инструменты медицинские колющие:
3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) – 1 шт.

Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 1 шт.

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 1,0 мл
- Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая (Инекта, варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822))
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



231205



2023-12-05



2026-12-05




GR-006/1.1

Imbian



4 620102 808395

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630506, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыбельно, р.п. Колыбельно, ул. Садовая, д. 277, этаж 2, пом. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru

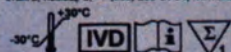

Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и
цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи

65x56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из нетканого,
дезинфицирующая жидкость
(70% этанолный спирт;
0,5% хлоргексидин;
20% дистиллированная вода)

Антисептическая салфетка
подтверждена испытанием
ФГУН ГИД ВВ «ВЕКТОР»
Регистрационный акт от 17.12.2019 г.



Imbian
КК-МВ

C

T


S

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета – 1 шт.

LOT 231205

2023-12-05

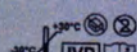

Буферный раствор, 1,0 мл


LOT 231205

2023-12-05



Инструменты медицинские колющие:
3. Ланцет (РУ № ФСЗ 2011/09783) – 1 шт.

Пипетки медицинские полимерные
МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-
2019: 1. Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ №
РЗН 2019/8912) – 1 шт.

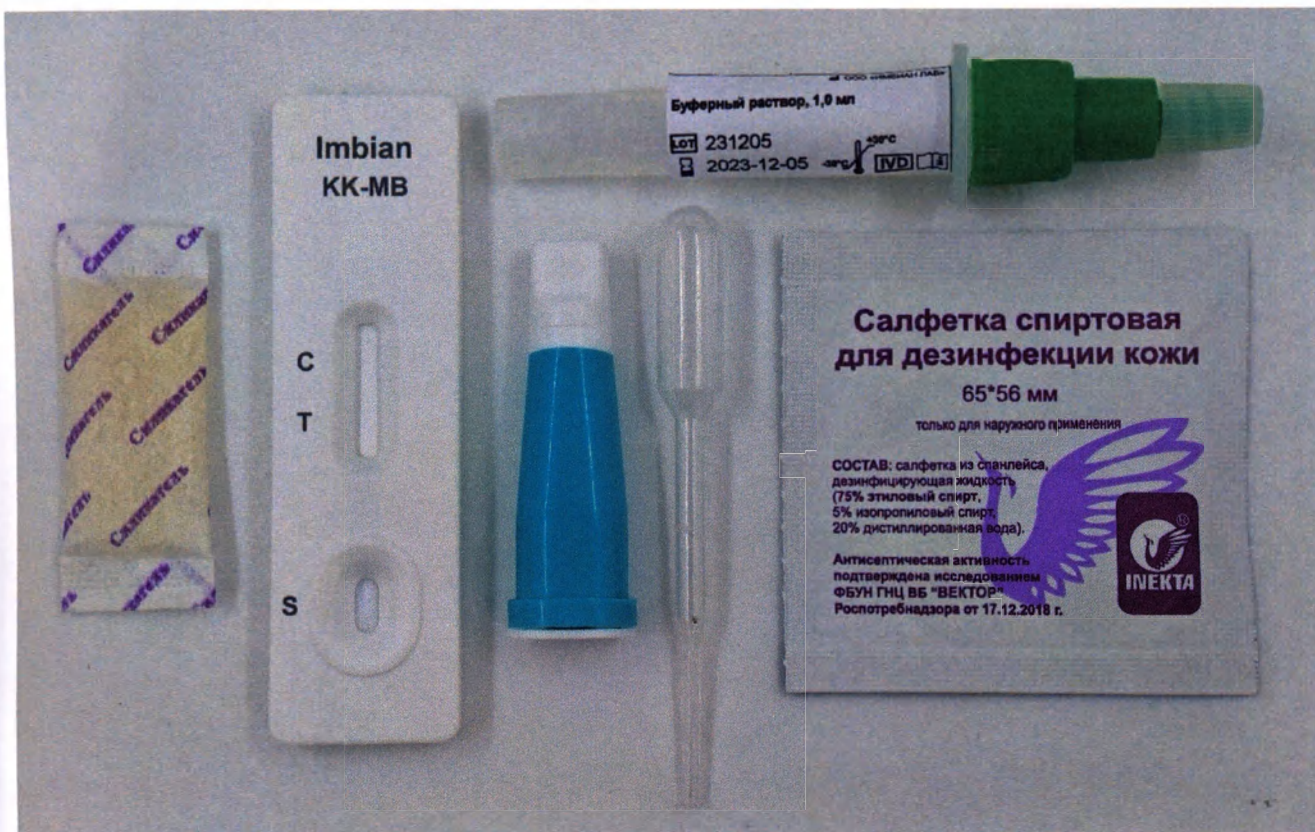

**КК-МВ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 1


Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме
и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

РУ № РЗН 2023/19349


- Тест-кассета 1 шт.
- Буферный раствор, 1,0 мл 1 шт.
- Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет 1 шт.
- (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Injekt: 1 шт.
- варианты исполнения: 2. 65х56 (РУ № РЗН 2013/822)
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед по 1 шт.
- ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пилетки для переноса 1 шт.
- жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8612)
- Инструкция по применению 1 шт.

LOT 231205
REF 2023-12-05
2026-12-05
GR-006/1.1

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Колырково, р.п. Колырково, ул. Седова, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru

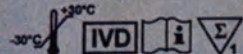

Комплект № 2

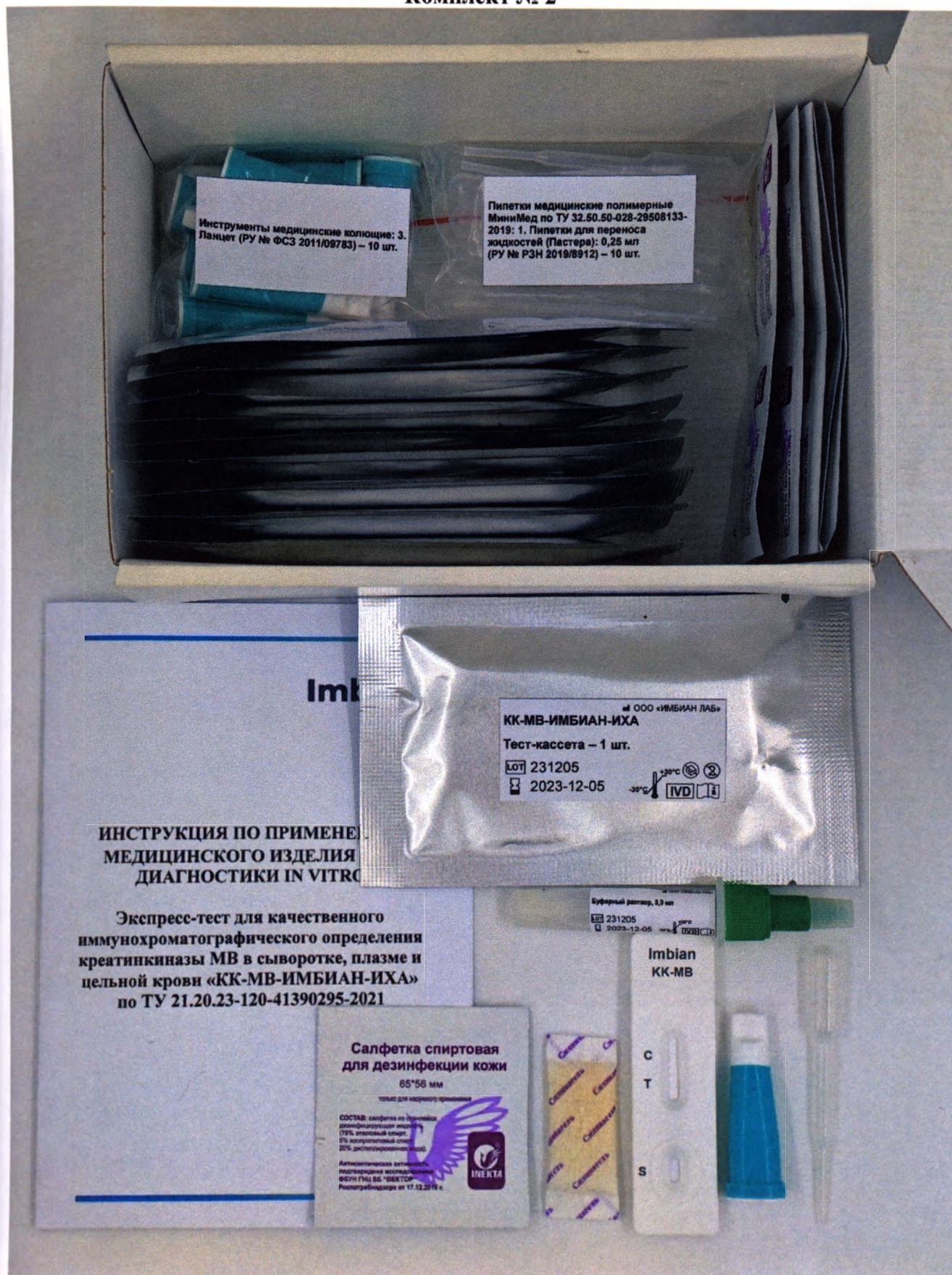

КК-МВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие:
- 3. Ланцет (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая
- Inekta: варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

10 шт.

1 фл.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

1 шт.



231205



2023-12-05



2026-12-05




GR-006/10.2

Imbian







4 620102 808401

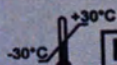


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Комплект № 3

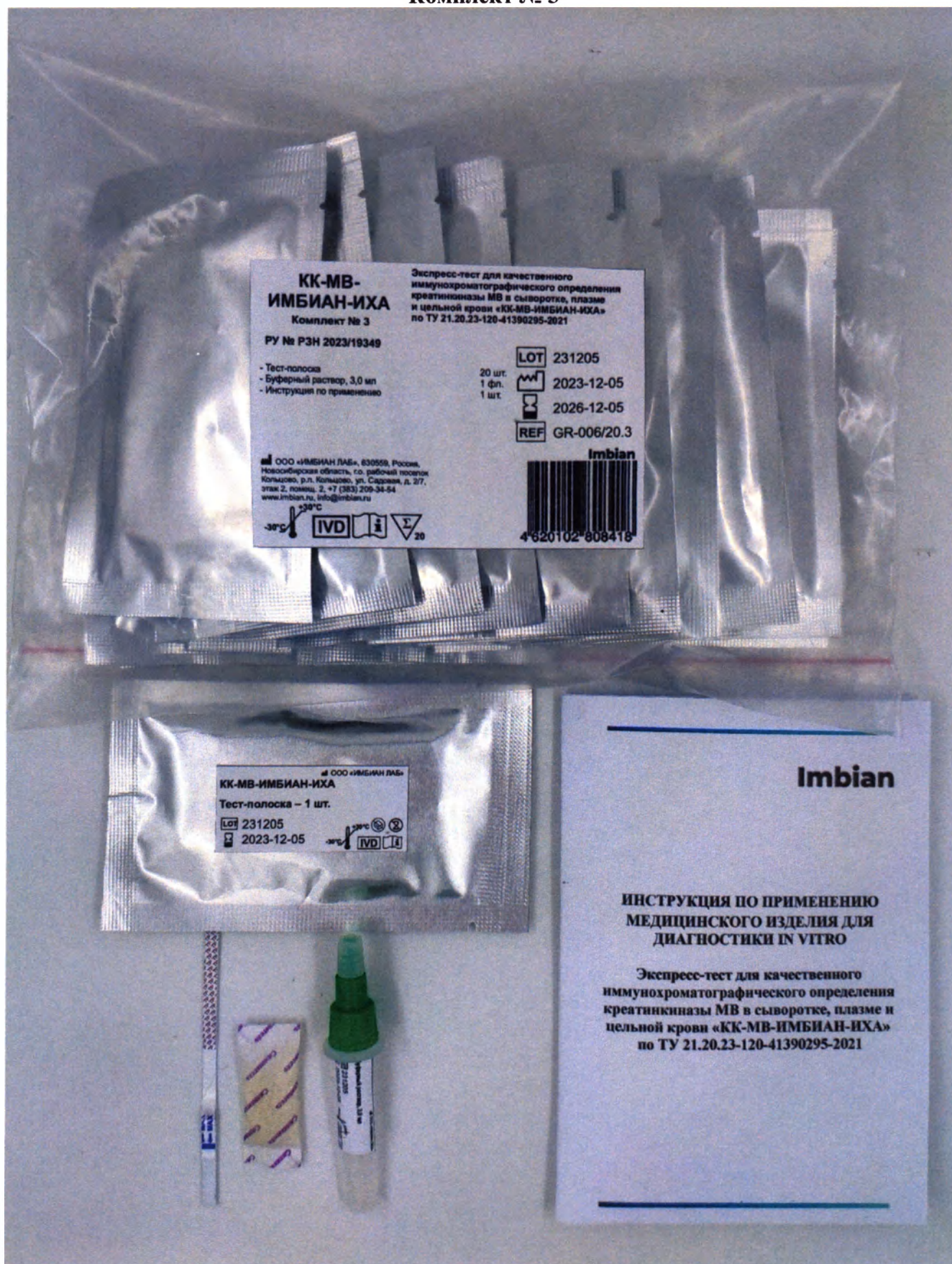

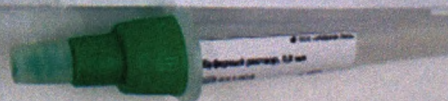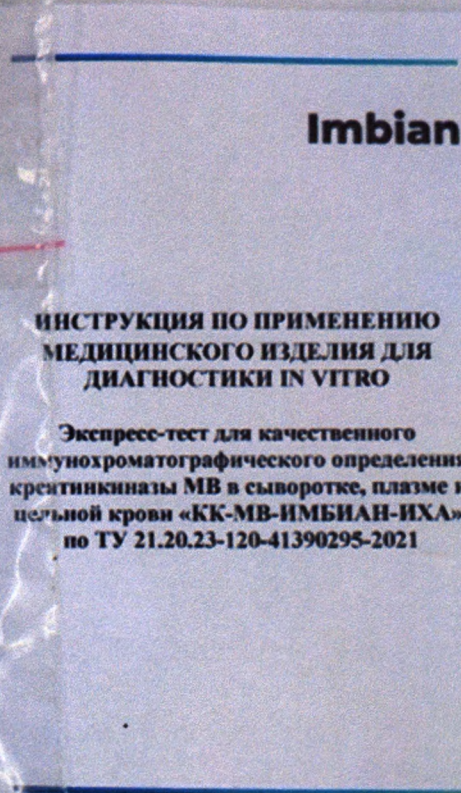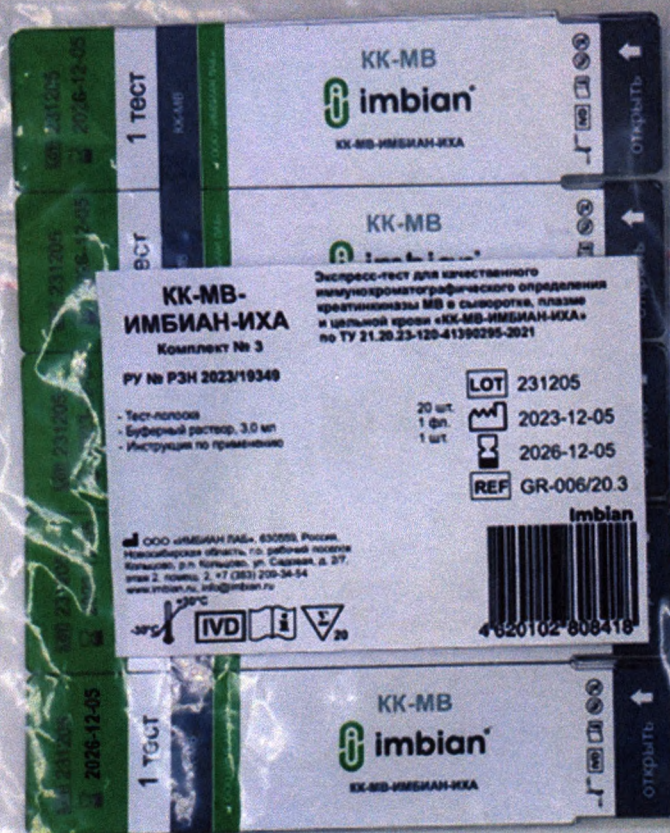

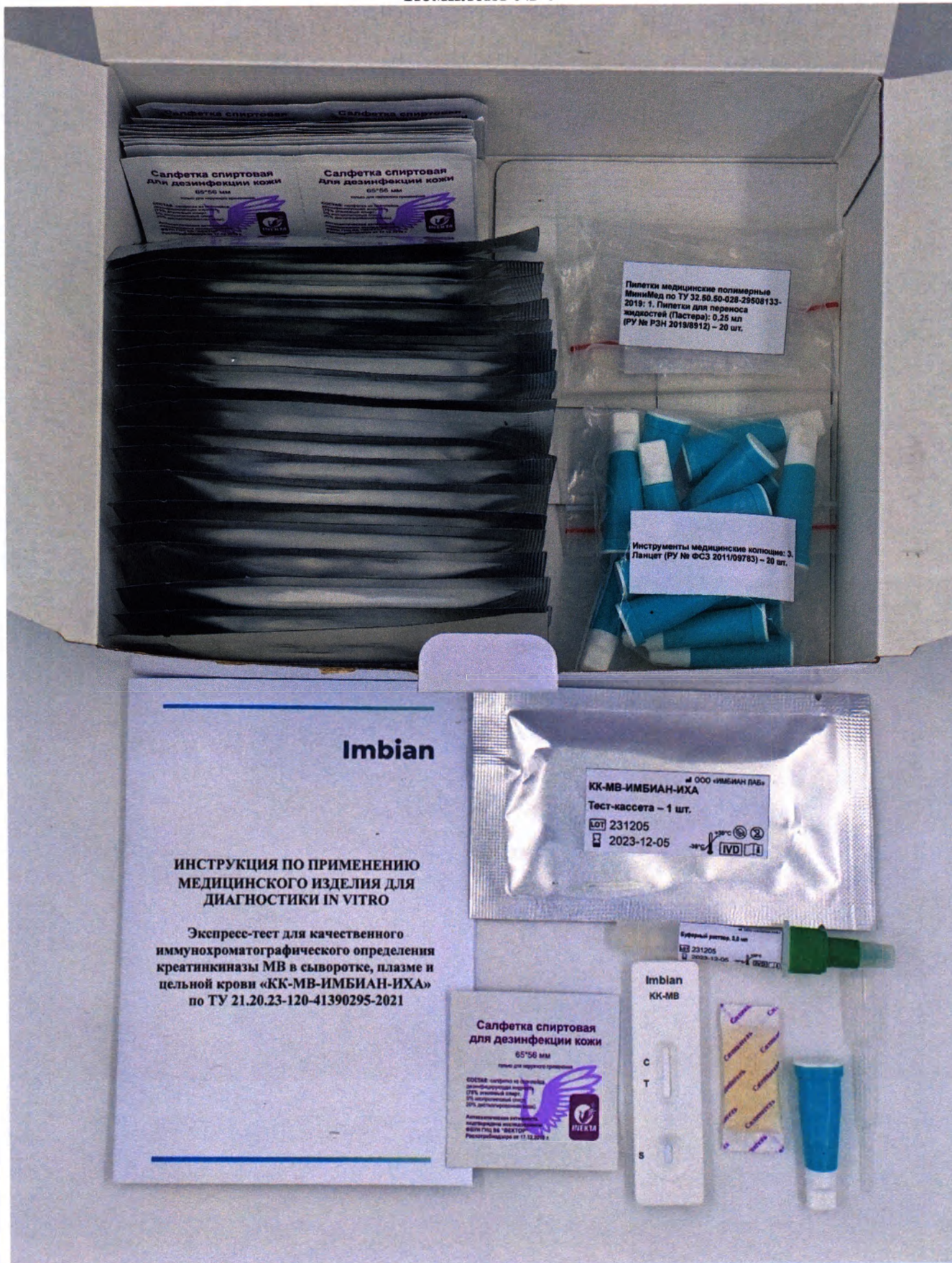

КК-МВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие:
- 3. Ланцет (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая
- Inekta: варианты исполнения: 2. 65x56
- (РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
- ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1. Пипетки для
- переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл
- (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме
и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

20 шт.

1 фл.

20 шт.

20 шт.

20 шт.

1 шт.



231205



2023-12-05



2026-12-05




GR-006/20.4

Imbian



4 620102 808425

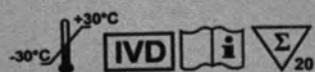

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Комплект № 5

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 5

РУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

25 шт.
1 фп.
1 шт.

LOT 231205

2023-12-05

2026-12-05

REF GR-006/25.5

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

-30°C

IVD

25

Imbian

4 620102 808432

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

КК-МВ-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска – 1 шт.

LOT 231205

2023-12-05

-30°C


IVD




Imbian


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

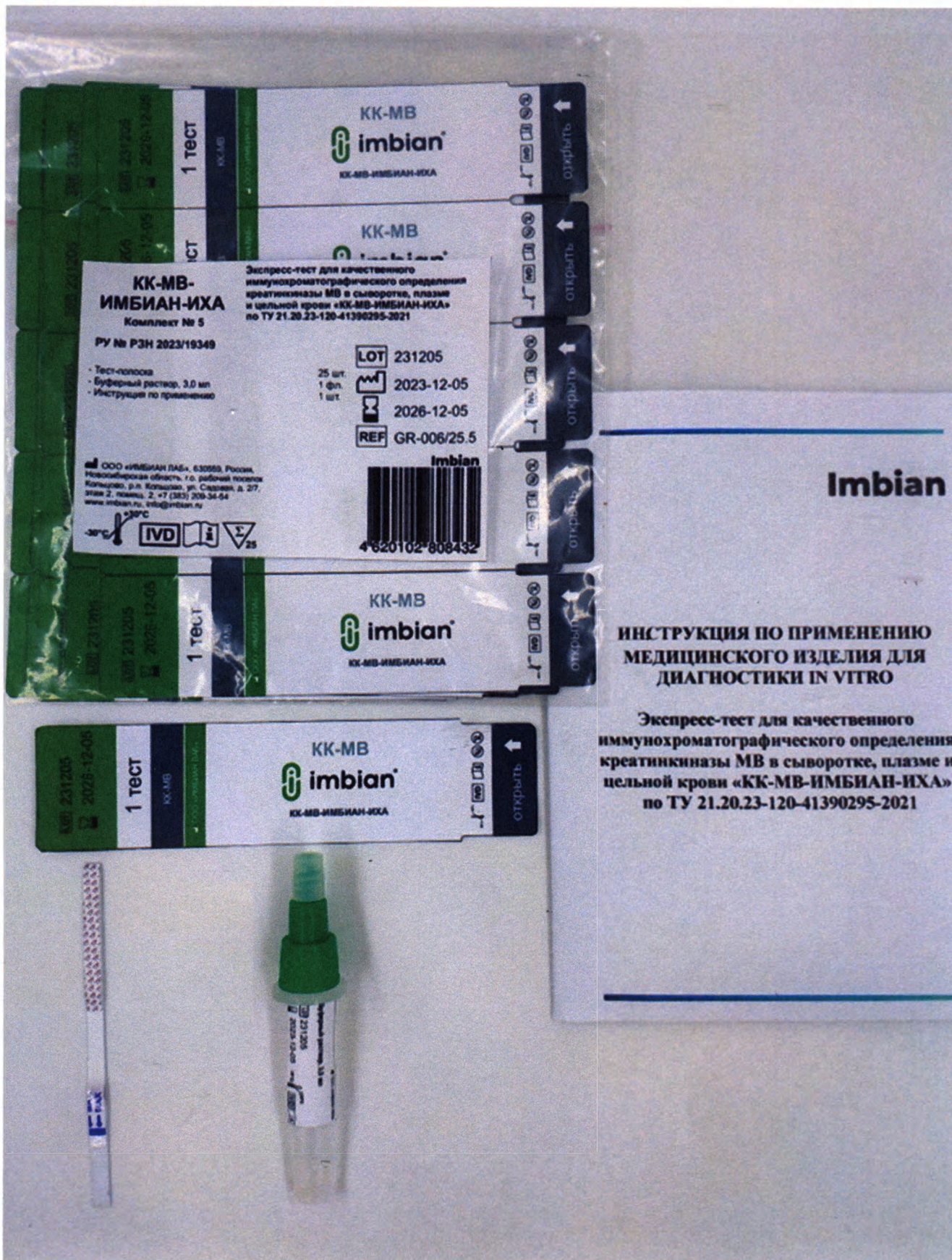

Комплект № 6

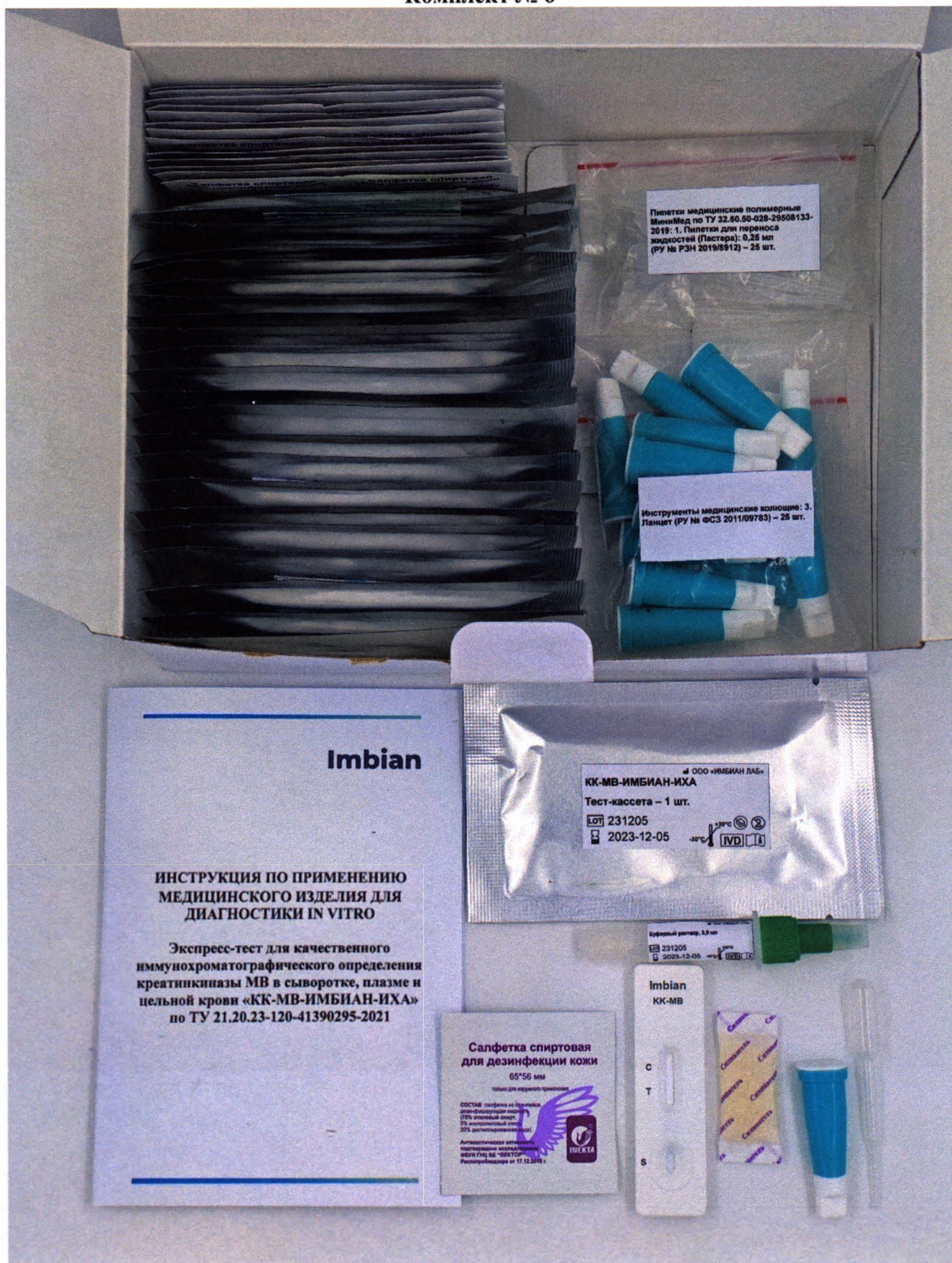

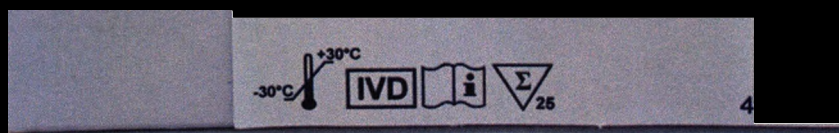

Imbian

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме и
цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
КК-МВ-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска - 50 шт.
LOT 231205
2023-12-05 -30°C IVD


**КК-МВ-
ИМБИАН-ИХА**

Комплект № 7

ПУ № РЗН 2023/19349

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Колызово, р.п. Колызово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

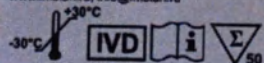

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатинкиназы МВ в сыворотке, плазме
и цельной крови «КК-МВ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-120-41390295-2021

LOT 231205

50 шт.
2 фл.
1 шт.

2023-12-05

2026-12-05

REF GR-006/50.7

Imbian




4 620102 808456


Буферный раствор, 3,0 мл


LOT 231205
2023-12-05 -30°C IVD

Буферный раствор, 3,0 мл

LOT 231205
2023-12-05 -30°C IVD

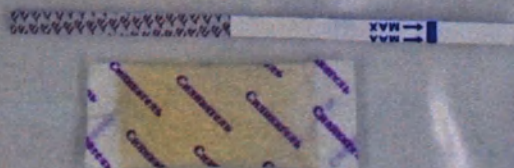

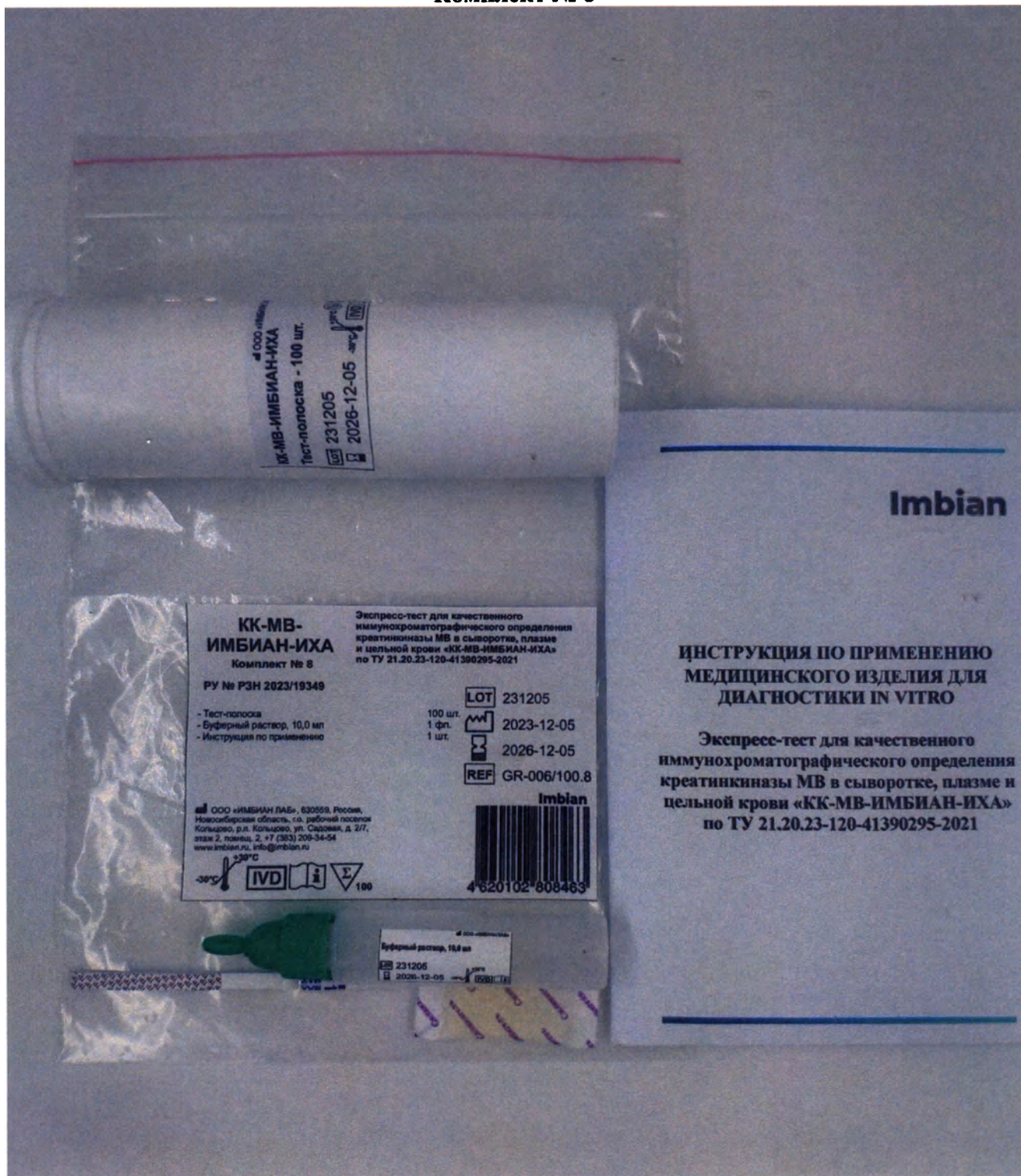

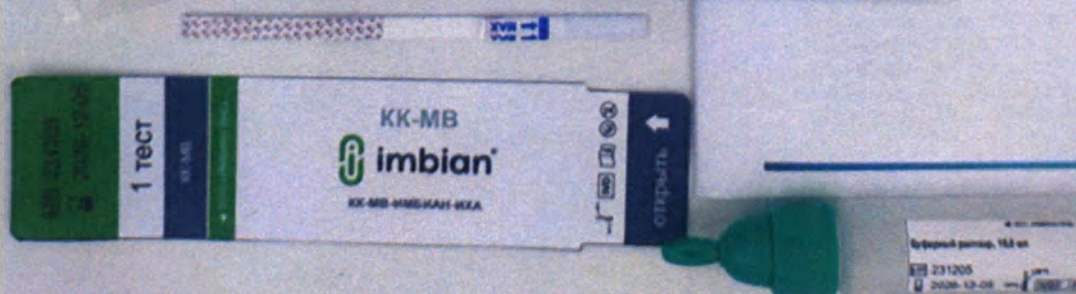

Имбиан

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ОСТИЖКИ IN VITRO

Тест для качественного
иммунохроматографического определения
креатининазы MB в сыворотке, плазме и
цельной крови «KK-MB-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 20.23-120-41390295-2021

