


Registered No. 2023-18247

NOTARIAL CERTIFICATE

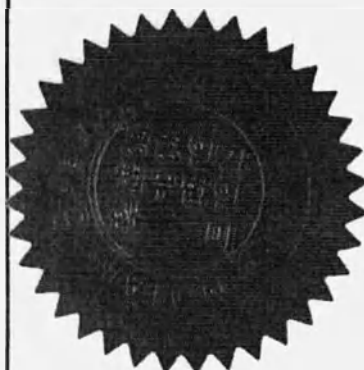


HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

Twintree Tower(B) #101,6 Yulgok-ro,
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea


APPROVED BY

CEO

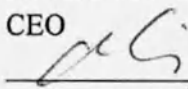 Do-Hyung, Kim

«06» November 2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Абатменты Geo для дентальных имплантатов
GeoMedi Co., Ltd. (ГеоМеди Ко., Лтд.), Корея

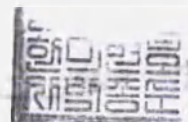

2023

Оглавление

1.	Наименование изделия, информация о производителе, классификация.	3
	Производитель	3
	Место производства	17
2.	Назначение и применение изделия	17
	Назначение	17
	Вид контакта с организмом	17
	Условия применения	17
	Потенциальные потребители медицинского изделия	17
3.	Особые свойства изделия	17
	Принцип действия	17
	Описание изделия	17
4.	Общие показания, противопоказания и побочные эффекты	32
	Показания:	32
	Противопоказания:	32
	Потенциальные осложнения	33
5.	Предупреждения и меры предосторожности	33
	Предупреждения	33
	Меры предосторожности	33
6.	Инструкции по применению	33
7.	Техническая спецификация	34
	Комплект поставки изделия	34
8.	Маркировка и упаковка	60
9.	Соответствие стандартам Российской Федерации	60
10.	Транспортирование, хранение и эксплуатация	61
11.	Сведения о стерильности изделия	61
12.	Сведения об утилизации	62
13.	Гарантии	62

1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация

Наименование медицинского изделия – Абатменты Geo для дентальных имплантатов, в вариантах исполнения:

1. Абатменты мультивинтовые Geo

1.1 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SUM, в составе:

Абатмент G-S15SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.2 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SUM, в составе:

Абатмент G-S25SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.3 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SUM, в составе:

Абатмент G-S35SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.4 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SUM, в составе:

Абатмент G-S45SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.5 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SUM, в составе:

Абатмент G-S55SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.6 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SURO, в составе:

Абатмент G-S15SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.7 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SURO, в составе:

Абатмент G-S25SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.8 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SURO, в составе:

Абатмент G-S35SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.9 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SURO, в составе:
Абатмент G-S45SURO – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.10 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SURO, в составе:
Абатмент G-S55SURO – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.11 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15DER, в составе:
Абатмент G-S15DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.12 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25DER, в составе:
Абатмент G-S25DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.13 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35DER, в составе:
Абатмент G-S35DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.14 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45DER, в составе:
Абатмент G-S45DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.15 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55DER, в составе:
Абатмент G-S55DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.16 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASR, в составе:
Абатмент G-S15ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.17 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASR, в составе:

Абатмент G-S25ASR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.18 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASR, в составе:

Абатмент G-S35ASR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.19 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASR, в составе:

Абатмент G-S45ASR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.20 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASR, в составе:

Абатмент G-S55ASR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.21 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASW, в составе:

Абатмент G-S15ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.22 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASW, в составе:

Абатмент G-S25ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.23 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASW, в составе:

Абатмент G-S35ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.24 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASW, в составе:

Абатмент G-S45ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.25 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASW, в составе:

Абатмент G-S55ASW – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.26 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACN, в составе:
Абатмент G-S15ACN – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.27 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACN, в составе:
Абатмент G-S25ACN – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.28 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACN, в составе:
Абатмент G-S35ACN – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.29 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACN, в составе:
Абатмент G-S45ACN – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.30 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACN, в составе:
Абатмент G-S55ACN – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.31 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACR, в составе:
Абатмент G-S15ACR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.32 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACR, в составе:
Абатмент G-S25ACR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.33 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACR, в составе:
Абатмент G-S35ACR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.34 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACR, в составе:

Абатмент G-S45ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.35 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACR, в составе:

Абатмент G-S55ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.36 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15TSV3, в составе:

Абатмент G-S15TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.37 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25TSV3, в составе:

Абатмент G-S25TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.38 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35TSV3, в составе:

Абатмент G-S35TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.39 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45TSV3, в составе:

Абатмент G-S45TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.40 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55TSV3, в составе:

Абатмент G-S55TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.41 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15TSV4, в составе:

Абатмент G-S15TSV4 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.42 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25TSV4, в составе:

Абатмент G-S25TSV4 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.43 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35TSV4, в составе:

Абатмент G-S35TSV4 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.44 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45TSV4, в составе:

Абатмент G-S45TSV4 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.45 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55TSV4, в составе:

Абатмент G-S55TSV4 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.46 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715SUM, в составе:

Абатмент G-A1715SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.47 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725SUM, в составе:

Абатмент G-A1725SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.48 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735SUM, в составе:

Абатмент G-A1735SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.49 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015SUM, в составе:

Абатмент G-A3015SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.50 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025SUM, в составе:

Абатмент G-A3025SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.51 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035SUM, в составе

Абатмент G-A3035SUM – 1 шт.

Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.52 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715SURO, в составе:

Абатмент G-A1715SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.53 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725SURO, в составе:

Абатмент G-A1725SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.54 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735SURO, в составе:

Абатмент G-A1735SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.55 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015SURO, в составе:

Абатмент G-A3015SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.56 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025SURO, в составе:

Абатмент G-A3025SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.57 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035SURO, в составе:

Абатмент G-A3035SURO – 1 шт.

Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.58 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715DER, в составе:

Абатмент G-A1715DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.59 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725DER, в составе:

Абатмент G-A1725DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.60 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735DER, в составе:

Абатмент G-A1735DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.61 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015DER, в составе:

Абатмент G-A3015DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.62 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025DER, в составе:

Абатмент G-A3025DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.63 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035DER, в составе:

Абатмент G-A3035DER – 1 шт.

Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.64 Абатмент мультивинтовой Гео G-A1715ASR, в составе:

Абатмент G-A1715ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.65 Абатмент мультивинтовой Гео G-A1725ASR, в составе:

Абатмент G-A1725ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.66 Абатмент мультивинтовой Гео G-A1735ASR, в составе:

Абатмент G-A1735ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.67 Абатмент мультивинтовой Гео G-A3015ASR, в составе:

Абатмент G-A3015ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.68 Абатмент мультивинтовой Гео G-A3025ASR, в составе:

Абатмент G-A3025ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.69 Абатмент мультивинтовой Гео G-A3035ASR, в составе:

Абатмент G-A3035ASR – 1 шт.

Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.70 Абатмент мультивинтовой Гео G-A1715ASW, в составе:

Абатмент G-A1715ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.71 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ASW, в составе:

Абатмент G-A1725ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.72 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ASW, в составе:

Абатмент G-A1735ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.73 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ASW, в составе:

Абатмент G-A3015ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.74 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ASW, в составе:

Абатмент G-A3025ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.75 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ASW, в составе:

Абатмент G-A3035ASW – 1 шт.

Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.76 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ACN, в составе:

Абатмент G-A1715ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.77 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ACN, в составе:

Абатмент G-A1725ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.78 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ACN, в составе:

Абатмент G-A1735ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.79 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ACN, в составе:

Абатмент G-A3015ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.80 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ACN, в составе:

Абатмент G-A3025ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.81 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ACN, в составе:

Абатмент G-A3035ACN – 1 шт.

Винт G-AACNC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.82 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ACR, в составе:

Абатмент G-A1715ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.83 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ACR, в составе:

Абатмент G-A1725ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.84 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ACR, в составе:

Абатмент G-A1735ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.85 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ACR, в составе:

Абатмент G-A3015ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.86 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ACR, в составе:

Абатмент G-A3025ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.87 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ACR, в составе:

Абатмент G-A3035ACR – 1 шт.

Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.88 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715TSV3, в составе:

Абатмент G-A1715TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.89 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725TSV3, в составе:

Абатмент G-A1725TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.90 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735TSV3, в составе:

Абатмент G-A1735TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.91 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015TSV3, в составе:

Абатмент G-A3015TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.92 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025TSV3, в составе:

Абатмент G-A3025TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.93 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035TSV3, в составе:

Абатмент G-A3035TSV3 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.94 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715TSV4, в составе:

Абатмент G-A1715TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.95 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725TSV4, в составе:

Абатмент G-A1725TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.96 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735TSV4, в составе:

Абатмент G-A1735TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.97 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015TSV4, в составе:

Абатмент G-A3015TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.98 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025TSV4, в составе:

Абатмент G-A3025TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.99 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035TSV4, в составе:

Абатмент G-A3035TSV4 – 1 шт.

Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.100 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840O, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.

Винт MUTOC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.101 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840D, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.

Винт MUTDC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.102 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840N, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.

Винт MUTNC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.103 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860O, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.

Винт MUTOC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.104 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860D, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.

Винт MUTDC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.105 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860N, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.

Винт MUTNC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2. Абатменты Geo CCM

2.1 Абатмент Geo CCM G48O, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.

Винт MUTOC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2.2 Абатмент Geo CCM G48D, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.

Винт MUTDC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

2.3 Абатмент Geo CCM G48N, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.

Винт MUTNC – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Далее по тексту – Абатмент мультивинтовой Geo, Абатмент Geo CCM, абатмент

Производитель

GeoMedi Co., Ltd. (ГеоМеди Ко., Лтд.), Корея

#702, 703, 704, 705, 709 – 1, 810-2, 811, B112, Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Место производства

GeoMedi Co., Ltd. (ГеоМеди Ко., Лтд.), Корея

#B112, 702, 703, 704, 705, 709-1, 810-2, 811 Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

2. Назначение и применение изделия

Назначение

Изделие предназначено для использования во время хирургического размещения дентального имплантата в альвеолярной и/или базальной кости нижней или верхней челюсти для обеспечения поддержки и ретенции зубного протеза (например, моста, одного зуба, покрывного протеза).

Вид контакта с организмом

абатменты - Постоянный контакт со слизистой оболочкой полости рта (более 30 дней)

Условия применения

К эксплуатации данного изделия допускается только опытный стоматолог.

Потенциальные потребители медицинского изделия

Пациенты, потерявшие зуб или зубы

3. Особые свойства изделия

Принцип действия

Изделия стерилизуются влажным теплом. Абатменты мультивинтовые Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) устанавливаются на имплантат и крепятся винтом. Абатмент мультивинтовой Geo (от LB2-G4840O до LB2-G4860N) и Абатмент Geo CCM используется крепятся на абатмент мультивинтовой Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) при помощи винта.

Описание изделия

Абатмент – это промежуточное звено между зубным имплантатом и коронкой зуба. Он представляет собой надкостный элемент имплантата, на котором фиксируется конструкция, замещающая утраченные зубы – это может быть единичная коронка, зубной мостовидный протез или съемный протез.

Таблица 1 – Абатмент мультивинтовой Geo

№	Вариант исполнения	Фото
1	G-S15SUM	
2	G-S25SUM	
3	G-S35SUM	
4	G-S45SUM	
5	G-S55SUM	
6	G-S15SURO	
7	G-S25SURO	
8	G-S35SURO	
9	G-S45SURO	
10	G-S55SURO	
11	G-S15DER	
12	G-S25DER	
13	G-S35DER	
14	G-S45DER	
15	G-S55DER	
16	G-S15ASR	
17	G-S25ASR	
18	G-S35ASR	
19	G-S45ASR	
20	G-S55ASR	
21	G-S15ASW	
22	G-S25ASW	
23	G-S35ASW	
24	G-S45ASW	
25	G-S55ASW	
26	G-S15ACN	
27	G-S25ACN	
28	G-S35ACN	
29	G-S45ACN	
30	G-S55ACN	
31	G-S15ACR	

32	G-S25ACR	
33	G-S35ACR	
34	G-S45ACR	
35	G-S55ACR	
36	G-S15TSV3	
37	G-S25TSV3	
38	G-S35TSV3	
39	G-S45TSV3	
40	G-S55TSV3	
41	G-S15TSV4	
42	G-S25TSV4	
43	G-S35TSV4	
44	G-S45TSV4	
45	G-S55TSV4	

№	Вариант исполнения	Фото
46	G-A1715SUM	
47	G-A1725SUM	
48	G-A1735SUM	
49	G-A3015SUM	
50	G-A3025SUM	
51	G-A3035SUM	
52	G-A1715SURO	
53	G-A1725SURO	
54	G-A1735SURO	
55	G-A3015SURO	
56	G-A3025SURO	
57	G-A3035SURO	
58	G-A1715DER	
59	G-A1725DER	
60	G-A1735DER	
61	G-A3015DER	
62	G-A3025DER	
63	G-A3035DER	
64	G- A1715ASR	
65	G- A1725ASR	
66	G- A1735ASR	
67	G- A3015ASR	
68	G- A3025ASR	
69	G- A3035ASR	
70	G- A1715ASW	
71	G- A1725ASW	
72	G- A1735ASW	

73	G- A3015ASW	
74	G- A3025ASW	
75	G- A3035ASW	
76	G-A1715ACN	
77	G-A1725ACN	
78	G-A1735ACN	
79	G-A3015ACN	
80	G-A3025ACN	
81	G-A3035ACN	
82	G-A1715ACR	
83	G-A1725ACR	
84	G-A1735ACR	
85	G-A3015ACR	
86	G-A3025ACR	
87	G-A3035ACR	
88	G-A1715TSV3	
89	G-A1725TSV3	
90	G-A1735TSV3	
91	G-A3015TSV3	
92	G-A3025TSV3	
93	G-A3035TSV3	
94	G-A1715TSV4	
95	G-A1725TSV4	
96	G-A1735TSV4	
97	G-A3015TSV4	
98	G-A3025TSV4	
99	G-A3035TSV4	

В таблице 3 представлен винт.

Таблица 3 – винт.

№	Вариант исполнения	Фото
1	G-ASUMC	
2	G-ASUROC	

3	G-ADERC	
4	G-AASRC	
5	G-AASWC	
6	G-AACNC	
7	G-AACRC	
8	G-ATSVC	

В таблице 4 представлен держатель абатмента.

Таблица 4 – держатель абатмента.

№	Вариант исполнения	Фото
1	G-SGOM	
2	G-SGOR	
3	G-SGD	

4	G-AG	
5	G-SGAR	
6	G-SGAW	

В таблице 5 представлен Абатмент мультвинтовой Geo.

Таблица 5 – Абатмент мультвинтовой Geo.

№	Вариант исполнения	Фото
1	LB2-G4840	
2	LB2-G4860	

В таблице 6 представлен винт цилиндрический.

Таблица 6 – винт цилиндрический.

№	Вариант исполнения	Фото
1	MUTOC	
2	MUTDC	
3	MUTNC	

В таблице 7 представлен абатмент Geo CCM.

Таблица 7 – Абатмент Geo CCM.

Вариант исполнения	Фото
MUTB-N	

Совместимость с дентальными имплантатами

Абатмент мультивинтовой Geo

G-S15SUM	Имплантат стоматологический TS (ПУ от 05.09.2018 № РЗН 2018/7577)	3.0/3.5 мм
G-S25SUM		3.0/3.5 мм
G-S35SUM		3.0/3.5 мм
G-S45SUM		3.0/3.5 мм
G-S55SUM		3.0/3.5 мм
G-S15SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-S25SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-S35SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-S45SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-S55SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-S15DER	Имплантат «Суперлайн» (ПУ от 28.06.2012 № ФСЗ 2012/12280)	3.7/4.0/4.5 мм
G-S25DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-S35DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-S45DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-S55DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-S15ASR	Имплантаты дентальные ASTRA TECH Implant System (ПУ от 12.03.2018 № РЗН 2015/3214)	3.5/4.0 мм
G-S25ASR		3.5/4.0 мм
G-S35ASR		3.5/4.0 мм
G-S45ASR		3.5/4.0 мм
G-S55ASR		3.5/4.0 мм
G-S15ASW		4.5/5.0 мм
G-S25ASW		4.5/5.0 мм
G-S35ASW		4.5/5.0 мм
G-S45ASW		4.5/5.0 мм
G-S55ASW		4.5/5.0 мм
G-S15ACN	NobelActive implant (ПУ от 01.11.2016 № РЗН 2013/260)	3.5 мм
G-S25ACN		3.5 мм
G-S35ACN		3.5 мм
G-S45ACN		3.5 мм
G-S55ACN		3.5 мм
G-S15ACR		4.3/5.0 мм
G-S25ACR		4.3/5.0 мм
G-S35ACR		4.3/5.0 мм
G-S45ACR		4.3/5.0 мм
G-S55ACR		4.3/5.0 мм

G-S15TSV3	Имплантаты стоматологические (ПУ от 05.02.2009 № ФСЗ 2009/03653)	3.5 мм
G-S25TSV3		3.5 мм
G-S35TSV3		3.5 мм
G-S45TSV3		3.5 мм
G-S55TSV3		3.5 мм
G-S15TSV4		4.5 мм
G-S25TSV4		4.5 мм
G-S35TSV4		4.5 мм
G-S45TSV4		4.5 мм
G-S55TSV4		4.5 мм

G-A1715SUM	Имплантат стоматологический TS (ПУ от 05.09.2018 № РЗН 2018/7577)	3.0/3.5 мм
G-A1725SUM		3.0/3.5 мм
G-A1735SUM		3.0/3.5 мм
G-A3015SUM		3.0/3.5 мм
G-A3025SUM		3.0/3.5 мм
G-A3035SUM		3.0/3.5 мм
G-A1715SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-A1725SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-A1735SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-A3015SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-A3025SURO	Имплантат «Суперлайн» (ПУ от 28.06.2012 № ФСЗ 2012/12280)	4.0/4.5/5.0 мм
G-A3035SURO		4.0/4.5/5.0 мм
G-A1715DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-A1725DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-A1735DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-A3015DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-A3025DER	Имплантаты дентальные ASTRA TECH Implant System (ПУ от 12.03.2018 № РЗН 2015/3214)	3.7/4.0/4.5 мм
G-A3035DER		3.7/4.0/4.5 мм
G-A1715ASR		3.5/4.0 мм
G-A1725ASR		3.5/4.0 мм
G-A1735ASR		3.5/4.0 мм
G-A3015ASR		3.5/4.0 мм
G-A3025ASR		3.5/4.0 мм
G-A3035ASR		3.5/4.0 мм
G-A1715ASW		4.5/5.0 мм

G-A1725ASW		4.5/5.0 мм
G-A1735ASW		4.5/5.0 мм
G-A3015ASW		4.5/5.0 мм
G-A3025ASW		4.5/5.0 мм
G-A3035ASW		4.5/5.0 мм
G-A1715ACN	NobelActive implant (ПУ от 01.11.2016 № РЗН 2013/260) Имплантаты стоматологические (ПУ от 05.02.2009 № ФСЗ 2009/03653)	3.5 мм
G-A1725ACN		3.5 мм
G-A1735ACN		3.5 мм
G-A3015ACN		3.5 мм
G-A3025ACN		3.5 мм
G-A3035ACN		3.5 мм
G-A1715ACR		4.3/5.0 мм
G-A1725ACR		4.3/5.0 мм
G-A1735ACR		4.3/5.0 мм
G-A3015ACR		4.3/5.0 мм
G-A3025ACR		4.3/5.0 мм
G-A3035ACR		4.3/5.0 мм
G-A1715TSV3	Имплантаты стоматологические (ПУ от 05.02.2009 № ФСЗ 2009/03653)	3.5 мм
G-A1725TSV3		3.5 мм
G-A1735TSV3		3.5 мм
G-A3015TSV3		3.5 мм
G-A3025TSV3		3.5 мм
G-A3035TSV3		3.5 мм
G-A1715TSV4		4.5 мм
G-A1725TSV4		4.5 мм
G-A1735TSV4		4.5 мм
G-A3015TSV4		4.5 мм
G-A3025TSV4		4.5 мм
G-A3035TSV4		4.5 мм

Совместимость моделей между собой

Абатменты мультвинтовые Geo, Абатмент Geo CCM	
G-S15SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S25SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O

G-S35SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S45SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S55SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A1715SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A1725SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A1735SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3015SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3025SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3035SUM	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S15SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S25SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S35SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S45SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S55SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A1715SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A1725SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O

G-A1735SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3015SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3025SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-A3035SURO	LB2-G4840O LB2-G4860O G48O
G-S15DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S25DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S35DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S45DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S55DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1715DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1725DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1735DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3015DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3025DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3035DER	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S15ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D

G-S25ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S35ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S45ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S55ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1715ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1725ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1735ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3015ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3025ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3035ASR	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S15ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S25ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S35ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S45ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S55ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1715ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D

G-A1725ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1735ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3015ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3025ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3035ASW	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S15TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S25TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S35TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S45TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S55TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1715TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1725TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1735TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3015TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3025TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3035TSV3	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D

G-S15TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S25TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S35TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S45TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S55TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1715TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1725TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A1735TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3015TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3025TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-A3035TSV4	LB2-G4840D LB2-G4860D G48D
G-S15ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S25ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S35ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S45ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S55ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A1715ACN	LB2-G4840N

	LB2-G4860N G48N
G-A1725ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A1735ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3015ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3025ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3035ACN	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S15ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S25ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S35ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S45ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-S55ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A1715ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A1725ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A1735ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3015ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3025ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N
G-A3035ACR	LB2-G4840N LB2-G4860N G48N

Конструкция изделия

Конструкция абатмента представлена на рисунке 3.1



Рисунок 3.1 – Конструкция абатмента

1 – тело абатмента

2 – посадочное место

Конструкция винта представлена на рисунке 3.2

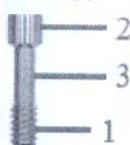


Рисунок 3.2 – Конструкция винта

1 – головка

2 – резьба

3 – цилиндрический стержень

Конструкция винта цилиндрического представлена на рисунке 3.3



Рисунок 3.2 – Конструкция винта цилиндрического

1 – резьба

2 – головка

4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты

Показания:

Изделия предназначены для использования во время хирургического размещения дентального имплантата в альвеолярной и/или базальной кости нижней или верхней челюсти для обеспечения поддержки и ретенции зубного протеза.

Абатменты используются для поддержки и обслуживания частичных или полных зубных протезов. Они крепятся к зубным имплантатам.

Противопоказания:

Противопоказания включают следующее:

1. Больные гемофилией
2. Пациенты, испытывающие трудности, связанные с лечением костей и ран.
3. Пациенты с неконтролируемым диабетом, заболеванием тканей, влияющим на лечение костей или ран, заядлые курильщики или алкоголики.
4. Пациенты, иммунитет которых ослаблен из-за химиотерапии и лучевой терапии.
5. Пациенты с инфекцией или воспалением полости рта (неправильная гигиена полости рта, бруксизм).

6. Пациенты с неизлечимой окклюзией / заболеванием суставов, недостаточным пространством зубной дуги.
7. Пациенты с недостаточной высотой или шириной кости.
8. Пациенты, которым нельзя делать операцию.
9. Пациенты, которым по медицинским показаниям нельзя проводить хирургическую операцию в полости рта.
10. Пациенты, у которых невозможно достичь соответствующих размеров, количества или желаемого положения имплантатов для обеспечения безопасной поддержки функциональных или, в конечном итоге, парафункциональных нагрузок.

Побочные эффекты

Возникновение аллергической реакции на сплав или его содержимое, а также на электрохимические основные реакции.

Расхождение, замедленное заживление, отек, гематома, инфекция, воспаление и общая гиперчувствительность.

5. Предупреждения и меры предосторожности

Предупреждения

1. Из-за множества биологических, механических и физико-химических факторов стоматологические приспособления могут быть менее долговечными, чем ожидалось. Пациенты должны полностью осознавать это.
2. В случае несоответствующей начальной фиксации, потенциальной инфекции, травмы или нагрузки на абатмент, стоматологические приспособления могут ослабнуть.
3. Абатмент может быть поврежден из-за неправильной фиксации.

Меры предосторожности

1. Запрещается использовать изделие для каких-либо целей, кроме его предполагаемого назначения. Перед тем, как поместить изделие в полость рта пациента, стоматолог должен проверить степень остеоинтеграции имплантата с помощью рентгеновских снимков и перкуссии.
2. Данное изделие нестерильное. Убедитесь, что изделие подвергается стерилизации паром пользователем (Стерилизация влажным теплом: температура 121 °C, время: 30 мин, время высыхания: 30 мин. После стерилизации используйте стерильную упаковку).
3. Используйте стандартные хирургические инструменты и не затягивайте их слишком сильно.
4. Предназначено для использования только опытным стоматологом. Это одноразовое изделие.
5. Проверьте упакованное состояние изделия. Не используйте изделие, если есть какие-либо дефекты с упаковкой.

6. Инструкции по применению

Перед применением

1. Перед применением убедитесь, что изделие не имеет дефектов. Используйте стандартные хирургические инструменты и не затягивайте изделия слишком сильно.
2. Изделие должно использоваться только опытным стоматологом. Это одноразовое изделие.
3. Перед использованием стерилизуйте. Стерилизация влажным теплом при температуре 121 °C, 30 минут. Время высыхания – 30 минут.

4. Стоматолог должен определить степень остеоинтеграции имплантата с помощью рентгенографии и перкуссии. Если степень остеоинтеграции считается подходящей, использовать абатмент.
5. Стоматолог должен знать, как использовать данное изделие, клинические показания и меры предосторожности при использовании.
6. Стоматолог должен изучить состояние полости рта пациента и проверить, есть ли какие-либо биологические и стоматологические факторы, которые могут помешать хирургической операции.

Применение

1. Установите соответствующий абатмент мультвинтовой Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) и используйте держатель для облегчения установки. Рекомендуется проверить окончательную посадку абатмента с помощью рентгенографии.
2. Затяните абатмент с помощью динамометрического ключа.
3. Абатмент мультвинтовой Geo (от LB2-G4840O до LB2-G4860N) и Абатмент Geo CCM используется для поддержки протеза после установки зубного имплантата и абатмента мультвинтового Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4). Крепятся на абатмент мультвинтовой Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) при помощи винта. Абатмент Geo CCM устанавливается на абатмент мультвинтовой Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) с использованием держателя.

7. Техническая спецификация

Материалы изготовления изделия

Материалы, применяемые в изделии, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.-Материалы, применяемые в изделии

Наименование изделия			Материал		Содержание
Абатмент мультвинтовой Geo	Абатмент мультвинтовой Geo	См. Список 1	Ti-6Al-4V ELI		100 %
		См. Список 2	Абатмент	Ti-6Al-4V ELI	
			Покрытие абатмента TiN	Титан Gr.2	
				Газообразный азот	
	Винт абатмента мультвинтового Geo		Ti-6Al-4V ELI		100 %
	Держатель абатмента мультвинтового Geo		Полипропилен		
Нержавеющая сталь					
Абатмент Geo CCM		Абатмент Geo CCM		100 %	
		Винт абатмента Geo CCM			Ti-6Al-4V ELI
		Кобальт-хром-молибденовый сплав			

Список 1:

1. Абатменты мультивинтовые Geo
- 1.1 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SUM
- 1.2 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SUM
- 1.3 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SUM
- 1.4 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SUM
- 1.5 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SUM
- 1.6 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SURO
- 1.7 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SURO
- 1.8 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SURO
- 1.9 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SURO
- 1.10 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SURO
- 1.11 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15DER
- 1.12 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25DER
- 1.13 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35DER
- 1.14 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45DER
- 1.15 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55DER
- 1.16 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASR
- 1.17 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASR
- 1.18 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASR
- 1.19 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASR
- 1.20 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASR
- 1.21 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASW
- 1.22 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASW
- 1.23 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASW
- 1.24 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASW
- 1.25 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASW
- 1.26 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACN
- 1.27 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACN
- 1.28 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACN
- 1.29 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACN
- 1.30 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACN
- 1.31 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACR
- 1.32 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACR
- 1.33 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACR
- 1.34 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACR
- 1.35 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACR
- 1.36 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15TSV3
- 1.37 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25TSV3
- 1.38 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35TSV3
- 1.39 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45TSV3

- 1.40 Абатмент мультвинтовой Geo G-S55TSV3
- 1.41 Абатмент мультвинтовой Geo G-S15TSV4
- 1.42 Абатмент мультвинтовой Geo G-S25TSV4
- 1.43 Абатмент мультвинтовой Geo G-S35TSV4
- 1.44 Абатмент мультвинтовой Geo G-S45TSV4
- 1.45 Абатмент мультвинтовой Geo G-S55TSV4
- 1.46 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715SUM
- 1.47 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725SUM
- 1.48 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735SUM
- 1.49 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015SUM
- 1.50 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025SUM
- 1.51 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035SUM
- 1.52 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715SURO
- 1.53 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725SURO
- 1.54 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735SURO
- 1.55 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015SURO
- 1.56 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025SURO
- 1.57 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035SURO
- 1.58 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715DER
- 1.59 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725DER
- 1.60 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735DER
- 1.61 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015DER
- 1.62 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025DER
- 1.63 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035DER
- 1.64 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715ASR
- 1.65 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725ASR
- 1.66 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735ASR
- 1.67 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015ASR
- 1.68 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025ASR
- 1.69 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035ASR
- 1.70 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715ASW
- 1.71 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725ASW
- 1.72 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735ASW
- 1.73 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015ASW
- 1.74 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025ASW
- 1.75 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035ASW
- 1.76 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715ACN
- 1.77 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725ACN
- 1.78 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735ACN
- 1.79 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015ACN
- 1.80 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025ACN
- 1.81 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035ACN


- 1.82 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715ACR
- 1.83 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725ACR
- 1.84 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735ACR
- 1.85 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015ACR
- 1.86 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025ACR
- 1.87 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035ACR
- 1.88 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715TSV3
- 1.89 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725TSV3
- 1.90 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735TSV3
- 1.91 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015TSV3
- 1.92 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025TSV3
- 1.93 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035TSV3
- 1.94 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1715TSV4
- 1.95 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1725TSV4
- 1.96 Абатмент мультвинтовой Geo G-A1735TSV4
- 1.97 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3015TSV4
- 1.98 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3025TSV4
- 1.99 Абатмент мультвинтовой Geo G-A3035TSV4

Список 2:


- 1. Абатменты мультвинтовые Geo
- 1.1 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840O
- 1.2 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840D
- 1.3 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4840N
- 1.4 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860O
- 1.5 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860D
- 1.6 Абатмент мультвинтовой Geo LB2-G4860N

Массогабаритные характеристики приведены ниже.


1 Абатмент мультвинтовой

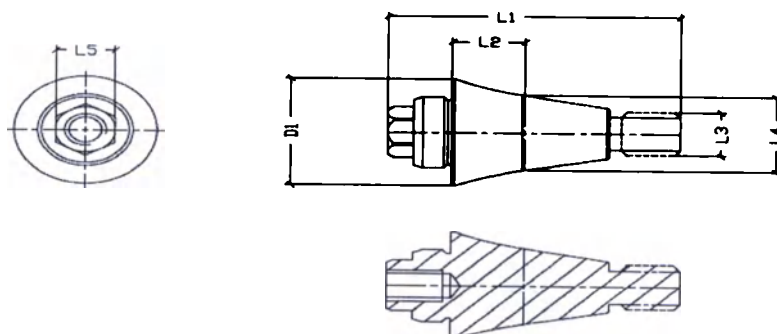

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	L5 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
1	G-S15SUM	4.8	9.01	1.5	1.96	2.8	2	0.194
2	G-S25SUM		10.01	2.5				0.241
3	G-S35SUM		11.01	3.5				0.295
4	G-S45SUM		12.01	4.5				0.351
5	G-S55SUM		13.01	5.5				0.409
6	G-S15SURO		9.01	1.5		3.35		0.236
7	G-S25SURO		10.01	2.5				0.293
8	G-S35SURO		11.01	3.5				0.36
9	G-S45SURO		12.01	4.5				0.416
10	G-S55SURO		13.01	5.5				0.475
11	G-S15DER		9.01	1.5		3.35		0.236
12	G-S25DER		10.01	2.5				0.293
13	G-S35DER		11.01	3.5				0.36
14	G-S45DER		12.01	4.5				0.416
15	G-S55DER		13.01	5.5				0.475

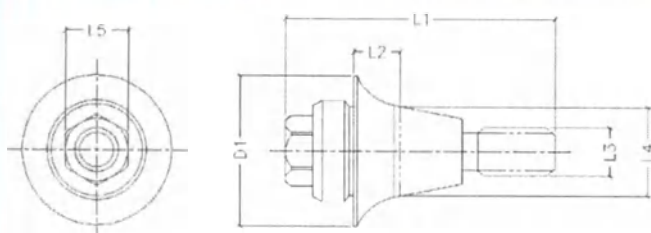


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	L5 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
16	G-S15ASR	4.8	8.7	1.5	1.55	2.93	2.0	0.177
17	G-S25ASR	4.8	9.7	2.5	1.55	2.93	2.0	0.232
18	G-S35ASR	4.8	10.7	3.5	1.55	2.93	2.0	0.287
19	G-S45ASR	4.8	11.7	4.5	1.55	2.93	2.0	0.344
20	G-S55ASR	4.8	12.7	5.5	1.55	2.93	2.0	0.399

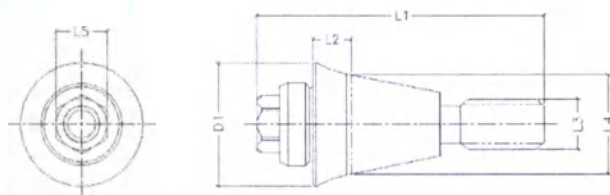


№	Вариант	D1 (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	L4 (мм)	L5 (мм)	Масса (г)
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------


	исполнения	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 5 \%$
21	G-S15ASW	4.8	11.3	1.5	1.96	3.92	2.0	0.306
22	G-S25ASW	4.8	12.3	2.5	1.96	3.92	2.0	0.384
23	G-S35ASW	4.8	13.3	3.5	1.96	3.92	2.0	0.45
24	G-S45ASW	4.8	14.3	4.5	1.96	3.92	2.0	0.516
25	G-S55ASW	4.8	15.3	5.5	1.96	3.92	2.0	0.583

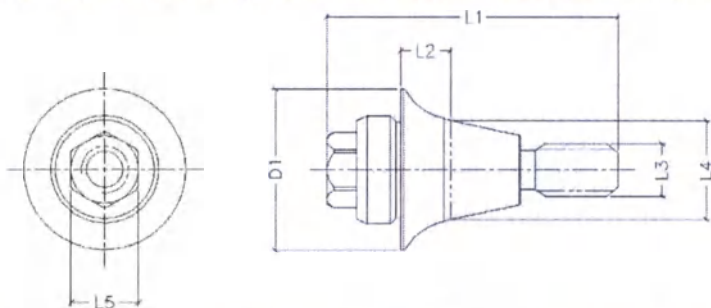


№	Вариант исполнения	D1 (мм) $\pm 1 \%$	L1 (мм) $\pm 1 \%$	L2 (мм) $\pm 1 \%$	L3 (мм) $\pm 1 \%$	L4 (мм) $\pm 1 \%$	L5 (мм) $\pm 1 \%$	Масса (г) $\pm 5 \%$
26	G-S15ACN	4.8	8.74	1.5	1.56	3.04	2.0	0.183
27	G-S25ACN	4.8	9.74	2.5	1.56	3.04	2.0	0.241
28	G-S35ACN	4.8	10.74	3.5	1.56	3.04	2.0	0.298
29	G-S45ACN	4.8	11.74	4.5	1.56	3.04	2.0	0.358
30	G-S55ACN	4.8	12.74	5.5	1.56	3.04	2.0	0.412

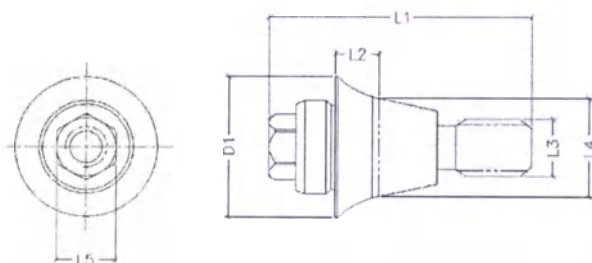


№	Вариант исполнения	D1 (мм) $\pm 1 \%$	L1 (мм) $\pm 1 \%$	L2 (мм) $\pm 1 \%$	L3 (мм) $\pm 1 \%$	L4 (мм) $\pm 1 \%$	L5 (мм) $\pm 1 \%$	Масса (г) $\pm 5 \%$
31	G-S15ACR	4.8	8.91	1.5	1.96	3.44	2.0	0.221
32	G-S25ACR	4.8	9.91	2.5	1.96	3.44	2.0	0.287
33	G-S35ACR	4.8	10.91	3.5	1.96	3.44	2.0	0.351
34	G-S45ACR	4.8	11.91	4.5	1.96	3.44	2.0	0.411
35	G-S55ACR	4.8	12.91	5.5	1.96	3.44	2.0	0.47

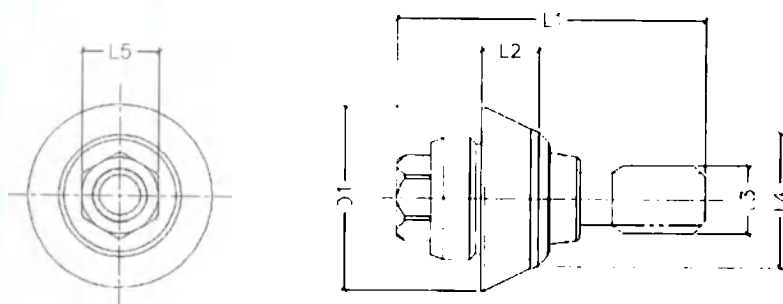


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	L5 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
36	G-S15TSV3	4.8	8.1	1.5	1.8	3.66	2.0	0.192
37	G-S25TSV3	4.8	9.1	2.5	1.8	3.66	2.0	0.259
38	G-S35TSV3	4.8	10.1	3.5	1.8	3.66	2.0	0.322
39	G-S45TSV3	4.8	11.1	4.5	1.8	3.66	2.0	0.385
40	G-S55TSV3	4.8	12.1	5.5	1.8	3.66	2.0	0.447

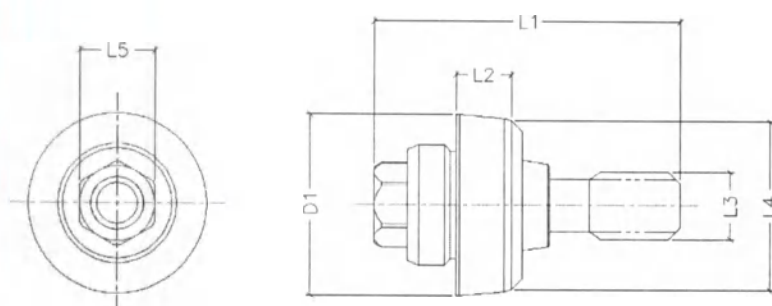

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	L5 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
41	G-S15TSV4	4.8	8.260	1.5	1.8	4.6	2.0	0.223
42	G-S25TSV4	4.8	9.260	2.5	1.8	4.6	2.0	0.305
43	G-S35TSV4	4.8	10.260	3.5	1.8	4.6	2.0	0.382
44	G-S45TSV4	4.8	11.260	4.5	1.8	4.6	2.0	0.458
45	G-S55TSV4	4.8	12.260	5.5	1.8	4.6	2.0	0.535

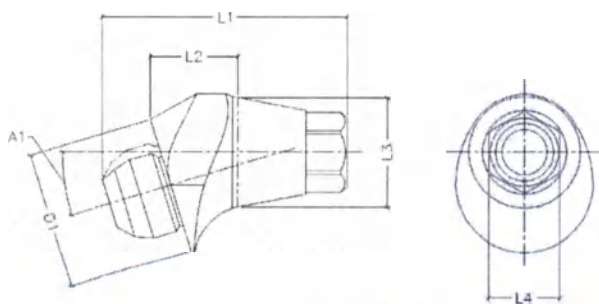


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°)± 1 %	Масса (г) ± 5 %
1	G-A1715SUM	4.8	7.276	3.0	2.8	2.08	17	0.189
2	G-A1725SUM		8.276	4.0				0.227
3	G-A1735SUM		9.276	5.0				0.286
4	G-A3015SUM		7.759	4.0			30	0.217
5	G-A3025SUM		8.759	5.0				0.25
6	G-A3035SUM		9.759	6.0				0.3
7	G-A1715SURO		7.156	3.0	3.35	2.49	17	0.207
8	G-A1725SURO		8.156	4.0				0.251
9	G-A1735SURO		9.156	5.0				0.302
10	G-A3015SURO		7.646	4.0			30	0.234
11	G-A3025SURO		8.646	5.0				0.28
12	G-A3035SURO		9.646	6.0				0.327
13	G-A1715DER		7.346	3.0	3.33	2.5	17	0.207
14	G-A1725DER		8.346	4.0				0.252
15	G-A1735DER		9.346	5.0				0.302
16	G-A3015DER		7.838	4.0			30	0.234
17	G-A3025DER		8.839	5.0				0.281
18	G-A3035DER		9.839	6.0				0.327

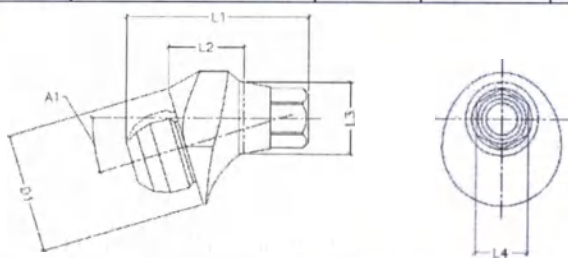


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°)± 1 %	Масса (г) ± 5 %
19	G-A1715ASR	3.2	7.206	3.0	2.93	2.09	17	0.191
20	G-A1725ASR	3.2	8.206	4.0	2.93	2.09	17	0.229


21	G-A1735ASR	3.2	9.206	5.0	2.93	2.09	17	0.274
22	G-A3015ASR	3.2	7.689	4.0	2.93	2.09	30	0.225
23	G-A3025ASR	3.2	8.689	5.0	2.93	2.09	30	0.26
24	G-A3035ASR	3.2	9.689	6.0	2.93	2.09	30	0.191

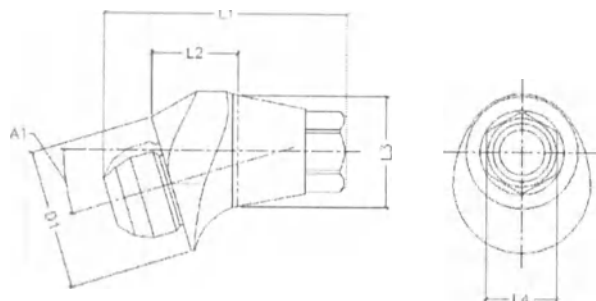


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
25	G-A1715ASW	4.8	8.41	3.0	3.92	2.49	17	0.307
26	G-A1725ASW	4.8	9.41	4.0	3.92	2.49	17	0.256
27	G-A1735ASW	4.8	10.41	5.0	3.92	2.49	17	0.314
28	G-A3015ASW	4.8	8.89	4.0	3.92	2.49	30	0.375
29	G-A3025ASW	4.8	9.89	5.0	3.92	2.49	30	0.293
30	G-A3035ASW	4.8	10.89	6.0	3.92	2.49	30	0.325

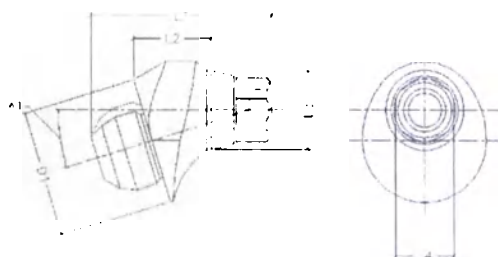


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
31	G-A1715ACN	4.8	6.96	3.0	3.035	2.25	17	0.194
32	G-A1725ACN	4.8	7.96	4.0	3.035	2.25	17	0.231
33	G-A1735ACN	4.8	8.96	5.0	3.035	2.25	17	0.284
34	G-A3015ACN	4.8	7.44	4.0	3.035	2.25	30	0.229
35	G-A3025ACN	4.8	8.44	5.0	3.035	2.25	30	0.268
36	G-A3035ACN	4.8	9.44	6.0	3.035	2.25	30	0.317

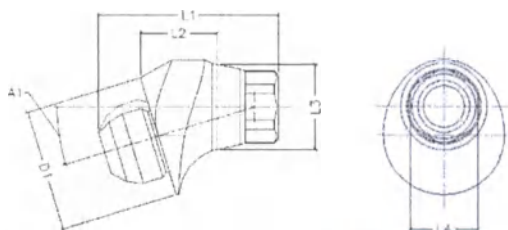

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
37	G-A1715ACR	4.8	7.056	3.0	3.44	2.655	17	0.203
38	G-A1725ACR	4.8	8.056	4.0	3.44	2.655	17	0.253
39	G-A1735ACR	4.8	9.056	5.0	3.44	2.655	17	0.307
40	G-A3015ACR	4.8	7.539	4.0	3.44	2.655	30	0.239
41	G-A3025ACR	4.8	8.539	5.0	3.44	2.655	30	0.289
42	G-A3035ACR	4.8	9.539	6.0	3.44	2.655	30	0.342

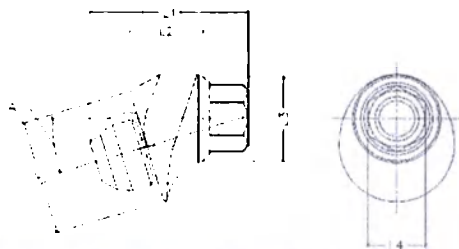


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	A1 (°) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
43	G-A1715TSV3	4.8	6.51	3.0	3.66	2.4	17	0.195
44	G-A1725TSV3	4.8	7.51	4.0	3.66	2.4	17	0.253
45	G-A1735TSV3	4.8	8.51	5.0	3.66	2.4	17	0.313
46	G-A3015TSV3	4.8	7.0	4.0	3.66	2.4	30	0.232
47	G-A3025TSV3	4.8	8.0	5.0	3.66	2.4	30	0.29
48	G-A3035TSV3	4.8	9.0	6.0	3.66	2.4	30	0.341

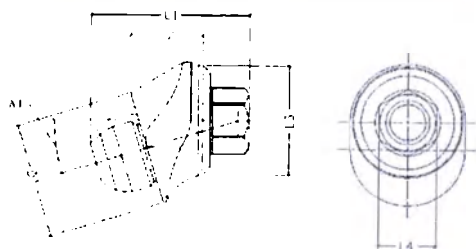

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	L3 (мм) ± 1 %	L4 (мм) ± 1 %	А1 (°) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
49	G-A1715TSV4	4.8	6.556	3.0	4.6	2.4	17	0.241
50	G-A1725TSV4	4.8	7.556	4.0	4.6	2.4	17	0.318
51	G-A1735TSV4	4.8	8.556	5.0	4.6	2.4	17	0.397
52	G-A3015TSV4	4.8	7.039	4.0	4.6	2.4	30	0.281
53	G-A3025TSV4	4.8	8.039	5.0	4.6	2.4	30	0.354
54	G-A3035TSV4	4.8	9.039	6.0	4.6	2.4	30	0.424

2 Винт

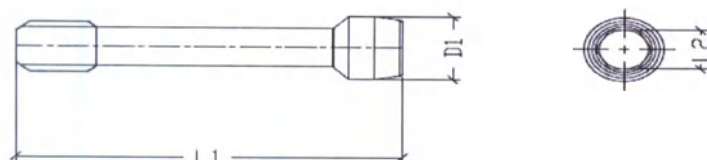


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	L2 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
1	G-ASUMC	1.98	9.58	1.21	0.054
2	G-ASUROC	2.02	7.48	1.2	0.06
3	G-ADERC	2.04	8.08	1.3	0.068
4	G-AASRC	1.98	7.6	1.29	0.046
5	G-AASWC	2.0	9.37	1.29	0.08
6	G-AACNC	1.98	7.62	1.53	0.043
7	G-AACRC	2.0	7.63	1.53	0.067
8	G-ATSVC	2.0	6.91	1.29	0.052


3 Держатель абатмента



№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
1	G-SGOM	4.85	20	0,186
2	G-SGOR			
3	G-SGD			

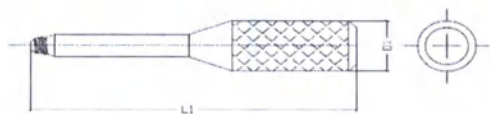


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
4	G-AG	3.8	20.9	0,794

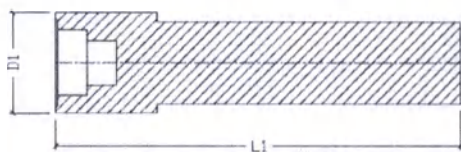


№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
5	G-SGAR	4.85	20.0	0.187
6	G-SGAW	4.85	20.0	0.187

4 Абатмент мультивинтовой

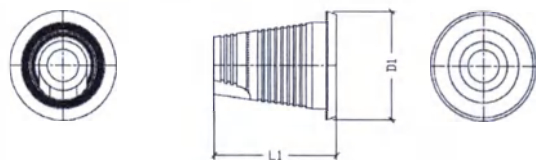

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 2 %	Масса (г) ± 5 %
1	LB2-G4840	5.2	4.5	0,089
2	LB2-G4860	5.1	5.9	0,117

5 Винт

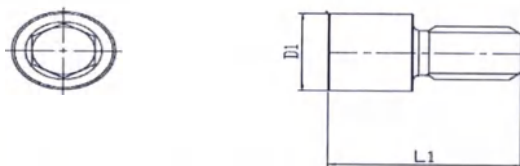

№	Вариант исполнения	D1 (мм) ± 1 %	L1 (мм) ± 1 %	Масса (г) ± 5 %
1	MUTOC	1.97	3.75	0.025
2	MUTDC	1.97	3.8	0.023

3	MUTNC	1.97	3.45	0.021
---	-------	------	------	-------

6 Абатмент Geo CCM



Вариант исполнения	D1 (мм) $\pm 1\%$	L1 (мм) $\pm 1\%$	Масса (г) $\pm 5\%$
MUTB-N	4.899	5.5	0.3

Момент затяжки:

1. Для абатмента мультивинтового Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) составляет $>21 \text{ Н*см}$
2. Для абатмента мультивинтового Geo (от LB2-G4840O до LB2-G4860N) - $>14 \text{ Н*см}$

Комплект поставки изделия

1. Абатменты мультивинтовые Geo

1.1 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SUM, в составе:

Абатмент G-S15SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.2 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SUM, в составе:

Абатмент G-S25SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.3 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SUM, в составе:

Абатмент G-S35SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.4 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SUM, в составе:

Абатмент G-S45SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.5 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SUM, в составе:

Абатмент G-S55SUM – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.6 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15SURO, в составе:

Абатмент G-S15SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.7 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25SURO, в составе:

Абатмент G-S25SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.8 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35SURO, в составе:

Абатмент G-S35SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.9 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45SURO, в составе:

Абатмент G-S45SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.10 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55SURO, в составе:

Абатмент G-S55SURO – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.11 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15DER, в составе:

Абатмент G-S15DER – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.12 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25DER, в составе:

Абатмент G-S25DER – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.13 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35DER, в составе:

Абатмент G-S35DER – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.14 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45DER, в составе:

Абатмент G-S45DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.15 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55DER, в составе:

Абатмент G-S55DER – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGD – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.16 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASR, в составе:

Абатмент G-S15ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.17 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASR, в составе:

Абатмент G-S25ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.18 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASR, в составе:

Абатмент G-S35ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.19 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASR, в составе:

Абатмент G-S45ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.20 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASR, в составе:

Абатмент G-S55ASR – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.21 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ASW, в составе:

Абатмент G-S15ASW – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.22 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ASW, в составе:

Абатмент G-S25ASW – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.23 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ASW, в составе:

Абатмент G-S35ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.24 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ASW, в составе

Абатмент G-S45ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.25 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ASW, в составе:

Абатмент G-S55ASW – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.26 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACN, в составе:

Абатмент G-S15ACN – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.27 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACN, в составе:

Абатмент G-S25ACN – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.28 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACN, в составе:

Абатмент G-S35ACN – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.29 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACN, в составе:

Абатмент G-S45ACN – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.30 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACN, в составе:

Абатмент G-S55ACN – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.31 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15ACR, в составе:

Абатмент G-S15ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.32 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25ACR, в составе:

Абатмент G-S25ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.33 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35ACR, в составе:

Абатмент G-S35ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.34 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45ACR, в составе:

Абатмент G-S45ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.35 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55ACR, в составе:

Абатмент G-S55ACR – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOM – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.36 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15TSV3, в составе:

Абатмент G-S15TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.37 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25TSV3, в составе:

Абатмент G-S25TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.38 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35TSV3, в составе:

Абатмент G-S35TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

1.39 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45TSV3, в составе:

Абатмент G-S45TSV3 – 1 шт.

Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.40 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55TSV3, в составе:

Абатмент G-S55TSV3 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGOR – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.41 Абатмент мультивинтовой Geo G-S15TSV4, в составе:

Абатмент G-S15TSV4 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.42 Абатмент мультивинтовой Geo G-S25TSV4, в составе:

Абатмент G-S25TSV4 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.43 Абатмент мультивинтовой Geo G-S35TSV4, в составе:

Абатмент G-S35TSV4 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.44 Абатмент мультивинтовой Geo G-S45TSV4, в составе:

Абатмент G-S45TSV4 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.45 Абатмент мультивинтовой Geo G-S55TSV4, в составе:

Абатмент G-S55TSV4 – 1 шт.
Держатель абатмента G-SGAW – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.46 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715SUM, в составе:

Абатмент G-A1715SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.47 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725SUM, в составе:

Абатмент G-A1725SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.48 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735SUM, в составе:

Абатмент G-A1735SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.49 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015SUM, в составе:

Абатмент G-A3015SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.50 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025SUM, в составе:

Абатмент G-A3025SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.51 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035SUM, в составе

Абатмент G-A3035SUM – 1 шт.
Винт G-ASUMC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.52 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715SURO, в составе:

Абатмент G-A1715SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.53 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725SURO, в составе:

Абатмент G-A1725SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.54 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735SURO, в составе:

Абатмент G-A1735SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.55 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015SURO, в составе:

Абатмент G-A3015SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.56 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025SURO, в составе:

Абатмент G-A3025SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.57 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035SURO, в составе:

Абатмент G-A3035SURO – 1 шт.
Винт G-ASUROC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.58 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715DER, в составе:

Абатмент G-A1715DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.59 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725DER, в составе:

Абатмент G-A1725DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.60 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735DER, в составе:

Абатмент G-A1735DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.61 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015DER, в составе:

Абатмент G-A3015DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.62 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025DER, в составе:

Абатмент G-A3025DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.63 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035DER, в составе:

Абатмент G-A3035DER – 1 шт.
Винт G-ADERC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.64 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ASR, в составе:

Абатмент G-A1715ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.65 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ASR, в составе:

Абатмент G-A1725ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.66 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ASR, в составе:

Абатмент G-A1735ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.67 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ASR, в составе:

Абатмент G-A3015ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.68 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ASR, в составе:

Абатмент G-A3025ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.69 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ASR, в составе:

Абатмент G-A3035ASR – 1 шт.
Винт G-AASRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.70 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ASW, в составе:

Абатмент G-A1715ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.71 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ASW, в составе:

Абатмент G-A1725ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.72 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ASW, в составе:

Абатмент G-A1735ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.73 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ASW, в составе:

Абатмент G-A3015ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.74 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ASW, в составе:

Абатмент G-A3025ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.75 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ASW, в составе:

Абатмент G-A3035ASW – 1 шт.
Винт G-AASWC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.76 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ACN, в составе:

Абатмент G-A1715ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.77 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ACN, в составе:

Абатмент G-A1725ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.78 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ACN, в составе:

Абатмент G-A1735ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.79 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ACN, в составе:

Абатмент G-A3015ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.80 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ACN, в составе:

Абатмент G-A3025ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.81 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ACN, в составе:

Абатмент G-A3035ACN – 1 шт.
Винт G-AACNC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.82 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715ACR, в составе:

Абатмент G-A1715ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.83 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725ACR, в составе:

Абатмент G-A1725ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.84 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735ACR, в составе:

Абатмент G-A1735ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.85 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015ACR, в составе:

Абатмент G-A3015ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.86 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025ACR, в составе:

Абатмент G-A3025ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.87 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035ACR, в составе:

Абатмент G-A3035ACR – 1 шт.
Винт G-AACRC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.88 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715TSV3, в составе:

Абатмент G-A1715TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.89 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725TSV3, в составе:

Абатмент G-A1725TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.90 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735TSV3, в составе:

Абатмент G-A1735TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.91 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015TSV3, в составе:

Абатмент G-A3015TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.92 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025TSV3, в составе:

Абатмент G-A3025TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.93 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035TSV3, в составе:

Абатмент G-A3035TSV3 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.94 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1715TSV4, в составе:

Абатмент G-A1715TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.95 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1725TSV4, в составе:

Абатмент G-A1725TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.96 Абатмент мультивинтовой Geo G-A1735TSV4, в составе:

Абатмент G-A1735TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.

Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.97 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3015TSV4, в составе:

Абатмент G-A3015TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.98 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3025TSV4, в составе:

Абатмент G-A3025TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.99 Абатмент мультивинтовой Geo G-A3035TSV4, в составе:

Абатмент G-A3035TSV4 – 1 шт.
Винт G-ATSVC – 1 шт.
Держатель абатмента G-AG – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.100 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4840O, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.
Винт MUTOC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.101 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4840D, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.
Винт MUTDC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.102 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4840N, в составе:

Абатмент LB2-G4840 – 1 шт.
Винт MUTNC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.103 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4860O, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.
Винт MUTOC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.104 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4860D, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.
Винт MUTDC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

1.105 Абатмент мультивинтовой Geo LB2-G4860N, в составе:

Абатмент LB2-G4860 – 1 шт.
Винт MUTNC – 1 шт
Инструкция по применению – 1 шт.

2. Абатмент Geo CCM

2.1 Абатмент Geo CCM G48O, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.
Винт MUTOC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

2.2 Абатмент Geo CCM G48D, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.
Винт MUTDC – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

2.3 Абатмент Geo CCM G48N, в составе:

Абатмент цилиндрический CCM MUTB-N – 1 шт.
Винт MUTNC – 1 шт
Инструкция по применению – 1 шт.

8. Маркировка и упаковка

Абатмент мультивинтовой (от LB2-G4840O до LB2-G4860N) и абатмент Geo CCM упаковываются в пластиковый контейнер и закрываются крышкой, все вместе обозначается как первичная упаковка (рисунок 5.1). Затем первичная упаковка вместе с инструкцией по применению упаковывается в потребительская упаковку (полиэтиленовый пакет). Абатменты мультивинтовые Geo (от G-S15SUM до G-A3035TSV4) упаковываются только в потребительскую упаковку.

Маркировка производителя содержит: информацию о производителе, место производства, информацию об уполномоченном производителе, номер серии/партии, срок годности, номер регистрационного удостоверения.

Символы изделия

№	Используемый символ	Описание	№	Используемый символ	Описание
1		Изготовитель	2		Не стерильно
3		Температурный диапазон	4		Обратитесь к инструкции по применению

5		Дата изготовления	6		Код партии
7		Запрет на повторное применение	8		Использовать до

9. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ ISO 14971-2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»,

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Часть 1. Общие требования»,

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»,

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ Р ИСО 17664-2012 «Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения повторной стерилизации медицинских изделий»

10. Транспортирование, хранение и эксплуатация

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

	Температура	Относительная влажность
Транспортировка	18°C ~ 25°C	Держите в сухом месте (30%-40%)
Хранение	1°C ~ 30 °C	Держите в сухом месте (30%-40%)
Эксплуатация	18°C ~ 25°C	Держите в сухом месте (30%-40%)

Срок годности

Срок годности составляет 5 лет.

11. Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется нестерильным. Стерилизация влажным теплом перед применением при температуре 121 °C, время: 30 мин. Время высыхания – 30 минут. Стерилизацию проводит с использованием стерильной упаковки. Для одноразового применения, повторная стерилизация и использование запрещено.

12. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

При неиспользовании изделия, повреждения индивидуальной упаковки и истечении срока хранения утилизацию проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

13. Гарантии

- Гарантийный срок хранения – 5 лет

Производитель:

GeoMedi Co., Ltd. (ГеоМеди Ко., Лтд.), Корея

#702, 703, 704, 705, 709 – 1, 810-2, 811, B112, Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel: (+82)-2-588-2873

Fax: (+82) -2-6280-2849

dhkim@geomedi.co.kr

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «ГиперСтом»

Адрес : 115191, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пер Духовской, д. 19, помещ. 133

Тел. +7 (909) 960-9000

e-mail : Info@giperstom.ru

등부 2023년 제18247호

Registered No. 2023-18247

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 사용지침에 기재된 주식회사 지오메디 대표이사 김도형의 대리인 김성현은 본 공증인의 면전에서 위 사서증서에 위 본인이 서명날인한 것임을 자인하였다.

KIM SEONG HEON, attorney-in-fact of GEOMEDI CO., LTD. DO-HYUNG, KIM / CEO, appeared before me and admitted said principal's subscription to the attached INSTRUCTIONS FOR USE.

2023년 11월 22일 이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this 22nd day of November, 2023 at this office.



공증사무소명칭
공증인가 법무법인 한미

Name of the office
HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

소속
서울중앙지방법검찰청


Belong to
Seoul Central District Prosecutors' Service


소재지표시
서울특별시 종로구 율곡로 6, B동 101호 (중학동, 트윈트리타워)

Address of the office
Twintree Tower(B) #101, 6 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

공증담당변호사 박종순

Notary Public PARK JONG SOON

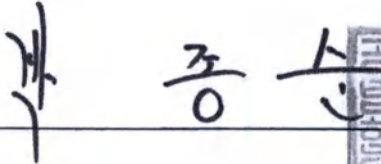

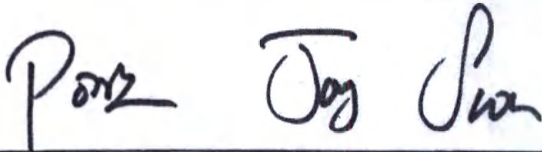

(Signature of Notary Public)

This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public since March 14, 2007 under Law No. 7428.

Твинтри тауэр (В) № 101, 6 Юлгок-ро

Адвокатская и нотариальная Тел. 733-3955-6 Факс: 733-3950
контора Ханми

Регистрационный № 2023-18247

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Тисненая печать: АДВОКАТСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ХАНМИ

АДВОКАТСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ХАНМИ

Твинтри тауэр (В) № 101, 6 Юлгок-ро,
Чонногу, Сеул, Корея

210мм X 297мм 70г/м²

ОДОБРЕНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

(подпись) Ким До-Хён

06 ноября 2023 года

Штамп: [Адвокатская и нотариальная контора Ханми]

	Регистрационный номер 2023 – 18247 Нотариальное свидетельство КИМ СОН ХЁН, лицо, действующее на основании доверенности исполнительного директора компании «ГЕОМЕДИ КО., ЛТД.» ДО-ХЁН, КИМ, лично явившийся ко мне, подтвердил подлинность подписи, проставленной вышеуказанным Доверителем на прилагаемой ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Данный факт засвидетельствован настоящим документом сегодня, 22 ноября 2023 г., в указанной нотариальной конторе. Наименование конторы АДВОКАТСКАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ХАНМИ Относится к Бюро прокурора Центрального округа Сеула Адрес конторы: Твинтри тауэр (В) № 101, 6 Юлгок-ро, Чонногу, Сеул, Корея Нотариус ПАК ЮН СУН /подпись/ (Подпись нотариуса) /Печать нотариуса/ В соответствии с Законом № 7428 Указанная юридическая компания уполномочена Министерством юстиции Республики Корея на осуществление нотариальной деятельности с 14 марта 2007 г.
--	--

210мм X 297мм 70г/м³

Перевод данного текста выполнен переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать седьмого декабря две тысячи двадцать третьего года.

Я, Рак Евгения Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре; № 21/86-н/77-2023- 40-2803

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Рак

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 35 лист(-а,-ов).

Е.С. Рак

Е.С. Рак