



April 22, 2024

I, Sherri Lakota, hereby swear that the attached reproduction of the Instruction for Use for «**Soft contact lenses TOTAL30 One-Month Replacement in several variants**» includes true, exact and complete information of a document in the possession Sherri Lakota, Alcon Laboratories Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA.

Sherri Lakota

Vice President, Global Regulatory Affairs, Alcon Vision Care and DEOH

This certificate may not be reproduced and is solely destined for the Government Authorities of the Russian Federation.

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

Place: State of Texas, USA

Subscribed and sworn to before me on this April 22, 2024, by Sherri Lakota proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.


Notary Public

The information stated in this document is confidential and is intended exclusively for the purpose of product registration

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ. КРАЙНЕ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, в вариантах исполнения:

1. Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -12,00 дптр до +8,00 дптр: в диапазоне оптической силы от -12,00 дптр до -8,50 дптр с шагом 0,5 дптр; в диапазонах оптической силы от -8,00 дптр до -0,25 дптр с шагом 0,25 дптр, от +0,25 дптр до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр и от -6,5 дптр до +8, 00 дптр с шагом 0,50 дптр (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).
2. Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены, варианты исполнения: базовая кривизна 8,4 мм; общий диаметр 14,2 мм; оптическая сила линзы от -10,00 до +6,00 дптр с шагом 0,25 дптр; аддидация: низкая, средняя, высокая (1 шт./уп.; 3 шт./уп.; 6 шт./уп.).

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены (из материала лефилкон А) изготовлены из силикон-гидрогелевого материала, содержащего приблизительно 55% воды и 45% материала лефилкон А. Линзы имеют поверхность, модифицированную для увеличения влагосодержания. Краситель «Реактивный голубой 247 (Reactive Blue 247)» добавляют к материалу линзы для создания светло-голубого оттенка всей поверхности линзы, чтобы сделать ее более заметной при использовании. Бензотриазоловые мономеры блокируют УФ-излучение и снижают уровень пропускания высокоэнергетического излучения видимой области спектра (HEVL) в диапазоне длин волн от 380 нм до 450 нм. Характеристики пропускания: менее 1% УФ-лучей спектра В в диапазоне от 280 нм до 315 нм и менее 10% УФ спектра А лучей в диапазоне от 315 нм до 380 нм для всего диапазона оптической силы. Самые тонкие линзы блокируют 34% излучения синего света в диапазоне длин волн от 380 нм до 450 нм.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Свойства линз

- | | |
|---|---|
| • Показатель преломления (рефракционный индекс) в гидратированном состоянии: | 1,40 |
| • Коэффициент светопропускаемости (спектральный): | ≥85 % (абсолютная величина для среднего значения в диапазоне длин волн от 380 нм до 780 нм) |
| • Коэффициент пропускания высокоэнергетического излучения видимой области спектра (спектральный): | ≤80% при длине волны 420 нм |
| • УФ-пропускаемость: | < 1 % УФ-В (средний процент пропускания в диапазоне длин волн от 280 нм до 315 нм)
< 10 % УФ-А (средний процент пропускания в диапазоне длин волн от 315 нм до 380 нм) |
| • Кислородопроницаемость (Dk): | 123 x 10 ⁻¹¹ (см ² /сек) (мл О ₂ /мл x мм рт. ст.), измерено при 35°C (полярографический метод) |
| • Содержание воды: | 55% по массе в изотоническом солевом растворе |

- Содержание воды на поверхности: $\geq 90\%$

Доступные параметры линзы.¹

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены:

- Диаметр: 14,2 мм
- Толщина в геометрическом центре: 0,08 мм при -3,00 дптр (зависит от оптической силы линзы)
- Базовая кривизна: 8,4 мм
- Оптическая сила: Значения минусовых диоптрий: от -0,25 дптр до -8,00 дптр (шаг 0,25 дптр)
от -8,50 дптр до -12,00 дптр (шаг 0,50 дптр)
Значения плюсовых диоптрий: от +0,25 дптр до +6,00 дптр (шаг 0,25 дптр)
от +6,50 дптр до +8,00 дптр (шаг 0,50 дптр)

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены:

- Диаметр: 14,2 мм
- Толщина в геометрическом центре: 0,08 мм при -3,00 дптр (зависит от оптической силы линзы)
- Базовая кривизна: 8,4 мм
- Оптическая сила: Оптическая сила линзы:
от +6,00 до -10,00 дптр (шаг 0,25 дптр)
Аддидация: низкая, средняя, высокая (LO, MED, Hi)

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Линзы контактные мягкие из материала лефилкон А выступают в качестве преломляющей среды для фокусировки лучей света на сетчатке, когда они гидратированы и находятся на роговице.

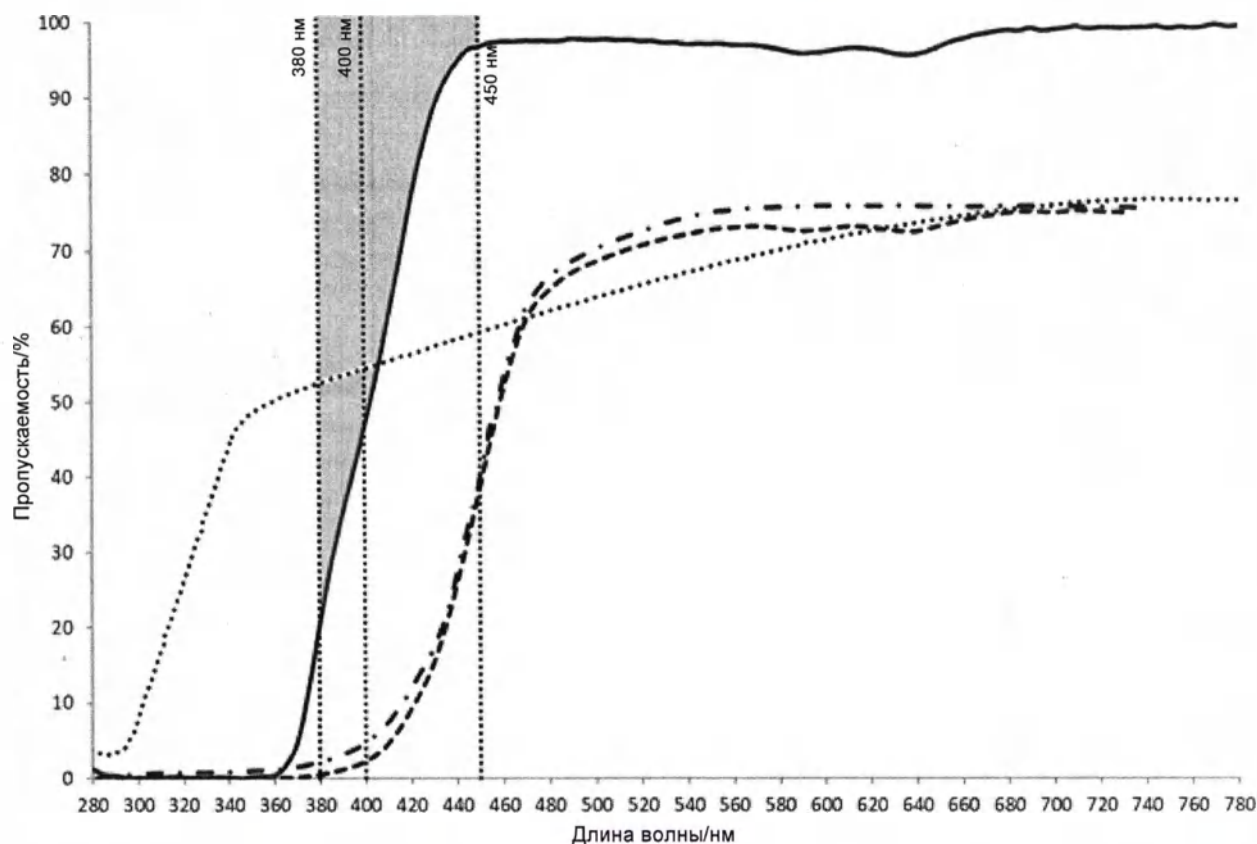
Помимо этого, контактные линзы содержат комбинацию мономеров, блокирующих УФ-излучение и видимое высокоэнергетическое излучение видимой области спектра, с целью защиты роговицы и внутренних структур глаза от вредного воздействия УФ-лучей. Например, самая тонкая контактная линза из лефилкона А (-3,00 дптр) блокирует $> 97\%$ УФ-А лучей и $> 99\%$ УФ-В лучей на основании средних значений по спектру. Линзы снижают пропускание высокоэнергетического излучения видимой области спектра (HEVL), достигающего заднего сегмента глаза, примерно на 34% в диапазоне длин волн от 380 нм до 450 нм. На рисунке 1 отображен профиль пропускания самой тонкой контактной линзы из лефилкона А, представленной на рынке. При увеличении толщины линзы уровень пропускания излучения будет снижаться еще сильнее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контактные линзы с УФ-фильтром НЕ являются заменой солнцезащитных очков с УФ-фильтром, так как не полностью закрывают глаз и зону вокруг глаза. Необходимо продолжать использовать солнцезащитные очки в соответствии с рекомендацией специалиста.

ПРИМЕЧАНИЕ: Длительное воздействие УФ-излучения является одним из факторов риска, связанных с развитием катаракты. Воздействие зависит от ряда факторов, таких как условия окружающей среды (высота, географическое положение, облачность) и индивидуальных факторов (продолжительность и характер деятельности на открытом воздухе). Контактные линзы с функцией поглощения УФ-излучения помогают защитить глаза от вредного УФ излучения. Не проводилось клинических исследований, доказывающих что применение УФ-поглощающих контактных линз позволяет снизить риск развития катаракты или других заболеваний глаз. Защитное действие контактных линз из лефилкона А в отношении высокоэнергетического излучения видимой области спектра дополняет защитные свойства хрусталика. Однако исследований, показавших клинические преимущества при снижении пропускания видимой части спектра на 34% при длинах волн ниже 450 нм, не проводилось. Проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции зрения для получения дополнительной информации.

Кривые коэффициента пропускания

Рисунок 1: коэффициент пропускания контактной линзы из лефилкона А по сравнению с роговицей и хрусталиком человека



- Контактные линзы из лефилкона А; измерялись по центральной части диаметром 6 мм для самых тонких линз, представленных на рынке (-3,00 дптр; 0,080 мм)
- Роговица человека в возрасте 24 лет, по данным Lerman, S., Radiant Energy and the Eye, MacMillan, Нью-Йорк, 1980 г., с. 58, рисунок 2-21.
- - Хрусталик человека в возрасте 25 лет, по данным Waxler M. Hitchins V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, 1986 г., с. 19, рисунок 5.
- - - Комбинированное фильтрующее влияние контактной линзы из лефилкона А и хрусталика человека при воздействии излучения на сетчатку.

На рисунке 1 показан коэффициент пропускания самой тонкой контактной линзы из лефилкона А, человеческой роговицы, хрусталика человека и комбинированное фильтрующее влияние контактной линзы и хрусталика человека при воздействии излучения на сетчатку. Затененные области на графике отображают среднее значение снижения (т.е. интегральное затухание) пропускания контактной линзой высокоэнергетического излучения видимой области спектра в процентах (от 380 нм до 450 нм). Общее снижение пропускания излучения в этой области составляет 34%: в диапазоне от 380 нм до 400 нм — 65% и в диапазоне от 400 нм до 450 нм — 21%. Эти данные отображают фильтрационную способность контактной линзы в центральной части, размером 6 мм, у самых тонких линз, представленных на рынке (-3,00 дптр; 0,08 мм). Фильтрационная способность будет увеличиваться у контактных линз с большей толщиной в центральной зоне.

Длина волны	Суммарный процент снижения пропускания высокоэнергетического излучения видимой области спектра
-------------	--

от 380 нм до 400 нм	65%
от 400 нм до 450 нм	21%
от 380 нм до 450 нм	34%

НАЗНАЧЕНИЕ/ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены предназначены для применения у людей со здоровыми глазами, которым требуется коррекция зрения, в соответствии с рекомендациями специалиста по контактной коррекции зрения. Линзы предназначены для дневного режима ношения (менее 24 часов в состоянии бодрствования).

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

Целевая группа пользователей: Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены предназначены для коррекции зрения у пациентов, не страдающих заболеваниями глаз, которым требуется коррекция зрения (при миопии, гиперметропии), у которых возможен правильный подбор изделия и которые понимают и могут выполнять инструкции по ношению, уходу и безопасному использованию (или за которых это могут сделать другие лица, действующие в их интересах). В большинстве случаев контактными линзами пользуются взрослые и подростки. Дети также могут носить контактные линзы, под наблюдением специалиста по контактной коррекции зрения и родителей.

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены предназначены для коррекции зрения у пациентов, не страдающих заболеваниями глаз, которым требуется коррекция зрения (при пресбиопии, с миопией и гиперметропией или без них), у которых возможен правильный подбор изделия и которые понимают и могут выполнять инструкции по ношению, уходу и безопасному использованию (или за которых это могут сделать другие лица, действующие в их интересах).

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены повышают остроту зрения у лиц с миопией или гиперметропией.

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены повышают остроту зрения у лиц с пресбиопией и миопией или гиперметропией или без них.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ (для чего используются)

Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены предназначены для оптической коррекции рефракционной аметропии (миопии и гиперметропии) в факических (с хрусталиком) или афакических (без хрусталика) глазах без патологии с максимальной величиной астигматизма приблизительно 1,50 дптр, не влияющей на остроту зрения.

Линзы контактные мягкие мультифокальные TOTAL30 Multifocal ежемесячной замены предназначены для оптической коррекции пресбиопии с рефракционной аметропией (миопией и гиперметропией) или без нее, в факических (с хрусталиком) или афакических (без хрусталика) глазах без патологии, которым может потребоваться аддидация до +3,00 диоптрий (D) или меньше, с максимальной величиной астигматизма приблизительно 1,50 дптр, не влияющей на остроту зрения.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАМЕНЫ

Контактные линзы предназначены для дневного режима ношения (менее 24 часов в состоянии бодрствования) с последующим снятием для утилизации либо для очищения и дезинфекции (химической, не тепловой), прежде чем снова их использовать в соответствии с рекомендациями специалиста по контактной коррекции зрения. Линзы следует ежемесячно выбрасывать и заменять на новую пару. При необходимости это нужно делать чаще, если это рекомендует специалист по контактной коррекции зрения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (когда нельзя носить линзы)

Контактные линзы не следует носить при наличии медицинских противопоказаний или при воздействии неблагоприятных условий окружающей среды. Состояния, при которых не может гарантироваться безопасное ношение контактных линз:

- Аллергия, воспаление, инфекция или раздражение глаза или век
- Выраженное нарушение функции слезной пленки (синдром сухого глаза)
- Гипестезия роговицы (сниженная чувствительность роговицы)
- Прием любых лекарственных средств, которые противопоказаны при использовании контактных линз или препятствуют их безопасному использованию, в том числе офтальмологических лекарственных средств
- Любые системные заболевания, которые могут ухудшиться при использовании контактных линз или препятствовать их безопасному использованию
- Покраснение или раздражение глаз

По вопросам, касающимся вышеуказанных или иных состояний и условий, проконсультируйтесь у специалиста по контактной коррекции зрения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Линзы дневного режима ношения не предназначены для их использования ночью. Линзы из лефилкона А нельзя оставлять на глазах во время сна.
- Возможно быстрое развитие серьезных заболеваний глаз, в т.ч. язв роговицы (язвенный кератит), приводящих к потере зрения.
- Использование контактных линз увеличивает риск глазных инфекций. Ношение линз во время сна и (или) курение дополнительно повышает риск язвенного кератита у пациентов, использующих контактные линзы.^{2,3}
- Если пациент чувствует дискомфорт в глазах, ощущение инородного тела, повышенное слезотечение, изменение зрения, покраснение глаз или другие проблемы, связанные с глазами, ему следует как можно скорее снять линзы и сразу же обратиться к специалисту.
- Проблемы, связанные с контактными линзами или средствами ухода за ними, могут привести к серьезным повреждениям глаза. Для правильного использования линз и средства по уходу за ними важно следовать указаниям специалиста по контактной коррекции зрения и всем инструкциям на изделии.
- Нестерильные жидкости (например, водопроводная вода, дистиллированная вода, изготовленные в домашних условиях солевые растворы или слюна) нельзя использовать в качестве заменителей любого из компонентов средств по уходу за линзами. Использование водопроводной или дистиллированной воды может привести к развитию акантамебного кератита — инфекции роговицы, устойчивой к лечению.
- Контактные линзы, поглощающие ультрафиолетовое излучение, НЕ являются заменой защитных очков, поглощающих УФ-лучи, или солнцезащитных очков. Пациенту следует продолжить использование защитных очков, поглощающих УФ-излучение в соответствии с назначениями.
- Эффективность ношения контактных линз, поглощающих УФ-излучение, для предотвращения или снижения частоты заболеваний глаз, связанных с воздействием УФ-света, в настоящее время не установлена.
- Не было продемонстрировано, что фильтрация высокоэнергетического излучения видимой области спектра (HEVL) контактными линзами оказывает оздоравливающее действие, включая, помимо прочего, защиту сетчатки, предотвращение прогрессирования катаракты, снижение усталости глаз, повышение контрастности и остроты зрения, уменьшение бликов, улучшение зрения при слабом освещении или оптимизацию циркадного ритма/цикла сна и бодрствования. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Особые меры предосторожности для специалистов по контактной коррекции

- При выборе соответствующей конструкции и параметров линзы специалист по контактной коррекции зрения должен учитывать все особенности глаз и характеристики линзы, которые могут повлиять на коррекцию зрения и здоровье глаз, в том числе кислородную проницаемость, толщину в центральной и периферической части и диаметр оптической зоны.
- Диагностические линзы, предназначенные для подбора или диагностики, следует снимать после однократного использования и не использовать повторно у других пациентов.

- Во время первого подбора контактных линз следует внимательно оценить состояние глаз и результаты оценки при установленной линзе. В дальнейшем специалист по контактной коррекции, назначивший коррекцию, должен регулярно контролировать эти показатели.
- Желтый краситель флуоресцеин не следует использовать, если пациент в линзах. Линзы впитывают краситель и меняют цвет.
- У лиц, использующих контактные линзы для коррекции пресбиопии, не всегда удается получить максимальную скорректированную остроту зрения вдаль и вблизи. Требования к остроте зрения у разных людей различаются, и это следует принимать во внимание при выборе наиболее подходящего типа контактных линз для каждого пациента.
- У пациентов с сахарным диабетом снижена чувствительность роговицы, поэтому у них имеется предрасположенность к повреждениям роговицы, эпителизация которых может быть неполной или замедленной по сравнению с таковой у людей без сахарного диабета.
- При беременности или приеме оральных контрацептивов могут наблюдаться изменения зрения или переносимости контактных линз. Пациентов следует предупредить об этом.
- Специалисту следует предупредить пациента о том, что необходимо немедленно снять линзы, если появится покраснение или раздражение глаз.
- Перед тем как покинуть кабинет специалиста по контактной коррекции зрения, пациенты должны научиться снимать линзы, либо у них должен быть кто-то, кто может сделать это за них.
- Для обеспечения здоровья глаз пациенту необходимо проходить плановые обследования глаз. Компания «Алкон» рекомендует пациентам посещать специалиста по контактной коррекции раз в год или чаще, согласно рекомендациям специалиста.

Правила обращения с линзами и меры предосторожности при использовании линз

- Ежедневно проверяйте свои глаза, чтобы убедиться, что они выглядят хорошо и чувствуют себя комфортно, а Ваше зрение является четким.
- Изделие не следует использовать, если блистерная упаковка повреждена или запечатана не полностью. Это могло привести к загрязнению изделия, что в свою очередь может повлечь развитие тяжелых глазных инфекций.
- Если фольга блистерной упаковки была ненамеренно открыта до предполагаемого использования линзы, то линзу следует хранить в чистом контейнере для линз. Средства по уходу за линзами отличаются, поэтому следуйте инструкциям производителя для хранения, очистки и дезинфекции линз перед их ношением.
- Для поддержания здоровья и безопасности глаз частота и время ношения линз должны определяться специалистом по контактной коррекции. Не оставляйте мягкие контактные линзы из лефилкона А на глазах во время сна.
- Не используйте с кем-либо одну и ту же пару линз, поскольку это может способствовать передаче микроорганизмов, а это, в свою очередь, вызвать серьезные проблемы со здоровьем глаз.
- Никогда не допускайте контакта линз с нестерильными жидкостями (включая водопроводную воду и слюну), так как это может привести к микробному загрязнению, а в дальнейшем — к необратимым повреждениям глаза.
- Никогда не используйте воду, физиологический раствор или увлажняющие капли для дезинфекции линз. Эти жидкости не подходят для дезинфекции линз. Неиспользование рекомендуемого дезинфицирующего раствора может привести к тяжелой инфекции, потере зрения или слепоте.
- Проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции перед тем, как носить линзы во время занятий спортом, включая плавание и другие водные активности, чтобы предотвратить микробное загрязнение или повреждение линз. Воздействие воды (или других нестерильных жидкостей) при ношении контактных линз во время плавания, катания на водных лыжах или приема джакузи, может увеличить риск развития глазной инфекции, в том числе акантамебного кератита.
- При нахождении вблизи токсичных или раздражающих испарений снимите и выбросьте линзы.
- Если линза высохла или на ней есть повреждения, выбросьте ее. Замените ее новой линзой.
- Лицам, использующим линзы, рекомендуется посещать специалиста по контактной коррекции зрения не реже одного раза в год или согласно указаниям специалиста.
- Сообщите своему работодателю, что носите контактные линзы, особенно если ваша работа предусматривает использование средств защиты глаз.
- Сохраните информацию об оптической силе линзы для каждого глаза. Перед тем как надеть линзу, убедитесь, что оптическая сила линзы, указанная на упаковке, соответствует вашему глазу.

Не меняйте тип или параметры линз без предварительной консультации со специалистом по контактной коррекции зрения.

- Если ношение линз прекращалось на длительное время, проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции, прежде чем возобновить ношение.
- Будьте осторожны, используя мыло, лосьоны, кремы, косметику или дезодоранты, так как они могут вызвать раздражение глаз в случае контакта с линзами.
- Надевайте линзы перед нанесением макияжа и снимайте их до удаления макияжа.
- Всегда носите с собой запасные линзы или очки.
- Не используйте линзы после истечения срока годности.

Дополнительная информация о мультифокальных линзах и линзах для моновидения

- Два распространенных метода использования контактных линз для коррекции пресбиопии включают ношение мультифокальных или бифокальных линз и линз для моновидения. Подобно бифокальным, трифокальным очкам или очкам с прогрессивными линзами, каждая мультифокальная контактная линза имеет зоны с разной оптической силой для дали или близи. Это позволяет пациенту использовать оба глаза, чтобы хорошо видеть на любом расстоянии. При коррекции методом моновидения используются стандартные монофокальные линзы, при этом на одном глазу носят линзу для дали, а на другом — линзу для близи.
- Как и при любом типе коррекции зрения, у коррекции с помощью мультифокальных или монофокальных линз есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в виде четкого зрения вблизи во всех направлениях взгляда (прямо, вперед или вверх) при использовании этих вариантов контактных линз может сопровождаться нечеткостью зрения на определенных расстояниях или при определенных условиях освещения. У некоторых людей, особенно тех, кто носит линзы для моновидения, могут отмечаться снижение глубины восприятия, а у некоторых — трудности с адаптацией. Такие симптомы, как легкая нечеткость зрения, головокружение или головные боли, могут быть кратковременными или проходить в течение нескольких недель по мере адаптации. Чем дольше сохраняются эти симптомы, тем хуже прогноз успешной адаптации.
- В период адаптации рекомендуется носить эти контактные линзы только в знакомых ситуациях, не требующих напряжения зрения. Например, следует избегать вождения автомобиля, пока не освоитесь с мультифокальной коррекцией или коррекцией методом моновидения.
- Некоторые пользователи не могут полностью приспособиться к работе при слабом освещении, например, управлять автомобилем ночью. Этот вопрос следует обсудить со специалистом по контактной коррекции. Могут быть рекомендованы дополнительные контактные линзы, чтобы можно было полностью скорректировать остроту зрения в обоих глазах, когда требуется четкое зрение для дали.
- При длительной работе вблизи, требующей очень острого зрения для близи, может оказаться полезным надеть очки поверх контактных линз или приобрести дополнительные контактные линзы с различной оптической силой, специально приспособленные для этой задачи. Специалист по контактной коррекции может помочь решить проблему такого рода.
- Важно следовать рекомендациям специалиста по контактной коррекции относительно адаптации к коррекции зрения при пресбиопии. В течение периода адаптации следует внимательно отмечать любые конкретные ситуации, которые кажутся небезопасными или в которых невозможно эффективно работать, а затем при необходимости обсудить их со специалистом по контактной коррекции.
- Решение о подборе мультифокальных линз или коррекции методом моновидения должно приниматься совместно со специалистом по контактной коррекции и только после тщательного рассмотрения и обсуждения всех зрительных потребностей.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (возможные проблемы и что делать в случае их возникновения)

Проблемы могут возникнуть при ношении контактных линз и могут впервые проявиться как один или несколько из следующих признаков и симптомов:

- Раздражение (в том числе увеличение количества отделяемого из глаза)
- Дискомфорт в глазах (например, ощущение инородного тела)
- Покраснение глаз
- Чувство жжения и зуд
- Нечеткость зрения

- Нарушение зрения (радужные круги или ореол вокруг источников света)
- Боль
- Головная боль
- Головокружение
- Ощущение сухости глаз
- Воспаление
- Диплопия (двоение в глазах)
- Светобоязнь (повышенная чувствительность к свету)

Предыдущие признаки и симптомы могут быть связаны с несколькими состояниями, включая:

- Снижение зрения (временное или стойкое)
- Эрозия роговицы
- Отек роговицы (отечность)
- Микробная инфекция
- Инфильтраты роговицы (наличие воспалительных клеток в роговице)
- Конъюнктивит
- Язвенный кератит (язва роговицы)
- Аллергическая реакция/гиперчувствительность
- Васкуляризация роговицы (наличие кровеносных сосудов в роговице)
- Токсическая реакция
- Субконъюнктивальное кровоизлияние

Игнорирование этих признаков, симптомов и состояний может привести к более серьезным осложнениям.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

В случае возникновения любого из вышеперечисленных нежелательных побочных реакций немедленно снимите линзу (линзы).

- Если чувство дискомфорта или проблема исчезли, тщательно осмотрите линзу (линзы).
 - Если линза повреждена, не надевайте ее обратно в глаз. Замените поврежденную линзу новой или обратитесь к специалисту.
 - Если на линзе оказались грязь, ресница или инородное тело, или если неприятные ощущения прекращаются, а линза при этом кажется неповрежденной, тщательно очистите, промойте и продезинфицируйте линзу, прежде чем вводить ее обратно в глаз.
- Если вышеуказанные симптомы сохраняются после удаления линзы из глаза и ее повторного надевания, удалите линзу из глаза и немедленно обратитесь к специалисту по контактной коррекции зрения.

Возможно развитие таких тяжелых осложнений как инфекция, язва роговицы (язвенный кератит) или ирит. Эти состояния могут быстро прогрессировать и приводить к стойкой потере зрения. Лечение таких состояний, как эрозии, положительный тест на прокрашивание эпителия роговицы и бактериальные конъюнктивиты, должно быть начато как можно раньше во избежание осложнений.

- Иногда сухость можно устранить, поморгав несколько раз, или за счет использования увлажняющих капель для контактных линз, которые утверждены для использования с мягкими контактными линзами. Если сухость не проходит, проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции.
- Если линза прилипла к глазу (перестала двигаться), закапайте несколько капель увлажняющего раствора для линз и подождите, пока подвижность линзы не восстановится. После этого попробуйте снять линзу. Если проблема не решилась, обратитесь к специалисту по контактной коррекции.
- Если линза сместилась в глазу, ее можно вернуть на место следующим образом:
 - Закройте глаза и аккуратно, массирующими движениями, верните линзу на место, или
 - Посмотрите в сторону линзы и аккуратно моргните, или
 - Поместите палец на верхнее или нижнее веко и аккуратно краем века подтолкните линзу к роговице.
- Если линза порвалась в глазу, осторожно уберите ее части так же, как и обычную линзу. Если возникли проблемы со снятием линзы, постарайтесь не сдавливать ткани глаза. Промойте глаз физиологическим раствором. Если это не помогает, обратитесь к специалисту по контактной коррекции.

Ситуации, требующие неотложной помощи

При попадании в глаза химических веществ любого рода (бытовая химия, растворы для садоводства, лабораторные химикаты и т.д.):

- Немедленно промойте глаза свежим физиологическим раствором или водопроводной водой.
- Снимите и выбросьте линзы и немедленно обратитесь к специалисту по контактной коррекции, либо в больничные кабинет неотложной помощи.

СООБЩЕНИЯ О СЕРЬЕЗНЫХ ИНЦИДЕНТАХ

О любом серьезном инциденте, связанном с использованием данного медицинского изделия, необходимо сообщать в компанию «Алкон Лабораториз, Инк.»:

Свяжитесь с представительством компании в Вашей стране или торговым представителем компании «Алкон»

Электронная почта: qa.complaints@alcon.com

Веб-сайт: <https://www.alcon.com/contact-us>

О серьезных происшествиях также следует сообщать в местные органы, отвечающие за использование медицинских изделий в вашей стране.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЕ

Время ношения линз и режим их замены определяет специалист по контактной коррекции на основании индивидуальных потребностей и физиологических особенностей пациента. Контактные линзы TOTAL30 (из материала лефилкон А) одобрены только для дневного режима ношения. Линзы следует выбрасывать и заменять на новую пару каждый месяц или чаще согласно рекомендациям специалиста по контактной коррекции.

Линзы следует дезинфицировать, используя только химические (не тепловые) дезинфицирующие средства по уходу за линзами.

ДНЕВНОЙ РЕЖИМ НОШЕНИЯ – менее 24 часов в состоянии бодрствования. Нормальный дневной режим ношения линз предполагает как минимум 6-часовой период без ношения линз в течение 24 часов. Время ношения можно увеличивать постепенно, пока не будет достигнуто максимальное рекомендованное время. Перед сном линзы необходимо снимать.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

- Перед тем как надеть контактные линзы, всегда мойте руки и вытирайте их чистым безворсовым полотенцем.
- Аккуратно встряхните блистер (с новой линзой внутри), прежде чем вскрыть упаковку.
- Извлеките линзы из блистера (или из контейнера для ранее использованных линз) и осторожно перенесите на свою ладонь.
- Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку и подходит по диоптриям для нужного глаза.
- Осмотрите линзу перед надеванием.
- Не используйте грязные или поврежденные линзы.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

- Перед тем как надеть контактные линзы, всегда мойте руки и вытирайте их чистым безворсовым полотенцем.
- Поместите линзу на кончик чистого и сухого, правого или левого указательного пальца. Поднесите средний палец той же руки к нижнему веку и оттяните его вниз.
- Используйте пальцы другой руки, чтобы приподнять верхнее веко.
- Поместите линзу прямо на глаз (роговицу) и аккуратно уберите палец с линзы.

- Посмотрите вниз и медленно опустите нижнее веко.
- Посмотрите прямо и медленно опустите край верхнего века.
- Аккуратно моргните.

ПРАВИЛА СНЯТИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

- Вымойте руки и вытрите их чистым безворсовым полотенцем
- Моргните несколько раз.
- Смотри вверх, сдвиньте линзу вниз на белую часть глаза
- Снимите линзу, аккуратно захватив ее между большим и указательным пальцем. Не сдавливайте ткань глаза.
- Если линзу тяжело захватить, используйте смазывающие и увлажняющие капли и попробуйте еще раз через несколько минут
- Если линза скользкая и ее трудно захватить, еще раз высушите свои пальцы и попробуйте снова. В этом случае не используйте увлажняющие капли.
- Никогда не используйте острые предметы, щипчики, маникюрные ножницы или ногти для снятия линзы или извлечения ее из контейнера.

Если у вас возникли проблемы со снятием линз (линза сместилась или повредилась), см. пункт **ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ** выше.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ

- После извлечения из глаз линзы следует тщательно очистить, промыть и продезинфицировать перед повторным использованием.
 - Специалист по контактной коррекции должен дать рекомендации и предоставить инструкции по правильному уходу за линзами. Не меняйте систему ухода за линзами, предварительно не проконсультировавшись со специалистом по контактной коррекции.
 - Средства по уходу за линзами имеют различные инструкции и правила применения. Во избежание проблем с глазами или повреждения линз всегда внимательно следуйте инструкциям производителя используемого изделия.
 - Некоторые средства по уходу за линзами требуют механической очистки и споласкивания. В этом случае следуйте инструкциям производителя по количеству раствора и времени механической очистки и споласкивания, чтобы снизить риск серьезных инфекций.
- Замачивание и хранение линз:
 - Используйте только свежий раствор каждый раз, когда замачиваете линзы для хранения.
 - Время хранения линз в растворе перед следующей стадией очистки, промывания и дезинфекции различается в зависимости от используемого средства по уходу за линзами. Следуйте инструкциям производителя.
 - Не допускается повторное использование или «разбавление» старого раствора, находящегося в контейнере для линз, поскольку повторное использование раствора снижает эффективность дезинфекции линзы и может стать причиной тяжелой инфекции, потери зрения или слепоты. «Разбавление» означает добавление свежего раствора в раствор, содержащийся в контейнере.
- Оставшийся раствор из вскрытого флакона средства по уходу за линзами необходимо вылить по истечении срока, рекомендованного производителем средства.
- Не используйте средства, разработанные исключительно для ухода за жесткими или газопроницаемыми линзами.
- Никогда не используйте тепловую обработку для ухода за линзами и их дезинфекции.
- Никогда не используйте воду, физиологический раствор или увлажняющие капли для дезинфекции линз. Эти жидкости не подходят для дезинфекции линз. Неиспользование рекомендуемого дезинфицирующего раствора может привести к тяжелой инфекции, потере зрения или слепоте.

РАСТВОРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

Линзы можно либо очищать и дезинфицировать, после каждого периода дневного ношения, либо выбрасывать и заменять на новую пару линз. Сменные линзы или соответствующие очки должны быть доступны в любое время.

Для ухода за контактными линзами из лефилкона А можно использовать растворы для ухода за линзами, которые подходят для использования с силикон-гидрогелевыми мягкими контактными линзами. Следуйте рекомендациям специалиста по контактной коррекции зрения по уходу за линзами. Алкон рекомендует следующие продукты по уходу за линзами:

- Система одноступенчатая пероксидная для ухода и хранения контактных линз AOSEPT PLUS с увлажняющей матрицей HydraGlyde
- Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist с контейнером для хранения контактных линз

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ЛИНЗ

Растворы по уходу за линзами и контейнеры для линз отличаются по назначению и инструкциям по применению. Некоторые контейнеры используются только для хранения контактных линз (иногда упоминаются как плоский футляр для линз или контейнер для хранения линз), а другие содержат нейтрализующий диск и предназначены для использования с пероксидными системами очистки и дезинфекции. Если линзы не используются ежедневно, очищенные и продезинфицированные линзы можно хранить в футляре для линз (с плотно закрытыми крышками) в течение определенного периода времени, которое различается в зависимости от раствора для линз и используемого контейнера. **Всегда следуйте инструкциям производителя к средствам для ухода за линзами.**

- Специалист по контактной коррекции должен проинструктировать пациента о том, как следует использовать рекомендуемый раствор(ы) по уходу за линзами и контейнер для хранения линз.
- Контейнеры для контактных линз могут стать источником роста бактерий и требуют соответствующей очистки, сушки и замены, чтобы избежать загрязнения или повреждения линзы:
 - Контейнеры для контактных линз необходимо очищать подходящим раствором и просушивать в соответствии с инструкциями к контейнеру для контактных линз. Инструкции по сушке, например, сушка воздухом или протирание безворсовым полотенцем, могут варьироваться в зависимости от конкретного контейнера для линз.
 - Заменяйте контейнеры для контактных линз по крайней мере один раз каждые 3 месяца или в соответствии с рекомендациями производителя контейнеров для линз.
 - Заменяйте контейнеры для линз, специально разработанные для пероксидных растворов и содержащие нейтрализующие диски, в соответствии с инструкциями производителя или раньше, если очищенные и дезинфицированные линзы вызывают ощущение жжения и покалывания.
 - Не храните линзы и не промывайте контейнер для линз водой или любым другим нестерильным раствором. Используйте только свежие средства по уходу за линзами, чтобы избежать загрязнения линз или контейнера для линз. Использование нестерильного раствора может привести к тяжелой инфекции, ухудшению зрения или слепоте.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Выбрасывайте контактные линзы и мембрану блистерной упаковки в мусорное ведро, а не в унитаз или раковину. Картонную упаковку и полипропиленовый (ПП) пластиковый корпус блистерной упаковки следует выбрасывать в мусорное ведро или утилизировать в соответствии с местными указаниями по обращению с отходами.

При утилизации или переработке изделия, его деталей и упаковки соблюдайте требования государственных нормативных документов.

Специальное требование для России: В условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентирующимися СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

(Использованное изделие – класс Б; Поврежденное или изделие с истекшим сроком годности (не бывшее в употреблении) – класс А).

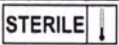
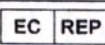
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (комплект поставки)

Каждая линза поставляется в запечатанной фольгой пластиковой блистерной упаковке, состоящей из формованного полипропиленового блистера и крышки из алюминиевой фольги с полиэфирным покрытием. Блистерные упаковки содержат физиологический раствор с фосфатным буфером с приблизительно 0,3% полимерных смачивающих агентов, состоящих из 1% сополимеров полиамидоамиона эпихлоргидрина и поли (2-метакрилоилоксиэтилметакрилхолин-ко-2-аминоэтилметакрилата), и стерилизованы паром.

На блистерную упаковку нанесены такие параметры, как базовая кривизна, диаметр, оптическая сила в диоптриях, а также код партии, дата изготовления и дата истечения срока годности.

Линзы поставляются в стерильном виде в картонных упаковках, содержащих до 6 контактных линз в индивидуальной герметичной упаковке.

СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА УПАКОВКЕ

СОКРАЩЕНИЕ/СИМВОЛ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
BC	Базовая кривизна
DIA	Диаметр
PWR	Оптическая сила
D	Диоптрия (оптическая сила линзы)
L	Левый
R	Правый
ADD	Аддидация
LO	Низкая
MED	Средняя
HI	Высокая
MAX ADD	Максимальная аддидация
UV	Ультрафиолет
UVA	Ультрафиолетовое излучение спектра А
UVB	Ультрафиолетовое излучение спектра В
UV-Vis	Ультрафиолетовое и видимое излучение
HEVL	Высокоэнергетическое излучение видимой области спектра (лучи синего спектра)
	Знак лицензии переработки отходов упаковки
	Код партии
	Использовать до (дата истечения срока годности)
	Стерилизация паром
	Одинарная стерильная барьерная система
	Знак Европейского соответствия
	Две буквы для обозначения языка (показан пример: английский)
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Медицинское изделие
	НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЛИНЗЫ В УНИТАЗ ИЛИ В РАКОВИНУ
	Внимание! Федеральный закон (США) разрешает продажу или заказ данного продукта только лицензированным специалистам по контактной коррекции.
	Производитель
	Дата производства (указывается на MDR этикетках)
	Медицинское изделие (указывается на MDR этикетках)
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Внимание! Федеральный закон (США) разрешает продажу или заказ данного продукта только лицензированным специалистам по контактной коррекции.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта.

В ходе транспортировки следует придерживаться национальных правил ее осуществления. Линзы при транспортировании устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды от +5 до +40°C (рекомендуемые условия транспортирования, согласно ГОСТ 31586-2012).

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Не использовать после окончания срока годности. Дата истечения срока годности изделия указана на упаковке рядом со знаком  EXP.

Нет специальных требований к условиям хранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Использовать только при условии неповрежденной упаковки блистера. Не используйте линзы в случае повреждений. Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями и пошаговой инструкцией.

Все вопросы, связанные с работой и качеством изделия, могут быть адресованы Уполномоченному Представителю производителя.

Компания-производитель гарантирует качество и стерильность линз в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения.

НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



«Алкон Лабораториз, Инк.»,
США
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Место производства медицинского изделия:

CIBA VISION GmbH, Industriering 1, 63868 Grosswallstadt, Germany

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / ИМПОРТЕР / ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

ООО «Алкон Фармацевтика»

125315 Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3

Телефон +7 (495) 961-13-33

Дата выпуска: апрель 2024

© 2024, Alcon, Inc

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

¹ Проверьте фактическое наличие изделия, которое может со временем меняться.

² Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

³ Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

Перевод с английского языка на русский язык



Alcon

/Логотип/: «Алкон» (Alcon)

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories, Inc.)

6201 Саут Фривей,

Форт-Уэрт, штат Техас 76134-2099, США

(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-2099,

USA)

www.alcon.com

22 апреля 2024 г.

Настоящим я, Шерри Лакота (Sherri Lakota), подтверждаю, что приложенная копия Инструкции по применению медицинского изделия **«Линзы контактные мягкие TOTAL30 ежемесячной замены, в вариантах исполнения»** содержит достоверную, точную и полную информацию из документа, находящегося в распоряжении Шерри Лакоты, «Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories Inc.), 6201 Саут Фривей, Форт-Уэрт, штат Техас 76134-2099, США (6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA).

/Подпись/

Шерри Лакота

Вице-президент, глобальный регуляторный отдел, направление изделий для ухода за зрением и средств от синдрома сухого глаза и для здоровья глаз компании «Алкон» (Alcon Vision Care and DEON)

Настоящее свидетельство не подлежит воспроизведению и предназначено исключительно для государственных органов Российской Федерации.

Нотариус или другое должностное лицо, оформляющее настоящее свидетельство, удостоверяет исключительно личность лица, подписавшего документ, к которому прилагается настоящее свидетельство, а не верность, точность или действительность указанного документа.

Место: штат Техас, США

Подписала под присягой и подтвердила в моем присутствии сегодня, 22 апреля 2024 г., Шерри Лакота, личность которой установлена на основании убедительных доказательств.

/Печать/: КЭТРИН БЛЮМ
(KATHRYNE BLUME) * СРОК
ПОЛНОМОЧИЙ ИСТЕКАЕТ
9 ФЕВРАЛЯ 2025 Г. * НОТАРИУС,
ШТАТ ТЕХАС *
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
НОТАРИУСА 13100609-8

/Подпись/

Нотариус

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Мухамедзяновой Валентиной Владимировной.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Второго мая две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Политов Антон Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Якубовой Татьяны Олеговны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Мухамедзяновой Валентины Владимировны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2024- *А.Ю. Политов*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Гербовая печать
нотариуса города Москвы
Якубовой Т. О.
ИНН 771775502947*

ПОДПИСЬ

А.Ю. Политов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса города Москвы
Якубовой Т. О.
ИНН 771775502947*

Российская Федерация

Город Москва

Второго мая две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Политов Антон Юрьевич, временно исполняющий обязанности
нотариуса города Москвы Якубовой Татьяны Олеговны,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Страниц(а) 15 представленного документа являются копиями.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2024- *А.Ю. Политов*

Уплачено за совершение нотариального действия: 1700 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 16 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

А.Ю. Политов