

Для регистрации в РФ

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор ООО «Доктор Клаус»

 /Кlaus В.А./

«02» июля 2024 г.

Doctor  
Klaus

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению медицинского изделия**  
**Средство офтальмологическое увлажняющее**  
**RELINS ACTIVE**

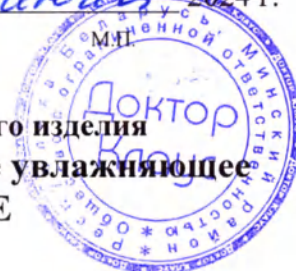

Регистрационное удостоверение в РФ:

**Назначение**

Средство офтальмологическое увлажняющее RELINS ACTIVE (далее – RELINS ACTIVE) предназначено для увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаз.

**Состав**

Натриевая соль гиалуроновой кислоты (0,41 %), борная кислота, натрия хлорид, борат натрия, ЭДТА динатриевая соль дигидрат, поликватерниум-7, ПГМГ, вода очищенная. СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.

**Описание и принцип действия**

Средство RELINS ACTIVE представляет собой стерильный изотонический боратный буферный раствор без запаха, прозрачный, бесцветный или желтоватый, без видимых механических включений.

*Увлажняющие, смазывающие и защитные свойства Средства RELINS ACTIVE обусловлены входящей в его состав гиалуроновой кислотой (в виде её натриевой соли).*

В составе Средства RELINS используется натрия гиалуронат, который имеет меньший молекулярный размер по сравнению с гиалуроновой кислотой, что позволяет веществу легче проникать в ткани, равномерно распространяться по поверхности роговицы.

*Натрия гиалуронат* представляет собой полисахарид, обладающий выраженным свойством удерживать воду, что обеспечивает высокую степень увлажнения и смазывания поверхности роговицы. Гиалуроновая кислота входит в состав слезы, также является структурным компонентом стекловидного тела, конъюнктивы, слезной железы, где она удерживает влагу, сохраняя стабильность слезной пленки и защищая глаза от пересыхания.

При закапывании RELINS ACTIVE на передней поверхности роговой оболочки глаза образуется равномерная тонкая пленка, предохраняющая глаз от пересыхания, надолго снимающая ощущение дискомфорта, сухости, усталости, рези и раздраженности глаз, которая не смывается при моргании и не вызывает снижения остроты зрения. За счет высокого содержания гиалуроновой кислоты (0,41 %) RELINS ACTIVE обеспечивает более длительный увлажняющий и защитный эффект от использования.

**Показания к применению**

Средство RELINS ACTIVE показано к применению для интенсивного и продолжительного увлажнения, предотвращения потери естественной слезной жидкости, снижения симптомов сухости глаз, а также:

- при синдроме «сухого глаза» с симптомами сухости, раздражения, зуда, жжения, покраснения, дискомфорта, чувства «песка в глазах» или инородного тела;
- для снятия усталости глаз при интенсивной зрительной нагрузке;
- при ношении всех видов контактных линз для снятия дискомфорта;

- для комфортного одевания жестких контактных линз.

#### **Основные причины появления синдрома «сухого глаза»:**

- пониженный объем слезоточивости либо повышенное испарение влаги с поверхности глаз;
- ношение всех типов контактных линз;
- гормональные изменения у женщин (в ожидании ребенка, во время кормления его грудью, а также во время менструации, менопаузы и пост-менопаузы);
- старение (синдром «сухого глаза» наблюдается чаще всего у женщин после 40 лет, после 60 лет – приблизительно 75 % людей);
- воздействие климатических факторов (ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, загрязненный воздух и т.п.);
- воздействие внешних факторов при использовании кондиционеров и обогревателей, а также при работе в помещениях с сухим воздухом, в пыльных или дымных (включая сигаретный дым) зонах, при работе с химикатами и т.п.;
- длительное управление автотранспортом;
- продолжительная работа за компьютером или просмотр телевизора;
- работа мастеров бьюти-индустрии, ювелира, или иное кропотливое занятие, связанное с большой нагрузкой на зрение и необходимостью концентрации;
- механическое повреждение глаз или последствия оперативного вмешательства;
- прием некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, и т.д.;
- перенесенные инфекционно-воспалительные и иные заболевания глаз;
- различные хронические заболевания, такие как ревматоидный артрит, диабет, заболевания щитовидной железы, астма и т.п.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Аллергическая реакция на какой-либо компонент средства.

Не применяйте RELINS ACTIVE при одновременном приеме терапевтических офтальмологических препаратов при воспалительных процессах и острых фазах заболеваний глаз, при поврежденных слизистых оболочках и роговицы глаза, а также сразу после проведения офтальмологических операций.

#### **Побочные эффекты**

Побочные эффекты не обнаружены.

#### **Возможные осложнения**

Аллергия, раздражение, зуд при индивидуальной непереносимости или несоблюдении инструкции по применению.

#### **Область применения**

Средство офтальмологическое увлажняющее RELINS ACTIVE может быть назначено или рекомендовано врачом-офтальмологом или специалистом по контактной коррекции для увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаз, в том числе при ношении всех видов контактных линз. Изделие предназначено для личного индивидуального использования как в домашних условиях, так и в лечебно-профилактических учреждениях, с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

#### **Предостережения**

Детям до 14 лет перед применением RELINS ACTIVE рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Данные об опыте применения RELINS ACTIVE женщинами в период беременности и лактации отсутствуют; назначение возможно только после консультации с врачом.

Не используйте RELINS ACTIVE при наблюдении неприятных ощущений в глазах в течение 15 минут после закапывания; при сохранении неприятных ощущений после прекращения использования обратитесь к врачу-офтальмологу.

При необходимости одновременного использования с лечебными глазными каплями или средствами ухода проконсультируйтесь с врачом.

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием RELINS ACTIVE и других средств. Используйте RELINS ACTIVE до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе.

Не используйте RELINS ACTIVE по истечении **90 дней после вскрытия флакона**.

Храните в недоступном для детей месте.

### Важная информация

RELINS ACTIVE не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (например, управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Непосредственно после закапывания средства RELINS ACTIVE возможно «затуманивание» зрения, которое проходит в течение 5-15 секунд. В этом случае следует дождаться распределения RELINS ACTIVE по поверхности глаза и стабилизации зрения.

### Указания по применению



Рекомендуется использовать RELINS ACTIVE по 1-2 капли в каждый глаз 3 раза в день или по мере необходимости.



RELINS ACTIVE закапывайте в чистые глаза, **без контактных линз** и, по возможности, без макияжа.



Перед использованием RELINS ACTIVE тщательно вымойте руки с мылом.



Снимите защитный колпачок с флакона и не касайтесь открытого кончика вставки-капельницы флакона.



Запрокиньте голову, оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх, и в промежуток, образовавшийся между веком и глазным яблоком (в середину конъюнктивальной полости), закапайте 1-2 капли RELINS ACTIVE.



Моргните несколько раз и медленно закройте глаза, чтобы RELINS ACTIVE равномерно распределилось по всей поверхности глаза.



В течение 15 минут не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.

Частота закапывания устанавливается индивидуально в зависимости от Ваших ощущений и/или согласно рекомендациям врача-офтальмолога или специалиста по контактной коррекции.

Не существует ограничений в отношении длительности применения RELINS ACTIVE.

В случае использования RELINS ACTIVE для комфортного надевания **жестких контактных линз** закапайте по 1 капле в каждую линзу и наденьте линзу согласно инструкции от производителя жестких контактных линз.

#### **Условия использования**

*В течение 15 минут после закапывания не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.*

RELINS ACTIVE может применяться в течение 90 дней после вскрытия флакона.

RELINS ACTIVE является изделием индивидуального применения, не допускается использование RELINS ACTIVE из одного флакона несколькими лицами.

#### **Условия хранения**

Храните RELINS ACTIVE в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +1 до +25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 °С).

#### **Условия эксплуатации и транспортирования**

RELINS ACTIVE могут эксплуатироваться при температуре от +10°C до +35°C, при относительной влажности воздуха не более 80 % (при 25 °С).

RELINS ACTIVE транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур от -5°C до +35°C, при относительной влажности воздуха не более 80%. Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия. Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделие должно быть выдержано в транспортной упаковке в нормальных условиях не менее 12 часов.

#### **Утилизация**

RELINS ACTIVE с истекшим сроком годности утилизируют путем разбавления водопроводной водой в десятикратном (1:10) размере и сливании в общую канализационную систему. Упаковку (первичную и потребительскую) утилизируют как бытовые отходы. Изделие относится к отходам класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

#### **Срок годности**

Срок годности RELINS ACTIVE - 2 (два) года с даты изготовления.

#### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

#### **Дезинфекция и очистка**

RELINS ACTIVE поставляется стерильным и не требует дополнительной дезинфекции или обработки.

#### **Гарантии производителя**

Производитель гарантирует сохранение всех свойств изделия и соответствие продукции техническим требованиям предприятия в течение всего срока годности (два года) с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

По вопросам, связанным с применением RELINS ACTIVE, обращайтесь к производителю.

#### **Форма выпуска**

RELINS ACTIVE в полимерных флаконах номинальным объемом 10 мл в потребительской упаковке с инструкцией по применению, размещенной на листке-вкладыше.

#### **Производитель**

ООО «Доктор Клаус», 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;

#### **Произведено**

Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д. 4-1.

**сайт:** [www.relinsvision.ru](http://www.relinsvision.ru); **e-mail:** [info@doctorklaus.by](mailto:info@doctorklaus.by); **тел./факс:** +375 17 51 139 51

**Страна производства:** Республика Беларусь

**Уполномоченный представитель в РФ**

ИП Васильев В.Н., 141033, РФ, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкрн. Поселок Пироговский, ул. Сазонова дом 5, квартира 171;

e-mail: [mir-zdorovia@rambler.ru](mailto:mir-zdorovia@rambler.ru); тел.+7 (498) 301 49 41.

---

## Расшифровка символов и обозначений, используемых при маркировке:



Температура хранения от +1 до +25 °C



Не использовать продукт, если упаковка повреждена или вскрыта (нарушена целостность защитного кольца крышки)




Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!



Избегать попадания прямых солнечных лучей



Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации

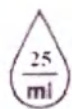


В 1 мл продукта около 25 капель



Не использовать продукт по истечении 3 месяцев после первого вскрытия флакона



Производитель

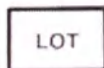

Номер партии



Дата окончания срока годности

Нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе при свидетельствовании подлинности подписи.

Город Минск, Республика Беларусь. Второе июля две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, нотариусом Минского городского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 20, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 27 марта 2014 г.) свидетельствую подлинность подписи директора Общества с ограниченной ответственностью “Доктор Клаус” Клауса Виталия Александровича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Клауса В.А., подписавшего документ, установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-669.

Взыскано нотариального тарифа 16 рублей.

Нотариус



Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью на 6 (шести) листах.


Нотариус



Для регистрации в РФ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Доктор Клаус»

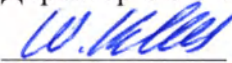 /Кlaus В. А./

«02»  2024 г.



Doctor  
Klaus

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению медицинского изделия**  
**Средство офтальмологическое увлажняющее**  
**RELINS THERAPY**

Регистрационное удостоверение в РФ:

**Назначение**

Средство офтальмологическое увлажняющее RELINS THERAPY (далее – RELINS THERAPY) предназначено для увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаз.

**Состав**

Декспантенол (2 %), натриевая соль гиалуроновой кислоты (0,15 %), борная кислота, натрия хлорид, борат натрия, ЭДТА динатриевая соль, поликватерниум-7, ПГМГ, вода очищенная. СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.

**Описание и принцип действия**

Средство RELINS THERAPY представляет собой стерильный изотонический боратный буферный раствор без запаха, прозрачный, бесцветный или желтоватый, без видимых механических включений.

*Увлажняющие, смазывающие и защитные свойства Средства RELINS THERAPY обусловлены входящей в его состав гиалуроновой кислотой (в виде её натриевой соли) и декспантенолом.*

В составе Средства RELINS используется натрия гиалуронат, который имеет меньший молекулярный размер по сравнению с гиалуроновой кислотой, что позволяет веществу легче проникать в ткани, равномерно распространяться по поверхности роговицы.

*Натрия гиалуронат* представляет собой полисахарид, обладающий выраженным свойством удерживать воду, что обеспечивает высокую степень увлажнения и смазывания поверхности роговицы. Гиалуроновая кислота входит в состав слезы, также является структурным компонентом стекловидного тела, конъюнктивы, слезной железы, где она удерживает влагу, сохраняя стабильность слезной пленки и защищая глаза от пересыхания.

*Декспантенол* является предшественником пантотеновой кислоты (провитамин B5), которая содержится во всех живых организмах и растениях. Декспантенол эффективно поддерживает увлажняющие свойства натрия гиалуроната, увлажняет, так как обладает высокой способностью связывать воду, обладает ухаживающими и успокаивающими свойствами.

При применении RELINS THERAPY на передней поверхности роговой оболочки глаза образуется равномерная тонкая пленка, предохраняющая глаз от пересыхания, надолго снимающая ощущение дискомфорта, сухости, усталости, рези и раздраженности глаз, которая не смывается при моргании и не вызывает снижения остроты зрения. Средство эффективно и быстро снимает эффект «сухого глаза» различной степени выраженности, а именно: устраняет ощущение инородного тела, жжения, рези в глазах, способствует снятию усталости при интенсивной зрительной нагрузке, устраняет дискомфорт при ношении всех видов контактных линз.

Постоянное и достаточное увлажнение передней поверхности глаза средством RELINS THERAPY способствует нормальному физиологическому течению процесса восстановления роговицы глаза после повреждений и травм различной этиологии и при реабилитации после хирургических вмешательств.

RELINS THERAPY совместимо со всеми видами жестких и мягких контактных линз и способствует их комфортному ношению, при этом *для закапывания не требуется предварительно снимать линзы.*

### **Показания к применению**

Средство RELINS THERAPY показано к применению для увлажнения глаз и устранения дискомфорта, вызванного механическим раздражением поверхности глаз при ношении контактных линз и снижением секреции слезных желез, а также:

- при синдроме «сухого глаза», сопровождающегося дискомфортом, сухостью, чувством инородного тела, жжением, раздражением, покраснением глаз;
- в качестве увлажняющего ухаживающего средства, способствующего ускорению восстановления роговицы после офтальмологических операций, а также после повреждений и травм различной этиологии;
- для снятия усталости при интенсивной зрительной нагрузке;
- при ношении всех видов контактных линз для снятия дискомфорта;
- для комфортного одевания жестких контактных линз.

### **Основные причины появления синдрома «сухого глаза»:**

- пониженный объем слезоточивости либо повышенное испарение влаги с поверхности глаз;
- ношение всех типов контактных линз;
- гормональные изменения у женщин (в ожидании ребенка, во время кормления его грудью, а также во время менструации, менопаузы и пост-менопаузы);
- старение (синдром «сухого глаза» наблюдается чаще всего у женщин после 40 лет, после 60 лет – приблизительно 75 % людей);
- воздействие климатических факторов (ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, загрязненный воздух и т.п.);
- воздействие внешних факторов при использовании кондиционеров и обогревателей, а также при работе в помещениях с сухим воздухом, в пыльных или дымных (включая сигаретный дым) зонах, при работе с химикатами и т.п.;
- длительное управление автотранспортом;
- продолжительная работа за компьютером или просмотр телевизора;
- работа мастеров бьюти-индустрии, ювелира, или иное кропотливое занятие, связанное с большой нагрузкой на зрение и необходимостью концентрации;
- механическое повреждение глаз или последствия оперативного вмешательства;
- прием некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, и т.д.;
- перенесенные инфекционно-воспалительные и иные заболевания глаз;
- различные хронические заболевания, такие как ревматоидный артрит, диабет, заболевания щитовидной железы, астма и т.п.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Аллергическая реакция на какой-либо компонент средства.

Не применяйте RELINS THERAPY при одновременном приеме терапевтических офтальмологических препаратов при воспалительных процессах и острых фазах заболеваний глаз, а также сразу после проведения офтальмологических операций.

### **Побочные эффекты**

Побочные эффекты не обнаружены.

### **Возможные осложнения**

Аллергия, раздражение, зуд при индивидуальной непереносимости или несоблюдении инструкции по применению.

### **Область применения**

Средство офтальмологическое увлажняющее RELINS THERAPY может быть назначено или рекомендовано врачом-офтальмологом или специалистом по контактной коррекции для увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаз, в том числе при ношении всех видов контактных линз. Изделие предназначено для личного индивидуального использования как в домашних условиях, так и в лечебно-профилактических учреждениях, с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

### **Предостережения**

Детям до 14 лет перед применением RELINS THERAPY рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Данные об опыте применения RELINS THERAPY женщинами в период беременности и лактации отсутствуют; назначение возможно только после консультации с врачом.

Не используйте RELINS THERAPY при наблюдении неприятных ощущений в глазах в течение 15 минут после закапывания; при сохранении неприятных ощущений после прекращения использования обратитесь к врачу-офтальмологу.

При необходимости одновременного использовании с лечебными глазными каплями или средствами ухода проконсультируйтесь с врачом.

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием RELINS THERAPY и других средств.

Используйте RELINS THERAPY до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе.

Не используйте RELINS THERAPY по истечении **90 дней после вскрытия флакона**.

Храните в недоступном для детей месте.

### **Важная информация**

RELINS THERAPY не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (например, управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Непосредственно после закапывания средства RELINS THERAPY возможно «затуманивание» зрения, которое проходит в течение 5-15 секунд. В этом случае следует дождаться распределения RELINS THERAPY по поверхности глаза и стабилизации зрения.

### **Указания по применению**



Рекомендуется использовать RELINS THERAPY по 1-2 капли в каждый глаз 3 раза в день или по мере необходимости.



Перед использованием RELINS THERAPY тщательно вымойте руки с мылом.



Снимите защитный колпачок с флакона и не касайтесь открытого кончика вставки-капельницы флакона.



Запрокиньте голову, оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх, и в промежуток, образовавшийся между веком и глазным яблоком (в середину конъюнктивальной полости), закапайте 1-2 капли RELINS THERAPY.



Моргните несколько раз и медленно закройте глаза, чтобы RELINS THERAPY равномерно распределилось по всей поверхности глаза.



В течение 15 минут не применяйте другие офтальмологические средства.

Частота закапывания устанавливается индивидуально в зависимости от Ваших ощущений и согласно рекомендациям врача-офтальмолога или специалиста по контактной коррекции.

Не существует ограничений в отношении длительности применения RELINS THERAPY.

В случае использования RELINS THERAPY для комфортного надевания **жестких контактных линз** закапайте по 1 капле в каждую линзу и наденьте линзу согласно инструкции от производителя жестких контактных линз.

#### **Условия использования**

*Для закапывания не требуется предварительно снимать линзы.*

RELINS THERAPY может применяться в течение 90 дней после вскрытия флакона.

RELINS THERAPY является изделием индивидуального применения; не допускается использование RELINS THERAPY из одного флакона несколькими лицами.

#### **Условия хранения**

Храните RELINS THERAPY в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от + 1 до + 25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 % (при 25 °С).

#### **Условия эксплуатации и транспортирования**

RELINS THERAPY может эксплуатироваться при температуре от + 10°С до + 35°С, при относительной влажности воздуха не более 80 % (при 25 °С).

RELINS THERAPY транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур от -5°С до +35°С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия. Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделие должно быть выдержано в транспортной упаковке в нормальных условиях не менее 12 часов.

#### **Утилизация**

RELINS THERAPY с истекшим сроком годности утилизируют путем разбавления водопроводной водой в десятикратном (1:10) размере и сливании в общую канализационную систему. Упаковку (первичную и потребительскую) утилизируют как бытовые отходы. Изделие относится к отходам класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

#### **Срок годности**

Срок годности RELINS THERAPY - 2 (два) года с даты изготовления.

#### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

#### **Дезинфекция и очистка**

RELINS THERAPY поставляется стерильным и не требует дополнительной дезинфекции или обработки.

**Гарантии производителя**

Производитель гарантирует сохранение всех свойств изделия и соответствие продукции техническим требованиям предприятия в течение всего срока годности (два года) с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

По вопросам, связанным с применением RELINS THERAPY, обращайтесь к производителю.

**Форма выпуска**

RELINS THERAPY в полимерных флаконах номинальным объемом 10 мл в потребительской упаковке с инструкцией по применению, размещенной на листке-вкладыше.

**Производитель**

ООО «Доктор Клаус», 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;

**Произведено**

Республика Беларусь. Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д. 4-1.

сайт: [www.relinsvision.ru](http://www.relinsvision.ru); e-mail: [info@doctorklaus.by](mailto:info@doctorklaus.by); тел./факс: +375 17 51 139 51

**Страна производства:** Республика Беларусь

**Уполномоченный представитель в РФ**

ИП Васильев В.Н., 141033, РФ, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкрн. Поселок Пироговский, ул. Сазонова дом 5, квартира 171;

e-mail: [mir-zdorovia@rambler.ru](mailto:mir-zdorovia@rambler.ru); тел.+7 (498) 301 49 41

---

## Расшифровка символов и обозначений, используемых при маркировке:



Температура хранения от +1 до +25 °C




Не использовать продукт, если упаковка повреждена или вскрыта (нарушена целостность защитного кольца крышки)




Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!



Избегать попадания прямых солнечных лучей

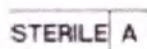

Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации

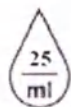


В 1 мл продукта около 25 капель



Не использовать продукт по истечении 3 месяцев после первого вскрытия флакона



Производитель

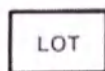

Номер партии



Дата окончания срока годности

См. также инструкцию по применению

Нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе при свидетельствовании подлинности подписи.

Город Минск, Республика Беларусь. Второе июля две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Таранова Татьяна Анатольевна, нотариусом Минского городского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 20, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 27 марта 2014 г.) свидетельствую подлинность подписи директора Общества с ограниченной ответственностью “Доктор Клаус” Клауса Виталия Александровича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Клауса В.А., подписавшего документ, установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-664.

Взыскано нотариального тарифа 16 рублей.

Нотариус



*Tar*

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью на 6 (шести) листах.

Нотариус

*Tar*

