



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул. Приорова, д. 10, телефон 450-39-11

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МЯГКОЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ВРОЖДЕННЫХ ВЫВИХОВ БЕДРА У НОВОРОЖДЕННЫХ
(типа Павлика)

Паспорт

985.00.00



ИМ 26

Приспособление мягкое предназначается для лечения врожденных вывихов бедра у детей в возрасте от 2 до 12 месяцев. Приспособление служит для удержания конечностей в согнутом и отведенном положении.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Мягкое приспособление изготавливается из кожи юфть с замшевой подкладкой.
- 1.2. Длина приспособления (по поясу) в развернутом виде:
 - малого — 460 (± 5) мм;
 - большого — 660 (± 5) мм.
- 1.3. Средний срок службы — 1 год.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- приспособление мягкое для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных большое ;
- приспособление мягкое для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных малое ;
- паспорт — 1 экз.

Примечание: приспособления могут поставляться в любой комплектации по согласованию с заказчиком.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 3.1. Провести внешний осмотр изделия.
- 3.2. Перед применением и в процессе дальнейшего использования приспособление должно подвергаться санитарной обработке методом протирки дезинфицирующими растворами.

4. ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Мягкое приспособление для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных состоит из пояса с крестообразными помочами и стремян.

4.2. На ребенка приспособление надевается в лежачем положении: вначале надевают пояс и крестообразные помочи так, чтобы они перекрещивались сзади, а затем застегивают пояс. После этого на ножки ребенка надевают стремяна. Стремяна надевают на всю конечность и укрепляют на голени с помощью двух манжеток.

Перед закреплением стремян к поясу ножкам ребенка придается положение сгибания и отведения в тазобедренном суставе и сгибания в коленном суставе.

При таком положении конечностей стремяна с помощью двух ремней пристегиваются к поясу.

Степень сгибания и отведения в тазобедренном суставе регулируется лечащим врачом в результате подтягивания стремян к поясу. При необходимости увеличить сгибание бедра подтягивается внутренний ремешок, при необходимости большего отведения — наружный. Приспособление может быть использовано для постепенного выведения конечности из положения сгибания и отведения при вправлении врожденных вывихов бедра в гипсовой повязке.

Прежде чем приступить к лечению врожденного вывиха бедра с помощью мягкого приспособления, необходимо устранить контрактуру в тазобедренном суставе с помощью гимнастических упражнений. Мягким приспособлением для лечения врожденных вывихов бедра дети должны пользоваться от пяти до шести месяцев, а затем, на основании клинических данных и рентгенограмм, подтверждаю-

щих полное вправление вывиха, в течение месяца приспособлением пользуются только в ночное время, после чего его снимают окончательно.

4.3. Медицинский персонал и родители обучаются пользованию этим приспособлением, поэтому уход за детьми во время лечения не вызывает у них никаких затруднений.

5. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

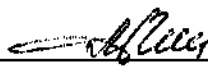
5.1. Приспособления упакованы на ФГУП «ЦИТО» Росздрава для условий хранения 2(С): ВЗ-0, ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

5.2. Приспособления должны храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от 0°C до +25°C в упаковке предприятия-изготовителя или без упаковки.

5.3. Воздух помещения, в котором хранятся приспособления, должен содержать нормальную влажность и не иметь коррозионно-активных примесей.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Приспособление мягкое для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных (типа Павлика)» соответствует требованиям ТУ 9396-138-01894927-2005 и признано годным для эксплуатации.

Подпись _____ 

Штамп 

Дата « 1 » 10 2010 г.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приспособления требованиям ТУ 9396-138-01894927-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 9 месяцев; гарантийный срок хранения—2 года.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1. В случае обнаружения дефектов, а также некомплектности поставки при первичной приемке, заказчик должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

125299, Москва, ул. Приорова, 10, ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России,

факс: (495) 450-41-86 — круглосуточно

тел: (495) 450-39-11— отдел сбыта

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

Восток прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью



3) лист(ов)

Генеральный директор
С.Н. Булгаков