

Код 10.10.010

ПЛАНТОГРАФ



Паспорт
400.64.00.00 ПС



Москва – 2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Плантограф предназначен для изображения отпечатка стопы и определения нагрузочных площадок сводов с целью диагностирования их патологических или анатомических отклонений от нормы при изготовлении ортопедической обуви и стелек.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основание плантографа изготавливается из стекла органического по ГОСТ 17622 или поликарбоната по ТУ6-19-113, окантовка рамки – из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949, крепежные винты – из углеродистой конструкционной стали по ГОСТ 1050 с никелевым покрытием, а заклепки вытяжные по ГОСТ Р ИСО 15974 - из алюминиевого сплава по ГОСТ 4784.

Мембрана плантографа изготавливается из полиэтилентерефталатной пленки ПЭТ электроизоляционной по ГОСТ 24234 и трикотажной ткани с клеевым покрытием.

2.2 Плантограф выпускается в двух вариантах:

- плантограф (малый),
- плантограф (большой).

2.3 Плантограф предназначен для длительного использования без замены мембран.

2.4 Габаритные размеры – не более 440х375х19,7 мм для большого и 400х290х19,7 для малого.

2.5 Масса плантографа – не более 2,1±0,1 кг для большого и не более 1,8±0,1 кг для малого.

2.6 Средний срок службы – не менее 1 года.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входят:

3.1.1 Плантограф (большой) по ТУ 9452-160-01894927-2005:

- плантограф (большой) – 1 шт.;
- валик с емкостью для краски – 1 шт.;
- флакон краски штемпельной – 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 экз.;
- этикетка – 1 экз.

3.1.2 Плантограф (малый) по ТУ 9452-160-01894927-2005:

- плантограф (малый) – 1 шт.;
- валик с емкостью для краски – 1 шт.;
- флакон краски штемпельной – 1 шт. (при необходимости);
- паспорт – 1 экз.;
- этикетка – 1 экз.

Примечание: Допускается исключение из комплекта поставки флакона краски штемпельной.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Провести расконсервацию комплекта, его осмотр и проверку комплектности согласно п. 3.

4.2. Между рамкой и тканью для каждого больного должен вкладываться чистый лист бумаги (лучше – белой) размерами 40×30 см.

4.3. При помощи валика (или губки) на полотно должен быть нанесен слой типографской или штемпельной краски.

4.4. Перед каждым использованием плантографа и в процессе дальнейшей эксплуатации поверхность пленки плантографа должна быть подвергнута дезинфекции методом двукратной протирки салфеткой, смоченной трехпроцентным раствором перекиси водорода (при температуре не менее +18°C) и с интервалом между протирками – 15 минут по МУ 287-113.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Плантограф устанавливают около больного. Больной усаживается и ставит свои стопы на пленку по оси плантографа. После этого больному разрешают медленно подняться (не сходя с места) с равномерным упором на обе стопы. В таком положении производится обвод стопы карандашом. Больной опять медленно усаживается и убирает ноги с пленки. Затем открывают рамку плантографа и извлекают лист бумаги с отпечатком стопы.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИИ

6.1. Плантограф упакован для условий хранения 2(С): ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-4 по ГОСТ 9.014.

6.2. На время хранения плантограф должен быть уложен в упаковку предприятия-изготовителя и храниться в закрытых помещениях при температуре от +2°C до +25°C в упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации может храниться без упаковки.

6.3. Воздух помещения, в котором храниться плантограф, должен содержать нормальную влажность и не иметь коррозионно-активных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Плантограф» соответствует требованиям ТУ 9452-160-01894927-2005 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата «_____» _____ 20 г.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9452-160-01894927-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации плантографа – 6 месяцев со дня реализации; гарантийный срок хранения – 1 год.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

9.1. В случае обнаружения дефектов, а также некомплектности поставки при первичной приемке, заказчик должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

- ФГУП «ЦИТО» 127299, г. Москва, ул. Приорова, д.10, стр. 7

телефон (495) 280-06-43

- адрес производства ФГУП «ЦИТО»: 127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 37, корп.1

телефон: (495) 280-06-43, (495) 280-06-49

9.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Плантограф после окончания срока службы и (или) эксплуатации подлежат утилизации в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 (класс опасности А).

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 5
(нет) листа (ов)

Помощник ген. директора

О. В. Рождественская

