

Код 04.04.012

**Устройство – рама продольная прикроватная
для ранней разработки движений в суставах нижних конечностей при
различных видах травм, проведения горизонтального
скелетного вытяжения и других процедур УРП-«ЦИТО»**



**Паспорт
400.42.00.00 ПС**



Москва – 2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

«Устройство-рама продольная прикроватная для ранней разработки движений в суставах нижних конечностей при различных видах травм, проведения горизонтального скелетного вытяжения и других процедур УРП-«ЦИТО» (далее «рама») предназначено для ранней активизации больных в постели при различных видах травм, для вертикального и горизонтального скелетного вытяжения, а также в послеоперационном периоде у больных общехирургического профиля. При оснащении дополнительными приставками раму можно использовать для противопрележного вывешивания больных со спинальной травмой. Применение комплекта поясов и гамаков дает возможность проводить консервативное лечение больных с переломами костей таза.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные детали рамы изготовлены либо из конструкционной стали с никелевым защитным покрытием (исп. С), либо из нержавеющей стали (исп. Н).

2.2. Габаритные размеры: стойки – Ø 33,5 x 1484 (мм);
продольной штанги – Ø 33,5 x 2400 (мм).

2.3. Масса рамы не более 17 кг.

2.4. Допускаемая нагрузка в середине продольной штанги на одну подвеску с роликом не более 60 кг.

2.5. Средний срок службы – 3 года.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- держатель – 4 шт.
- стойка с винтом фиксирующим – 2 шт.
- подвеска с роликом и винтом крепления – 3 шт.
- штанга продольная – 1 шт.
- паспорт – 1 экз.
- этикетка – 1 шт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Провести расконсервацию комплекта.

4.2. Провести осмотр и проверить комплектность согласно п.3.

4.3. Перед применением и в процессе дальнейшей эксплуатации раму необходимо подвергнуть санитарной обработке дезинфицирующим раствором.

5. УСТРОЙСТВО

5.1. Конструктивно рама содержит две стойки, продольную штангу, опорные муфты и подвески с роликами, которые фиксируются установочными винтами. Стойки имеют узлы крепления (держатели) к спинкам кровати.

5.2. Для установки рамы первоначально на спинки кровати крепятся две вертикальные стойки за счёт двух держателей (соответственно за верхнюю и нижнюю перекладины спинок). На закреплённые стойки надеваются опорные муфты и крепятся на требуемой высоте с помощью установочных винтов. Продольная штанга с укреплёнными на ней блоками вставляется в закреплённые муфты. Стойки регулируются по высоте. Подвески с роликами устанавливаются в требуемом положении и фиксируются. После регулировки все узлы необходимо затянуть винтами.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации рамы необходимо регулярно проверять надежность крепления стоек к спинкам кровати и продольной штанги в стойках, а также подвесок с роликами на продольной штанге. В случае выявления недостатков крепёж следует подтянуть.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При появлении прогибов продольной штанги и стоек, необходимо ослабить крепёж и повернуть их на 180°. Установить, и опять затянуть винтами.

8. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИИ

8.1. Рама упакована для условий хранения 2(С): ВЗ-0, ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

8.2. Рама в разобранном виде должна храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации может храниться без упаковки.

8.3. Воздух помещения, в котором хранится рама, должен иметь нормальную влажность и не содержать коррозионно-активных примесей.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

«Устройство-рама продольная прикроватная для ранней разработки движений в суставах нижних конечностей при различных видах травм, проведения горизонтального скелетного вытяжения и других процедур УРП-«ЦИТО» соответствует требованиям ТУ 9452-164-01894927-2003 и признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата «____» _____ 20 ____ г.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие рамы требованиям ТУ 9452-164-01894927-2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения – 3 года.

10.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

11. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

11.1. Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

127299, Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7. ФГУП «ЦИТО».

Факс/тел. (495) 450-41-86 (круглосуточно), тел. (495) 450-28-52.

Факс/тел. (499) 153-87-64 и тел. (495) 450-39-11 – отдел сбыта.

11.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Рама после окончания срока службы и (или) эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 (класс опасности Б).

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4

1 листа (ов)

Генеральный директор

В.С.Спектор



В.С.Спектор