



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул. Приорова, д.10, телефон 450-39-11

д 01.08.200

ДИСТРАКТОР ТИТАНОВЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ РЕПОЗИЦИИ И ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ОСТЕОСИНТЕЗА ДТО — «ЦИТО»

Инструкция по эксплуатации
38797МЛЖК063.00.00ПС



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Дистрактор титановый для открытой и закрытой репозиции и временной фиксации костных отломков при операциях остеосинтеза Д_тО-«ЦИТО» (далее — дистрактор) предназначен для репозиции и временной фиксации костных отломков при операциях остеосинтеза закрытого типа. Дистрактор комплектуется ключом специальным (далее — ключ).

1.2. Дистрактор предназначен для применения в клинических отделениях стационарных специализированных лечебных учреждений, а также в травматологических и ортопедических отделениях многопрофильных больниц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Дистрактор и ключ выполнены из титанового сплава ВТ6 по ГОСТ 19807-91.

2.2. Развод штанг дистрактора:

- минимальный — 40 мм;
- максимальный — 500 мм.

2.3. Масса дистрактора — $0,824 \pm 0,02$ кг.

2.3.1. Масса ключа — $0,078 \pm 0,01$ кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки включает в себя:

Дистрактор (в сборе) — 1 шт.

Комплекующие:

Ключ специальный — 1 шт.

Эксплуатационная документация:

Паспорт — 1 экз.;

Этикетка — 1 экз.

4. ОПИСАНИЕ

Дистрактор представляет собой разборную конструкцию, снабженную двумя параллельными передвижными штангами: несущей и дополнительной. Штанги устанавливаются в обойме с необходимым межосевым расстоянием. Штанги имеют изогнутую форму и каждая снабжена держателем с фиксатором, в которых и устанавливаются стержни Шанца для осуществления открытой или закрытой репозиции и фиксации костных отломков. Для установки стержней используется специальный ключ с профильными зевами для всех типов хвостовиков стержней Шанца.

22

5.2. Перед применением дистрактор и ключ должны быть подвергнуты дезин-
ти, предстерилизационной очистке и стерилизации по МУ 287-113.

«Дистрактор титановый для открытой и закрытой репозиции и временной фиксации костных отломков при операциях остеосинтеза ДТО-«ЦИТО» соответствуют требованиям технических условий ТУ 9438-158-01894927-2003 и признан годным для эксплуатации.

О.Т.В.

Подпись лица, ответственного за приемку Алекс

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и паспортом.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены невосстанавливаемых изделий.

8.1. Комплект подвергнут консервации по ГОСТ 9.014 для условий хранения 2(С) вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1.

8.2. Дистрактор следует хранить в закрытом помещении при температуре воздуха от -50° до +40 °С в упаковке предприятия-изготовителя. В условиях эксплуатации допускается хранение без упаковки.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать коррозионно-активных примесей.

8.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

