



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул. Приорова, д.10, телефон 450-39-11

СЕТКА-ТРАНСПОРТИР МЕДИЦИНСКАЯ

Паспорт
401.82.00.00ПС



ИМ 13

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Сетка-транспортир медицинская предназначена для угловых и линейных измерений суставов при заболеваниях и последствиях травм суставов у детей и взрослых по рентгенограммам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Сетка-транспортир медицинская обеспечивает измерение углов в суставах от 0° до 180° .

2.2. Габаритные размеры сетки-транспортира:

- длина 295 ± 5 мм,
- ширина 167 ± 5 мм,
- толщина $1,6 \pm 0,1$ мм.

2.3. Сетка-транспортир изготовлена из стекла органического по ГОСТ 15809 или поликарбоната по ТУ 6-19-113-87.

2.4. Масса сетки-транспортира составляет $0,093 \pm 0,001$ кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В каждый комплект поставки сетки-транспортира медицинской входят:

- сетка-транспортир — 1 шт.;
- паспорт с инструкцией по эксплуатации — 1 экз.;
- этикетка — 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО (см. рисунок)

4.1. Сетка-транспортир состоит из основания, на котором наклеена шкала с делениями от 0° до 90° и от 90° до 0° с ценой деления 5° , а также сетка линейных делений от 0 до 40 мм с це-

ной деления 5 мм. На поле сетки-транспортира располагается информация о предприятии-изготовителе.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Провести расконсервацию и осмотр изделия.

5.2. Проверить комплектность согласно п.3 настоящего паспорта.

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1. Сетка-транспортир накладывается на рентгенограмму и по ней производится определение углов и линейных величин, характеризующих развитие проксимального отдела бедра, вертлужной впадины и их взаимосвязь у детей с патологией развития.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сетка-транспортир соответствует требованиям
ТУ 9452-162-01894927-2005 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата “___” _____ 200__ г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 6 месяцев при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 3 года.

8.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня получения продукции потребителем.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

8.4. Предприятие не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

9.1. Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

127299, Москва, ул. Приорова, 10,

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО»,

факс/тел. (095) 450-41-86 (круглосуточно),

тел. 450-39-11 (отдел сбыта).

10. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Изделие должно храниться в закрытых помещениях при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.