



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул. Приорова, 10 тел 450-39-11 факс 450-41-86

КАМЕРА
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ

Паспорт
2529.20.00ПС

Камера дезинфекционная предназначена для дезинфекции хирургических инструментов и других медицинских принадлежностей по параформалиновому методу.

1. Технические данные

1.1. Камера изготовлена из стекла органического марки СТ-1 ГОСТ 10667-90 следующих типоразмеров:

Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
250x250x200	6,5
400x400x300	11,8
500x500x300	18,9
500x600x400	22,5
600x400x400	20,3
600x500x400	22,5
600x500x500	26,4
500x800x400	28,3

1.2. Средний срок службы — 5 лет.

2. Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

— камера дезинфекционная — шт.

— паспорт — 1 экз.

3. Подготовка к работе

3.1. Проверить плотность посадки крышки на корпус камеры.

3.2. Перед применением провести дезинфекцию камеры в соответствии с МУ 287-113.

4. Описание и методика применения

Камера представляет собой прямоугольную емкость с двойным дном и плотно прилегающей крышкой. На дно камеры насыпают сухой формалин (параформ)) в количестве 200—300 г и накрывают вторым дном, имеющим ряды отверстий для выхода паров формалина. На второе дно укладывают инструменты и накрывают камеру крышкой. Стерилизация должна продолжаться не менее 6 часов.

5. Требования безопасности

Для защиты от вредного воздействия паров формалина в процессе эксплуатации камеру необходимо плотно закрывать крышкой и производить работу в условиях местной вытяжной системы (вытяжной шкаф).

6. Свидетельство о приемке

«Камера для дезинфекции хирургических инструментов» соответствует требованиям ТУ 9451-154-01894927-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата «__» _____ 200__ г.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям ТУ 9451-154-01894927-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

7.4. Предприятие не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

8. Консервация и хранение

8.1. Камера предназначена для хранения в условиях 2(С) по ГОСТ 9.014-78.

8.2. Камера должна храниться в закрытых помещениях при температуре от +2 °С до +25 °С.

8.3. Воздух помещения, в котором хранится камера, не должен иметь коррозионно-активных примесей.

