

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

ТУТОР НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ДИНАМИЧЕСКИЙ «ЭЛАСТОСТОП «ЦИТО» (ТУТОР-СТОПОДЕРЖАТЕЛЬ)

ТН0-24Ц75ПП

Тутор на голеностопный сустав динамический «Эластостоп «ЦИТО» ТН0-24Ц75ПП является протезно-ортопедическим изделием, выпускаемым по стандартным размерам. Тутор представляет собой подошву, соединенную с икроножным фиксатором посредством шины пружинящей. Для изготовления туторов применяются полимерные композиционные материалы.

Используемый материал позволяет проводить гигиеническую обработку внутренней и наружной поверхностей изделия мыльным раствором или другими бытовыми дезинфицирующими средствами с последующим обтиранием насухо.

При пользовании тутор не должен вызывать болевых ощущений и избыточного давления на конечность, затрудняющего кровообращение.

Тутор рекомендуется одевать на хлопчатобумажный чулок.

НАЗНАЧАЕТСЯ при вялых параличах и парезах стопы различной этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАН при наличии эквиноварусной или вальгусной деформаций стопы, рекурвации голени.

ВНИМАНИЕ Контроль соответствия и подгонку ортопедического изделия с учетом медицинских показаний, а также инструктаж по пользованию, проверка степени освоения эксплуатации тутора пациентом проводится врачом ортопедом-протезистом при назначении изделия и на контрольных осмотрах.

При выявлении дефектов или при выходе тутора из строя (или других возникших неполадках) необходимо обратиться на предприятие, выдавшее изделие, с предъявлением самого изделия и перечня претензий для устранения дефектов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОНКА И РЕМОНТ ТУТОРА ЗАПРЕЩЕНЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня выдачи изделия.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52396-177-01894927-2010.

Изделие безопасно при применении по назначению.

Дата выдачи изделия «» 20 г.
М.П.

