



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, г. Москва, ул. Приорова, 10 тел. 450-39-11

код 06.01

**ШИНА ОТВОДЯЩАЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ
ВЫВИХОВ БЕДРА У НОВОРОЖДЕННЫХ
(шина ЦИТО)**

Паспорт



Отводящая шина для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных предназначена для лечения врожденных вывихов бедра у детей в возрасте от 2 до 12 месяцев. Шина служит для удержания конечностей в согнутом и отведенном положении.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Шина изготавливается из плотной хлопчатобумажной ткани.
- 1.2. Габаритные размеры шины в развернутом виде:
 - малая — 530×660 (±6) мм;
 - большая — 600×820 (±8) мм.
- 1.3. Средний срок службы — 1 год.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- отводящая шина для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных малая
- отводящая шина для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных большая
- паспорт — 1 экз.

Примечание: шины могут поставляться в любой комплектации по согласованию с заказчиком.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 3.1. Провести внешний осмотр изделия.
- 3.2. Перед применением и в процессе дальнейшего использования шина должна подвергаться санитарной обработке методом ручной стирки с применением СМС.

4. ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Отводящая шина для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных состоит из комбинезона и мягкой пластмассовой распорки с закругленными сбоку краями.

По внутренней стороне шины пришита детская клеенка. Снаружи в области промежности в комбинезоне имеется карман, в котором располагается распорка. Распорка винтом фиксируется к комбинезону. В нижней части комбинезона по наружной поверхности поперечно пришиты бретельки, которые спереди застегиваются на пуговицы, имеющиеся на краю комбинезона. Помимо этого к комбинезону продольно пришиты бретельки, которые проходят через область надплечья и тоже застегиваются на пуговицы, пришитые спереди к верхнему краю комбинезона.

4.2. На ребенка шина надевается в лежачем положении так, чтобы распорка находилась в области промежности.

Ножкам ребенка придают положение сгибания и отведения в тазобедренном суставе, а затем застегивают комбинезон.

Для лечения врожденных вывихов бедра у детей шиной должны пользоваться в течение пяти—шести месяцев, а затем на основании клинических данных и рентгенограмм, подтверждающих полное вправление вывиха в течение месяца шиной пользуются только в ночное время, после чего ее снимают окончательно.

4.3. Медицинский персонал и родители легко обучаются пользованию этой шиной, поэтому уход за детьми во время лечения не вызывает у них никаких затруднений.

5. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Шины упакованы на ФГУП «ЦИТО» для условий хранения 2(С): ВЗ-0, ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

5.2. Шины должны храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от 0°C до +25°C в упаковке предприятия-изготовителя или без упаковки.

5.3. Воздух помещения, в котором хранятся шины, должен содержать нормальную влажность и не иметь коррозионно-активных примесей.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Отводящая шина для лечения врожденных вывихов бедра у новорожденных (шина ЦИТО)» соответствует требованиям ТУ 9396-138-01894927-2005 и признано годным для эксплуатации.

Подпись _____

Штамп ОТК

Дата «____» _____ 200 г.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шины требованиям ТУ 9396-138-01894927-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 9 месяцев; гарантийный срок хранения—2 года.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1. В случае обнаружения дефектов, а также некомплектности поставки при первичной приемке, заказчик должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

127299, Москва, ул. Приорова, 10,

ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России,

факс: (495) 450-41-86 — круглосуточно

тел: (495) 450-39-11— отдел сбыта

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.