

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Компания «АСК»



**Руководство по эксплуатации
ОКПн.00.00.РЭ.01**

**Набор мебели медицинской
по ТУ 9452-003-68690950-2012**

2024

Версия 2.1

Оглавление

Введение.....	3
1. Наименование, назначение и область применения медицинского изделия.....	3
2. Показания для применения медицинского изделия.....	4
3. Противопоказания для применения медицинского изделия.....	4
4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.....	4
5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.....	4
6. Рекомендации по эксплуатации.....	4
7. Технические характеристики.....	5
8. Комплектность медицинского изделия.....	7
9. Подготовка к работе и порядок работы с медицинским изделием.....	11
10. Техническое обслуживание медицинского изделия.....	12
11. Упаковка медицинского изделия.....	12
12. Маркировка медицинского изделия. Символы и знаки.....	12
13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.....	13
14. Гарантии изготовителя.....	14
15. Утилизация.....	14
16. Срок службы (годности) медицинского изделия.....	15
17. Сведения о производителе медицинского изделия.....	15
18. Перечень основных применяемых национальных стандартов.....	15
Приложение А.....	16
Основные параметры и конструктивные особенности медицинских изделий, входящих в наборы.....	16
Приложение Б.....	21
Перечень изделий, входящих в наборы, специфичное назначение и информация о потенциальных потребителях.....	21
Приложение В.....	23
Общий вид изделия.....	23

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации является эксплуатационным документом, включающим в себя описание, основные технические данные и правила эксплуатации медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012» (в дальнейшем – набор, мебель, изделие).

Набор мебели медицинской представлен следующими изделиями:

- тумба медицинская;
- стол прикроватный;
- стол инструментальный;
- стол манипуляционный;
- шкаф для медикаментов;
- шкаф;
- кушетка медицинская смотровая;
- кушетка медицинская физиотерапевтическая;
- ширма.

Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

1. Наименование, назначение и область применения медицинского изделия

Наименование медицинского изделия: «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Набор имеет следующие исполнения:

I. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов, в составе*:

- кушетка медицинская смотровая – 1 шт.
- шкаф – 1 шт.
- тумба медицинская – 1 шт. (при необходимости)
- стол инструментальный – 1 шт. (при необходимости)
- стол манипуляционный – 1 шт. (при необходимости)
- шкаф для медикаментов – 1 шт. (при необходимости)
- кушетка медицинская физиотерапевтическая – 1 шт. (при необходимости)
- ширма – 1 шт. (при необходимости).

II. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат, в составе*:

- тумба медицинская – 1 шт.
- шкаф – 1 шт.
- стол прикроватный – 1 шт. (при необходимости)
- ширма – 1 шт. (при необходимости).

Примечание: *-полное наименование изделий набора с указанием исполнений, их состава и перечня прилагаемой эксплуатационной документации приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Каждое изделие, входящее состав наборов, представлено вариантами исполнений.

Назначение медицинского изделия: «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012» предназначен для оснащения медицинских кабинетов и палат в лечебно-профилактических учреждениях:

- для размещения и хранения медицинских расходных материалов, медицинских инструментов, медикаментов, медицинских приборов и аппаратов при проведении медицинских осмотров, процедур и манипуляций;
- для размещения пациентов при проведении медицинских осмотров, процедур и манипуляций.

Назначение вариантов исполнения набора соответствует общему назначению медицинского изделия применительно к кабинетам или палатам соответственно.

Специфичное назначение изделий, входящих в наборы, указано в таблице Б1 приложения Б.

Потенциальный потребитель - медицинский работник, пациент (см. таблицу Б1 Приложения Б).

Область применения - процедурные, перевязочные, смотровые, диагностические и терапевтические кабинеты, больничные и реанимационные палаты медицинских организаций.

2. Показания для применения медицинского изделия

- Применять согласно назначению. Применять в медицинских целях. Применять в медицинских организациях.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия

- Не выявлены.
- При эксплуатации изделий не допускается превышать допустимые нагрузки.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

- Не выявлены.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

- Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами;
- Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить;
- Не использовать как опору и средство транспортировки (применимо для стола прикроватного).
- Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.
- Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур;
- Не допускайте раскачивания изделия;
- Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания;
- Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- Загрузку шкафа (при наличии в наборе) следует осуществлять таким образом, чтобы наибольший вес груза приходился на нижние полки. Закрепите шкаф к стене для исключения риска опрокидывания в случае несоблюдения рекомендаций по загрузке.
- Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 12 настоящего руководства по эксплуатации.

6. Рекомендации по эксплуатации

- Рекомендуется проводить регулярную санитарную обработку дезинфицирующими средствами по МУ-287-113 3%-ым раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ым раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003 без использования абразивных средств и воздействий.
- Шкафы, тумбы медицинские, шкафы для медикаментов применять в соответствии с назначением, в том числе для обеспечения специальных условий хранения медицинских изделий и лекарственных средств, требующих хранения в «темном месте», защищенном от воздействия света, в том числе от воздействия ультрафиолетового излучения, присутствующем в солнечном свете, а также применяемым при проведении обязательных периодических обеззараживаний медицинских помещений методом «кварцевания» с использованием открытых светильников с УФ-лампами.

7. Технические характеристики

Изделия набора соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371 (в части пп. 5.2.4-5.2.8, 5.2.10, 5.2.19-5.2.21, 5.2.24, 5.2.26-5.2.31, 5.3.1-5.3.3, 5.3.5, 5.4.1.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.6-5.5.10, 8.1, 8.2), ГОСТ 19917 (в части пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.5.2, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.8, 5.2.10.5, 5.2.11, 5.2.11.1, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.18, 5.3.1-5.3.4), ТУ 9452-003-68690950-2012 и комплекту конструкторской документации.

Покупные изделия имеют сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие нормативным документам, распространяющимся на них.

Габаритные размеры, масса, конструктивные особенности изделий, входящих в состав наборов, приведены в таблице А1 Приложения А. Основные параметры принадлежностей и/или изделий, входящих в состав тумб медицинских согласно комплектности приведены в таблице А2 Приложения А.

Общий вид исполнений изделий, входящих в наборы, представлен в приложении В.

Применяемые материалы безопасны и не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

Наружные поверхности изделия не имеют вмятин, царапин, трещин, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов. На рабочей поверхности столов, тумб, облицованных синтетическим декоративным материалом, не имеется стыков облицовки.

Изделия выдерживают нагрузку массой согласно таблицам А1 и А2 Приложения А.

Двери шкафов и тумб открываются и закрываются плавно, без перекосов с усилием не более 10 Н.

Зазоры в проемах на сторону для дверей и наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем, не превышают 5 мм.

Замки на дверцах шкафов, ящиках неподвижно и прочно закреплены, обеспечивают их легкое отпирание и запирание. Замки обеспечивают плотное прилегание дверей к корпусу шкафа и ящика.

Дверцы тумбочек, шкафов без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Выдвигание ящиков (при наличии) осуществляется по роликовым направляющим или по телескопическим направляющим плавно, без заеданий и перекосов.

Усилие выдвигания ящиков (при наличии) - не более 10 Н.

Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

Изделие установлено на опоры, согласно таблице 1, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 1.

№	Наименование изделия	Обозначение исполнений	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые ножки	Нерегулируемые ножки
1	2	3	4	5	6
1	Тумбы медицинские	ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	50	-	-
2	Тумбы медицинские	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00	-	+	-
3	Тумба медицинская	ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	50	-	-
4	Тумба медицинская	ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01	-	+	-
5	Стол прикроватный	СН.01.00; СН.02.00	50	-	-
6	Стол инструментальный	СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00	50	-	-
7	Стол манипуляционный	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03	100	-	-
8	Шкаф для	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01;	-	+	-

№	Наименование изделия	Обозначение исполнений	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые ножки	Нерегулируемые ножки
1	2	3	4	5	6
	медикаментов	ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.01.01; ШСС.02.01			
9	Шкаф	ШК.37.02; ШК.36.00	-	+	-
10	Кушетка медицинская смотровая	КМС.01.00; КМС.02.00	-	-	+
11	Кушетка медицинская физиотерапевтическая	КМФ.01.00	-	-	+
12	Ширма*	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	50	-	+

* - каждая секция изделия имеет 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору.

Зазор между одной из опор и поверхностью пола – не более 3 мм.

Передвижение на колесных опорах по горизонтальной поверхности осуществляется без заеданий. Колеса вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания от усилия не более 0,35 кгс.

Тормозные устройства установлены на не менее чем 2-х колесных опорах изделия. Усилие включения тормоза колес – не более 150 Н.

Усилие, необходимое для передвижения изделий по горизонтальному бесшовному каменному полу с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой - не более указанного в таблице 2, при этом колеса должны быть ориентированы в направлении движения. Усилие трогания с места - не более указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой при приложении усилия, указанного в таблице 2, не смещаются.

Таблица 2.

Масса изделия (с учетом нагрузки) (см. приложение А)	Усилие перемещения, не более, Н	Усилие трогания, не более, Н	Усилие смещения при заторможенных колесных опорах, не менее, Н
менее 50 кг	35	60	115
50 - 100 кг	65	125	235

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия изделий выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2. Наружные поверхности изделий имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI класса по ГОСТ 9.104.

Цвет лакокрасочных покрытий элементов изделий набора - одного цветового ряда.

Наружные поверхности изделий набора устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3%-ым раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ым раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

Изделия набора при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Изделия набора при транспортировании устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5. Изделия при хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 2.

Изделия набора, установленные на колесные опоры, при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям, обладают вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

Изделия, упакованные в транспортную упаковку, устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладают вибропрочностью и ударопрочностью, сохраняют работоспособность после механических воздействий при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 50444.

8. Комплектность медицинского изделия

Комплект поставки набора мебели соответствует указанному в таблицах 2.1, 2.2.

Состав набора, варианты исполнений изделий в наборе, количество изделий в наборе, определяются по требованию.

Таблица 2.1. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012», исполнения «Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
-	Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов, в составе:	АСК.003.00012.100	1
1	Кушетка медицинская смотровая, варианты исполнения:		1
1.1	КМС.01.00; КМС.02.00, в составе:	КМС.01.00; КМС.02.00	-
1.1.1	Кушетка медицинская смотровая		1
1.1.2	Паспорт	КМС.00.00.ПС.01	1
2	Шкаф, варианты исполнения:		1
2.1	ШК.37.02; ШК.36.00, в составе:	ШК.37.00; ШК.37.01; ШК.37.02; ШК.36.00; ШМО.01.00; ШМО.02.00; ШМО.03.00	-
2.1.1	Шкаф		1
2.1.2	Паспорт	ШК.00.00.ПС.01	1
3	Тумба медицинская, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *
3.1	ТМ.01.00, в составе:	ТМ.01.00	-
3.1.1	Тумба медицинская		1
3.1.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.1.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.1.4	Принадлежности:	-	-
3.1.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
3.1.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	2 (при необходимости) *
3.1.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
3.2	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00, в составе:	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	-
3.2.1	Тумба медицинская		1
3.2.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.2.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.2.4	Принадлежности:	-	-
3.2.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
3.2.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *
3.2.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *

Продолжение таблицы 2.1

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
3.3	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00, в составе:	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00	-
3.3.1	Тумба медицинская		1
3.3.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.3.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.3.4	Принадлежности:	-	-
3.3.4.1	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *
3.4	ТМ.02.00, в составе:	ТМ.02.00	-
3.4.1	Тумба медицинская		1
3.4.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.4.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.4.4	Принадлежности:	-	-
3.4.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
3.4.4.2	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
3.5	ТМ.04.00; ТМ.06.01, в составе:	ТМ.04.00; ТМ.06.01	-
3.5.1	Тумба медицинская		1
3.5.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.5.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.5.4	Принадлежности:	-	-
3.5.4.1	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
3.6	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02, в составе:	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	-
3.6.1	Тумба медицинская		1
3.6.2	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
4	Стол инструментальный, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *
4.1	СИ.02.00; СИ.02.01. Н; СИ.03.00; СИ.03.01. Н; СИ.05.00, в составе:	СИ.02.00; СИ.02.01. Н; СИ.03.00; СИ.03.01. Н; СИ.05.00	-
4.1.1	Стол инструментальный		1
4.1.2	Паспорт	СИ.00.00.ПС.01	1
5	Стол манипуляционный, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *
5.1	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03, в составе:	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03	-
5.1.1	Стол манипуляционный		1
5.1.2	Паспорт	СМ.00.00.ПС.01	1
6	Шкаф для медикаментов, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *

Продолжение таблицы 2.1

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
3.3	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00, в составе:	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00	-
3.3.1	Тумба медицинская		1
3.3.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
3.3.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
3.3.4	Принадлежности:	-	-
3.3.4.1	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *
6.1	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01, в составе:	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01	-
6.1.1	Шкаф для медикаментов		1
6.1.2	Паспорт	ШММ.00.00.ПС.01	1
7	Кушетка медицинская физиотерапевтическая, вариант исполнения:		1 (при необходимости) *
7.1	КМФ.01.00, в составе:	КМФ.01.00	-
7.1.1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая		1
7.1.2	Паспорт	КМФ.00.00.ПС.01	1
8	Ширма, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *
8.1	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00, в составе:	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	-
8.1.1	Ширма		1
8.1.2	Паспорт	ШМ.00.00.ПС.01	1
9	Руководство по эксплуатации	ОКПн.00.00.РЭ.01	1

Примечание:

*- по требованию

Таблица 2.2. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012», исполнения «Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
-	Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат, в составе:	АСК.003.00012.200	1
1	Тумба медицинская, варианты исполнения:		1
1.1	ТМ.01.00, в составе:	ТМ.01.00	-
1.1.1	Тумба медицинская		1
1.1.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
1.1.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
1.1.4	Принадлежности:	-	-
1.1.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
1.1.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	2 (при необходимости) *
1.1.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.2	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00, в составе:	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	-
1.2.1	Тумба медицинская		1
1.2.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
1.2.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
1.2.4	Принадлежности:	-	-
1.2.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
1.2.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *
1.2.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
1.3	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00, в составе:	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00	-
1.3.1	Тумба медицинская		1
1.3.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
1.3.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
1.3.4	Принадлежности:	-	-
1.3.4.1	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *
1.4	ТМ.02.00, в составе:	ТМ.02.00	-
1.4.1	Тумба медицинская		1
1.4.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
1.4.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
1.4.4	Принадлежности:	-	-
1.4.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *
1.4.4.2	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
1.5	ТМ.04.00; ТМ.06.01, в составе:	ТМ.04.00; ТМ.06.01	-
1.5.1	Тумба медицинская		1
1.5.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *
1.5.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
1.5.4	Принадлежности:	-	-
1.5.4.1	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *
1.6	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02, в составе:	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	-
1.6.1	Тумба медицинская		1
1.6.2	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1
2	Шкаф, варианты исполнения:		
2.1	ШК.37.02; ШК.36.00, в составе:	ШК.37.02; ШК.36.00	-
2.1.1	Шкаф		1
2.1.2	Паспорт	ШК.00.00.ПС.01	1
3	Стол прикроватный, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
3.1	СН.01.00; СН.02.00, в составе:	СН.01.00; СН.02.00	-
3.1.1	Стол прикроватный		1
3.1.2	Паспорт	СН.00.00.ПС.01	1
5	Ширма, варианты исполнения:		1 (при необходимости) *
4.1	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00, в составе:	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	-
4.1.1	Ширма		1
4.1.2	Паспорт	ШМ.00.00.ПС.01	1
5	Руководство по эксплуатации	ОКПн.00.00.РЭ.01	1

Примечание:

*- по требованию

9. Подготовка к работе и порядок работы с медицинским изделием

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических (от +10°C до +35°C) условиях не менее 8 ч.

Распаковать полученное медицинское изделие, произвести внешний осмотр. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Изделия поставляются в собранном виде*.

Примечание: *-по требованию, следующие изделия: кушетка медицинская смотровая КМС.01.00; КМС.02.00; шкаф ШК.37.02; ШК.36.00; тумба медицинская ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМС.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМС.03.00; ТМ.03.01; ТМС.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМС.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМС.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМС.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02; стол прикроватный СН.01.00; СН.02.00; стол инструментальный СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00; кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.01.00; ширма ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00; могут поставляться в разобранном виде. В случае поставки изделия в разобранном виде паспорт на изделие дополняется вкладышем: «Схема сборки изделия» с описанием последовательности сборки и спецификацией.

Ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (в случае поставки изделия в разобранном виде).

Изделия, поставляемые в разобранном виде, собрать согласно прилагаемой схеме сборки изделия.

Установить медицинское изделие на место его эксплуатации.

Если изделие имеет регулируемые опоры, провести регулировку опор для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

Загрузку шкафа (при наличии в наборе) следует осуществлять таким образом, чтобы наибольший вес груза приходился на нижние полки. Закрепите шкаф к стене для исключения риска опрокидывания в случае несоблюдения рекомендаций по загрузке.

Произвести дезинфекцию всех поверхностей изделия согласно МУ-287-113.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производить периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия

Техническое обслуживание изделий выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией и требованиями техники безопасности

Техническое обслуживание изделий осуществляется ответственным от лица пользователя, внимательно изучившим эксплуатационную документацию, описание и конструкцию изделия, или представителями сервисной организации с целью обеспечения нормальной работы изделий в процессе их эксплуатации.

Техническое обслуживание проводится перед вводом в эксплуатацию изделий и при эксплуатации периодически, не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание заключается во внешнем осмотре, при котором проверяют:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность изделия;
- наличие и прочность крепления;
- отсутствие слабо закрепленных элементов;
- отсутствие нарушения целостности поверхности.

В случае выявления нарушения целостности поверхности, механических повреждений, влияющих на работоспособность изделия, следует заменить поврежденную деталь. В случае ослабления резьбовых соединений, затянуть соответствующим инструментом.

11. Упаковка медицинского изделия

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901.

При транспортировании изделий набора автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать изделия по согласованию с потребителем при условии предохранения его от повреждений, атмосферных осадков.

Вся съемная фурнитура изделий набора упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или коробку из гофрокартона по ГОСТ Р 52901, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей изделия.

Двери и ящики изделий набора для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков закреплены средствами, исключающими повреждение.

Для транспортирования торцы изделий защищены полосами из гофрокартона по ГОСТ Р 52901.

Изделия набора могут перевозиться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация (схема сборки изделия и т.п.) помещена во влагонепроницаемую упаковку и уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей изделия.

12. Маркировка медицинского изделия. Символы и знаки

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие набора нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение настоящих технических условий;

- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На ящик должны быть нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару должна быть наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т. п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия

Транспортирование изделий набора производится в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление упаковок с изделиями набора в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования изделий набора крытыми транспортными средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

Условия хранения изделий набора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение изделий набора в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

14. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий набора требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий набора - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

15. Утилизация

Изделия набора при хранении и использовании не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, радиации и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

Изделия набора не взрывоопасны и не способны самовозгораться. При воздействии открытого огня загораются без взрыва.

При возникновении пожара тушить всеми известными способами пожаротушения.

При работе с изделиями набора специальных мер по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами РФ, действующими на момент утилизации.

Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

16. Срок службы (годности) медицинского изделия

Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

17. Сведения о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Компания «АСК» (ООО МК «АСК»)

Адрес (место нахождения) юридического лица:

603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230

Адрес производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.

Юлиуса Фучика, д. 60, пом. №1.

Тел/факс (831) 277-03-14, (831) 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru; info@tdask.ru; tdask@yandex.ru

18. Перечень основных применяемых национальных стандартов

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69, СанПин 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Основные параметры и конструктивные особенности медицинских изделий, входящих в наборы

Таблица А1. Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделий, входящих в наборы.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В**	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
1. Тумба медицинская				
ТМ.01.00	454±45 x 456±45 x 903±90	21±2	столешница- 25; полка -15	Ниша, дверка, внутри полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.01.01	454±45 x 456±45 x 803±80	24±2	столешница- 25; ящик-5	Три выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.01.01	454±45 x 456±45 x 803±80	24±2	столешница- 25; ящик-5	Три выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.02.00	450±45 x 450±45 x 783±80	18±2	столешница- 25; полка -15; выдвижная столешница -5	Ниша, выдвижная столешница, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.03.00	454±45 x 456±45 x 803±80	20±2	столешница- 25; полка -15	Ниша; дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.03.00	454±45 x 456±45 x 803±80	20±2	столешница- 25; полка -15	Ниша; дверка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.03.01	454±45 x 456±45 x 803±80	19±2	столешница- 25; полка -15	Дверка, внутри полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.03.01	454±45 x 456±45 x 803±80	19±2	столешница- 25; полка -15	Дверка, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.04.00	450±45 x 410±40 x 850±85	19±2	столешница- 25; полка -15	Ниша, дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.05.00	454±45 x 456±45 x 803±80	25±2,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик; дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.05.00	454±45 x 456±45 x 803±80	25±2,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик; дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.05.01	460±45 x 460±45 x 820±80	16±1,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша/ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.05.02	450±45 x 400±40 x 860±85	18±2	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Выдвижной ящик, дверка с замком; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.06.00	904±90 x 512±50 x 810±80	39±4	столешница- 25; полка -15;	Две дверки, внутри две полки; устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.06.01	480±50 x 480±50 x 745±75	26±2,5	столешница- 25; ящик-5	Два выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.07.00	454±45 x 456±45 x 803±80	23±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; устанавливается на колесные опоры
ТМс.07.00	454±45 x 456±45 x 803±80	23±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.08.00	454±45 x 456±45 x 903±90	27±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, три выдвижных ящика устанавливается на колесные опоры
ТМ.09.00	454±45 x 456±45 x	27±3	столешница- 25; ящик-5	Четыре выдвижных ящика устанавливается на колесные опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В**	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
	803±80			
ТМс.09.00	454±45 x 456±45 x 803±80	27±3	столешница- 25; ящик-5	Четыре выдвижных ящика устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.01	904±90 x 512±50 x 810±80	43±4	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик, дверка, внутри полка; ящик, дверка, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.02	904±90 x 512±50 x 810±80	50±5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Дверка, внутри две полки; четыре выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.03	904±90 x 512±50 x 810±80	57±6	столешница- 25; ящик-5	Восемь выдвижных ящиков; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.11.00	904±90 x 512±50 x 810±80	36±4	столешница- 25; полка -15;	Ниша, две дверки, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.11.01	904±90 x 512±50 x 810±80	41±4	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.12.00	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.12.01	580±60 x 500±50 x 785-1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.12.02	580±60 x 500±50 x 785-1110±80	29±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.00	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	32±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.01	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	32±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.02	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	33±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.14.00	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	27±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; полка-15;	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.14.01	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	27±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; полка-15	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.14.02	580±60 x 500±50 x 785- 1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; полка-15	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
2. Стол прикроватный				
СН.01.00	700±70 x 450±45 x 750-1130±80	8±1	столешница-8	Металлический разборный каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры
СН.02.00	700±70 x 450±45 x 750-1130±80	8±1	столешница-8	Металлический разборный каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры
3. Стол инструментальный				
СИ.02.00	580±60 x	12±1	полка металлическая	Разборный металлический каркас, две

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В**	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
	450±45 x 935±90		-4 полка стеклянная-3	полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.02.01.Н	545±55 x 450±45 x 830±80	11±1	полка -4	Разборный металлический каркас, две полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.03.00	580±60 x 450±45 x 935±90	15±1,5	полка металлическая -4 полка стеклянная-3	Разборный металлический каркас, три полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.03.01.Н	545±55 x 450±45 x 830±80	15±1,5	полка -4	Разборный металлический каркас, три полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.05.00	550±55 x 350±35 x 600-800±60	7±1	столешница-5	Разборный металлический каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры
4. Стол манипуляционный				
СМ.03.00	765±75 x 485±50 x 1025±100	25±2,5	полка-15; ящик-5	Выдвижной ящик на телескопических направляющих; две полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.01	765±75 x 485±50 x 1025±100	24,5±2,5	полка-15; ящик-5	Выдвижной ящик на телескопических направляющих; полка; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.02	765±78 x 485±50 x 1025±100	36±4	полка-15; ящик-5	Два выдвижных ящика на телескопических направляющих; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.03	765±75 x 485±50 x 1025±100	44±4,5	полка-15; ящик-5	Три выдвижных ящика на телескопических направляющих; изделие устанавливается на колесные опоры
5. Шкаф для медикаментов				
ША.01.00	1000±100 x 560±55 x 1910±190	99±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами, с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.01.01	1000±100 x 560±55 x 1910±190	99±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами, с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.00	1100±100 x 650±65 x 1910±190	103±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами; с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки и внутри шкафа двухсторонние поворотные створки с ячейками; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.01	1040±100 x 380±40 x 1910±190	140±14	ящик-5	32 выдвижных ящика, две дверки; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.02	1040±100 x 380±40 x 1910±190	140±14	ящик-5	32 выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.01.00	600±60 x 400±40 x 1850±185	39±4	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянная дверка, три полки; нижняя секция-металлическая дверка с замком и двумя ключами, полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.01.01	560±55 x	35±3,5	полка стеклянная-3;	Верхняя секция - стеклянная дверка,

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В**	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
	320±30 x 1730±170		полка металлическая-15	три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.01.00	600±80 x 400±40 x 1850±185	36±4	полка металлическая-15	Верхняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.01.01	560±55 x 320±30 x 1730±170	32±3	полка металлическая-15	Верхняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШСС.01.01	560±55 x 320±30 x 1730±170	36±3,5	полка стеклянная-3;	Верхняя секция - стеклянная дверка, три полки; нижняя секция - стеклянная дверка, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.02.00	800±80 x 400±40 x 1850±180	50±5	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - металлические дверки с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.02.01	800±80 x 370±40 x 1730±170	48±5	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - металлические дверки с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.02.00	800±80 x 400±40 x 1850±185	49±5	полка металлическая-15	Нижняя и верхняя секции - металлические дверки с замком и двумя ключами; верхняя секция - три полки, нижняя секция - одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.02.01	800±80 x 370±40 x 1730±170	46±4,5	полка металлическая-15	Нижняя и верхняя секции - металлические дверки с замком и двумя ключами; внутри - два запираемых на замок трейзера с дверками с замком и двумя ключами; верхняя секция - три полки, нижняя секция - одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШСС.02.01	800±80 x 370±40 x 1730±170	49±5	полка стеклянная-3;	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - стеклянные полки, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
6. Шкаф				
ШК.37.02	800±80 x 606±60 x 1860±185	86±9	дно-30; полка -15	Два отделения с пятью полками; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШК.36.00	400±80 x 606±60 x 1860±185	44±5	дно-30; полка -15	Одно отделение с полками; изделие устанавливается на регулируемые опоры
7. Кушетка медицинская смотровая				
КМС.01.00	1980±200 x 650±65 x 530±50	26±3	160	Металлический каркас; двухсекционное ложе, угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В**	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
КМС.02.00	1980±200 x 700±70 x 805±80	33±3	160	Металлический каркас; двухсекционное ложе, угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°.
8. Кушетка медицинская физиотерапевтическая				
КМФ.01.00	1980±200 x 650±65 x 530±50	35±3,5	160	Двухсекционное ложе; угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°
9. Ширма				
ШМ.01.00	770±70 x 410±40 x 1700±170	5±0,5	-	1 секция; секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.02.00	1560±150 x 410±40 x 1700±170 Размеры одной секции 770±70 x 410±40 x 1700±170	12±1	-	2 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.03.00	2350±235 410±40 x 1700±170 Размеры одной секции 770±70 x 410±40 x 1700±170	18±2	-	3 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.04.00	3135±310 410±40 x 1700±170 Размеры одной секции 770±70 x 410±40 x 1700±170	24±2	-	4 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору

* - - габаритные размеры изделий приведены без учета принадлежностей и штатива с держателем (для тумб медицинских).

** - Ш – ширина изделия, Г - глубина изделия, В – высота изделия.

Таблица А2. Основные технические характеристики принадлежностей и изделий, входящих в состав тумб медицинских согласно комплектности

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм, ±4 мм Д×Ш×В	Масса, кг, ±0,1 кг	Номинальная нагрузка, кг
Ручка для перемещения	375×90×55	0,4	-
Ограждение	402×32×12	0,4	-
Штатив с держателем	260×130×1207	1,4	5
Бампер	100×100×17	0,1	-

Перечень изделий, входящих в наборы, специфичное назначение и информация о потенциальных потребителях

Таблица Б1. Перечень изделий, входящих в наборы, специфичное назначение и информация о потенциальных потребителях


Наименование, варианты исполнений	Назначение изделия	Потенциальный потребитель
Тумба медицинская ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	Предназначено для обеспечения размещения медикаментов, медицинского оборудования при лечении и реабилитации маломобильных пациентов, а также для обеспечения размещения расходных материалов, медицинских изделий, медицинских приборов и аппаратов, необходимых для проведения осмотров и процедур в процедурном, терапевтическом кабинетах в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник, пациент
Принадлежность к тумбе медицинской: Ручка для перемещения	Предназначено для захвата и удержания тумбы медицинской при перемещении потребителем. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00;	Медицинский работник, пациент
Принадлежность к тумбе медицинской: Ограждение	Предназначено для предотвращения падения медицинских изделий, размещаемых пользователем на крышке (столе) тумбы. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00	Медицинский работник, пациент
Изделие из состава тумбы медицинской: Штатив с держателем	Предназначено для навески различных емкостей с инфузионными растворами, лекарственными средствами и препаратами, при проведении инфузионной терапии или переливания крови. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00	Медицинский работник, пациент
Принадлежность к тумбе медицинской: Бампер	Предназначено для защиты корпуса тумбы от повреждений при столкновении со стеной, оборудованием. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	Медицинский работник, пациент
Стол прикроватный СН.01.00; СН.02.00	Предназначено для обеспечения сестринского ухода, приема лекарства и проведения прочих манипуляций при обслуживании, лечении и реабилитации тяжелобольных и маломобильных пациентов в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник, пациент
Стол инструментальный СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00	Предназначено для транспортировки медицинских и хирургических инструментов от стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (операционную, процедурную, перевязочную и т.д.), а так же для размещения и временного хранения в операционных, процедурных, перевязочных в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник
Стол манипуляционный СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02;	Предназначено для создания специальных условий при размещении стерильных	Медицинский работник

Наименование, варианты исполнений	Назначение изделия	Потенциальный потребитель
СМ.03.03	хирургических инструментов, шовного материала и других предметов, необходимых во время проведения операции и/или медицинских процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	
Шкаф для медикаментов ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01	Предназначено для создания специальных условий при размещении и хранении лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник
Шкаф ШК.37.02; ШК.36.00	Предназначено для размещения и хранения медицинского инструментария, перевязочных материалов, медицинских расходных материалов, медицинских изделий и принадлежностей, медикаментов при проведении медицинских осмотров, процедур, манипуляций и диагностики в процедурных, перевязочных, смотровых кабинетах, больничных и специализированных больничных палатах.	Медицинский работник, пациент
Кушетка медицинская смотровая КМС.01.00; КМС.02.00	Предназначено для размещения пациента при проведении медицинских осмотров и терапевтических процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник, пациент
Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.01.00	Предназначено для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник, пациент
Ширма ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	Предназначено для разделения пространства (зонирования помещения), изолирования пациентов и создания комфортной среды для пациента при проведении медицинских осмотров или других процедур в медицинских организациях, для создания временной перегородки у кроватей и кушеток в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля	Медицинский работник, пациент

Общий вид изделия

Общий вид изделий, входящих в наборы медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012» представлен в таблицах А3-А13:

Таблица А3. Общий вид. Тумба медицинская: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02

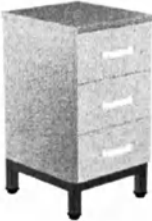 ТМ.01.00	 ТМ.01.01	 ТМс.01.01
 ТМ.02.00	 ТМ.03.00	 ТМс.03.00
 ТМ.03.01	 ТМс.03.01	 ТМ.04.00

		
TM.05.00	TMc.05.00	TM.05.01
		
TM.05.02	TM.06.00	TM.06.01
		
TM.07.00	TMc.07.00	TM.08.00
		
TM.09.00	TMc.09.00	TM.10.01
		
TM.10.02	TM.10.03	TM.11.00

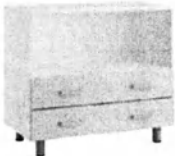
		
TM.11.01	TM.12.00	TM.12.01
		
TM.12.02	TM.13.00	TM.13.01
		
TM.13.02	TM.14.00	TM.14.01
		
TM.14.02		

Таблица А4. Общий вид. Стол прикроватный: CH.01.00; CH.02.00

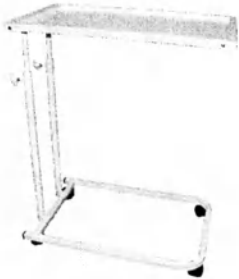
	
CH.01.00	CH.02.00




Таблица А5. Стол инструментальный: СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00

 СИ.02.00	 СИ.02.01.Н	 СИ.03.00
 СИ.03.01.Н	 СИ.05.00	

Таблица А6. Общий вид. Стол манипуляционный: СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03

 СМ.03.00	 СМ.03.01
 СМ.03.02	 СМ.03.03

Таблица А7. Общий вид. Шкаф для медикаментов: ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01

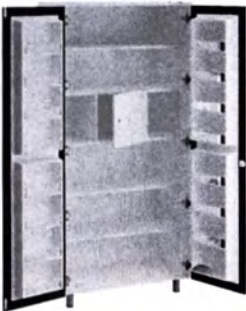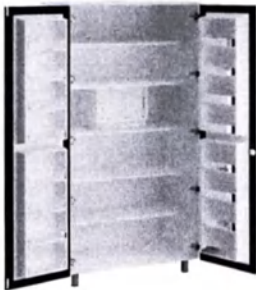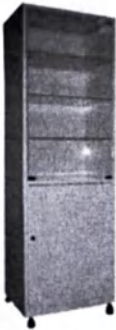		
ША.01.00	ША.01.01	ША.02.00
		
ША.02.01	ША.02.02	ШМС.01.00
		
ШМС.01.01	ШММ.01.00	ШММ.01.01
		
ШСС.01.01	ШМС.02.00	ШМС.02.01

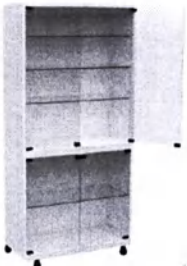
 ШММ.02.00	 ШММ.02.01	 ШСС.02.01
--	--	--

Таблица А8. Общий вид. Шкаф: ШК.37.02; ШК.36.00

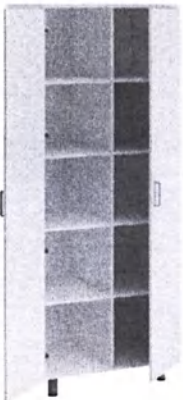
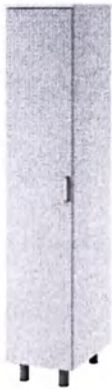
 ШК.37.02	 ШК.36.00
--	---

Таблица А9. Общий вид. Кушетка медицинская смотровая: КМС.01.00; КМС.02.00

 КМС.01.00	 КМС.02.00
--	--

Таблица А10. Общий вид. Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ.01.00


 КМФ.01.00
--

Таблица А11. Общий вид. Ширма: ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00

 ШМ.01.00	 ШМ.03.00
 ШМ.02.00	 ШМ.04.00

Всего прошито и пронумеровано 29
(фактум реванс) лист 8

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.

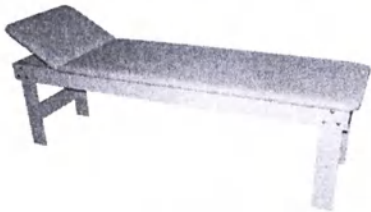

ООО Медицинская Компания «АСК»



ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ:

ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00;
ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00;
ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01;
ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00;
ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01;
ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01;
ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02

Паспорт
ТМ.00.00 ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	10
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	13
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	13
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	14
Приложение 1	15

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, поправки и незавершенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Тумба медицинская: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02. Далее по тексту – Изделие, Тумбы.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнений:

I. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов;

II. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат

медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:** ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Тумба медицинская: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии**
1	Тумба медицинская, варианты исполнения:		1	
1.1	ТМ.01.00, в составе:	ТМ.01.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Тумба медицинская		1	
1.1.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *	
1.1.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	
1.1.4	Принадлежности:	-	-	
1.1.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *	
1.1.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	2 (при необходимости) *	

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии**
1.1.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *	
1.2	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00, в составе:	ТМ.01.01; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	-	Указать исполнение
1.2.1	Тумба медицинская		1	
1.2.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *	
1.2.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	
1.2.4	Принадлежности:	-	-	
1.2.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *	
1.2.4.2	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *	
1.2.4.3	Бампер	ТМ.00.00-04	4	
1.3	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00, в составе:	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00;	-	Указать исполнение
1.3.1	Тумба медицинская	ТМс.07.00; ТМс.09.00	1	
1.3.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *	
1.3.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	
1.3.4	Принадлежности:	-	-	
1.3.4.1	Ограждение	ТМ.00.00-03	3 (при необходимости) *	
1.4	ТМ.02.00, в составе:	ТМ.02.00	-	Указать исполнение
1.4.1	Тумба медицинская		1	
1.4.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *	
1.4.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	
1.4.4	Принадлежности:	-	-	
1.4.4.1	Ручка для перемещения	ТМ.00.00-02	1 (при необходимости) *	
1.4.4.2	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *	
1.5	ТМ.04.00; ТМ.06.01, в составе:	ТМ.04.00; ТМ.06.01	-	Указать исполнение
1.5.1	Тумба медицинская		1	
1.5.2	Штатив с держателем	ТМ.00.00-01	1 (при необходимости) *	
1.5.3	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	
1.5.4	Принадлежности:	-	-	
1.5.4.1	Бампер	ТМ.00.00-04	4 (при необходимости) *	

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии**
1.6	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02, в составе:	ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	-	Указать исполнение
1.6.1	Тумба медицинская		1	
1.6.2	Паспорт	ТМ.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- комплектуется при необходимости, по требованию.

** - нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 Специфичное назначение изделия, составных частей и принадлежностей:

Наименование изделия	Назначение
Тумба медицинская ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	Предназначено для обеспечения размещения медикаментов, медицинского оборудования при лечении и реабилитации маломобильных пациентов, а также для обеспечения размещения расходных материалов, медицинских изделий, медицинских приборов и аппаратов, необходимых для проведения осмотров и процедур в процедурном, терапевтическом кабинетах в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля
Принадлежность к тумбе медицинской: Ручка для перемещения	Предназначено для захвата и удержания тумбы медицинской при перемещении потребителем. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.05.00; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00.
Принадлежность к тумбе медицинской: Ограждение	Предназначено для предотвращения падения медицинских изделий, размещаемых пользователем на крышке (столешнице) тумбы. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00;
Изделие из состава тумбы медицинской: Штатив с держателем	Предназначено для навески различных ёмкостей с инфузионными растворами, лекарственными средствами и препаратами, при проведении инфузионной терапии или переливания крови. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00;

Наименование изделия	Назначение
Принадлежность к тумбе медицинской: Бампер	Предназначено для защиты корпуса тумбы от повреждений при столкновении со стеной, оборудованием. Устанавливается на тумбу медицинскую, в вариантах исполнения: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00;

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – I по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444-2020:

- группа 1:

- Тумба медицинская: ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.01; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМс.09.00; ТМ.12.00.

- Тумба медицинская: ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01

- группа 2:

- Тумба медицинская: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМ.12.00.

- Тумба медицинская: ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.

3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.6 Не допускайте раскачивания изделия.

3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.

3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Тумба медицинская				
ТМ.01.00	454±45 х 456±45 х 903±90	21±2	столешница- 25; полка -15	Ниша, дверка, внутри полка; изделие устанавливается на колесные опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
ТМ.01.01	454±45 х 456±45 х 803±80	24±2	столешница- 25; ящик-5	Три выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.01.01	454±45 х 456±45 х 803±80	24±2	столешница- 25; ящик-5	Три выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.02.00	450±45 х 450±45 х 783±80	18±2	столешница- 25; полка -15; выдвижная столешница -5	Ниша, выдвижная столешница, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.03.00	454±45 х 456±45 х 803±80	20±2	столешница- 25; полка -15	Ниша; дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.03.00	454±45 х 456±45 х 803±80	20±2	столешница- 25; полка -15	Ниша; дверка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.03.01	454±45 х 456±45 х 803±80	19±2	столешница- 25; полка -15	Дверка, внутри полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.03.01	454±45 х 456±45 х 803±80	19±2	столешница- 25; полка -15	Дверка, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.04.00	450±45 х 410±40 х 850±85	19±2	столешница- 25; полка -15	Ниша, дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.05.00	454±45 х 456±45 х 803±80	25±2,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик; дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМс.05.00	454±45 х 456±45 х 803±80	25±2,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик; дверка, внутри съемная полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.05.01	460±45 х 460±45 х 820±80	16±1,5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша/ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.05.02	450±45 х 400±40 х 860±85	18±2	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Выдвижной ящик, дверка с замком; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.06.00	904±90 х 512±50 х 810±80	39±4	столешница- 25; полка -15;	Две дверки, внутри две полки; устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.06.01	480±50 х 480±50 х 745±75	26±2,5	столешница- 25; ящик-5	Два выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.07.00	454±45 х 456±45 х 803±80	23±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; устанавливается на колесные опоры
ТМс.07.00	454±45 х 456±45 х 803±80	23±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.08.00	454±45 х 456±45 х 903±90	27±3	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, три выдвижных ящика устанавливается на колесные опоры
ТМ.09.00	454±45 х	27±3	столешница- 25;	Четыре выдвижных ящика

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
	456±45 х 803±80		ящик-5	устанавливается на колесные опоры
ТМс.09.00	454±45 х 456±45 х 803±80	27±3	столешница- 25; ящик-5	Четыре выдвижных ящика устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.01	904±90 х 512±50 х 810±80	43±4	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ящик, дверка, внутри полка; ящик, дверка, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.02	904±90 х 512±50 х 810±80	50±5	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Дверка, внутри две полки; четыре выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.10.03	904±90 х 512±50 х 810±80	57±6	столешница- 25; ящик-5	Восемь выдвижных ящиков; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.11.00	904±90 х 512±50 х 810±80	36±4	столешница- 25; полка -15;	Ниша, две дверки, внутри полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.11.01	904±90 х 512±50 х 810±80	41±4	столешница- 25; полка -15; ящик-5	Ниша, два выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ТМ.12.00	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колеса
ТМ.12.01	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.12.02	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	29±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; ящик, дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.00	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	32±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.01	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	32±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.13.02	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	33±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; ящик- 5	Подъемно-поворотная столешница; 2 выдвижных ящика; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.14.00	580±60 х 500±50 х 785-1110±80	27±3	столешница-25; подъемно-поворотная	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры*, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
			столешница-5; полка-15;	
ТМ.14.01	580±60 х 500±50 х 785- 1110±80	27±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; полка-15	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры
ТМ.14.02	580±60 х 500±50 х 785- 1110±80	28±3	столешница-25; подъемно-поворотная столешница-5; полка-15	Подъемно-поворотная столешница; ниша, распашная дверка; изделие устанавливается на колесные опоры

* - габаритные размеры изделий приведены без учета принадлежностей.

Таблица 3. Основные технические характеристики принадлежностей и изделий, входящих в состав тумб медицинских согласно комплектности

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм, ±4 мм, Д×Ш×В	Масса, кг, ±0,1 кг	Номинальная нагрузка, кг
Ручка для перемещения	375×90×55	0,4	-
Ограждение	402×32×12	0,4	-
Штатив с держателем	260×130×1207	1,4	5
Бампер	100×100×17	0,1	-

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 4, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Таблица 4.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Тумбы медицинские	ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМ.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00	50	-	-
2	Тумбы медицинские	ТМс.01.01; ТМс.03.00; ТМс.03.01; ТМс.05.00; ТМс.07.00; ТМс.09.00	-	+	-
3	Тумба медицинская	ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02	50	-	-
4	Тумба медицинская	ТМ.06.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01	-	+	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантия изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба медицинская: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тумба медицинская: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковки _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Тумба медицинская _____
Обозначение исполнения _____
Серийный номер _____
Дата выпуска _____
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК _____
Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год _____
Продавец _____
подпись или штамп _____
Штамп продавца _____

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год _____
Сведения о ремонте: _____
Исполнитель _____
подпись _____



11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 5. Тумба медицинская: ТМ.01.00; ТМ.01.01; ТМс.01.01; ТМ.02.00; ТМ.03.00; ТМс.03.00; ТМ.03.01; ТМс.03.01; ТМ.04.00; ТМ.05.00; ТМс.05.00; ТМ.05.01; ТМ.05.02; ТМ.06.00; ТМ.06.01; ТМ.07.00; ТМс.07.00; ТМ.08.00; ТМ.09.00; ТМс.09.00; ТМ.10.01; ТМ.10.02; ТМ.10.03; ТМ.11.00; ТМ.11.01; ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02; ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02; ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02.

 ТМ.01.00	 ТМ.01.01	 ТМс.01.01
 ТМ.02.00	 ТМ.03.00	 ТМс.03.00
 ТМ.03.01	 ТМс.03.01	 ТМ.04.00

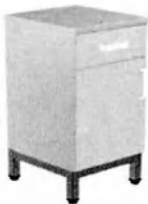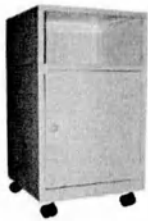		
TM.05.00	TMc.05.00	TM.05.01
		
TM.05.02	TM.06.00	TM.06.01
		
TM.07.00	TMc.07.00	TM.08.00
		
TM.09.00	TMc.09.00	TM.10.01
		
TM.10.02	TM.10.03	TM.11.00

 TM.11.01	 TM.12.00	 TM.12.01
 TM.12.02	 TM.13.00	 TM.13.01
 TM.13.02	 TM.14.00	 TM.14.01
 TM.14.02		

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.01.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

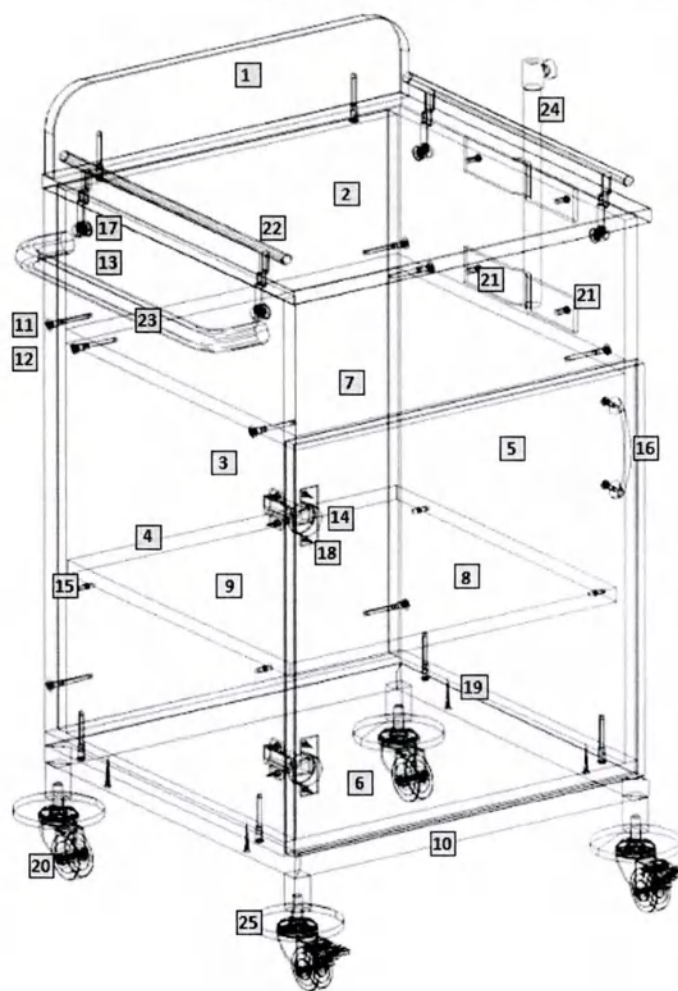


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Бортик	1	454	90
2.	Крышка	1	454	454
3.	Стенка вертикальная	1	450	100
4.	Стенка боковая левая	1	626	430
5.	Стенка боковая правая	1	626	430
6.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
7.	Стенка горизонтальная	1	418	413
8.	Дверь	1	476	446
9.	Полка	1	415	400
10.	Металлическое основание	1	454	456
11.	Евровинт 7x50	14	-	-
12.	Заглушка для евровинта	8	-	-
13.	Заглушка для эксцентрика	4	-	-
14.	Петля для накладной двери	2	-	-
15.	Полкодержатель металлический	4	-	-
16.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
17.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
18.	Шуруп 4x16	8	-	-
19.	Шуруп 4x35	4	-	-
20.	Колесо	4	-	-
21.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
22.	Ограждения *	2	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
24.	Штатив*	1	-	-
25.	Бампер*	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (4,5) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия. На крышке (2) установите штоки эксцентриковых стяжек (17), вертикальную стенку (3) и ограждения (23) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (11), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (4,5) с горизонтальными стенками (6,7). Установите крышку (2). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Евровинтами (11) установите бортик (1). На видимые головки евровинтов и эксцентриков установите заглушки (12 и 13).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (23) (при необходимости) и держатель штатива (21) (при необходимости). Шурупами 4x35 19 соедините каркас тумбы с металлическим основанием (10).
- 5) На двери (8) шурупами 4x16 (18) закрепите петли (14); установите ручку (16). Дверь закрепите к боковой стенке тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (9) на полкодержатели (15).
- 6) В металлическом основании (10) установить колеса (20) и бамперы (25) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (24) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (21).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.01.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

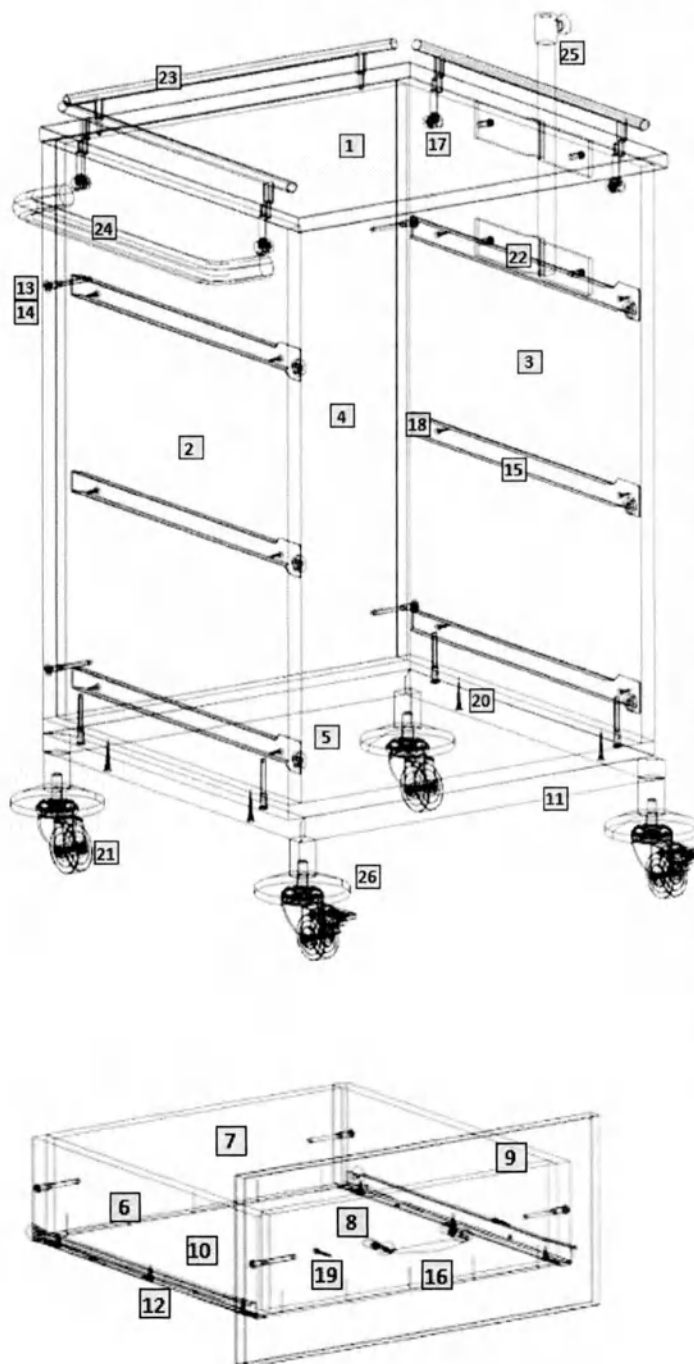


Рис.1


Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (18) закрепите J-образные части роликовых направляющих (15). На крышке 1 установите штоки эксцентриковых стяжек (17) и ограждения (23) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота стяжек эксцентриковых (17) до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (13) установите заглушки (14).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (24) (при необходимости) и держатель штатива (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (20) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (11).
- 5) Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней и задней стенками (7 и 8). Дно ящика (10) закрепите к передним (9) и задним (7) стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад J-образные части направляющих (15) и закрепите их шурупами 4x16 (18). Шурупами 3.5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад ящика ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
- 6) В металлическое основание (11) установить колеса (21) и бамперы (26) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (25) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (22).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	6	400	110
7.	Задняя стенка ящика	3	360	110
8.	Передняя стенка ящика	3	360	110
9.	Фасад ящика	3	210	446
10.	Дно ящика	3	400	390
11.	Металлическое основание	1	454	456
12.	Гвоздь	30	-	
13.	Евровинт 7x50	20	-	
14.	Заглушка для евровинта	4	-	
15.	Комплект роликовых направляющих	3	-	
16.	Ручка-скоба	3	винтами 4x20 -6 шт.	
17.	Стяжка эксцентриковая	4	-	
18.	Шуруп 4x16	30	-	
19.	Шуруп 3.5x30	6	-	
20.	Шуруп 4x35	4	-	
21.	Колесо	4	-	
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения *	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
25.	Штатив*	1	-	
26.	Бампер*	4	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.01.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

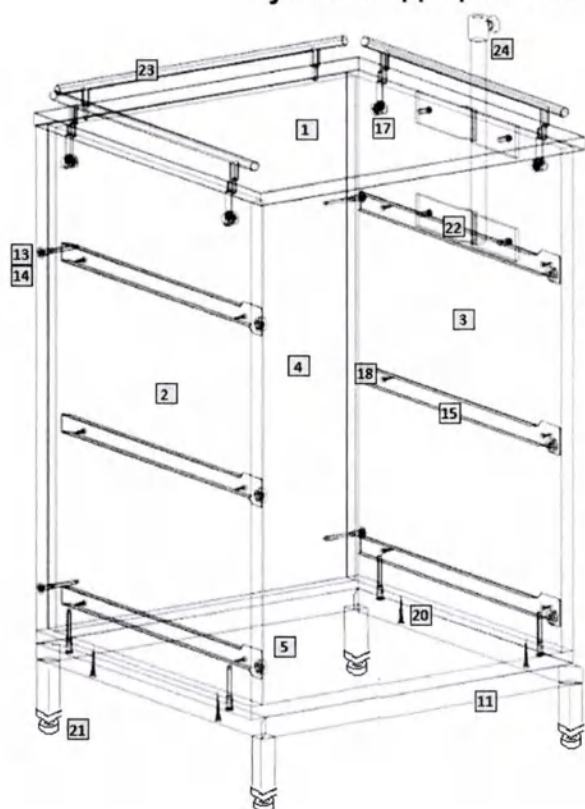

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	6	400	110
7.	Задняя стенка ящика	3	360	110
8.	Передняя стенка ящика	3	360	110
9.	Фасад ящика	3	210	446
10.	Дно ящика	3	400	390
11.	Металлическое основание	1	454	456
12.	Гвоздь	30	-	-
13.	Евровинт 7x50	20	-	-
14.	Заглушка для евровинта	4	-	-
15.	Комплект роликовых направляющих	3	-	-
16.	Ручка-скоба	3	винтами 4x20 -6 шт.	
17.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
18.	Шуруп 4x16	30	-	-
19.	Шуруп 3.5x30	6	-	-
20.	Шуруп 4x35	4	-	-
21.	Регулируемая опора	4	-	-
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения *	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Штатив*	1	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

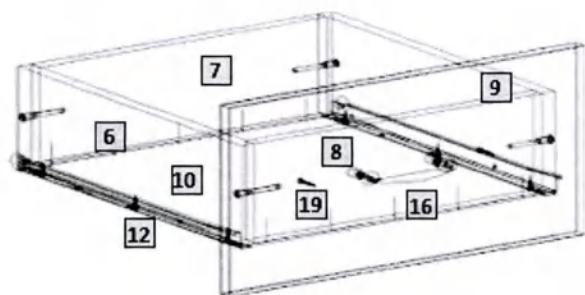


Рис.1

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (18) закрепите [- образные части роликовых направляющих (15). На крышке 1 установите штики эксцентриковых стяжек (17) и ограждения (23) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота стяжек эксцентриковых (17) до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (13) установите заглушки (14).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковой стенке тумбы держатель штатива (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (20) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (11).
- 5) Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней и задней стенками (7 и 8). Дно ящика (10) закрепите к передним (9) и задним (7) стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад [- образные части направляющих (15) и закрепите их шурупами 4x16 (18). Шурупами 3.5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад ящика ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
- 6) В металлическое основание (11) установить регулируемые опоры (21).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (24) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (22).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.02.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

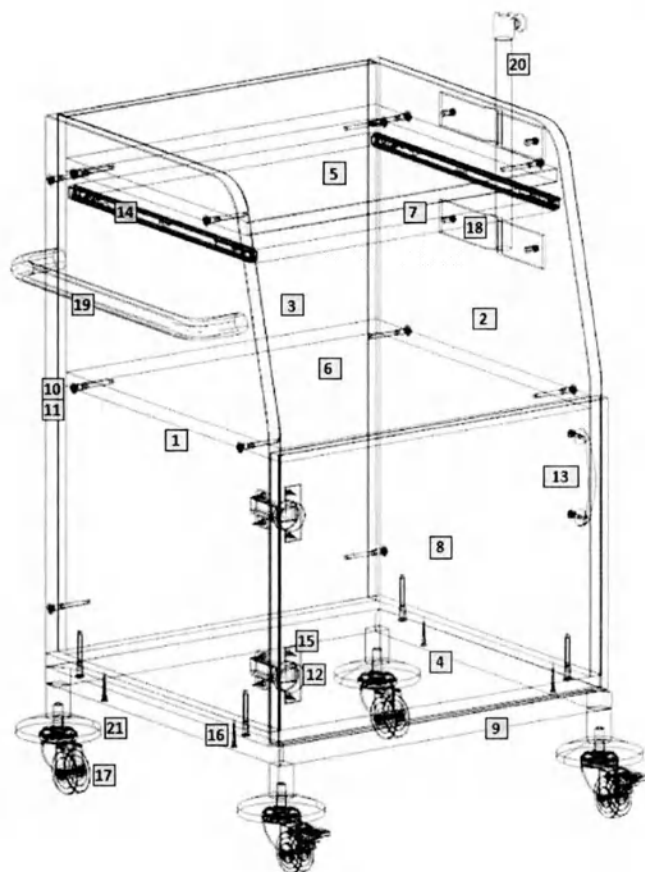


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	642	430
2.	Стенка боковая правая	1	642	430
3.	Стенка вертикальная	1	642	418
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
5.	Стенка горизонтальная	1	418	349
6.	Стенка горизонтальная	1	418	413
7.	Полка выдвижная	1	398	355
8.	Дверь	1	348	446
9.	Металлическое основание	1	454	456
10.	Евровинт 7x50	16	-	
11.	Заглушка для еврвинта	12	-	
12.	Петля для накладной двери	2	-	
13.	Ручка-скоба	1	винтами 4x20 -2 шт.	
14.	Комплект направляющих	1	-	
15.	Шуруп 4 x 16	16	-	
16.	Шуруп 4 x 35 (для крепления платформы)	4	-	
17.	Колесо	4	-	
18.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
19.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
20.	Штатив*	1	-	
21.	Бампер*	4	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) Евровинтами (10), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (1 и 2) с горизонтальными стенками (4 и 6) (кроме верхней горизонтальной стенки (5)). Установите выдвижную полку (7) на шариковых направляющих (14). Евровинтами (10) закрепите верхнюю горизонтальную стенку (5). На видимые головки еврвинтов установите заглушки (11).
- 3) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (19) (при необходимости) и держатель штатива (18) (при необходимости). Шурупами 4x35 (16) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (9).
- 4) На двери (8) шурупами 4x16 (16) закрепите петли (12); установите ручку (13). Дверь (8) закрепите к боковой стенке (1) тумбы шурупами (15). При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель.
- 5) Установить принадлежности (при необходимости)
- 6) В металлическое основание (9) установить колеса (17) и бамперы (21) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (20) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (18).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.03.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

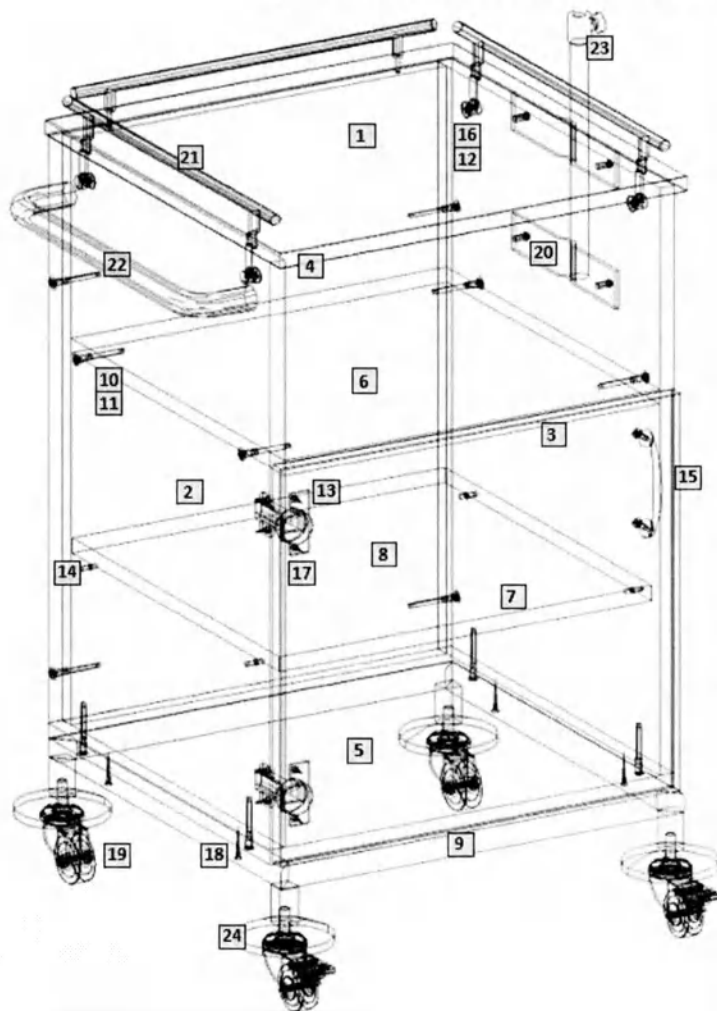


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Стенка горизонтальная	1	418	413
7.	Дверь	1	424	446
8.	Полка	1	415	400
9.	Металлическое основание	1	454	456
10.	Евровинт 7x50	12	-	
11.	Заглушка для еврвинта	8	-	
12.	Заглушка для эксцентрика	4	-	
13.	Петля для накладной двери	2	-	
14.	Полкодержатель металлический	4	-	
15.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
16.	Стяжка эксцентриковая	4	-	
17.	Шуруп 4x16	8	-	
18.	Шуруп 4x35	4	-	
19.	Колесо	4	-	
20.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13-4 шт.	
21.	Ограждения *	3	с винтами 6.3x13-6 шт.	
22.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13-2шт.	
23.	Штатив*	1	-	
24.	Бампер*	4	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.

2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (12) в предназначенные для них отверстия. На крышке установите штоки эксцентриковых стяжек и ограждения (при необходимости).

3) Евровинтами, как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (2 и 3) с горизонтальными стенками (5 и 6). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки еврвинтов (10) и стяжек эксцентриковых (16) установите заглушки (11) и (12).

4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (22) (при необходимости) и держатель для штатива (20) (при необходимости). Шурупами 4x35 18 соедините каркас тумбы с металлическим основанием (9).

5) На двери (7) шурупами 4x16 (17) закрепите петли (13); установите ручку (15). Дверь закрепите к боковой стенке тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (8) на полкодержатели (14).

6) В металлическое основание (9) установить колеса (19) и бамперы (24) (при необходимости).

7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (23) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (20).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.03.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

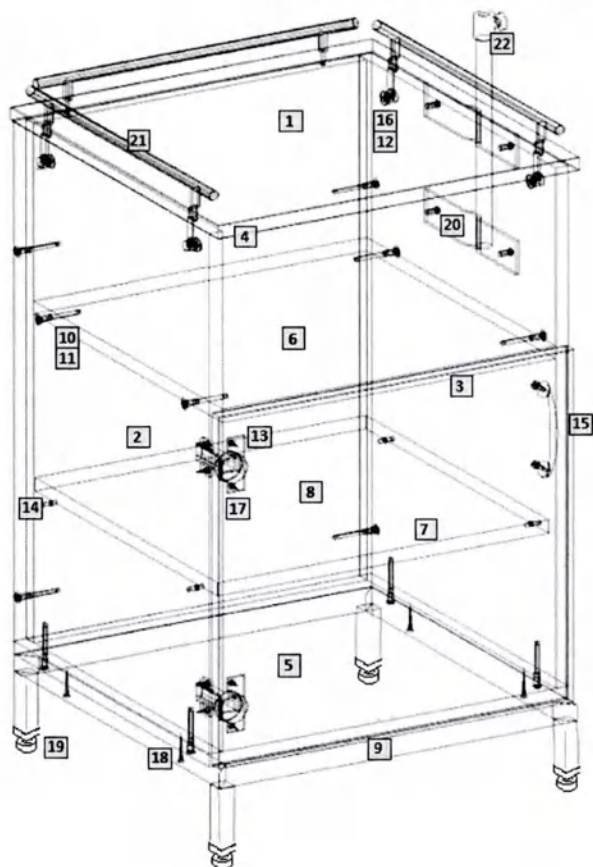


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Стенка горизонтальная	1	418	413
7.	Дверь	1	424	446
8.	Полка	1	415	400
9.	Металлическое основание	1	454	456
10.	Евровинт 7x50	12	-	-
11.	Заглушка для евровинта	8	-	-
12.	Заглушка для эксцентрика	4	-	-
13.	Петля для накладной двери	2	-	-
14.	Полкодержатель металлический	4	-	-
15.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
16.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
17.	Шуруп 4x16	8	-	-
18.	Шуруп 4x35	4	-	-
19.	Регулируемая опора	4	-	-
20.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13-4 шт.	
21.	Ограждения *	3	с винтами 6.3x13-6 шт.	
22.	Штатив*	1	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (12) в предназначенные для них отверстия. На крышке установите штыки эксцентриковых стяжек и ограждения (при необходимости).
- 3) Евровинтами, как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (2 и 3) с горизонтальными стенками (5 и 6). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (10) и стяжек эксцентриковых (16) установите заглушки (11) и (12).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковой стенке тумбы держатель для штатива (20) (при необходимости). Шурупами 4x35 18 соедините каркас тумбы с металлическим основанием (9).
- 5) На двери (7) шурупами 4x16 (17) закрепите петли (13); установите ручку (15). Дверь закрепите к боковой стенке тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (8) на полкодержатели (14).
- 6) В металлическое основание (9) установить регулируемые опоры (19).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (22) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (20).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.03.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

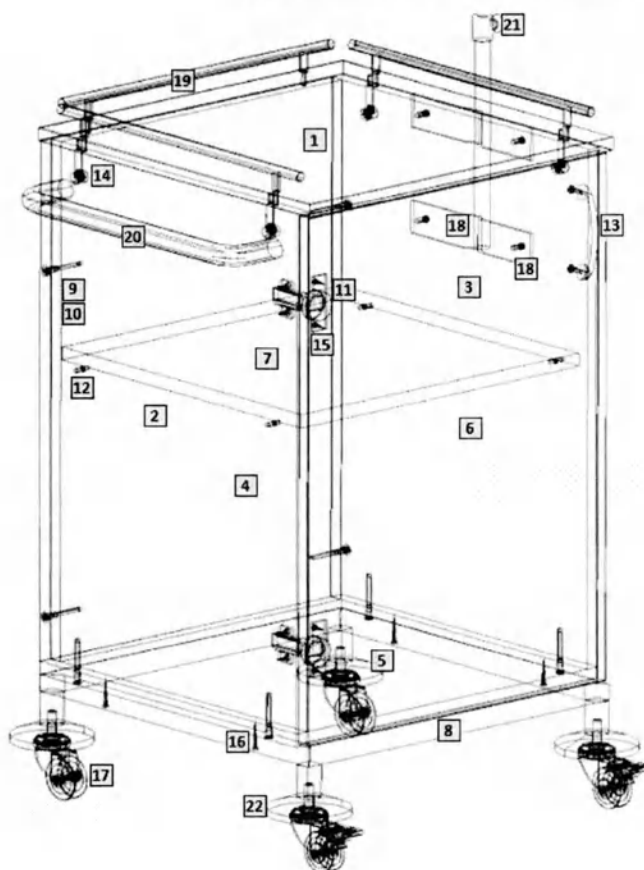


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Дверь	1	436	446
7.	Полка	1	415	400
8.	Металлическое основание	1	454	456
9.	Евровинт 7x50	8	-	-
10.	Заглушка для евровинта	4	-	-
11.	Петля для накладной двери	2	-	-
12.	Полкодержатель металлический	4	-	-
13.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
14.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
15.	Шуруп 4x16	8	-	-
16.	Шуруп 4x35	4	-	-
17.	Колесо	4	-	-
18.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13-4 шт.	
19.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13-6 шт.	
20.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13-2шт.	
21.	Штатив*	1	-	-
22.	Бампер*	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (14) в предназначенные для них отверстия. На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (14) и ограждения (20) (при необходимости).

3) Евровинтами (18), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (9) установите заглушки (10).

4) При помощи евровинтов с полукруглой головкой 6,3x18 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (20) (при необходимости) и держатель штатива (18) (при необходимости). Шурупами 4x35 (16) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (8).

5) На двери шурупами 4x16 (15) закрепите петли (11). Установите ручку (13). Дверь (6) закрепите к боковой стенке (4) тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (7) на полкодержатели (12).

6) В металлическое основание (8) установите колеса (17) и бамперы (22) (при необходимости).

7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (21) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (18).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.03.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

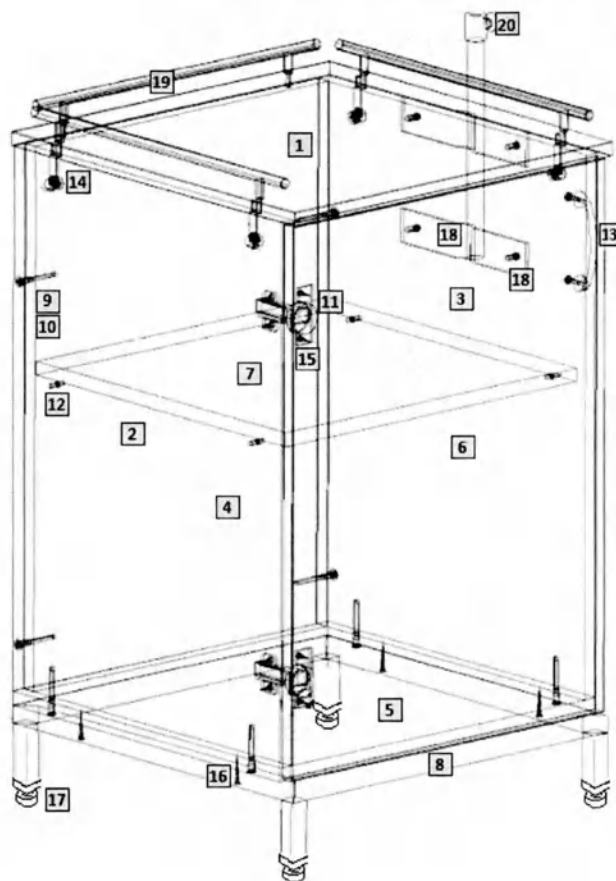


Рис.1


Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Дверь	1	436	446
7.	Полка	1	415	400
8.	Металлическое основание	1	454	456
9.	Евровинт 7x50	8	-	
10.	Заглушка для евровинта	4	-	
11.	Петля для накладной двери	2	-	
12.	Полкодержатель металлический	4	-	
13.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 - 2 шт.	
14.	Стяжка эксцентриковая	4	-	
15.	Шуруп 4x16	8	-	
16.	Шуруп 4x35	4	-	
17.	Регулируемая опора	4	-	
18.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
19.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
20.	Штатив*	1	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки


- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (14) в предназначенные для них отверстия. На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (14) и ограждения (20) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (18), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (9) установите заглушки (10).
- 4) При помощи евровинтов с полукруглой головкой 6,3x18 закрепите на боковой стенке тумбы держатель штатива (18) (при необходимости). Шурупами 4x35 (16) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (8).
- 8) На двери шурупами 4x16 (15) закрепите петли (11). Установите ручку (13). Дверь (6) закрепите к боковой стенке (4) тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (7) на полкодержатели (12).
- 9) В металлическое основание (8) установить регулируемые опоры (17).
- 10) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (20) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (18).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.04.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

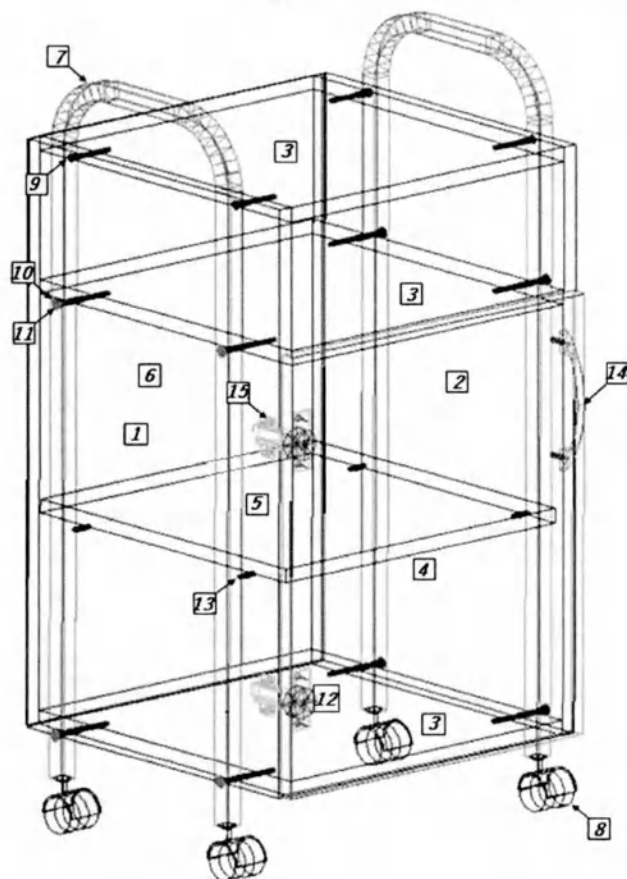

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	656	390
2.	Стенка боковая правая	1	656	390
3.	Стенка горизонтальная	3	378	390
4.	Дверь	1	496	406
5.	Полка	1	376	380
6.	Стенка задняя	1	654	408
7.	Металлический каркас	2	-	-
8.	Колесо	4	-	-
9.	Евровинт 7x50	4	-	-
10.	Евровинт 7x70	8	-	-
11.	Заглушка для евровинта	8	-	-
12.	Петля для накладной двери	2	-	-
13.	Полкодержатель металлический	4	-	-
14.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
15.	Шуруп 4x16	8	-	-
16.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13-4 шт.	
17.	Штатив*	1	-	-
18.	Бампер*	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

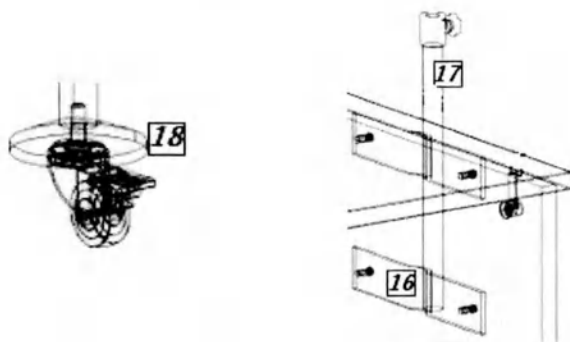

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, ключ на 17 мм, рулетку или линейку.
- 2) На металлический каркас (7) при помощи ключа 17мм установите колесные опоры (8). На вертикальных боковых стенках (1 и 2) установите полкодержатели (13).
- 3) Евровинтами (9), как показано на рис. 1, соедините стенки боковые (1 и 2) с горизонтальными стенками (3) и металлическим каркасом (7) евровинтами (10). Гвоздями закрепите заднюю стенку (6). На видимые головки евровинтов (9,10) установите заглушки (11).
- 4) При помощи винтов 6,3x18 закрепите на боковой стенке тумбы держатель штатива (16) (при необходимости)
- 5) На двери (4) шурупами 4x16 закрепите петли (12); установите ручку (14). Дверь закрепите к боковой стенке тумбы шурупами 15. При необходимости выровняйте положение двери регулировочными винтами петель. Установите полку (5) на полкодержатели (13).
- 6) В металлический каркас (7) установить колеса (8) и бамперы (18) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (17) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (16).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.05.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

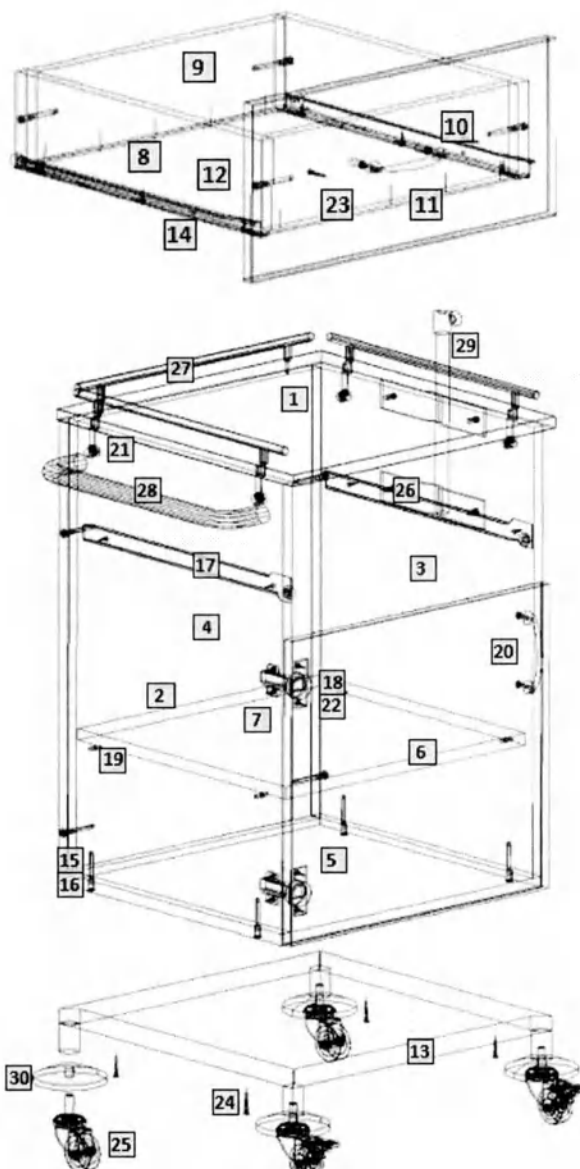


Рис. 1

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (21) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (22) закрепите L-образные части роликовых направляющих (17); установите полкодержатели (19). На крышке (1) установите штыки эксцентриковых стяжек (21) и ограждения (27).
- 3) Евровинтами (15), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку 1. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (15) установите заглушки (16).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы транспортировочную ручку (28) (при необходимости) и держатель штатива (26) (при необходимости). Шурупами 4x35 (24) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (13).
- 5) Сборка ящика. Евровинтами (15) соедините боковые стенки ящика (8 и 9) с передней (10) и задней (9) стенками. Дно ящика (12) закрепите к передней и задней стенкам гвоздями (14). Установите роликами назад J-образные части направляющих (17) и закрепите их шурупами 4x16 (22). Шурупами 3,5x30 (23) закрепите фасад (11) к передней стенке ящика (10). Установите на фасад ящика ручку (20). Установите собранный ящик в корпус тумбы.
- 6) На двери (6) шурупами 4x16 (22) закрепите петли (18); установите ручку (20). Дверь (6) закрепите к боковой стенке (2) тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (7) на полкодержатели (19).
- 7) В металлическое основание (13) установить колеса (25) и бамперы (30) (при необходимости).
- 8) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (29) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (26).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Дверь	1	424	446
7.	Полка	1	415	400
8.	Боковая стенка ящика	2	400	110
9.	Задняя стенка ящика	1	360	110
10.	Передняя стенка ящика	1	360	110
11.	Фасад ящика	1	210	446
12.	Дно ящика	1	400	390
13.	Металлическое основание	1	454	456
14.	Гвоздь	10	-	-
15.	Евровинт 7x50	12	-	-
16.	Заглушка для евровинта	4	-	-
17.	Комплект роликовых направляющих	1	-	-
18.	Петля для накладной двери	2	-	-
19.	Полкодержатель металлический	4	-	-
20.	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
21.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
22.	Шуруп 4x16	18	-	-
23.	Шуруп 3,5x30	2	-	-
24.	Шуруп 4x35	4	-	-
25.	Колесо	4	-	-
26.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
27.	Ограждения *	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
28.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
29.	Штатив*	1	-	-
30.	Бампер*	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.05.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

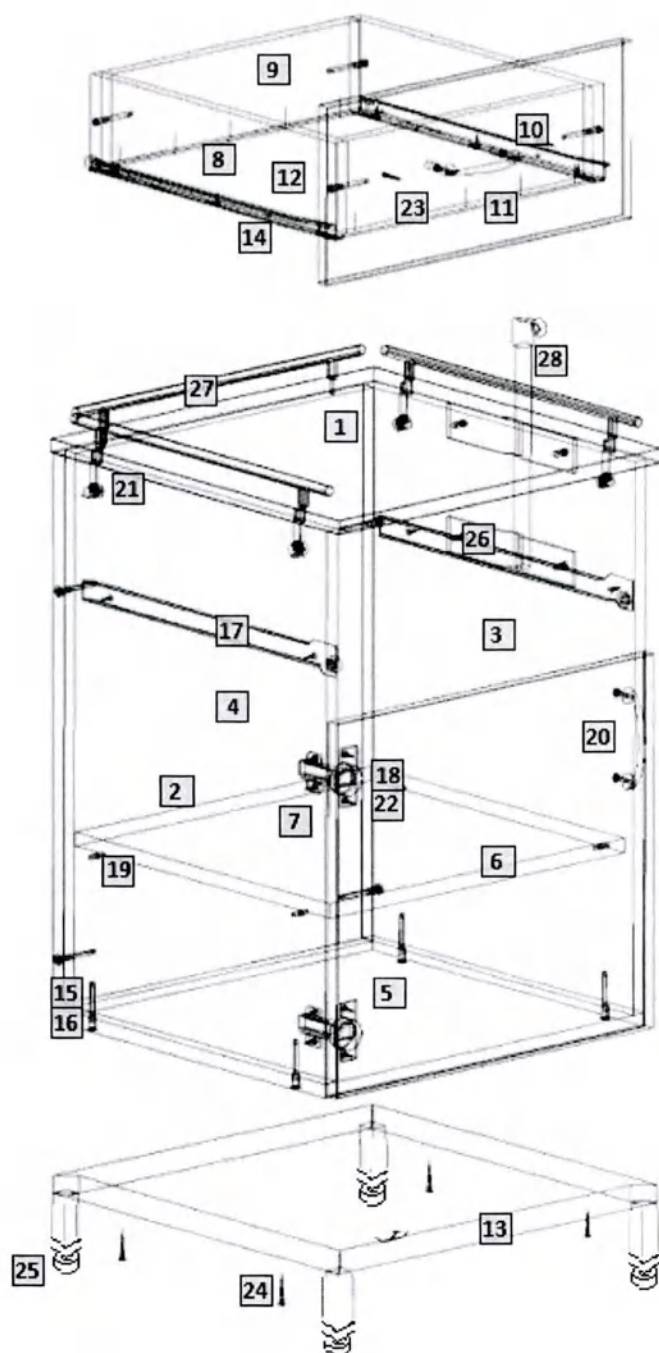


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт.	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Дверь	1	424	446
7.	Полка	1	415	400
8.	Боковая стенка ящика	2	400	110
9.	Задняя стенка ящика	1	360	110
10.	Передняя стенка ящика	1	360	110
11.	Фасад ящика	1	210	446
12.	Дно ящика	1	400	390
13.	Металлическое основание	1	454	456
14.	Гвоздь	10	-	-
15.	Евровинт 7x50	12	-	-
16.	Заглушка для еврвинта	4	-	-
17.	Комплект роликовых направляющих	1	-	-
18.	Петля для накладной двери	2	-	-
19.	Полкодержатель металлический	4	-	-
20.	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
21.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
22.	Шуруп 4x16	18	-	-
23.	Шуруп 3,5x30	2	-	-
24.	Шуруп 4x35	4	-	-
25.	Регулируемая опора	4	-	-
26.	Держатель штатива*	1	с винтами 6,3x13- 4 шт.	
27.	Ограждения *	3	с винтами 6,3x13- 6 шт.	
28.	Штатив*	1	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (21) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (22) закрепите [- образные части роликовых направляющих (17); установите полкодержатели (19). На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (21) и ограждения (27).
- Евровинтами (15), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку 1. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки еврвинтов (15) установите заглушки (16).
- При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковой стенке тумбы держатель штатива (26) (при необходимости). Шурупами 4x35 (24) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (13).
- Сборка ящика. Евровинтами (15) соедините боковые стенки ящика (8 и 9) с передней (10) и задней (9) стенками. Дно ящика (12) закрепите к передней и задней стенкам гвоздями (14). Установите роликами назад [- образные части направляющих (17) и


закрепите их шурупами 4×16 (22). Шурупами 3.5×30 (23) закрепите фасад (11) к передней стенке ящика (10). Установите на фасад ящика ручку (20). Установите собранный ящик в корпус тумбы.

10) На двери (6) шурупами 4×16 (22) закрепите петли (18); установите ручку (20). Дверь (6) закрепите к боковой стенке (2) тумбы шурупами. При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель. Установите полку (7) на полкодержатели (19).




11) В металлическое основание (13) установить регулируемые опоры (25).

12) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (28) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (26).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.05.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

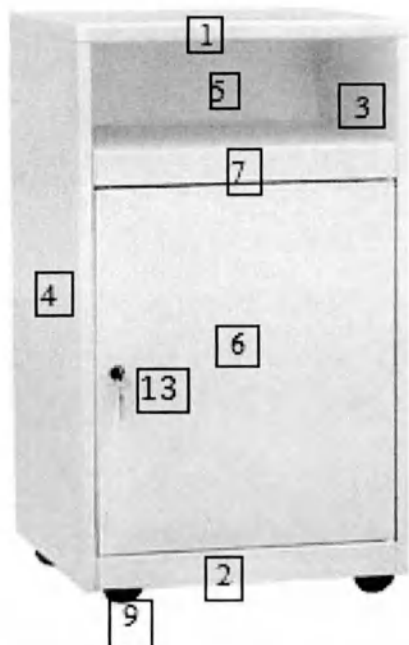


Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	460	460
2.	Стенка горизонтальная нижняя	2	460	460
3.	Стенка боковая правая	1	780	460
4.	Стенка боковая левая	1	780	460
5.	Задняя стенка	1	780	460
6.	Дверь	1	510	450
7.	Стенка горизонтальная средняя	1	459	450
8.	Полка	1	457	440
9.	Колеса	4	-	-
10.	Осевые петли	2	-	-
11.	Магнитная защелка	1	-	-
12.	Саморезы 4,5x13	18	-	-
13.	Замок с 2мя ключами	1	-	-

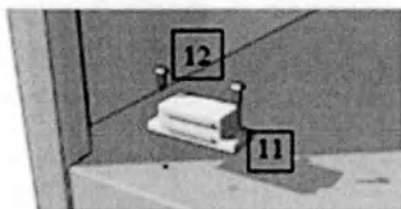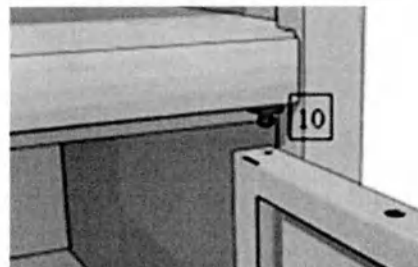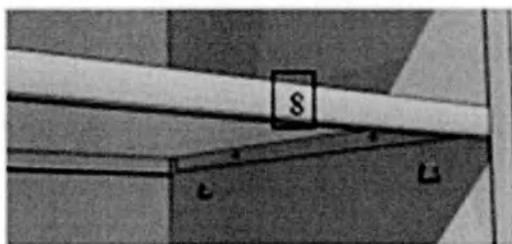



Последовательность сборки

1. Установите горизонтальную стенку (2) на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую стенку (3), сначала вставив ее переднюю часть в соответствующий паз дна, а затем надвинув заднюю часть на дно. Аналогичным образом установить левую стенку (4).
2. Установить заднюю стенку (5), вставив ее в соответствующие пазы боковых стенок. Нижнюю часть стенки задвинуть до упора в паз боковой стенки (3,4), а верхнюю – не доводя до конца. Прикрепить стенку (5) к горизонтальной стенке (2) с помощью двух саморезов (12).
3. Вставить нижний отгиб в передней части крышки (1) в соответствующие пазы в передней части боковых стенок (3 и 4). Задвинуть крышку назад до упора. Задвинуть до конца верхнюю часть задней стенки (5) в пазы боковых стенок (3 и 4). Прикрепить крышку (1) к задней стенке (5) с помощью саморезов (12).
4. Завести стенку горизонтальную (7) внутрь тумбы и вставить ее в соответствующие пазы в боковых стенках (3 и 4). Прикрепить среднюю горизонтальную стенку (7) к задней стенке (5) с помощью саморезов (12).
5. На стенку горизонтальную (2) установить магнитные защелки (11), прикрепив их с помощью саморезов (12).
6. Перевернуть тумбу дном вверх и ввинтить колеса (9) в соответствующие резьбовые отверстия.
7. Установить полку (8).
8. Вставьте осевые петли (10) в отверстие горизонтальной стенки (3) и средней горизонтальной стенки (7). Надеть дверь (6) соответствующим отверстием на верхнюю ось.
9. Установить замок (13) в отверстие в двери (6).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.05.02 ТУ 9452-003-68690950-2012

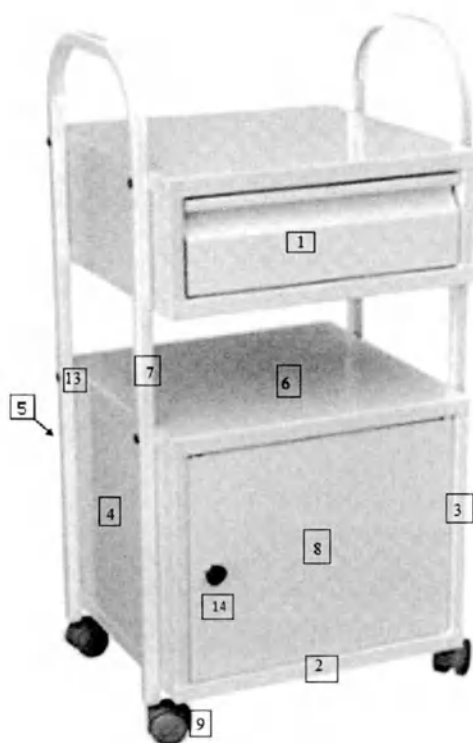

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Ящик	1	175	410
2.	Стенка горизонтальная нижняя	1	400	450
3.	Стенка боковая правая	1	400	360
4.	Стенка боковая левая	1	400	360
5.	Задняя стенка	1	410	360
6.	Крышка	1	400	450
7.	Металлический каркас	2	-	-
8.	Дверь	1	400	340
9.	Колеса	4	-	-
10.	Осевые петли	2	-	-
11.	Магнитная защелка	1	-	-
12.	Саморезы 4,5х13	16	-	-
13.	Винт 5х12	6	-	-
14.	Замок с 2мя ключами	1	-	-

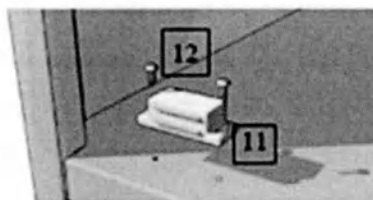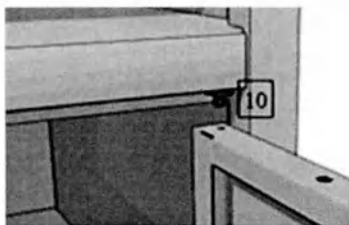

Последовательность сборки

1. Установите горизонтальную стенку (2) на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую стенку (3), сначала вставив ее переднюю часть в соответствующий паз горизонтальной стенки (2), а затем надвинув заднюю часть горизонтальной стенки (2). Аналогичным образом установить левую стенку (4).
2. Установить заднюю стенку (5), вставив ее в соответствующие пазы боковых стенок. Нижнюю часть стенки задвинуть до упора в паз боковой стенки (3,4), а верхнюю – не доводя до конца. Прикрепить стенку (5) к горизонтальной стенке (2) с помощью двух саморезов (12).
3. Вставить нижний отгиб в передней части крышки (6) в соответствующие пазы в передней части боковых стенок (3 и 4). Задвинуть крышку назад до упора. Задвинуть до конца верхнюю часть задней стенки (5) в пазы боковых стенок (3 и 4). Прикрепить крышку (6) к задней стенке (5) с помощью саморезов (13).
4. На стенку горизонтальную (2) установить магнитные защелки (11), прикрепив их с помощью саморезов (12).
5. Вставьте осевые петли (10) в отверстие горизонтальной стенки (3) и крышки (6). Надеть дверь (8) соответствующим отверстием на верхнюю ось.
6. Соедините ящик (1) и собранную тумбу с металлическим каркасом (7) винтами (13).
7. Вставьте в металлический каркас (7) колеса (9).
8. Установить замок (14) в отверстие в двери (6).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.06.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

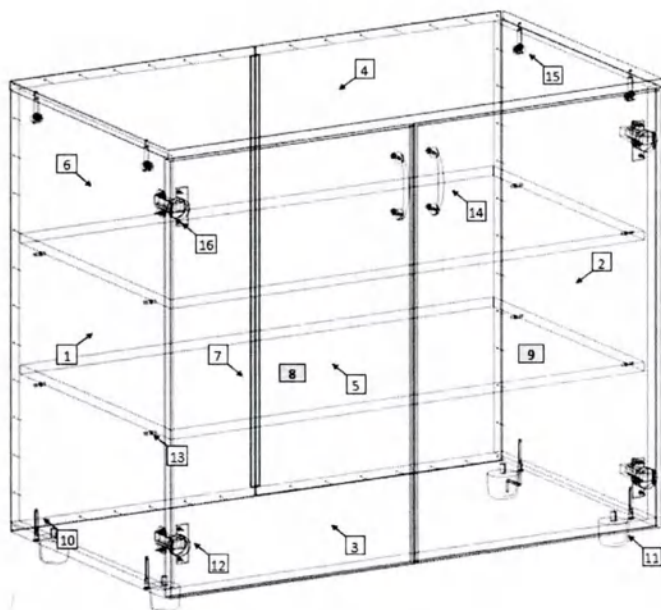


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол. , шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Шири на, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
4.	Крышка	1	904	508
5.	Полка	2	864	480
6.	Задняя стенка	2	708	447
7.	Профиль соединительный	1	-	-
8.	Дверь левая	1	684	446
9.	Дверь правая	1	684	446
10.	Евровинт 7x50	4	-	-
11.	Опора регулируемая	4	-	-
12.	Петля для накладной двери	4	-	-
13.	Полкодержатель металлический	8	-	-
14.	Ручка	2	с винтами 4x20 - 4 шт.	
15.	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
16.	Шуруп 4 x 16	28	-	-

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2. На горизонтальной нижней стенке (3) шурупами 4×16 (16) закрепите опоры (11). На вертикальных боковых стенках (1 и 2) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (15) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (13). На крышке (4) установите штоки эксцентриковых стяжек (15).

3. Евровинтами (10), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1, 2) с горизонтальной стенкой (3). Установите крышку (4). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Закрепите заднюю стенку (6).

4. На фасаде (8, 9) шурупами 4×16 (16) закрепите петли (12), установите ручки (14). Фасад закрепите к боковой стенке тумбы. При необходимости отрегулируйте положение фасада винтами петель. Установите полки (5) на полкодержатели (13).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.06.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

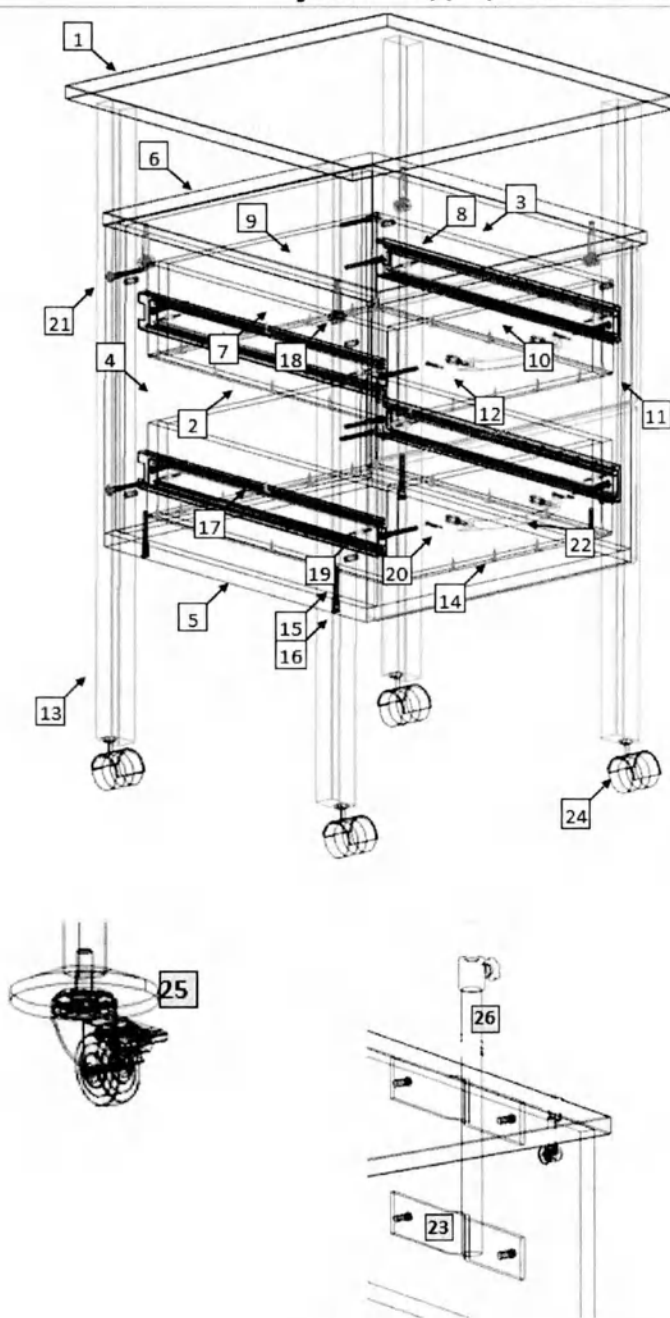


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Топ	1	484	484
2.	Стенка боковая левая	1	368	440
3.	Стенка боковая правая	1	368	440
4.	Стенка вертикальная задняя	1	368	368
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	400	440
6.	Крышка	1	404	464
7.	Боковая стенка ящика левая	2	400	110
8.	Боковая стенка ящика правая	2	400	110
9.	Задняя стенка ящика	2	310	110
10.	Передняя стенка ящика	2	310	110
11.	Фасад ящика		396	188
12.	Дно ящика	2	400	340
13.	Металлический каркас	4	-	-
14.	Гвоздь	20	-	-
15.	Евровинт 7x50	20	-	-
16.	Заглушки	20	-	-
17.	Комплект роликовых направляющих	2	-	-
18.	Эксцентриковая стяжка	4	-	-
19.	Шуруп 4x16	8	-	-
20.	Шурупами 3.5x30	4	-	-
21.	Евровинт 7x70	4	-	-
22.	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
23.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13-4 шт.	
24.	Колеса	4	-	-
25.	Бампер*	4	-	-
26.	Штатив*	1	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.

2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (18) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (19) закрепите [- образные части роликовых направляющих (17). На крышке (6) установите штоки эксцентриковых стяжек (18).

3) Евровинтами (15), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (6). Затяжка соединения производится путём поворота стяжек эксцентриковых (18) до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (15) установите заглушки (16).

4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы держатель штатива (23) (при необходимости). Шурупами (20) соедините каркас собранной тумбы с металлическим каркасом (13). Установите топ (1).

5) Сборка ящиков. Евровинтами (15) соедините боковые стенки ящика (7,8) с передней и задней стенками (9,10). Дно ящика (12) закрепите к передним и задним стенкам (9,10) гвоздями (14). Установите роликами назад [- образные части направляющих (17) и закрепите их шурупами 4x16 (19). Шурупами 3.5x30 (20) закрепите фасад (11) к передней стенке ящика (10). Установите на фасад ящика ручку (22). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

6) В металлический каркас (12) установить колеса (24) и бамперы 25 (при необходимости).

7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (26) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (23).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.07.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

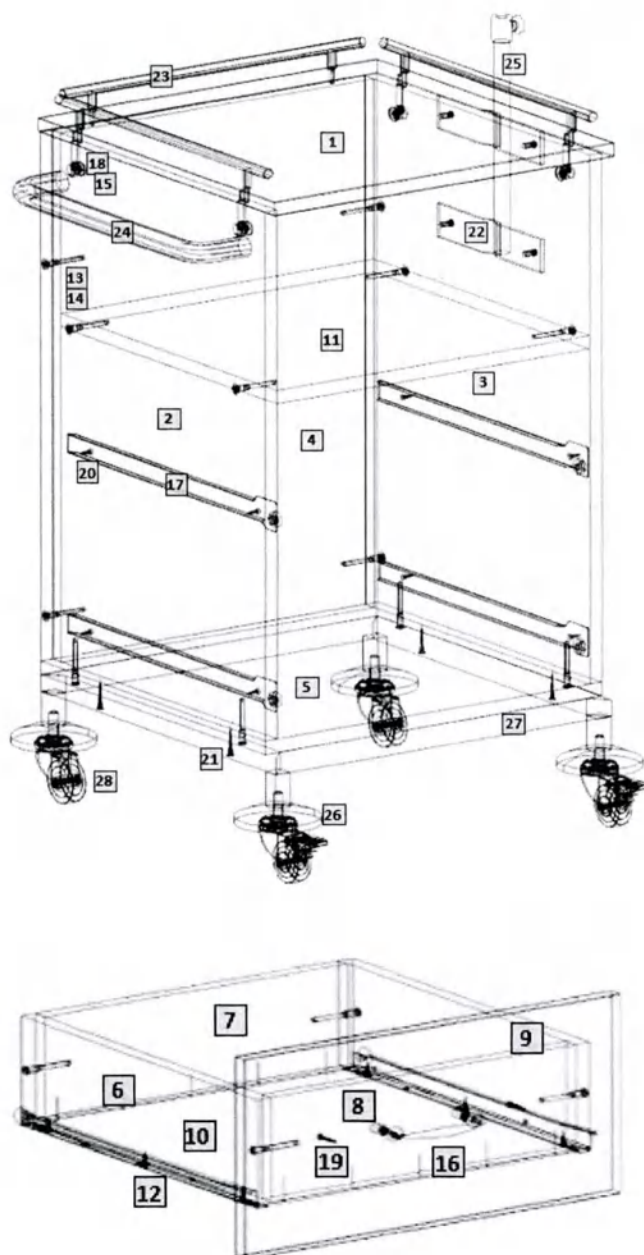


Рис.1

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
2. На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (18) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (20) закрепите L-образные части роликовых направляющих (17). На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (18) и ограждения (23) (при необходимости).
3. Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2,3) с горизонтальными стенками (11, 5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов установите заглушки (14).
4. При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках тумбы ручку для перемещения (при необходимости) и держатель (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (21) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (27).
5. Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней и задней стенками (7,8). Дно ящика (10) закрепите к передней и задней стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад L-образные части направляющих (17) и закрепите их шурупами 4x16 (20). Шурупами 3,5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад ящика (9) ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
6. В металлическое основание (27) установить колеса (28) и бамперы (26) (при необходимости).
7. При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (25) в закреплённый на боковой стенке тумбы держатель (22).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт.	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	4	400	110
7.	Задняя стенка ящика	2	360	110
8.	Передняя стенка ящика	2	360	110
9.	Фасад ящика	2	210	446
10.	Дно ящика	2	400	390
11.	Стенка горизонтальная	1	418	413
12.	Гвоздь	20	-	-
13.	Евровинт 7x50	20	-	-
14.	Заглушка для евровинта	8	-	-
15.	Заглушка для эксцентрика	4	-	-
16.	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
17.	Комплект роликовых направляющих	2	-	-
18.	Эксцентриковая стяжка	4	-	-
19.	Шуруп 3,5x30	4	-	-
20.	Шуруп 4x16	20	-	-
21.	Шуруп 4x35	4	-	-
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
25.	Штатив*	1	-	-
26.	Бампер*	1	-	-
27.	Металлическое основание	1	-	-
28.	Колесо	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.07.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

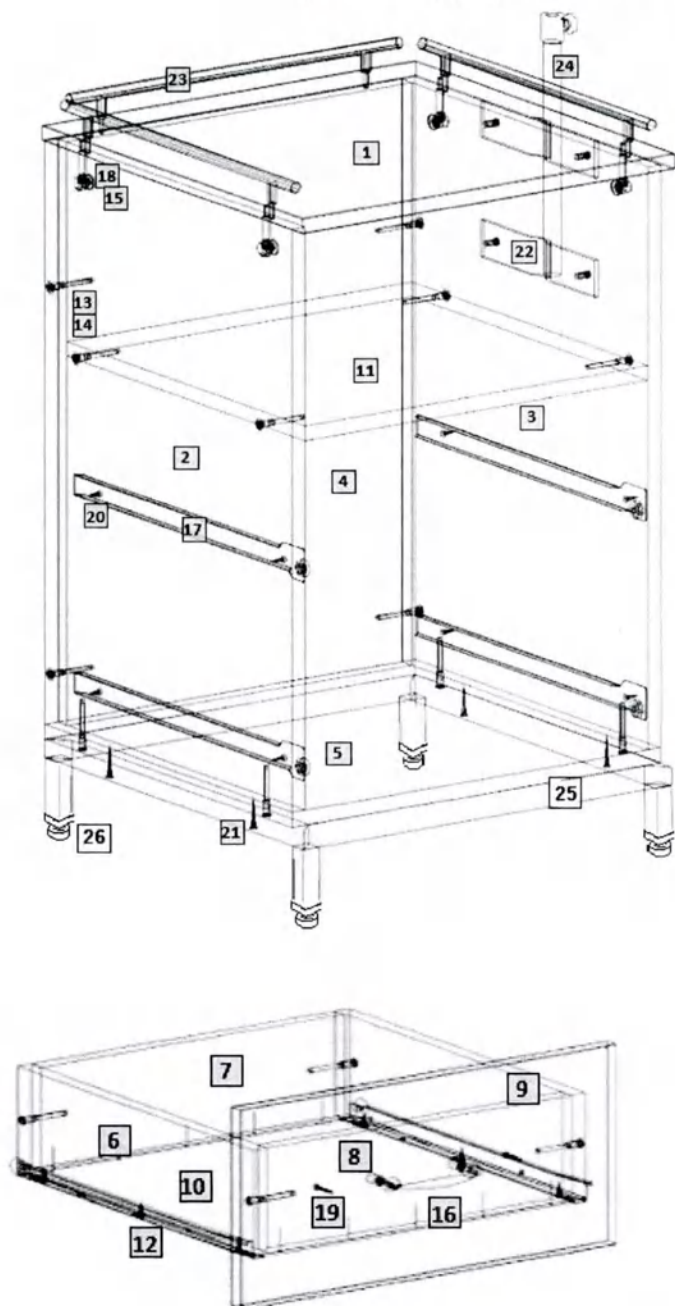


Рис.1

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.
2. На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (18) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 20 закрепите L-образные части роликовых направляющих (17). На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (18) и ограждения (23) (при необходимости).
3. Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2,3) с горизонтальными стенками (11, 5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов установите заглушки (14).
4. При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковой стенке держатель (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (21) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (25).
5. Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней и задней стенками (7,8). Дно ящика (10) закрепите к передней и задней стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад J-образные части направляющих (17) и закрепите их шурупами 4x16 (20). Шурупами 3,5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад ящика (9) ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
6. В металлическое основание (25) установить регулируемые опоры (26).
7. При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (24) в закреплённый на боковой стенке тумбы держатель (22).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	4	400	110
7.	Задняя стенка ящика	2	360	110
8.	Передняя стенка ящика	2	360	110
9.	Фасад ящика	2	210	446
10.	Дно ящика	2	400	390
11.	Стенка горизонтальная	1	418	413
12.	Гвоздь	20	-	-
13.	Евровинт 7x50	20	-	-
14.	Заглушка для евровинта	8	-	-
15.	Заглушка для эксцентрика	4	-	-
16.	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	-
17.	Комплект роликовых направляющих	2	-	-
18.	Эксцентриковая стяжка	4	-	-
19.	Шуруп 3,5x30	4	-	-
20.	Шуруп 4x16	20	-	-
21.	Шуруп 4x35	4	-	-
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	-
23.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	-
24.	Штатив*	1	-	-
25.	Металлическое основание	1	-	-
26.	Регулируемая опора	4	-	-

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.08.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

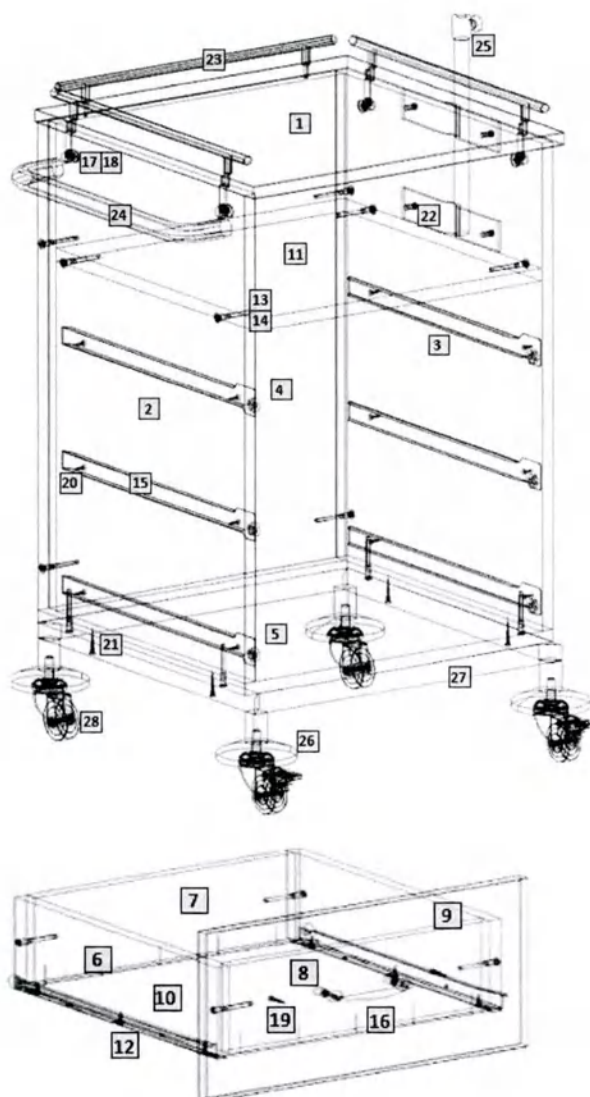


Рис.1

№	Наименование	Кол., шт	Спецификация	
			Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	6	400	80
7.	Задняя стенка ящика	3	360	80
8.	Передняя стенка ящика	3	360	80
9.	Фасад ящика	3	156	446
10.	Дно ящика	3	400	390
11.	Стенка горизонтальная	1	418	413
12.	Гвоздь	30	-	
13.	Евровинт 7x50	24	-	
14.	Заглушка для еврвинта	8	-	
15.	Комплект роликовых направляющих	3	-	
16.	Ручка-скоба	1	с винтами 4x20 -2 шт.	
17.	Эксцентриковая стяжка	4	-	
18.	Заглушка для эксцентрика	4	-	
19.	Шуруп 3,5x30	6	-	
20.	Шуруп 4x16	30	-	
21.	Евровинт 4x35	4	-	
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Ручка перемещения* для	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
25.	Штатив*	1	-	
26.	Бампер*	1	-	
27.	Металлическое основание	1	-	
28.	Колесо	4	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2 и 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (20) закрепите [- образные части роликовых направляющих (15). На крышке (1) установите штоки эксцентриковых стяжек (17) и ограждения (23) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2 и 3) с горизонтальными стенками (11 и 5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки еврвинтов установите заглушки (14).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках (2,3,6) тумбы транспортировочную ручку (24) (при необходимости) и держатель штатива (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (21) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (27).
- 5) Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней (8) и задней (7) стенками. Дно ящика (10) закрепите к передней (8) и задней (7) стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад [- образные части направляющих (15) и закрепите их шурупами 4x16 (20). Шурупами 3,5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад (9) ящика ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
- 6) В металлическое основание (27) установите колеса (28) и бамперы (26) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установите штатив (25) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (22).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.09.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

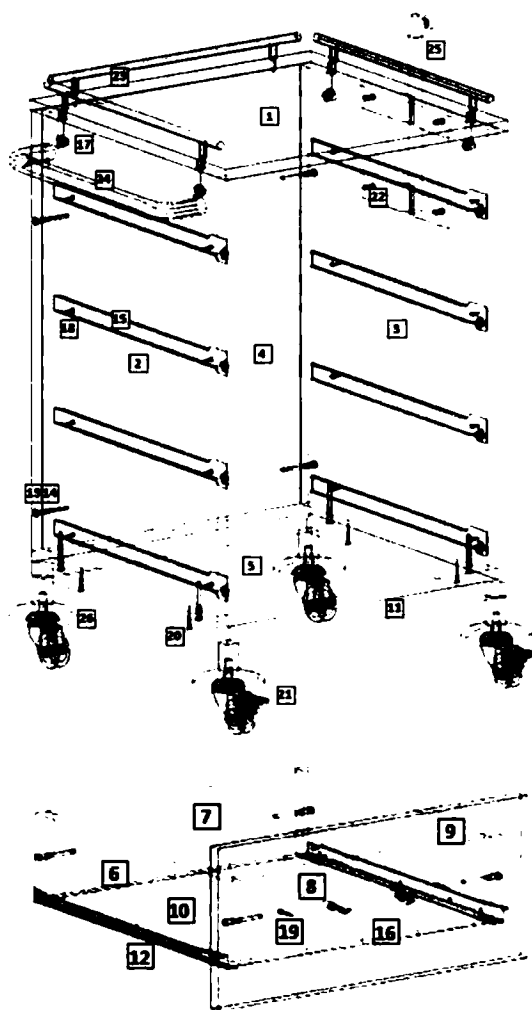


Рис.1

№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	8	400	80
7.	Задняя стенка ящика	4	360	80
8.	Передняя стенка ящика	4	360	80
9.	Фасад ящика	4	156	446
10.	Дно ящика	4	400	390
11.	Металлическое основание	1	454	456
12.	Гвоздь	40	-	
13.	Евровинт 7x50	24	-	
14.	Заглушка для евравинта	4	-	
15.	Комплект роликовых направляющих	4	-	
16.	Ручка-скоба	4	с винтами 4x20 -8 шт.	
17.	Эксцентриковая стяжка	4	-	
18.	Шуруп 4x16	40	-	
19.	Шуруп 3,5x30	8	-	
20.	Евровинт 4x35	4	-	
21.	Колесо	4	-	
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Ручка для перемещения*	1	с винтами 6.3x13- 2шт.	
25.	Штатив*	1	-	
26.	Бампер*	1	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

- 1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
- 2) На вертикальных боковых стенках (2, 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (18) закрепите L-образные части роликовых направляющих (15). На крышке 1 установите шток эксцентриковых стяжек (17) и ограждения (23) (при необходимости).
- 3) Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2, 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евравинтов (13) установите заглушки (14).
- 4) При помощи винтов 6,3x13 закрепите на боковых стенках (2, 3) тумбы ручку для перемещения (24) (при необходимости) и держатель (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (20) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (11).
- 5) Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней (8) и задней (7) стенками. Дно ящика (10) закрепите к передней (8) и задней (7) стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад L-образные части направляющих (15) и закрепите их шурупами 4x16 (20). Шурупами 3,5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад (9) ящика ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
- 6) В металлическое основание (11) установить колеса (21) и бамперы (26) (при необходимости).
- 7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (25) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (22).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМс.09.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

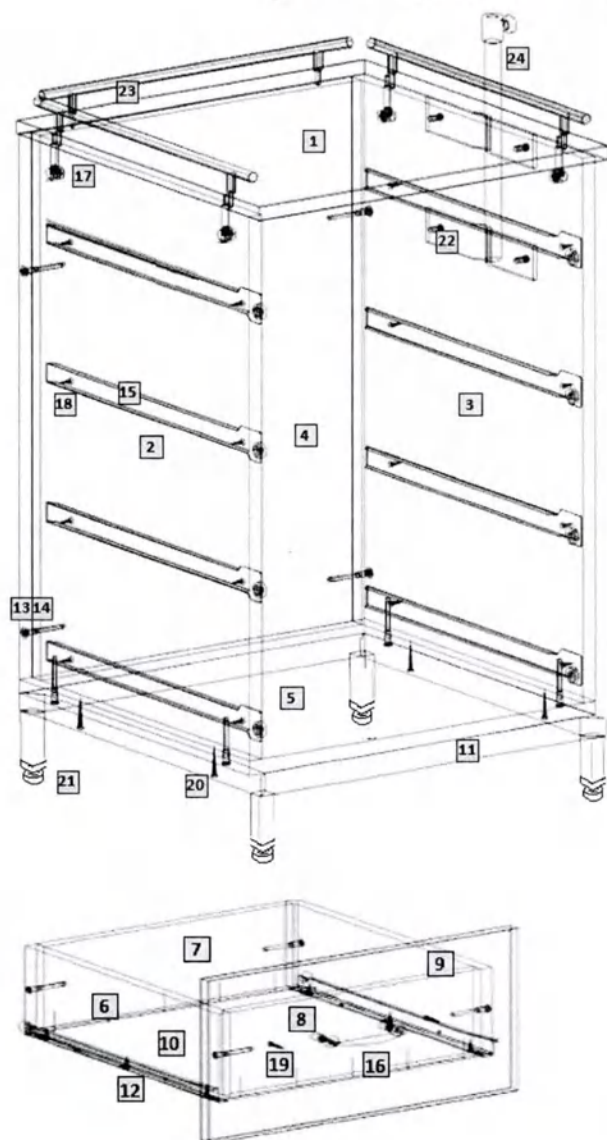


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Крышка	1	454	454
2.	Стенка боковая левая	1	626	430
3.	Стенка боковая правая	1	626	430
4.	Стенка вертикальная	1	626	418
5.	Стенка горизонтальная нижняя	1	450	430
6.	Боковая стенка ящика	8	400	80
7.	Задняя стенка ящика	4	360	80
8.	Передняя стенка ящика	4	360	80
9.	Фасад ящика	4	156	446
10.	Дно ящика	4	400	390
11.	Металлическое основание	1	454	456
12.	Гвоздь	40	-	
13.	Евровинт 7x50	24	-	
14.	Заглушка для евровинта	4	-	
15.	Комплект роликовых направляющих	4	-	
16.	Ручка-скоба	4	с винтами 4x20 - 8 шт.	
17.	Эксцентриковая стяжка	4	-	
18.	Шуруп 4x16	40	-	
19.	Шуруп 3,5x30	8	-	
20.	Евровинт 4x35	4	-	
21.	Регулируемые опоры	4	-	
22.	Держатель штатива*	1	с винтами 6.3x13- 4 шт.	
23.	Ограждения*	3	с винтами 6.3x13- 6 шт.	
24.	Штатив*	1	-	

*при наличии принадлежности в заказе (при необходимости)

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2) На вертикальных боковых стенках (2, 3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (17) в предназначенные для них отверстия; шурупами 4x16 (18) закрепите [- образные части роликовых направляющих (15). На крышке 1 установите штоки эксцентриковых стяжек (17) и ограждения (23) (при необходимости).

3) Евровинтами (13), как показано на рис.1, соедините вертикальные стенки (2, 3) с горизонтальной стенкой (5). Установите крышку (1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (13) установите заглушки (14).

4) При помощи винтов 6.3x13 закрепите на боковой стенке держатель (22) (при необходимости). Шурупами 4x35 (20) соедините каркас тумбы с металлическим основанием (11).

5) Сборка ящиков. Евровинтами (13) соедините боковые стенки ящика (6) с передней (8) и задней (7) стенками. Дно ящика (10) закрепите к передней (8) и задней (7) стенкам гвоздями (12). Установите роликами назад [- образные части направляющих (15) и закрепите их шурупами 4x16 (20). Шурупами 3.5x30 (19) закрепите фасад (9) к передней стенке ящика (8). Установите на фасад (9) ящика ручку (16). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

6) В металлическое основание (11) установить регулируемые опоры (21).

7) При необходимости установки штатива с держателем, установить штатив (24) в закрепленный на боковой стенке тумбы держатель (22).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.10.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

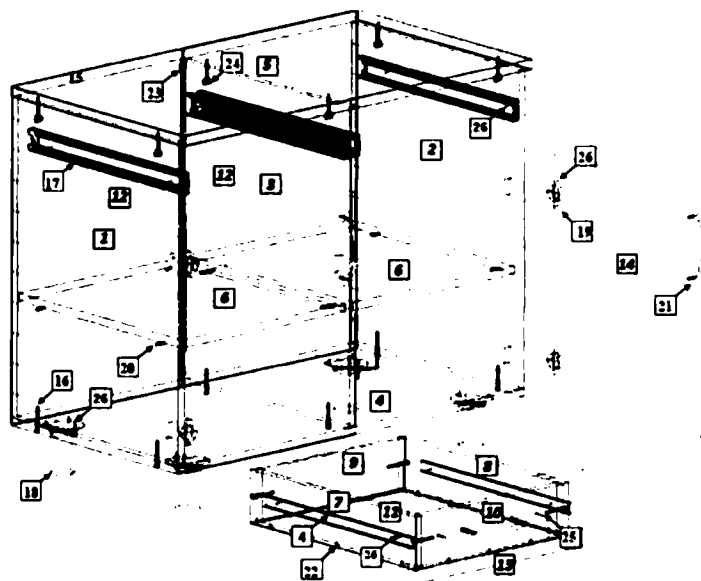


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт.	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка средняя	1	672	490
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
5.	Крышка	1	904	508
6.	Полка	2	422	480
7.	Боковая стенка ящика левая	2	480	110
8.	Боковая стенка ящика правая	2	480	110
9.	Задняя стенка ящика	2	368	110
10.	Передняя стенка ящика	2	368	110
11.	Дно ящика	2	400	480
12.	Задняя стенка	1	708	447
13.	Фасад ящика	2	168	446
14.	Дверь	1	512	446
15.	Гвоздь	40	-	
16.	Евровинт 7x50	14	-	
17.	Комплект роликовых направляющих	2	-	
18.	Опора регулируемая	4	-	
19.	Петля для накладной двери	4	-	
20.	Полкодержатель металлический	8	-	
21.	Ручка	4	с винтами 4x20 - 8 шт.	
22.	Саморез с прессшайбой	40	-	
23.	Скрепка для задней стенки	5	-	
24.	Стяжка эксцентриковая	6	-	
25.	Шуруп 3,5x30	4	-	
26.	Шуруп 4x16	49	-	

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2. На горизонтальной нижней стенке 4 шурупами 4x16 (26) закрепите опоры (18). На вертикальных боковых стенках и средней стенке (1,2,3) – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (24) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (20). На боковую (1,2) и среднюю стенку (3) шурупами 4x16 (26) закрепите направляющие (17). На крышке (5) установите штоки эксцентриковых стяжек 24.

3. Евровинтами (3), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1,2,3) с горизонтальные стенки (4). Установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (15) закрепите задние стенки (12). Для крепления задней стенки к средней стенке используйте скрепки (23) с шурупами (26).

4. Сборка ящика. Внимание! Присадка отверстий на фасадах ящиков выполнена несимметрично, один ящик собирается на левую сторону, второй – на правую. Евровинтами (16) соедините боковые стенки ящика (7,8) с передней (10) и задней (9) стенками. Дно ящика (11) закрепите саморезами (22). Шурупами 4x16 (26) закрепите узкие части направляющих (17). Шурупами 3,5x30 (25) закрепите фасад (13) к передней стенке ящика (10). Установите ручку (21). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

5. На дверь (14) шурупами 4x16 (26) закрепите петли (19), установите ручки (21). Двери закрепите к боковым стенкам тумбы. При необходимости отрегулируйте положение фасадов винтами петель. Установите полки (6) на полкодержатели 20.

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.10.02 ТУ 9452-003-68690950-2012

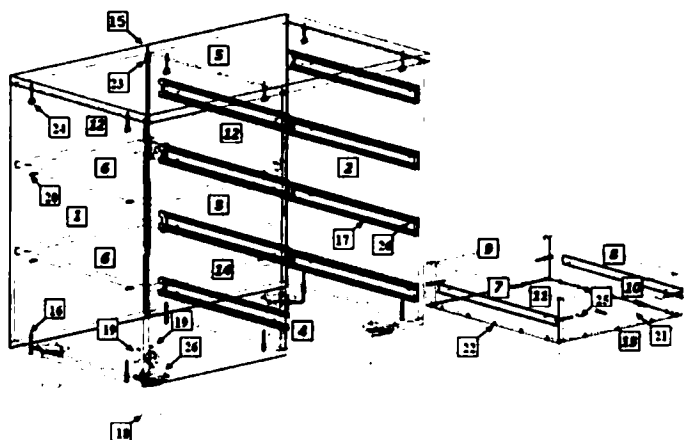


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка средняя	1	672	490
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
5.	Крышка	1	904	508
6.	Полка	2	422	480
7.	Боковая стенка ящика левая	4	480	110
8.	Боковая стенка ящика правая	4	480	110
9.	Задняя стенка ящика	4	368	110
10.	Передняя стенка ящика	4	368	110
11.	Дно ящика	4	400	480
12.	Стенка задняя	2	708	447
13.	Фасад ящика	4	168	446
14.	Фасад	1	684	446
15.	Гвоздь	40	-	
16.	Евровинт 7x50	20	-	
17.	Комплект роликовых направляющих	4	-	
18.	Опора регулируемая	4	-	
19.	Петля для накладной двери	2	-	
20.	Полкодержатель металлический	8	-	
21.	Ручка	5	с винтами 4x20 - 10 шт.	
22.	Саморез с прессшайбой	80	-	
23.	Скрепка для задней стенки	5	-	
24.	Стяжка эксцентриковая	6	-	
25.	Шуруп 3,5x30	8	-	
26.	Шуруп 4x16	59	-	

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
2. На горизонтальной нижней стенке (4) шурупами 4x16 (26) закрепите опоры (18). На вертикальных боковых стенках и средней стенке (1,2,3) – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (24) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (20); установите монтажные планки петель (19). На боковую правую стенку (2) и среднюю стенку (3) шурупами 4x16 (26) закрепите направляющие (17). На крышке (5) установите штыки эксцентриковых стяжек (24).
3. Евровинтами (16), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1,2,3) с горизонтальной стенкой (4). Установите крышку (5). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (15) закрепите заднюю стенку (12). Для крепления задней стенки к средней стенке используйте скрепки (23) с шурупами (26).
4. Сборка ящика. Евровинтами (16) соедините боковые стенки ящика (7,8) с передней (10) и задней (9) стенками. Дно ящика (11) закрепите саморезами (22). Шурупами 4x16 (26) закрепите узкие части направляющих (17). Шурупами 3,5x30 (25) закрепите фасад (13) к передней стенке ящика (10). Установите ручку (21). Установите собранные ящики в корпус тумбы.
5. На фасаде (14) шурупами 4x16 (26) закрепите петли (19), установите ручку (21). Фасад закрепите к боковой стенке тумбы. При необходимости отрегулируйте положение фасада винтами петель. Установите полки (6) на полкодержатели (20).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.10.03 ТУ 9452-003-68690950-2012

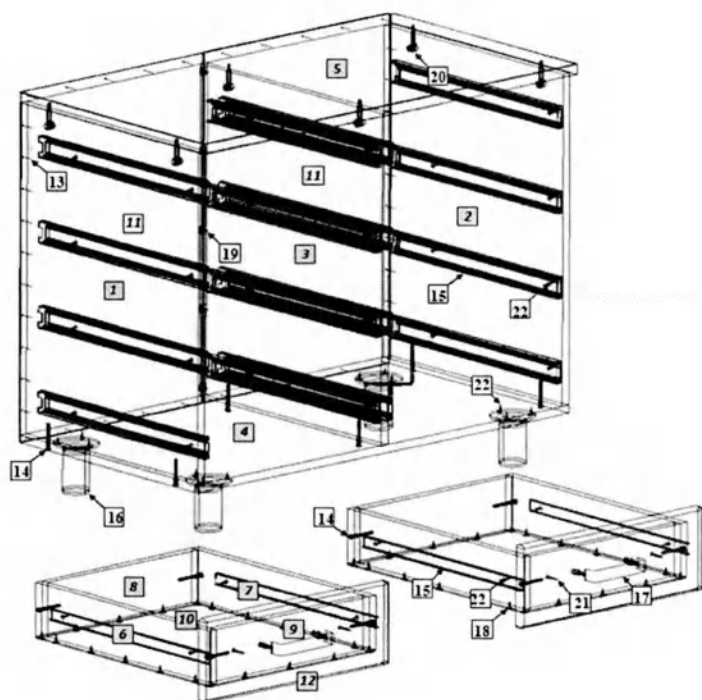


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол. , шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка средняя	1	672	490
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
5.	Крышка	1	904	508
6.	Боковая стенка ящика левая	8	480	110
7.	Боковая стенка ящика правая	8	480	110
8.	Задняя стенка ящика	8	368	110
9.	Передняя стенка ящика	8	368	110
10.	Дно ящика	8	400	480
11.	Стенка задняя	2	708	447
12.	Фасад ящика	4	168	446
13.	Гвоздь	40	-	-
14.	Евровинт 7x50	38	-	-
15.	Комплект роликовых направляющих	8	-	-
16.	Опора регулируемая	4	-	-
17.	Ручка	8	с винтами 4x20 - 16 шт.	
18.	Саморез с прессшайбой	160	-	-
19.	Скрепка для задней стенки	5	-	-
20.	Стяжка эксцентриковая	6	-	-
21.	Шуруп 3,5x30	16	-	-
22.	Шуруп 4x16	85	-	-

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку.

2. На горизонтальной нижней стенке (4) шурупами 4x16 (22) закрепите опоры (16). На вертикальных боковых стенках и средней стенке (1,2,3) – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (20) в предназначенные для них отверстия. На боковую (1,2) и среднюю стенки (3) шурупами 4x16 (22) закрепите направляющие (15). На крышке (5) установите штыки эксцентриковых стяжек (20).

3. Евровинтами (14), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1,2,3) с горизонтальной стенкой (4). Установите крышку (5). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (13) закрепите задние стенки (11). Для крепления задней стенки к средней стенке используйте скрепки (19) с шурупами (22).

4. Сборка ящиков. Внимание! Присадка отверстий на фасадах ящиков выполнена несимметрично, один ящик собирается на левую сторону, второй – на правую. Евровинтами (14) соедините боковые стенки ящика (6,7) с передней (9) и задней (8) стенками. Дно ящика (10) закрепите саморезами (18). Шурупами 4x16 (22) закрепите узкие части направляющих (15). Шурупами 3,5x30 (21) закрепите фасад (12) к передней стенке ящика (9). Установите ручку (17). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.11.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

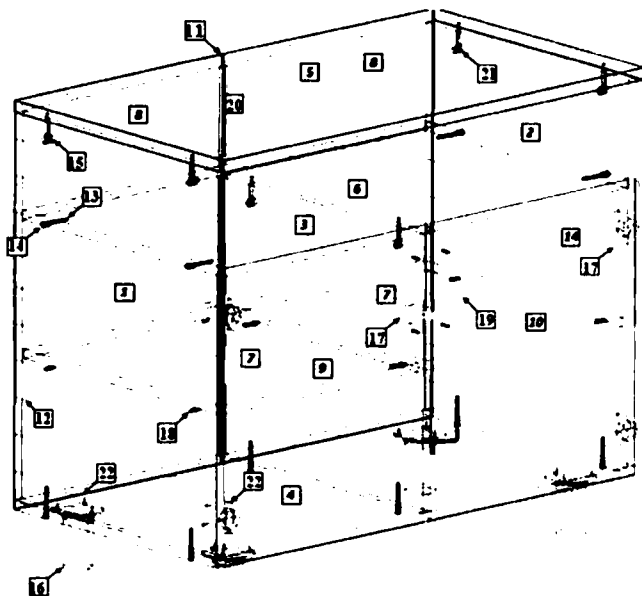


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол. , шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка средняя	1	484	490
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
5.	Крышка	1	904	508
6.	Стенка горизонтальная	1	868	490
7.	Полка	2	422	480
8.	Стенка задняя	2	708	447
9.	Дверь левая	1	512	446
10.	Дверь правая	1	512	446
11.	Профиль соединительный	1	-	
12.	Гвоздь	50	-	
13.	Евровинт 7x50	10	-	
14.	Заглушка для еврвинта	4	-	
15.	Заглушка для эксцентрика	4	-	
16.	Опора регулируемая	4	-	
17.	Петля для двери	4	-	
18.	Полкодержатель металлический	8	-	
19.	Ручка	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
20.	Скрепка для задней стенки	5	-	
21.	Стяжка эксцентриковая	6	-	
22.	Шуруп 4x16	33	-	

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2. На горизонтальной нижней стенке (4) шурупами 4x16 (22) закрепите опоры (16). На вертикальных боковых стенках и средней стенке (1,2,3) – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (21) в предназначенные для них отверстия; установите полкодержатели (18); установите монтажные планки петель (17). На крышке (5) и горизонтальной стенке (6) установите штоки эксцентриковых стяжек (21).

3. Евровинтами (13), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1,2,3) с горизонтальными стенками (4,6). Установите крышку (5). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Гвоздями (12) закрепите задние стенки (8), предварительно установив в стык соединительный профиль (11). Для крепления задней стенки (8) к средней стенке (3) используйте скрепки (20) с шурупами (22). На головки еврвинтов и эксцентриков установите заглушки (14,15).

4. На фасадах (9,10) шурупами 4x16 (22) закрепите петли (17), установите ручки (19). Двери (9,10) закрепите к боковым стенкам тумбы (1,2). При необходимости отрегулируйте положение фасадов винтами петель. Установите полки (7) на полкодержатели (18).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.11.01 ТУ 9452-003-68690950-2012

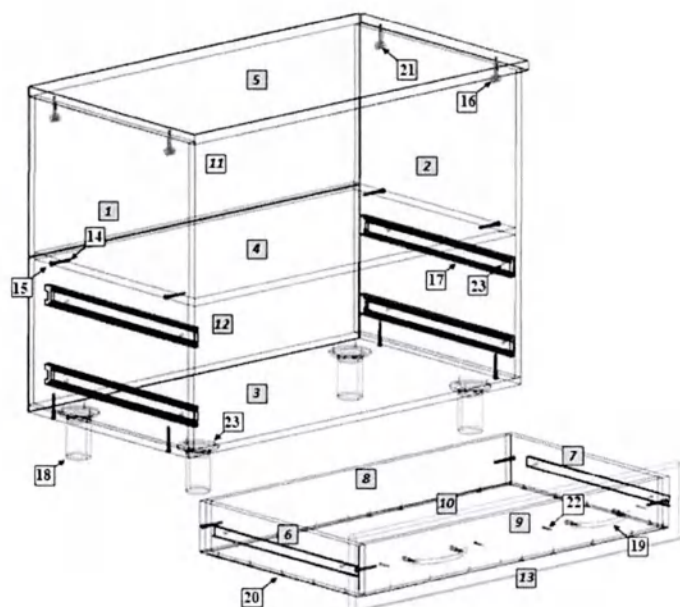


Рис. 1

Спецификация				
№	Наименование	Кол. , шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	672	490
2.	Стенка боковая правая	1	672	490
3.	Стенка горизонтальная нижняя	1	900	490
4.	Стенка горизонтальная	1	868	490
5.	Крышка	1	904	508
6.	Боковая стенка ящика левая	4	480	110
7.	Боковая стенка ящика правая	4	480	110
8.	Задняя стенка ящика	4	810	110
9.	Передняя стенка ящика	4	810	110
10.	Дно ящика	4	840	480
11.	Стенка задняя	2	372	898
12.	Стенка задняя	2	334	898
13.	Фасад ящика	4	168	896
14.	Евровинт 7x50	16	-	
15.	Заглушка для евравинта	4	-	
16.	Заглушка для эксцентрика	4	-	
17.	Комплект направляющих	2	-	
18.	Опора регулируемые	4	-	
19.	Ручка	4	с винтами 4x20 -8 шт.	
20.	Саморез с прессшайбой	60	-	
21.	Стяжка эксцентриковая	4	-	
22.	Шуруп 3.5 x 30	8	-	
23.	Шуруп 4 x 16	42		

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2. На горизонтальной нижней стенке (3) шурупами 4×16 (23) закрепите опоры (18). На вертикальных боковых стенках (1,2) – установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (21) в предназначенные для них отверстия. На боковую стенку (1,2) шурупами 4×16 (23) закрепите направляющие (17). На крышке (5) установите штоки эксцентриковых стяжек (21).

3. Евровинтами (14), как показано на рис. 1, соедините вертикальные стенки (1,2) с горизонтальными стенками (3,4). Установите крышку (5). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На головки евравинтов и эксцентриков установите заглушки (15,16).

4. Сборка ящиков. Евровинтами (14) соедините боковые стенки ящика (6,7) с передней (9) и задней (8) стенками. Дно ящика (10) закрепите саморезами (20). Шурупами 4×16 (23) закрепите узкие части направляющих (17). Шурупами 3.5×30 (22) закрепите фасад (13) к передней стенке ящика (9). Установите ручку (19). Установите собранные ящики в корпус тумбы.

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.12.00; ТМ.12.01; ТМ.12.02 ТУ 9452-003-68690950-2012

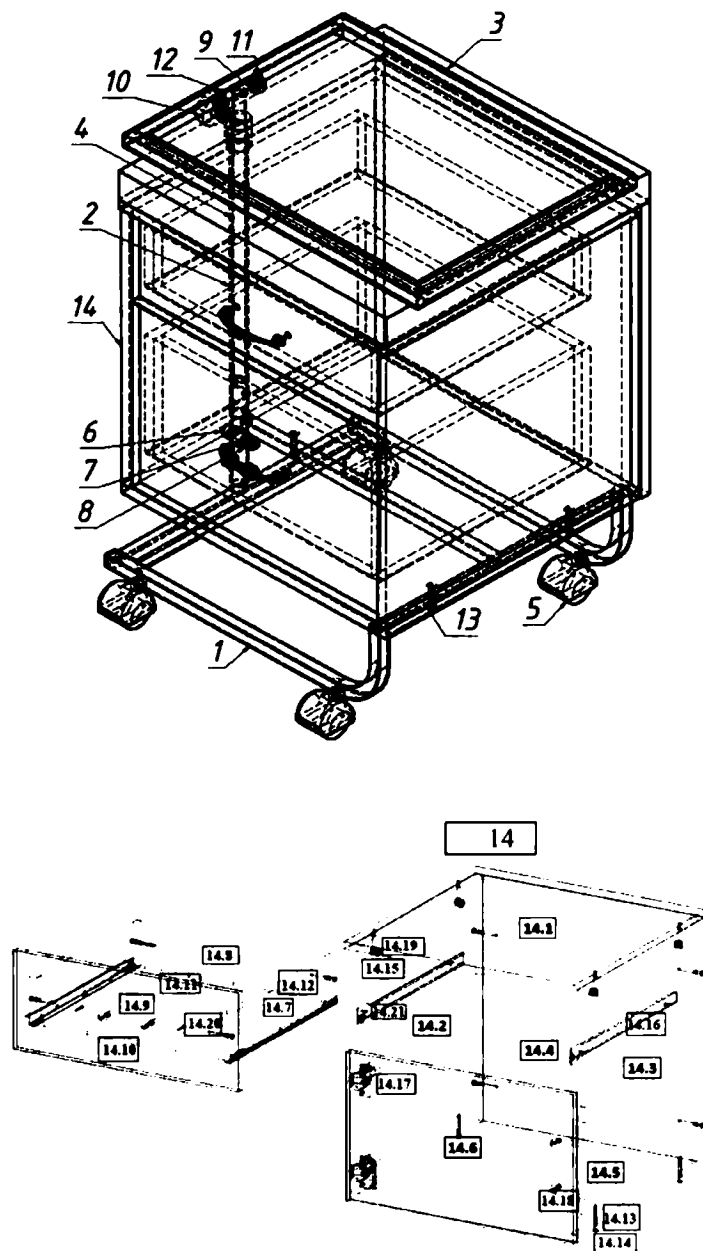


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Основание	1	-	
2.	Стойка основания	1	-	
3.	Столешница в сборе	1	-	
4.	Стойка столешницы	1	-	
5.	Колесо	4	-	
6.	Болт М10х40	2	-	
7.	Шайба М10	6	-	
8.	Гайка М10	2	-	
9.	Пластиковая заглушка	6	-	
10.	Ручка фиксатор	1	-	
11.	Гровер М10	2	-	
12.	Болт М10х20	2	-	
13.	Стяжка межсекционная	3	-	
14.	Тумба	1	-	
14.1	Крышка	1	504	500
14.2	Стенка боковая левая	1	515	480
14.3	Стенка боковая правая	1	515	480
14.4	Стенка вертикальная задняя	1	515	468
14.5	Стенка горизонтальная нижняя	1	500	480
14.6	Дверь	1	314	496
14.7	Стенка ящика боковая	2	400	100
14.8	Стенка ящика задняя	1	410	100
14.9	Стенка ящика передняя	1	410	100
14.10	Фасад ящика	1	210	496
14.11	Дно ящика	1	400	440
14.12	Гвоздь	10	-	
14.13	Евровинт 7 x 50	12	-	
14.14	Заглушка для евравинта	4	-	
14.15	Заглушка для эксцентрика	4	-	
14.16	Комплект направляющих	1	-	
14.17	Петля для накл. двери	2	-	
14.18	Ручка	2	с винтами 4х20 -4 шт.	
14.19	Стяжка эксцентриковая	4	-	
14.20	Шуруп 3.5 x 30	2	-	
14.21	Шуруп 4 x 16	18	-	

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку, ключи на 17 и 12мм.

2) Сборка металлокаркаса:

Стойку основания (2), вставляем в основание (1), крепим при помощи болта (6) с шайбами (7) и гайкой (8), притянуть ключом на 17. Закрывать видимые части болта (6) и гайки (8) декоративными заглушками (9). Перевернуть основание и закрепить колеса (5) при помощи ключа на 12мм. Перевернуть столешницу (3) и закрепить к ней стойку столешницы (4) с помощью болта (12) с шайбой (7), гровером (11), притянуть ключом на 17мм.

3) Сборка тумбы:

3.1) На вертикальных боковых стенках (14.2,14.3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (14.19) в предназначенные для них отверстия. На крышке (14.1) установите штоки эксцентриковых стяжек (14.19).

3.2) Евровинтами (14.13), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (14.2,14.3) с горизонтальной стенкой (14.5). Установите крышку (14.1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (14.13) и эксцентриков (14.15) установите заглушки (14.14, 14.15).

3.3) Сборка ящика. Евровинтами (14.13) соедините боковые стенки ящика (14.7) с передней (14.9) и задней (14.8) стенками. Дно ящика (14.11) закрепите к передней (14.9) и задней (14.8) стенкам гвоздями (14.12). Установите роликами назад J-образные части направляющих (14.16) и закрепите их шурупами 4×16 (14.21). Шурупами 3.5×30 (14.20) закрепите фасад (14.10) к передней стенке ящика (14.9). Установите на фасад ящика ручку (14.18). Установите собранный ящик в корпус тумбы.

3.4) На двери шурупами 4×16 закрепите петли (14.17); установите ручку (14.18). Дверь (14.6) закрепите к боковой стенке тумбы шурупами (14.21). При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель.

4) Поставить собранную тумбу (14), на основание (1), соединить основание (1) с дном тумбы стяжками (13) при помощи крестовой отвертки стянуть элементы.

5) Вставить стойку столешницы (4) в стойку основания (2), закрепить столешницу в нужном положении ручкой фиксатором (10).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.13.00; ТМ.13.01; ТМ.13.02 ТУ 9452-003-68690950-2012

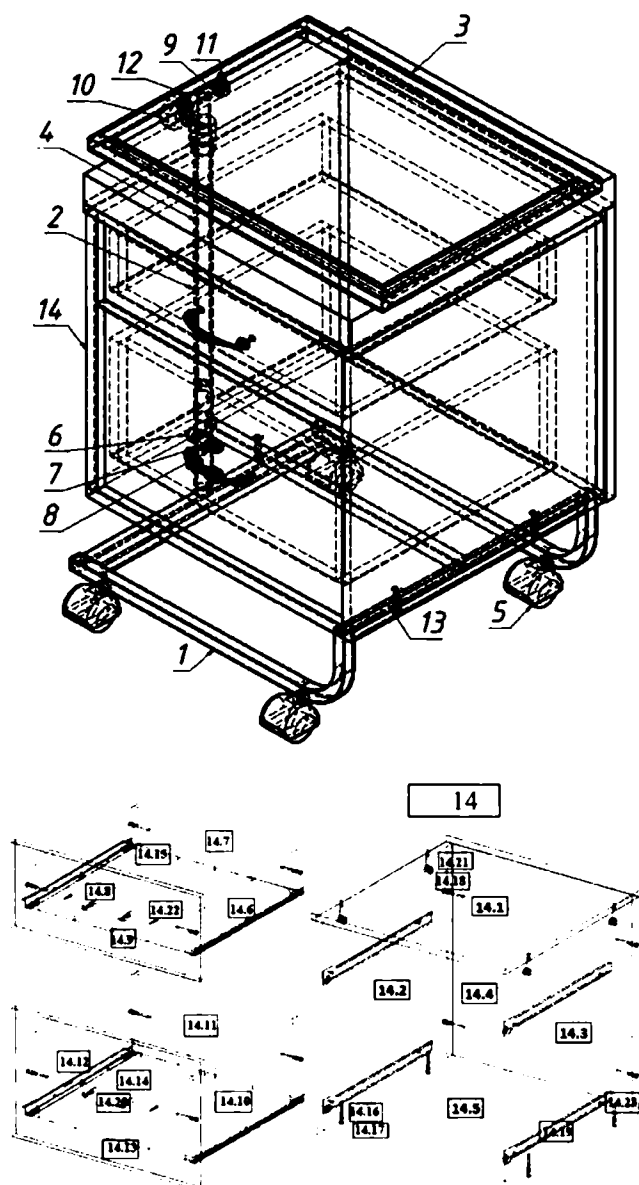


Рис. 1

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку, ключи на 17 и 12мм.

2) Сборка металлокаркаса:

Стойку основания (2), вставляем в основание (1), крепим при помощи болта (6) с шайбами (7) и гайкой (8), притянуть ключом на 17. Закрывать видимые части болта (6) и гайки (8) декоративными заглушками (9). Перевернуть основание и закрепить колеса (5) при помощи ключа на 12мм. Перевернуть столешницу (3) и закрепить к ней стойку столешницы (4) с помощью болта (12) с шайбой (7), гровером (11), притянуть ключом на 17мм.

3) Сборка тумбы:

3.1) На вертикальных боковых стенках (14.2, 14.3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (14.21) в предназначенные для них отверстия. На крышке (14.1) установите штоки эксцентриковых стяжек (14.8). Евровинтами (14.16), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (14.2, 14.3) с горизонтальной стенкой (14.5). Установите крышку (14.1). Застяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (14.16) и эксцентриков (14.21) установите заглушки (14.17, 14.18).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Основание	1	-	-
2.	Стойка основания	1	-	-
3.	Столешница в сборе	1	-	-
4.	Стойка столешницы	1	-	-
5.	Колесо	4	-	-
6.	Болт М10х40	2	-	-
7.	Шайба М10	6	-	-
8.	Гайка М10	2	-	-
9.	Пластиковая заглушка	6	-	-
10.	Ручка фиксатор	1	-	-
11.	Гровер М10	2	-	-
12.	Болт М10х20	2	-	-
13.	Стяжка межсекционная	3	-	-
14.	Тумба	1	-	-
14.1	Крышка	1	504	500
14.2	Стенка боковая левая	1	515	480
14.3	Стенка боковая правая	1	515	480
14.4	Стенка вертикальная задняя	1	515	468
14.5	Стенка горизонтальная нижняя	1	500	480
14.6	Стенка ящика боковая	2	400	100
14.7	Стенка ящика задняя	1	410	100
14.8	Стенка ящика передняя	1	410	100
14.9	Фасад ящика	1	210	496
14.10	Стенка ящика боковая	2	400	200
14.11	Стенка ящика задняя	1	410	200
14.12	Стенка ящика передняя	1	410	200
14.13	Фасад ящика	1	314	496
14.14	Дно ящика	2	400	440
14.15	Гвоздь	20	-	-
14.16	Евровинт 7 x 50	16	-	-
14.17	Заглушка для еврвинта	4	-	-
14.18	Заглушка для эксцентрика	4	-	-
14.19	Комплект направляющих	2	-	-
14.20	Ручка-скоба	2	с винтами 4x20 -4 шт.	
14.21	Стяжка эксцентриковая	4	-	-
14.22	Шуруп 3.5 x 30	4	-	-
14.23	Шуруп 4 x 16	20	-	-

3.2) Сборка ящиков. Евровинтами (14.16) соедините боковые стенки ящика (14.6, 14.10) с передней (14.8, 14.12) и задней (14.7, 14.11) стенками. Дно ящика (14.14) закрепите к передней (14.8, 14.12) и задней (14.7, 14.11) стенкам гвоздями (14.15). Установите роликами назад J-образные части направляющих и закрепите их шурупами 4×16 (14.23). Шурупами 3.5×30 (14.22) закрепите фасад (14.9, 14.13) к передней стенке ящика (14.8, 12.12). Установите на фасад ящика ручку (14.20).

4) Поставить собранную тумбу (14), на основание (1), соединить основание (1) с дном тумбы стяжками (13) при помощи крестовой отвертки стянуть элементы.

5) Вставить стойку столешницы (4) в стойку основания (2), закрепить столешницу в нужном положении ручкой фиксатором (10).

Схема сборки изделия:
Тумба медицинская ТМ.14.00; ТМ.14.01; ТМ.14.02 ТУ 9452-003-68690950-2012

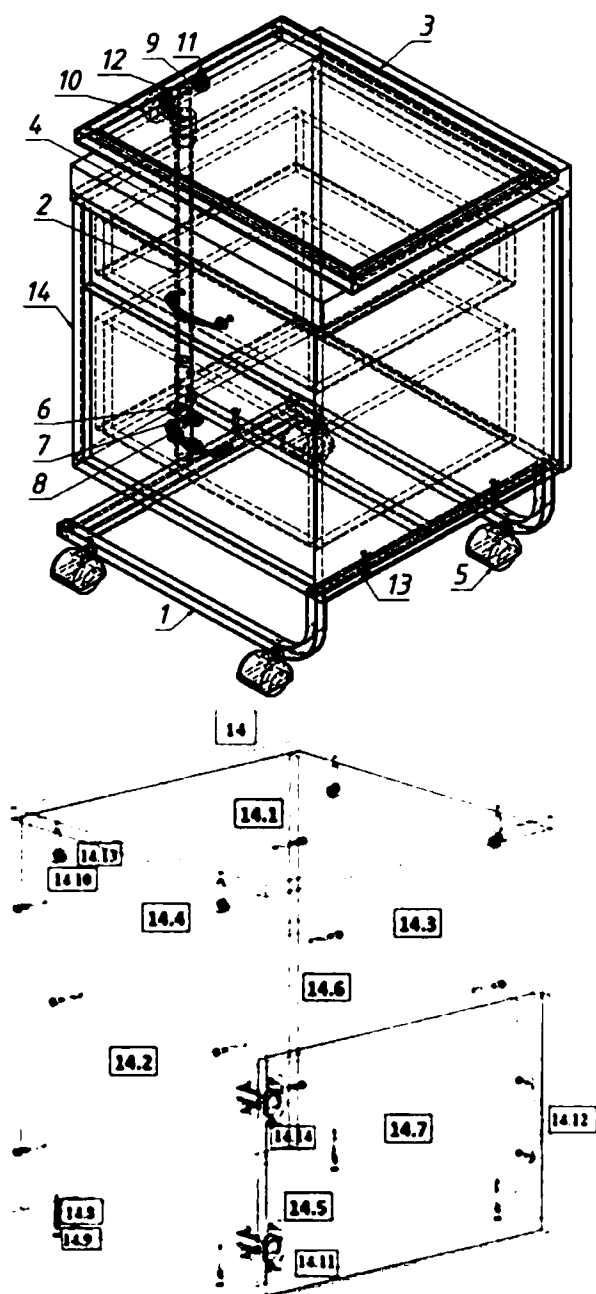


Рис.1

Последовательность сборки

1) Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку, ключи на 17 и 12мм.

2) Сборка металлокаркаса:

Стойку основания (2), вставляем в основание (1), крепим при помощи болта (6) с шайбами (7) и гайкой (8), притянуть ключом на 17. Закрывать видимые части болта (6) и гайки (8) декоративными заглушками (9). Перевернуть основание и закрепить колеса (5) при помощи ключа на 12мм. Перевернуть столешницу (3) и закрепить к ней стойку столешницы (4) с помощью болта (12) с шайбой (7), гровером (11), притянуть ключом на 17мм.

3) Сборка тумбы:

3.1) На вертикальных боковых стенках (14.2 и 14.3) установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (14.10) в предназначенные для них отверстия. На крышке (14.1) установите штоки эксцентриковых стяжек (14.10).

3.2) Евровинтами (14.8), как показано на рис.1, соедините вертикальные боковые стенки (14.2 и 14.3) с горизонтальными стенками (14.5 и 14.6). Установите крышку (14.1). Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. На видимые головки евровинтов (14.8) и эксцентриков (14.13) установите заглушки (14.9 и 14.10).

3.3) На двери (14.7) шурупами 4×16 (14.14) закрепите петли (14.11); установите ручку (14.12). Дверь (14.7) закрепите к боковой стенке тумбы шурупами (14.14). При необходимости отрегулируйте положение двери винтами петель.

4) Поставить собранную тумбу (14), на основание (1), соединить основание (1) с дном тумбы стяжками (13) при помощи крестовой отвертки стянуть элементы.

5) Вставить стойку столешницы (4) в стойку основания (2), закрепить столешницу в нужном положении ручкой фиксатором (10).

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Основание	1	-	
2.	Стойка основания	1	-	
3.	Столешница в сборе	1	-	
4.	Стойка столешницы	1	-	
5.	Колесо	4	-	
6.	Болт М10х40	2	-	
7.	Шайба М10	6	-	
8.	Гайка М10	2	-	
9.	Пластиковая заглушка	6	-	
10.	Ручка фиксатор	1	-	
11.	Гровер М10	2	-	
12.	Болт М10х20	2	-	
13.	Стяжка межсекционная	3	-	
14.	Тумба	1	-	
14.1	Крышка	1	504	500
14.2	Стенка боковая левая	1	515	480
14.3	Стенка боковая правая	1	515	480
14.4	Стенка вертикальная задняя	1	515	468
14.5	Стенка горизонтальная нижняя	1	500	480
14.6	Стенка горизонтальная	1	468	463
14.7	Дверь	1	314	496
14.8	Евровинт 7 x 50	12	-	
14.9	Заглушка для евровинта	8	-	
14.10	Заглушка для эксцентрика	4	-	
14.11	Петля для накладной двери	2	-	
14.12	Ручка-скоба	1	с винтами 4х20 -2 шт.	
14.13	Стяжка эксцентриковая	4	-	
14.14	Шуруп 4 x 16	20	-	

Всего прошито и пронумеровано 48
(сорок восемь) листов

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ:
CH.01.00; CH.02.00

Паспорт
CH.00.00 ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	4
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол прикроватный: СН.01.00; СН.02.00. Далее по тексту – Изделие, Столы.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Стол прикроватный: СН.01.00; СН.02.00» указана в Таблице 1.
Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Стол прикроватный, варианты исполнения:		1	
1.1	СН.01.00; СН.02.00, в составе:	СН.01.00; СН.02.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Стол прикроватный		1	
1.1.2	Паспорт	СН.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для обеспечения сестринского ухода, приема лекарств и проведения прочих манипуляций при обслуживании, лечении и реабилитации тяжелобольных и маломобильных пациентов в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»)

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 2:

- Стол прикроватный: СН.01.00; СН.02.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Не использовать как опору и средство транспортировки.
- 3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.6 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Стол прикроватный				
CH.01.00	700±70 х 450±45 х 750-1130±80	8±1	столешница-8	Металлический разборный каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры
CH.02.00	700±70 х 450±45 х 750-1130±80	8±1	столешница-8	Металлический разборный каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Стол прикроватный	CH.01.00; CH.02.00	50	-	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантии изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол прикроватный: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол прикроватный: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковывания _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол прикроватный _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Стол прикроватный: CH.01.00; CH.02.00.


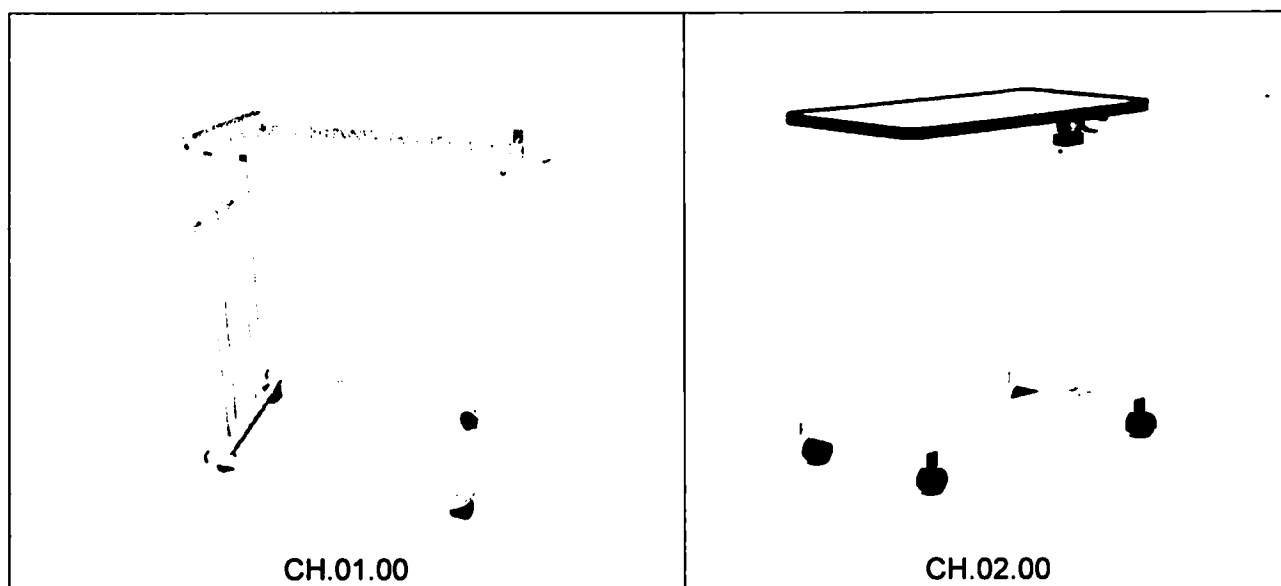


Схема сборки изделия:
Стол прикроватный СН.01.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

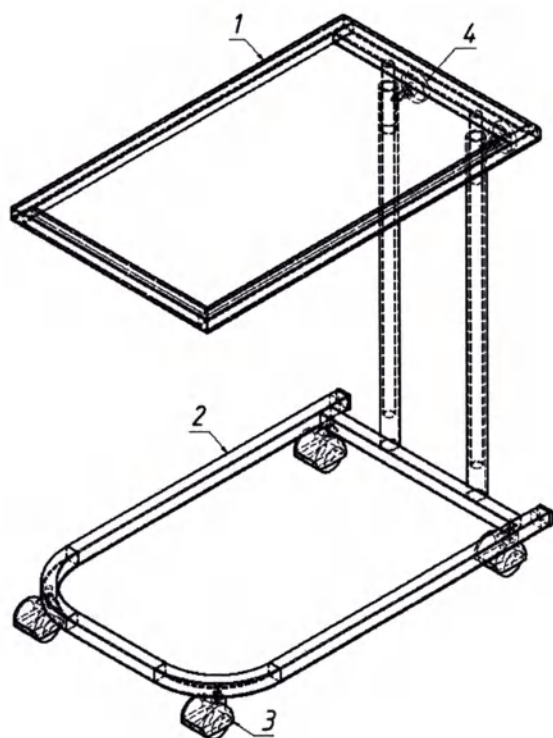

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница в сборе с рамкой	1
2	Каркас основания	1
3	Колесо мебельное	4
4	Ручка болт	2


Рис.1

Последовательность сборки

Для сборки потребуется ключ на 12мм

1. Распаковать компоненты стола.
2. Вставить рамку столешницы (1) в каркас основания (2). Зафиксировать необходимую высоту столешницы ручками (4).
3. При помощи гаечного ключа соединить колеса (3) с основанием (2).

Схема сборки изделия:
Стол прикроватный СН.02.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

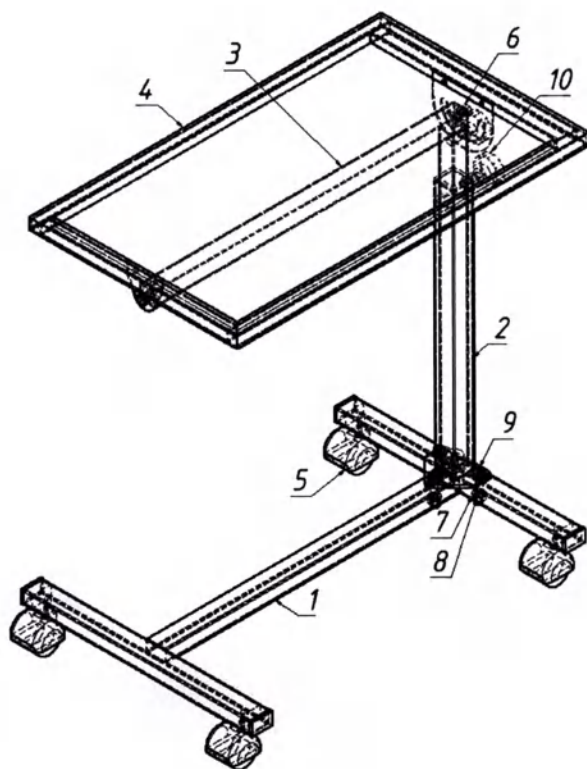

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Основание	1
2	Стойка основания	1
3	Стойка выдвижная	1
4	Столешница в сборе с рамкой	2
5	Колесо	4
6	Болт М10х20	2
7	Шайба М10	9
8	Гровер М10	3
9	Болт М10х50	3
10	Ручка-фиксатор	2

Рис. 1

Последовательность сборки

Для сборки потребуется 2 гаечных ключа на 12мм и на 17мм

1. К основанию (1), закрепить стойку основания (2) при помощи болта М10х50, шайб (7), гровера (8) и гаечного ключа на 17мм
2. Перевернуть столешница (4) и закрепить к ней Стойку выдвижную (3) при помощи болтов (6), шайб (7) и гаечного ключа на 17мм. Зафиксировать столешницу (1), на стойке (3) при помощи ручки-фиксатора (10).
3. Вставить выдвижную стойку (3) в стойку основания (2) зафиксировать при помощи ручки фиксатора (10)
4. Поставить колеса (5), в основание (1) с помощью ключа на 12мм

Всего прошито и пронумеровано 11
(однократно) лист об

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ:
СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00

Паспорт
СИ.00.00.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	5
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол инструментальный: СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00. Далее по тексту – Изделие, Столы.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов

медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Стол инструментальный: СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Стол инструментальный, варианты исполнения:		1	
1.1	СИ.02.00; СИ.02.01. Н; СИ.03.00; СИ.03.01. Н; СИ.05.00, в составе:	СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Стол инструментальный		1	
1.1.2	Паспорт	СИ.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для транспортировки медицинских и хирургических инструментов от стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (операционную, процедурную, перевязочную и т.д.), а так же для размещения и временного хранения в операционных, процедурных, перевязочных в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»)

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 2:

- Стол инструментальный: СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
 3.4 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
 3.5 Не допускайте раскачивания изделия.
 3.6 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
 3.7 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
 3.8 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Стол инструментальный				
СИ.02.00	580±60 х 450±45 х 935±90	12±1	полка металлическая -4 полка стеклянная-3	Разборный металлический каркас, две полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.02.01.Н	545±55 х 450±45 х 830±80	11±1	полка -4	Разборный металлический каркас, две полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.03.00	580±60 х 450±45 х 935±90	15±1,5	полка металлическая -4 полка стеклянная-3	Разборный металлический каркас, три полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.03.01.Н	545±55 х 450±45 х 830±80	15±1,5	полка -4	Разборный металлический каркас, три полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СИ.05.00	550±55 х 350±35 х 600- 800±60	7±1	столешница-5	Разборный металлический каркас, столешница, регулируемая по высоте; изделие устанавливается на колесные опоры

- 4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Стол инструментальный	СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00	50	-	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантии изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол инструментальный: _____
обозначение исполнения

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол инструментальный: _____
обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковки _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол инструментальный _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Стол инструментальный: СИ.02.00; СИ.02.01.Н; СИ.03.00; СИ.03.01.Н; СИ.05.00.

 СИ.02.00	 СИ.02.01.Н	 СИ.03.00
 СИ.03.01.Н	 СИ.05.00	

Схема сборки изделия:
Стол инструментальный СИ.02.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

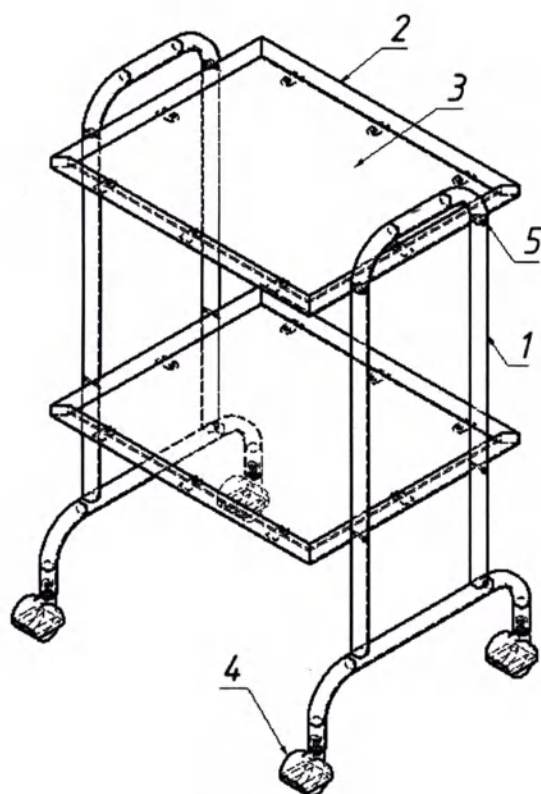


Рис. 1

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Каркас	2
2	Рамка	2
3	Полка	2
4	Колесо мебельное	4
5	Саморез 4,2х32	8

Последовательность сборки

Для сборки потребуется крестовая отвертка.

1. Распаковать компоненты столика.
2. Саморезами (5) через отверстия в каркасах (1) закрепить рамки полок (2).
3. Установить на ножки каркасов (1) колеса (4).
4. Установить полки (3) в рамки (2).

Схема сборки изделия:
Стол инструментальный СИ.02.01.Н ТУ 9452-003-68690950-2012

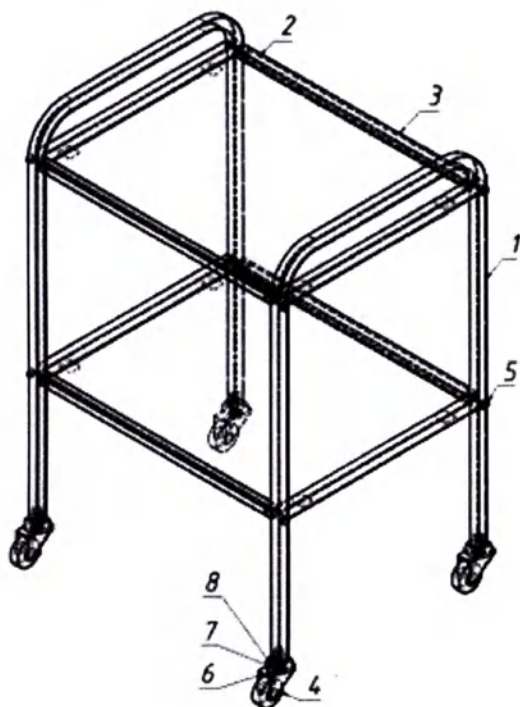


Рис.1

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Каркас	2
2	Трубка	4
3	Полка	2
4	Колесо	4
5	Винт М8х35	8
6	Болт М10х25	4
7	Шайба 10	4
8	Гровер 10	4

Последовательность сборки

Для сборки потребуется ключ на 13мм и ключ на 17мм

1. Распаковать компоненты столика.
2. Соединить каркасы (1) с трубками (2) винтами (5). В случае ромбовидности образующихся при этом рамок под полки найти положение трубок (2) (вращая их вокруг собственной оси) при котором рамки под полки станут прямоугольными.
3. Ввернуть в ножки каркасов (1) колеса (4) при помощи болта (6), шайбы (7) и гровера (8).
4. Установить полки (3) в собранный каркас столика.

Схема сборки изделия:
Стол инструментальный СИ.03.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

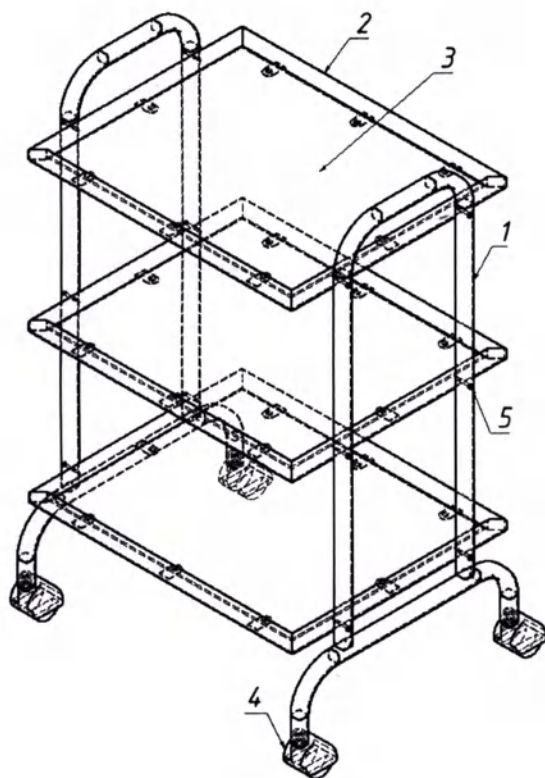


Рис.1

Спецификация		
№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Каркас	2
2	Рамка	3
3	Полка	3
4	Колесо мебельное	4
5	Саморез 4,2х32	12

Последовательность сборки

Для сборки потребуется крестовая отвертка.

1. Распаковать компоненты столика.
2. Саморезами (5) через отверстия в каркасах (1) закрепить рамки полок (2).
3. Установить на ножки каркасов (1) колеса (4).
4. Установить полки (3) в рамки (2).

Схема сборки изделия:
Стол инструментальный СИ.03.01.Н ТУ 9452-003-68690950-2012

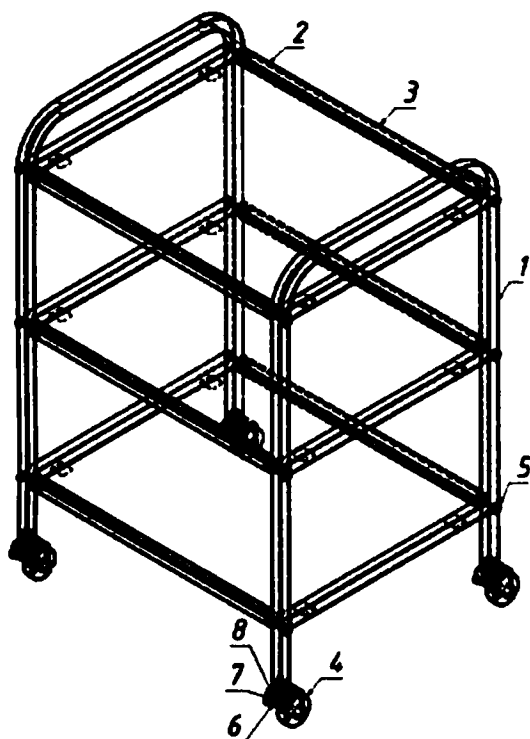


Рис. 1


Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Каркас	2
2	Трубка	6
3	Полка	3
4	Колесо	4
5	Винт М8х35	12
6	Болт М10х25	4
7	Шайба 10	4
8	Гровер 10	4

Последовательность сборки

Для сборки потребуется ключ на 13мм и ключ на 17мм

1. Распаковать компоненты столика.
2. Соединить каркасы (1) с трубками (2) винтами (5). В случае ромбовидности образующихся при этом рамок под полки найти положение трубок (2) (вращая их вокруг собственной оси) при котором рамки под полки станут прямоугольными.
3. Ввернуть в ножки каркасов (1) колеса (4) при помощи болта (6), шайбы (7) и гровера (8).
4. Установить полки (3) в собранный каркас столика.

Схема сборки изделия:
Стол инструментальный СИ.05.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

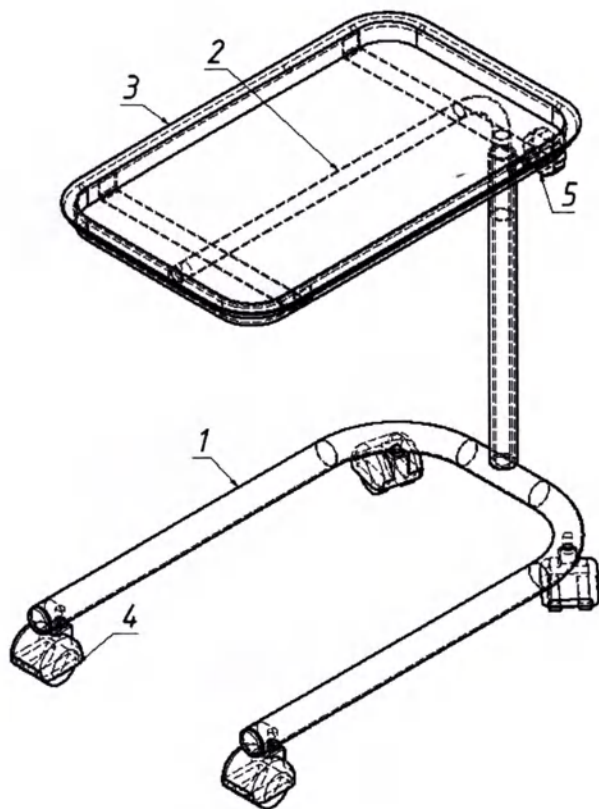

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Кронштейн столешницы (лотка)	1
3	Лоток из нержавеющей стали	1
4	Колесо мебельное	4
5	Моховик	1

Рис.1

Последовательность сборки

Для сборки потребуется ключ на 12 мм

1. Распаковать компоненты столика.
2. Установить на ножки каркаса (1) колеса (4) с помощью ключа на 12мм.
3. Установить кронштейн столешницы (2) на каркас (1), закрепить при помощи моховика (5) на необходимой высоте.
4. Установить лоток (3) в кронштейн столешницы (2).

Всего прошито и пронумеровано 14
(сетевая часть) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____



ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ:
СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03

Паспорт
СМ.00.00 ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	5
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол манипуляционный: СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03. Далее по тексту – Изделие, Столы.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов

медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Стол манипуляционный: СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Стол манипуляционный, варианты исполнения:		1	
1.1	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03, в составе:	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03	-	Указать исполнение
1.1.1	Стол манипуляционный		1	
1.1.2	Паспорт	СМ.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для создания специальных условий при размещении стерильных хирургических инструментов, шовного материала и других предметов, необходимых во время проведения операции и/или медицинских процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 2:

- Стол манипуляционный: СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется выдвигать все ящики одновременно, а также опираться на выдвинутые ящики.
- 3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.6 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Стол манипуляционный				
СМ.03.00	765±75 х 485±50 х 1025±100	25±2,5	полка-15; ящик-5	Выдвижной ящик на телескопических направляющих; две полки; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.01	765±75 х 485±50 х 1025±100	24,5±2,5	полка-15; ящик-5	Выдвижной ящик на телескопических направляющих; полка; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.02	765±78 х 485±50 х 1025±100	36±4	полка-15; ящик-5	Два выдвижных ящика на телескопических направляющих; изделие устанавливается на колесные опоры
СМ.03.03	765±75 х 485±50 х 1025±100	44±4,5	полка-15; ящик-5	Три выдвижных ящика на телескопических направляющих; изделие устанавливается на колесные опоры

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Стол манипуляционный	СМ.03.00; СМ.03.01; СМ.03.02; СМ.03.03	100	-	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделий

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:

«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;

«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».

- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:

«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;

«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».

- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Бережь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантия изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол манипуляционный: _____
обозначение исполнения

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол манипуляционный: _____
обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковки _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол манипуляционный _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Стол манипуляционный: CM.03.00; CM.03.01; CM.03.02; CM.03.03.



CM.03.00



CM.03.01



CM.03.02



CM.03.03

Всего прошито и пронумеровано 9
(два) лист об

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО Медицинская Компания «АСК»



ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ:

ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02;
ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01;
ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00;
ШММ.02.01; ШСС.02.01

Паспорт

ШММ.00.00.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	6
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	9
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	9
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	10
Приложение 1	11

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф для медикаментов: ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01. Далее по тексту – Изделие, Шкаф.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов
медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Шкаф для медикаментов: ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Шкаф для медикаментов, варианты исполнения:		1	
1.1	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01, в составе:	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01	-	Указать исполнение
1.1.1	Шкаф для медикаментов	-	1	
1.1.2	Паспорт	ШММ.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для создания специальных условий при размещении и хранении лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Шкаф для медикаментов: ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02;

ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01;

ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.

3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.6 Не допускайте раскачивания изделия.

3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.

3.9 Загрузку шкафа (при наличии в наборе) следует осуществлять таким образом, чтобы наибольший вес груза приходился на нижние полки. Закрепите шкаф к стене для исключения риска опрокидывания в случае несоблюдения рекомендаций по загрузке

3.10 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Шкаф для медикаментов				
ША.01.00	1000±100 x 560±55 x 1910±190	99±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами, с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.01.01	1000±100 x 560±55 x 1910±190	99±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами, с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.00	1100±100 x 650±65 x 1910±190	103±10	полка-15	Отделение с двумя дверками с замком и двумя ключами; с внутренней стороны дверей прикреплены ячейки

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
				и внутри шкафа двухсторонние поворотные створки с ячейками; внутри трейзер с дверкой с замком и двумя ключами; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.01	1040±100 х 380±40 х 1910±190	140±14	ящик-5	32 выдвижных ящика, две дверки; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ША.02.02	1040±100 х 380±40 х 1910±190	140±14	ящик-5	32 выдвижных ящика; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.01.00	600±60 х 400±40 х 1850±185	39±4	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянная дверка, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.01.01	560±55 х 320±30 х 1730±170	35±3,5	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянная дверка, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.01.00	600±60 х 400±40 х 1850±185	36±4	полка металлическая-15	Верхняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.01.01	560±55 х 320±30 х 1730±170	32±3	полка металлическая-15	Верхняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, три полки; нижняя секция - металлическая дверка с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШСС.01.01	560±55 х 320±30 х 1730±170	36±3,5	полка стеклянная-3;	Верхняя секция - стеклянная дверка, три полки; нижняя секция - стеклянная дверка, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.02.00	800±80 х 400±40 х 1850±180	50±5	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - металлические дверки с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШМС.02.01	800±80 х 370±40 х 1730±170	48±5	полка стеклянная-3; полка металлическая-15	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - металлические дверки с замком и двумя ключами, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.02.00	800±80 х 400±40 х 1850±185	49±5	полка металлическая-15	Нижняя и верхняя секции - металлические дверки с замком и двумя ключами; верхняя секция - три полки, нижняя секция - одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШММ.02.01	800±80 х 370±40 х	46±4,5	полка металлическая-15	Нижняя и верхняя секции - металлические дверки с замком и

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
	1730±170			двумя ключами; внутри- два запираемых на замок трейзера с дверками с замком и двумя ключами; верхняя секция - три полки, нижняя секция - одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШСС.02.01	800±80 х 370±40 х 1730±170	49±5	полка стеклянная-3;	Верхняя секция - стеклянные дверки, три полки; нижняя секция - стеклянные полки, одна полка; изделие устанавливается на регулируемые опоры

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Шкаф для медикаментов	ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.01.01; ШСС.02.01	-	+	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации. На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;

- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантии изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медикаментов: _____
обозначение исполнения

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф для медикаментов: _____
обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф для медикаментов _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____


Исполнитель _____
подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Шкаф для медикаментов: ША.01.00; ША.01.01; ША.02.00; ША.02.01; ША.02.02; ШМС.01.00; ШМС.01.01; ШММ.01.00; ШММ.01.01; ШСС.01.01; ШМС.02.00; ШМС.02.01; ШММ.02.00; ШММ.02.01; ШСС.02.01.

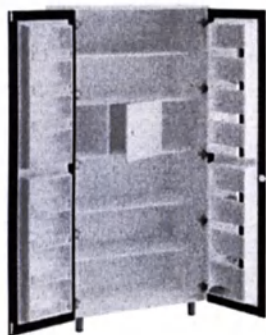

ША.01.00



ША.01.01




ША.02.00



ША.02.01



ША.02.02

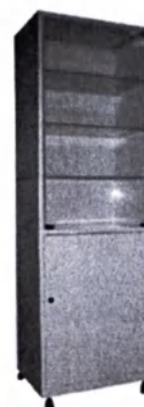


ШМС.01.00



ШМС.01.01



ШММ.01.00

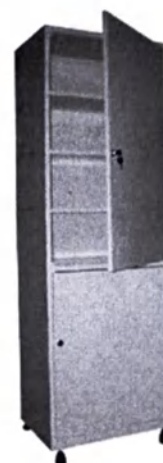

ШММ.01.01



ШСС.01.01



ШМС.02.00




ШМС.02.01



ШММ.02.00



ШММ.02.01

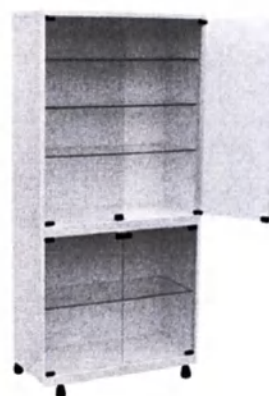

ШСС.02.01

Всего прошито и пронумеровано 12
(рекардизация) лист 8

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____



ООО Медицинская Компания «АСК»



ШКАФ:

ШК.37.02; ШК.36.00;

Паспорт

ШК.00.00.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	4
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незавершенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф: ШК.37.02; ШК.36.00. Далее по тексту – Изделие, Шкафы. Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнений:

- I. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов;
II. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат
медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Шкаф: ШК.37.00; ШК.37.01; ШК.37.02; ШК.36.00; ШМО.01.00; ШМО.02.00; ШМО.03.00» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Шкаф, варианты исполнения:		1	
1.1	ШК.37.02; ШК.36.00 в составе:	ШК.37.02; ШК.36.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Шкаф		1	
1.1.2	Паспорт	ШК.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для размещения и хранения медицинского инструментария, перевязочных материалов, медицинских расходных материалов, медицинских изделий и принадлежностей, медикаментов при проведении медицинских осмотров, процедур, манипуляций и диагностики в процедурных, перевязочных, смотровых кабинетах, больничных и специализированных больничных палатах.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Шкаф: ШК.37.02; ШК.36.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется опираться на открытые двери.
- 3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.6 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Шкаф				
ШК.37.02	800±80 х 606±60 х 1860±185	86±9	дно-30; полка -15	Два отделения с пятью полками изделие устанавливается на регулируемые опоры
ШК.36.00	400±80 х 606±60 х 1860±185	44±5	дно-30; полка -15	Одно отделение с полками; изделие устанавливается на регулируемые опоры

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Таблица 3.

№ т/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колеса. Диаметр колес, мм	Регули- руемые опоры	Нерегули- руемые опоры
1	Шкаф	ШК.37.02; ШК.36.00	-	+	-

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантия изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковывания _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф _____

обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____

число, месяц (прописью), год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____



подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Шкаф: ШК.37.02; ШК.36.00.

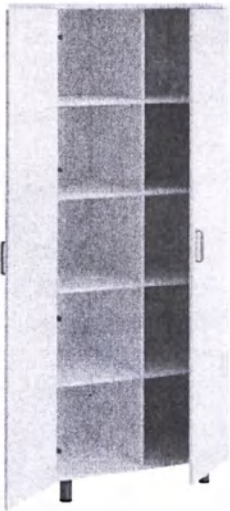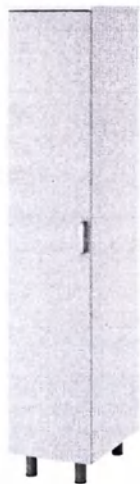 ШК.37.02	 ШК.36.00
---	---

**Схема сборки изделия:
Шкаф ШК.37.02 ТУ 9452-003-68690950-2012**

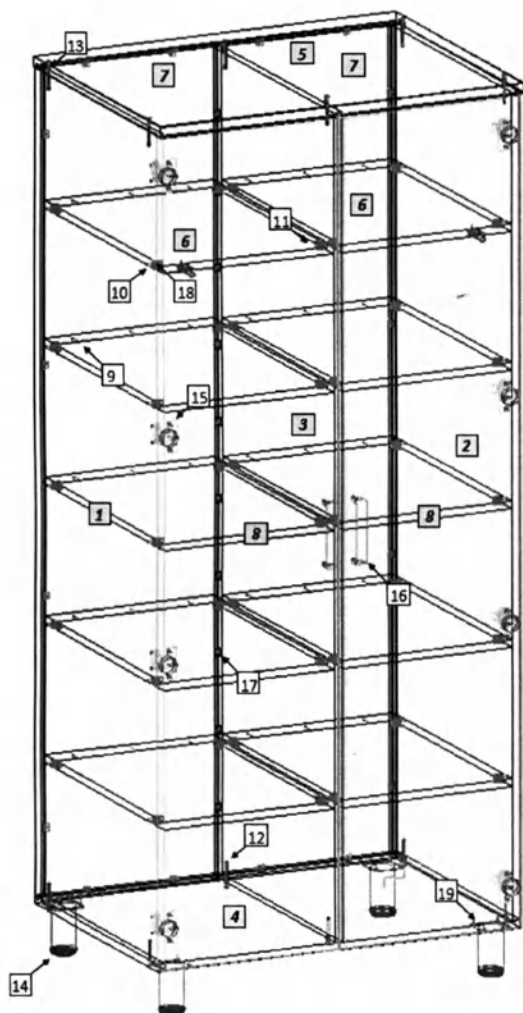


Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	1720	580
2.	Стенка боковая правая	1	1720	580
3.	Стенка средняя	1	1720	580
4.	Стенка горизонтальная нижняя	1	800	580
5.	Крышка	1	804	602
6.	Стенка горизонтальная	10	376	580
7.	Стенка задняя	2	1755	397
8.	Фасад	2	1732	396
9.	Гвоздь	80	-	
10.	Дюбель ввинчиваемый	16	-	
11.	Дюбель	8		
12.	Евровинт 7 x 50	6	-	
13.	Евровинт 7 x 70	6	-	
14.	Опора регулируемая	4	-	
15.	Петля для накладной двери	8	-	
16.	Ручка	2	винтами 4x20 -4 шт	
17.	Скрепка для задней стенки	10	-	
18.	Стяжка эксцентриковая	32	-	
19.	Шуруп 4 x 16	46	-	

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1. Согласно позициям на схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.
2. На горизонтальных стенках (6) установите эксцентриковые стяжки (18). На вертикальных боковых стенках (1,2) установите монтажные планки петель (15) и дюбель эксцентриковых стяжек (10); на вертикальную среднюю стенку (3) установите дюбель эксцентриковых стяжек (11). Евровинтами (12) соедините вертикальные стенки (1,2,3) с горизонтальной нижней стенкой (4); евровинтами (13) – с крышкой (5). Установите и закрепите горизонтальные стенки (6). Гвоздями (9) закрепите заднюю стенку (7). Для крепления задней стенки к средней стенке (3) используйте скрепки (17) с шурупами (19). На горизонтальной нижней стенке (4) шурупами (19) закрепите опоры (14).
3. На дверях (8) при помощи шурупов 4x16 (19) установите петли (15), установите ручки (16). Закрепите двери к боковым стенкам шкафа. Отрегулируйте положение дверей винтами петель.

Схема сборки изделия:
Шкаф ШК.36.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

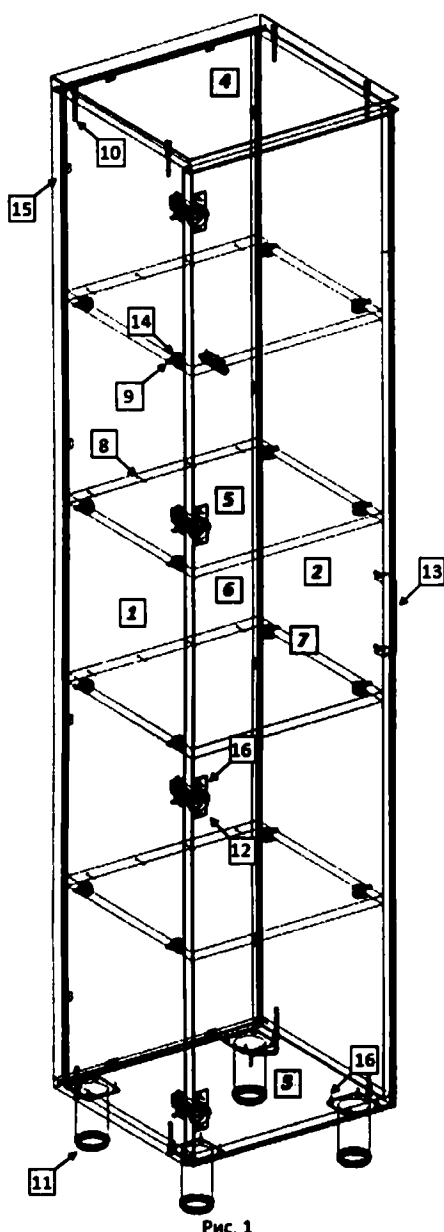


Рис. 1

Рис.1

Спецификация				
№	Наименование	Кол., шт	Примечание	
			Номинальные	
			Длина, мм	Ширина, мм
1.	Стенка боковая левая	1	1720	584
2.	Стенка боковая правая	1	1720	584
3.	Стенка горизонтальная нижняя	1	400	584
4.	Крышка	1	404	606
5.	Стенка горизонтальная	4	368	568
6.	Стенка задняя	1	1735	382
7.	Фасад	1	1732	396
8.	Гвоздь	16	-	
9.	Штоки эксцентриковых стяжек	16	-	
10.	Евровинт 7 x 50	8	-	
11.	Опора регулируемая	4	-	
12.	Петля	4	-	
13.	Ручка	1	с винтами 4x20 – 2 штуки	
14.	Стяжка эксцентриковая	16	-	
15.	Уголок мебельный с саморезом	12	-	
16.	Шуруп 4 x 16	30	-	

Последовательность сборки

1. Внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображенной на рис. 1, сверяясь со спецификацией на изделие. Согласно схеме и спецификации определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвертки, молоток, рулетку или линейку.

2. На боковых стенках (1,2) штоки эксцентриковых стяжек (9). Установите монтажные планки петель (12). На горизонтальных стенках (5) установите эксцентр. стяжки (14). Евровинтами (10) соедините стенки (1,2) с горизонтальной нижней стенкой (3) и крышкой (4), установив в пазы заднюю стенку (6). Закрепите заднюю стенку в пазах уголками (15). Установите и закрепите горизонт. стенки (5), гвоздями (8) зафиксируйте к ним заднюю стенку. На горизонтальной нижней стенке (3) шурупами (16) закрепите опоры (11).

На фасаде (7) шурупами 4x16 (16) закрепите петли (12), установите ручку (13). Закрепите дверь к боковой стенке шкафа. Отрегулируйте положение двери винтами петель.

Всего прошито и пронумеровано 11
(оренбургские) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО Медицинская Компания «АСК»



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ

КМС.01.00; КМС.02.00

Паспорт

КМС.00.00.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	4
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1.....	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Кушетка медицинская смотровая: КМС.01.00; КМС.02.00. Далее по тексту – Изделие, Кушетки.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов

медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Кушетка медицинская смотровая: КМС.01.00; КМС.02.00» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Кушетка медицинская смотровая, варианты исполнения:		1	
1.1	КМС.01.00; КМС.02.00, в составе:	КМС.01.00; КМС.02.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Кушетка медицинская смотровая		1	
1.1.2	Паспорт	КМС.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для размещения пациента при проведении медицинских осмотров и терапевтических процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – I по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа I:

- Кушетка медицинская смотровая: КМС.01.00; КМС.02.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
 3.4 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
 3.5 Не допускайте раскачивания изделия.
 3.6 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
 3.7 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
 3.8 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.
 Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская смотровая				
КМС.01.00	1980±200 х 650±65 х 530±50	26±3	160	Металлический каркас; двухсекционное ложе, угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°
КМС.02.00	1980±200 х 700±70 х 805±80	33±3	160	Металлический каркас; двухсекционное ложе, угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°.

- 4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 2, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Кушетка медицинская смотровая	КМС.01.00; КМС.02.00	-	-	+

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.
 На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;

- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантии изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка медицинская смотровая: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка медицинская смотровая: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковывания _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Кушетка медицинская смотровая _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Кушетка медицинская смотровая: КМС.01.00; КМС.02.00.




КМС.01.00



КМС.02.00

Схема сборки изделия:
Кушетка медицинская смотровая КМС.01.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

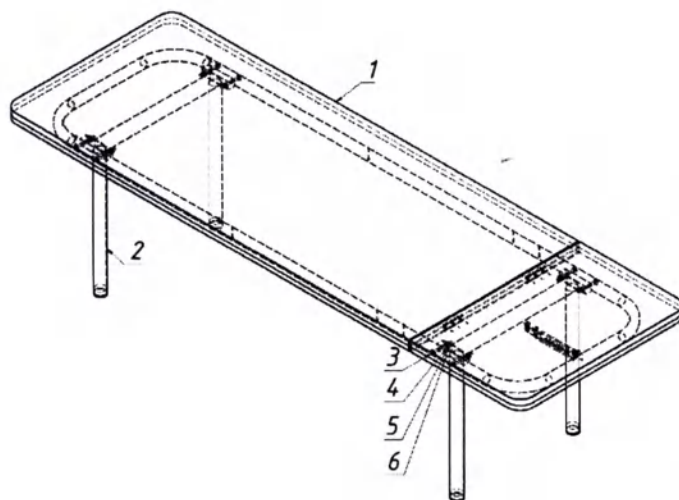

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Каркас кушетки в сборе	1
2	Ножка	2
3	Винт мебельный 8x70	8
4	Шайба гроверная Т8	8
5	Шайба Т8	8
6	Гайка М8	8

Рис. 1

Последовательность сборки

Для сборки потребуется гаечный ключ на 13мм

1. Распаковать компоненты кушетки.
2. Привернуть ножки (2) к каркасу кушетки (1) через отверстия при помощи винтов (3), гровера (4), шайбы (5) и гайки (6) ключом на 13мм.

Схема сборки изделия:
Кушетка медицинская смотровая КМС.02.00 ТУ 9452-003-68690950-2012

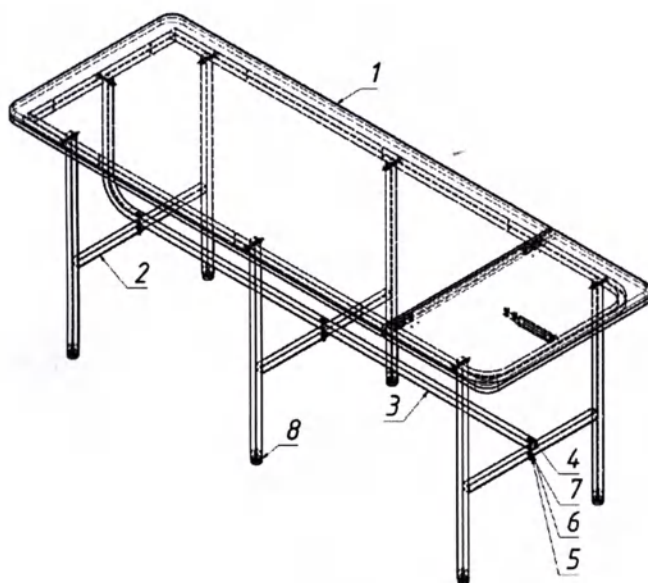


Рис. 1

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Ложe кушетки в сборе	1
2	Ножка	3
3	Труба продольная	1
4	Болт М8х70	10
5	Гайка М8	10
6	Шайба 8Т	10
7	Гровер 8	10
8	Опора регулируемая	6

Последовательность сборки

Для сборки потребуется два ключа на 13 мм.

1. Распаковать компоненты кушетки.
2. В ножки (2) вставить регулируемые опоры (8). Закрепить ножки (2) болтами (4) с шайбами (6), гайками (5) и гровером (7) к металлическому каркасу кушетки (1), вставляя болты с наружной стороны.
3. Закрепить продольную трубу (3) болтами (4) с шайбами (6) и гайками (5) к металлическому каркасу кушетки (1) и ножкам (2).

Всего прошито и пронумеровано 11
(Оценки) лист 6

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО Медицинская Компания «АСК»



**КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
КМФ.01.00**

**Паспорт
КМФ.00.00.ПС.01**

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	4
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение I	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Кушетка медицинская физиотерапевтическая: КМФ.01.00. Далее по тексту – Изделие, Кушетка.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнения:

Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов;

медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Кушетка медицинская физиотерапевтическая: КМФ.01.00» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая, вариант исполнения:		1
1.1	КМФ.01.00, в составе:	КМФ.01.00	-
1.1.1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая		1
1.1.2	Паспорт	КМФ.00.00.ПС.01	1

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»)

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Кушетка медицинская физиотерапевтическая: КМФ.01.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.5 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.6 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.7 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.8 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская физиотерапевтическая				
КМФ.01.00	1980±200 x 650±65 x 530±50	35±3,5	160	Двухсекционное ложе; угол подъема подголовника регулируется при помощи устройства «Rastomat» от 0 - 45°

- 4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 2, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 2.

№ л/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая	КМФ.01.00	-	-	+

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации. На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:

«Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня отгрузки»;

- «Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантия изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка медицинская физиотерапевтическая: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кушетка медицинская физиотерапевтическая: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковки _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Кушетка медицинская физиотерапевтическая _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Кушетка медицинская физиотерапевтическая: КМФ.01.00.

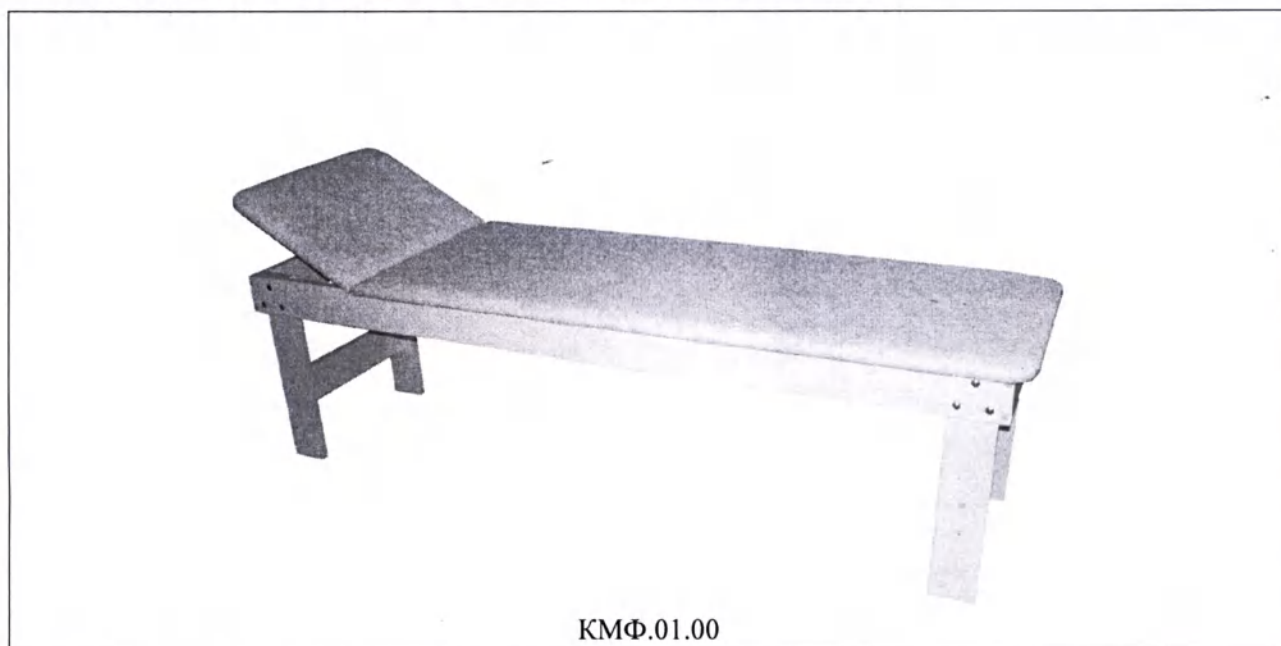


Схема сборки изделия:
Кушетка медицинская физиотерапевтическая КМФ 01.00
ТУ 9452-003-68690950-2012

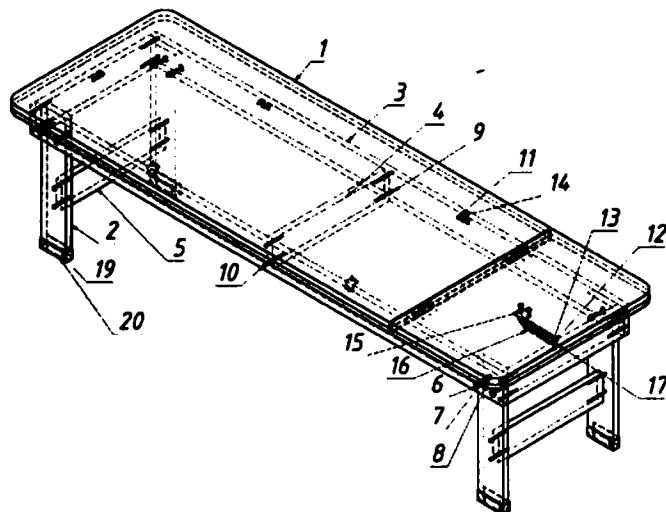


Рис.1

Спецификация		
№	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Ложe в сборе	1
2	Опора	4
3	Панель боковины каркаса	2
4	Перемычка каркаса	3
5	Перемычка ножек	2
6	Болт М8х70	8
7	Гайка М8	8
8	Шайба 8	8
9	Евровинт 7х70	20
10	Заглушка евровинта	20
11	Уголок металлический	6
12	Винт М4х10	1
13	Гайка М4	1
14	Саморез М3,5х16	22
15	Болт М6х20	2
16	Упор регулируемый «Rastomat»	1
17	Дистанционная шайба	1
18	Ключ-шестигранник (на схеме не указывается)	1
19	Гвоздь	8
20	Подпятник	4

Последовательность сборки

Для сборки потребуется гаечный ключ на 10мм и 13мм, крестовая отвертка или шуруповерт с крестовой насадкой, ключ-шестигранник входящий в комплект или шуруповерт с насадкой шестигранной на 5 мм, молоток.

1. Распаковать компоненты кушетки.
 2. Закрепить опоры (2) перемычками (5) между собой ключом 18.
 3. Скрепить боковины каркаса (3) между собой перемычками каркаса (4).
 4. Перевернуть каркас, вставить скрепленные опоры внутрь и закрепить гаечным ключом на 13 мм, используя болты (6) с одной стороны и шайбы (8) и гайки (7) с другой (внутренней). Молотком приколотить гвоздями (19) подпятник (20) к опорам.
 5. Перевернуть ложе (1). Сверху наложить собранный каркас на равных расстояниях от краев ложа.
 6. Со стороны подголовника, с помощью гаечного ключа на 10 мм прикрепить уголок (16) к ложу болтами (15) во встроенные в подголовник гайки.
 7. В отверстие с другой стороны упора вставить дистанционную шайбу (17), в нее винт (12). С обратной уголок и закрутить гайкой (13).
 8. Закрепить саморезами (14) уголок к перемычке каркаса, так чтобы рычажок упора (16) не доходил до 1-го паза.
- С помощью крестовой отвертки или шуруповерта с крестовой насадкой привинтить уголки (11) саморезами (14).
9. Поставить заглушки евровинта (10).
 10. Перевернуть вдвоем кушетку на опоры, придерживая подголовник в сложенном состоянии.

Всего прошито и пронумеровано 10
(десять) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____



ООО Медицинская Компания «АСК»



ШИРМА

ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00

Паспорт

ШМ.00.00.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 4.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ	5
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	8
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	8
Приложение 1.....	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Ширма: ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00. Далее по тексту – Изделие, Ширмы.

Изделие выпускается по ТУ 9452-003-68690950-2012 в составе исполнений:

- I. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских кабинетов;
II. Набор мебели медицинской для оснащения медицинских палат
медицинского изделия «Набор мебели медицинской по ТУ 9452-003-68690950-2012».

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Ширма: ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00» указана в Таблице 1.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Ширма, варианты исполнения:		1	
1.1	ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00, в составе:	ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00	-	Указать исполнение
1.1.1	Ширма		1	
1.1.2	Паспорт	ШИМ.00.00.ПС.01	1	

Примечание: *- нужное отметить знаком ☒ или вписать соответствующую информацию.

2.4 **Специфичное назначение изделия:** изделие предназначено для разделения пространства (зонирования помещения), изолирования пациентов и создания комфортной среды для пациента при проведении медицинских осмотров или других процедур в медицинских организациях, для создания временной перегородки у кроватей и кушеток в лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – I по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 2:

- Ширма: ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.
- 3.4 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.5 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.6 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.7 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 5 настоящего паспорта.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Ширма				
ШМ.01.00	770±70 х 410±40 х 1700±170	5±0,5	-	1 секция; секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.02.00	1560±150 х 410±40 х 1700±170 Размеры одной секции 770±70 х 410±40 х 1700±170	12±1	-	2 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.03.00	2350±235 410±40 х 1700±170 Размеры одной секции 770±70 х 410±40 х 1700±170	18±2	-	3 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору
ШМ.04.00	3135±310 410±40 х 1700±170 Размеры одной секции 770±70 х 410±40 х 1700±170	24±2	-	4 секции; каждая секция изделия устанавливается на 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм, допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Ширма*	ШМ.01.00; ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00	50	-	+

*- каждая секция изделия имеет 3 опоры: две колесные (без тормозного устройства) и одну нерегулируемую опору.

5. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ. СИМВОЛЫ И ЗНАКИ

5.1 Маркировка изделия

Маркировка изделий набора соответствует ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации.

На каждое изделие нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1 «Обратитесь к руководству по эксплуатации»;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

На каждую принадлежность нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, страна производства, адрес производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование и обозначение принадлежности;
- месяц и год изготовления изделия;
- гарантийный срок:
«Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки»;
«Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления».
- срок службы: «Средний срок службы - 8 лет».

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На упаковку нанесены основные и дополнительные надписи и манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Не кантовать».

При перевозке изделий в контейнерах в облегченной таре, транспортную маркировку на эту тару не наносят.

На транспортную тару наклеена этикетка, содержащая следующее:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; страна производства;
- наименование набора;
- обозначение технических условий;
- наименование варианта исполнения набора;
- наименование и обозначение исполнения изделия, входящего в состав набора;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;

- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п., деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

5.2 Символы и знаки

Символы и знаки на маркировке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

Символы и знаки на транспортной упаковке изделия:

Символ/знак	Расшифровка по ГОСТ 14192-96
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
	Не кантовать

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы

6.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

6.2. Условия транспортирования и хранения

6.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

6.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

6.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6.3. Утилизация

6.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

6.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

6.4. Гарантия изготовителя

6.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

6.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-003-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ширма: _____

обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-003-68690950-2012.

Дата упаковывания _____

(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Ширма _____
обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69,
СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Общий вид изделия:

Таблица 4. Ширма: ШИМ.01.00; ШИМ.02.00; ШИМ.03.00; ШИМ.04.00.

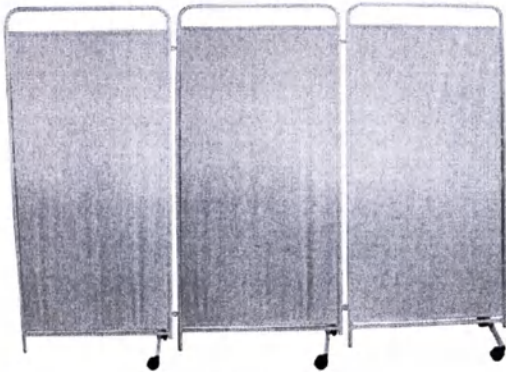
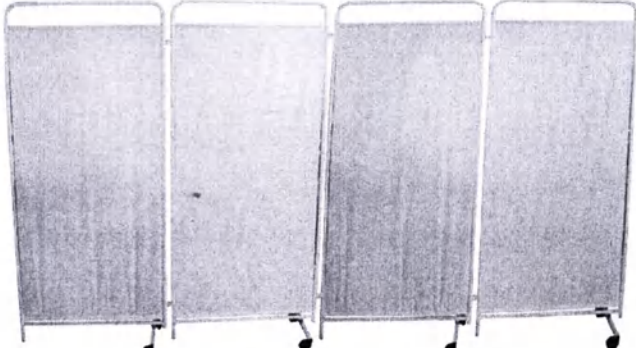
 ШИМ.01.00	 ШИМ.03.00
 ШИМ.02.00	 ШИМ.04.00

Схема сборки изделий
Ширмы ШМ.01.00, ШМ.02.00, ШМ.03.00, ШМ.04.00
ТУ 9452-003-68690950-2012

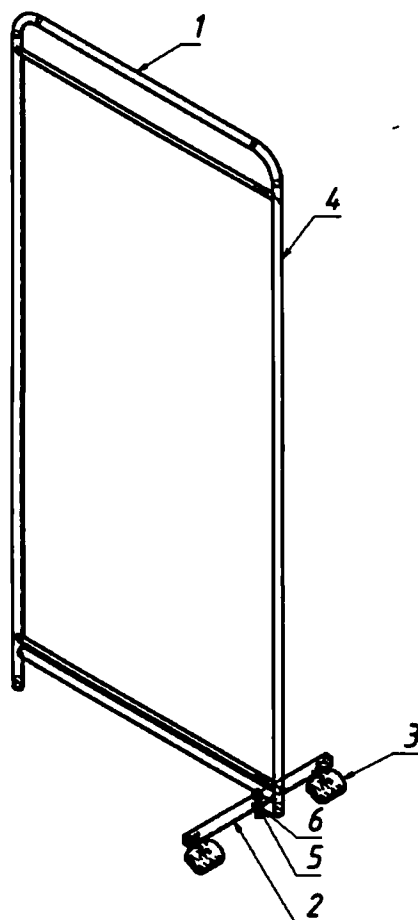


Рис.1

Спецификация					
№	Наименование (размеры, мм)	ШМ. 01.00	ШМ. 02.00	ШМ. 03.00	ШМ. 04.00
1	Каркас ширмы в сборе	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
2	Ножка	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
3	Колесо мебельное	2 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
4	Соединитель	-	2 шт.	4 шт.	6 шт.
5	Шайба 10	2 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
6	Гайка М10	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.

Последовательность сборки

Для сборки потребуются гаечные ключи на 17мм и 12мм.

1. Распаковать компоненты ширмы.
2. При помощи шайбы (5) и гайки (6) установить на каркасы ширмы (1) ножки (2), при помощи ключа на 17.
3. Установить на ножки (2) колеса (3), при помощи ключа на 12.
4. Скрепить каркасы ширм 1 соединителями (4) (для ШМ.02.00; ШМ.03.00; ШМ.04.00)

Всего прошито и пронумеровано 10
(десять) лист 8

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____

