

**Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ
МУЛЬТИФАНКШН»**

Инструкция по установке и эксплуатации.

**Убедительно просим Вас во избежание недоразумений, до начала установки/эксплуатации
внимательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации!**

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

1. Характеристики.

Настоящая инструкция распространяется на комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН», представляющий из себя многофункциональный комплекс лечебно-диагностических аппаратных средств, предназначенных для работы врача (гинеколога, уролога, проктолога, хирурга) в условиях больниц, поликлиник и медицинских учебных заведений.

Комплекс предназначен для проведения лечебно-диагностических мероприятий врачами различных специальностей посредством оборудования, входящего в комплекс, документирования и сохранения данных о проведенных манипуляциях, размещения другого медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, дезсредств, средств любого химического состава, не запрещенного для применения в медицине, документации, справочной литературы, стерилизации и хранения инструментов, хранения перевязочных материалов, для размещения пациентов и медицинского персонала в смотровых, операционных кабинетах.

Конструктивное исполнение комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» унифицировано типоразмерам, что обеспечивает размещение необходимого количества приборов и аппаратов около пациента.

В основание комплекса положен модуль-тумба на металлическом каркасе, который комплектуется выдвижными ящиками, нишами, комплектом дополнительных принадлежностей, смотровым универсальным креслом гинекологическим / урологическим / проктологическим. По согласованию с заказчиком комплекс может иметь различную конфигурацию. Модуль тумба изготовлена из МДФ, ЛДСП с пластиком. Модуль тумба снабжена дверцами, полками и ящиками и поворотными колесами, для перемещения ее в пространстве относительно кресла.

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» представлен входящими в состав комплекса медицинскими приборами: аспиратор хирургический, дымоотсос, радиохирургический аппарат, универсальный источник света, камера бактерицидная, светильник смотровой, модуль для подогрева инструментов, системный блок, мониторы, видеокамера, кронштейны для размещения дополнительного оборудования, смотровое кресло универсальное для размещения пациента.

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» может комплектоваться дополнительными модулями, нишами, полками, имеющими не стандартный размер и исполнение по согласованию с заказчиком.

Конструктивное исполнение комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН», а также возможность выбора состава набора расширяет функциональные возможности изделия.

Область применения – гинекология, урология, проктология, хирургия, ЛОР

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

2. Рекомендации по установке

В большинстве случаев комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство его применения.

При установке соблюдайте необходимые расстояния, для беспрепятственной работы с подвижными частями комплекса (лампа, консоль, ящики, дверцы и т.д.)

Чтобы облегчить установку комплекса необходимо:

- установить комплекс на том месте, где предполагается ее использование;
- отрегулировать положение комплекса по высоте и в горизонтальной плоскости, путем регулировки высоты опорных колес под изделиями;
- установить универсальную смотровую лампу;
- установить кронштейн с консолью (при наличии в составе);

3. Подключение электрических частей.

Электрические блоки, входящие в комплект Комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» комплектуются 3-жильными кабелями питания со штепселем на конце. Вставьте штекер в розетку с параметрами сети 210 – 240 V, 50-60 Hz.

В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или специалистом необходимой квалификации, для предотвращения повреждений электротоком. Перед использованием проверяйте надлежащее соединение проводов.

Меры предосторожности:

- Перед обработкой и очисткой изделий убедитесь, что штепсель питания вынут из розетки;
- Не трогайте штепсель изделия мокрыми руками. В противном случае это может привести к поражению электротоком;
- В тех случаях, когда неисправна розетка, шнур, штепсель питания, не эксплуатируйте изделие. В противном случае это может привести к короткому замыканию;
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания изделия;
- Не сгибайте, не тяните и не связывайте шнур питания изделия;
- Своевременно очищайте штепсель от пыли и других загрязнений.

Необходимо использовать только сетевой кабель, входящий в состав поставки и подключать его к заземленной розетке.

Сетевой кабель многофункционального аппаратного комплекса следует подключать только к должным образом заземленной розетке. Сетевой кабель следует подключать непосредственно к розетке, без использования переходников. Применение сетевых переходником может вести к поражению током.

Запрещается снимать какие-либо крышки или панели, закрывающие внутренние компоненты комплекса.

Не ставьте другое электрическое оборудование поверх комплекса. Такие конфигурации могут быть неустойчивы и препятствовать охлаждению.

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» не следует устанавливать вблизи другого электронного оборудования, т.к. блоки входящие в его состав при работе могут создавать электромагнитные помехи.

4. Эксплуатация

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» должен эксплуатироваться обученным медицинским персоналом.

Соблюдайте температурный режим эксплуатации медицинской мебели - от +5 до +40° С.

Для обеспечения длительного срока службы необходимо своевременно очищать составные части изделия от пыли, грязи и органических загрязнений.

1. Эксплуатация модуль-тумбы:

Эксплуатация фурнитуры:

1. Не перегружайте створки дверей и ящики мебели дополнительной нагрузкой;
2. Не перегибайте створки дверей при открытии настежь
3. Избегайте ударов створок дверей и ящиков мебели об другие части мебели или предметы интерьера;
4. Не вставляйте дополнительные предметы в притвор между дверцей и корпусом;
5. Избегайте загрязнений элементов фурнитуры

Уход за фурнитурой

Для ухода за фурнитурой настоятельно рекомендуем использовать средства, не разрушающие защиту от коррозии, не содержащие кислоты и смолы.

Не менее одного раза в год смазывайте маслом все подвижные детали, замки и места запоров

Уход за пластиковыми поверхностями

Пластиковые поверхности мебели рекомендуется очищать специальными средствами для ПВХ, либо с помощью воды и обычного моющего средства.

Категорически запрещается:

1. Ставить раскаленные предметы на пластиковые поверхности мебели
2. Прислонять раскаленные предметы к пластиковым поверхностям мебели

2. Эксплуатация составных частей комплекса.

Все оборудование, описываемое в данном руководстве, предназначено для использования только квалифицированным медицинским персоналом, прошедшим обучение по применению конкретных методик диагностики и лечебного воздействия. Данное руководство предназначено ТОЛЬКО в качестве руководства по эксплуатации комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН».

При получении и распаковке комплекса, осмотрите его на предмет отсутствия вмятин, трещин и других повреждений, которые могли бы быть получены в процессе транспортировки. При обнаружении повреждений уведомите об этом поставщика для проведения экспертизы.

Не используйте комплекс в присутствии потенциально взрывоопасных сред, например, в присутствии горючих анестезиологических средств.

Необходимо использовать только сетевой кабель, входящий в состав поставки и подключать его к заземленной розетке.

В случае попадания влаги на электрические составные части комплекса, вследствие утечки из трубок, или разбрызгивания, отключите комбайн от электрической розетки. Необходимо вытереть жидкость насухо или дать ей высохнуть на воздухе, после чего продолжить эксплуатацию комплекса.

5. Рекомендации и советы.

Не следует подсоединять к электрическим блокам мебели, какое-либо дополнительное оборудование, без письменного согласия производителя.

При проведении ремонтных работ комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» рекомендуем защищать пленочным материалом от попадания на поверхность изделий растворов, штукатурных материалов и красок.

Одноразовые фильтры, используемые в составных частях комплекса, содержат потенциально биологически опасные частицы. Обращайтесь с использованными фильтрами как с любым биологически опасным материалом. Утилизируйте использованные фильтры в соответствии с местными правилами и нормами.

Использование фильтров после окончания срока службы ЗАПРЕЩЕНО!

Если фильтр не будет замене, это может привести к снижению эффективности фильтрации.

При возникновении любых дополнительных вопросов обращайтесь к представителям производителя.

6. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» должно осуществляться сертифицированными специалистами ООО «Зерц».

7. Гарантийный срок.

В течении гарантийного срока ООО «Зерц» гарантирует качество изготовленных изделий:

- Стабильность цвета рабочих поверхностей, пластика в процессе эксплуатации;
- Механическую целостность фурнитуры (ручек, петель, замков и т.д.);
- Целостность изделий.
- Работоспособность всех электрических и механических блоков комплекса

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» в эксплуатацию, указанной в гарантийном талоне.

Гарантия распространяется:

- на все составные части, входящие в состав комплекса многофункционального лечебно-диагностического «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН», при условии, что эксплуатация происходила в соответствии с Правилами по уходу и эксплуатации;
- на монтажные работы, при условии, что установка комплекса и его блоков осуществляется специалистами, уполномоченными от ООО «Зерц»

Гарантия не распространяется на изделия:

- 
- поврежденные в результате нарушения Правил по уходу и эксплуатации;
 - поврежденные в результате воздействия со стороны третьих лиц или вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (СТИХИЯ, ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ И Т.Д.);
 - поврежденные в результате умышленных или ошибочных действий;
 - ремонт и замена деталей которых осуществлялась самостоятельно, либо предприятиями и частными лицами, не уполномоченными на это ООО «Зерц».

Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, которые могли быть обнаружены при осмотре в момент получения изделий.

8. Утилизация.

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ МУЛЬТИФАНКШН» подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими на территории, где производится утилизация.

9. Сертификация продукта.

Товар сертифицирован на территории России.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕРЦ»
Адрес: Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 81
Телефон/факс: (495) 649-62-60
Электронная почта: zerts@zerts.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕРЦ»

127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, 81
Тел./ факс (495) 649-62-60
e-mail: zerts@zerts.ru
ИНН 7743739919 КПП 774301001
р/с 40702810900000001326
в ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" г. Москва
БИК 044552632 к/с 30101810400000000632

Руководителю Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального
развития

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

«31» марта 2010 г.

Доверенность.

ООО «ЗЕРЦ», Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 81, в лице Генерального директора Шматковой В.В., настоящей доверенностью уполномочивает работающего в должности курьера, Занегина Александра Леонидовича (паспортные данные: 4509 №093924, выдан Отделением по району Марфино ОУФМС России по гор. Москве в CAO 14.01.2008 года, зарегистрированный по адресу: г.Москва, ул.Комдива Орлова, дом 2/37, корп.2, кв.75, в том, что ему доверяется представлять интересы ООО «ЗЕРЦ» в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в том числе:

1. Сдавать все необходимые документы для получения регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения.
2. Получать регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения:

Комплекс многофункциональный лечебно-диагностический «ЗЕРЦ
МУЛЬТИФАНКШН» с приложениями (см. приложение 1), ТУ 9452-002-60554199-2009

Подпись доверенного лица Занегин А.Л.  удостоверяем:

Доверенность выдана до 31.12.2010г.

Генеральный директор
ООО «ЗЕРЦ»



Шматкова В.В.