

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_ г. № _____

Директор ГУ «Уфимский НИИ
глазных болезней» АН РБ

_____ М.М. Бикбов

« _____ » _____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению протектора роговицы «Декстралинк»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Протектор роговицы «Декстралинк» – предназначен для использования в офтальмологии при проведении процедуры УФ-кросслинкинга в условиях лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Декстралинк» – стерильный раствор желто-оранжевого цвета, вязкой консистенции в укупоренных флаконах коричневого стекла объемом 3 мл, помещенный в стерильные пакеты.

Состав на 1 мл раствора:

Рибофлавин-моноклеотид 1 мг,

Декстран 200 мг

Изотоническая основа q.s.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания. При правильном использовании изделия противопоказаний не обнаружено.

Предупреждение. Стерильность препарата гарантируется до истечения срока годности, указанного на этикетке (упаковке).

Побочное действие. Возможны нарушение зрения, незначительный отек роговицы в послеоперационном периоде, несвязанные с применением протектора роговицы «Декстралинк».

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием протектор роговицы необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

- протектор роговицы предназначен для одноразового использования;
- необходимо убедиться в целостности упаковки;
- откройте упаковку и проверьте отсутствие внутренних повреждений;
- в случае наличия повреждений – не использовать.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

В условиях операционной вскрыть стерильный пакет, извлечь флакон.

Открыть флакон, набрать содержимое флакона в шприц с канюлей. Производить инстилляцию протектора роговицы «Декстралинк» при выполнении процедуры УФ-кросслинкинга по мере необходимости.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 5-20°C до даты указанной на упаковке. Срок годности – 2 года со дня изготовления.

Меры предосторожности.

- не расстерилизовывать;
- не нагревать;
- не замораживать.

Заместитель директора по клинике
ГУ «Уфимский НИИ глазных болезней» АН РБ

З.Р. Марванова

Ответственный за
производство

А.Р. Халимов