

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трансплантат-коллагеновый каркас для офтальмологических операций стерильный ТкО-«УфНИИГБ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАТОВ

Трансплантат-коллагеновый каркас для офтальмологических операций стерильный ТкО-«УфНИИГБ» предназначен для имплантации при различных пластических и реконструктивных операциях на органе зрения

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трансплантаты соответствуют требованиям технических условий и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Трансплантаты изготавливаются из кадаверной ткани, забор которой осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными в установленном порядке

2.3. Трансплантаты белого цвета или цвета слоновой кости.

2.4. По бактериологическим показателям трансплантаты стерильны, тестированы на HbS Ag, RW, AIDS.

2.5. Трансплантаты в транспортной упаковке устойчивы к климатическим и механическим воздействиям.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество (фл.)	Примечание
1	Паспорт	1	
2			

4. ХРАНЕНИЕ

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в чистых, сухих и закрытых помещениях в защищенном от света месте, при комнатной температуре до 18°C.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Извлечение трансплантатов из флаконов должно производиться в условиях операционной стерильным инструментом в день операции.

5.2. Перед применением изделия должны быть отмыты от консерванта пятикратным объемом стерильного физиологического раствора и раствором антибиотика.

5.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не целевое использование трансплантатов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

№ серии
соответствует техническим условиям
ТУ 9398-003-01966940-2011 и признаны годными для применения.

Дата выпуска _____

Инспектор ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Государственное бюджетное учреждение «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан»

450077, г. Уфа, ул. Пушкина, 90
тел/факс: (347) 272-08-52

Дата продажи _____

Рук. подразделения по производству медизделий _____

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения 2 года.

6.3. Изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

- не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделий;
- приобретения изделий у других организаций;
- отсутствия паспорта на изделие;
- после истечения срока гарантии.

Директор
ГБУ «Уф НИИ ГБ» АН РБ



М.М. Бикбов