

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Росхимзащита»



Рыжов Е.В.

«11» июня 2024 г.

**Комплект медицинской одежды защитной  
из нетканых материалов  
нестерильный одноразовый  
по ТУ 14.12.30 – 433 – 05807954–2023**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

## Наименование медицинского изделия

### 1.1 Наименование медицинского изделия

Комплект медицинской одежды защитной из нетканых материалов нестерильный одноразовый (далее – комплект).

### 1.2 Технические условия

ТУ 14.12.30 – 433 – 05807954–2023

## 2 Сведения о производителе медицинского изделия

Акционерное общество «Росхимзащита»

АО «Росхимзащита»

Юридический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Фактический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Адрес производства: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Контактные телефоны: +7 (4752) 560680

E-mail: mailmos@krhz.ru

## 3 Назначение медицинского изделия, установленное производителем

Комплект одежды имеет следующее назначение: для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемических мероприятий и защиты персонала лечебных, санитарных учреждений от возбудителей инфекции, занятых диагностикой и лечением инфекций.

Комплект предназначен для защиты персонала лечебных и санитарных учреждений от возбудителей инфекции, занятых диагностикой и лечением инфекций, для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ, а также для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Комплект изготавливается из нетканого материала, одного размера, одного цвета, поставляется в нестерильном виде и предназначен только для однократного применения.

Назначение набора не подразумевает его использование со слизистой или раневой поверхностью человека, или с кровью в организме пациента или вводимой в пациента кровью.

#### **4 Условия применения**

**Область применения:** для применения при оказании лечебно-профилактической помощи в лечебных и санитарных учреждениях.

#### **5 Риски применения медицинского изделия, перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий**

**Показания к применению:** для предотвращения заражения медицинского персонала при диагностике и лечении пациентов, зараженных инфекциями.

**Противопоказания:** не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

**Побочные эффекты:** возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы набора.

**Риски применения медицинского изделия:** Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508-2012, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

#### **6 Технические характеристики набора**

##### **6.1 Общее описание**

###### **6.1.1 Комплект состоит из:**

1. Брюки белые (размер: 50-52) - 1 шт.
2. Куртка белая (размер: 50-52) – 1 шт.;
3. Халат хирургический белый (размер: 50-52) – 1 шт.;
4. Бахилы на завязках высокие белые – 1 пара.;
5. Шапочка-шлем белая в вариантах исполнения:
  - Шапочка-шлем с запахом - 1 шт. (при необходимости);
  - Шапочка-шлем с пелериной и утяжкой по краю лицевого выреза - 1 шт. (при необходимости);
6. Инструкция по применению - 1 экз.

6.1.2 Набор изготавливается из нетканого материала, одного размера, одного цвета, поставляется в нестерильном виде и предназначен для однократного применения.

### **6.2 Общие характеристики**

Цвет набора должен быть белым.

Разрывная нагрузка нетканого материала, из которого изготовлен комплект, должна быть 75 Н ( $\pm 5\%$ ) по длине и 210 Н ( $\pm 5\%$ ) по ширине.

Прочность при продавливании шариком должна быть 30 Н ( $\pm 5\%$ ).

Прочность при расслаивании должна быть 60 Н ( $\pm 5\%$ ) по длине и 62 Н ( $\pm 5\%$ ) по ширине.

Прочность при раздирании по ГОСТ ISO 9073-4-2023 должна быть 80 Н ( $\pm 5\%$ ) по длине и ширине.

Прочность закрепления волокон должна быть 15 Н ( $\pm 5\%$ ).

Требования к швам для скрепления деталей отдельных частей комплекта:

Шов должен быть ниточным по ГОСТ 29122. Допустимо использование безниточных швов, выполненных методом ультразвуковой сварки.

Прочность соединительных швов должна быть 76 Н ( $\pm 5\%$ ).

Водопроницаемость комплекта должна быть 35 дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>·с. ( $\pm 5\%$ ).

Комплект по норме проницаемости микроорганизмами соответствует группе защиты II по ГОСТ 12.4.175-88.

Водоупорность комплекта должна быть 280 - 470 мм вод. ст.

Комплект должен обладать устойчивостью к воздействию климатических факторов при эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2.

### **6.3 Линейные размеры набора**


Линейные размеры набора соответствуют данным таблиц 1-5 и рисункам 1-5.

Таблица 1

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b>                     | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                  | Длина по боковому шву                             | 120,0               | $\pm 3,0$                   |
| 3                  | Ширина по линии талии (без стягивания на завязку) | 65,0                | $\pm 3,0$                   |
| 4                  | Ширина на уровне среднего шва                     | 34,0                | $\pm 2,0$                   |

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b> | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>5</b>           | <b>Ширина по линии низа</b>   | <b>23,8</b>         | <b>± 2,0</b>                |

Обозначение измерений отражены на рисунке 1.

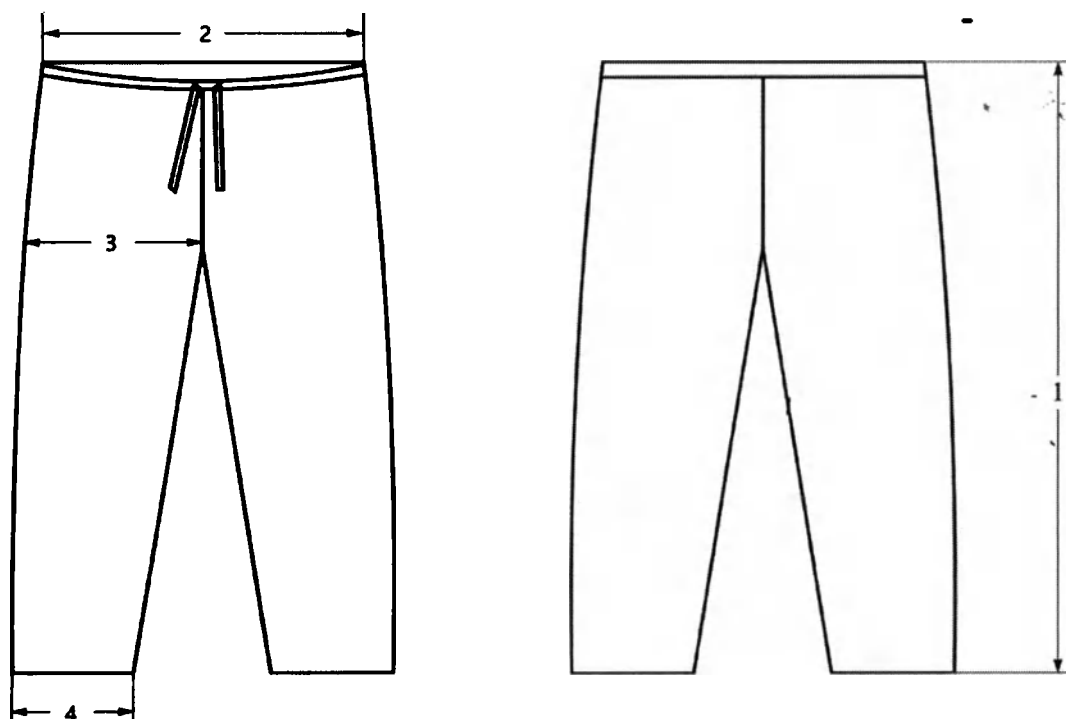

**Рисунок 1 - Брюки**

Брюки прямые длинные, без бокового шва, в области талии собраны на эластичную тесьму (резинка) или на незластичную тесьму, продетую через укрепленные петли в кулисе пояса. Низ изделия не обработан (см. рисунок 1).

Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенными в таблице 1 и указанными на рисунке 1.

Линейные размеры куртки должны соответствовать требованиям таблицы 2.


**Таблица 2**

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b>          | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>           | <b>Длина спинки посередине</b>         | <b>80,0</b>         | <b>± 5,0</b>                |
| <b>2</b>           | <b>Ширина на уровне глубины проймы</b> | <b>70,0</b>         | <b>± 3,0</b>                |
| <b>3</b>           | <b>Ширина по линии низа</b>            | <b>70,0</b>         | <b>± 3,0</b>                |

**Инструкция по применению «Комплект медицинской одежды защитной из нетканых материалов нестерильный одноразовый по ТУ 14.12.30 – 433 – 05807954–2023»**

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b>       | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 4                  | Длина рукава с учётом плечевого шва | 84,0                | ± 3,0                       |

Обозначение измерений отражены на рисунке 2.

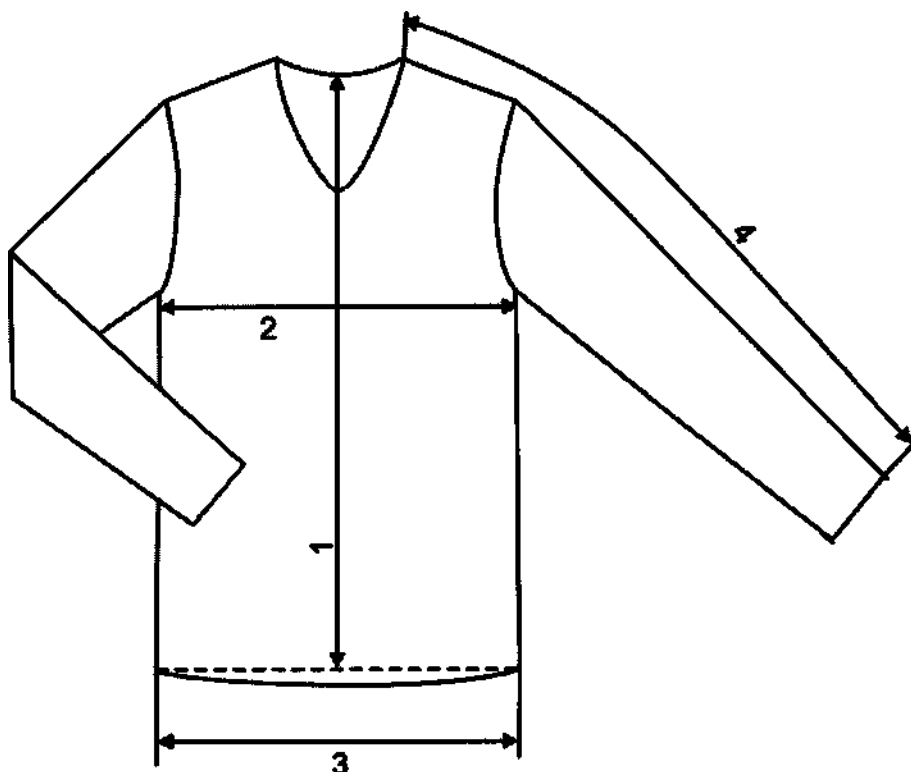

**Рисунок 2 – Куртка.**

Куртка прямого силуэта с длинными втачными рукавами, с V- образным вырезом горловины. Срезы рукавов и низ изделия не обработаны.

Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенными в таблице 2 и указанными на рисунке 2.

Линейные размеры халата хирургического должны соответствовать требованиям таблицы 3.

**Таблица 3**

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b> | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                  | Длина спинки посередине       | 133,0               | ±7,0                        |

**Инструкция по применению «Комплект медицинской одежды защитной из нетканых материалов нестерильный одноразовый по ТУ 14.12.30 – 433 – 05807954–2023»**

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b>                  | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2                  | Ширина на уровне глубины проймы и по низу      | 170,0               | $\pm 3,0$                   |
| 3                  | Длина рукава с плечом от стойки до низа рукава | 85,0                | $\pm 3,0$                   |
| 4                  | Ширина рукава сверху                           | 30,5 -              | $\pm 2,0$                   |
| 5                  | Ширина рукава внизу                            | 19,0                | $\pm 2,0$                   |
| 6                  | Длина стойки по шву втачивания в горловину     | 73,0                | $\pm 3,0$                   |
| 7                  | Длина завязок на рукаве                        | 30,0                | $\pm 2,0$                   |
| 8                  | Длина завязок на горловине                     | 40,0                | $\pm 2,0$                   |
| 9                  | Длина завязок на талии                         | 90,0                | $\pm 2,0$                   |
| 10                 | Высота воротника                               | 6,0                 | $\pm 2,0$                   |

Обозначение измерений отражены на рисунке 3.

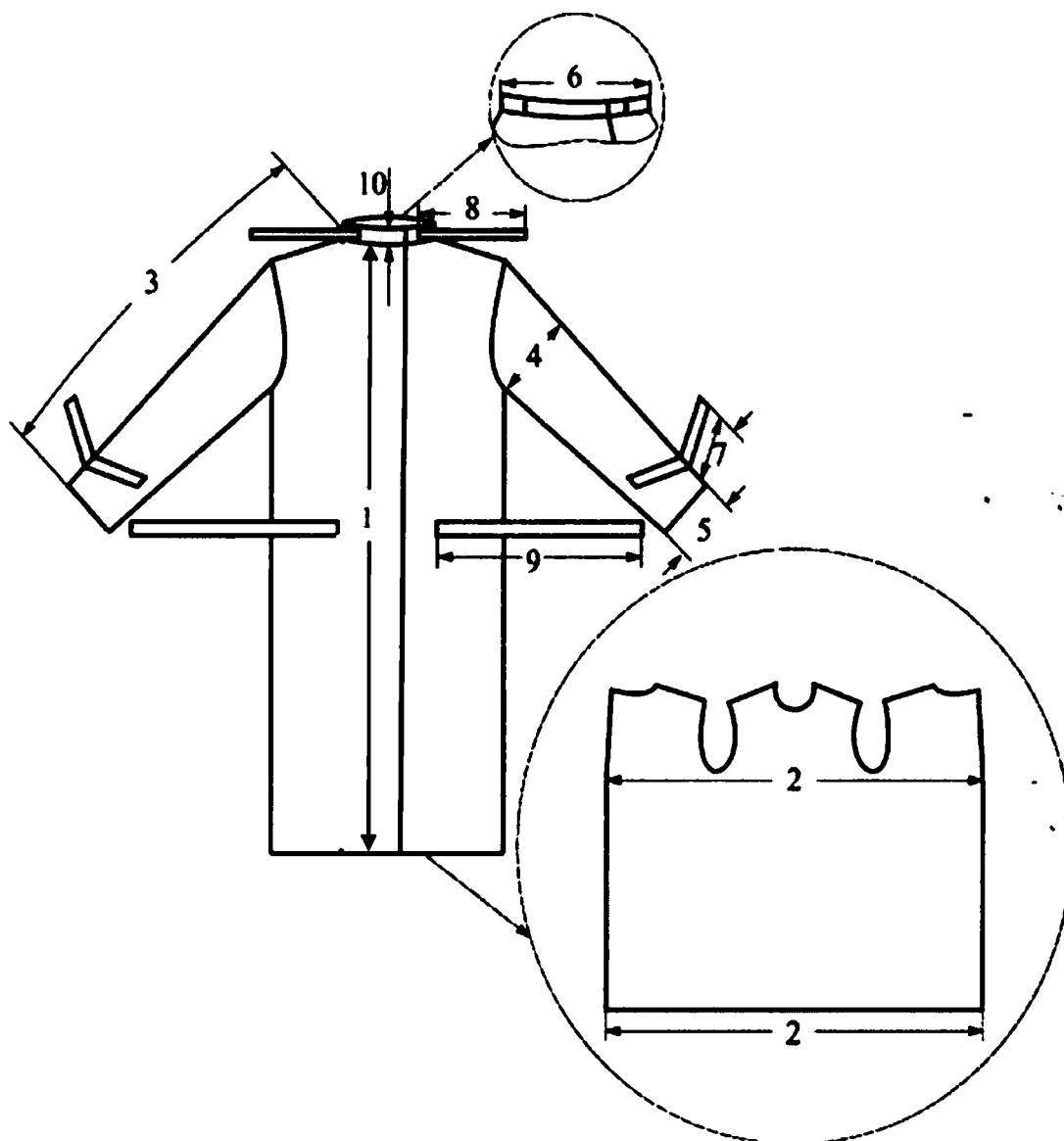


Рисунок 3 – Халат хирургический

Передняя часть халата хирургического – цельнокроеная со спинками, без боковых швов. Длинный рукав по низу, собранный на резинке или на завязках. По среднему срезу спинки на линии талии закреплены отлетные завязки пояса: левая завязка продевается в укрепленную петлю на правой спинке. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками, левая завязка продевается через укрепленную петлю на правой стороне стойки и завязываются спереди по стойке.


Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенными в таблице 3 и указанными на рисунке 3.

Линейные размеры бахил на завязках должны соответствовать требованиям таблицы 4.

**Таблица 4**

| <b>№ измерения</b> | <b>Наименование измерения</b>             | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                  | Высота бахил (без учета припусков)        | 37,5                | $\pm 3,0$                   |
| 2                  | Длина следа бахил (без учета припусков)   | 40,0                | $\pm 2,0$                   |
| 3                  | Ширина бахил вверху (без учета припусков) | 28,0                | $\pm 2,0$                   |
| 4                  | Длина завязок                             | 39,0                | $\pm 2,0$                   |
| 5                  | Высота подошвы                            | 9,0                 | $\pm 2,0$                   |

Обозначение измерений отражены на рисунке 4.

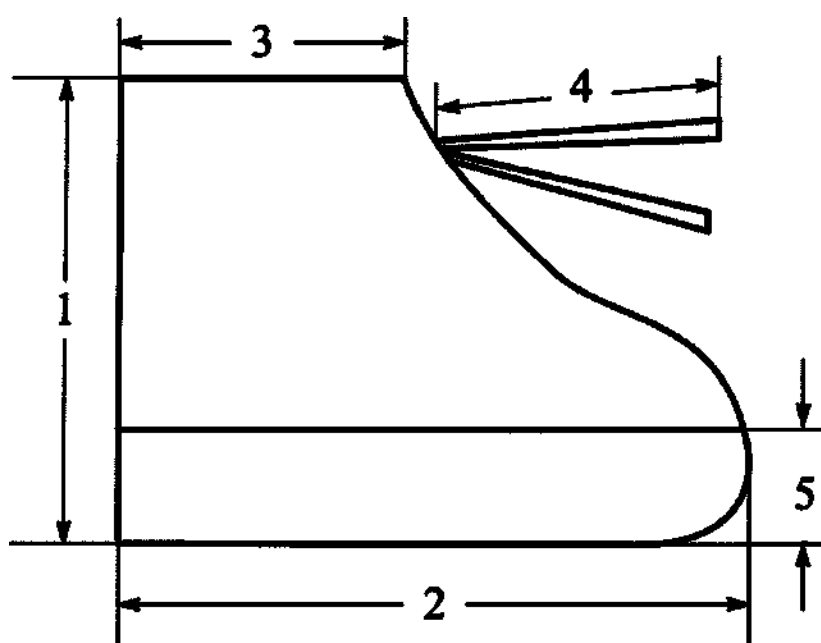

**Рисунок 4 – Бахилы на завязках.**

Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенными в таблице 4 и указанными на рисунке 4.

Подошва настрачивается на лицевую сторону бахил строчкой по верхнему краю подошвы.

Передние и нижние срезы бахилы соединяют одним швом на оверлоке (трех- или четырехниточным обметочным цепным стежком с шириной строчки по ГОСТ 12807) с закрепками в начале и конце строчки на пятке.


**Инструкция по применению «Комплект медицинской одежды защитной из нетканых материалов нестерильный одноразовый по ТУ 14.12.30 – 433 – 05807954–2023»**

Линейные размеры шапочки-шлема должны соответствовать требованиям таблицы 5.


**Таблица 5**

| <b>№ измерения</b>                                                                       | <b>Наименование измерения</b>                                                            | <b>Значение, см</b> | <b>Доп. Отклонения (см)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Шапочка-шлем с запахом (вариант исполнения А)</b>                                     |                                                                                          |                     |                             |
| 1                                                                                        | Длина шапки посередине от низа пелерины до лицевого выреза                               | 61,0                | ± 3,0                       |
| 2                                                                                        | Ширина по линии горловины                                                                | 32,0                | ± 2,0                       |
| 3                                                                                        | Ширина от середины затылочной части до лицевого выреза (в области от глазниц до темечка) | 22,0                | ± 2,0                       |
| 4                                                                                        | Высота шапочки                                                                           | 35,0                | ± 2,0                       |
| 5                                                                                        | Длина завязок                                                                            | 52,0                | ± 2,0                       |
| <b>Шапочка-шлем с пелериной и утяжкой по краю лицевого выреза (вариант исполнения Б)</b> |                                                                                          |                     |                             |
| 1                                                                                        | Длина шапки посередине от низа пелерины до лицевого выреза (с учётом кулисы)             | 60,0                | ± 3,0                       |
| 2                                                                                        | Длина по лицевому вырезу по шву притачивания кулисы                                      | 32,0                | ± 2,0                       |
| 3                                                                                        | Ширина по линии горловины                                                                | 33,5                | ± 2,0                       |
| 4                                                                                        | Ширина от середины затылочной части до лицевого выреза (в области от глазниц до темечка) | 27,0                | ± 2,0                       |
| 5                                                                                        | Высота шапочки                                                                           | 47,0                | ± 2,0                       |

Обозначение измерений отражены на рисунке 5.

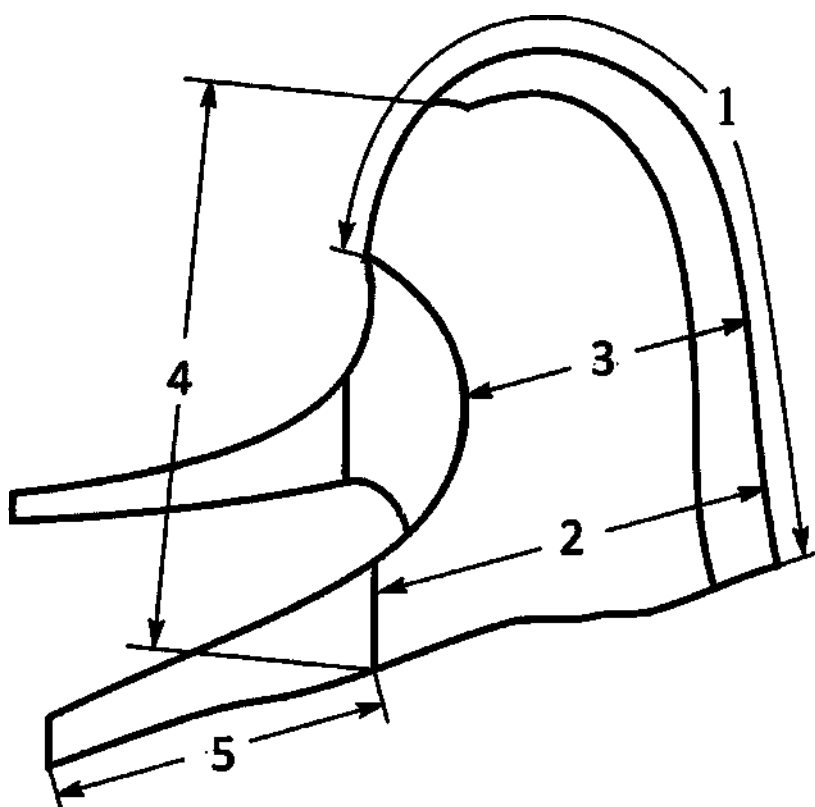

*Шапочка-шлем с запахом  
(Вариант исполнения А)*

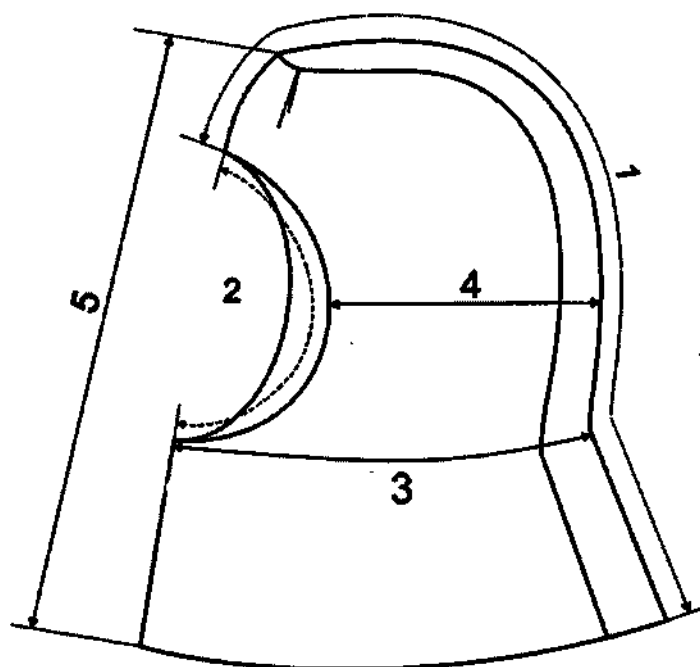

*Шапочка-шлем с пелериной и утяжкой по краю лицевого выреза  
(Вариант исполнения Б)*

Рисунок 5 – Шапочка-шлем.

Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенными в таблице 5 и указанными на рисунке 5 (вариант исполнения А и Б).

Поверхностная плотность материала (из чего), из которого изготовлен комплект, должна соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 6

| Часть набора               | Диапазон, г/м <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------------|
| Брюки белые                | от 45 до 65                |
| Куртка белая               |                            |
| Халат хирургический белый  |                            |
| Бахилы на завязках высокие |                            |
| Шапочка-шлем белая         |                            |

#### 6.4 Меры предосторожности

##### **ВНИМАНИЕ!**

Запрещено использование набора в случае нарушения его целостности или в случае нарушения целостности упаковки! В этом случае набор должен быть утилизирован как медицинские отходы класса «А» по СанПиН 2.1.3684-21.

##### **ВНИМАНИЕ!**

Набор не предназначен для стерилизации паровым, воздушным и газовым методами!

##### **ВНИМАНИЕ!**

Назначение набора не подразумевает его использование со слизистой или раневой поверхностью человека, или с кровью в организме пациента или вводимой в пациента кровью.

##### **ВНИМАНИЕ!**

При наличии инструкций по надеванию и снятию медицинских изделий в конкретной организации – следуйте этим инструкциям для надевания и

**снятия набора и дополнительных медицинских изделий в соответствии с действующей инструкцией на эти дополнительные медицинские изделия.**

## **7 Порядок надевания набора**

**7.1 Извлечь набор из упаковки, убедившись в её целостности.**

**7.2 Надеть рабочую одежду.**

**7.3 Надеть набор поверх рабочей одежды, убедившись в его целостности, в следующем порядке:**

- бахилы, закрепив их завязками;
- шапочку-шлем, закрепив с помощью завязок или утяжки;
- куртку;
- брюки;
- халат, закрепив завязками на горловине, манжетах и поясе.

## **8 Порядок снятия набора**

**8.1 Снять набор так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри.**

**8.2 Набор снять в обратном порядке его надевания.**

**8.3 Не расправляя, погрузить набор в специальный контейнер или другую емкость для утилизации.**

## **9 Техническое обслуживание, текущий ремонт**

**Набор является нестерильным медицинским изделием однократного применения. Ремонту не подлежит.**

## **10 Информация о стерильном состоянии медицинского изделия, о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения**

**Набор является нестерильным медицинским изделием однократного применения. При изготовлении набора не используются лекарственные средства, материалы животного и (или) человеческого происхождения.**

## **11 Эксплуатация**

**11.1 Условия эксплуатации.**

Температура – от 5 до 40°C.

Относительная влажность – от 40 до 80%.

Атмосферное давление – (84,0 – 106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.].

## **11.2 Указание по эксплуатации.**

Комплект – медицинское изделие однократного применения.

Комплект является одеждой второго слоя – должен надеваться поверх рабочей одежды.

Назначение комплекта не подразумевает его использование со слизистой или раневой поверхностью человека, или с кровью в организме пациента или вводимой в пациента кровью.

## **12 Транспортирование**

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (от +10°C до + 35°C при относительной влажности до 80 % при 25 °C).

## **13 Хранение**

Комплекты в потребительской упаковке должны храниться в условиях хранения 1 (от +10°C до +35°C при относительной влажности до 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150 не более 4 лет с даты изготовления.

В процессе хранения набор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## **14 Расшифровка символов**



Не допускать воздействия солнечного света



Не стерильно



Не допускать воздействия влаги



Вверх



Глажение запрещено



Запрет утилизации в бытовой мусорный контейнер

## 15 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие комплекта всем требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения набора до использования – 4 года с даты изготовления.

## 16 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Утилизация набора осуществляется на общих основаниях и в соответствии с требованиями согласно

СанПиН 2.1.3684-21.

Использованный набор должен быть утилизирован как медицинские отходы класса «Б» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

Не использованный набор со следами повреждений или с истекшим сроком годности должен быть утилизирован в потребительской упаковке как медицинские отходы класса «А» в соответствии с классификацией по СанПиН 2.1.3684-21.

## 17 Перечень применяемых национальных стандартов

| ОБОЗНАЧЕНИЕ        | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.004-91   | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования                         |
| ГОСТ 12.1.005-88   | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования                     |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ        | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.018-93   | Система стандартов безопасности труда.<br>Пожаровзрывобезопасность статического электричества.<br>Общие требования                                                                                  |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности                                                                                                     |
| ГОСТ 12.2.003-91   | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности                                                                                                 |
| ГОСТ 12.3.009-76   | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности                                                                                                |
| ГОСТ 12.3.020-80   | Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности                                                                                   |
| ГОСТ 12.4.009-83   | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание                                                                               |
| ГОСТ 12.4.021-75   | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования                                                                                                                     |
| ГОСТ 12.4.026-2015 | Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| ГОСТ 12.4.136-84   | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами                                                                             |
| ГОСТ 12.4.175-88   | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами                                                                                            |
| ГОСТ 427-75        | Линейки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                            |
| ГОСТ 3811-72       | Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей                                                         |
| ГОСТ 5094-74       | Угольники чертежные. Технические условия                                                                                                                                                            |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ                    | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 7502-98                   | Рулетки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 9142-2014                 | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 9481-2001                 | Ящики из гофрированного картона для химических нитей. Технические условия                                                                                                                                            |
| ГОСТ 10354-82                  | Пленка полиэтиленовая. Технические условия                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ 10581-91                  | Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                                                                                                                                                  |
| Стандарты серии ГОСТ ISO 10993 | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий                                                                                                                                              |
| ГОСТ 12088-77                  | Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости                                                                                                                                       |
| ГОСТ 12302-2013                | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия                                                                                                                                  |
| ГОСТ Р ИСО 13935-2-2017        | Материалы текстильные. Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия для разрыва шва методом захвата                                              |
| ГОСТ 14192-96                  | Маркировка грузов                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 15150-69                  | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023        | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования                                                        |
| ГОСТ 20790-93                  | Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия                                                                                                                                              |
| ГОСТ Р 51885-2002              | Знаки информационные для общественных мест                                                                                                                                                                           |
| ГОСТ Р 52770-2016              | Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний                                                                                                              |

| <b>ОБОЗНАЧЕНИЕ</b>   | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ISO 9073-4-2023 | Материалы нетканые. Методы испытаний. Часть 4.<br>Определение сопротивления раздиру трапецеидальным методом                                                                                                                                                                                                                                               |
| СанПиН 2.1.3684-21   | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| ГОСТ 6309-93         | Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические.<br>Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 29122-91        | Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ Р 52901-2007    | Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ГОСТ 33781-2016      | Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ГОСТ 23948-80        | Изделия швейные. Правила приемки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ГОСТ 20790-93        | «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ EN 13795-1-2011 | «Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования»                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13795-2-2011 | «Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний»                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ EN 13795-3-2011 | «Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 3. Требования к исполнению и уровню исполнения»                                                                                                                                                                          |

## 18 Контактная информация

По вопросам качества медицинского изделия «Комплект одежды защитной из нетканых материалов» по

ТУ 32.50.50-004-00302178-2020, производства АО «Росхимзащита», обращаться по адресу:

Акционерное общество «Росхимзащита»

АО «Росхимзащита»

Юридический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Фактический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Адрес производства: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Контактные телефоны: 8 (4752) 56-05-13

E-mail: [mailmos@krhz.ru](mailto:mailmos@krhz.ru)

19 Шаблон предоставления сведений о рекламации

**Письмо-претензия**  
**(по факту брака (недостачи) товара)**

Исх. № \_\_\_\_\_  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Куда \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Кому \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя)

**ПРЕТЕНЗИЯ № \_\_\_\_\_**

На основании договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., накладной № \_\_\_\_\_ от  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., счету № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в адрес  
\_\_\_\_\_  
(наименование организации, которая предъявляет претензию)  
поступили товары \_\_\_\_\_  
(наименование товаров)  
по цене \_\_\_\_\_ руб. в количестве \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ руб.  
Данные товары поступили \_\_\_\_\_  
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету,  
значится: \_\_\_\_\_

Фактически оказалось \_\_\_\_\_

Брак (недостача) на сумму \_\_\_\_\_ руб. образовался(сь) по вине поставщик  
(перевозчика, изготовителя).  
Данный факт подтверждается актом № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
На основании изложенного и руководствуясь ст. \_\_\_\_\_ договора № \_\_\_\_\_ от  
"\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

**ПРОШУ:**

Убытки в сумме \_\_\_\_\_ руб.,  
(стоимость бракованного или недостающего товара)  
\_\_\_\_\_ % штрафа в сумме \_\_\_\_\_ руб., транспортные расходы в сумме  
\_\_\_\_\_ руб., расходы по экспертизе в сумме \_\_\_\_\_ руб.,  
всего в сумме \_\_\_\_\_ руб. перечислить на наш расчетный счет  
№ \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(наименование банка)

Приложения:

1. Акт приемки товара № \_\_\_\_\_.
2. Удостоверение представителя \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Товаротранспортная накладная № \_\_\_\_\_.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Прошито и пронумеровано, скреплено печатью 20 ли

Генеральный директор

АО «Росхимзащита»

И.М. Рыжов Е.

ИМП 2024 г.

