

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КоттонСтайл»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КоттонСтайл»

М.К. Магомедов

«08» ноября 2023 г.



**ТАМПОН ДЕНТАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ РАЗМЕР М
по ТУ 21.20.24-002-11810570-2023
Руководство по эксплуатации
21.20.24-002-11810570 РЭ**

**г. Великий Новгород
2023 год**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации», проверить целостность упаковки и самих тампонов, обеспечив их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Ваши замечания по улучшению конструкции и удобству использования просим присылать на адрес предприятия-изготовителя.

Наименование изготовителя: ООО «КоттонСтайл»

юр. адрес: 173020, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д.10

Обращения по рекламациям:

тел.: +79119203317

эл. почта: cottonstyle@mail.ru

РУ № _____ от _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	стр.4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	стр.4
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	стр.5
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И СЫРЬЮ.....	стр.5
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	стр.6
6. МАРКИРОВКА.....	стр.6
7. УПАКОВКА.....	стр.7
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	стр.8
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	стр.8
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	стр.8
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	стр.10
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	стр.10
Приложение А	стр.11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание медицинского изделия «Тампон дентальный медицинский нестерильный размер М по ТУ 21.20.24-002-11810570-2023» (далее по тексту – тампон, изделие).

1.2 Вид климатического исполнения тампонов в зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.3 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям тампоны соответствуют требованиями ГОСТ Р 52770 и серии стандартов ГОСТ ISO 10993.

1.4 Тампоны относятся к изделиям однократного применения. Вид контакта по ГОСТ ISO 10993-1-2021-кратковременный (менее 24 часов) контакт с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками.

1.5 Код ОКПД2 по ОК 034-2014 – 21.20.24.150.

1.6 В зависимости от потенциального риска применения медицинских изделий тампоны относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

1.7 Настоящее Руководство по эксплуатации выполнено с учётом указаний ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ IEC 82079-1-2014 и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 января 2017 г. № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение: тампон дентальный предназначен для абсорбции слюны и влаги во время различных стоматологических манипуляций для обеспечения сухой зоны вокруг зубов, подлежащих лечению, для изоляции выводных протоков слюнных желез, для предотвращения попадания на слизистую оболочку препаратов, которые могут вызвать повреждение слизистой оболочки.

Описание изделия: нестерильное изделие из медицинской гигроскопической ваты, выполненное в виде валика цилиндрической формы, которое используется для поглощения влаги из полости рта во время стоматологических процедур. Также может использоваться в качестве прокладки между губой/щекой и десной для лучшего осмотра/операционного воздействия. Благодаря высокой пластичности принимает контур ротовой полости, обеспечивает высокую абсорбцию, сохраняя первичную форму. Это изделие для одноразового использования. Предусмотрена возможность термической (автоклавной) стерилизации, которая должна проводиться в условиях лечебно-профилактических учреждений квалифицированным персоналом.

Область применения: применяется профессионально в условиях лечебно-профилактических учреждений во время стоматологических процедур.

Функциональное назначение: для абсорбции влаги в ротовой полости пациента во время стоматологических манипуляций.

Принцип действия медицинского изделия: закладывается в ротовую полость пациента во время стоматологического осмотра/операционного воздействия. За счет высокой абсорбционной способности гигроскопической ваты впитывает и удерживает влагу.

Информация о потенциальных потребителях: медицинские работники стоматологического профиля.

Показания к применению: используется во время различных стоматологических манипуляций:

- для обеспечения сухой зоны вокруг зубов, подлежащих лечению;
- для изоляции выводных протоков слюнных желез;
- для предотвращения попадания на слизистую оболочку препаратов, которые могут вызвать ее повреждение.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материала изделия.

Возможные побочные эффекты: аллергическая реакция ввиду непереносимости пациентом материалов, из которых изготовлено изделие. С лекарственными средствами не взаимодействует.

Меры предосторожности:

- перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению;
- не использовать по истечении срока годности;
- не использовать в случае повреждения упаковки;
- не использовать повторно;
- перед использованием рекомендуется провести термическую (автоклавную) стерилизацию.

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Тампоны должны соответствовать требованиям технических условий 21.20.24-002-11810570-2023, изготавливаться по технологическому регламенту предприятия-изготовителя, утвержденному в установленном порядке и с соблюдением санитарных норм и правил.

3.2 Массогабаритные размеры и основные показатели качества тампонов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Массогабаритные размеры и показатели качества тампона

Параметр	Значение
Длина, мм	$38,0 \pm 4,0$
Диаметр, мм	$10,0 \pm 2,0$
Масса, гр.	$0,33 \pm 0,04$
Реакция водной вытяжки	нейтральная
Поглотительная способность, гр.	не менее 20
Скорость смачивания, с	не более 10
Влажность, %, не более	не более 8,0

3.3 Волокнистая основа тампонов должна быть хорошо прочесанной и сохранять связь между волокнами.

3.4 Поверхность тампонов должна быть ровной, без следов выщипывания волокон, без механических повреждений и посторонних включений, видимых невооруженным взглядом. Тампоны не должны иметь посторонних запахов.

3.5 Потребительская упаковка тампонов, выполненная из полимерных материалов, должна быть герметичной и целостной.

3.6 Вид климатического исполнения тампонов – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.7 Тампоны при хранении должны быть устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 для условий хранения 1 (Л) при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C .

3.8 Тампоны в транспортной упаковке должны быть устойчивы при транспортировании к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 для условий хранения 5 (ОЖ4) при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C .

3.9 Тампоны при транспортировании должны быть устойчивы к механическим воздействиям.

3.10 Назначенный срок годности тампонов – 8 лет с даты изготовления. Критерии предельного состояния – несоответствие требованиям п.п. 3.2-3.9 настоящего Руководства по эксплуатации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И СЫРЬЮ

4.1 Материалы, применяемые при изготовлении тампонов, должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

4.2 Перед использованием сырья должно пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, согласно ГОСТ 24297.

4.3 Тампоны должны быть изготовлены из ваты медицинской гигроскопической по ГОСТ 5556, покрытую снаружи пленочным покрытием из карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).

4.4 Для изготовления тампонов применяют материалы, указанные в таблице 2:

Таблица 2 – Список применяемых материалов

Материал	Поставщик/Производитель
Вата из хлопковых волокон гигроскопическая нестерильная, нечесаная, отбеленная (100% хлопок) ТН ВЭД 5601211000	Поставщик: ООО ТД «Амелия - Северо-Запад», Россия Производитель: ИП ООО «Barakat Alfa», Узбекистан
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) ТН ВЭД 3912310000	Поставщик: ООО «Химфармпродукт Аптечный склад», Россия Производитель: JINING FORTUNE BIOTECH CO., LTD., Китай
Упаковка: пленка полиэтиленовая ТН ВЭД 3923	ООО «КВИЛС», Россия
Упаковка: пленка полипропиленовая ТН ВЭД 3920202900	ООО «КВИЛС», Россия
Транспортная тара: коробка из гофрированного картона ТН ВЭД 4819100000	Поставщик: ООО ТД «Спидент Раша», Россия Производитель: ООО «Фирма Стройтехника», Россия

4.5 Все сырье, используемое для производства тампонов, должно соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей — санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» и сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность.

4.6 Качество сырья должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами, паспортами, декларациями соответствия).

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 В комплект поставки обязательно должно входить Руководство по эксплуатации, соответствующее ГОСТ Р 2.601, количество продукции, которое устанавливают по согласованию с заказчиком.

5.2 Комплект поставки:

1. Тампон дентальный медицинский нестерильный размер М по ТУ 21.20.24-002-11810570-2023 – 50, 100, 200, 250, 500, 600, 1000 или 2000 штук.

2. Руководство по эксплуатации (на групповую тару) – 1 шт.

6 МАРКИРОВКА

6.1 Маркировка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, а применяемые символы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1. Маркировка групповой упаковки должна быть выполнена печатным способом.

6.2 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

6.3 На каждую потребительскую упаковку тампонов должна быть нанесена маркировка с указанием:

Информация	Символ
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и товарный знак (при наличии)	
- адрес места производства	-
- наименование изделия	-
- размеры изделия	-
- краткая инструкция и область применения	-
- количество изделий	-
- символ «Нестерильно»	
- обозначение технических условий	-
- срок годности медицинского изделия	
- дата изготовления медицинского изделия (дата, месяц, год)	
- символ «Запрет на повторное использование»	
- символ «Беречь от влаги»	
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»	
- символ «Код переработки упаковки из полипропилена»	
- утилизация упаковки	
- номер партии	
- номер и дата регистрационного удостоверения	-
- условия хранения	-
- условия утилизации	-
- телефон для предъявления претензий	-
- электронная почта производителя	-

6.4 На каждую групповую упаковку тампонов должна быть нанесена маркировка с указанием:

Информация	Символ
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и товарный знак (при наличии)	
- адрес места производства	-
- наименование изделия	-
- размеры изделия	-

- краткая инструкция и область применения
- количество изделий
- символ «Нестерильно»
- обозначение технических условий
- срок годности медицинского изделия
- дата изготовления медицинского изделия (дата, месяц, год)
- символ «Запрет на повторное использование»
- символ «Не использовать при повреждении упаковки»
- символ «Беречь от влаги»
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- символ «Код переработки упаковки из полипропилена»
- утилизация упаковки
- номер партии
- номер и дата регистрационного удостоверения
- условия хранения
- условия утилизации
- телефон для предъявления претензий
- электронная почта производителя



6.5 Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, быть выполнена печатным способом, с использованием символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1. Маркировка должна наноситься на этикетку, приклеиваемую к транспортной упаковке. Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую информацию:

- | Информация | Символ |
|---|--------|
| - полное наименование изделия | - |
| - наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес | |
| - срок годности медицинского изделия | |
| - дата изготовления медицинского изделия (дата, месяц, год) | |
| - «запрет на повторное использование» | |
| - символ «Код переработки для гофрированного картона» | |
| - символ «Беречь от влаги» | |
| - символ «Не допускать воздействия солнечного света» | |
| - символы «Предел температуры» и «Диапазон влажности» для условий транспортирования | |
| - символы «Предел температуры» и «Диапазон влажности» для условий хранения | |
| - номер (код) партии | |
| - число единиц групповой упаковки изделий в транспортной упаковке | - |



Фотографические изображения образцов маркировки приведены в приложении А.

7 УПАКОВКА

7.1 Потребительская упаковка и транспортная упаковка должны обеспечивать безопасность и сохранность продукции при транспортировании и хранении. Готовые изделия должны быть сложены и упакованы в потребительскую упаковку – пакеты из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354 или из пленки полипропиленовой по ГОСТ 12302. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

7.2 Количество упакованных изделий указывают в технологической документации. Предполагается упаковка изделий в потребительскую упаковку в количестве 100, 200, 250, 500, 600, 1000 или 2000 штук.

7.3 Тампоны сгруппированы по 25 или 50 штук и стянуты полоской из пленки полипропиленовой по ГОСТ 12302.

7.4 Тампоны в потребительских упаковках укладываются в групповую упаковку – в коробки из картона по ГОСТ 7933.

Примечание: По согласованию с потребителем допускается использование других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность свойств тампонов и разрешенных для упаковки медицинских изделий.

7.5 Для транспортирования тампоны в групповой упаковке должны быть упакованы в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, обеспечивающие сохранность качества продукции при хранении и транспортировании по условиям хранения 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150.

7.6 В каждую групповую тару должна быть вложена эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) по ГОСТ Р 2.601.

7.7 При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учётом указаний ГОСТ 15846.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Тампоны сочетаются со всеми медицинскими изделиями, которые применяют в стоматологической практике в случаях отсутствия прямого контакта тампонов с открытой раневой поверхностью.

8.2 Перед использованием рекомендуется провести термическую (автоклавленную) стерилизацию при температуре 135 °С в течение 30 минут.

8.3 Порядок работы с изделием

8.3.1 Проверьте, что упаковка не повреждена. Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала.

8.3.2 Проверьте целостность изделия методом визуального осмотра.

8.3.3 Введите тампон в раскрытый рот пациента с помощью стоматологического пинцета или специального тампонодержателя.

8.3.4 Перенос и удаление использованного тампона осуществляйте также при помощи стоматологического пинцета или специального тампонодержателя.

8.4 Использованные тампоны должны подлежать сбору, учету и утилизации как отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы), в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

8.5 Тампоны, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, утилизируют как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы) в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАМПОНОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

9.2 Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 с температурой от –50°С до +40°С при относительной влажности воздуха до 100% при 25°С.

9.3 Для транспортирования тампоны в групповой упаковке должны быть упакованы в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, обеспечивающие сохранность качества продукции при хранении и транспортировании по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

9.4 Условия хранения тампонов в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150 с температурой от +5°С до +40°С при относительной влажности воздуха до 80% при 25°С. Хранение изделий должно производиться в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

9.5 Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие тампонов требованиям технических условий 21.20.24-002-11810570-2023 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок годности – 8 лет со дня изготовления.

10.3 Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 8 лет со дня изготовления.

10.4 Изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно заменять не пригодные к эксплуатации изделия, если повреждения не связаны с нарушением правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.5 При обнаружении следов несанкционированного вскрытия и наличия механических повреждений упаковки и транспортной тары, изготовитель снимает с себя ответственность по гарантийным обязательствам, установленным техническими условиями 21.20.24-002-11810570-2023.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При нарушении норм и правил применения Тампонов, установленных в настоящем Руководстве по эксплуатации, предприятие-изготовитель и продавец, независимо от сроков приобретения продукции, не несут какой бы то ни было ответственности за любые последствия, наступившие при применении Тампонов, в том числе повлёкшие нанесение ущерба здоровью человека.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тампоны соответствуют техническим условиям 21.20.24-002-11810570-2023 и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____
подпись, дата

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тампоны
упакованы в соответствии с 21.20.24-002-11810570-2023 и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).


(личная подпись)

(расшифровка подписи)


(год, месяц, число)

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фотографические и чертежные изображения

Тампоны и стяжки тампонов (по 50 штук)

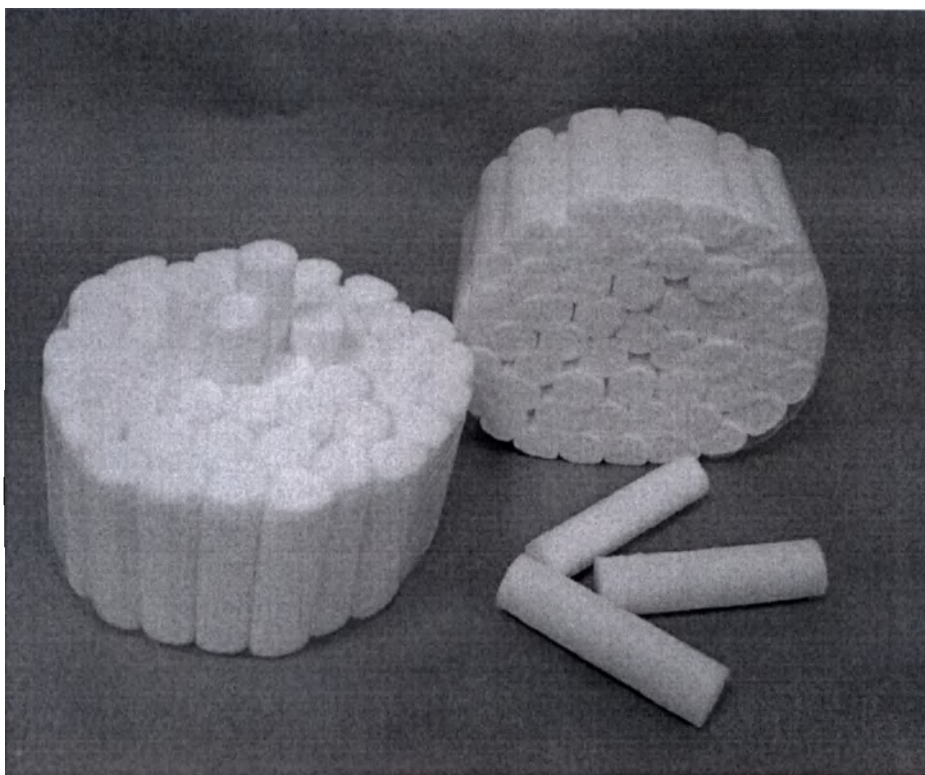


Чертежное изображение тампона

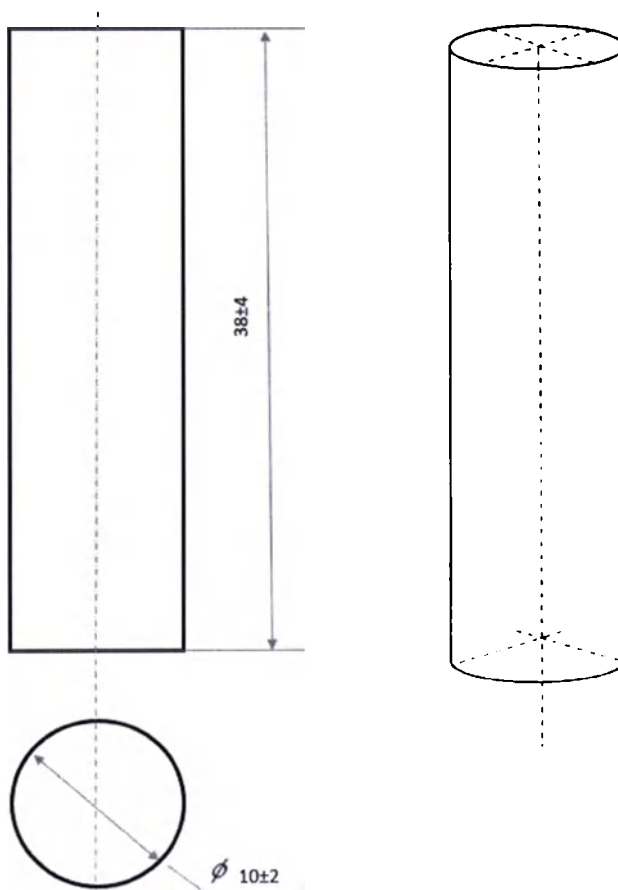

Потребительская упаковка тампонов



Потребительские упаковки тампонов в групповой упаковке

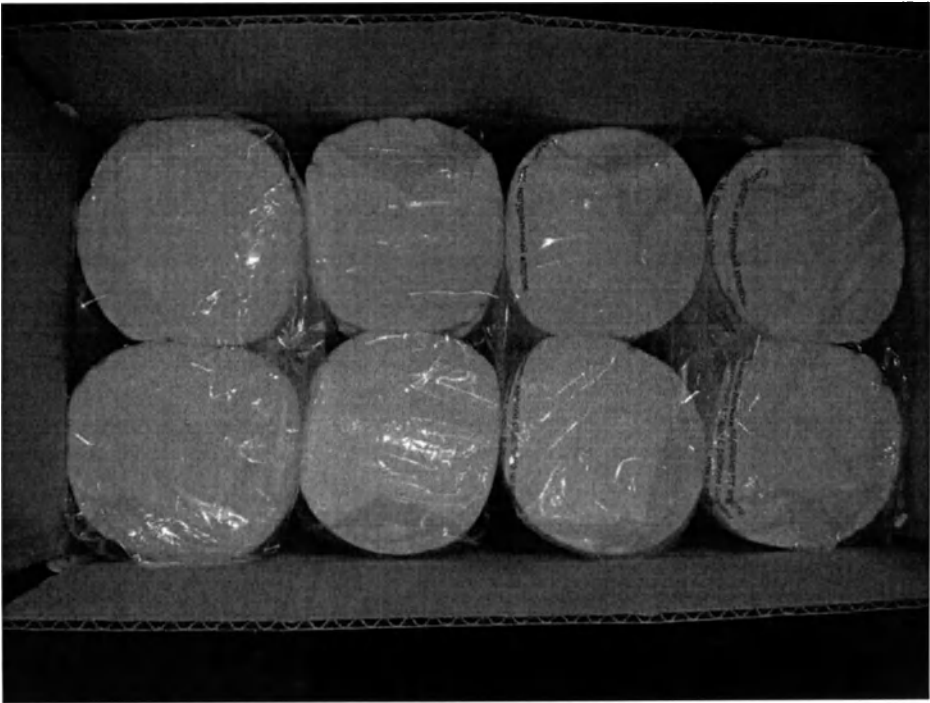

Образец маркировки потребительской упаковки тампонов

COTTONSTYLE

ТАМПОН ДЕНТАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ РАЗМЕР М

500 шт. (10x50 шт.)

По ТУ 21.20.24-002-11810570-2023



Сделано в России



Качество



Комфорт

СОСТАВ:
100% натуральный хлопок.

РАЗМЕР:
М, длина 38мм, диаметр 10мм

Тампоны дентальные стоматологические нестерильные, предназначенные для использования в стоматологической практике в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Инструкция по использованию: Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала. Проверьте целостность изделия методом визуального осмотра. Применение данного изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

Произведено и упаковано:
ООО «КоттонСтайл»
Место производства
медицинского изделия:
173020, г. Великий Новгород,
ул. Связи, д. 19.
Юридический адрес:
ООО «КоттонСтайл»
г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 10.

Телефоны для предъявления претензий:
8 (8162) 63-44-83
8 (8162) 63-06-13.

email: svyazi_19@mail.ru

Изделие медицинского назначения
РУ №
ТУ 21.20.24-002-11810570-2023

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия хранения по группе 1 (U) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C

Хранить тампоны отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или в таре, защищенной от этих паров.

Использованные тампоны относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Возможна утилизация с бытовыми отходами.



Срок годности: 8 лет

Дата изготовления: 04.10.2023

Номер партии: M/1/4.10.23

Образец маркировки групповой упаковки тампонов

COTTONSTYLE

ТАМПОН ДЕНТАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

НЕСТЕРИЛЬНЫЙ РАЗМЕР М

2000 шт. (4x500 шт.)

По ТУ 21.20.24-002-11810570-2023



Сделано в России



Качество



Комфорт

СОСТАВ:
100% натуральный хлопок.

РАЗМЕР:
М, длина 38мм, диаметр 10мм

Тампоны дентальные стоматологические нестерильные, предназначенные для использования в стоматологической практике в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Инструкция по использованию: Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала. Проверьте целостность изделия методом визуального осмотра. Применение данного изделия должно полностью соответствовать своему прямому назначению.

Произведено и упаковано:
ООО «КоттонСтайл»
Место производства
медицинского изделия:
173020, г. Великий Новгород,
ул. Связи, д. 19.
Юридический адрес:
ООО «КоттонСтайл»
г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 10.
Телефоны для предъявления претензий:
8 (8162) 63-44-83
8 (8162) 63-06-13.
email: svyazi_19@mail.ru
Изделие медицинского назначения
РУ №
ТУ 21.20.24-002-11810570-2023

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия хранения по группе 1 (U) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C

Хранить тампоны отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или в таре, защищенной от этих паров.

Использованные тампоны относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Возможна утилизация с бытовыми отходами.



Срок годности: 8 лет

Дата изготовления: 04.10.2023

Номер партии: M/1/4.10.23

Образец маркировки транспортной упаковки тампонов

ТАМПОН ДЕНТАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ РАЗМЕР М

по ТУ 21.20.24-002-11810570-2023

Размер: М, $\varnothing$ 10 мм, длина 38 мм

РУ

Состав: 100 % натуральный хлопок

Количество: 20 000 шт. (10 пак. По 2000 шт.)

 Производитель: ООО «КоттонСтайл»

Россия, 173020, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 10

Место производства:

Россия, 173020, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 19

 8 лет 04.10.2023

Условия транспортирования:

 M/1/4.10.2023

Условия хранения:

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14 листа(ов)

Генеральный директор ООО «КоттонСтайл»

М.К. Магомедов

