

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Сисмекс РУС»



Е.А. Козырева

2012__г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим

KX-21N, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i,

производства

Sysmex Corporation, Япония.

CELLPACK

Предназначение

Разбавитель для использования в гематологических анализаторах.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните CELLPACK при температуре от +5 до +30 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. В случае замерзания хорошо перемешайте после оттаивания. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

Использование

CELLPACK является реагентом, предназначенным для измерения числа и размеров RBC и тромбоцитов

методом гидродинамической фокусировки (обнаружение DC). При добавлении специального лизирующего реагента для определения концентрации гемоглобина, его можно также использовать для

анализа концентрации гемоглобина.

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ 9%, БОРНОЙ КИСЛОТЫ 0,15%, БОРАТ НАТРИЯ 0,15%, К2-ЭДТА (ЭТИЛЕНДИАМИТЕТРАУКСУСНАЯ КИСЛОТА) 0,15

Stromatolyser-WH

Лизирующий реагент

Предназначение.

Реагент для гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Хранить в темном месте при температуре от +2 до +35 °C. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке.

Использование

Представляет собой реагент, который в комбинации со специальным лизирующим раствором лизирует WBC/HGB и предназначается для классификации WBC с использованием технологии кондуктометрии.

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР СОДЕРЖАЩИЙ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЛИ АММОНИЯ 8,5 Г/Л, ХЛОРИД НАТРИЯ 0,6 Г/Л

CELLSHEATH

Предназначение

Несущая жидкость для использования в гематологических анализаторах.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните CELLSHEATH при температуре от +5 до +30 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. В случае замерзания хорошо перемешайте после оттаивания.

Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка)

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ 17%, ЭФИР ПОЛИОКСИЭТИЛЕНАЛКИЛА - 0,08%, ТРИС БУФЕР 0,2%, К2-ЭДТА (ЭТИЛЕНДИАМИТЕТРАУКСУСНАЯ КИСЛОТА)

Использование

CELLSHEATH в комбинации со специальным разбавителем является реагентом, предназначенным для измерения числа и размеров RBC и тромбоцитов методом гидродинамической фокусировки (обнаружение DC).

STROMATOLYSER-FB

Предназначение

Лизирующий реагент для канала определения лейкоцитов и базофилов WBC/BASO в гематологических анализаторах.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните STROMATOLYSER-FB при температуре от +5 до +30 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. В случае замерзания хорошо перемешайте после оттаивания. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной

на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или

наружная этикетка).

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР СОДЕРЖАЩИЙ НЕИОННЫЙ СУРФАКТАНТ 0,4%, ЧЕТВЕРИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛЬ АММОНИЯ 0,1-0,7%, 2-ФЕНОКСИТАНОЛ 0,5%

Использование

STROMATOLYSER-FB является реагентом для подсчета базофилов и WBC методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

STROMATOLYSER-4DL

Предназначение

Разбавитель для DIFF-канала гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните STROMATOLYSER-4DL при температуре от +2 до +35 °C или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР СОДЕРЖАЩИЙ НЕИОННЫЙ СУРФАКТАН 0,18%, ХЛОРИД НАТРИЯ 0,6%)

Использование

STROMATOLYSER-4DL представляет собой реагент, который в комбинации со специальным раствором

красителя (STROMATOLYSER-4DS) используется для классификации WBC методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

STROMATOLYSER-4DS

Предназначение Раствор красителя для DIFF-канала гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните STROMATOLYSER-4DS в темном месте при температуре от +2 до +35 °C. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: РАСТВОР ПОЛИМЕТИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 0,02%, МЕТАНОЛ ДО 3%

Использование

STROMATOLYSER-4DS представляет собой реагент, который в комбинации со специальным лизирующим раствором (STROMATOLYSER-4DL) используется для классификации WBC методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

STROMATOLYSER-NR(L)

Предназначение

Лизирующий реагент для NRBC-канала гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните STROMATOLYSER-NR(L) при температуре от +2 до +35 °С вдали от воздействия прямого солнечного света. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: РАСТВОР ПОЛИМЕТИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 0,01%, И САЛИЦИАТ НАТРИЯ 0,16%

Использование

STROMATOLYSER-NR(L) - это реагент, который в комбинации с STROMATOLYSER-NR(S) используется

для подсчета числа и соотношения эритроцитов методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

STROMATOLYSER-NR(S)

Предназначение

Раствор красителя для NRBC-канала гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните STROMATOLYSER-NR(S) при температуре от +2 до +35 °С вдали от воздействия прямого солнечного света. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

Использование

STROMATOLYSER-NR(S) - это реагент, который в комбинации с STROMATOLYSER-NR(L) используется

для подсчета числа и соотношения эритроцитов методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

SULFOLYSER

Предназначение

Не содержащий цианидов -лизирующий реагент для определения содержания гемоглобина с помощью гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните SULFOLYSER при температуре от +1 до +30 °С или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. Если реагент замерз, нагрейте его в теплой воде с температурой не выше 30 °С и тщательно перемешайте перед применением. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛАУРИСУЛЬФАТА НАТРИЯ 1,7 Г/Л

Использование

SULFOLYSER представляет собой реагент, который в комбинации со специальным разбавителем применяется для определения концентрации гемоглобина, высвобождаемого из RBC согласно SLS-методу.

STROMATOLYSER-IM

Предназначение

Лизирующий реагент для IMI-канала гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия Храните STROMATOLYSER-IM при температуре от +2 до +35 °С или ниже, оберегая от воздействия прямого солнечного света. В случае заморзания хорошо перемешайте после оттаивания. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно

использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: ВОДНЫЙ РАСТВОР СОДЕРЖАЩИЙ НЕИОННЫЙ СУРФАКТАНТ 2,4%, ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ 0,41%, ХЛОРИД НАТРИЯ 0,41%

Использование

STROMATOLYSER-IM является реагентом для определения незрелых клеток методом RF/DC.

RET SEARCH (II) (разбавитель)

RET SEARCH (II) (раствор красителя)

Предназначение

Разбавляющий реагент (дилуэнт) и раствор красителя для канала RET гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после первого вскрытия

Храните RET SEARCH (II) в темном месте при температуре от +2 до +35 °С. Не используйте реагент, который, возможно, был заморожен. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Относительно стабильности после вскрытия см. этикетку продукта (вкладыш в упаковку или наружная этикетка).

СОСТАВ: ПОЛИМЕТИН 0,03%, ТРИС БУФЕР 0,18%, ЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 92,8%, МЕТАНОЛ 7,1%

Использование

RET SEARCH (II) является реагентом, который используется в комбинации RET SEARCH (II) (разбавитель) и RET SEARCH (II) (раствор красителя) для анализа содержания ретикулоцитов и оптического анализа тромбоцитов методом проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.

CELLCLEAN

Предназначение

CELLCLEAN является сильным щелочным детергентом, который служит для удаления лизирующего реагента, клеточного остатка и белков крови, остающихся в гидравлической системе Sysmex автоматических гематологических анализаторов.

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните CELLCLEAN при 1 - 30°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом.

СОСТАВ: ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ (5%) В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

CELLPACK DCL

Общее наименование

Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах.

Предназначение (только для диагностики in vitro)

CELLPACK DCL представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента согласно спецификациям Sysmex. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) или для

детектора проточной цитометрии (FCM).

Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Хлорид натрия 0,7%, Трис-буфер 0,2%, ЭДТА-2К - 0,02%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните CELLPACK DCL при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость

с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору)

используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента.

(➤ Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при замутнении или изменении цвета. Если реагент замораживался, дайте ему оттаять и тщательно перемешайте перед использованием.

CELLPACK DST

Общее наименование

Концентрат разбавителя для блока реагентов для использования в гематологических анализаторах

Предназначение (только для диагностики in vitro)

CELLPACK DST представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Концентрация гемоглобина определяется с добавлением гемолитического реагента согласно спецификациям Sysmex. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) или для детектора проточной цитометрии (FCM).

Этот реагент должен применяться путем присоединения к устройству подготовки реагентов согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Хлорид натрия 15,7%, Трис-буфер 4,3%, ЭДТА-2К - 0,4%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните CELLPACK DST при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с

реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента. (➤

Р.5-17 "5.18.1 Таблица

спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при замутнении или изменении цвета. Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

CELLPACK DFL

Общее наименование

Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах

Предназначение (только для диагностики in vitro)

CELLPACK DFL – это реагент, используемый в сочетании с Fluorocell RET для анализа ретикулоцитов

или с Fluorocell PLT для анализа тромбоцитов, в обоих случаях с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Трис-буфер, 0,17%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните CELLPACK DFL при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с

реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору)

используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента. (➤Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при замутнении или изменении цвета. Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Lysercell WNR

Общее наименование

Лизирующий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Lysercell WNR – это реагент, используемый в сочетании с Fluorocell WNR. Путем лизирования эритроцитов реагентом Lysercell WNR и дифференцировки лейкоцитов (не базофилов), базофилов и нормобластов в помощью Lysercell WNR и Fluorocell WNR осуществляется подсчет лейкоцитов, подсчет базофилов, определение относительного количества базофилов, подсчет нормобластов и определение относительного количества нормобластов. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Органическая четвертичная, соль аммония, 0,20%, Неионогенное ПАВ, 0,10%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Lysercell WNR при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с

реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента. (➤Р.5-17 "5.18.1 Таблица

спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при замутнении или изменении цвета. Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Lysercell WDF

Общее наименование

Лизирующий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Lysercell WDF – это реагент, используемый в сочетании с Fluorocell WDF. Путем гемолиза эритроцитов

реагентом Lysercell WDF и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью Fluorocell WDF выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количества нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Органическая четвертичная, соль аммония, 0,07%, Неионогенное ПАВ, 0,17%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Lysercell WDF при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с

реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору)

используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента. (➤Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при замутнении или изменении цвета. Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Lysercell WPC

Общее наименование

Лизирующий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Lysercell WPC – это реагент, используемый в сочетании с Fluorocell WPC. Lysercell WPC служит для гемолиза эритроцитов, а Lysercell WPC и Fluorocell WPC – для определения присутствия аномальных или незрелых клеток. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex.

Состав: Анионное ПАВ, 0,03%, Неионогенное ПАВ, 0,12%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Lysercell WPC при 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или в спецификациях реагента. (> P.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов") Заменяйте реагент при проявлении признаков загрязнения или нестабильности, например, при помутнении или изменении цвета. Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен

Fluorocell WNR

Общее наименование

Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Fluorocell WNR предназначается для окрашивания ядросодержащих клеток в разбавленных и лизированных образцах крови при подсчете числа лейкоцитов, числа ядросодержащих эритроцитов и числа базофилов с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.

Состав: Полиметиновый краситель, 0,005%, Этиленгликоль, 99,9%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Fluorocell WNR в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. (> P.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов"). Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Fluorocell WDF

Общее наименование

Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Fluorocell WDF предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 4 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.

Состав: Полиметиновый краситель, 0,002%, Метанол, 3,0%, Этиленгликоль, 96,9%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Fluorocell WDF в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. (> P.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов"). Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Fluorocell RET

Общее наименование

Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Fluorocell RET предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex

Состав: Полиметиновый краситель, 0,03%, Метанол, 7,9%, Этиленгликоль, 92,0%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Fluorocell WNR в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. (➤ Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов"). Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Fluorocell PLT

Общее наименование

Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Fluorocell PLT предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа тромбоцитов в крови с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.

Состав: Оксазиновый краситель, 0,003%, Этиленгликоль, 99,9%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Fluorocell PLT в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. (➤ Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов"). Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен

Fluorocell WPC

Общее наименование

Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Fluorocell WPC предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете различных видов незрелых клеток с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.

Состав: Полиметиновый краситель, 0,004%, Этанол, 15,1%, Этиленгликоль, 84,8%

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните Fluorocell WPC в темном месте при температуре 2 - 35°C. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. В качестве срока годности после вскрытия упаковки (подсоединения к прибору) используйте дату, напечатанную на емкости с реагентом или во вкладыше в упаковке. (➤ Р.5-17 "5.18.1 Таблица спецификаций реагентов"). Не используйте реагент, если есть подозрение, что он был заморожен.

Контрольные материалы

e-CHECK (XE) (8 x 4,5 ml) L1

e-CHECK (XE) (8 x 4,5 ml) L2

SCS-1000 CALIBRATOR (3x2 ml)

Latex A-7312 (3 ml)

Latex Particles 4207A DUKE (10 ml)

Latex PLT Check

XN CHECK LEVEL 1 (8 x 3 ml)

XN CHECK LEVEL 2 (8 x 3 ml)

XN CHECK LEVEL 3 (8 x 3 ml)

e-CHECK (XS) (4 x 1,5 ml) L1.

e-CHECK (XS) (4 x 1,5 ml) L2.

e-CHECK (XS) (4 x 1,5 ml) L3.

CHECK BF (2 levels x 3 x 3 ml).

EIGHTCHECK-3WP (12 x 1,5 ml) L.

EIGHTCHECK-3WP (12 x 1,5 ml) N.

EIGHTCHECK-3WP (12 x 1,5 ml) H.

EIGHTCHECK-3WP (12 x 4,6 ml) L.

EIGHTCHECK-3WP (12 x 4,6 ml) N.

EIGHTCHECK-3WP (12 x 4,6 ml) H.

IQAS EIGHTCHECK (1,5 ml).

e-CHECK (XE) (8 x 4,5 ml) L1.

e-CHECK (XE) (8 x 4,5 ml) L2.

e-CHECK (XE) (8 x 4,5 ml) L3.

Latex A-7312 (3 ml).

Latex Particles 4207A DUKE (10 ml).

Latex PLT Check

Предназначение (только для диагностики in vitro)

представляют собой гематологические контрольные материалы, главным образом предназначенные для внутрилабораторного контроля качества автоматизированных, полуавтоматизированных и ручных процедур по измерению компонентного состава крови.

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки

Храните контрольную кровь в темном месте при температуре 2 - 8°C.

Если пробы не были распечатаны, вы можете хранить их до истечения срока годности, указанного на упаковочной коробке.

В качестве срока годности после вскрытия упаковки используйте дату, указанную на емкости с реагентом или на вкладыше в упаковке.

Калибрационные материалы

XN CAL (3 x 3.0 ml)

XN CAL (Bulk)

XN CAL PF (3 x 3.0 ml)

XN CAL PF (Bulk).

CELLCHECK-400 (50 x 10 ml)

XL Poch-pack XL

SCS-1000 CALIBRATOR (3x2 ml)

Предназначение (только для диагностики in vitro)

Применяйте для калибровки прибора по показателям WBC, RBC, HGB, HCT, PLT и RET.

Применяйте для калибровки прибора по показателю PLT-F (подсчет тромбоцитов, получаемый по каналу PLT-F).

Хранение и срок годности после вскрытия упаковки вначале

Храните калибратор в темном охлаждаемом месте при температуре 2 - 8°C.

Если он не был распечатан, вы можете хранить его до истечения срока годности, указанного на этикетке на ампуле или коробке.

В качестве срока годности после вскрытия упаковки используйте дату, указанную на емкости с реагентом или на вкладыше в упаковке.

Справлено,
принято
10 (десять) листов

