

Термометр медицинский максимальный TVY-120



ИМ04

Изготовитель:	«Амрус Энтерпрайзис, Лтд.»	Н-Дж 08863, США
Импортер:	ЗАО фирма «Москва-Амрос»	Москва, 107996, а/я11
Сертификат	POCC US ИМ04	
Выдан	АНО ЦСМИ ВНИИМП	POCC RU.0001.11ИМ04
Соответствует	ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 302-79	Срок годности 10 лет
Регистрационное удостоверение МЗ РФ		№ 97/1362
Санитарно-эпидемиологическое заключение		77.ФЦ.12.944.П.000407.11.02
Сертификат утверждения типа СИ		US.C.39.004.A №14706
Зарегистрирован в Государственном реестре СИ		№ 17050-98
Диапазон измерения, °C		35+42
Пределы допускаемой погрешности, °C		± 0,1
Цена деления шкалы		0,1
Термометр поверен и признан годным к применению на основании результатов первичной поверки		
Оттиск поверительного клейма		
Дата поверки	2007	

Руководство пользователя Термометр медицинский максимальный TVY-120

Предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях или домашних условиях.

Способ измерения: аксиллярно (в подмышечной впадине).

Способ применения:

Встряхните термометр, держа его резервуаром вниз.

Добейтесь снижения высоты столбика ртути до уровня 36°C.

Измерение температуры:

Разместите наконечник термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой. Время измерения – не менее 3-х минут.

Меры предосторожности:

Осторожно. Хрупкое. Содержит ртуть.

Храните термометр в футляре. Берегите от детей.

Предохраняйте термометр от падений и ударов по нему.

Если термометр разбился и ртуть разлилась, тщательно соберите ее, а место разлива обработайте раствором марганцовки, чтобы связать ртуть химически.

Транспортируйте и храните термометр при температуре воздуха не ниже минус 35°C и не выше 42°C.